



ООО «Медтехника Реботек»

125222, г. Москва, ул. Генерала Белобородова, д.35/2 помещение 10

телефон: (495) 504-26-51, 504-26-52

факс: (495) 504-26-53

<http://www.rebotec.net>

e-mail: info@rebotec.net



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Душевые табуретки

Применение


Табуреты для душа предназначены для использования дома и в больнице. Они служат для обеспечения большей самостоятельности во время принятия душа при ограниченных физических возможностях. Несмотря на то, что сидеть на них довольно удобно, они не предназначены для длительного сидения. Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного предмета и привести его в надлежащее положение!

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Табуретом для душа можно сразу же начинать пользоваться. Для того чтобы использовать табурет 368.00.20-368.00.60, нужно учесть следующие рекомендации:

Модель с регулирующимися ножками:

- Убрать фиксатор (А), оттянув его
- Ножку установить на желаемую высоту (В)
- Снова вставить зажим (А)

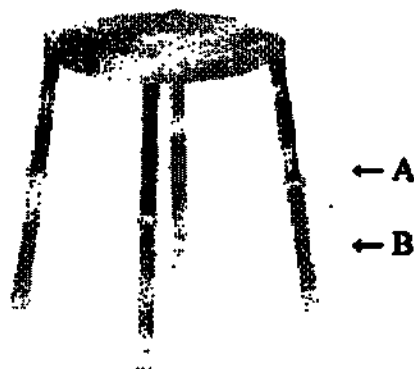

Техническое обслуживание

Уход

Алюминиевые трубки достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из синтетических материалов очищайте при помощи специальных средств – следуйте указаниям из информации о товаре.

Небрежный уход или его недостаток приводят к тому, что срок службы предмета сокращается. Внимание! Не используйте чистящие средства, содержащие растворители или масляные компоненты!

Обслуживание

Табурет характеризуется долгим сроком службы и высокой надёжностью в эксплуатации. Небрежный или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности для ремонта в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

Инструкции по технике безопасности

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Перед каждым использованием проверяйте табурет на наличие повреждений
- Перед применением проверяйте следующие вещи:
 - сиденье прочно укреплено;
 - устойчивость табурета;
 - зажим для регулировки высоты табурета.



Внимание! Риск падения! Следите за тем, чтобы все четыре ножки были установлены на одинаковой высоте

- Не переносить табурет вместе с сидящим на нем человеком
- Использовать табурет только в помещении и на ровной поверхности
- После длительного времени простоя проверить специалистами

Технические характеристики

Наименование	Модель	Нагрузка* M _н , кг	Масса, кг	Параметры сиденья, мм			
				Диаметр	Высота	Длина	Ширина
Реботек 7	356.00**	100	3,0	—	455 – 605	450	350
Реботек 7	363.00.10**	120	2,8	—	415 – 565	450	450
Реботек 7	363.00.20**	120	3,6	—	415 – 565	450	530
Реботек 7	363.00.30**	120	4,8	—	415 – 565	510	530
Реботек 7	368.00.10	100	1,3	320	500	—	—
Реботек 7	368.00.20	100	1,6	320	460 – 635	—	—
Реботек 7	368.00.30	100	3,0	—	430 – 600	400	400

* M_н – масса пользователя

** имеет гигиенический вырез

Гарантия

Гарантийный срок эксплуатации - 24 месяца со дня продажи; исключение быстроизнашивающиеся детали, и повреждения, причиненные вследствие ненадлежащего обращения. Для Вашей безопасности и из условий взаимозаменяемости деталей, ремонт и обслуживание продукции может быть произведен в представительстве компании **ВИБРОТЕС** и в ее сервисных центрах с применением только оригинальных запчастей и деталей.

Гарантийный срок хранения - 36 месяцев

Дата продажи: « »



Печат ОТК