



ООО «Медтехника Реботек»


125222, г. Москва, ул. Генерала Балеборолени, д.35/2 помещение 10

телефон: (495) 504-26-51, 504-26-52

факс: (495) 504-26-53

<http://www.rebotec.net>

e-mail: info@rebotec.net

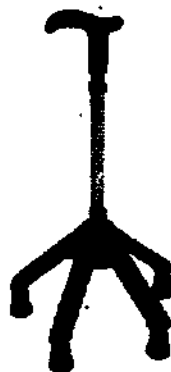

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Трости опорные на 4 ножках

Предупреждение

Трости опорные на 4 ножках (далее трости) предназначены для лиц с ограниченными возможностями передвижения и служат для обеспечения повышенной надежности при ходьбе. Данный продукт можно использовать как дома, так и на улице. Для этого строго следуйте указаниям по технике безопасности.


Дилер, специализирующийся на продаже этого вида товаров или обслуживающий медицинский персонал должны обязательно ознакомить Вас с правилами использования данного продукта и привести его в надлежащее положение!

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Установка высоты происходит через алюминиевую трубку путем нажатия на клип-фиксатор или нажимную кнопку


Установка высоты тростей на 4 уровня

- Ослабить резьбовое соединение шумоизоляционной гайки, повернув влево (А).
- Нажимную кнопку вдавить в отверстие (В) или вынуть клип-фиксатор (С).
- Алюминиевую трубку поставить в желаемое положение.
- Нажать кнопку или защелкнуть клип-фиксатор.
- Резьбовое соединение затянуть, прокрутив вправо (А) (если Вы затянете потуже, тем самым избежите появления различных звуков при использовании).

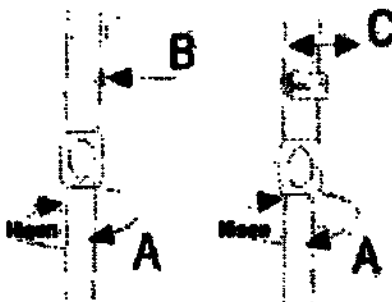

Замена резинового наконечника

Использованный или поврежденный резиновый наконечник нужно обязательно заменить (Е). Снимите его с конца трубки, прикрепите новый, учитывая его размер и конструкцию (см. технические характеристики), убедитесь в том, что наконечник закреплен прочно.

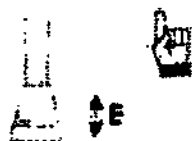

Внимание! Следите за тем, чтобы в наконечник была металлическая пластинка. Она защищает наконечник от прорыва трубкой костыля. Результатом этого может стать повреждение напольного покрытия или падение.

Техническое обслуживание

Уход

Трубку трости достаточно протереть влажной тряпкой и затем вытереть насухо. Все части из искусственных материалов очищайте при помощи специальных чистящих средств.

Внимание! Не используйте содержащие растворители или масляные чистящие средства.

Обслуживание

Перед каждым использованием проверяйте трости на предмет повреждений. Убедитесь, что клип-фиксатор, нажимная кнопка и наконечник прочно закреплены, а труба находится в правильном положении. При деформации или повреждении трости нужно немедленно проверить. Небрежный уход или ненадлежащий уход и обслуживание ведут к сокращению срока службы.

Ремонт

Для проведения ремонтных работ обратитесь к торговому представителю. В целях безопасности при ремонте в качестве замены должны использоваться только оригинальные запчасти.

Использование техники безопасности

- Обратите внимание на указанный на товаре максимально допустимый вес тела!
- Перед каждым использованием проверяйте трость на наличие повреждений.
- При преодолении препятствий с Вами должен быть сопровождающий, чтобы он смог помочь Вам удержаться на ногах в случае падения.
- Если же падение неизбежно, постарайтесь отбросить трость в сторону, чтобы Вы не упали на нее.



Внимание! Возможная опасность: падение из-за соскальзывания

- Регулярно проверяйте наконечники на наличие повреждений или износ.
- При ходьбе трость должна быть в максимально вертикальном положении. Поэтому никогда не удаляйте её далеко от туловища.
- Используйте трость только в качестве поддержки при ходьбе.
- Ни в коем случае ее нельзя использовать в других целях: опора для того, чтобы подняться, в качестве рычага или рукоятки, перестановки мебели и т.д.
- Механические изменения производить запрещено.
- Не допускать попадания на трость солнечных лучей в течение длительного времени (у окна, отопления, за окном автомобиля).
- Используйте трость без защиты от скольжения на обледенелой или заснеженной поверхности.
- Будьте внимательны во время передвижения по влажной плитке, полу или незакрепленному ковровому покрытию.

Технические характеристики

Назначение трости на 4 режима	Модель	Нагрузка, кг	Высота, см	Рукоятка	Цвет*
Реботек 1/4	150	100	63,0 – 85,5	алюмин	00/10/50/80/95
Реботек 1/4	151	100	63,0 – 85,5	алюмин	00/10/50/80/95
Реботек 1/4	152Л	100	63,0 – 85,5	алюмин	00/10/50/80
Реботек 1/4	154П	100	63,0 – 85,5	алюмин	00/10/50/80
Реботек 1/4	153	100	63,0 – 85,5	эргоном	00/10/50/80

* Л/Л - под левую/правую руку

** 00 - белый; 10 - черный; 50 - синий; 80 - зеленый; 95 - цветной