


Фотографические изображения

Раствор промывочный для реagentных и пробозаборных игл во флаконе к анализаторам гемостаза автоматическим cobas t (System Cleaner cobas t systems)

Раствор промывочный для реagentных и пробозаборных игл во флаконе к анализаторам гемост аза автоматическим cobas t (System Cleaner cobas t systems)

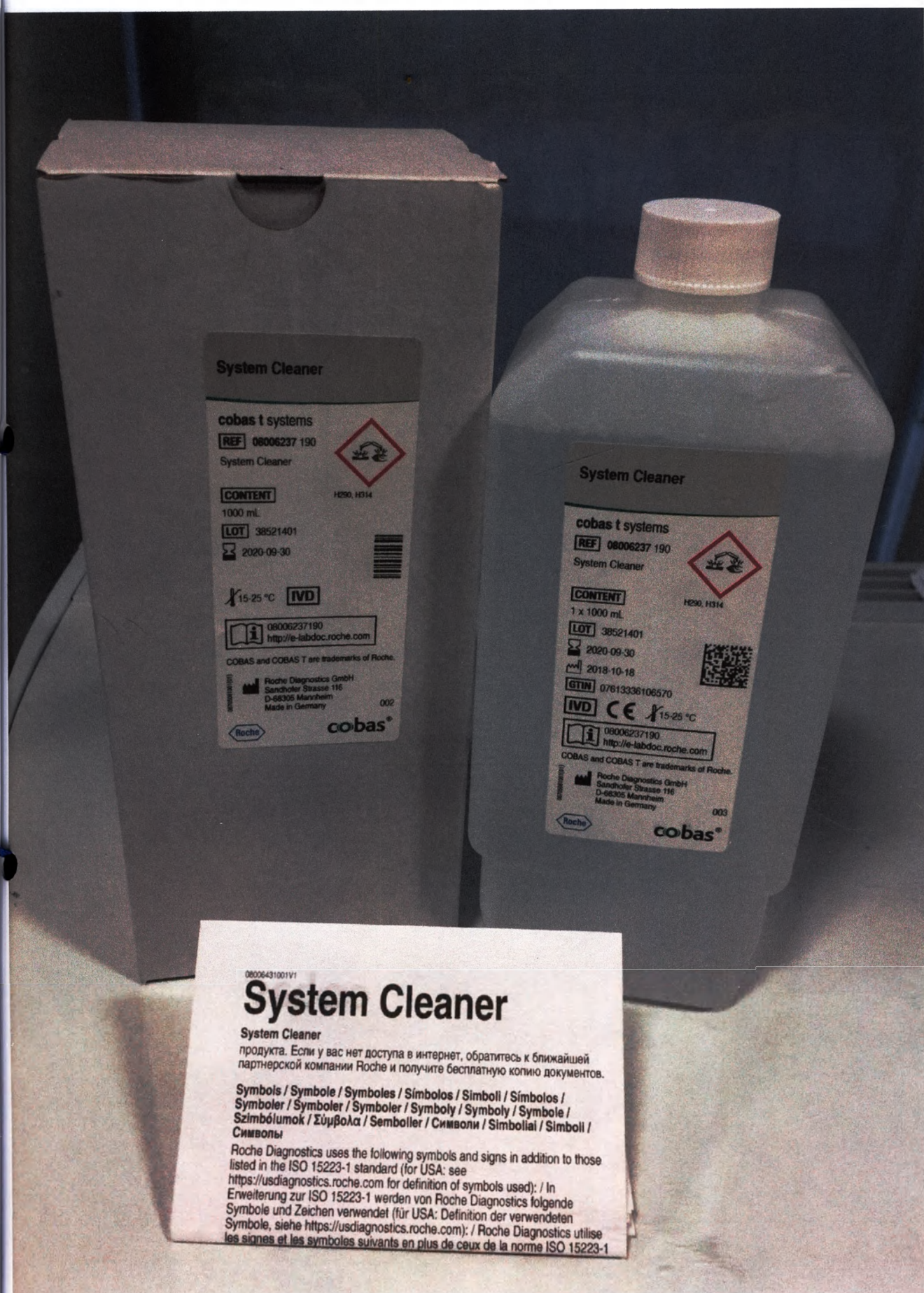

Раствор промывочный для реagentных и пробозаборных игл во флаконе к анализаторам
cobas t (System Cleaner cobas t systems)

System Cleaner

cobas t systems

REF 08006237 190

System Cleaner

CONTENT

1000 mL

LOT 38521401

2020-09-30

H290, H314

15-25 °C **IVD**

08006237190
<http://e-labdoc.roche.com>

COBAS and COBAS T are trademarks of Roche.

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Strasse 116
D-68305 Mannheim
Made in Germany

002

Roche **cobas®**

ор промывочный для реagentных и пробозаборных игл во флаконе к анализаторам гемост аза
атическим cobas t (System Cleaner cobas t systems)

Раствор промывочный для реagentных и пробозаборных игл во флаконе к анализаторам гемостаза автоматическим cobas t (System Cleaner cobas t systems)

Регистрационное удостоверение № _____ от _____

Срок годности см. на упаковке
Температура хранения см. на упаковке
Номер лота см. на упаковке

Производитель: «Roche Diagnostics GmbH» ("Рош Диагностикас ГмбХ"),
Sandhofer Strasse 116, D-68305 Mannheim, Germany, Германия


Изделие предназначено только для диагностики in-vitro

Уполномоченный представитель производителя на территории РФ:

Общество с ограниченной ответственностью «Рош Диагностика Рус»
(ООО «Рош Диагностика Рус»), 107031, Москва, Трубная площадь, д. 2
Тел. +7 495 229-69-99, факс: +7 495 229-62-64.
E-mail: moscow.reception_dia@roche.com

Кат. номер 08006237190

раствор промывочный для реagentных и пробозаборных игл во флаконе к анализаторам
система автоматическим cobas t (System Cleaner cobas t systems)

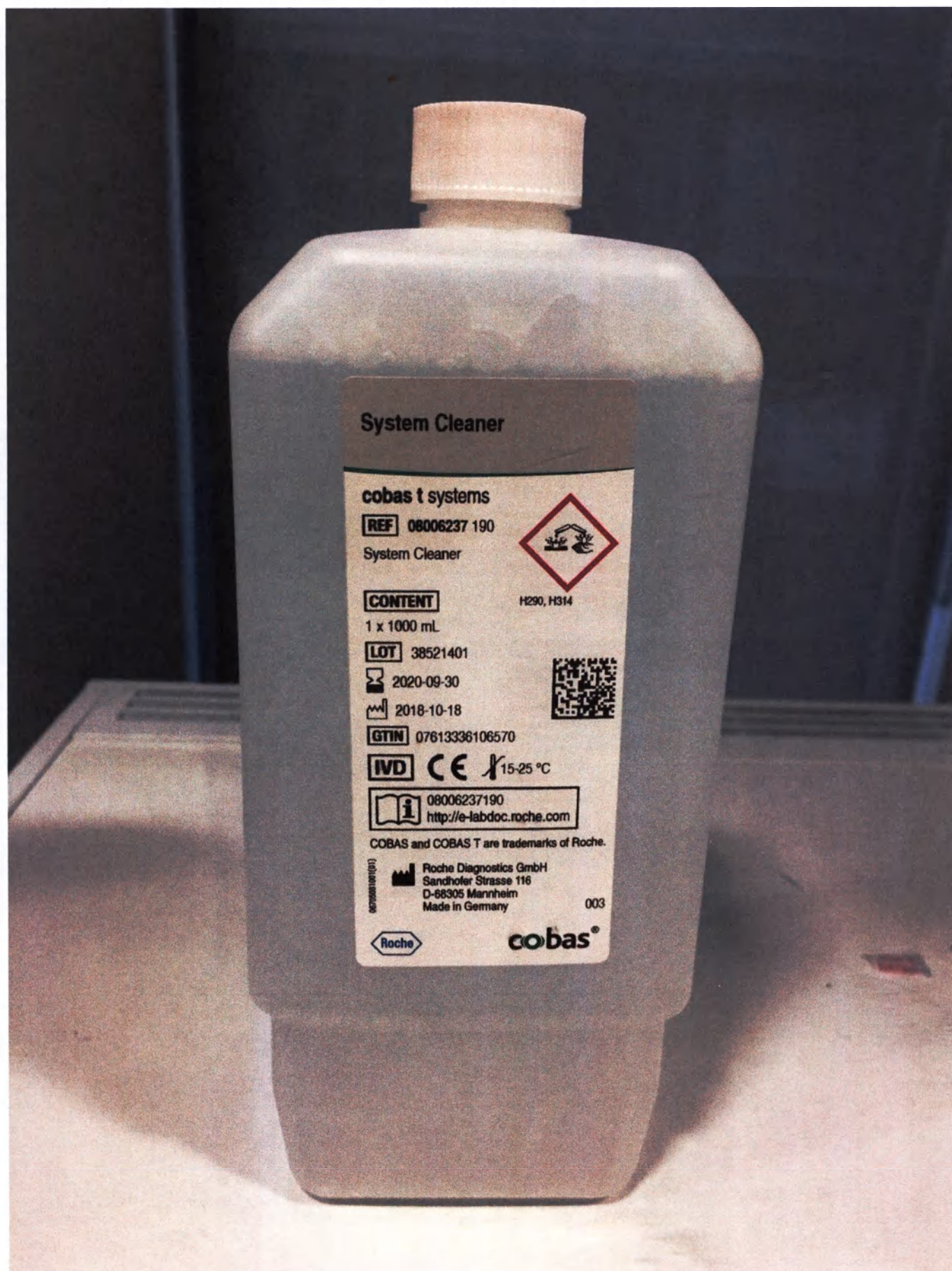

Раствор промывочный для реagentных и пробозаборных игл во флаконе к анализаторам емост аза автоматическим cobas t (System Cleaner cobas t systems)

System Cleaner

System Cleaner

REF

08006237 190

CONTENT

1 x 1000 ml

cobas®

SYSTEM

cobas t 511

cobas t 711

Русский

Назначение

cobas t System Cleaner представляет собой промывочный раствор для реagentных и пробозаборных игл и трубок на указанных анализаторах cobas t.

Теоретическое обоснование

Для сохранения целостности реagentных и пробозаборных игл и системы трубок требуется промывка. Промывочный раствор System Cleaner используется в качестве раствора для очистки с целью предотвращения возможного переноса из реagentных и пробозаборных игл и трубок.

Реагенты - рабочие растворы

Соляная кислота 0.3 моль/л

Меры предосторожности и предупреждения

Только для in vitro диагностики.

Соблюдайте обычные меры предосторожности, необходимые при работе со всеми лабораторными реagentами.

Утилизация всех отходов должна осуществляться в соответствии с местными правилами.

Паспорт безопасности предоставляется профессиональному пользователю по запросу.

Этот набор содержит компоненты, классифицируемые следующим образом в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1272/2008:

Хлороводород

Oxetal ID 104



Опасно

H290 Может вызывать коррозию металлов.

H314 Вызывает серьезные ожоги кожи и повреждения глаз.

Меры предосторожности:

P280 Использовать защитные перчатки / защитную одежду / средства защиты глаз / лица.

Ответные меры:

P301 + P330 ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. НЕ вызывать рвоту.

P303 + P361 В СЛУЧАЕ ПОПАДАНИЯ НА КОЖУ (волосы): Немедленно снять загрязненную одежду. Промыть кожу под струей воды или душем.

P304 + P340 ПРИ ВДЫХАНИИ: Выведите пострадавшего на свежий воздух и обеспечьте ему комфортные для дыхания условия. Немедленно обратитесь в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу.

P305 + P351 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть водой в течение нескольких минут. По возможности, снять контактные линзы. Продолжить промывание. Немедленно обратитесь в токсикологический центр или к врачу.

P390 Собрать пролитую жидкость, для предотвращения материального ущерба.

Маркировка о безопасности продукта соответствует руководству EU GHS.

Контактный телефон для всех стран: +49-621-7590

Избегайте образования пены во флаконе с чистящим раствором.

Приготовление рабочего раствора реагента

Готов к применению.

Хранение и стабильность

Хранить при 15-25 °C.

Неоткрытый флакон стабилен до указанного срока годности.

Стабильность открытых флаконов:

на борту анализатора cobas t 12 недель

Не замораживать.

Состав набора

См. раздел «Реагенты — рабочие растворы».

Необходимые (но не предоставляемые) материалы

• Общее лабораторное оборудование

Анализатор гемостаза автоматический cobas t. При необходимости в дополнительных материалах, смотрите Руководство пользователя.

Анализ

Для получения оптимальных результатов исследований строго следуйте указаниям настоящей инструкции. Подробную информацию по работе с анализатором можно найти в соответствующем Руководстве пользователя.

Используйте чистящий раствор как указано в Руководстве пользователя соответствующего анализатора.

Точка в данной инструкции всегда используется для разделения десятичных разрядов, чтобы отметить границу между целыми и дробными частями десятичного числа. Разделители для групп разрядов не используются.

Для получения более подробной информации обратитесь к Руководству пользователя соответствующего анализатора и Инструкции ко всем необходимым компонентам.

Символы

В дополнение к перечисленным в стандарте ISO 15223-1, Roche Diagnostics применяет следующие символы и знаки (для США: см. <https://usdiagnostics.roche.com> для определения используемых символов):

CONTENT

Состав набора

SYSTEM

Анализаторы/Приборы, для которых предназначен данный набор реагентов

REAGENT

Реагент

CALIBRATOR

Калибратор

→

Объем после восстановления или смешивания

GTIN

Номер в системе международной торговли

Дополнения, удаления или изменения отображаются на индикаторе изменений в полях.
© 2017, Roche Diagnostics



Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, D-68305, Mannheim
www.roche.com



Всего пронумеровано,
прошнуровано и
скреплено печатью
6 листа (об)



Лукина И. А.
Руководитель отдела Логистики
и качества по доверенности от:

02 июля 2018