



ФОТОИЗОБРАЖЕНИЕ УПАКОВКИ ИЗДЕЛИЯ

ОБРАЗЕЦ МАРКИРОВКИ УПАКОВКИ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Набор реагентов для бактериологических исследований

«Питательная среда для определения чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам
сухая»

СОСТАВ, г/л:


Панкреатический гидролизат
рыбной муки..... 21,0
Пептон ферментативный..... 10,0
Натрий хлористый..... 3,0
Крахмал..... 1,5
Агар..... 12,0±3,0

pH 7,4±0,2

Препарат агароскопичен, светочувствителен.
Хранить герметически закрытым в сухом
месте при температуре от 2 до 30°C.

РФ № ФСР 2012/13687 от 30.07.2012 г.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

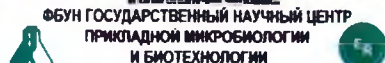

ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Набор реагентов
для бактериологических исследований
«Питательная среда для
определения чувствительности
микроорганизмов
к антибактериальным препаратам
сухая»

ТУ 9398-132-78095326-2011

142279 Оболенск, Московская обл.
Серпуховский р-н, ФБУН ГНЦ ПМБ.
(4867) тел. 36-00-20, факс 36-01-16
E-mail: info@obolensk.ru

СПОСОБ ПРИГОТОВЛЕНИЯ:

46,0 г порошка тщательно размешать в 1 л дис-
тиллированной воды, кипятить 2 мин до полного
расплавления агара, стерилизовать автоклави-
рованием при температуре 121°C в течение 15 мин
и разлить по 20 мл в стерильные чашки Петри
диаметром 90 мм или по 25 мл в чашки диаметром
100 мм. При использовании свежеприготовленных
чашек или чашек после хранения в холодильнике
их необходимо подсушить, соблюдая правила
асептики, при температуре (37±1)°C с приоткрытой
крышкой в течение 10-20 мин.

Дополнительная информация приведена
в инструкции по применению

Только для in vitro диагностики

Серия.....182
Дата изготовления..... 12.2016
Годен до..... 12.2018
Масса..... 250 г