

Кровать функциональная механическая «Armed»



ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать функциональная механическая «Armed» с принадлежностями предназначена для размещения больных в лечебных учреждениях, в отделениях реанимации, травматологии, хирургии, кардиологии, а также в учреждениях социального обслуживания для инвалидов, престарелых и нетрудоспособных людей.

1. Основные технические характеристики

Характеристики/ Модели	RS104-A	RS104-B	RS104-C	RS104-D
Длина кровати, мм	2150	2190	2120	2120
Ширина кровати, мм	900	900	900	900
Высота кровати, мм	520	530	530	530
Максимальная грузоподъемность, кг	250	250	250	250
Изменяемый диапазон углов наклона спинной секции	0° - 75°	0° - 75°	0° - 70°	0° - 70°
Изменяемый диапазон углов наклона ножной секции	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°
Вес, кг	80	82	80	80
Вес с упаковкой, кг	90	92	90	90

Характеристики/ Модели	RS104-E	RS104-F	RS104-G	RS104-H
Длина кровати, мм	2120	2120	2120	2030
Ширина кровати, мм	900	900	900	900
Высота кровати, мм	530	530	450-750	530
Максимальная грузоподъемность, кг	250	250	250	200
Изменяемый диапазон углов наклона спинной секции	0° - 75°	0° - 75°	0° - 75°	0° - 75°
Изменяемый диапазон углов наклона ножной секции	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°
Вес, кг	70	70	70	75
Вес с упаковкой, кг	80	80	80	85

Характеристики/ Модели	RS105-A	RS105-B	RS105-C	RS106-A
Длина кровати, мм	2120	2150	2120	2150
Ширина кровати, мм	900	900	900	900
Высота кровати, мм	530	530	530	460-810
Максимальная грузоподъемность, кг	250	250	250	250
Изменяемый диапазон углов наклона спинной секции	0° - 75°	0° - 75°	0° - 75°	0° - 75°
Изменяемый диапазон углов наклона ножной секции	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°
Вес, кг	80	70	85	80
Вес с упаковкой, кг	90	80	95	90

Характеристики/ Модели	RS106-B	RS106-C	RS106-D	RS112-A
Длина кровати, мм	2120	2150	2100	2150
Ширина кровати, мм	900	900	900	900
Высота кровати, мм	500-800	460-810	500-750	460-810
Максимальная	250	250	200	250

грузоподъемность, кг				
Изменяемый диапазон углов наклона спинной секции	0° - 75°	0° - 75°	0° - 75°	0° - 75°
Изменяемый диапазон углов наклона ножной секции	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°	0° - 40°
Вес, кг	70	70	86	70
Вес с упаковкой, кг	80	80	96	80

Исполнение RS104-A состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, четырех откидных боковых ограждений из пластика, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», двух ручек регулировки изменения наклона спинной и ножной секций кровати, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS104-B состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес оборудованных тормозными механизмами для неподвижной фиксации кровати, двух откидных боковых ограждений из пластика, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», двух ручек регулировки изменения наклона спинной и ножной секций кровати, стойки-держателя для внутривенных инъекций, надкроватного столика и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS104-C состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух откидных боковых ограждений из пластика, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», двух ручек регулировки изменения наклона спинной и ножной секций кровати, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS104-D состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, четырех откидных боковых ограждений из пластика, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», двух ручек регулировки изменения наклона спинной и ножной секций кровати и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS104-E состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», двух ручек регулировки изменения наклона спинной и ножной секций кровати и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS104-F состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», двух ручек регулировки изменения наклона спинной и ножной секций кровати, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS104-G состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», двух ручек регулировки изменения наклона спинной и ножной секций кровати и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS104-H состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, головной и ножной металлической спинки кровати, двух ручек регулировки изменения наклона спинной и ножной секций кровати, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS105-A состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, четырех откидных боковых ограждений из пластика, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», двух ручек регулировки изменения наклона спинной и ножной секций кровати, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS105-B состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», двух ручек регулировки изменения наклона спинной и ножной секций кровати, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS105-C состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес оборудованных тормозными механизмами для неподвижной фиксации кровати, двух опускаемых металлических боковых ограждений, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», двух ручек регулировки изменения наклона спинной и ножной секций кровати, надкроватьного столика и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS106-A состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», трех ручек регулировки наклона спинной, ножной секций и подъема ложа, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS106-B состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», трех ручек регулировки наклона спинной, ножной секций и подъема ложа, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS106-C состоит из стального каркаса, четырех секций ложа изготовленных из

стали, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, головной и ножной пластиковой спинки кровати, трех ручек регулировки наклона спинной, ножной секций и подъема ложа, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS106-D состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозными механизмами для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, головной и ножной пластиковой спинки кровати с металлической отделкой, трех ручек регулировки наклона спинной, ножной секций и подъема ложа, надкроватьного столика и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS112-A состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех съемных литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», и прочих мелких составных частей и деталей

2. Сборка и подготовка к эксплуатации

Вскройте упаковку и проверьте комплектацию.

При поставке с завода кровать разобрана на части для удобства доставки. Открывая упаковку изделия, нужно проверить целостность деталей и наличие документов. Сохраните документы для дальнейшего использования.

Порядок сборки

Основная конструкция кровати не требует сборки.

1) В ножные опоры, имеющие внутреннюю резьбу, вкрутите несущие части колес, так же имеющие резьбу. (Колеса у изголовья – без тормозов, в ножной части – с тормозами)

2) Прикрепите боковые ограждения болтами.

3) По углам кровати имеются по два опорных штыря с фиксатором. Подняв фиксаторы, установите головную и ножную торцевые ограждения. Опустив фиксаторы, ограждения блокируются.

4) При необходимости использования устройства для подтягивания, инфузионной стойки для вливаний и т. п., вставьте их в соответствующие отверстия в торцевом ограждении.

Примечание:

Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов.

Выбор места для кровати должен исключать случайные удары и толчки.

Прочистить и продезинфицировать кровать перед первым и повторными использованиями.

3. Меры безопасности

Перед использованием необходимо проверить прочность фиксации компонентов во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

4. Эксплуатация

1) Регулировка положений секций

Ручки рычагов регулировки поверхности оборотно-складного типа. В исходном положении находятся под торцевым ограждением в ножной части кровати.

Правый рычаг для регулирования ножной секции, левый рычаг для регулирования спинной

секции, а средний для регулировки высоты ложа.

При использовании рычагов застопорите кровать с помощью педалей на колесах в ножной части кровати.

Для регулирования секций надо выдвинуть рычаг из-под ограждения, сложенную ручку отвести в сторону. Вращая ручку, приведите секцию или ложе в необходимое положение. При использовании рычагов выдвигайте и убирайте ручки в исходное положение без усилий.

Если механизм регулировки кровати не используется, прокрутить ручку, сложить и, задвинув в горизонтальном положении, поместить под торцевое ограждение.

2) Боковые ограждения легко опускаются, что позволяет обеспечить быстрый доступ к пациенту. У основания расположен механизм с педалью. Приподняв педаль снизу вверх, ограждение легко опускается вниз, подняв ограждение, оно без усилий зафиксировано.

3) Торцевые ограждения легко снимаются с упоров и вставляются на место. Для снятия с упоров поднимите фиксаторы в виде крючков вверх. С внутренней стороны ограждений имеются 2 в ножной части и 4 в головной части отверстия для установки дополнительных аксессуаров, таких как инфузионная стойка, устройство для подтягивания и т. п.

4) Колеса с педальными тормозами защищают кровать с пациентом от случайных перемещений при ударе или давлении.

5) Бамперы расположены по углам кровати, защищая корпус от повреждений.

5. Обслуживание

1) Не демонтировать «ручку тяги» и «шкив тяги» «регулирующий винт» и другие части механизма.

2) Следует избегать царапин или вмятин на поверхностях деталей, на которых гальваническим способом нанесен слой металла, или на компонентах, покрытых эпоксидной эмалью.

3) Чистите и смазывайте металлические части и ручной рычаг передачи каждый год для продления срока эксплуатации изделия.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кроватей медицинским требованиям нормативных документов.

(ГОСТ Р 50444-92 (пп.3,4)) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Срок гарантии 12 месяцев

Дата продажи _____

Сервисное обслуживание производится в _____

Контактный телефон: _____

Адрес: _____

Всего прошнуровано

и пронумеровано

7 (Семь)

листа (ов)

Генеральный директор

