


Оборудование медицинских кабинетов и палат:
Кровать функциональная электрическая «Armed»
с принадлежностями

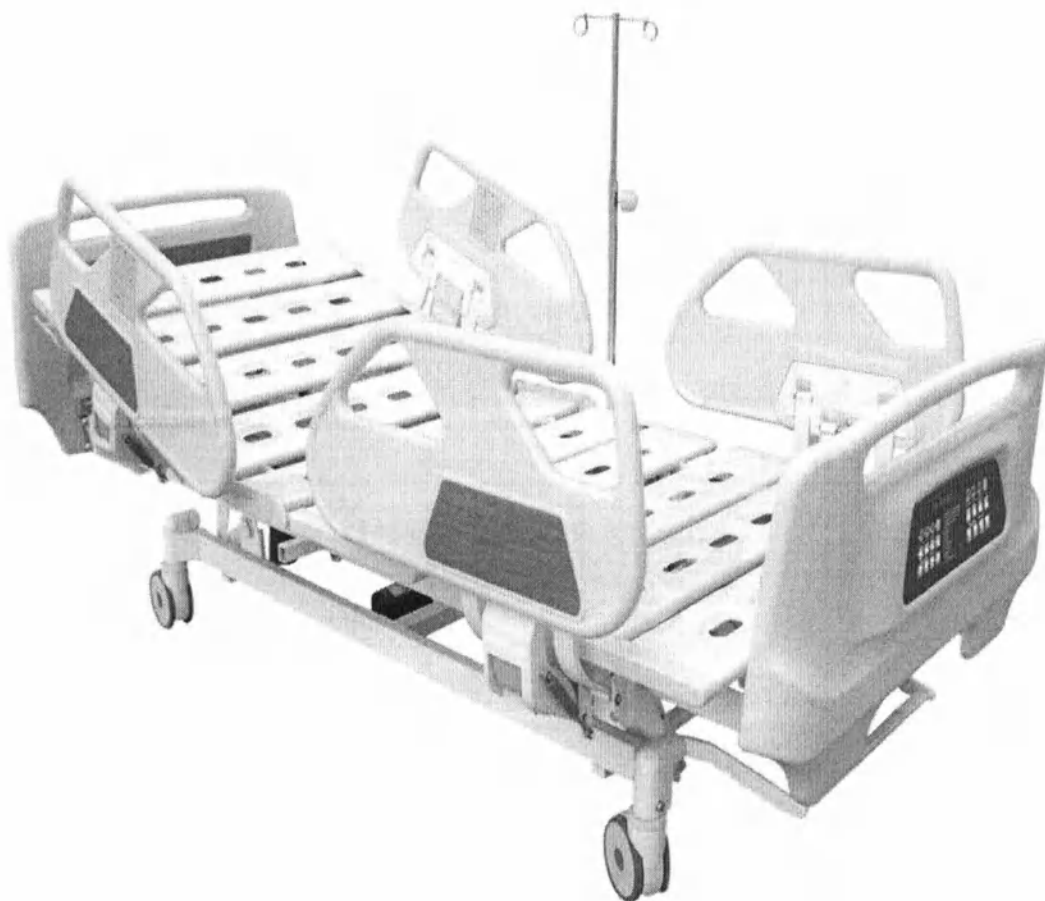

ПАСПОРТ
И
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Кровать функциональная электрическая «Armed» с принадлежностями предназначена для размещения больных в лечебных учреждениях, в отделениях реанимации, травматологии, хирургии, кардиологии, а также в учреждениях социального обслуживания для инвалидов, престарелых и нетрудоспособных людей.

1. Основные технические характеристики

Характеристики/ Модели	RS800	RS300	RS301
Длина ложа, мм	2025	2220	2230
Длина кровати, мм	2230	2220	2230
Ширина ложа, мм	935	990	990
Ширина кровати, мм	935	1050	1050
Высота подъема ложа, мм	500-1000	450-790	575-815
Максимальная грузоподъемность, кг	250	250	250
Изменяемый диапазон углов наклона спинной секции	0° - 75°	0° - 75°	0° - 75°
Изменяемый диапазон углов наклона ножной секции	0° - 40°	0° - 35°	0° - 35°
Изменение диапазона углов подъема ножной секции ложа	0° - 10°	0° - 10°	0° - 10°
Изменение диапазона углов подъема головной секции ложа	0° - 10°	0° - 10°	0° - 10°
Электропитание В/Гц	220/50	220/50	220/50
Электропитание на пульте, В	24	24	24
Вес, кг	110	95	100
Вес с упаковкой, кг	145	105	125

Характеристики/ Модели	RS302	RS201	RS101-A	RS101-A-A
Длина ложа, мм	2080	2150	2150	2150
Длина кровати, мм	2080	2150	2150	2150
Ширина ложа, мм	970	900	900	900
Ширина кровати, мм	970	900	900	900
Высота подъема ложа, мм	400-700	520-720	520-720	520-720
Максимальная грузоподъемность, кг	250	250	250	250
Изменяемый диапазон углов наклона спинной секции	0° - 75°	0° - 75°	0° - 75°	0° - 75°
Изменяемый диапазон углов наклона ножной секции	0° - 40°	0° - 35°	0° - 40°	0° - 40°
Изменение диапазона углов подъема ножной секции ложа	0° - 10°	0° - 10°	0° - 10°	0° - 10°
Электропитание В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Электропитание на пульте, В	24	24	24	24
Вес, кг	90	100	95	100
Вес с упаковкой, кг	100	125	105	125

Характеристики/ Модели	RS101-A-B	RS101-B-A	RS101-F	RS305
Длина ложа, мм	2150	2100	2160	2080
Длина кровати, мм	2150	2100	2160	2080
Ширина ложа, мм	900	1100	900	970
Ширина кровати, мм	900	1100	900	970
Высота подъема ложа, мм	520-720	450-750	450-750	400-700
Максимальная грузоподъемность, кг	250	250	250	250
Изменяемый диапазон углов наклона спинной секции	0° - 75°	0° - 75°	0° - 75°	0° - 75°
Изменяемый диапазон углов наклона ножной секции	0° - 35°	0° - 35°	0° - 40°	0° - 40°
Изменение диапазона углов подъема ножной секции ложа	0° - 10°	0° - 10°	0° - 10°	0° - 10°
Электропитание В/Гц	220/50	220/50	220/50	220/50
Электропитание на пульте, В	24	24	24	24
Вес, кг	100	100	105	90
Вес с упаковкой, кг	125	125	135	100

Исполнение RS201 состоит из стального каркаса с порошковым покрытием и пластиковым поддоном, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, четырех откидных боковых ограждений из пластика с двумя пультами управления изменения наклона спинной, ножной секций и подъема ложа кровати, головной и ножной пластиковой спинки кровати с контрольной панелью управления для медсестры, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS101-A состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, четырех откидных боковых ограждений из пластика с двумя пультами управления изменения наклона спинной, ножной секций и подъема ложа кровати, головной и ножной пластиковой спинки кровати с контрольной панелью управления для медсестры, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS101-A-A состоит из стального каркаса с порошковым покрытием и пластиковым поддоном, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати и дополнительной прямолинейной педалью тормоза, четырех откидных боковых ограждений из пластика с двумя пультами управления изменения наклона спинной, ножной секций и подъема ложа кровати, головной и ножной пластиковой спинки кровати с контрольной панелью управления для медсестры и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS101-A-B состоит из стального каркаса с порошковым покрытием и пластиковым поддоном, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, четырех откидных боковых ограждений из пластика с двумя пультами управления изменения наклона спинной, ножной секций и подъема ложа кровати, головной и ножной пластиковой спинки кровати с контрольной панелью управления для медсестры и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS101-B-A состоит из стального каркаса обитого деревянными панелями, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых

колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, пульта управления изменения наклона спинной, ножной секций и подъема ложа кровати, головной и ножной деревянной спинки кровати и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS101-F состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, головной и ножной пластиковой спинки кровати с меламиновыми вставками «под дерево», пульта управления изменения наклона спинной, ножной секций и подъема ложа кровати, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS305 состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, пульта управления изменения наклона спинной, ножной секций и подъема ложа кровати, головной и ножной деревянной спинки кровати, матраса для кровати и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS800 состоит из стального каркаса с порошковым покрытием и пластиковым поддоном, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью обтянутой тканью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати и дополнительной прямолинейной педалью тормоза, четырех откидных боковых ограждений из пластика с двумя пультами управления изменения наклона спинной, ножной секций и подъема ложа кровати и контрольной панелью управления для медсестры, головной и ножной пластиковой спинки кровати и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS300 состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, с прямолинейной педалью тормоза для неподвижной фиксации кровати, четырех откидных боковых ограждений из пластика с двумя пультами управления изменения наклона спинной, ножной секций и подъема ложа кровати, головной и ножной пластиковой спинки кровати с контрольной панелью управления для медсестры, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS301 состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, с педалью тормоза для неподвижной фиксации кровати, четырех откидных боковых ограждений из пластика с двумя пультами управления изменения наклона спинной, ножной секций и подъема ложа кровати, головной и ножной пластиковой спинки кровати с контрольной панелью управления для медсестры, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

Исполнение RS302 состоит из стального каркаса с порошковым покрытием, четырех секций ложа изготовленных из стали покрытой ударопрочной эпоксидной эмалью, четырех литых колес, два из которых оборудованы тормозным механизмом для неподвижной фиксации кровати, двух складных металлических рейлингов, головной и ножной деревянной спинки кровати, пульта управления изменения наклона спинной, ножной секций и подъема ложа кровати, стойки-держателя для внутривенных инъекций и прочих мелких составных частей и деталей.

2. Сборка и подготовка к эксплуатации

Вскройте упаковку и проверьте комплектацию.

При поставке с завода кровать разобрана на части для удобства доставки. Открывая упаковку изделия, проверьте целостность деталей и наличие документов. Распаковывая, старайтесь не повредить электромотор и электрическое оборудование.

Сохраните документы для дальнейшего использования.

Порядок сборки

Основная конструкция кровати не требует сборки.

1) Прикрепите боковые ограждения болтами.

2) По углам кровати имеются по два опорных штыря с фиксатором. Подняв фиксаторы, установите головное и ножное торцевые ограждения. При опускании фиксаторов, ограждения блокируются.

Примечание!

Кровать должна быть установлена на ровном полу без уклонов.

Выбор места для кровати должен исключать случайные удары и толчки.

Прочистить и продезинфицировать кровать перед первым и последующими использованиями.

3. Условия эксплуатации

1) Температура: от + 5°C до + 40°C

2) Относительная влажность: 30 % - 80 %.

3) Атмосферное давление: 645 - 795 мм рт. ст.

4) Электропитание: однофазное: 220 В ± 22 В, 50 Гц ± 1 Гц.

4. Меры безопасности

Перед использованием необходимо проверить прочность фиксации компонентов кровати во избежание расшатывания, соскальзывания, смещения, что может привести к несчастным случаям.

Необходимо проверить питание: однофазный ток 220 В, 50 Гц переменного тока, с двухконтактным разъемом. При подключении к электросети проверьте прочность соединения вилки и розетки.

- Не прикасайтесь к источнику электропитания влажными руками.

- При поставке с завода-изготовителя электрическое оборудование было установлено и отлажено надлежащим образом. Пользователь не может менять исходное состояние электрической системы, в т.ч. состояние розетки и пульта управления в случае разъединения, потери напряжения или несчастного случая. При поломке электрической системы необходимо обратиться к сертифицированному электрику или связаться с продавцом.

- Необходимо обеспечить защиту кабеля электропитания и проводов, подведенных к устройствам управления, чтобы избежать разрушения слоя изоляции при перегибе или разрыве провода.

- Оберегайте пульт управления от механических повреждений.

- Позаботьтесь о том, чтобы вовремя устранять возможные дефекты или поломки и заменять поврежденные детали.

- При использовании кровати нужно разместить пациента на некотором расстоянии от края кровати, чтобы его не зажало одним из боковых ограждений или другими выдвижными частями конструкции; если пациент лежит на груди, запрещено использовать кнопку сгибания спинной секции, чтобы не нанести вред пациенту.

- При изменении положения ложа или непосредственно самого пациента нужно следовать инструкциям доктора или медсестры, чтобы не причинить вред пациенту.

- Если оборудование не используется, отключите электропитание (выньте вилку из розетки).

5. Эксплуатация

1) Пульт управления (оснащен креплением для фиксации на ограждениях кровати)

Регулировка положений ложа и секций производится нажатием на соответствующие кнопки пульта управления. Необходимое движение ложа или секции происходит в течение всего времени нажатия.

При отпускании кнопки движение останавливается.

Примечание!

Нажатие двух или более кнопок одновременно запрещается, так как это приводит к поломке пульта.

Использовать какие-либо колющие и режущие предметы для нажатия кнопки запрещается.

Избегайте слишком сильного нажатия на кнопки, так как это приводит к их повреждению.



- Указатель направления движения: «вверх», «вниз»
- Управление спинной секцией
- Управление ножной секцией
- Управление спинной и ножной секцией одновременно
- Управление высотой ложа
- Управление наклоном ложа

2) Боковые ограждения легко опускаются, что позволяет обеспечить быстрый доступ к пациенту. У основания расположен механизм с металлической педалью. При поднятии педали снизу вверх ограждение легко опускается вниз, при поднятии ограждения - оно без усилий зафиксировано.

3) Торцевые ограждения легко снимаются с упоров и вставляются на место. Для снятия с упоров поднимите фиксаторы в виде крючков вверх. С внутренней стороны имеются по два отверстия для установки дополнительных аксессуаров, таких как инфузионная стойка, устройство для подтягивания и т. п.

4) Центральная тормозная система защищает кровать с пациентом от случайных перемещений при ударе или давлении. Рычаг (педаль) расположен в ножной части кровати. Чтобы зафиксировать кровать, опустите рычаг, колеса заблокируются. Чтобы привести кровать в движение, поднимите рычаг вверх для разблокирования колес.

5) Бамперы расположены по углам кровати, защищая корпус от повреждений.

6. Обслуживание

1) Нельзя демонтировать электрическую систему и другие части механизма кровати.

2) Следует избегать царапин или вмятин на поверхностях деталей, на которых гальваническим способом нанесен слой металла, а также на компонентах, покрытых эпоксидной эмалью.

3) Чистите и смазывайте металлические части каждый год для продления срока эксплуатации изделия.

При изменении внешнего вида изделия или его технических характеристик, предварительное оповещение не осуществляется.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кроватей медицинским требованиям нормативных документов.

(ГОСТ Р 50444-92, ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.38-99, ГОСТ Р 50267.0.2-2005, ГОСТ Р 51318.11-2006 (класс Б), ГОСТ Р 51317.4.2-99, ГОСТ Р 51317.4.3-2006, ГОСТ Р 50648-94, ГОСТ Р 51317.4.5-99, ГОСТ Р 51317.4.11-99, ГОСТ Р 50648-94) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации: 12 месяцев.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Срок гарантии 12 месяцев
Дата продажи _____
Сервисное обслуживание производится в _____
Контактный телефон: _____
Адрес: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 2

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Срок гарантии 12 месяцев
Дата продажи _____
Сервисное обслуживание производится в _____
Контактный телефон: _____
Адрес: _____

Всего прошнуровано

и пронумеровано

4 (семь)

листа (ов)

Генеральный директор

ООО «Медимпорт»

