


**Инструкция по применению
жгута кровоостанавливающего «ФЭСТ» механического с регулируемой
компрессией. Жгут предназначен для однократного применения.**

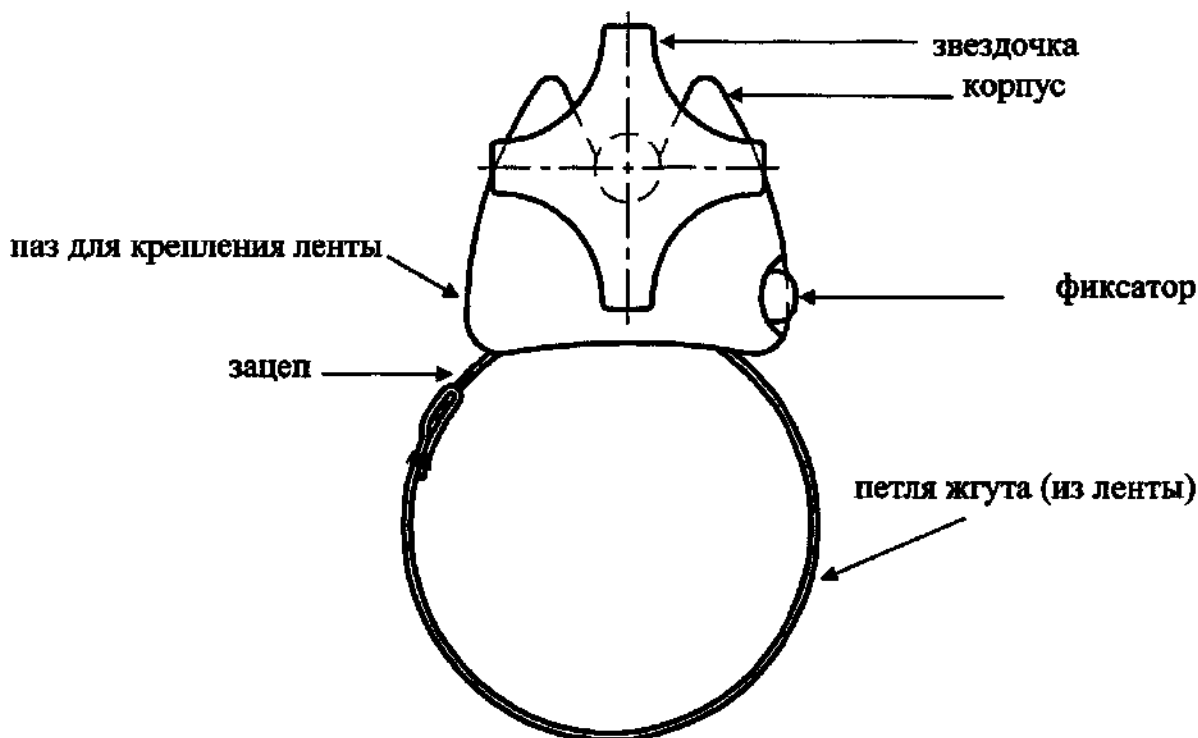

Предварительно нажав на фиксатор и вытянув ленту нужной длины, образовать петлю. Разместить петлю жгута выше раны. Вращая звездочку, затянуть петлю жгута до прекращения кровотечения из раны пострадавшего или до прекращения прощупывания пульса. Вложить записку с указанием времени наложения жгута. При длительной транспортировке (в тепле — через 40 минут, а в холоде — через 30 минут) жгут надо постепенно ослабить на несколько минут, до появления на ране капель крови, а затем снова затянуть (чуть выше или ниже прежнего места). Для ослабления петли жгута и для его снятия — нажать на фиксатор.

В случае ограниченного доступа к пострадавшему, необходимо вынуть зацеп с лентой жгута из паза корпуса, и обернуть ее вокруг поврежденной конечности.



[Signature]
В.В.Михайлов