

Руководство по применению изделия медицинского назначения

Пленка Унипласт операционная

Описание

Пленка Унипласт операционная представляет собой полосу пленки с равномерным сплошным или штриховым, или волнообразным слоем клеевого покрытия, с антиадгезионным защитным покрытием с обеих сторон изделия. Изделие стерильно.

Показания к применению

Пленка Унипласт операционная предназначена для закрытия операционного поля во время хирургических манипуляций с целью изолирования раны, разреза или прокола и кожи вокруг них; небольших первично леченых ран и хирургических разрезов без экссудации; а также для фиксации на ранах тампонов, раневых повязок, катетеров и других предметов медицинского назначения.

Способ применения

Вскрыть упаковку, извлечь изделие.

Руководствуясь рисунками на защитном покрытии, снять защитную бумагу, наложить изделие на рану, осторожно зафиксировать, не прикладывая усилия, затем снять защитную пленку.

Изделие однократного применения.

Противопоказания

Нет.

Форма выпуска

Пленка Унипласт операционная по 1 штуке в контурной безъячейковой упаковке.

Наборы от 2 до 10 штук изделий одного размера в пакете с клапаном или в пачке складной из картона.

Хранение

В сухом месте.

Срок годности

3 года.

Заместитель генерального
директора ОАО «ВЕРОФАРМ»



Т.Х.Чибиляев