

Руководство по применению изделия медицинского назначения

Пластыри Унипласт стрипы

Описание

Пластыри Унипласт стрипы представляют собой полоски нетканого материала с равномерным сплошным или штриховым, или волнообразным слоем клеевого покрытия, с антиадгезионным защитным покрытием. Изделие стерильно.

Показания к применению

Пластыри Унипласт стрипы предназначены для атравматичного сопоставления краев небольших ран и хирургических разрезов, а также для стабилизации хирургических швов с целью профилактики возникновения грубых рубцов.

Способ применения

Вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь блок со стрипами. Произвести пальцевое (или с помощью хирургических швов) сопоставление краев раны, после чего наложить стрипы клеевой стороной на кожу, поперек линии раны, до надежного сопоставления краев раны. Рекомендуется менять стрипы при каждой перевязке.

Противопоказания

нет

Форма выпуска

Пластыри Унипласт стрипы от 2 до 10 шт. параллельно расположены на одном защитном покрытии в виде блока. От 1 до 3 блоков в контурной безъячейковой упаковке.

Наборы от 2 до 100 шт. контурных безъячейковых упаковок с блоками изделий в пакете с клапаном или в пачке складной из картона.

Хранение

В сухом месте.

Срок годности

3 года.

Заместитель генерального
директора ОАО «Верофарм»



Т.Х. Чибиляев