

**Руководство по эксплуатации (применению)
изделия медицинского назначения**

Лейкопластырь «Унипласт кровоостанавливающий М-ДОК»

Описание

Полоска ткани или нетканого материала, или пленки прямоугольной, фигурной или круглой формы со слоем клеевого покрытия (полоска липкая) с перфорацией или без нее с подушечкой из нетканого материала, с включением микродисперсной окисленной целлюлозы, с защитным покрытием. Изделие стерильно.

Показания к применению

Лейкопластырь «Унипласт кровоостанавливающий М-ДОК» предназначен для использования в качестве гемостатического средства для местного применения.

Противопоказания

Возможна индивидуальная непереносимость.

Способ применения

Наклеивать на чистую и сухую кожу. Вскрыть упаковку, извлечь лейкопластырь, снять защитное покрытие, не прикасаясь пальцами к подушечке, приложить ее на рану, зафиксировать по краям. Не применять повторно.

Форма выпуска

Лейкопластырь «Унипласт кровоостанавливающий М-ДОК» по 1 штуке или в виде ленты от 2 до 10 штук в контурной безъячейковой упаковке.

Наборы от 2 до 100 штук изделий одного или разных типоразмеров в контурной безъячейковой упаковке, уложенных в пакет с клапаном или в пачку складную из картона – 1 уп.

Хранение

В сухом месте.

Срок годности

3 года.

Начальник Медицинского
управления



Скоблик Т.И.