

**Руководство по применению
изделия медицинского назначения**

Повязка Унипласт раневая сорбирующая

Описание

Повязка Унипласт раневая сорбирующая представляет собой многослойную сорбирующую прокладку из целлюлозы с защитным слоем из нетканого материала в оболочке из нетканого материала. Изделие стерильно.

Показание к применению

Повязка Унипласт раневая сорбирующая предназначена для использования в качестве перевязочного средства для защиты и очищения от раневого отделяемого ран с обильной экссудацией: гнойных, мокнущих, кровоточащих ран; снижает риск вторичного инфицирования.

Противопоказания

Возможна индивидуальная непереносимость.

Способ применения

Вскрыть упаковку, извлечь повязку. Аккуратно наложить повязку на раневую поверхность. Зафиксировать бинтом или Лейкопластырем «Унипласт фиксирующий». Изделие однократного применения.

Форма выпуска

По 1 штуке в контурной безъячейковой упаковке. Наборы от 2 до 50 штук одного размера в пачке складной из картона.

Хранение

Повязку хранят в сухом месте.

Срок годности

4 года.

Генеральный директор
ОАО «ВЕРОФАРМ»



М.В.Пенькова