

**Руководство по эксплуатации (применению)
изделия медицинского назначения**

Пластырь мозольный амортизирующий СМАРТ

Описание

Пластырь мозольный амортизирующий состоит:

- из амортизирующего материала с клеевым слоем, фигурной формы с отверстием или
- из амортизирующего материала фигурной формы с отверстием, приклеенного к полоске липкой основы фигурной формы – лейкопластырю Верофарм или лейкопластырю «Унипласт фиксирующий».

Показания к применению

Защитное средство при наличии мозолей и оmozолелостей, а также профилактика для предотвращения их образования.

Способ применения

Открыть безъячейковую контурную упаковку, вынуть Пластырь мозольный амортизирующий, снять с его поверхности защитный слой, наложить на чистую сухую мозоль или оmozолелость, слегка прижать и разгладить.

Если после применения на коже остались следы клейкой массы, их можно удалить теплым мыльным раствором или лосьоном.

Форма выпуска

Пластырь мозольный амортизирующий в контурной безъячейковой упаковке по 1 штуке или в виде ленты от 1 до 10 штук (размеры 1,7 x 7,2 см, 1,9 x 7,2 см, 2,3 x 7,2 см) или в виде блоков, содержащих от 2 до 20 штук изделий на одном защитном покрытии, в контурной безъячейковой упаковке (размером 1,5 x 2,4 см или диаметром 2,3 см) или в пакете с клапаном или пачке складной.

Наборы от 2 до 100 штук изделий в пакетах с клапаном или пеналах, или пачках складных из картона.

Хранение

В сухом защищенном от света месте при температуре не выше 40 °С.

Срок годности

2 года.

Заместитель генерального
Директора



Чибилев Т.Х.

ТАБЛИЦА
сопоставления Пластыря мозольного амортизирующего СМАРТ
с существующими аналогами

Основные данные	Российские аналоги		Зарубежные аналоги	
1	2	3	4	5
Название и назначение	Аналог неизвестен		Hornhaut, Амортизирующий пластырь	COR Мозольный гигиенический пластырь для мозолей и омозелелостей
Предприятие- производитель, фирма, страна			Scholl, Великобритания	URGO, Франция
Основные параметры и характеристики			Липкий амортизирующий материал	Амортизирующий материал на липкой полоске

Начальник Медицинского
Управления



Скоблик Т.И.

Лейкопластырь амортизирующий
для мозолей

*Название
изменено*

