

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ЗАО
«Вектор»

Попков В.В.

2015 г.

М.п.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Аспиратора вакуумного мануального АВМ-«Вектор».

1. Информация об изделии.

Аспиратор вакуумный мануальный АВМ-«Вектор». ТУ 9398-007-12132623-2015.
Производитель: ЗАО «Вектор», Россия, Ростовская обл., г. Волгодонск,
ул. Железнодорожная 94.

2. Описание и работа изделия.

2.1 Назначение.

Аспиратор вакуумный мануальный АВМ-«Вектор» предназначен биопсия эндометрия полости матки. Область применения – гинекология, онкология.

Принцип действия изделия при заборе диагностического материала основан на механическом отделении частиц эндометрия от стенок матки и вакуумном заборе отделенных частиц эндометрия.

2.2 Основные технические характеристики.

Аспиратор состоит из шприца с фиксатором положения поршня, канюли с адаптером, адаптер соединяет шприц и канюлю и выполняет функцию клапана..

Длина устройства – 280 мм; длина канюли с адаптером – 170мм; диаметр рабочей части – 3 мм; вес – не более 35 г. Количество забираемого материала не менее – 10 мл.



В комплект поставки аспиратора входит:

- шприц - 1 шт.;
- канюля с адаптером - 1 шт.;
- индивидуальная упаковка - 1 шт.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Биопсия эндометрия нельзя проводить во время беременности;
при воспалительных заболеваниях влагалища и шейки матки;
индивидуальная непереносимость.

5. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

1. Извлечь шприц из пакета.
2. На шприце сжать фиксаторы положения поршня двумя пальцами и ввести поршень в цилиндр до упора.
3. Взять канюлю из пакета и аккуратно надеть адаптер на шприц и продвинуть канюлю до упора в поршень.
4. Установить на канюле ограничитель на необходимую глубину введения.
5. Удерживая цилиндр шприца в одной руке, другой, преодолевая создаваемое разрежение в цилиндре, потянуть поршень на себя до выхода фиксаторов положения поршня до щелчка.. Аспиратор готов к работе
6. Определить положение скребка по отношению к удерживающей аспиратор руке, в рабочем положении скребок должен быть повернут к стенке полости матки.

6. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

1. Ввести канюлю в полость матки на необходимую глубину до ограничителя.
2. Удерживая устройство в одной руке, второй сдвинуть канюлю за силиконовую ручку (расположенную на канюле) внутрь шприца до упора, при этом откроется клапан и содержимое полости матки начнет поступать в цилиндр шприца.
3. При заборе материала канюлей производить вращательные и возвратно-поступательные движения, снимая скребком со стенок матки необходимый биоматериал.
4. По окончании забора биоматериала, сжать стопоры двумя пальцами и ввести поршень в цилиндр до упора, при этом содержимое шприца попадет в предварительно подготовленный сосуд.

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить в сухом месте при температуре $+40^{\circ}\text{C}$ и -50°C , в условиях относительной влажности 98%. Однократного применения. Не применять при нарушении целостности упаковки. Изделие не подлежит повторной стерилизации.


8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.

Гарантийный срок годности 5 лет со дня стерилизации


9. Утилизация

После использования, аспиратор обеззараживают химическим или физическим методами и утилизируют в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10.

10. Применяемые на маркировке изделия условные знаки и их разъяснения

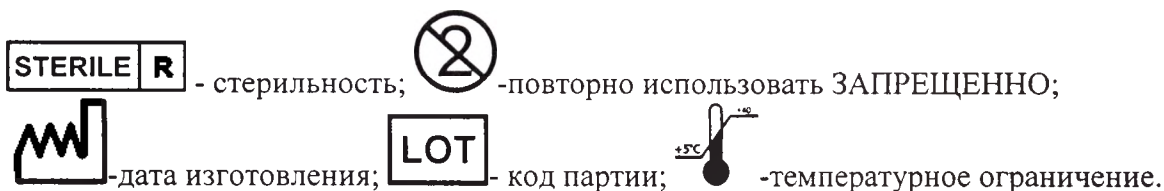

Инструкцию разработал:
Зам. генерального директора

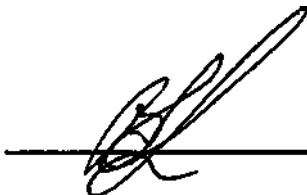
Костенко В.И.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 2
18621 листов.
Генеральный директор
В.В. ПОПКОВ

