


УТВЕРЖДЕНО

«УТВЕРЖДАЮ»

Приказом Росздравнадзора
от _____ 2012 г. № _____

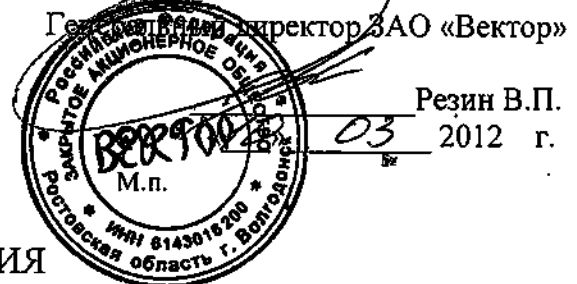

ИНСТРУКЦИЯ

по применению контрацептивов внутриматочных «Вектор-экстра» с прополисом и календулой

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Контрацептивы внутриматочные «Вектор-экстра» с прополисом и календулой предназначены для предупреждения нежелательной беременности у женщин.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Контрацептив внутриматочный «Вектор-экстра» с прополисом и календулой представляет собой пластмассовый каркас (стержень с плечиками для фиксации) покрытый тонкой водорастворимой плёнкой из смеси биологически активных веществ – прополиса и календулы с навитой на него спиралью из золотой или медной или осеребрённой медной проволоки или из их сочетаний. Каркас может иметь Т-образную или Ф-образную форму. Габаритные размеры контрацептивов - 32х 32 мм для Т-образных и 32 х 18 мм для Ф-образных. К нижней части каркаса крепится мононить полипропиленовая. Контрацептив комплектуется приспособлением для его установки, которое представляет собой трубку диаметром 4 мм и длиной 195 мм, изготовленную из полипропилена.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказания к применению:

- воспалительные заболевания гениталий любой локализации в острой и подострой стадии;
- доброкачественные и злокачественные опухоли гениталий;
- недавно перенесённое кровотечение, обильные продолжительные месячные;
- повышенная температура тела;
- аллергия к материалам, установленная врачом;
- пороки развития гениталий.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1. Вскрыть упаковку при помощи ножниц и извлечь из упаковки контрацептив с трубкой.
2. Установить ограничитель на трубке на нужную глубину введения.
3. Ввести трубку с контрацептивом в матку до ограничителя.
4. Удалить трубку из матки.
5. Обрезать трансцервикальные нити контрацептива так, чтобы они выступали из шейки матки на 2 – 3 см.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Контрацептивы должны храниться в заводской индивидуальной герметичной упаковке, при температуре от +40 до – 50°C

Контрацептивы транспортируется всеми видами транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Не применять контрацептивы с просроченным сроком годности или с нарушенной упаковкой.



Разработал

Главный врач

МУЗ «Родильный дом»

Титоров В.Д.

Печенкина Н.Л.