

Копия

Копия верна

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор ЗАО «Вектор»

Резин В.П.

«02» ноября 2010 г.

М.п.



Руководство по эксплуатации контрацептивов внутриматочных кольцеобразных «Вектор»

1. НАЗНАЧЕНИЕ.

Контрацептивы внутриматочные кольцеобразные «Вектор» предназначены для предупреждения нежелательной беременности у женщин.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Контрацептив внутриматочный кольцеобразный «Вектор» состоит из пластмассового каркаса кольцеобразной формы, внутри которого имеется стержень. На стержень навивается спираль из золотой или осеребрённой медной проволоки или из сочетания осеребрённой медной и медной проволоки. Габаритные размеры контрацептива – Ø 24 мм. К нижней части каркаса в месте соединения стержня с кольцом крепится монополь полипропиленовая. Контрацептив комплектуется приспособлением для его установки, которое представляет собой трубку диаметром 4 мм и длиной 195 мм, изготовленную из полипропилена.

3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ.

Противопоказания к применению:

- воспаление гениталий любой локализации;
- доброкачественные и злокачественные опухоли гениталий;
- недавно перенесённое кровотечение, обильные продолжительные месячные;
- повышенная температура тела;
- аллергия к металлам, установленная врачом;
- пороки развития гениталий.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

1. Вскрыть упаковку при помощи ножниц и извлечь из упаковки контрацептив с трубкой.
2. Установить ограничитель на трубке на нужную глубину введения.
3. Ввести трубку с контрацептивом в матку до ограничителя.
4. Удалить трубку из матки.
5. Обрезать трансцервикальные нити контрацептива так, чтобы они выступали из шейки матки на 2 – 3 см.

5. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Контрацептивы должны храниться в заводской индивидуальной герметичной упаковке, при температуре от +40 до – 50°C

Контрацептивы транспортируются всеми видами транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Не применять контрацептивы с просроченным сроком годности или с нарушенной упаковкой.

Разработал

Титов В.Д.