

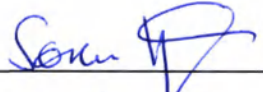


Renfert

To be submitted to the Competent Health Authorities in Russian Federation

I herewith confirm that the content of **Operating manual (Instruction for use)** for medical device «**Zahntechnische Wachse mit Zubehör**» is valid and true.

Renfert GmbH, 78247 Hilzingen Untere Giesswiesen 2, Germany is the original manufacturer of the device mentioned in the document.

(Signature): 
(Name, position): Sören Hug, CEO

(Notary marks):

On this ____ day of _____ 2018 before me, the undersigned notary public, personally appeared _____, proved to me through satisfactory evidence of identification, which was _____ to be person whose name is signed on the preceding or attached document, and acknowledged to me that he/ she signed it voluntarily for its stated purpose.

Notary Public (name) _____

(Notary stamp):



Инструкция по применению медицинского изделия

На медицинское изделие: **Воски стоматологические с принадлежностями**
Производство: «Ренферт ГмбХ», Германия, Renfert GmbH, 78247 Hilzingen
Untere Giesswiesen 2, Germany

Ноябрь 2018

Оглавление

1. Идентификация медицинского изделия	4
2. Назначение медицинского изделия	6
3. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия. Меры предосторожности. Требования к безопасности при работе.	18
4. Описание функций. Характеристики. Сведения о материалах	19
5. Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента (телом человека) 39	
6. Информация о порядке ввода медицинского изделия в эксплуатацию	47
7. Данные о маркировке медицинского изделия (этикетка на медицинском изделии и на транспортной упаковке)	48
8. Хранение. Гарантия. Транспортировка	53
9. Техническое обслуживание и ремонт	54
10. Требования к охране окружающей среды	54
11. Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия	54
12. Стерилизация и дезинфекция	55
13. Применяемые стандарты.	55
14. Список однотипных медицинских изделий (которыми можно заменить медицинское изделие)	55
15. Официальные дистрибьюторы на территории РФ	58
16. Претензии по качеству	59

1. Идентификация медицинского изделия

Наименование

Воски стоматологические с принадлежностями

Производитель

Производитель: «Ренферт ГмбХ», Германия, Renfert GmbH, 78247 Hilzingen Untere Giesswiesen 2, Germany.

Тел +49 7731 8208-914; Факс +49 7731 8208-912

E-mail: info@renfert.com

Место производства

78247 Hilzingen, Untere Giesswiesen 2, Germany.

Комплектация

Воск ГЕО (GEO wax):

- набор восков для литья ГЕО (GEO range of casting waxes set):
- пластины восковые гладкие, 0,3 мм - 4 листа/4 sheets of casting wax smooth, 0,3 mm;
- пластины восковые, с тонким рифлением, 0,35 мм - 4 листа/4 sheets of casting wax, fine stippled, 0,35 mm;
- пластины восковые, с тонким рифлением, 0,5 мм - 4 листа/4 sheets of casting wax, fine stippled, 0,5 mm;
- пластины восковые, с грубым рифлением - 4 листа/4 sheets of casting wax, coarse stippled, 0,5 mm;
- пластины восковые, 0,6 мм - 5 листов/5 sheets of casting wax, 0,6 mm;
- кламмеры восковые - 3 листа/3 sheets of Bonyhard clasps;
- кламмеры восковые для моляра - 3 листа/3 sheets of molar clasps;
- кламмеры восковые для премоляров - 3 листа/3 sheets of premolar clasps;
- кламмеры восковые кольцевые - 3 листа/3 sheets of ring clasps;
- ретенции восковые с круглыми отверстиями - 3 листа/3 sheets of grid meshes;
- бюгель нижней челюсти - 10 шт./10 pcs. of lingual bars;
- ретенции с отверстиями - 10 шт./10 pcs. of perforated retainers;
- прутики восковые, 0,8 мм - 10 шт./10 pcs. of wax rods, 0,8 mm;
- моделировочный воск для модельного литья - 30 г/30 g of sculpturing wax for model casting;
- базовый воск - 30 г/30 g of undercut wax.
- пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,30 мм; 0,35 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм;
- пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,30 мм; 0,35 мм; 0,40 мм; 0,50 мм; 0,60 мм;
- пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,30 мм; 0,35 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм;
- пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,30 мм; 0,35 мм; 0,40 мм; 0,50 мм; 0,6 мм;
- воск литейный ГЕО (GEO casting wax) - 0,3 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм;
- воск ГЕО для модельного литья прозрачный бирюзовый (GEO model casting wax);
- воск ГЕО для модельного литья непрозрачный бирюзовый (GEO model casting wax, hard/opaque);
- кламмеры восковые ГЕО для премоляров (GEO premolar clasps);
- кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для премоляров (GEO premolar clasps, self-adhesive);

- кламмеры восковые ГЕО для моляров (GEO molar clasps);
- кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для моляров (GEO molar clasps, self-adhesive);
- кламмеры восковые ГЕО кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight);
- кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight, self-adhesive);
- кламмеры восковые ГЕО кольцевые (GEO ring clasps);
- кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые (GEO ring clasps, self-adhesive);
- кламмеры восковые ГЕО Bonyhard (GEO Bonyhard clasps);
- кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся Bonyhard (GEO Bonyhard clasps, self-adhesive);
- ретенции восковые ГЕО грубые (GEO retention meshes, coarse);
- ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся грубые (GEO retention meshes, coarse, self-adh);
- ретенции восковые ГЕО мелкие (GEO retention meshes, fine);
- ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся мелкие (GEO retention meshes, fine, self-adhes);
- ретенции восковые ГЕО решетки диагональные (GEO Diagonal grid, turquoise) - 70x70 мм;
- ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся диагональные (GEO retention grids, diagonal, self-adh);
- ретенции восковые ГЕО с круглыми отверстиями (GEO grid meshes);
- ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся с круглыми отверстиями (GEO grid meshes, self-adhesive);
- ретенции восковые ГЕО перемычки (GEO bar retainers);
- ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся перемычки (GEO bar retainers, self-adhesive);
- ретенции восковые ГЕО с прямыми отверстиями (GEO perforated wax retainers);
- ретенции восковые ГЕО со смещенными отверстиями (GEO perforated wax retainers, staggered);
- бюгеля восковые ГЕО для нижней челюсти (GEO L-jaw bar);
- прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) - 0,6 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм;
- проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм;
- проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм;
- проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм;
- воск погружной GEO-DIP желтый (GEO-DIP dipping wax, yellow);
- воск погружной GEO-DIP оранжевый (GEO-DIP dipping wax, orange);
- воск погружной GEO-DIP зеленый (GEO-DIP dipping wax, green);
- воск для поднутрений (GEO block-out wax);
- воск клеевой розовый прозрачный (GEO Sticky wax pink transparent);
- набор звеньев восковых (GEO-PONTICS, Wax pontics):
- звенья восковые ГЕО, верх справа, боковые зубы 14-17, 10 шт./GEO-PONTICS, Wax pontics 14-17, 10 pcs;
- звенья восковые ГЕО, верх фронтальные зубы 12-22, 10 шт./GEO-PONTICS, Wax pontics 12-22, 10 pcs;
- звенья восковые ГЕО, верх слева, боковые зубы, 24-27, 10 шт./GEO-PONTICS, Wax pontics 24-27, 10 pcs;
- звенья восковые ГЕО, низ фронтальный зубы 42-32, 10 шт./GEO-PONTICS, Wax pontics 42-32, 10 pcs;
- звенья восковые ГЕО, низ справа, боковые зубы 44-47, 10 шт./GEO-PONTICS, Wax pontics 44-47, 10 pcs.
- звенья восковые ГЕО, верх справа, боковые зубы 14-17 (GEO-PONTICS, Wax pontics 14-17);
- звенья восковые ГЕО, верх фронтальные зубы 12-22 (GEO-PONTICS, Wax pontics 12-22);

- звенья восковые ГЕО, верх слева, боковые зубы 24-27 (GEO-PONTICS, Wax pontics 24-27);
- звенья восковые ГЕО, низ слева, боковые зубы 34-37 (GEO-PONTICS, Wax pontics 34-37);
- звенья восковые ГЕО, низ фронтальные зубы 42-32 (GEO-PONTICS, Wax pontics 42-32);
- звенья восковые ГЕО, низ справа, боковые зубы 44-47 (GEO-PONTICS, Wax pontics 44-47).
- балки восковые литейные ГЕО (GEO Casting sprues, triangle);
- груши восковые ГЕО литейные (GEO Pear-shaped wax casting sprues).

Принадлежности:

1. Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой (PICOSILK Spray) 75 мл.
2. Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой, дополнительная бутылка (PICOSILK refill bottle) 500 мл.

2. Назначение медицинского изделия

Потенциальные пользователи.

Область применения: стоматология.

Медицинское изделие используется в зуботехнических лабораториях зубными техниками. Обработка воска происходит в помещении при комнатной температуре в диапазоне 15°C – 35°C.

При изготовлении готового протеза воск легко без остатка удалется кипящей водой из гипсовых форм, не оставляет следов на фарфоровых и пластмассовых зубах и не окрашивает пластмассу протеза.

Назначение медицинского изделия

Медицинское изделие является термопластичным материалом, для использования в зуботехнических лабораториях для моделирования несъемных зубных протезов: коронок, промежуточной части мостовидных протезов, штифтовых зубов, фасеток, вкладок, получаемых методом литья по выполняемым моделям.

Наименование	Артикул/Идентификатор	Назначение/Принцип действия
пластины восковые гладкие, 0,3 мм 4 листа/4 sheets of casting wax smooth, 0,3 mm;	#6330000 GEO Modellguß-Sortiment/Воски стоматологические: Набор восков для литья ГЕО (GEO range of casting waxes set)	Лоток с наиболее важными готовыми деталями GEO в ассортименте для рационального моделирования отливок.
пластины восковые, с тонким рифлением, 0,35 мм 4 листа/4 sheets of casting wax, fine stippled, 0,35 mm;		
пластины восковые, с тонким рифлением, 0,5 мм 4 листа/4 sheets of casting wax, fine stippled, 0,5 mm;		
пластины восковые, с грубым рифлением 4		

листа/4 sheets of casting wax, coarse stippled, 0,5 mm;		
пластины восковые, 0,6 мм 5 листов/5 sheets of casting wax, 0,6 mm;		
кламмеры восковые 3 листа/3 sheets of Bonyhard clasps;		
кламмеры восковые для моляра 3 листа/3 sheets of molar clasps;		
кламмеры восковые для премоляров 3 листа/3 sheets of premolar clasps;		
кламмеры восковые кольцевые 3 листа/3 sheets of ring clasps;		
ретенции восковые с круглыми отверстиями 3 листа/3 sheets of grid meshes;		
бюгель нижней челюсти/of lingual bars;		
ретенции с отверстиями/of perforated retainers;		
прутики восковые, 0,8 мм/of wax rods, 0,8 mm;		
моделировочный воск для модельного литья 30 г/30 g of sculpturing wax for model casting;		
базовый воск 30 г/30 g of undercut wax.		
пластины восковые GEO гладкие (GEO casting wax, smooth) 0,30 мм; 0,35 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм;	#6403030 GEO Gusswachs glatt, 0,30 mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,3 мм #6403035 GEO Gusswachs glatt 0,35mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,35 мм #6403040 GEO Gusswachs glatt 0,40mm 15 Tfl./ Пластины восковые GEO гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,4 мм #6403050 GEO Gusswachs glatt 0,50mm 15 Tfl. /Пластины восковые GEO гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,5 мм	Воск в пластинах с гладкой поверхностью. Гладкий воск в пластинах для моделирования формованных литейных оснований верхней челюсти.

	#6403060 GEO Gusswachs glatt 0,60mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,6 мм	
пластины восковые GEO с тонким рифлением (GEO casting wax, fine- stippled) 0,30 мм; 0,35 мм; 0,40 мм; 0,50 мм; 0,60 мм;	#6413030 GEO Gusswachs feingenarbt 0,30mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,3 мм	Воск в пластинах с мелким рифлением. Зернистый воск в пластинах для моделирования формованных литейных оснований верхней челюсти.
	#6413035 GEO Gusswachs feingenarbt 0,35mm 15 Tfl./ Пластины восковые GEO с тонким рифлением (GEO casting wax, fine- stippled) - 0,35 мм	
	#6413040 GEO Gusswachs feingenarbt 0,40mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,4 мм	
	#6413050 GEO Gusswachs feingenarbt 0,50mm 15 Tfl./ластины восковые GEO с тонким рифлением (GEO casting wax, fine- stippled) - 0,5 мм	
	#6413060 GEO Gusswachs feingenarbt 0,60mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,6 мм	
пластины восковые GEO с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse- stippled) 0,30 мм; 0,35 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм;	#6433030 GEO Gusswachs grobgenarbt 0,30mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,3 мм	Воск в пластинах с грубым рифлением. Зернистый воск в пластинах для моделирования формованных литейных оснований верхней челюсти.
	#6433035 GEO Gusswachs grobgenarbt 0,35mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,35 мм	
	#6433040 EO Gusswachs grobgenarbt 0,40mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,4 мм	
	#6433050 GEO Gusswachs grobgenarbt 0,50mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,5 мм	
	#6433060 GEO Gusswachs grobgenarbt 0,60mm 15	

	Tfl./Пластины восковые GEO с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,6 мм	
пластины восковые GEO с прожилками (GEO casting wax, veined) 0,30 мм; 0,35 мм; 0,40 мм; 0,50 мм; 0,6 мм;	#6443030 GEO Gusswachs geader 0,30mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,3 мм #6443035 GEO Gusswachs geader 0,35mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,35 мм #6443040 GEO Gusswachs geader 0,40mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,4 мм #6443050 GEO Gusswachs geader 0,50mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,5 мм #6443060 GEO Gusswachs geader 0,60mm 15 Tfl./Пластины восковые GEO с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,6 мм	Воск в пластинах с прожилками. Воск в пластинах с прожилками для моделирования формованных литейных оснований верхней челюсти.
воск литейный GEO (GEO casting wax) 0.3 мм; 0.4 мм; 0.5 мм; 0.6 мм;	#4453003 GEO CASTING-WACHS 0,3mm 32 Tfl./Воск стоматологический литейный GEO (GEO casting wax) - 0,3 мм #4453004 GEO CASTING-WACHS 0,4mm 32 Tfl./Воск стоматологический литейный GEO (GEO casting wax) - 0,4 мм #4453005 GEO CASTING-WACHS 0,5mm32 Tfl./Воск стоматологический литейный GEO (GEO casting wax) - 0,5 мм #4453006 GEO CASTING-WACHS 0,6mm 32 Tfl./Воск стоматологический литейный GEO (GEO casting wax) - 0,6 мм	Самоклеящийся подготовительный воск для прокладывания опор. Для определенной глубины пустот в области опоры.
воск GEO для модельного литья прозрачный бирюзовый (GEO model casting wax);	#6490000 GEO Modellgusswachs 75g/Воск стоматологический GEO для модельного литья прозрачный бирюзовый (GEO model casting wax)	Моделировочный воск для формовой отливки. Для моделирования формованных пропорций при литье моделей из паковочной массы. Точное соответствие восковой модели по готовым частям.
воск GEO для модельного литья непрозрачный бирюзовый (GEO model	#6491000 GEO Modellgusswachs hart opak 75g/Воск стоматологический GEO для	Моделировочный воск для формовой отливки. Для моделирования

casting wax, hard/opaque);	модельного литья непрозрачный бирюзовый (GEO model casting wax, hard/opaque)	формованных пропорций при литье моделей из паковочной массы. Точное соответствие восковой модели по готовым частям.
кламмеры восковые ГЕО для премоляров (GEO premolar clasps);	#6883002 GEO Prämolaren-Klammern 10TFL/Кламмеры восковые ГЕО для премоляров (GEO premolar clasps)	Анатомические кламмерные профили конической формы, изготовленные из легко адаптируемого воска. Предварительно сформированные восковые кламмерные профили в качестве инструмента для более точного и быстрого моделирования при литье под давлением.
кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для премоляров (GEO premolar clasps, self-adhesive);	#6383002 GEO Prämolaren-Klammern selbstklebend 10 Stk./Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для премоляров (GEO premolar clasps, self-adhesive)	Самоклеящиеся восковые кламмерные профили. Анатомические кламмерные профили конической формы, изготовленные из легко адаптируемого воска. Предварительно сформированные восковые кламмерные профили в качестве инструмента для более точного и быстрого моделирования при литье под давлением.
кламмеры восковые ГЕО для моляров (GEO molar clasps);	#6883003 GEO Molaren-Klammern 10 TFL/Кламмеры восковые ГЕО для моляров (GEO molar clasps)	Анатомические кламмерные профили конической формы, изготовленные из легко адаптируемого воска. Предварительно сформированные восковые кламмерные профили в качестве инструмента для более точного и быстрого моделирования при литье под давлением.
кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для моляров (GEO molar clasps, self-adhesive);	#6383003 GEO Molaren-Klammern selbstklebend 10 Stk./Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для моляров (GEO molar clasps, self-	Самоклеящиеся восковые кламмерные профили. Анатомические

	adhesive)	кламмерные профили конической формы, изготовленные из легко адаптируемого воска. Предварительно сформированные восковые кламмерные профили в качестве инструмента для более точного и быстрого моделирования при литье под давлением.
кламмеры восковые GEO кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight);	#6883004 GEO Ring-Klammern gerade 10TFL/Кламмеры восковые GEO кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight)	Анатомические кламмерные профили конической формы, изготовленные из легко адаптируемого воска. Предварительно сформированные восковые кламмерные профили в качестве инструмента для более точного и быстрого моделирования при литье под давлением
кламмеры восковые GEO самоклеящиеся кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight, self-adhesive);	#6383004 GEO Ringklammern gerade selbstklebend 10 Stk./Кламмеры восковые GEO самоклеящиеся кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight, self-adhesive)	Самоклеящиеся восковые кламмерные профили. Анатомические кламмерные профили конической формы, изготовленные из легко адаптируемого воска. Предварительно сформированные восковые кламмерные профили в качестве инструмента для более точного и быстрого моделирования при литье под давлением.
кламмеры восковые GEO кольцевые (GEO ring clasps);	#6883005 GEO Ring-Klammern 10 TFL/Кламмеры восковые GEO кольцевые (GEO ring clasps)	Анатомические кламмерные профили конической формы, изготовленные из легко адаптируемого воска. Предварительно сформированные восковые кламмерные профили в качестве инструмента для более точного и быстрого

		моделирования при литье под давлением.
кламмеры восковые GEO самоклеящиеся кольцевые (GEO ring clasps, self-adhesive);	#6383005 GEO Ringklammern selbstklebend 10 Stk./Кламмеры восковые GEO самоклеящиеся кольцевые (GEO ring clasps, self-adhesive)	Самоклеящиеся восковые кламмерные профили. Анатомические кламмерные профили конической формы, изготовленные из легко адаптируемого воска. Предварительно сформированные восковые кламмерные профили в качестве инструмента для более точного и быстрого моделирования при литье под давлением.
кламмеры восковые GEO Bonyhard (GEO Bonyhard clasps);	#6883010 GEO BONYHARD-Klammern 10 TFL/Кламмеры восковые GEO Bonyhard (GEO Bonyhard clasps)	Анатомические кламмерные профили конической формы, изготовленные из легко адаптируемого воска. Предварительно сформированные восковые кламмерные профили в качестве инструмента для более точного и быстрого моделирования при литье под давлением.
кламмеры восковые GEO самоклеящиеся Bonyhard (GEO Bonyhard clasps, self-adhesive);	#6383010 GEO BONYHARD-Klammern selbstklebend 10 Stk./Кламмеры восковые GEO самоклеящиеся Bonyhard (GEO Bonyhard clasps, self-adhesive)	Анатомические кламмерные профили конической формы, изготовленные из легко адаптируемого воска. Предварительно сформированные восковые кламмерные профили в качестве инструмента для более точного и быстрого моделирования при литье под давлением.
ретенции восковые GEO грубые (GEO retention meshes, coarse);	#6883007 GEO Retentionsgitter grob 20 Tfl./Ретенции восковые GEO грубые (GEO retention meshes, coarse)	Готовые восковые ретенции для воскового моделирования при формованном литье.
ретенции восковые GEO самоклеящиеся грубые (GEO retention meshes, coarse, self-adh);	#6383007 GEO Retentionsgitter grob selbstklebend 20 Tfl./Ретенции восковые GEO самоклеящиеся грубые (GEO retention meshes, coarse, self-adh);	Самоклеящиеся готовые ретенционные решетки из воска. Восковые ретенции

	coarse, self-adh)	идеально подходят для верхней челюсти.
ретенции восковые GEO мелкие (GEO retention meshes, fine);	#6883008 GEO Retentionsgitter fein 20 Tfl./Ретенции восковые GEO мелкие (GEO retention meshes, fine)	Готовые восковые ретенции для воскового моделирования при формованном литье.
ретенции восковые GEO самоклеящиеся мелкие (GEO retention meshes, fine, self-adhes);	#6383008 GEO Retentionsgitter fein selbstklebend 20 Tfl./Ретенции восковые GEO самоклеящиеся мелкие (GEO retention meshes, fine, self-adhes)	Самоклеящиеся готовые ретенционные решетки из воска. Восковые ретенции идеально подходят для верхней челюсти.
ретенции восковые GEO решетки диагональные (GEO Diagonal grid, turquoise) 70x70 мм;	#6883011 GEO Retentionsgitter diag. türk. 70x70mm 20 Stück/Ретенции восковые GEO решетки диагональные (GEO Diagonal grid, turquoise) -70x70 мм	Готовая ретенционная решетка из воска. Идеально подходит для восковой ретенции на верхней челюсти.
ретенции восковые GEO самоклеящиеся диагональные (GEO retention grids, diagonal, self-adh);	#6383011 Retentionsgitter diag. türk. selbstkl. 20 Tfl./Ретенции восковые GEO самоклеящиеся диагональные (GEO retention grid, diagonal, self-adh)	Самоклеящиеся готовые ретенционные решетки из воска. Восковые ретенции идеально подходят для верхней челюсти.
ретенции восковые GEO с круглыми отверстиями (GEO grid meshes);	#6883009 GEO Rundlochgitter 20 Tfl./Ретенции восковые GEO с круглыми отверстиями (GEO grid meshes)	Готовые восковые ретенции для воскового моделирования при формованном литье.
ретенции восковые GEO самоклеящиеся с круглыми отверстиями (GEO grid meshes, self-adhesive);	#6383009 GEO Rundlochgitter selbstklebend 20 Tfl./Ретенции восковые GEO самоклеящиеся с круглыми отверстиями (GEO grid meshes, self-adhesive)	Самоклеящиеся готовые ретенционные решетки из воска. Восковые ретенции идеально подходят для верхней челюсти.
ретенции восковые GEO перемычки (GEO bar retainers);	#6883006 GEO Stegretentionen 10 TFL/Ретенции восковые GEO перемычки (GEO bar retainers)	Готовые восковые ретенции для воскового моделирования при формованном литье.
ретенции восковые GEO самоклеящиеся перемычки (GEO bar retainers, self-adhesive);	#6383006 GEO Stegretentionen selbstklebend 10 Stk./Ретенции восковые GEO самоклеящиеся перемычки (GEO bar retainers, self-adhesive)	Самоклеящиеся восковые ретенции. Готовые восковые ретенции для моделирования формованного литья. Восковые ретенции идеально подходят для нижней челюсти.
ретенции восковые GEO с прямыми отверстиями (GEO perforated wax retainers);	#6643000 GEO Lochretentionen 40 Stk./Ретенции восковые GEO с прямыми отверстиями (GEO perforated wax retainers)	Готовые восковые ретенции для технологий формованного литья. Идеально подходят для
ретенции восковые GEO	#6623000 GEO Lochretentionen	нижнечелюстных

со смещенными отверстиями (GEO perforated wax retainers, staggered);	versetzt 40 Stk./Петенции восковые ГЕО со смещенными отверстиями (GEO perforated wax retainers, staggered)	ретенций.
бюгеля восковые ГЕО для нижней челюсти (GEO L-jaw bar);	#6673042 GEO Unterkieferbügel 65 G/Бюгеля восковые ГЕО для нижней челюсти (GEO L-jaw bar)	Профилированные детали для нижнечелюстных бюгелей. Стандартные размеры обтекаемой формы.
прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 0,6 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм;	#6683006 GEO Wachsdraht in Stangen 0,6mm (12g)/Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 0,6 мм	Литниковый воск средней твердости, хорошо деформируемый, для моделирования при формованном литье.
	#6683008 GEO Wachsdraht in Stangen 0,8mm 25 G/Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 0,8 мм	
	#6683010 GEO Wachsdraht in Stangen 1,0mm 37 G/Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 1,0 мм	
	#6683012 GEO Wachsdraht in Stangen 1,2mm 50 G/Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 1,2 мм	
проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм;	#6762020 GEO Wachsdraht türkis hart 2,0mm 250 G/Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 2,0 мм	Твердый воск. Литниковый воск. Идеально подходит в качестве литейного канала или литейных балок для технологий литья и прессовки.
	#6762025 GEO Wachsdraht türkis hart 2,5mm 250 G/Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 2,5 мм	
	#6762030 GEO Wachsdraht türkis hart 3,0mm 250 G/Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 3,0 мм	
	#6762035 GEO Wachsdraht türkis hart 3,5mm 250 G/Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 3,5 мм	
	#6762040 GEO Wachsdraht türkis hart 4,0mm 250 G/Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 4,0 мм	

	#6762050 GEO Wachsdraht türkis hart 5,0mm 250 G/Проволока восковая GEO твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 5,0 мм	
проволока восковая GEO, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм, 5,0 мм;	#6783020 GEO Wachsdraht mittelhart blau 2,0mm 250 G/Проволока восковая GEO, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 2,0 мм	Воск средней твердости. Литниковый воск. Идеально подходит в качестве литейного канала или литейных балок для технологий литья и прессовки.
	#6783025 GEO Wachsdraht mittelhart blau 2,5mm 250 G/Проволока восковая GEO, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 2,5 мм	
	#6783030 GEO Wachsdraht mittelhart blau 3,0mm 250 G/Проволока восковая GEO, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 3,0 мм	
	#6783035 GEO Wachsdraht mittelhart blau 3,5mm 250 G/Проволока восковая GEO, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 3,5 мм	
	#6783040 GEO Wachsdraht mittelhart blau 4,0mm 250 G/Проволока восковая GEO, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 4,0 мм	
	#6783050 GEO Wachsdraht mittelhart blau 5,0mm 250 G/Проволока восковая GEO, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 5,0 мм	
проволока восковая GEO экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм;	#6751020 GEO Wachsdraht extrahart 2,0mm 250 G/Проволока восковая GEO экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 2,0 мм	Экстра твёрдый воск. Литниковый воск. Идеально подходит в качестве литейного канала или литейных балок для технологий литья и прессовки.
	#6751025 GEO Wachsdraht extrahart 2,5mm 250 G/Проволока восковая GEO экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 2,5 мм	

	#6751030 GEO Wachsdraht extrahart 3,0mm 250 G/Проволока восковая GEO экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 3,0 мм #6751035 GEO Wachsdraht extrahart 3,5mm 250 G/Проволока восковая GEO экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 3,5 мм #6751040 GEO Wachsdraht extrahart 4,0mm 250 G/Проволока восковая GEO экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 4,0 мм #6751050 GEO Wachsdraht extrahart 5,0mm 250 G/Проволока восковая GEO экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 5,0 мм	
воск погружной GEO-DIP желтый (GEO-DIP dipping wax, yellow);	#4823000 GEO-DIP Tauchwachs, gelb 200 G/Воск стоматологический погружной GEO-DIP желтый (GEO-DIP dipping wax, yellow)	Практичные гранулы Погружного воска для обработки с помощью погружных восковых устройств. Для производства восковых колпачков.
воск погружной GEO-DIP оранжевый (GEO-DIP dipping wax, orange);	#4823200 GEO-DIP Tauchwachs, orange 200 G/Воск стоматологический погружной GEO-DIP оранжевый (GEO-DIP dipping wax, orange)	
воск погружной GEO-DIP зеленый (GEO-DIP dipping wax, green);	#4823300 GEO-DIP Tauchwachs, grün 200 G/Воск стоматологический: Воск погружной GEO-DIP зелёный (GEO-DIP dipping wax, green)	
воск для поднутрений (GEO block-out wax);	#6500000 GEO Ausblockwachs 75g/Воск стоматологический для поднутрений (GEO block-out wax)	Для блокировки областей подрезки, полостей или дефектов на гипсовых моделях при формованном литье и коронковых техниках.
воск клеевой розовый прозрачный (GEO Sticky wax pink transparent);	#4881000 GEO Klebewachs pink-transparent 75g/Воск стоматологический клеевой розовый прозрачный (GEO Sticky wax pink transparent)	Специальный воск с высокой адгезией. Идеально подходит для скрепления гипсовых, пластмассовых и металлических деталей.
звенья восковые GEO, верх справа, боковые зубы 14-17/GEO-PONTICS, Wax pontics	#5000000 GEO-PONTICS, Wachszwischenglieder (6 x 10Stk.)/Набор звеньев восковых (GEO-PONTICS, Wax pontics)	Фасованные восковые промежуточные звенья для производства передних и боковых

14-17; звенья восковые GEO, верх фронтальные зубы 12-22/GEO-PONTICS, Wax pontics 12-22;		зубных мостов. Анатомическая конструкция зубчатых ядер в воске. Восковые промежуточные звенья используются для облегчения при изготовлении моделей мостов.
звенья восковые GEO, верх слева, боковые зубы, 24-27/GEO- PONTICS, Wax pontics 24-27;		
звенья восковые GEO, низ фронтальный зубы 42-32/GEO-PONTICS, Wax pontics 42-32;		
звенья восковые GEO, низ справа, боковые зубы 44-47/GEO-PONTICS, Wax pontics 44-47,		
звенья восковые GEO, верх справа, боковые зубы 14-17 (GEO- PONTICS, Wax pontics 14-17);	#5000100 GEO-PONTICS, Wachszwischenglieder 14-17 (20 Stk.)/Звенья восковые GEO, верх справа, боковые зубы 14-17 (GEO- PONTICS, Wax pontics 14-17)	
звенья восковые GEO, верх фронтальные зубы 12-22 (GEO-PONTICS, Wax pontics 12-22);	#5000200 GEO-PONTICS, Wachszwischenglieder 12-22 (20 Stk.)/Звенья восковые GEO, верх фронтальные зубы 12-22 (GEO- PONTICS, Wax pontics 12-22)	
звенья восковые GEO, верх слева, боковые зубы 24-27 (GEO-PONTICS, Wax pontics 24-27);	#5000300 GEO-PONTICS, Wachszwischenglieder 24-27 (20 Stk.)/Звенья восковые GEO, верх слева, боковые зубы 24-27 (GEO- PONTICS, Wax pontics 24-27)	
звенья восковые GEO, низ слева, боковые зубы 34-37 (GEO-PONTICS, Wax pontics 34-37);	#5000400 GEO-PONTICS, Wachszwischenglieder 34-37 (20 Stk.)/Звенья восковые GEO, низ слева, боковые зубы 34-37 (GEO- PONTICS, Wax pontics 34-37)	
звенья восковые GEO, низ фронтальные зубы 42-32 (GEO-PONTICS, Wax pontics 42-32);	#5000500 GEO-PONTICS, Wachszwischenglieder 42-32 (20 Stk.)/Звенья восковые GEO, низ фронтальные зубы 42-32 (GEO- PONTICS, Wax pontics 42-32)	
звенья восковые GEO, низ справа, боковые зубы 44-47 (GEO-PONTICS, Wax pontics 44-47).	#5000600 GEO-PONTICS, Wachszwischenglieder 47-44 (20 Stk.)/Звенья восковые GEO, низ справа, боковые зубы 44-47 (GEO- PONTICS, Wax pontics 44-47)	
балки восковые литейные GEO (GEO Casting sprues, triangle);	#6803000 GEO Triangel-Gussbalken 115g/Балки восковые литейные GEO (GEO Casting sprues,triangle)	Готовые литейные каналы в форме балок для эффективного

		прикрепления восковой структуры.
груши восковые GEO литейные (GEO Pear-shaped wax casting sprues).	#5011100 GEO Wachs-Gussbirnen 200 Stk./Груши восковые GEO литейные (GEO Pear-shaped wax casting sprues)	Усиленный воск Литой штифт с грушевидным эмалевым резервуаром. Для использования в качестве литейных каналов при восковом моделировании.
Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой (PICOSILK Spray) 75 мл.	#15500000 PICOSILK-Spray 75 ML/Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой (PICOSILK Spray) 75 мл	Для снятия поверхностного напряжения восковых моделей коронок, мостов и частичных протезов.
Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой, дополнительная бутылка (PICOSILK refill bottle) 500 мл.	#15500100 PICOSILK Nachfüllflasche 500 ML/Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой, дополнительная бутылка (PICOSILK refill bottle) 500 мл	Для снятия поверхностного напряжения восковых моделей коронок, мостов и частичных протезов.

3. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия. Меры предосторожности. Требования к безопасности при работе.

Медицинское изделие не используется на пациентах. Медицинское изделие относится к группе изделий для профессионального применения зубными техниками в зуботехнических лабораториях. Восковое моделирование с использованием восков стоматологических является одним из основных этапов создания зубных протезов.

Медицинское изделие не имеет подтвержденных побочных действий.

Необходимо следовать технике безопасности:

Воски:

Указание на опасность: Горячий воск может вызывать ожоги. Следует избегать контакта с кожей, слизистыми оболочками и глазами. Не вдыхать пары при нагревании.

При нагревании воск становится жидким, может стекать по каплям или проливаться.

Picosilk:

Указание на опасность: Легко воспламеняется в жидком и газообразном состоянии. Вызывает серьезное раздражение глаз.

Меры предосторожности: Хранить вдали от источников тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить при использовании. Не вдыхать пары/аэрозольную взвесь. Использовать защитные перчатки и средство для защиты глаз/лица. Если раздражение глаз сохраняется, обратиться к врачу.

Обстоятельства, при которых необходимо проконсультироваться с врачом.
Не применимо.

Контакт с пользователем/пациентом.

Контакт медицинского изделия с пользователем не предусмотрен. Тем не менее, такой контакт возможен. Специалисты в лаборатории должны проверить ингредиенты на возможные аллергические реакции перед использованием. Соблюдение гигиены труда позволит избежать контакта с медицинским изделием. Вытяжная вентиляция предотвращает образование высоких концентраций 2-пропанола при использовании Picosilk. При правильном использовании контакт медицинского изделия с пациентом и пользователем исключается.

Риски.

Медицинское изделие по степени потенциального риска применения относится к классу 1 согласно требованиям ГОСТ 31508.

По показателям безопасности медицинское изделие относится к 4-му классу опасности (вещества малоопасные) согласно требованиям ГОСТ 12.1.007.

4. Описание функций. Характеристики. Сведения о материалах

Принцип действия

Принцип действия медицинского изделия основан на термопластичных свойствах изделия.

Использование с другими медицинскими устройствами.

Медицинское изделие служит для создания основы для воскового моделирования. Используется с электрическими воскотопками, водяными банями, муфельными печами и лампами накаливания.

Медицинское изделие может наноситься с помощью электрошпателя. Зубной техник имеет возможность выбирать необходимую насадку для электрошпателя. Также зубной техник может использовать для моделирования газовые горелки и ручной инструмент.

Застывший воск корригируется с помощью лезвия или других зуботехнических моделировочных инструментов и выравнивается кисточкой для воска.

Электромагнитная совместимость.

Не применимо.

Загрязнения

Не применимо.

Описание функций

Наименование	Функция/Описание
пластины восковые гладкие, 0,3 мм 4 листа/4 sheets of casting wax smooth, 0,3 mm;	Лоток с наиболее важными готовыми деталями GEO в ассортименте. Наиболее важные восковые детали для рационального моделирования формованных отливок.
пластины восковые, с тонким рифлением, 0,35 мм 4 листа/4 sheets of casting wax, fine stippled, 0,35 mm;	
пластины восковые, с тонким рифлением, 0,5 мм 4 листа/4 sheets of casting wax, fine stippled, 0,5 mm;	
пластины восковые, с грубым рифлением 4 листа/4 sheets of casting wax, coarse stippled, 0,5 mm;	

пластины восковые, 0,6 мм 5 листов/5 sheets of casting wax, 0,6 mm;	
кламмеры восковые 3 листа/3 sheets of Bonyhard clasps;	
кламмеры восковые для моляра 3 листа/3 sheets of molar clasps;	
кламмеры восковые для премоляров 3 листа/3 sheets of premolar clasps;	
кламмеры восковые кольцевые 3 листа/3 sheets of ring clasps;	
ретенции восковые с круглыми отверстиями 3 листа/3 sheets of grid meshes;	
бюгель нижней челюсти/of lingual bars;	
ретенции с отверстиями/of perforated retainers;	
прутики восковые, 0,8 мм/of wax rods, 0,8 mm;	
моделировочный воск для модельного литья 30 г/30 g of sculpturing wax for model casting;	
базовый воск 30 г/30 g of undercut wax.	
пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) 0,30 мм; 0,35 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм;	Воск для моделирования формованных литейных оснований на верхней челюсти. Восковая пластина отрезается по нужному размеру модели литейной основы. Прозрачность литейного воска облегчает правильную нарезку. При тщательном наложении и подгонке литейный воск наносится на восковую модель формованного литейного основания.
пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) 0,30 мм; 0,35 мм; 0,40 мм; 0,50 мм; 0,60 мм;	Литейный воск с мелким рифлением для моделирования формованных литейных оснований на верхней челюсти. Восковая пластина отрезается по нужному размеру модели литейной основы. Прозрачность литейного воска облегчает правильную нарезку. При тщательном наложении и подгонке литейный воск наносится на восковую модель формованного литейного основания.
пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) 0,30 мм; 0,35 мм; 0,4 мм; 0,5 мм; 0,6 мм;	Литейный воск с грубым рифлением. Литейный воск с грубым рифлением для моделирования формованных литейных оснований на верхней челюсти. Восковая пластина отрезается по нужному размеру модели литейной основы.

	Прозрачность литейного воска облегчает правильную нарезку. При тщательном наложении и подгонке литейный воск наносится на восковую модель формованного литейного основания.
пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) 0,30 мм; 0,35 мм; 0,40 мм; 0,50 мм; 0,6 мм;	Литейный воск с прожилками. Литейный воск с прожилками для моделирования формованных литейных оснований на верхней челюсти. Восковая пластина отрезается по нужному размеру модели литейной основы. Прозрачность литейного воска облегчает правильную нарезку. При тщательном наложении и подгонке литейный воск наносится на восковую модель формованного литейного основания.
воск литейный ГЕО (GEO casting wax) 0.3 мм; 0.4 мм; 0.5 мм; 0.6 мм;	Для определенной глубины пустот в области опоры. Для этого самоклеющийся воск для отливки моделей можно наносить на седловидные поверхности моделей на большие площади и осуществить подгонку. При помощи воска для отливки можно плучить определенную полость пластмассовых гнезд. Эффект адгезии предотвращает утечку дублирующего силикона при дублировании
воск ГЕО для модельного литья прозрачный бирюзовый (GEO model casting wax); воск ГЕО для модельного литья непрозрачный бирюзовый (GEO model casting wax, hard/opaque);	Для быстрого и точного воскового моделирования отлитой под давлением модели из паковочной массы. Воск распределяется горячим инструментом. Точное моделирование и соединение кламмеров, восковых пластин или ретенций на моделях из паковочной массы.
кламмеры восковые ГЕО для премоляров (GEO premolar clasps); кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для премоляров (GEO premolar clasps, self-adhesive); кламмеры восковые ГЕО для моляров (GEO molar clasps); кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для моляров (GEO molar clasps, self-adhesive);	Предварительно сформированные восковые кламмерные профили в качестве инструмента для более точного и быстрого моделирования при литье под давлением Для этого восковые кламмерные профили размещаются на моделях из паковочной массы и адаптируются.

кламмеры восковые ГЕО кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight);	При помощи горячего инструмента восковые кламмерные профили соединяются с моделями из паковочной массы.
кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight, self-adhesive);	
кламмеры восковые ГЕО кольцевые (GEO ring clasps);	
кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые (GEO ring clasps, self-adhesive);	
кламмеры восковые ГЕО Bonyhard (GEO Bonyhard clasps);	
кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся Bonyhard (GEO Bonyhard clasps, self-adhesive);	Наложить Ретенции с отверстиями на седловидную область модели из паковочной массы. Затем склеить при помощи горячего инструмента отлитую восковую модель с моделью из паковочной массы.
ретенции восковые ГЕО грубые (GEO retention meshes, coarse);	
ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся грубые (GEO retention meshes, coarse, self-adh);	
ретенции восковые ГЕО мелкие (GEO retention meshes, fine);	
ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся мелкие (GEO retention meshes, fine, self-adhes);	
ретенции восковые ГЕО решетки диагональные (GEO Diagonal grid, turquoise) 70x70 мм;	
ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся диагональные (GEO retention grids, diagonal, self-adh);	
ретенции восковые ГЕО с круглыми отверстиями (GEO grid meshes);	
ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся с круглыми отверстиями (GEO grid meshes, self-adhesive);	
ретенции восковые ГЕО перемычки (GEO bar retainers);	
ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся перемычки (GEO bar retainers, self-adhesive);	
ретенции восковые ГЕО с прямыми отверстиями (GEO perforated wax retainers);	
ретенции восковые ГЕО со смещенными отверстиями (GEO perforated wax retainers, staggered);	
бюгеля восковые ГЕО для нижней челюсти (GEO L-jaw bar);	Присоединить балочные ретенции на седловидную область модели из паковочной массы. Затем использовать горячий инструмент для формирования модельного литья из деталей из паковочной массы.
	Наложить восковой бюгельный профиль на модель из паковочной массы. Затем использовать горячий инструмент для закрепления восковой формованной модели на модели из паковочной массы.

прутики восковые GEO (GEO wax rods) 0,6 мм; 0,8 мм; 1,0 мм; 1,2 мм;	Восковой профиль для проектирования цингулюма или индивидуальных ретенций на модели из паковочных материалов.
проволока восковая GEO твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм;	Идеально подходит в качестве литейного канала или литейной балки для литейной и прессовой техники. Для использования в качестве литейного канала или литейной балки при восковом моделировании. Литейные каналы прикрепляются к восковой модели и аккуратно распределяются при помощи горячего инструмента. Литейная балка уменьшается до длины моста и размывается литниковыми каналами.
проволока восковая GEO, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм;	Идеально подходит в качестве литейного канала или литейной балки для литейной и прессовой техники. Для использования в качестве литейного канала или литейной балки при восковом моделировании. Литейные каналы прикрепляются к восковой модели и аккуратно распределяются при помощи горячего инструмента. Литейная балка уменьшается до длины моста и размывается литниковыми каналами.
проволока восковая GEO экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) 2,0 мм; 2,5 мм; 3,0 мм; 3,5 мм; 4,0 мм; 5,0 мм;	Идеально подходит в качестве литейного канала или литейной балки для литейной и прессовой техники. Для использования в качестве литейного канала или литейной балки при восковом моделировании. Литейные каналы прикрепляются к восковой модели и аккуратно распределяются при помощи горячего инструмента. Литейная балка уменьшается до длины моста и размывается литниковыми каналами.
воск погружной GEO-DIP желтый (GEO-DIP dipping wax, yellow);	Для производства восковых колпачков в процессе погружения. Погружение: Хорошо удерживается рукой Быстрое погружение по подготовленной границе Извлечь концевую часть медленно и равномерно
воск погружной GEO-DIP оранжевый (GEO-DIP dipping wax, orange);	
воск погружной GEO-DIP зеленый (GEO-DIP dipping wax, green);	

	Непосредственно перед извлечением удерживать короткий концевик, чтобы излишки воска могли стечь.
воск для поднутрений (GEO block-out wax);	Распределение воска осуществляется горячим инструментом. Воск для блокировки хорошо прилипает к гипсовой модели и очень легко счищается.
воск клеевой розовый прозрачный (GEO Sticky wax pink transparent);	Адгезивный воск для фиксации гипсовых, пластмассовых и металлических частей.
звенья восковые GEO, верх справа, боковые зубы 14-17/GEO-PONTICS, Wax pontics 14-17;	На гипсовой модели зубов зубной техник сначала моделирует коронки из воска, которые затем соединяются с элементом моста из воска (Восковые промежуточные звенья).
звенья восковые GEO, верх фронтальные зубы 12-22/GEO-PONTICS, Wax pontics 12-22;	
звенья восковые GEO, верх слева, боковые зубы, 24-27/GEO-PONTICS, Wax pontics 24-27;	
звенья восковые GEO, низ фронтальный зубы 42-32/GEO-PONTICS, Wax pontics 42-32;	
звенья восковые GEO, низ справа, боковые зубы 44-47/GEO-PONTICS, Wax pontics 44-47,	
звенья восковые GEO, верх справа, боковые зубы 14-17 (GEO-PONTICS, Wax pontics 14-17);	
звенья восковые GEO, верх фронтальные зубы 12-22 (GEO-PONTICS, Wax pontics 12-22);	
звенья восковые GEO, верх слева, боковые зубы 24-27 (GEO-PONTICS, Wax pontics 24-27);	
звенья восковые GEO, низ слева, боковые зубы 34-37 (GEO-PONTICS, Wax pontics 34-37);	
звенья восковые GEO, низ фронтальные зубы 42-32 (GEO-PONTICS, Wax pontics 42-32);	
звенья восковые GEO, низ справа, боковые зубы 44-47 (GEO-PONTICS, Wax pontics 44-47).	
балки восковые литейные GEO (GEO Casting sprues, triangle);	Треугольные литейные балки GEO уменьшаются до длины моста и скрепляются через литниковые каналы. Эти готовые литейные балки экономят время при формировании восковой модели. После этого мосты не могут деформироваться.
груши восковые GEO литейные (GEO Pear-shaped wax casting sprues).	Литой штифт с грушевидным эмалевым резервуаром. Для использования в качестве литейных каналов при восковом моделировании. Литейные каналы прикрепляются к восковой модели и аккуратно размываются горячим инструментом.
Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой (PICOSILK Spray) 75 мл.	PICOSILK-спрей распыляется на восковые детали перед встраиванием в

	отлитые формы. PICOSILK-спрей значительно улучшает текучесть запрессованной массы, обеспечивая на литье точное воспроизведение моделируемого воскового объекта в металле.
Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой, дополнительная бутылка (PICOSILK refill bottle) 500 мл.	PICOSILK-спрей распыляется на восковые детали перед встраиванием в отлитые формы. PICOSILK-спрей значительно улучшает текучесть запрессованной массы, обеспечивая на литье точное воспроизведение моделируемого воскового объекта в металле.

Физические характеристики

Наименование	Масса гр.	Цвет	Температура использования °С	Температура затвердевания °С	Температура каплепадения °С	Конусная пенетрация 25 °С (0,1мм)
Воск погружной GEO-DIP желтый (GEO-DIP dipping wax, yellow)	200-210	Желтый	90 – 92	70-78	80-88	7-13
Воск погружной GEO-DIP оранжевый (GEO-DIP dipping wax, orange)	200-210	Оранжевый	90 – 92	70-78	80-88	7-13
Воск погружной GEO-DIP зелёный (GEO-DIP dipping wax, green)	200-210	Зеленый	90 – 92	70-78	80-88	7-13
Наименование	Кол-во шт.	Цвет	Прочность мм.	Температура затвердевания °С	Температура каплепадения °С	Конусная пенетрация 25 °С (0,1мм)
Воск литейный GEO (GEO casting wax) - 0,3 мм	32	прозрачный	0,2-0,4	75-80	82-89	8-12

Воск литейный ГЕО (GEO casting wax) - 0,4 мм	32	прозрачный	0,3-0,5	75-80	82-89	8-12
Воск литейный ГЕО (GEO casting wax) - 0,5 мм	32	прозрачный	0,4-0,6	75-80	82-89	8-12
Воск литейный ГЕО (GEO casting wax) - 0,6 мм	32	прозрачный	0,5-0,7	75-80	82-89	8-12
Наименование	Масса гр.	Цвет	Температура использования °С		Температура каплепадения °С	Конусная пенетрация 25 °С (0,1мм)
Воск клеевой розовый прозрачный (GEO Sticky wax pink transparent)	75-83	Розовый	185 – 200		78-87	2-5
Наименование	Кол-во шт.	Цвет	Температура затвердевания °С		Температура каплепадения °С	Конусная пенетрация 25 °С (0,1мм)
Набор звеньев восковых (GEO-PONTICS, Wax pontics)	60	Мятный зеленый	70-74		81-84	8-12
Звенья восковые ГЕО, верх справа, боковые зубы 14-17 (GEO-PONTICS, Wax pontics 14-17)	20	Мятный зеленый	70-74		81-84	8-12
Звенья восковые ГЕО, верх фронтальные зубы 12-22	20	Мятный зеленый	70-74		81-84	8-12

(GEO-PONTICS, Wax pontics 12-22)					
Звенья восковые ГЕО, верх слева, боковые зубы 24-27 (GEO-PONTICS, Wax pontics 24-27)	20	Мятный зеленый	70-74	81-84	8-12
Звенья восковые ГЕО, низ слева, боковые зубы 34-37 (GEO-PONTICS, Wax pontics 34-37)	20	Мятный зеленый	70-74	81-84	8-12
Звенья восковые ГЕО, низ фронтальные зубы 42-32 (GEO-PONTICS, Wax pontics 42-32)	20	Мятный зеленый	70-74	81-84	8-12
Звенья восковые ГЕО, низ справа, боковые зубы 44-47 (GEO-PONTICS, Wax pontics 44-47)	20	Мятный зеленый	70-74	81-84	8-12
Груши восковые ГЕО литейные (GEO Pear-shaped wax casting sprues), 200 шт.	200	Мятный зеленый	78-83	82-89	7-11

Наименование	Кол-во шт.	Цвет	Самоадгезия	Температура затвердевания °С	Температура каплепадения °С	Конусная пенетрация 25 °С (0,1мм)
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для моляров (GEO molar clasps, self-adhesive),	10	Мятный зеленый	да	69-75	76-86	16-20
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight, self-adhesive),	10	Мятный зеленый	да	69-75	76-86	16-20
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые (GEO ring clasps, self-adhesive),	10	Мятный зеленый	да	69-75	76-86	16-20
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся перемычки (GEO bar retainers, self-adhesive),	10	Мятный зеленый	да	69-75	76-86	16-20
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся грубые (GEO retention meshes, coarse, self-	20	Мятный зеленый	да	69-75	76-86	16-20

adh)						
Ретенции восковые ГЕО самоклящи еся мелкие (GEO retention meshes, fine, self-adhes)	20	Мятный зеленый	да	69-75	76-86	16-20
Ретенции восковые ГЕО самоклящи еся с круглыми отверстиями (GEO grid meshes, self- adhesive)	20	Мятный зеленый	да	69-75	76-86	16-20
Кламмеры восковые ГЕО самоклящи еся Bonyhard (GEO Bonyhard clasps, self- adhesive),	10	Мятный зеленый	да	69-75	76-86	16-20
Ретенции восковые ГЕО самоклящи еся диагональны е (GEO retention grid, diagonal, self-adh)	10	Мятный зеленый	да	69-75	76-86	16-20
Наименова ние	Кол- во шт.	Цвет	Прочность мм.	Температур а затвердеван ия °С	Температур а каплепаден ия °С	Конусная пенетрац ия 25 °С (0,1мм)
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,3 мм	15	Мятный зеленый	0,2-0,4	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые	15	Мятный зеленый	0,25-0,45	71-77	80-85	9-15

ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,35 мм						
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,4 мм	15	Мятный зеленый	0,3-0,5	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,5 мм	15	Мятный зеленый	0,4-0,6	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,6 мм	15	Мятный зеленый	0,5-0,7	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine- stippled) - 0,3 мм	15	Мятный зеленый	0,2-0,4	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine- stippled) - 0,35 мм	15	Мятный зеленый	0,25-0,45	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine- stippled) - 0,4 мм	15	Мятный зеленый	0,3-0,5	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с	15	Мятный зеленый	0,4-0,6	71-77	80-85	9-15

тонким рифлением (GEO casting wax, fine- stippled) - 0,5 мм						
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine- stippled) - 0,6 мм	15	Мятный зеленый	0,5-0,7	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse- stippled) - 0,3 мм	15	Мятный зеленый	0,2-0,4	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse- stippled) - 0,35 мм	15	Мятный зеленый	0,25-0,45	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse- stippled) - 0,4 мм	15	Мятный зеленый	0,3-0,5	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse- stippled) - 0,5 мм	15	Мятный зеленый	0,4-0,6	71-77	80-85	9-15
Пластины	15	Мятный	0,5-0,7	71-77	80-85	9-15

восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse- stippled) - 0,6 мм		зеленый				
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,3 мм	15	Мятный зеленый	0,2-0,4	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,35 мм	15	Мятный зеленый	0,25-0,45	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,4 мм	15	Мятный зеленый	0,3-0,5	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,5 мм	15	Мятный зеленый	0,4-0,6	71-77	80-85	9-15
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,6 мм	15	Мятный зеленый	0,5-0,7	71-77	80-85	9-15
Наименова ние	Масс а гр.	Цвет	Температур а использован ия °С	Температур а затвердеван ия °С	Температур а каплепаден ия °С	Конусная пенетрац ия 25 °С (0,1мм)
Воск ГЕО для модельного литья прозрачный	75-78	Мятный зеленый	125 – 170	63-69	66-72	20-27

бирюзовый (GEO model casting wax)						
Воск ГЕО для модельного литья непрозрачный бирюзовый (GEO model casting wax, hard/opaque)	75-78	Мятный зеленый	125 – 180	65-71	69-77	9-13
Воск для поднутренний (GEO block-out wax)	75-78	Розовый	180 – 200	70-77	82-90	8-14
Наименование	Кол-во шт.	Цвет	Температура затвердевания °С		Температура каплепадения °С	Конусная пенетрация 25 °С (0,1мм)
Ретенции восковые ГЕО со смещенными отверстиями (GEO perforated wax retainers, staggered),	10x40	Мятный зеленый	69-77		76-86	16-20
Ретенции восковые ГЕО с прямыми отверстиями (GEO perforated wax retainers),	10x40	Мятный зеленый	69-77		76-86	16-20
Наименование	Масса гр.	Цвет	Температура затвердевания °С		Температура каплепадения °С	Конусная пенетрация 25 °С (0,1мм)
Бюгеля восковые ГЕО для нижней челюсти (GEO L-jaw	65-70	Розовый	57-64		60-68	14-22

bar)					
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 0,6 мм	12-14	Мятный зеленый	57-64	60-68	14-22
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 0,8 мм	25-28	Мятный зеленый	57-64	60-68	14-22
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 1,0 мм	37-40	Мятный зеленый	57-64	60-68	14-22
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 1,2 мм	50-53	Мятный зеленый	57-64	60-68	14-22
Балки восковые литейные ГЕО (GEO Casting sprues,triangl e)	115- 118	Мятный зеленый	78-83	82-89	7-11
Наименова ние	Кол- во шт.	Цвет	Температура затвердевания °С	Температур а каплепаден ия °С	Конусная пенетрац ия 25 °С (0,1мм)
Кламмеры восковые ГЕО для премоляров (GEO premolar clasps)	10	Мятный зеленый	69-75	76-86	16-20
Кламмеры восковые ГЕО для моляров (GEO molar clasps)	10	Мятный зеленый	69-75	76-86	16-20
Кламмеры восковые ГЕО кольцевые прямые (GEO ring	10	Мятный зеленый	69-75	76-86	16-20

clasps, straight)					
Кламмеры восковые ГЕО кольцевые (GEO ring clasps)	10	Мятный зеленый	69-75	76-86	16-20
Ретенции восковые ГЕО перемычки (GEO bar retainers)	10	Мятный зеленый	69-75	76-86	16-20
Ретенции восковые ГЕО грубые (GEO retention meshes, coarse)	20	Мятный зеленый	69-75	76-86	16-20
Ретенции восковые ГЕО мелкие (GEO retention meshes, fine)	20	Мятный зеленый	69-75	76-86	16-20
Ретенции восковые ГЕО с круглыми отверстиями (GEO grid meshes)	20	Мятный зеленый	69-75	76-86	16-20
Кламмеры восковые ГЕО Bonyhard (GEO Bonyhard clasps)	10	Мятный зеленый	69-75	76-86	16-20
Ретенции восковые ГЕО решетки диагональны е (GEO Diagonal grid, turquoise) - 70x70 мм -	20	Мятный зеленый	69-75	76-86	16-20

Наименование	Масса гр.	Цвет	Диаметр без допустимого отклонения при диаметре инструмента мм.	Температура затвердевания °С	Температура каплепадения °С	Конусная пенетрация 25 °С (0,1мм)
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 2,0 мм	250-275	Ледяной синий	2,0	80-88	89,5-98	5-9
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 2,5 мм	250-275	Ледяной синий	2,5	80-88	89,5-98	5-9
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 3,0 мм	250-275	Ледяной синий	3,0	80-88	89,5-98	5-9
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 3,5 мм	250-275	Ледяной синий	3,5	80-88	89,5-98	5-9
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 4,0 мм	250-275	Ледяной синий	4,0	80-88	89,5-98	5-9

мм						
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 5,0 мм	250- 275	Ледяной синий	5,0	80-88	89,5-98	5-9
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 2,0 мм	250- 275	Бирюзов ый	2,0	77-85	83-90	8-12
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 2,5 мм	250- 275	Бирюзов ый	2,5	77-85	83-90	8-12
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 3,0 мм	250- 275	Бирюзов ый	3,0	77-85	83-90	8-12
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 3,5 мм	250- 275	Бирюзов ый	3,5	77-85	83-90	8-12
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 4,0 мм	250- 275	Бирюзов ый	4,0	77-85	83-90	8-12
Проволока восковая	250- 275	Бирюзов ый	5,0	77-85	83-90	8-12

ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 5,0 мм						
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 2,0 мм	250-275	Синий	2,0	79-85	85-94	6-12
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 2,5 мм	250-275	Синий	2,5	79-85	85-94	6-12
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 3,0 мм	250-275	Синий	3,0	79-85	85-94	6-12
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 3,5 мм	250-275	Синий	3,5	79-85	85-94	6-12
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 4,0 мм	250-275	Синий	4,0	79-85	85-94	6-10

wax wire medium hard blue) - 4,0 мм						
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 5,0 мм	250- 275	Синий	5,0	79-85	85-94	6-10
Наименование					Плотность г/см ³	Объем мл.
Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой (PICOSILK Spray) 75 мл					0,82-0,88	72-76
Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой, дополнительная бутылка (PICOSILK refill bottle) 500 мл					0,82-0,88	497-505

5. Перечень и описание материалов медицинского изделия, вступающих в непосредственный или опосредованный контакт с организмом пациента (телом человека)

Контакт медицинского изделия с пользователем не предусмотрен. Тем не менее, такой контакт возможен. Соблюдение гигиены труда позволит избежать контакта с медицинским изделием.

Материалы животного или человеческого происхождения не используются.

Лекарственные средства не используются.

Сведения о материалах, содержащихся в медицинском изделии

Наименование	Состав №	Состав №	Состав №	Состав №	Состав №	Сост ав №
Воск погружной GEO-DIP желтый (GEO-DIP dipping wax yellow)	алифатическая углеводородная смола	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	парафин и полимеры	атрахиноновый краситель	азокраситель	-
Воск погружной GEO-DIP оранжевый (GEO-DIP dipping wax orange)	алифатическая углеводородная смола	Парафин и микрокристаллический углеводородный воск	парафин и полимеры	периноновый краситель	азокраситель	-
Воск погружной GEO-DIP зелёный (GEO-DIP dipping wax green)	алифатическая углеводородная смола	Парафин и микрокристаллический углеводородный воск	парафин и полимеры	периноновый краситель	азокраситель	атрахиноновый краситель

						Ь
Воск литейный ГЕО (GEO casting wax) - мм	Парафин и микрокристалличе ский углеводородный воск	-	-	-	-	-
Воск литейный ГЕО (GEO casting wax) - мм	Парафин и микрокристалличе ский углеводородный воск	-	-	-	-	-
Воск литейный ГЕО (GEO casting wax) - мм	Парафин и микрокристалличе ский углеводородный воск	-	-	-	-	-
Воск литейный ГЕО (GEO casting wax) - мм	Парафин и микрокристалличе ский углеводородный воск	-	-	-	-	-
Воск клеевой розовый прозрачный (GEO Sticky wax pink transparent)	алифатическая углеводородная смола	микрокристалли ческий воск	перинонов ый краситель	атрахинон овый краситель	-	-
Набор звеньев восковых (GEO- PONTICS Wax pontics)	парафин и полусинтетически й воск	смола	пчелиный воск	атрахинон овый краситель	-	-
Звенья восковые ГЕО верх справа боковые зубы - (GEO-PONTICS Wax pontics -)	парафин и полусинтетически й воск	смола	пчелиный воск	атрахинон овый краситель	-	-
Звенья восковые ГЕО верх фронтальные зубы - (GEO-PONTICS Wax pontics -)	парафин и полусинтетически й воск	смола	пчелиный воск	атрахинон овый краситель	-	-
Звенья восковые ГЕО верх слева боковые зубы - (GEO-PONTICS Wax pontics -)	парафин и полусинтетически й воск	смола	пчелиный воск	атрахинон овый краситель	-	-
Звенья восковые ГЕО низ слева боковые зубы - (GEO-PONTICS Wax pontics -)	парафин и полусинтетически й воск	смола	пчелиный воск	атрахинон овый краситель	-	-
Звенья восковые ГЕО низ фронтальные зубы - (GEO-PONTICS Wax pontics -)	парафин и полусинтетически й воск	смола	пчелиный воск	атрахинон овый краситель	-	-
Звенья восковые ГЕО низ справа боковые зубы - (GEO-PONTICS Wax pontics -)	парафин и полусинтетически й воск	смола	пчелиный воск	атрахинон овый краситель	-	-
Группы восковые ГЕО литейные	гидрированные и негидрированные	микрокристалли	Парафин и	краситель СІ	атрахинон	азок

(GEO Pear-shaped wax casting sprues) шт.	соединения растительного происхождения	чешский воск	полимерный воск		овый краситель	раситель
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для премоляров (GEO premolar clasps self-adhesive)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	акриловый сополимер	азокраситель	-
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для моляров (GEO molar clasps self-adhesive)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	акриловый сополимер	азокраситель	-
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые прямые (GEO ring clasps straight self-adhesive)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	акриловый сополимер	азокраситель	-
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые (GEO ring clasps self-adhesive)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	акриловый сополимер	азокраситель	-
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся перемычки (GEO bar retainers self-adhesive)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	акриловый сополимер	азокраситель	-
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся грубые (GEO retention meshes coarse self-adh)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	акриловый сополимер	азокраситель	-
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся мелкие (GEO retention meshes fine self-adhes)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	акриловый сополимер	азокраситель	-
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся с круглыми отверстиями (GEO grid meshes self-adhesive)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	акриловый сополимер	азокраситель	-
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся Bonyhard (GEO Bonyhard clasps self-adhesive)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	акриловый сополимер	азокраситель	-
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся	гидрированные и негидрированные соединения	парафин и микрокристаллический	атрахиноновый	акриловый	-	-

диагональные (GEO retention grid diagonal self-adh)	растительного происхождения	углеводородный воск	краситель	сополимер		
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax smooth) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax smooth) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax smooth) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax smooth) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax smooth) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax fine-stippled) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax fine-stippled) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax fine-stippled) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax fine-stippled) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax fine-stippled) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax coarse-stippled) - мм шт.	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax coarse-stippled) - мм шт.	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-

stippled) - мм	воск					
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax coarse-stippled) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax coarse-stippled) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax coarse-stippled) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax veined) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax veined) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax veined) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax veined) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax veined) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Воск ГЕО для модельного литья прозрачный бирюзовый (GEO model casting wax)	парафиновый воск и микрокристаллический воск	углеводородная смола	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Воск ГЕО для модельного литья непрозрачный бирюзовый (GEO model casting wax hard/opaque)	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	неорганический пигмент и стабилизатор	пиразолоновый краситель	атрахиновый краситель	-	-
Воск для поднутренний (GEO block-out wax)	парафин и микрокристаллический воск	алифатическая углеводородная смола	Очищенный углеводород и пластмасса	краситель CI	атрахиновый краситель	азокраситель
Ретенции восковые ГЕО со смещенными	гидрированные и негидрированные соединения	парафиновый воск и микрокристалли	азокраситель	атрахиновый	-	-

отверстиями (GEO perforated wax retainers staggered)	растительного происхождения	ческий воск		краситель		
Ретенции восковые ГЕО с прямыми отверстиями (GEO perforated wax retainers)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафиновый воск и микрокристаллический воск	азокраситель	атрахиновый краситель	-	-
Бюгеля восковые ГЕО для нижней челюсти (GEO L-jaw bar)	парафиновый воск и микрокристаллический воск	пчелиный воск	азокраситель	атрахиновый краситель	-	-
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) мм	парафиновый воск и микрокристаллический воск	пчелиный воск	азокраситель	атрахиновый краситель	-	-
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) мм	парафиновый воск и микрокристаллический воск	пчелиный воск	азокраситель	атрахиновый краситель	-	-
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) мм	парафиновый воск и микрокристаллический воск	пчелиный воск	азокраситель	атрахиновый краситель	-	-
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) мм	парафиновый воск и микрокристаллический воск	пчелиный воск	азокраситель	атрахиновый краситель	-	-
Балки восковые литейные ГЕО (GEO Casting spruestriangle)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	микрокристаллический воск	парафин и полимерный воск	атрахиновый краситель	-	-
Кламмеры восковые ГЕО для премоляров (GEO premolar clasps)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиновый краситель	азокраситель	-	-
Кламмеры восковые ГЕО для моляров (GEO molar clasps)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиновый краситель	азокраситель	-	-
Кламмеры восковые ГЕО кольцевые прямые (GEO ring clasps straight)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиновый краситель	азокраситель	-	-
Кламмеры восковые ГЕО кольцевые (GEO ring clasps)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиновый краситель	азокраситель	-	-
Ретенции восковые ГЕО перемычки (GEO bar retainers)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиновый краситель	азокраситель	-	-
Ретенции восковые ГЕО грубые (GEO retention meshes coarse)	гидрированные и негидрированные соединения растительного	парафин и микрокристаллический углеводородный	атрахиновый краситель	азокраситель	-	-

	происхождения	воск				
Ретенции восковые ГЕО мелкие (GEO retention meshes fine)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	азокраситель	-	-
Ретенции восковые ГЕО с круглыми отверстиями (GEO grid meshes)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	азокраситель	-	-
Кламмеры восковые ГЕО Bonyhard (GEO Bonyhard clasps)	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	азокраситель	-	-
Ретенции восковые ГЕО решетки диагональные (GEO Diagonal grid turquoise) -х мм -	гидрированные и негидрированные соединения растительного происхождения	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	атрахиноновый краситель	азокраситель	-	-
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - мм	парафин микрокристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	бензофенон	азокраситель	-
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - мм	парафин микрокристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	бензофенон	азокраситель	-
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - мм	парафин микрокристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	бензофенон	азокраситель	-
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - мм	парафин микрокристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	бензофенон	азокраситель	-
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - мм	парафин микрокристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	бензофенон	азокраситель	-
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - мм	парафин микрокристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	бензофенон	азокраситель	-
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire hard turquoise) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	эфирный воск	атрахиноновый краситель	-	-
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire hard turquoise) - мм	парафин и микрокристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	эфирный воск	атрахиноновый краситель	-	-
Проволока восковая	парафин и	алифатическая	эфирный		-	-

ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire hard turquoise) - мм	микrokристаллический углеводородный воск	углеводородная смола	воск	атрахиноновый краситель		
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire hard turquoise) - мм	парафин и микrokристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	эфирный воск	атрахиноновый краситель	-	-
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire hard turquoise) - мм	парафин и микrokристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	эфирный воск	атрахиноновый краситель	-	-
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire hard turquoise) - мм	парафин и микrokристаллический углеводородный воск	алифатическая углеводородная смола	эфирный воск	атрахиноновый краситель	-	-
Проволока восковая ГЕО средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - мм	парафин микrokристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	-	-	-
Проволока восковая ГЕО средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - мм	парафин микrokристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	-	-	-
Проволока восковая ГЕО средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - мм	парафин микrokристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	-	-	-
Проволока восковая ГЕО средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - мм	парафин микrokристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	-	-	-
Проволока восковая ГЕО средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - мм	парафин микrokристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	-	-	-
Проволока восковая ГЕО средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - мм	парафин микrokристаллический воск очищенный синтетический	углеводородная смола растительного происхождения	атрахиноновый краситель	-	-	-
Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой (PICOSILK Spray) мл	-пропанол	алкилсульфонат натрия	вода	-	-	-
Пикосилк Picosilk обработка воска	-пропанол	алкилсульфонат натрия	вода	-	-	-

перед паковкой дополнительная бутылка (PICOSILK refill bottle) мл						
--	--	--	--	--	--	--

6. Информация о порядке ввода медицинского изделия в эксплуатацию

Наименование	Порядок эксплуатации
Пластины восковые	Восковая пластина отрезается по нужному размеру модели литейной основы. При тщательном наложении и подгонке воск наносится на восковую модель формованного литейного основания.
Кламмеры восковые	Восковые кламмерные профили размещаются и подгоняются на модели из паковочной массы. При помощи горячего инструмента восковые кламмерные профили с отлитой формованной моделью соединяются с моделью из паковочной массы.
Ретенции восковые	Наложить Ретенции с отверстиями на седловидную область модели из паковочной массы. Затем склеить при помощи горячего инструмента отлитую восковую модель с моделью из паковочной массы.
Бюгель нижней челюсти	Наложить восковой бюгельный профиль на модель из паковочной массы. Затем использовать горячий инструмент для закрепления восковой формованной модели на модели из паковочной массы.
Прутики восковые	Восковой профиль для проектирования цингулюма или индивидуальных ретенций на модели из паковочных материалов.
Моделировочный воск для модельного литья	Восковая пластина отрезается по нужному размеру модели литейной основы. При тщательном наложении и подгонке воск наносится на восковую модель формованного литейного основания.
Воск литейный ГЕО	Воск для отливки моделей можно наносить на седловидные поверхности моделей на большие площади и осуществить подгонку. При помощи воска для отливки можно плучить определенную полость пластмассовых гнезд. Эффект адгезии предотвращает утечку дублирующего силикона.
Проволока восковая	Используется в качестве литейного канала или литейной балки при восковом моделировании. Литейные каналы прикрепляются к восковой модели и аккуратно распределяются при помощи горячего инструмента. Литейная балка уменьшается до длины моста и размывается литниковыми каналами.
Воск погружной	Для производства восковых колпачков в процессе погружения. Погружение: Надежно удерживать. Быстро погрузить по подготовленной границе. Извлечь концевую часть медленно и аккуратно. Непосредственно перед извлечением удерживать короткий

	концевик, чтобы излишки воска могли стечь.
Воск для поднутрений	Распределение воска осуществляется горячим инструментом.
Звенья восковые	На гипсовой модели зубов зубной техник сначала моделирует коронки из воска, которые затем соединяются с элементом моста из воска (Восковые промежуточные звенья).
Балки восковые	Закрепить на седловидную область модели из паковочной массы ретенции с отверстиями. Затем использовать горячий инструмент для формовки отлитой модели на модели из паковочной массы.
Груши восковые	Литейные каналы прикрепляются к восковой модели и аккуратно размываются горячим инструментом.
Спрей Picosilk	Спрей распыляется на восковые детали перед встраиванием в отлитые формы. Значительно улучшает текучесть запрессованной массы, обеспечивая на литье точное воспроизведение моделируемого воскового объекта в металле.

7. Данные о маркировке медицинского изделия (этикетка на медицинском изделии и на транспортной упаковке)

Дополнительная этикетка для экспорта в Россию содержит следующую информацию:

- артикульный номер;
- знак соответствия декларирования соответствия;
- логотип производителя;
- номер регистрационного удостоверения;
- наименование медицинского изделия;
- номер заказа клиента со штрих-кодом;
- «Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ»;
- информация о сроках хранения;
- «Условия хранения, применения и утилизации см. в инструкции или паспорте безопасности»;
- «Хранить в сухом месте»;
- название, адрес, телефон и факс импортера/дистрибьютора;
- производитель/изготовитель;
- страна происхождения.

Пример:

REF: 5011100				Срок годности: не ограничен	Условия хранения, применения и утилизации см. в инструкции или паспорте безопасности
РУ ФСЗ 2011/09516 от 01.02.2012 Срок действия не ограничен				Хранить в сухом месте	
Груши восковые ГЕО литейные (GEO Pear-shaped wax casting sprues), 200 шт.				Изготовитель: «Ренферт ГмбХ», Германия, Renfert GmbH, 78247 Hilzingen Untere Giesswiesen 2, Germany	Импортер/Дистрибьютор: ООО Рокада-Дент Россия, 420107 Казань, Ул. Петербургская, д.26
		Утилизировать в соответствии с требованиями законодательства РФ.		Изготовлено в Германии	Т. +7(843)294 59 70 Ф. +7(843)294 59 72
VA123456					

Символы встречающиеся в маркировке

	Знак соответствия декларирования соответствия
	Знак соответствия обязательной сертификации
	QR код

Информация об упаковке

Наименование	Информация об упаковке
Воск погружной GEO-DIP желтый (GEO-DIP dipping wax, yellow)	Пластмассовая коробка с резьбовой крышкой Ø 71 x 118 мм
Воск погружной GEO-DIP оранжевый (GEO-DIP dipping wax, orange)	
Воск погружной GEO-DIP зелёный (GEO-DIP dipping wax, green)	Картонная коробка 124 x 113 x 33 мм
Воск литейный GEO (GEO casting wax) - 0,3 мм	
Воск литейный GEO (GEO casting wax) - 0,4 мм	
Воск литейный GEO (GEO casting wax) - 0,5 мм	
Воск литейный GEO (GEO casting wax) - 0,6 мм	Пластмассовый цилиндр с уплотнительной крышкой Цилиндр: 62 x 72 мм Высота: 57 мм
Воск клеевой розовый прозрачный (GEO Sticky wax pink transparent)	
Набор звеньев восковых (GEO-PONTICS, Wax pontics)	Пластмассовая коробка 175 x 165 x 30 мм
Звенья восковые GEO, верх справа, боковые зубы 14-17 (GEO-PONTICS, Wax pontics 14-17)	Пластмассовая коробка 76 x 76 x 30 мм
Звенья восковые GEO, верх фронтальные зубы 12-22 (GEO-PONTICS, Wax pontics 12-22)	
Звенья восковые GEO, верх слева, боковые зубы 24-27 (GEO-PONTICS, Wax pontics 24-27)	
Звенья восковые GEO, низ слева, боковые зубы 34-37 (GEO-PONTICS, Wax pontics 34-37)	
Звенья восковые GEO, низ фронтальные зубы 42-32 (GEO-	

PONTICS, Wax pontics 42-32)	
Звенья восковые ГЕО, низ справа, боковые зубы 44-47 (GEO-PONTICS, Wax pontics 44-47)	
Груши восковые ГЕО литейные (GEO Pear-shaped wax casting sprues), 200 шт.	Пластмассовая коробка с резьбовой крышкой Ø 71 x 118 мм
Кламмеры восковые ГЕО модели в ассортименте	Пластмассовая коробка 360 x 300 x 27
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для премоляров (GEO premolar clasps, self-adhesive),	Картонная коробка с крышкой 90 x 90 x 25 мм
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для моляров (GEO molar clasps, self-adhesive),	
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight, self-adhesive),	
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые (GEO ring clasps, self-adhesive),	
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся перемычки (GEO bar retainers, self-adhesive),	
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся грубые (GEO retention meshes, coarse, self-adh)	
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся мелкие (GEO retention meshes, fine, self-adhes)	
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся с круглыми отверстиями (GEO grid meshes, self-adhesive)	
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся Bonyhard (GEO Bonyhard clasps, self-adhesive),	
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся диагональные (GEO retention grid, diagonal, self-adh)	
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,3 мм	Складная картонная коробка 165 x 86 x 20 мм
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,35 мм	
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,4 мм	
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,5 мм	
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,6 мм	
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,3 мм	Картонная коробка 165 x 86 x 20 мм
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,35 мм	
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,4 мм	
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,5 мм	
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,6 мм	
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,3 мм 15шт.	
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,35 мм	
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,4 мм	
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,4 мм	

coarse-stippled) - 0,5 мм	
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,6 мм	
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,3 мм	
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,35 мм	
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,4 мм	
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,5 мм	
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,6 мм	
Воск ГЕО для модельного литья прозрачный бирюзовый (GEO model casting wax)	Пластмассовый цилиндр с уплотнительной крышкой Цилиндр: 62 x 72 мм Высота: 57 мм
Воск ГЕО для модельного литья непрозрачный бирюзовый (GEO model casting wax, hard/opaque)	Пластмассовый цилиндр с уплотнительной крышкой Цилиндр: 62 x 72 мм Высота: 57 мм
Воск для поднутренний (GEO block-out wax)	
Ретенции восковые ГЕО со смещенными отверстиями (GEO perforated wax retainers, staggered),	Картонная коробка 143 x 47 x 17 мм
Ретенции восковые ГЕО с прямыми отверстиями (GEO perforated wax retainers),	
Бюгеля восковые ГЕО для нижней челюсти (GEO L-jaw bar)	Картонная коробка 136 x 56 x 20 мм
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 0,6 мм	Картонная коробка 136 x 56 x 20 мм
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 0,8 мм	
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 1,0 мм	
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 1,2 мм	
Балки восковые литейные ГЕО (GEO Casting sprues, triangle)	Картонная коробка 103 x 143 x 68 мм
Кламмеры восковые ГЕО для премоляров (GEO premolar clasps)	Картонная коробка с крышкой 90 x 90 x 25 мм
Кламмеры восковые ГЕО для моляров (GEO molar clasps)	
Кламмеры восковые ГЕО кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight)	
Кламмеры восковые ГЕО кольцевые (GEO ring clasps)	
Ретенции восковые ГЕО перемишки (GEO bar retainers)	
Ретенции восковые ГЕО грубые (GEO retention meshes, coarse)	
Ретенции восковые ГЕО мелкие (GEO retention meshes, fine)	
Ретенции восковые ГЕО с круглыми отверстиями (GEO grid meshes)	
Кламмеры восковые ГЕО Bonyhard (GEO Bonyhard clasps)	
Ретенции восковые ГЕО решетки диагональные (GEO Diagonal grid, turquoise) - 70x70 мм	
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 2,0 мм	Картонная банка с крышкой Ø 94 x 113 мм
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 2,5 мм	
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 3,0 мм	
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 3,5 мм	
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire	

extra hard blue) - 4,0 мм	Картонная коробка 88 x 93 x 90 мм
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 5,0 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 2,0 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 2,5 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 3,0 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 3,5 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 4,0 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 5,0 мм	
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 2,0 мм	Картонная коробка 90 x 95 x 90 мм
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 2,5 мм	
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 3,0 мм	
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 3,5 мм	
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 4,0 мм	
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 5,0 мм	
Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой (PICOSILK Spray) 75 мл	Флакон-спрей в картонной коробке Картонная коробка: 52 x 44 x 153 мм
Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой, дополнительная бутылка (PICOSILK refill bottle) 500 мл	Пластмассовая бутылка в запаянном пакете Запаянный пакет: 200 x 300 x 0,05 мм

8. Хранение. Гарантия. Транспортировка

Комплектность поставки

Комплектность поставки (партия – количество упакованного воска) соответствует контракту, заказу, договору или иному документу, согласованному с потребителем и поставщиком в установленном порядке. Каждый комплект поставки должен сопровождаться документом, удостоверяющим его качество, утвержденным поставщиком в установленном порядке. Документ может быть оформлен в виде отдельного свидетельства о приемке или может быть включен в сопроводительную документацию (паспорт) по усмотрению поставщика.

Перед использованием необходимо проверить комплектность медицинского изделия и целостность транспортной упаковки.

Хранения

Медицинское изделие не подлежит никаким ограничениям срока хранения и срока годности при условии соблюдения целостности упаковки и условий хранения (см. таблицу условий хранения медицинского изделия).

Медицинское изделие предназначено только для однократного применения. Не подлежит повторному использованию, переработке или стерилизации. Ремонту не подлежит.

Не допускается хранить медицинское изделие вблизи отопительных приборов.

Таблица. Условия хранения медицинского изделия.

Наименование	Условия хранения			Условия транспортировки	
	Минимум [°C]	Максимум [°C]	Общие условия хранения	Минимум [°C]	Максимум [°C]
Воск (вся продукция)	5	35	Хранить закрытым. Хорошо проветриваемое помещение. Отсутствие прямых солнечных лучей. Относительная влажность воздуха 40% - 80%.	5	45
Picosilk	15	35	Хранить закрытым. Хорошо проветриваемое помещение. Отсутствие прямых солнечных лучей. Относительная влажность воздуха 40% - 80%.	15	55

Гарантия

Изготовитель гарантирует соответствие медицинского изделия требованиям заявленных технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и применения.

Транспортировка

Медицинское изделие транспортируется всеми видами транспорта крытого исполнения или в контейнерах на любые расстояния, с любой скоростью в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

При погрузке, транспортировке, разгрузке и хранении медицинского изделия должна быть обеспечена защита тары от механических повреждений, загрязнения и атмосферных осадков согласно требованиям ГОСТ 15150-69.

9. Техническое обслуживание и ремонт

Медицинское изделие не подлежит техническому обслуживанию и ремонту.

10. Требования к охране окружающей среды

Медицинское изделие безопасно и не оказывает влияния на окружающую среду.

В процессе хранения восков не происходит разложения и выделения вредных и канцерогенных веществ. Воски относятся к 4 классу опасности (вещества малоопасные) согласно требованиям ГОСТ 12.1.007.

11. Порядок и условия утилизации или уничтожения медицинского изделия

Воски: могут быть утилизированы с бытовыми отходами, а также восковыми отходами, в соответствии с классом опасности «А» по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Picosilk: утилизировать в соответствии с официальными правилами утилизации класса опасности «Б» по СанПиН 2.1.7.2790-10.

После высыхания, загрязненные Picosilk материалы, можно утилизировать как бытовые отходы, в соответствии с классом опасности «А» по СанПиН 2.1.7.2790-10.

Медицинское изделие необходимо утилизировать в соответствии с требованиями ФЗ №89 от 24.06.98г. «Об отходах производства и потребления».

12. Стерилизация и дезинфекция

Медицинское изделие поставляется нестерильным и не подлежит стерилизации и дезинфекции.

13. Применяемые стандарты.

Производитель имеет сертифицированную систему менеджмента качества в части:

- разработка, производство и продажа стоматологических приборов, стоматологических материалов и стоматологических инструментов. Производственная площадка, прошедшая сертификацию: Untere Giesswiesen 2, 78247 Hilzingen, Германия.

Система менеджмента качества подтверждается сертификатом № 50910-14-00, соответствия требованиям EN ISO 13485:2016. Сертификат выдан 28 января 2018г., действителен до 27 января 2021г. от имени DEKRA Certification GmbH, Штутгарт, Германия.

14. Список однотипных медицинских изделий (которыми можно заменить медицинское изделие)

Наименование (Renfert)	Аналог
Воск погружной GEO-DIP желтый (GEO-DIP dipping wax, yellow)	РЗН 2018/6782 от 29.01.2018г. Производитель: АО «ЭУР-МЕД Дентадепо». Наименование: Воск зуботехнический "ДЕНЕСТ" по ТУ 20.59.52-001-40227038-2017 в вариантах исполнения.
Воск погружной GEO-DIP оранжевый (GEO-DIP dipping wax, orange)	
Воск погружной GEO-DIP зелёный (GEO-DIP dipping wax, green)	
Воск литейный GEO (GEO casting wax) - 0,3 мм	РЗН 2016/4222 от 03.06.2016г. Производитель «Дентаурум ГмбХ энд Ко. КГ». Наименование: Воск стоматологический и заготовки восковые для моделирования с принадлежностями.
Воск литейный GEO (GEO casting wax) - 0,4 мм	
Воск литейный GEO (GEO casting wax) - 0,5 мм	
Воск литейный GEO (GEO casting wax) - 0,6 мм	

Воск клеевой розовый прозрачный (GEO Sticky wax pink transparent)	РЗН 2018/6706 от 22.01.2018. Производитель ООО «НПП «Лига». Наименование: Воски зуботехнические ЛИГАДЕНТ по ТУ 9391-001-22286416-2015
Набор звеньев восковых (GEO-PONTICS, Wax pontics)	ФСЗ 2007/00960 от 21.11.2016г. Производитель: АО «СТОМА». Наименование: Воск моделировочный для мостовидных протезов.
Звенья восковые ГЕО, верх справа, боковые зубы 14-17 (GEO-PONTICS, Wax pontics 14-17)	
Звенья восковые ГЕО, верх фронтальные зубы 12-22 (GEO-PONTICS, Wax pontics 12-22)	
Звенья восковые ГЕО, верх слева, боковые зубы 24-27 (GEO-PONTICS, Wax pontics 24-27)	
Звенья восковые ГЕО, низ слева, боковые зубы 34-37 (GEO-PONTICS, Wax pontics 34-37)	
Звенья восковые ГЕО, низ фронтальные зубы 42-32 (GEO-PONTICS, Wax pontics 42-32)	
Звенья восковые ГЕО, низ справа, боковые зубы 44-47 (GEO-PONTICS, Wax pontics 44-47)	
Груши восковые ГЕО литейные (GEO Pear-shaped wax casting sprues), 200 шт.	ФСЗ 2007/00412 от 28.12.2015г. Производитель: "ЙЕТИ Денталпродукте ГмбХ". Наименование: Воски стоматологические для изготовления зубных протезов с принадлежностями
Кламмеры восковые ГЕО модели в ассортименте	РЗН 2016/4222 от 03.06.2016г. Производитель «Дентаурум ГмбХ энд Ко. КГ». Наименование: Воск стоматологический и заготовки восковые для моделирования с принадлежностями.
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для премоляров (GEO premolar clasps, self-adhesive),	
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся для моляров (GEO molar clasps, self-adhesive),	
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight, self-adhesive),	
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся кольцевые (GEO ring clasps, self-adhesive),	
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся перемишки (GEO bar retainers, self-adhesive),	
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся грубые (GEO retention meshes, coarse, self-adh)	
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся мелкие (GEO retention meshes, fine, self-adhes)	
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся с круглыми отверстиями (GEO grid meshes, self-adhesive)	
Кламмеры восковые ГЕО самоклеящиеся Bonyhard (GEO Bonyhard clasps, self-adhesive),	
Ретенции восковые ГЕО самоклеящиеся диагональные (GEO retention grid, diagonal, self-adh)	
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,3 мм	ФСЗ 2010/08519 от 06.12.2010г. Производитель: "ИНТЕРДЕНТ д.о.о." Наименование: Воск зуботехнический
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,35 мм	
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,4 мм	
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) - 0,5 мм	
Пластины восковые ГЕО гладкие (GEO casting wax, smooth) -	

0,6 мм	
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,3 мм	
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,35 мм	
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,4 мм	
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,5 мм	
Пластины восковые ГЕО с тонким рифлением (GEO casting wax, fine-stippled) - 0,6 мм	
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,3 мм	
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,35 мм	
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,4 мм	
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,5 мм	
Пластины восковые ГЕО с грубым рифлением (GEO casting wax, coarse-stippled) - 0,6 мм	
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,3 мм	
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,35 мм	
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,4 мм	
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,5 мм	
Пластины восковые ГЕО с прожилками (GEO casting wax, veined) - 0,6 мм	
Воск ГЕО для модельного литья прозрачный бирюзовый (GEO model casting wax)	РЗН 2018/6782 от 29.01.2018г. Производитель: АО «ЭУР-МЕД Денталдепо». Наименование: Воск зуботехнический "ДЕНЕСТ" по ТУ 20.59.52-001-40227038-2017 в вариантах исполнения.
Воск ГЕО для модельного литья непрозрачный бирюзовый (GEO model casting wax, hard/opaque)	
Воск для поднутренний (GEO block-out wax)	
Ретенции восковые ГЕО со смещенными отверстиями (GEO perforated wax retainers, staggered),	РЗН 2016/4222 от 03.06.2016г. Производитель «Дентаурум ГмбХ энд Ко. КГ». Наименование: Воск стоматологический и заготовки восковые для моделирования с принадлежностями.
Ретенции восковые ГЕО с прямыми отверстиями (GEO perforated wax retainers),	
Бюгеля восковые ГЕО для нижней челюсти (GEO L-jaw bar)	
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 0,6 мм	
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 0,8 мм	
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 1,0 мм	
Прутики восковые ГЕО (GEO wax rods) 1,2 мм	
Балки восковые литейные ГЕО (GEO Casting sprues, triangle)	
Кламмеры восковые ГЕО для премоляров (GEO premolar clasps)	
Кламмеры восковые ГЕО для моляров (GEO molar clasps)	
Кламмеры восковые ГЕО кольцевые прямые (GEO ring clasps, straight)	
Кламмеры восковые ГЕО кольцевые (GEO ring clasps)	
Ретенции восковые ГЕО перемычки (GEO bar retainers)	

Ретенции восковые ГЕО грубые (GEO retention meshes, coarse)	
Ретенции восковые ГЕО мелкие (GEO retention meshes, fine)	
Ретенции восковые ГЕО с круглыми отверстиями (GEO grid meshes)	
Кламмеры восковые ГЕО Bonyhard (GEO Bonyhard clasps)	
Ретенции восковые ГЕО решетки диагональные (GEO Diagonal grid, turquoise) - 70x70 мм -	
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 2,0 мм	
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 2,5 мм	
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 3,0 мм	
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 3,5 мм	
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 4,0 мм	
Проволока восковая ГЕО экстра твердая синяя (GEO wax wire extra hard blue) - 5,0 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 2,0 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 2,5 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 3,0 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 3,5 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 4,0 мм	
Проволока восковая ГЕО твердая бирюзовая (GEO wax wire, hard, turquoise) - 5,0 мм	
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 2,0 мм	
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 2,5 мм	
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 3,0 мм	
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 3,5 мм	
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 4,0 мм	
Проволока восковая ГЕО, средней твердости синяя (GEO wax wire medium hard blue) - 5,0 мм	
Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой (PICOSILK Spray) 75 мл	ФСЗ 2011/09376 от 16.03.2011г. Производитель: «БЕГО Бремер Голдшлэгерей Вильг. Хербст ГмбХ & Ко. КГ» Наименование: Материалы зуботехнические вспомогательные для изготовления зубных протезов
Пикосилк Picosilk обработка воска перед паковкой, дополнительная бутылка (PICOSILK refill bottle) 500 мл	

15.Официальные дистрибьюторы на территории РФ

ООО «Дентал АВ», Россия, 191014, г. Санкт-Петербург, Ковенский пер.,9, тел. :

+7(812) 2757585 , факс : +7(812) 6470611, email: info@dental-av.ru, сайт: www.dentalav.ru

ООО «Рокада-Дент», Россия, 420107, г.Казань, ул.Петербургская, 26 . тел. +7(843)5706880, факс : +7(843)5706882, email: mail@rocadamed.ru, сайт: www.rocadamed.ru
Группа компаний СИМКО, Россия, 105064, Москва, Нижний Сусальный пер., 7 кор. 7, тел.: +7(495)7378003, факс : +7(495)7373826, email: orders@simkodent.ru, сайт: www.simkodent.ru

ООО «МайДент24», Россия, 125040, г. Москва, 5-я улица Ямского поля, 7, кор. 2., тел./факс +7(495)5105624, email: info@mydent24.ru, сайт: www.mydent24.ru

ПВП «Контакт», Россия, 662521, п. Березовка, Красноярск. кр., ул. Солнечная 1а/3, тел. +7 (391)2737156, email: info@contact-kr.ru, сайт: <http://www.contact-kr.ru/>

ООО «ЭХО», Россия, 353905, г. Новороссийск, ул. Корницкого 83, тел. +7 (800) 550 55 78, email: dental@echo-nvrsk.ru, сайт: <https://www.echo-nvrsk.ru/>

ООО «УралКвадромед», Россия, 620062, Екатеринбург, пр. Ленина, 64-10, тел. +7(343)2047337, email: info@uqm.ru, сайт: <http://www.uqm.ru/>

ООО «Риком», Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная 10, тел. +7 495 672 71 99, email: info@rikom-dent.ru, сайт: <http://www.rikom-dent.ru/>

ООО «Северная Каролина», Россия, 199106, Санкт-Петербург, Большой пр. В.О., д. 60/10, тел. +7(812)7028112, email: karolina_spb@mail.ru, сайт: <http://www.carolinaspb.ru>

16.Претензии по качеству

Претензии по качеству можно направлять:

1. Напрямую производителю «Renfert GmbH»:

«Ренферт ГмбХ», Германия, Renfert GmbH, 78247 Hilzingen Untere Giesswiesen 2, Germany.

Тел +49 7731 8208-914; Факс +49 7731 8208-912

E-mail: info@renfert.com

2. Уполномоченному представителю на территории РФ ООО «МедТестКонсалтинг»:

Общество с ограниченной ответственностью «МедТестКонсалтинг», Россия, 123181 г. Москва, ул. Кулакова, д.1, корп.1, оф.193

E-mail: managers@medtestconsult.ru

confirmation of signature

I hereby certify that the above signature is the true signature, subscribed in my presence, of

Mr. Sören Sven Hug,
born 29th of December 1983
business address: Untere Gießwiesen 2 in 78247 Hilzingen, Germany
certified by passport -

Singen, the 9th day of June 2020



Notary assessor Dr. Wendelin Mayer
as an officially appointed representative of the

Notary Dr. Kerstin Strohmaier
with the official seat in Singen (Hohentwiel), Germany





Апостиль
(Гагская Конвенция от 5 октября 1961 года)

1. Страна: Федеративная Республика Германия
- Настоящий официальный документ
2. был подписан Др. Венделин Майер
3. выступающей в качестве помощника нотариуса др. Керштин Штромайер
4. Скреплен печатью нотариуса Др. Штромайер в г. Зинген

Заверено

5. в г. Констанц
6. 15.06.2020
7. Президентом суда земли Рёдинг при суде земли Констанц
8. за номером: № 910 а (AR 492/2020)
9. Печать: Суд земли Констанц
10. Подпись: (подпись)

На фирменном бланке Renfert / Ренферт

Для предоставления в Компетентные Органы Здравоохранения Российской Федерации

Настоящим я подтверждаю, что содержание Руководства по эксплуатации (инструкции по использованию) медицинского изделия «Воски стоматологические с принадлежностями» является действительным и точным.

Renfert GmbH / Ренферт ГмбХ, 78247 г. Хильцинген, Унтере Гисвизен 2, Германия, является оригинальным производителем изделия, упомянутого в документе.

Подпись: /Подписи/
Зорен Хуг, руководитель

(нотариальные примечания):

Сегодня, _____, передо мной, нижеподписавшимся публичным нотариусом, лично предстал _____, который, предоставив мне убедительные свидетельства своей личности, _____, подтвердил, что является лицом, чья подпись стоит на предстоящем или прикрепленном документе, а также подтвердил мне, что поставил подпись добровольно в указанных целях.

Публичный нотариус (имя) _____
(Штамп нотариуса):

Подтверждение подлинности подписи

Настоящим я подтверждаю, что подпись выше является подлинной подписью,
поставленной в моем присутствии

Г-ном Зореном Свеном Хуг,

Дата рождения: 29 декабря 1983 г.,

Рабочий адрес: Унтере Гисвизен 2 в 78247 г. Хильцинген, Германия

- подтверждено при предъявлении идентификационной карты -

Г. Зинген, 9 июня 2020 г.

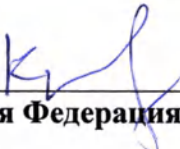
/Подпись/

Помощник нотариуса Др. Венделин Майер в качестве официально назначенного
представителя нотариуса Др. Керштин Штромайер с официальным офисом в г.
Зинген (Хоэнтвиль), Германия

Перевод с немецкого языка на русский язык

Печать нотариуса: Керштин Штромайер / Нотариус в Зинген (Хоэнтвиль)

Печать нотариуса: Керштин Штромайер / Нотариус в Зинген (Хоэнтвиль)


Российская Федерация

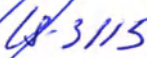
Город Москва.

Двадцать третьего июля две тысячи двадцатого года.

Я, Прокошенкова Елена Евгеньевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Краплина Дениса Александровича.

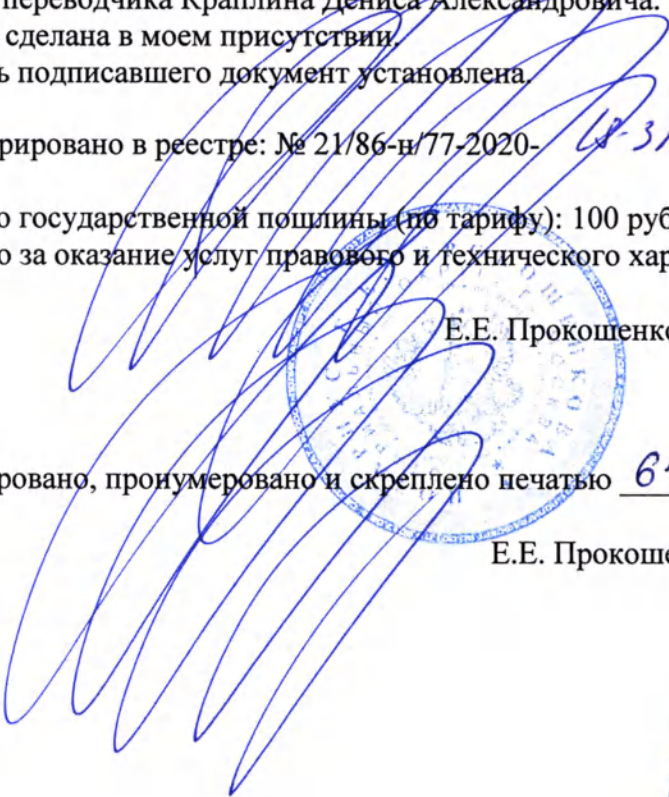
Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 21/86-н/77-2020- 

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 100 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 300 руб. 00 коп.


Е.Е. Прокошенкова

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 64 лист(-а,-ов).

Е.Е. Прокошенкова

