



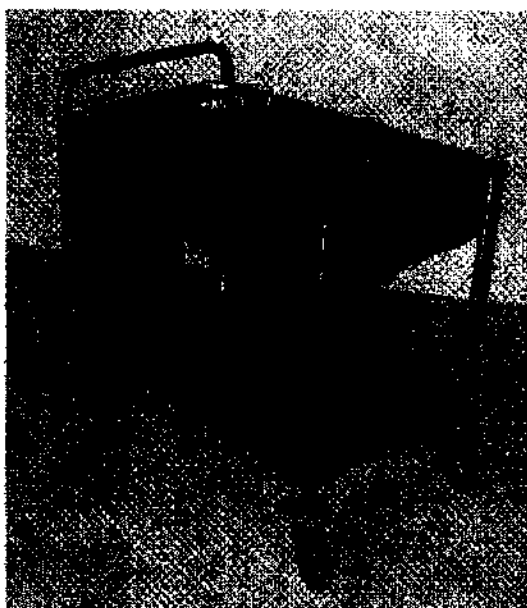


Больничное оборудование

Производство санитарного оборудования и оборудования
для общественных учреждений

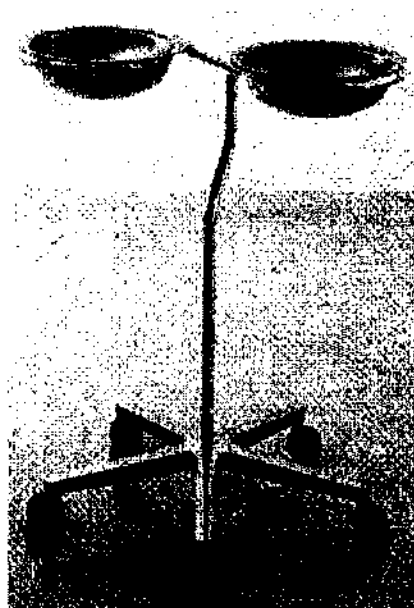

Производство по аккредитации и сертификации

ТЕЛЕЖКИ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
ТАЗИКИ

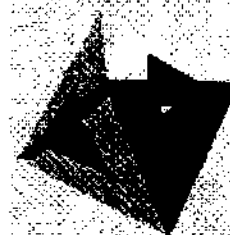





Уважаемый клиент,

благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение нашему продукту, и предлагаем Вам внимательно ознакомиться с этим руководством перед тем, как приступить к установке.

В руководстве содержатся все сведения, необходимые для правильной установки, начала эксплуатации, правильного использования, обслуживания и т.д.

Храните это руководство в подходящем месте, не выбрасывайте его после прочтения, независимо от предыдущего опыта.

Несколько минут, посвященных чтению, в дальнейшем позволят Вам сэкономить время.

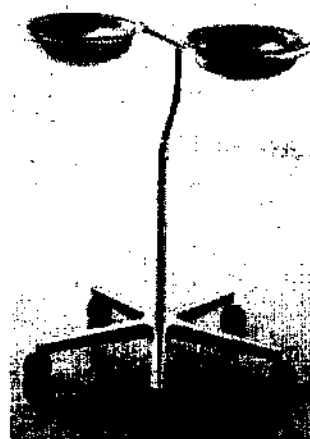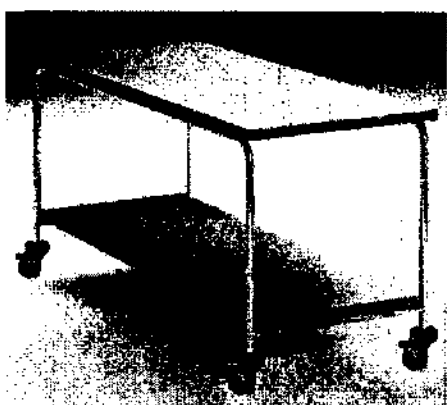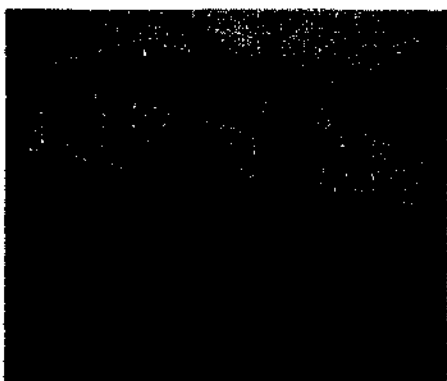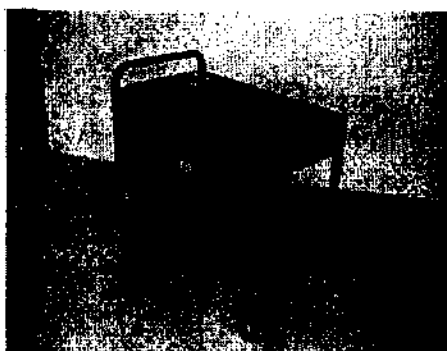

1	ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РУКОВОДСТВУ	Стр.3
2	КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ХРАНИТЬ РУКОВОДСТВО	Стр.4
2.1	Кому адресовано руководство	Стр.4
2.2	Назначение сведений, содержащихся в руководстве	Стр.4
2.3	Ограничения использования руководства	Стр.4
2.4	Как хранить руководство	Стр.4
2.5	Условные обозначения, примененные в руководстве	Стр.4
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Стр.5
3.1	Модели	Стр.5
4	ДАННЫЕ МАРКИРОВКИ НА ТЕЛЕЖКЕ	Стр.6
4.1	Данные маркировки на тележке	Стр.6
4.1.1	Техпаспорт тележки	Стр.6
4.1.2	Маркировка ЕС	Стр.6
5	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ	Стр.7
5.1	Подготовка к перевозке	Стр.7
5.2	Перемещение тележки	Стр.7
5.3	Распаковка	Стр.7
6	МОНТАЖ	Стр.8
7	ОЧИСТКА	Стр.9
7.1	Общие сведения	Стр.9
7.2	Техника безопасности при очистке	Стр.9
8	ГАРАНТИЯ	Стр.10

☑ Это руководство составлено изготовителем и входит в комплект тележки. Сведения, содержащиеся в руководстве, предназначены как неквалифицированному (неопытному), так и квалифицированному персоналу.

☑ Это руководство определяет назначение, для которого была сконструирована тележка, и содержит все сведения, необходимые, чтобы обеспечить ее безопасную и правильную установку и эксплуатацию.

☑ Дальнейшая техническая информация, не отраженная в этом руководстве, содержится в технической документации, составленной компанией "VERNIPOLL S.r.l." и предоставляемой по месту нахождения компании.

! Внимательно прочтите это руководство перед тем, как приступить к установке, использованию и любой иной работе с тележкой.

☑ Неукоснительное соблюдение содержащихся в руководстве правил гарантирует безопасность людей и тележки, экономию труда и продлевает срок службы тележки.

При проектировании и изготовлении тележки применялись критерии и предосторожности, позволяющие удовлетворить основным действующим требованиям к безопасности.

☑ Тщательный анализ рисков, проведенный фирмой "VERNIPOLL S.r.l.", позволил устранить большую часть рисков, однако рекомендуется неукоснительно придерживаться инструкций, данных в настоящем документе.

Всегда справляйтесь по этому руководству перед тем, как провести любую операцию. Бережно храните руководство и держите его всегда под рукой, при тележке или вблизи от нее.

☑ Схемы и рисунки приводятся ради наглядности, компания, проводя политику постоянного развития и актуализации, может вносить изменения без предварительного уведомления.

☑ Настоящее руководство следует хранить на протяжении всего срока службы тележки; в случае утери или порчи следует запросить копию у разработчика, назвав ему параметры тележки (цена будет назначена изготовителем).

☑ Любые предложения клиента, направленные на внесение в тележку улучшений, будут с удовольствием приняты компанией "VERNIPOLL S.r.l.", которая взвесит возможность их реализации.

☑ Настоящий документ является собственностью исключительно "VERNIPOLL S.r.l." и не может быть предоставлен третьим лицам ни полностью, ни частично без письменного разрешения "VERNIPOLL S.r.l."

☑ "VERNIPOLL S.r.l." сохраняет свои права на руководство согласно закону.

☑ Все размеры в этом руководстве выражены в мм.

В этой главе даны некоторые указания по использованию руководства и об ограничениях его использования.

2.1. КОМУ АДРЕСОВАНО РУКОВОДСТВО

Настоящее руководство адресовано следующим лицам:

- отвечающим за перевозку, погрузку и разгрузку
- операторам
- монтажникам
- отвечающим за очистку

2.2. НАЗНАЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РУКОВОДСТВЕ

Руководство дает указания по эксплуатации тележки, предусмотренной проектом, содержит технические характеристики, инструкции по перемещению, установки, регулировке и эксплуатации, описывает методы чистки и облегчает заказ сменных деталей.

2.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУКОВОДСТВА

Напоминаем, что руководство не может заменить соответствующего опыта работы оператора, поэтому может служить только памяткой по основным операциям.

Уточняем также, что руководство отражает состояние техники на момент приобретения тележки и что изготовитель имеет право обновлять руководство и приборы, не изменяя предыдущих руководства и изделия, кроме исключительных случаев.

2.4. КАК ХРАНИТЬ РУКОВОДСТВО

Напоминаем пользователю, что руководство следует хранить бережно, чтобы обеспечить ему такой же срок службы, как у тележки.

В случае утери или порчи руководства можно запросить копию, направив местному представителю или непосредственно фирме-изготовителю специальный запрос с указанием типа, паспортных данных и года изготовления тележки.

2.5. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЕННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ



Описание:


Этот символ привлекает внимание к отдельным указаниям, неточное соблюдение которых может привести к физическим травмам или создать угрозу жизни людей.



Описание:

Этот символ привлекает внимание к отдельным указаниям, неточное соблюдение которых может привести к повреждению предметов или разрушить тележку.


3.1. Модели

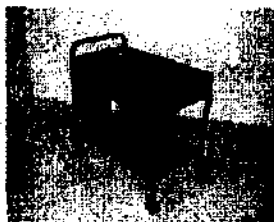

Тележка из нержавеющей стали для лекарств, 2 полки



Тележка с 2 полками (нержавеющая сталь или эмалированная листовая сталь)

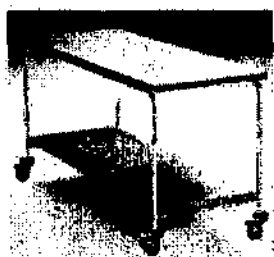

Столик для инструментов, 2 полки



Столик для инструментов с бортиком



Штатив для тазиков, укомплектованный 2 тазиками



Штатив для одного тазика, укомплектованный тазиком



Штатив для кюветы, укомплектованный кюветой для гипсового бинта

Рис. 01

4.1. ДАННЫЕ МАРКИРОВКИ НА ТЕЛЕЖКЕ

При получении тележки **ВАЖНО** внимательно прочесть данные на этикетке. При обнаружении отклонений в этом отношении необходимо сразу сообщить о них "VERNIPOLL S.r.l." прежде, чем приступить к каким-либо действиям.

4.1.1. ТЕХПАСПОРТ ТЕЛЕЖКИ

Всегда ссылайтесь на номер партии тележки (рис. 3), когда запрашиваете техническую поддержку или заказываете сменные детали. Старые и новые модели (однозначно идентифицируемые по номеру партии) могут различаться в деталях, кроме того, для оказания технической поддержки могут понадобиться иные подготовительные меры.

Номер партии, отраженный на этикетке тележки, расположен, как показано на рисунке 3.



Рис. 03

A – маркировка соответствия "CE" [EC]

B – модель

C – подлежит стерилизации

D – безопасная нагрузка

E – номер партии

На рисунке 4 приведены общие сведения об изготовителе.

Изготовитель:

VERNIPOLL S.r.l.
Voc. Renare Loc. Case Sparse
06031 Беванья провинции Перуджа, Италия
тел. +0390742360549
факс +0390742360043
e-mail: vernipoll@vernipoll.com
веб-сайт: www.vernipoll.com

Рис. 04

4.1.2. МАРКИРОВКА ЕС (РИС.5)

Эта маркировка на этикетке удостоверяет соответствие тележки основным требованиям безопасности. Директива 93/42/CEE.

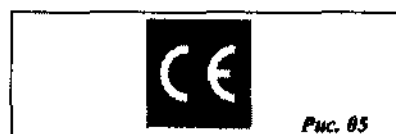


Рис. 05

В этой главе даны указания, необходимые для правильного проведения погрузки-разгрузки и перемещения тележки.

5.1. ПРИЕМКА ТЕЛЕЖКИ

Тележка поставляется следующим образом:

А) В картонной коробке.

5.2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ТЕЛЕЖКИ

Упакованная тележка должна располагаться согласно пиктограммам и письменным указаниям на внешней стороне упаковки, рис.6.



Повреждение тележки, вызванное неправильным перемещением, не покрывается ГАРАНТИЕЙ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Устойчивость к перепадам температуры при транспортировке -25°C $+50^{\circ}\text{C}$.

При перевозке ни в коем случае не располагать тележку снаружи, в контакте с атмосферными агентами.

Стандартная упаковка

Картонная коробка

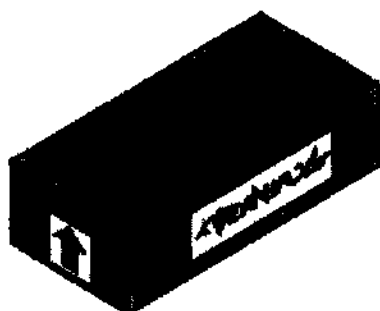


Рис. 06

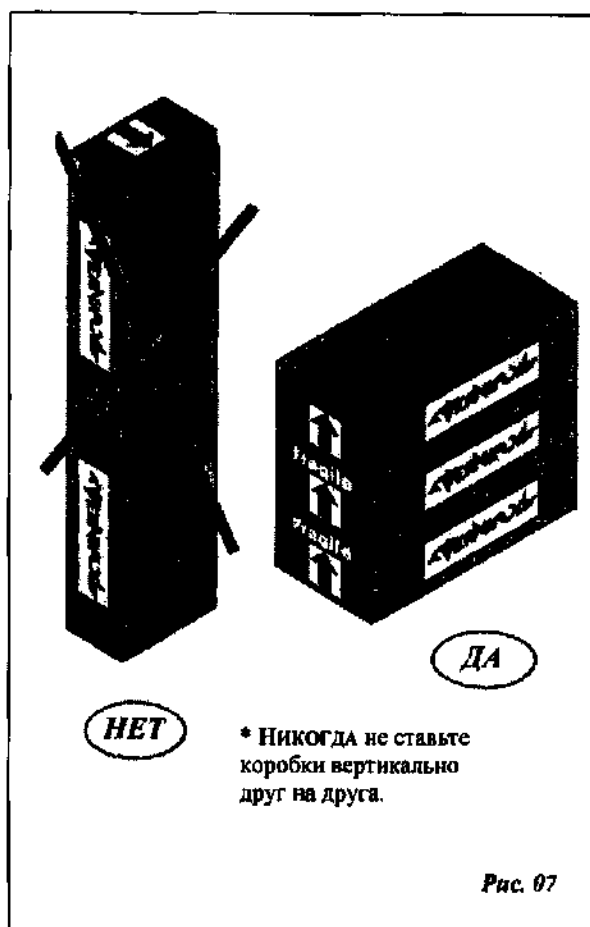


Рис. 07

Временное или длительное хранение должно осуществляться в закрытом помещении, защищенном от атмосферных агентов, с тележками следует обращаться бережно.

Температура хранения от 0° до 40°C .

Влажность 15-80% без конденсации.



Рис. 08

5.3. РАСПАКОВКА (РИС.9)

Все материалы упаковки поддаются рециркуляции и подлежат устранению в соответствии с местным законодательством, не забудьте выбросить "пластиковые" компоненты, чтобы они не создавали угрозу удушья.

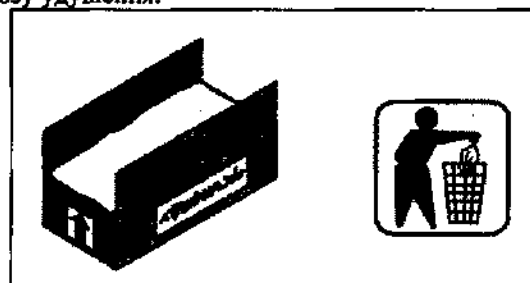


Рис. 09


В этой главе приведены все технические данные, необходимые, чтобы провести монтаж с учетом действующих нормативов.

Монтаж и проверка функционирования тележки должны проводиться квалифицированным персоналом с полным соблюдением действующих нормативов, а также прилагаемых инструкций по монтажу. В случае монтажа, отклоняющегося от рекомендованного, "VERNIPOLL S.r.l." не несет никакой

ответственности за ущерб, нанесенный предметам и / или людям.

Тележка в зависимости от модели может поставляться в сборке или в полностью разобранном виде.

В дальнейшем даются указания по монтажу тележек, поставленных в полностью разобранном виде.

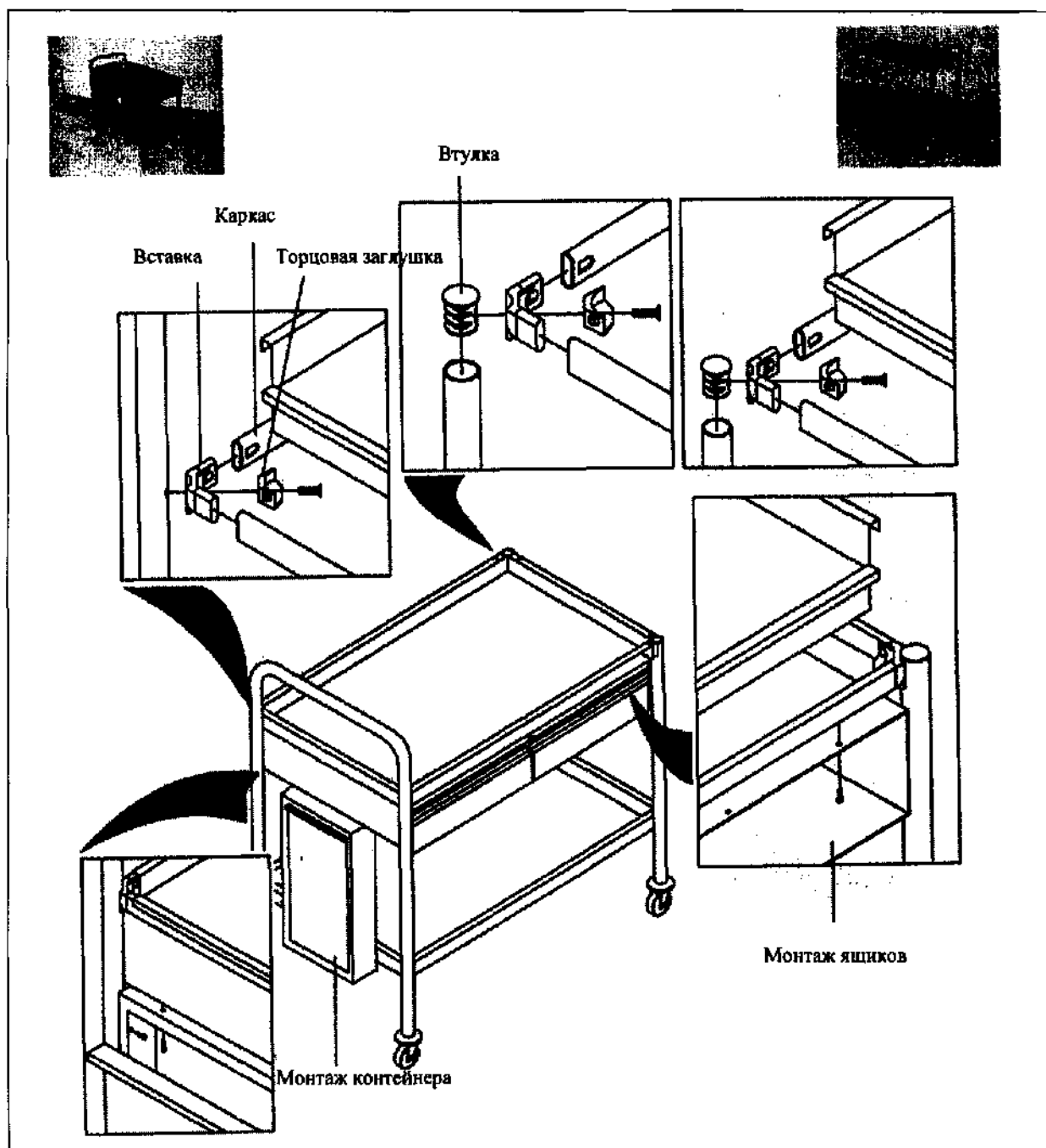

7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В этой главе речь идет обо всех процедурах очистки, необходимых, чтобы поддерживать максимальную эффективность тележки.

7.2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ

Лицо, отвечающее за очистку, должно соблюдать нижеследующие правила, несоблюдение инструкций может повлечь тяжелые травмы.

- Повесить на тележку объявление о проведении очистки.
- Содержать тележку и ее различные компоненты в хороших и безопасных условиях, чтобы обеспечить вашу безопасность и соблюсти действующие правила.
- Запрещается самостоятельно или при посредстве третьих лиц вносить изменения в тележку, ее компоненты и любые ее функции, а также нарушать каким-либо образом целостность тележки, ее компонентов и любых ее функций без предварительной консультации с изготовителем.
- НИКОГДА не проводить очистку тележки без инструкции.
- Перед каждой очисткой убедиться, что:
 - Поднимать тележку (при необходимости) должны два человека, после того, как убедиться, что тележка пуста.
 - Поверхности эмалированные, пластиковые или из двойного слоистого пластика можно чистить водой, спиртом, нейтральными моющими средствами и дезинфицирующими средствами, имеющимися в продаже и применяемыми в больницах. Почистить влажной губкой, ополоснуть и тщательно вытереть сухой тряпкой.
 - Не использовать ацетон, растворитель и абразивные материалы.
 - НИКОГДА не мыть тележку струями воды под давлением, паром или путем погружения.
 - Закончив работу, тщательно очистить место, где находилась тележка, и выбросить образовавшийся мусор в соответствии с местными нормами устранения отходов.

Компания "VERNIPOLL S.r.l.", в дальнейшем именуемая "Изготовитель", гарантирует, что при выходе из производства каждое ее новое изделие лишено дефектов производства и материала. Изготовитель обязуется бесплатно заменить изделия, пришедшие в негодность по причине установленного дефекта материала и / или производства.

Данная гарантия действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты передачи первому Пользователю.

Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо:

- Отправить дефектные детали на предприятие Изготовителя для соответствующей бесплатной проверки, сопроводив их идентификационными данными, отраженными на этикетке тележки.
- Соблюдать программу и сроки операций по обслуживанию, предусмотренные Изготовителем и содержащиеся в главе "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ" настоящего руководства.

Расходы на перевозку замененных изделий и их осмотр нашими техниками, полезный для установления причин брака, несет Пользователь.

Изучение дефектов и их причин может производиться только и исключительно персоналом Изготовителя и техниками, которых он уполномочил на это. Изделия, замененные по гарантии, остаются в собственности изготовителя.

Гарантия не распространяется на:

- Компоненты, не произведенные непосредственно изготовителем, за которые отвечает соответствующий производитель.
- Неисправности, вызванные обычным износом.
- Неисправности, вызванные неправильным использованием.
- Неисправности, вызванные халатностью, несчастным случаем, неумелым обращением, а также использованием, не соответствующим предписаниям и обычному назначению тележки.
- Ущерб, нанесенный людям или предметам вследствие неисправности.



VERNIPOLL srl

Voc. Renare Loc. Case Sparse

06031 Беванья провинции Перуджа, Италия

тел. +0390742360549

факс +0390742360043


e-mail: vernipoll@vernipoll.com

веб-сайт: www.vernipoll.com


Web: www.vernipoll.com

ООО ЦИРМИ  info@cirmi.ru  www.goszdravnadzor.ru

e.mail: vernipoll@vernipoll.com

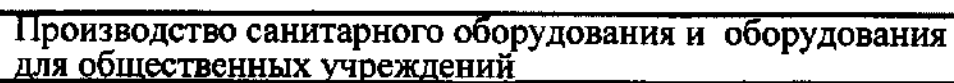


Большинственное оборудование

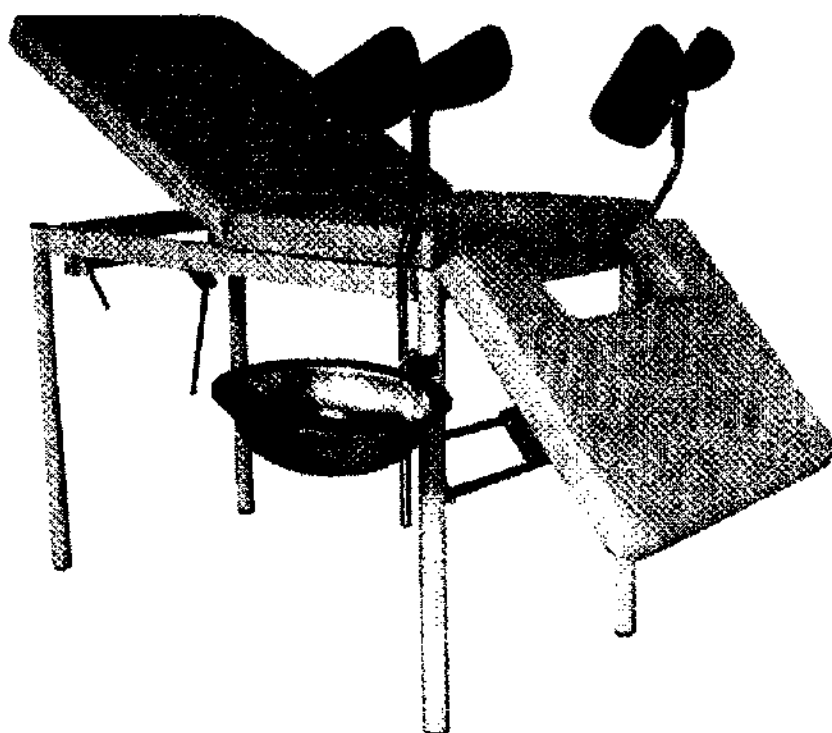

Г. Кравченко, И. Кравченко, И. Кравченко

**КУШЕТКИ
СМОТРОВЫЕ**

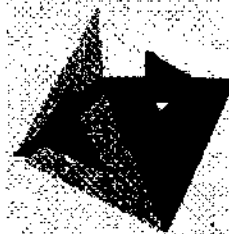


Уважаемый клиент,

благодарим Вас за то, что Вы отдали предпочтение нашему продукту, и предлагаем Вам внимательно ознакомиться с этим руководством перед тем, как приступить к установке.

В руководстве содержатся все сведения, необходимые для правильной установки, начала эксплуатации, правильного использования, обслуживания и т.д.

Храните это руководство в подходящем месте, не выбрасывайте его после прочтения, независимо от предыдущего опыта.

Несколько минут, посвященных чтению, в дальнейшем позволят Вам сэкономить время.

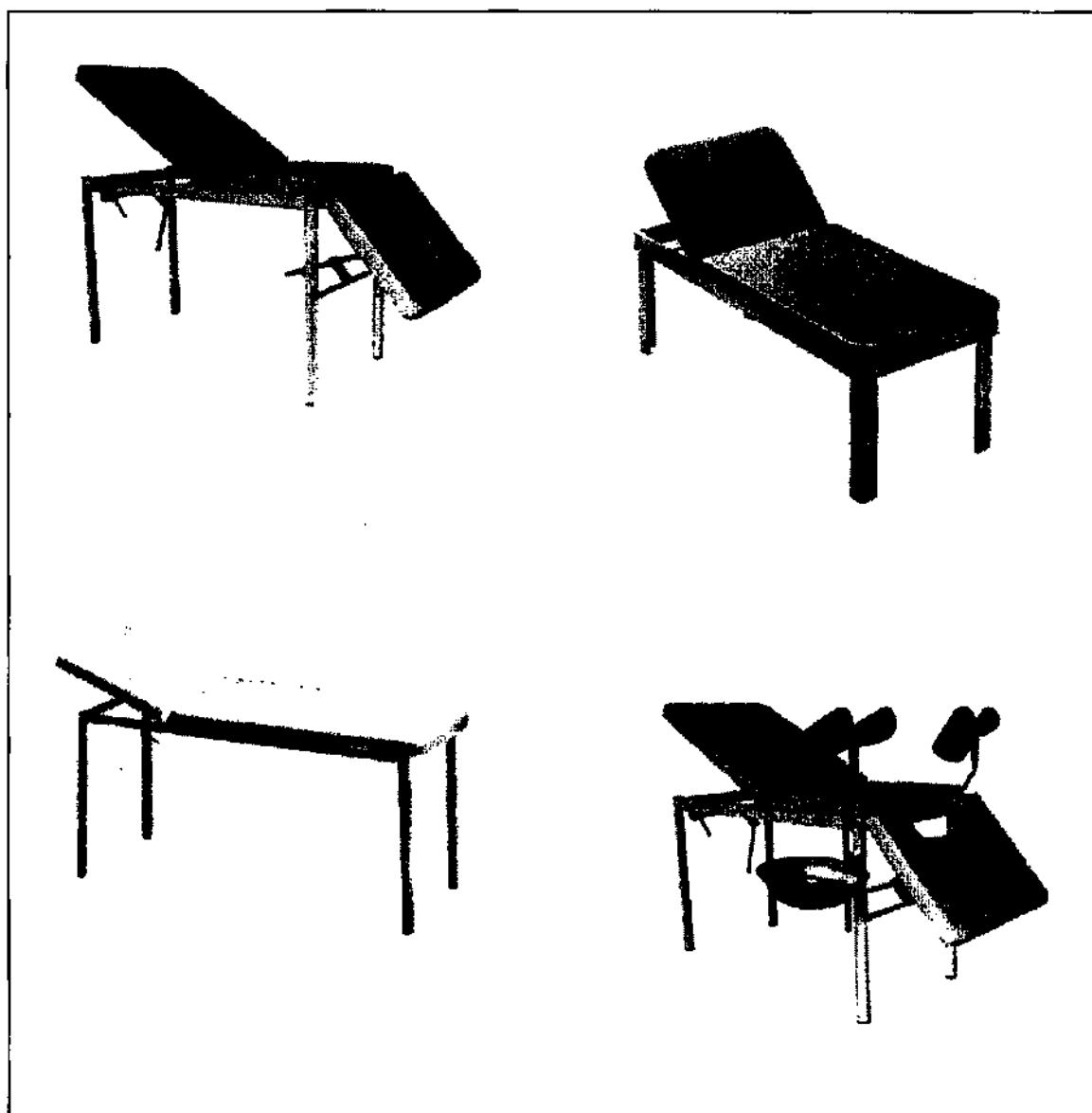

1	ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО РУКОВОДСТВУ	Стр.3
2	КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ И ХРАНИТЬ РУКОВОДСТВО	Стр.4
2.1	Кому адресовано руководство	Стр.4
2.2	Назначение сведений, содержащихся в руководстве	Стр.4
2.3	Ограничения использования руководства	Стр.4
2.4	Как хранить руководство	Стр.4
2.5	Условные обозначения, примененные в руководстве	Стр.4
3	ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	Стр.5
3.1	Модели	Стр.5
4	ДАННЫЕ МАРКИРОВКИ	Стр.6
4.1	Данные маркировки на кушетке	Стр.6
4.1.1	Техпаспорт кушетки	Стр.6
4.1.2	Маркировка ЕС	Стр.6
5	ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУШЕТКИ	Стр.7
5.1	Приемка кушетки	Стр.7
5.2	Перемещение кушетки	Стр.7
5.3	Распаковка	Стр.7
6	МОНТАЖ	Стр.8
7	ОЧИСТКА	Стр.9
7.1	Общие сведения	Стр.9
7.2	Техника безопасности при очистке	Стр.9
8	ГАРАНТИЯ	Стр.10

☑ Это руководство составлено изготовителем и входит в комплект кушетки. Сведения, содержащиеся в руководстве, предназначены как неквалифицированному (неопытному), так и квалифицированному персоналу.

☑ Это руководство определяет назначение, для которого была сконструирована кушетка, и содержит все сведения, необходимые, чтобы обеспечить ее безопасную и правильную установку и эксплуатацию.

☑ Дальнейшая техническая информация, не отраженная в этом руководстве, содержится в технической документации, составленной компанией "VERNIPOLL S.r.l." и предоставляемой по месту нахождения компании.

! Внимательно прочтите это руководство перед тем, как приступить к установке, использованию и любой иной работе с кушеткой.

☑ Неукоснительное соблюдение содержащихся в руководстве правил гарантирует безопасность людей и кушетки, экономию труда и продлевает срок службы кушетки.

При проектировании и изготовлении кушетки применялись критерии и предосторожности, позволяющие удовлетворить основным действующим требованиям к безопасности.

☑ Тщательный анализ рисков, проведенный фирмой "VERNIPOLL S.r.l.", позволил устранить большую часть рисков, однако рекомендуется

неукоснительно придерживаться инструкций, данных в настоящем документе.

Всегда обращайтесь по этому руководству перед тем, как провести любую операцию. Бережно храните руководство и держите его всегда под рукой, при кушетке или вблизи от нее.

☑ Схемы и рисунки приводятся ради наглядности, компания, проводя политику постоянного развития и актуализации, может вносить изменения без предварительного уведомления.

☑ Настоящее руководство следует хранить на протяжении всего срока службы кушетки; в случае утери или порчи следует запросить копию у разработчика, назвав ему параметры кушетки (цена будет назначена изготовителем).

☑ Любые предложения клиента, направленные на внесение в кушетку улучшений, будут с удовольствием приняты компанией "VERNIPOLL S.r.l.", которая взвесит возможность их реализации.

☑ Настоящий документ является собственностью исключительно "VERNIPOLL S.r.l." и не может быть предоставлен третьим лицам ни полностью, ни частично без письменного разрешения "VERNIPOLL S.r.l."

☑ "VERNIPOLL S.r.l." сохраняет свои права на руководство согласно закону.

☑ Все размеры в этом руководстве выражены в мм.

В этой главе даны некоторые указания по использованию руководства и об ограничениях его использования.

2.1. КОМУ АДРЕСОВАНО РУКОВОДСТВО

Настоящее руководство адресовано следующим лицам:

- отвечающим за перевозку, погрузку и разгрузку
- операторам
- монтажникам
- отвечающим за очистку

2.2. НАЗНАЧЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В РУКОВОДСТВЕ

Руководство дает указания по эксплуатации кушетки, предусмотренной проектом, содержит технические характеристики, инструкции по перемещению, установке, регулировке и эксплуатации, описывает методы чистки и облегчает заказ сменных деталей.

2.3. ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РУКОВОДСТВА

Напоминаем, что руководство не может заменить соответствующего опыта работы оператора, поэтому может служить только памяткой по основным операциям.

Уточняем также, что руководство отражает состояние техники на момент приобретения кушетки и что изготовитель имеет право обновлять руководство и приборы, не изменяя предыдущих руководства и изделия, кроме исключительных случаев.

2.4. КАК ХРАНИТЬ РУКОВОДСТВО

Напоминаем пользователю, что руководство следует хранить бережно, чтобы обеспечить ему такой же срок службы, как у кушетки.

В случае утери или порчи руководства можно запросить копию, направив местному представителю или непосредственно фирме-изготовителю специальный запрос с указанием типа, паспортных данных и года изготовления кушетки.

2.5. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ПРИМЕНЕННЫЕ В РУКОВОДСТВЕ



Описание:

Этот символ привлекает внимание к отдельным указаниям, неточное соблюдение которых может привести к физическим травмам или создать угрозу жизни людей.



Описание:

Этот символ привлекает внимание к отдельным указаниям, неточное соблюдение которых может привести к повреждению предметов или разрушить кушетку.

3.1. МОДЕЛИ



Рис. 01

4.1. ДАННЫЕ МАРКИРОВКИ НА КУШЕТКЕ

При получении кушетки **ВАЖНО** внимательно прочесть данные на этикетке. При обнаружении отклонений в этом отношении необходимо сразу сообщить о них "VERIPOLL S.r.l." прежде, чем приступить к каким-либо действиям.

4.1.1. ТЕХПАСПОРТ КУШЕТКИ

Всегда ссылайтесь на номер партии кушетки (рис. 3), когда запрашиваете техническую поддержку или заказываете сменные детали. Старые и новые модели (однозначно идентифицируемые по номеру партии) могут различаться в деталях, кроме того, для оказания технической поддержки могут понадобиться иные подготовительные меры.

Паспортные данные отпечатаны на этикетке, расположенной сбоку, как показано на рисунке 3.

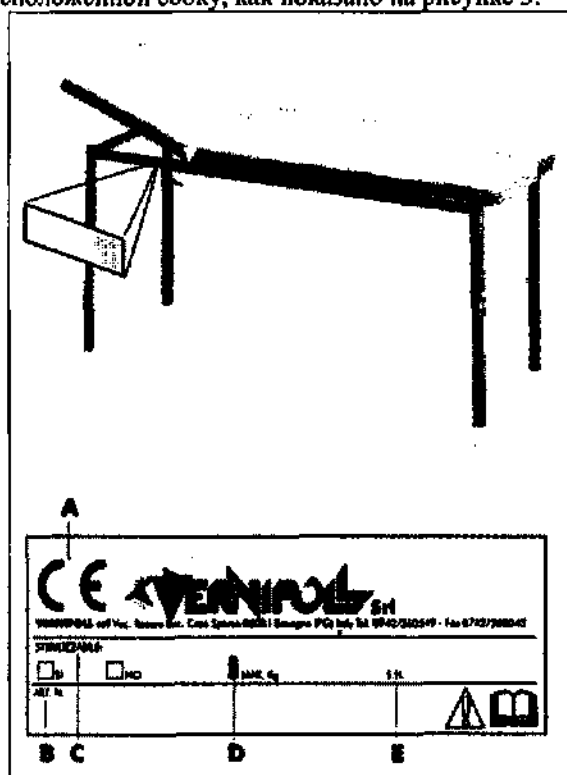


Рис. 03

A – маркировка соответствия "CE" [EC]

B – модель

C – подлежит стерилизации

D – безопасная нагрузка

E – номер партии

На рисунке 4 приведены общие сведения об изготовителе.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

VERIPOLL S.r.l.
Voc. Renare Loc. Case Sparse
06031 Беванья провинции Перуджа, Италия
тел. +0390742360549
факс +0390742360043
e-mail: vernipoll@vernipoll.com
веб-сайт: www.vernipoll.com

рис. 04

4.1.2. МАРКИРОВКА ЕС (РИС. 5)

Эта маркировка на этикетке удостоверяет соответствие кушетки основным требованиям безопасности. Директива 93/42/CEE.



Рис. 05

В этой главе даны указания, необходимые для правильного проведения погрузки-разгрузки и перемещения кушетки.

5.1. ПРИЕМКА КУШЕТКИ

Кушетка поставляется следующим образом:

А) В картонной коробке.

5.2. ПЕРЕМЕЩЕНИЕ КУШЕТКИ

Упакованная кушетка должна располагаться согласно пиктограммам и письменным указаниям на внешней стороне упаковки, рис.6.



Повреждение кушетки, вызванное неправильным перемещением, не покрывается ГАРАНТИЕЙ.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Устойчивость к перепадам температуры при транспортировке -25°C $+50^{\circ}\text{C}$.

При перевозке ни в коем случае не располагать кушетку снаружи, в контакте с атмосферными агентами.

Стандартная упаковка

Картонная коробка

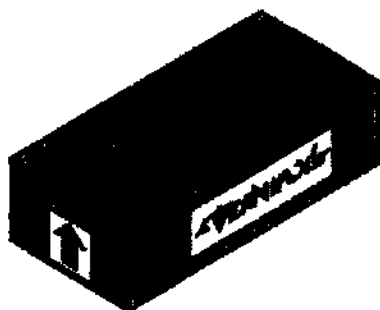


Рис. 06

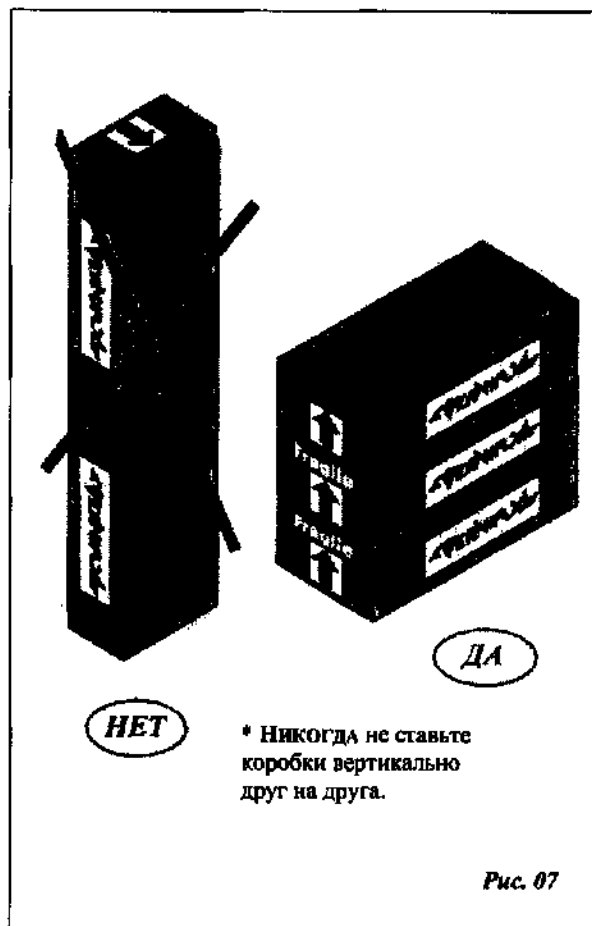


Рис. 07

Временное или длительное хранение должно осуществляться в закрытом помещении, защищенном от атмосферных агентов, с кушетками следует обращаться бережно.

Температура хранения от 0° до 40°C .

Влажность 15-80% без конденсации.



Рис. 08

5.3. РАСПАКОВКА (РИС.9)

Все материалы упаковки поддаются рециркуляции и подлежат устранию в соответствии с местным законодательством, не забудьте выбросить "пластиковые" компоненты, чтобы они не создавали угрозу удушья.

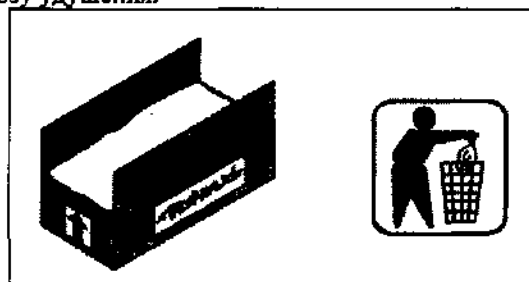



Рис. 09

В этой главе приведены все технические данные, необходимые, чтобы провести монтаж с учетом действующих нормативов.


Монтаж и проверка функционирования кушетки должны проводиться квалифицированным персоналом с полным соблюдением действующих нормативов, а также прилагаемых инструкций по монтажу.

В случае монтажа, отклоняющегося от рекомендованного, "VERNIPOLL S.r.l." не несет никакой ответственности за ущерб, нанесенный предметам и / или людям.

Эта операция должна проводиться только квалифицированным персоналом согласно приводимым ниже схемам.

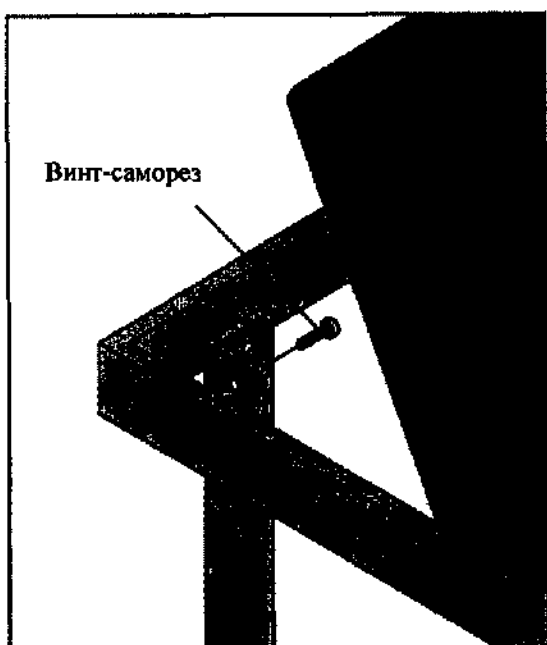

Монтаж ножек кушетки для кардиологии и физиотерапии

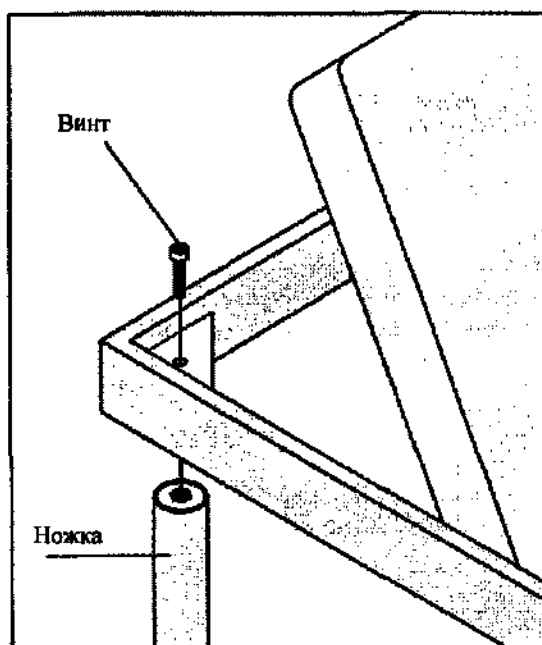

Монтаж ножек у стальных кушеток

7.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

В этой главе речь идет обо всех процедурах очистки, необходимых, чтобы поддерживать максимальную эффективность кушетки.

7.2. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОЧИСТКЕ

Лицо, отвечающее за очистку, должно соблюдать нижеследующие правила, несоблюдение инструкций может повлечь тяжелые травмы.

- Повесить на кушетку объявление о проведении очистки.
- Содержать кушетку и ее различные компоненты в хороших и безопасных условиях, чтобы обеспечить вашу безопасность и соблюсти действующие правила.
- Запрещается самостоятельно или при посредстве третьих лиц вносить изменения в кушетку, ее компоненты и любые ее функции, а также нарушать каким-либо образом целостность кушетки, ее компонентов и любых ее функций без предварительной консультации с изготовителем.
- НИКОГДА не проводить очистку кушетки без инструкции.
- Перед каждой очисткой убедиться, что:
- Поднимать кушетку (при необходимости) должны два человека, после того, как убедиться, что кушетка пуста.
- Эмалированные поверхности, а также обшивку из PELTEX можно чистить водой, спиртом, нейтральными моющими средствами и дезинфицирующими средствами, имеющимися в продаже и применяемыми в больницах. Почистить влажной губкой, ополоснуть и тщательно вытереть сухой тряпкой.
- Не использовать ацетон, растворитель и абразивные материалы.
- НИКОГДА не мыть кушетку струями воды под давлением, паром или путем погружения.
- Закончив работу, тщательно очистить место, где находилась кушетка, и выбросить образовавшийся мусор в соответствии с местными нормами устранения отходов.

Компания "VERNIPOLL S.r.l.", в дальнейшем именуемая "Изготовитель", гарантирует, что при выходе из производства каждое ее новое изделие лишено дефектов производства и материала. Изготовитель обязуется бесплатно заменить изделия, пришедшие в негодность по причине установленного дефекта материала и / или производства.

Данная гарантия действует в течение 12 (двенадцати) месяцев с даты передачи первому Пользователю.

Чтобы воспользоваться гарантией, необходимо:


- Отправить дефектные детали на предприятие Изготовителя для соответствующей бесплатной проверки, сопроводив их идентификационными данными, отраженными на этикетке кушетки.
- Соблюдать программу и сроки операций по обслуживанию, предусмотренные Изготовителем и содержащиеся в главе "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ" настоящего руководства.

Расходы на перевозку замененных изделий и их осмотр нашими техниками, полезный для установления причин брака, несет Пользователь.

Изучение дефектов и их причин может производиться только и исключительно персоналом Изготовителя и техниками, которых он уполномочил на это. Изделия, замененные по гарантии, остаются в собственности изготовителя.

Гарантия не распространяется на:

- Компоненты, не произведенные непосредственно изготовителем, за которые отвечает соответствующий производитель.
- Неисправности, вызванные обычным износом.
- Неисправности, вызванные неправильным использованием.
- Неисправности, вызванные халатностью, несчастным случаем, неумелым обращением, а также использованием, не соответствующим предписаниям и обычному назначению кушетки.
- Ущерб, нанесенный людям или предметам вследствие неисправности.

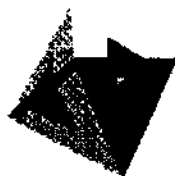

VERNIPOLL srl

Voc. Renare Loc. Case Sparse

06031 Беанья провинции Перуджа, Италия

тел. +0390742360549

факс +0390742360043

e-mail: vernipoll@vernipoll.com

веб-сайт: www.vernipoll.com

Web: www.vernipoll.com

e.mail: vernipoll@vernipoll.com