

ОАО Рок

Технические средства реабилитации инвалидов

КРЕСЛА - КОЛЯСКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ

«Лиза», «Эко-багги», «Кимба», «Киви»


Паспорт и руководство по эксплуатации



Лиза



Эко-багги

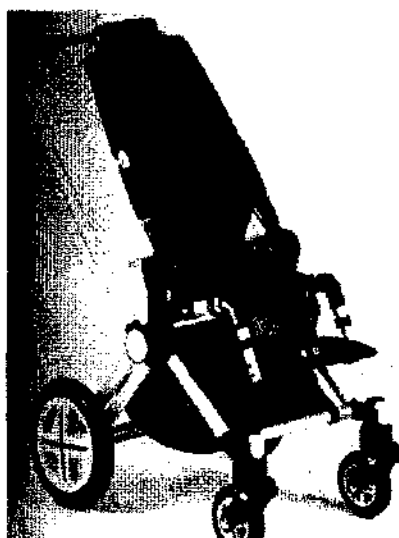

Киви



Кимба



Содержание

1. Назначение

2. Технические характеристики

3. Комплект поставки

4. Эксплуатация

4.1. Рекомендации для Вашей безопасности

4.2. Распаковка и приведение коляски в рабочее состояние

4.3. Рекомендации по уходу за коляской

5. Хранение

6. Ремонт, техническое обслуживание, замена шин

7. Утилизация

8. Свидетельство о приемке

9. Гарантийные обязательства

1. Назначение

Кресла-коляски «Лиза», «Эко-багги», «Кимба», «Киви» предназначены для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата.

Это может возникнуть в результате:

- паралича
- потери конечностей
- деформации конечностей
- контрактуры суставов
- прочих заболеваний

2. Технические характеристики

Кресла-коляски «Лиза», «Эко-багги», «Кимба», «Киви» соответствуют требованиям ГОСТ Р 51081-97, ГОСТ Р 51083-97, а также требованиям стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски по ИСО 7176-16.

Модель	Лиза	Эко-багги	Кимба	Киви
Масса	13,5 кг	9,0 кг	13,5 кг	12,0 кг
Максимальная нагрузка	50 кг	50 кг	50 кг	25 кг
Глубина сиденья	30,35,40 см	30 см	19-40 см	12-28 см
Ширина сиденья	36 см	35 см	26-35 см	27-32 см
Высота спинки/с удлинением	60/75 см	55 см	60/75 см	63/68 см
Угол наклона спинки	90°-130°	90°-130°	90°-130°	90°-130°
Высота подножки-сиденья	27-39 см	20-34 см	27-39 см	27-39 см
Диаметр колес -передних -задних	18 см 25 см	16,5 см 20 см	18 см 25 см	18 см 25 см
Размеры сложенной коляски	106x49x40 см	30x40x120 см	82x44x27 см	65x90x50 см

3. Комплект поставки

1. Кресло-коляска _____ 1 шт
2. Инструкция по эксплуатации _____ 1 шт.
3. Шестигранные гаечные ключи для регулировки длины подножек и подтягивания крепежных элементов _____ 1 шт.

4.Эксплуатация

4.1. Рекомендации по безопасному использованию коляски

Перед использованием коляски для Вашей безопасности рекомендуем ознакомиться с данными рекомендациями:

- Кресла-коляски для детей-инвалидов должны использоваться только на ровной и твердой поверхности.
- При преодолении лестниц или возвышенностей для безопасности рекомендуем прибегать к помощи двух человек.
- При преодолении ступенек, порогов и лестниц ставьте коляску на задние колеса (при движении на верх – потянуть немножко назад, при движении вниз – медленно опуская вперед)
- Поднимайте коляску только за литые или жестко привинченные детали:
- трубку передней рамы над передними колесами, заднюю ось, ручки для сопровождающего лица.
- При езде по возвышенностям или спускам крепко держите коляску за ручки для сопровождающего лица. При езде вдоль возвышенности коляска иначе может опрокинуться на бок, при езде по спуску произвольно укатиться.
- Избегайте ставить коляску на спуске, если однако это остро необходимо, ставьте ее в обратном направлении на тормозах.
- При саждении или высаживании ребенка из коляски ставьте ее на тормоза.
- При саждении или высаживании ребенка подножка не должна быть использована.
- Максимальная нагрузка на коляску не должна превышать 50 кг.
- Перед использованием коляски оба фиксирующих запора на раме должны быть жестко зафиксированы.
- Перед тем как начать движение на коляске, необходимо жестко закрепить и соединить подножки, чтобы не погнуть переднюю раму.
- Навешивание тяжелых сумок может негативно сказаться на стабильности коляски.
- Никогда не оставляйте Вашего ребенка в коляске без присмотра. Даже тогда, когда он зафиксирован ремнем, и коляска стоит на тормозах.

4.2. Распаковка и приведение коляски в рабочее состояние

Для того, чтобы привести коляску в рабочее состояние необходимо действовать следующим образом:

- аккуратно удалите упаковку и фиксатор, используемый при транспортировке ;
- поставьте правую ногу за левым задним колесом .
- Правую руку положите на правую ручку;
- Левую руку положите на рычаг для складывания коляски
- Легко потяните за коляску по направлению заднего колеса
- Обратите внимание, чтобы скользящая рама полностью легла на заклепку
- Слегка опрокинуть коляску через заднюю ось назад
- Рычаг для рас/складывания коляски нажать до раскрытия «ножниц» до упора

Внимание! Во избежании защемления рук раскладывать коляску только по описанному способу.

Подножка (первая сборка)

- Фиксирующую ось вставить в отверстие
- Боковые трубки вставить в отверстия для подножек на нужную высоту и затянуть винты.

В повседневной жизни действовать следующим образом:

- Подножку снаружи повернуть вовнутрь, подножки опустить вниз, фиксирующую ось вставить в отверстие.
- Обратить внимание, чтобы запирающие болты защелкнулись со звуком.

При сворачивании коляски действовать следующим образом:

- Убрать из коляски дополнительные детали.
- Подножку демонтировать в обратном порядке.
- Положить левую руку на рычаг для складывания коляски.
- Правую руку расположить на спинке коляски и потянуть за рычаг складывания коляски.
- Затем действовать в обратном порядке как при раскладывании.
- Под конец зафиксировать коляску фиксирующим ремнем.

4.3.Рекомендации по уходу за коляской

Для продления срока эксплуатации коляски и соблюдения мер безопасности советуем придерживаться следующих рекомендаций:

- не превышайте максимально допустимую нагрузку на коляску (50 кг)
- не рекомендуется перевозить на коляске тяжелые сумки, так как это негативно влияет на ее стабильность;
- не оставляйте ребенка в коляске без присмотра, даже если он пристегнут ремнями, и коляска стоит на тормозе;
- после регулировки коляски следите, чтобы все винтовые крепления были хорошо затянуты;
- все пластмассовые и рамочные части должны чиститься только обычными домашними чистящими средствами;

5. Хранение

Кресла-коляски должны храниться в крытых помещениях при температуре от 0° до 40° при влажности до 80%. Расстояние до отопительных приборов не менее 1м.

6. Ремонт

В случае поломки Вашей инвалидной коляски обращайтесь в фирму, которая Вам ее продала.

7. Утилизация

Утилизация производится в соответствии с действующими нормативными документами.

8. Свидетельство о приемке

Кресла-коляски для детей-инвалидов «Лиза», «Эко-багги», «Кимба», «Киви» соответствуют требуемой нормативной документации (ГОСТ Р 51083, ГОСТ Р ИСО 7176) и признаны годными к эксплуатации.

9. Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-колясок требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51081-97; ГОСТ Р 51083-97) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации. Кресла-коляски соответствуют требованиям стойкости к возгоранию материалов, используемых для обивки мягких элементов кресла-коляски по ИСО 7176-16.

- 1) Гарантия на детскую инвалидную коляску на производственные дефекты предоставляется на 1 год.
- 2) Во время действия гарантии некондиционные или бракованные детали ремонтируются или заменяются при предоставлении товарных документов и письменной рекламации бесплатно (согласно п.1).
- 3) Исключение составляют те дефекты, которые возникли из-за изменений и/или ремонтных работ, проведенных третьими лицами без предварительного согласия фирмы-изготовителя.
- 4) Гарантия не распространяется на те дефекты, которые возникли в результате естественного износа или несоответствующего использования коляски.
- 5) Гарантия прекращает свое действие, если при ремонте использовались не оригинальные запасные части.
- 6) Гарантия также прекращает свое действие, если монтаж оригинальных деталей или конструктивные изменения проводились не уполномоченной изготовителем фирмой или не самим изготовителем.
- 7) Во время действия гарантии заменяемые детали являются собственностью фирмы-изготовителя.

Гарантия распространяется только на те случаи, когда изделие вышло из строя не по вине покупателя!

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

Срок гарантии _____ 4 года

Дата продажи _____

Сервисное обслуживание производится в ООО «ОТТО БОКК Сервис»
Контактный телефон: (495) 564 83 60, (495) 933 48 58
Адрес: г.Москва, ул.Молодогвардейская, д.57, стр.3

Изготовитель: ОТТО БОКК Мобилити Соллюшнс ГмбХ
Линденштрассе 13, Д-07426, Кенигзее, Германия
Тел.: (0 36 738) 79 0
Факс: (0 36 738) 79 200

Поставщик: ООО «ОТТО БОКК Сервис»
119334 Москва, 5-й Донской проезд, 15, стр.16
Тел.: (495) 564 83 60
Факс: (495) 564 83 63
E-mail: info@ottobock.ru
[http:// www.ottobock.ru](http://www.ottobock.ru)

Карточка-заменитель
на материалы к Регистрационному удостоверению №

06149

Цель изъятия: _____
(перерегистрация, уничтожение, др. причина)

Дата изъятия: _____

Номер заявки на перерегистрацию/дата: _____

Номер нового Регистрационного удостоверения/дата: _____

Топорков

(Фамилия получателя)

« _____ » _____ 200__ года

