

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Эскулап»
Пономарев В.Н..



03.08.2009 г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

**«Шприцы трехкомпонентные инъекционные однократного применения
с иглами и без, типа «Луер» и «Луер-лок», стерильные, объемом:
1мл, 2мл, 2,5мл, 3мл, 5мл, 10мл, 12 мл, 20мл, 30мл, 50мл, 60мл, 150 мл,
по ТУ 9398-001-28994-01-2009»**

Инструкция по эксплуатации.

- Визуальным осмотром определить целостность каждой упаковки шприца
- Шприц из поврежденной индивидуальной упаковки использовать запрещается
- Вскрыть индивидуальную упаковку, извлечь шприц
- Снять с иглы защитный колпачок
- Набрать в шприц лекарственный препарат.
- Расположить шприц с иглой вертикально, выдавить, нажимая на шток – поршень, пузырьки воздуха
- После инъекции шприц уничтожить

Хранить в отапливаемых, вентилируемых помещениях при температуре от +5° С до +40°С и относительной влажности воздуха до 80 % при +25°С.

- Не применять повторно!
- Гарантийный срок – 5 лет со дня стерилизации



Генеральный директор ООО «Эскулап»



(Пономарев В.Н.)