

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор  
ООО МедИнформ



Проненко Р. М.

20\_\_ г.

М. П.

## **ИНСТРУКЦИЯ по применению изделия медицинского назначения:**

**Гель силиконовый Стратамед (Stratamed) для использования на открытых ранах и нарушениях кожи, в тубах по 5, 10, 20, 50 г.**

Производства:

Stratapharma AG (Стратфарма АГ), CH-4051 Basel, Швейцария.

### **Организации-изготовители:**

- Dow Corning Corporation 2200 West Salzburg Road P. O. Box 994, Midland, Michigan, 48686, USA
- HiMedica Ltd. Unit B, Tarvin, Cheshire CH3 8JF, United Kingdom
- Aphena Pharma Solutions – Maryland, LLC, 7978 Industrial Park Road, P. O. Box 3382, Easton, Maryland, 21601, USA
- Codibel sa (Facopar) Zone C – rue Jules Bordet, 7180, Seneffe, Belgium

2011

### **Краткое описание.**

**Гель силиконовый Стратамед (Stratamed)** предназначен для применения в различных сферах медицины, в том числе в дерматологии, хирургии и эстетической хирургии для предотвращения образования и лечения келоидных и гипертрофических кожных рубцов, как длительно существующих, так и свежих, возникших в результате травм, оперативных вмешательств и ожогов. **Гель силиконовый Стратамед (Stratamed)** является первым силиконовым гелем, который может быть использован после многих инвазивных процедур.

**Гель силиконовый Стратамед (Stratamed)** разработан на основе силикона. Не один из компонентов средства не является лекарством, средство не оказывает никакого фармакологического действия ни местно, ни системно.

### **Формы выпуска.**

Выпускается в виде геля в тубах по 5, 10, 20, 50 г.,

### **Показания к применению.**

**Гель силиконовый Стратамед (Stratamed)** предназначен для обработки рубцов и открытых ран, как длительно существующих, так и свежих, возникших в результате травм, оперативных вмешательств и ожогов.

**Гель силиконовый Стратамед (Stratamed)** был разработан для использования на всех типах рубцов в том числе, тех, которые являются результатом:

- общей хирургии
- травм
- хронических ран
- ожогов
- укусов
- ссадин и сыпи
- лазерной терапии, в том числе удаление татуировок
- химического пилинга
- кожных ссадин
- акне и других заболеваний кожи.

При выраженном рубцовом процессе рекомендуется сочетание Стратамед (Stratamed) с другими видами терапии.

### **Противопоказания, побочные действия.**

Противопоказаний к применению средства нет.

Индивидуальная непереносимость (в виде покраснения, раздражение на коже) наблюдается крайне редко.

Стратамед (Stratamed) не обладает какими либо побочными эффектами, не вызывает раздражения кожи, мацерации или инфекционных осложнений. Может применяться даже у детей и лиц с чувствительной кожей.

## **Применение.**

Перед первым использованием **Геля Стратамед (Stratamed)** аккуратно срежьте наконечник с пластиковой тубы.

### Нанесение на поврежденную кожу не требующее вторичную повязку:

Сначала убедитесь, что пораженные участки кожи или раны чистые и сухие. Затем нанесите очень тонкий слой геля на пострадавшие области и оставьте до полного высыхания.

**Гель силиконовый Стратамед (Stratamed)** должен применяться один раз в день, или два раза в день,

на открытые участки кожи, в зависимости от рекомендаций вашего врача. После высыхания средства, на его поверхность можно наносить макияж и солнцезащитные средства.

### Нанесение на поврежденную кожу или раны, требующее вторичную повязку:

Сначала убедитесь, что пораженные участки кожи или раны чистые и сухие. Затем нанесите тонкий слой геля и накройте повязкой. Сушка не является необходимой.

Для достижения наилучших результатов гель Стратамед (Stratamed) должен быть в постоянном контакте с кожей (24 часа в сутки).

Гель высыхает в течение 5-6 минут, если это занимает больше времени, вероятно, Вы нанесли слишком большое количество, удалите излишки чистой салфеткой или марлей и дайте гелю засохнуть. Чтобы уменьшить время сушки в жарком климате, храните гель в холодильнике.

Рекомендуемая продолжительность лечения составляет как минимум 60-90 дней. Лечение больших шрамов может занять больше времени.

## **Особые указания:**

- Изделие предназначено только для наружного применения.
- Не наносите Стратамед (Stratamed) на слизистые оболочки и глаза. Если не удалось избежать попадания в глаза, следует промыть глаза проточной водой и обратиться к врачу.
- В случае неполного высыхания Стратамед (Stratamed) может оставлять следы на одежде.
- Не следует наносить Стратамед (Stratamed) поверх любых дерматологических препаратов, не проконсультировавшись с врачом.
- Гель не содержит антибактериальных ингредиентов, поэтому если появляются признаки инфекции необходимо обратиться к врачу.
- Не подходит для влажных, сильно экссудативных или туннелированных ран.

Основу геля Стратамед (Stratamed) составляет инертный силикон, который действует только поверхностно и не оказывает общего действия на организм. В редких случаях применение геля может вызвать покраснение, появление болезненных ощущений и раздражения на коже. При появлении любых нежелательных реакций следует обратиться за консультацией к врачу или провизору.

#### **Условия хранения**

- Стратамед (Stratamed) следует хранить в сухом месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С
- Избегайте прямого воздействия на средство солнечных лучей.
- Следует хранить средство в недоступном для детей месте.
- После использования закрывайте тубу крышкой.
- Не используйте Стратамед (Stratamed) после истечения срока годности, указанного на упаковке.



