

«УТВЕРЖДАЮ»

**Генеральный директор
ООО МедИнформ**



Ироценко Р. М.

**« » 20__ г.
М. П.**

**ИНСТРУКЦИЯ
по применению
изделия медицинского назначения:**

**Гель силиконовый Стратадерм (Strataderm) для рассасывания и предотвращения
образования рубцов, в тубах по 5, 10, 20, 50 г.**

Производства:

Stratapharma AG (Стратфарма АГ), CH-4051 Basel, Швейцария.

Организации-изготовители:

- Dow Corning Corporation 2200 West Salzburg Road P. O. Box 994, Midland, Michigan,
48686, USA
- HiMedica Ltd. Unit B, Tarvin, Cheshire CH3 8JF, United Kingdom
- Aphenia Pharma Solutions – Maryland, LLC, 7978 Industrial Park Road, P. O. Box 3382,
Easton, Maryland, 21601, USA
- Codibel sa (Facopar) Zone C – rue Jules Bordet, 7180, Seneffe, Belgium

2011

Краткое описание.

Гель силиконовый Стратадерм (Strataderm) для рассасывания и предотвращения образования рубцов, в тубах по 5, 10, 20, 50 г. предназначен для применения в различных сферах медицины, в том числе в дерматологии, хирургии и эстетической хирургии для предотвращения образования и лечения келоидных и гипертрофических кожных рубцов, как длительно существующих, так и свежих, возникших в результате травм, оперативных вмешательств и ожогов.

Гель силиконовый Стратадерм (Strataderm) разработан на основе силикона. Не один из компонентов средства не является лекарством, средство не оказывает никакого фармакологического действия ни местно, ни системно. Применение силиконового геля является легким и удобным способом улучшить состояние рубца, не прибегая к болезненным и дорогостоящим инвазивным процедурам.

Формы выпуска.

Выпускается в виде геля в тубах по 5, 10, 20, 50 г.

Показания к применению.

Гель силиконовый Стратадерм (Strataderm) применяется для всех видов рубцов, в том числе в результате: общих хирургических операций, травм, застарелых ран, ожогов, укусов, акне и других заболеваний кожи. **Гель силиконовый Стратадерм (Strataderm)** гель не следует применять для лечения угревой сыпи в активной стадии или наносить на открытые раны.

Гель силиконовый Стратадерм (Strataderm) может использоваться как монотерапия, так и в комплексе с другими видами лечения (инъекции кортикостероидов, сдавливающие повязки и т.д.) для повышения эффективности лечения.

Противопоказания, побочные действия.

Противопоказаний к применению средства нет.

Индивидуальная непереносимость (в виде покраснения, раздражение на коже) наблюдается крайне редко.

Гель Стратадерм (Strataderm) не обладает какими либо побочными эффектами, не вызывает раздражения кожи, мацерации или инфекционных осложнений. Может применяться даже у детей и лиц с чувствительной кожей.

Применение.

Перед первым использованием Геля Стратадерм (Strataderm) аккуратно срежьте наконечник с пластиковой тубы.

Гель силиконовый Стратадерм (Strataderm) нужно аккуратно нанести очень тонким слоем на рубец. Перед нанесением убедитесь, что рубец чистый и сухой. Гель высыхает на поверхности кожи и оставляет невидимую прозрачную пленку, поэтому втирать его не стоит, т.к. это не повысит его эффективность. К тому же, втирание может травмировать рубец.

При правильном нанесении Стратадерм (Strataderm) гель должен полностью высохнуть в течение 3-4- минут. Если в течение этого времени гель не высох, значит, Вы нанесли слишком много геля. Аккуратно промокните излишек геля салфеткой и оставьте гель досыхать.

После полного высыхания геля, поверх него можно наносить косметику, солнцезащитные крема, сдавливающие повязки и т.д.

Рекомендуемый курс применения геля Стратадерм (Strataderm) составляет 60-90 дней (24 часа/каждый день). Для улучшения состояния более крупных и застарелых рубцов может потребоваться больше времени. Используйте Стратадерм (Strataderm) гель до тех пор, пока улучшения больше не будут наблюдаться.

Особые указания:

- Стратадерм (Strataderm) гель нельзя наносить на открытые раны.
- Стратадерм (Strataderm) гель нельзя наносить на глаза и слизистые оболочки.
- Стратадерм (Strataderm) гель нельзя наносить на другие участки кожи без рекомендации врача.
- Стратадерм (Strataderm) гель может оставлять пятна на одежде, если он не полностью высох.
- Стратадерм (Strataderm) гель используется только для наружного применения. Если появились раздражения, прекратите использование и проконсультируйтесь с врачом.
- Храните при температуре не выше 25 °C.
- Не используйте Стратадерм (Strataderm) гель после окончания срока годности, который указан на упаковке.

Стратадерм (Strataderm) гель можно применять для кожи детей и чувствительной кожи взрослых. Тем не менее, при появлении покраснения, боли и раздражения, следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.

Условия хранения

- Стратадерм (Strataderm) гель следует хранить в сухом месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C
- Избегайте прямого воздействия на средство солнечных лучей.
- Следует хранить средство в недоступном для детей месте.
- После использования закрывайте тубу крышкой.
- Не используйте Стратадерм (Strataderm) гель после истечения срока годности, указанного на упаковке.

