

УТВЕРЖДАЮ

Директор

ООО «МедиКрафт»

Юдин А.В.

"27" марта 2020 г.



Гель медицинский проводящий абразивный "Акугель-Подготовка"

фотографическое изображение МИ и этикетки



Гель медицинский проводящий абразивный "Акугель-Подготовка", масса 250 г





АКУГЕЛЬ - ПОДГОТОВКА

ГЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ПРОВОДЯЩИЙ
АБРАЗИВНЫЙ

Гель предназначен для улучшения электропроводности при проведении электрофизиологических, диагностических и физиотерапевтических процедур, обезжиривания кожи и абразивного отшелушивания отмерших слоев эпителия.

Порядок применения: Гель нанести непосредственно на кожу пациента в области для проведения исследования/процедуры или на ватный диск. Емкость с остатками геля плотно закрыть. Провести легкий массаж данной области без применения сильного давления. После обработки начать исследование/процедуру согласно действующим медицинским технологиям. Не допускается использование извлеченного из упаковки геля повторно.

Условия хранения: на стеллажах, расположенных от отопительных и нагревательных приборов на расстоянии не менее 1 м с защитой от воздействия прямых солнечных лучей при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C.

Состав: вода, карбомер, полисорбат-20, диоксид кремния, хлорид калия, консерванты, вспомогательные вещества.

Производитель: ООО "Медикрафт"
630073, Россия, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 2, комната 512. Тел: +7 (383) 213-63-91
e-mail: sales@medikraft.ru www.medikraft.ru

Масса нетто:
160 г

Срок годности 3 года
с даты выпуска
ТУ 32.50.50-013-66242897-2020
Рег. Уд. Росздравнадзора №
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

Партия №
Дата выпуска:



АКУГЕЛЬ - ПОДГОТОВКА

ГЕЛЬ МЕДИЦИНСКИЙ
ПРОВОДЯЩИЙ
АБРАЗИВНЫЙ

Гель предназначен для улучшения электропроводности при проведении электрофизиологических, диагностических и физиотерапевтических процедур, обезжиривания кожи и абразивного отшелушивания отмерших слоев эпителия.

Порядок применения: Гель нанести непосредственно на кожу пациента в области для проведения исследования/процедуры или на ватный диск. Емкость с остатками геля плотно закрыть. Провести легкий массаж данной области без применения сильного давления. После обработки начать исследование/процедуру согласно действующим медицинским технологиям. Не допускается использование извлеченного из упаковки геля повторно.

Условия хранения: на стеллажах, расположенных от отопительных и нагревательных приборов на расстоянии не менее 1 м с защитой от воздействия прямых солнечных лучей при температуре от плюс 5°C до плюс 40°C.

Состав: вода, карбомер, полисорбат-20, диоксид кремния, хлорид калия, консерванты, вспомогательные вещества.

Производитель: ООО "Медикрафт"
630073, Россия, г. Новосибирск, пр. Карла Маркса, д. 2, комната 512. Тел: +7 (383) 213-63-91
e-mail: sales@medikraft.ru www.medikraft.ru

Масса нетто:
250 г

Срок годности 3 года
с даты выпуска
ТУ 32.50.50-013-66242897-2020
Рег. Уд. Росздравнадзора №
Не подлежит обязательному подтверждению соответствия

Партия №
Дата выпуска:



Прошито, пронумеровано, скреплено подписью и печатью 4 л.
(четыре листа)

Директор
ООО «МедиКрафт»



А.В. Юдин

М.П.