

Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015

Вариант исполнения:

МК-04 Контейнер для сбора, хранения, предварительной дезинфекции и обеззараживания расходных материалов, многоразовый (белый, жёлтый, красный, голубой, бирюзовый, зеленый), объёмом: 1,3 л, 4,5 л, 7,5 л, 10 л, 20 л.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия показаны к применению для сбора, хранения, предварительной дезинфекции и обеззараживания расходных материалов.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбор отходов
- ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ пересыпание расходных материалов из контейнеров не допускается.
- ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ заполнять контейнеры более чем на ¾ от объема не допускается.
- ! ВНИМАНИЕ Масса содержимого контейнеров в кг. не должна превышать заявленный объем более чем в 1,5 раза.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ, ЭКСПЛУАТИРУЮЩЕМУ ЁМКОСТИ

К использованию контейнеров допускается только персонал, ознакомленный с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.

ОПИСАНИЕ

Наименование параметра	Значение параметров				
Объем, не менее, л	1,3	4,5	7,5	10	20
Масса, не более, г.	180	320	365	2500	4700
Номинальная нагрузка, не менее, кг.	4,5	8,0	9,5	12,0	22,0
Номинальная высота свободного падения, не менее, м.	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6
Номинальное усилие сжатия в осевом направлении, не менее, Н	343	647	775	902	902
Габаритные размеры крышки ДхШ, мм ± 1 мм	153х118	250х150	300х180	300х200	350х300
Масса крышки, не более, гр	30	130	190	200	250
Толщина стенки, мм	0,8±0,5	1,5±0,5	2±0,5	2±0,5	3±0,5

КОНТЕЙНЕРЫ:

- устойчивы к биологическим средам;
- поставляются нестерильными;
- не требуют проведения дезинфекции;
- выполнены из порошковой композиции пропилена с добавлением красителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделия имеют гладкую однородную и одноцветную лицевую поверхность, без вздутий, расслоений трещин, недоливов, раковин и сколов.

Ручки изделий выдерживают полуторакратную номинальную нагрузку.

Изделия устойчивы к средствам дезинфекции, рекомендованным МЗ РФ для медицинских отходов.

Контейнеры устойчивы к воздействию температуры при паровой стерилизации в автоклавах при паровой стерилизации в течение 30 минут, при температуре 132 градуса Цельсия и давлении в камере 2 атмосферы.

Контейнеры устойчивы к использованию электромагнитного излучения сверхвысокой частоты мощностью от 600 Вт до 1200 Вт, в течение не менее 70 минут, при температуре 100°С.

Контейнеры устойчивы к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации по МУ 25.1-001 в непрерывном режиме.

Разместить контейнер перед собой.

Нанести маркировку на этикетку, выполненную в виде наклейки или бирки, или при их отсутствии непосредственно на изделие.

Наклеить этикетку с маркировкой на корпус изделия или прикрепить бирку в месте, удобном для идентификации маркировки персоналом.

Перед использованием контейнер подвергнуть дезинфекции в соответствии с рекомендациями МУ-287-113.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

Для дезинфекции расходные материалы поместить в контейнер, содержащий дезинфицирующий раствор учитывая их комплектацию и/или конструктивные особенности:

- изделия, имеющие замковые части, погружают раскрытыми;
- изделия, имеющие каналы, заполняют раствором с помощью шприца и т.п. после этого придавливают прессом, если он входит в комплектацию изделия,
- легкие изделия для полного погружения в раствор необходимо прикрыть крышкой.

Время выдержки/обработки зависит от типа, выбранного для обработки дезинфицирующего средства, и отражается в инструкции по применению дезинфицирующего средства.

По истечении времени дезинфекции необходимо:

- вынуть из дезинфицирующего раствора обработанные расходные материалы;
- промыть расходные материалы под проточной водой от остатков дезинфектанта;
- слить из контейнера дезинфицирующий раствор,
- сполоснуть контейнер проточной водой и заполнить моющим раствором;
- погрузить расходные материалы в контейнер с моющим раствором и провести ручную очистку расходных материалов в моющем растворе с помощью щеток и ершей;
- очищенные расходные материалы промыть под проточной водой, сполоснуть дистиллированной, выгрузить из контейнера и просушить.

Если обработка расходных материалов проводится в растворе совмещенного действия (моюще-дезинфицирующем), то по окончании времени дезинфекции следует сразу же переходить к предстерилизационной ручной очистке изделий с помощью щеток и ершей в этом же растворе без промежуточных промываний. После чего расходные материалы вынуть из раствора, промыть под проточной водой и сполоснуть дистиллированной, просушить.

Контейнер с раствором закрывают крышкой и оставляют до следующей партии изделий (в случае возможности многократного использования раствора). По окончании срока годности рабочего раствора или при первых признаках изменения внешнего вида его необходимо слить, контейнер очистить с применением моющих средств.

Порядок обеззараживания

После сбора и герметизации медицинских отходов в соответствии с порядком работы, изложенном выше, переместите загерметизированные контейнеры к месту обеззараживания.

Обеспечьте выход пара при термической обработке, расположите контейнеры в установке для обеззараживания согласно эксплуатационной документации на применяемое оборудование.

Проведите обеззараживание медицинских отходов в зависимости от вида термической обработки в соответствии с нормативными документами:

- обеззараживание с использованием электромагнитного излучения сверхвысокой частоты производить соблюдением СанПиН 2.1.7.2790-10 в соответствии с МР 02.007-06, МУ 3.1.2313. 007;
- обеззараживание с использованием паровой стерилизации производить соблюдением СанПиН 2.1.7.2790-10 в соответствии с МУ № 287-113, МУ 3.1.2313. 007.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование и хранение изделий в части воздействия климатических факторов по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 - контейнеры и принадлежности устойчивы при хранении, транспортировании и эксплуатации к воздействию температуры окружающей среды от -40°C до +40°C, относительной влажности 98% при температуре +25°C, обладают вибропрочностью при вибрационных нагрузках в диапазоне частот 10-55Гц с амплитудой перемещения 0,15 мм.

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.

Хранение изделий должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Контейнеры, не поступившие в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежат вторичной переработке либо подлежат утилизации как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованиями санитарных правил Российской Федерации.

Контейнеры подлежат утилизации (уничтожению) согласно требованиям, установленным СанПиН 2.1.7.2790, в зависимости от класса собранных в них отходов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности изделия – 36 месяцев со дня приёмки ОТК предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения не менее трех лет от даты изготовления.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «КМ-Проект»
(ООО «Компания «КМ-Проект»)

Российская Федерация, Республика Татарстан, 420111, г. Казань, а/я 82

телефон: (843) 221-31-00; Факс: (843) 221-31-00

адрес электронной почты: km.med.waste@yandex.ru

3 (три) /

лист(а)
Л.А. Ск

Д.

