

Контейнеры для медицинских отходов и расходного материала по ТУ 9398-001-44941910-2015

Варианты исполнения:

МК-05	Контейнер для сбора, хранения, предварительной дезинфекции и обеззараживания, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (белый, красный, желтый, зеленый, серый), объемом: 15,0 л, 25,0 л, 30,0 л, 50,0 л.
МК-06	Контейнер для сбора, хранения, предварительной дезинфекции и обеззараживания, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (белый, желтый, красный, зеленый, синий), объемом: 10,0 л, 12,0 л, 20,0 л, 35,0 л, 50,0 л, 65,0 л.
МК-07	Контейнер для сбора, хранения, предварительной дезинфекции и обеззараживания, транспортирования и утилизации медицинских отходов, многоразовый (белый, красный, желтый), объемом: 10,0 л, 12,0 л, 20,0 л, 35,0 л, 50,0 л, 65,0 л.

Принадлежности:

В-01 Вкладка для замачивания и дезинфекции белья, многоразовая (цвет: белый, желтый, красный).

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия показаны к применению для сбора, хранения, предварительной дезинфекции и обеззараживания, транспортирования и утилизации медицинских отходов **всех классов**, установленных в СанПиН 2.1.7.2790. Классификация класса отходов, которые допускается собирать в контейнер, обеспечивается потребителем нанесением маркировки соответствующего цвета согласно требованиям, установленным в СанПиН 2.1.7.2790.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбор отходов классов А или Г в контейнеры желтого и красного цвета.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбор отходов класса Б в контейнеры красного цвета и в контейнеры цвета отличного от желтого без наличия желтой маркировки

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ сбор отходов класса В в контейнеры желтого цвета и в контейнеры цвета отличного от красного без наличия красной маркировки.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ повторное использование одноразовых контейнеров не допускается.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ пересыпание медицинских отходов из контейнеров не допускается.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ применение контейнеров с принадлежностями, имеющих признаки бракованного изделия (трещины, сколы, неустойчивость, кривизна) не допускается.

! ЗАПРЕЩАЕТСЯ заполнять контейнеры более чем на $\frac{1}{4}$ от объема не допускается.

! ВНИМАНИЕ Масса содержимого контейнеров в кг. не должна превышать заявленный объем более чем в 1,5 раза.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ

К использованию контейнеров допускается только персонал, ознакомленный с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10.

ОПИСАНИЕ

Параметры контейнеров и принадлежностей представлены в приложении 1

КОНТЕЙНЕРЫ и принадлежности:

- устойчивы к биологическим средам;
- поставляются нестерильными;
- не требуют проведения стерилизации или дезинфекции;
- выполнены из порошковой композиции пропилена с добавлением красителей

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Изделия имеют гладкую однородную и одноцветную лицевую поверхность, без вздутий, расслоений трещин, недоливов, раковин и сколов.

Изделия устойчивы к средствам дезинфекции, рекомендованным МЗ РФ для медицинских отходов.

Контейнеры МК-07 устойчивы к воздействию температуры при паровой стерилизации в автоклавах при паровой стерилизации в течение 30 минут, при температуре 132 градуса Цельсия и давлении в камере 2 атмосферы.

Контейнеры устойчивы к использованию электромагнитного излучения сверхвысокой частоты мощностью от 600 Вт до 1200 Вт, в течение не менее 70 минут, при температуре 100°C.

Контейнеры устойчивы к воздействиям биологических жидкостей и выделений тканей организма, с которыми они контактируют в процессе эксплуатации по МУ 25.1-001 в непрерывном режиме.

ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЙ К РАБОТЕ

Разместить контейнер и принадлежности (при наличии) перед собой.

Нанести маркировку на этикетку, выполненную в виде наклейки или бирки, или при их отсутствии непосредственно на изделие.

Наклеить этикетку с маркировкой на корпус изделия или прикрепить бирку в месте, удобном для идентификации маркировки персоналом.

При наличии вкладки, расположить вкладку в контейнере.

ПОРЯДОК РАБОТЫ

СБОР, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ и ХРАНЕНИЕ медицинских отходов в контейнерах.

Вложить в контейнер пакет соответствующего размера таким образом, чтобы края пакета загибались через края контейнера. Контейнер готов к эксплуатации.

Производить сбор медицинских отходов в течение 1 рабочей смены.

В конце рабочей смены, лицо, ответственное за сбор отходов, ставит контейнер на колесную опору и транспортирует отходы к месту их временного хранения на территории ЛПО.

После разгрузки, контейнер необходимо продезинфицировать.

Дезинфекцию контейнеров производить ежедневно. Для дезинфекции следует использовать зарегистрированные МЗ РФ и рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в соответствующих рекомендациях по их использованию.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ отходов (белья) в контейнерах МК-06, МК-07.

Установить вкладку В-01 соответствующего размера в контейнер.

Перед применением контейнер заполнить на 2/3 приготовленным заранее раствором для дезинфекции.

Белье последовательно вещь за вещью погружают в дезинфицирующий раствор из расчета 5 л/кг сухого белья.

Контейнер плотно закрывают крышкой и оставляют на время, указанное в инструкции на раствор для дезинфекции.

По истечении времени дезинфекции белье во вкладке В-01 вынуть из контейнера, постирать и прополоскать.

После разгрузки, контейнер и вкладку необходимо продезинфицировать. Дезинфекция контейнеров и вкладки производится ежедневно. Для дезинфекции следует использовать зарегистрированные МЗ РФ и рекомендованные к применению в медицинских учреждениях дезинфицирующие средства в концентрациях и времени экспозиции, указанных в соответствующих рекомендациях по их использованию.

Контейнеры МК-06 и МК-07 допускают проведение обеззараживания отходов, при необходимости.

Порядок обеззараживания

После сбора и герметизации медицинских отходов в соответствии с порядком работы, изложенном выше, переместите загерметизированные контейнеры к месту обеззараживания.

Перед размещением контейнера с отходами в установке для обеззараживания обеспечьте проникновение пара при термической обработке.

Расположите контейнеры в установке для обеззараживания согласно эксплуатационной документации на применяемое оборудование. Проведите обеззараживание медицинских отходов в зависимости от вида термической обработки в соответствии с нормативными документами:

обеззараживание с использованием электромагнитного излучения сверхвысокой частоты производить соблюдением СанПиН 2.1.7.2790-10 в соответствии с МР 02.007-06, МУ 3.1.2313. 007;

обеззараживание с использованием паровой стерилизации производить соблюдением СанПиН 2.1.7.2790-10 в соответствии с МУ № 287-113, МУ 3.1.2313. 007.

ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

Транспортирование и хранение изделий в части воздействия климатических факторов по условиям хранения 2 по ГОСТ 15150 - контейнеры и принадлежности устойчивы при хранении, транспортировании и эксплуатации к воздействию температуры окружающей среды от -40°C до +40°C, относительной влажности 98% при температуре +25°C, обладают вибропрочностью при вибрационных нагрузках в диапазоне частот 10-55Гц с амплитудой перемещения 0,15 мм.

Изделия транспортируются всеми видами крытых транспортных средств с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта.

Хранение изделий должно проводиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

ПОРЯДОК УТИЛИЗАЦИИ

Контейнеры, не поступившие в эксплуатацию, по истечении срока хранения подлежат вторичной переработке либо подлежат утилизации как твёрдые бытовые отходы в соответствии с требованиями санитарных правил Российской Федерации.

Контейнеры подлежат утилизации (уничтожению) согласно требованиям, установленным СанПиН 2.1.7.2790, в зависимости от класса собранных в них отходов.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Срок годности изделия – 36 месяцев со дня приёмки ОТК предприятия-изготовителя.

Гарантийный срок хранения не менее трех лет от даты изготовления.

КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Компания «КМ-Проект»
(ООО «Компания «КМ-Проект»)

Российская Федерация, Республика Татарстан, 420111, г. Казань, а/я 82

телефон: (843) 221-31-00; Факс: (843) 221-31-00

адрес электронной почты: km.med.waste@yandex.ru

Наименование параметра	Значение параметров по моделям			
Объем, не менее, л	15,0	25,0	30,0	50,0
Масса, не более, кг	1,0	2,0	2,5	3,0
Ширина, не менее, мм	200	200	250	310
Длина, не менее, мм	250	280	290	350
Высота, не менее мм	300	360	420	465
Номинальная высота свободного падения, не менее, м.	0,6	0,6	0,6	0,6
Номинальное усилие сжатия в осевом направлении, не менее, Н	1030	1030	1030	1030
Габаритные размеры крышки ДхШ, мм,±0,5 мм	250x260	320x360	360x380	360x380
Масса крышки, не более, гр	500	500	1000	1000

Конструкция педали изделия МК-05 выполнена в виде рычажного механизма из двух деталей, соединяемых между собой путём фиксации выступов, расположенных на большей детали в пазах, расположенных на меньшей детали (рис. 1).

Рисунок 1



Размеры деталей механизма должны соответствовать размерам, указанным в таблице 4.

Объём контейнера, л	15	25	30	50
Наименование параметра				
деталь 1				
Длина, не более мм.	340	470	480	650
Ширина, не более мм.	50	60	110	110
деталь 2				
Длина, не более мм.	260	360	380	380
Ширина, не более мм.	65	85	155	155
Габаритные размеры детали 2 в месте нажатия (ДхШ) не менее, мм	70x50	70x50	210x50	210x50

Усилие, необходимое для поднятия и закрытия крышки в изделиях КМ-05, оснащённых педалью, не должно превышать 10Н.


Наименование параметра	Значение параметров по моделям					
Объем, не менее, л	10,0	12,0	20,0	35,0	50,0	65,0
Масса, не более, кг	2,00	3,00	3,00	4,00	5,0	6,0
Высота не менее, мм	220	245	360	420	455	490
Верхний диаметр, не менее, мм	270	260	300	365	400	420
Нижний диаметр, не менее, мм	230	240	245	287	340	405
Номинальная высота свободного падения, не менее, м.	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Номинальное усилие сжатия в осевом направлении, не менее, Н	1030	1030	1030	1030	1030	1030
Диаметр крышки, не менее, мм.	250	250	300	400	400	400
Масса крышки, не менее, гр	100	100	200	300	300	300

Вкладка В-01

Выполнена в виде сетчатой корзины. Размеры и параметры вкладки должны соответствовать размерам, указанным в п.1.2.1. Объемом вкладки считается объем изделия, в которое она может устанавливаться. Масса вкладки должна быть не более 800 г.

Для всех изделий:

Объём изделий, л	Толщина стенки, мм
до 1,5	0,8±0,5
от 1,6 до 6,0	1,5±0,5
от 6,1 до 12	2±0,5
более 12	3±0,5

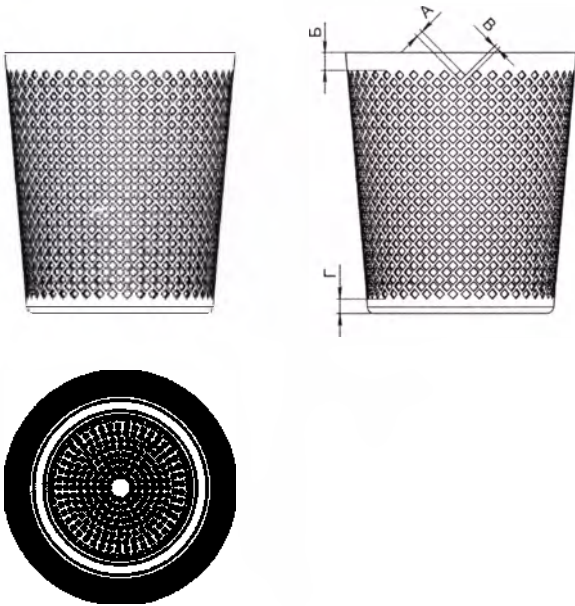

Обозначение на эскизе	Наименование параметра	Значение параметра
А	Размер ячеек (ДхШ), мм. ± 2 мм.	5х5 мм
Б	Расстояние от края вкладки до ячеек, мм. ±10 мм.	35 мм.
В	Расстояние между ячейками, мм. ± 2 мм.	5 мм.
Г	Расстояние от дна вкладки до ячеек, мм. ±10 мм.	35 мм.

Всего прошито и пронумеровано

5 (мел) листа(ов)

Директор ООО «Компания «КМ-ПРОЕКТ» Л.А. Скибинская

