

СОГЛАСОВАНО

Главный врач ФГУЗ

«Клиническая больница №119

Федерального медико-биологического агентства



Врач Агапов

2011 г.

УТВЕРЖДАЮ



Генеральный директор
«МЕДИКС-Консалт»

Нам Т.В.

2011 г.

**Инструкция по применению
изделия медицинского назначения**

**Раствор офтальмологический увлажняющий «Оксиал» во флаконах объемом: 3мл
и 10мл, производства компании «Тубилукс Фарма С.п.А.» (Tubilux Pharma S.p.A.),
Италия**

Москва 2011 г.

ИНСТРУКЦИЯ

Раствор офтальмологический увлажняющий «Оксиал» во флаконах объемом: 3мл и 10мл, производства компании «Тубилукс Фарма С.п.А.» (Tubilux Pharma S.p.A.), Италия

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Раствор офтальмологический увлажняющий «Оксиал» во флаконах объемом: 3мл и 10мл, производства компании «Тубилукс Фарма С.п.А.» (Tubilux Pharma S.p.A.), Италия, предназначен для применения в домашних условиях для улучшения переносимости контактных линз, увлажнения слизистой оболочки глаза.

2. ПРИНЦИП РАБОТЫ

Раствор офтальмологический увлажняющий «Оксиал» во флаконах объемом: 3мл и 10мл представляет собой увлажняющий офтальмологический раствор, содержащий гиалуроновую кислоту, полученную с помощью процессов ферментации (не животного происхождения). В состав «Оксиала» входит протектор, который является пленкообразующим полимером, обеспечивающим комфорт, в слегка гипотоничном сбалансированном растворе электролитов, с консервантом оксид, подверженным биологическому распаду. Это увеличивает эффективность гиалуроновой кислоты и оптимизирует вязкоэластические свойства «Оксиала».

«Оксиал» приносит быстрое и продолжительное облегчение в случаях ощущения сухости, раздражения и усталости глаз, не вызванных патологическими состояниями, а индуцированных внешними факторами, такими, как длительное пребывание перед видеозэкранами и мониторами, кондиционирование воздуха, запыление, загрязнение, задымление воздуха и т.п. Раствор офтальмологический увлажняющий показан как тем, кто пользуется контактными линзами любого типа, так и тем, кто не носит линзы.

3. АНАЛИЗИРУЕМЫЕ ОБРАЗЦЫ

Характеристики флакона

-материал флакона – ПВХ (непрозрачный белый)

-стерильно

-объем флакона – 10 мл, 3 мл.

Характеристики раствора

-Состав: натриевая соль гиалуроновой кислоты – 0,15%, борная кислота, протектор, хлорид натрия, хлорид калия, хлорид кальция гидрат, хлорид магния гексагидрат, оксид 0,06%, очищенная вода;

-прозрачный раствор;

-разлит в стерильных условиях;

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ ИЗДЕЛИЯ

Раствор офтальмологический увлажняющий «Оксиал» во флаконах объемом: 3мл и 10мл, производства компании «Тубилукс Фарма С.п.А.», предназначен для улучшения переносимости контактных линз, увлажнения слизистой оболочки глаза и может использоваться конечным потребителем в домашних условиях.

5. ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

Указания по применению:


- Убедитесь в том, что герметичность упаковки не нарушена.
- Тщательно вымойте руки.
- Чтобы открыть флакон, необходимо полностью отвернуть крышку до отделения кольца, свидетельствующего о том, что флакон не был вскрыт ранее.
- Переверните флакон вверх дном и закапайте одну или две капли в каждый глаз, или в соответствии с рекомендацией специалиста.
- Плотнo закройте флакон после использования.

Предупреждения:

- После вскрытия флакона раствор должен быть использован в течение 60 дней.
- Любые остатки препарата должны быть выброшены.
- Чтобы избежать возможного загрязнения, не касайтесь кончиком пипетки никаких поверхностей.
- Не применяйте препарат в случае повышенной чувствительности к любому из компонентов препарата.
- Сообщалось о редких случаях умеренного раздражения глаз при применении препарата.
- Прекратите применение препарата, если Вы ощущаете боль, покраснение глаз или снижение зрения после инстилляций. Проконсультируйтесь с врачом в случае, если перечисленные симптомы не проходят или усиливаются.
- Не глотайте раствор.
- Храните препарат в недоступном для детей месте.
- Не используйте раствор по истечении срока годности.
- Храните флакон при температуре ниже 25°C.
- При отсутствии улучшения проконсультируйтесь со специалистом.
- Не закапывайте «Оксиал» в глаз(а) вместе с другими препаратами т.к. их действие может изменяться.
- Не замораживайте раствор.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить при температуре от 0 до 25° С, относительной влажности воздуха не более 85%.

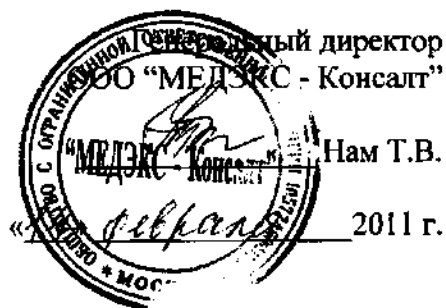

Всего пронумеровано, сшито и скреплено
печатью _____
Ген. директор ООО «МЕДЭКС-Консалт»
Нам Т.В. _____

