

Инструкция к применению.

Пакеты класса А.

став

Пакеты производятся из полиэтилена низкого давления.

казания

Пакеты предназначены для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса А

К отходам данного класса относятся:

Отходы не имеющие контакта с биологическими жидкостями пациентов, инфекционными больными; нетоксичные отходы.

Пищевые отходы всех подразделений ЛПУ кроме инфекционных (в т.ч. кожно-венерологических)

фтизиатрических. Мебель, инвентарь, неисправное

диагностическое оборудование, не содержащие токсичных элементов. Неинфицированная бумага, смет, строительный мусор и т.д.

Пакеты выдерживают нагрузку до 15 кг.

отивопоказания

нет

иническая
рмакология

Пакеты позволяют герметично хранить отходы до момента их вывоза с территории ЛПУ.

особ применения и
зы

Пакет закрепляют на специальной стойке (тележке) и заполняют отходами, по объему примерно на ¾. После этого из пакета полностью удаляют воздух и производят его герметизацию. Для дополнительной герметизации можно использовать пластиковые хомуты – стяжки. После заполнения пакеты доставляются в межкорпусные баки, установленные на территории ЛПУ.

словия хранения

Срок годности пакетов - 1 год. Хранить вдали от источников открытого огня, в сухом месте, без прямого солнечного света.

ебования к
урсосбережению и
ологии

Порядок сбора, хранения, удаления, и утилизации отходов медицинских подразделений осуществляется согласно СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

аркировка

На каждый пакет наносится маркировка содержащая: класс опасности; выдержка из СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»; инструкция по заполнению; предупреждения о работе в средствах индивидуальной защиты; информационное окно для заполнения, со следующими графами:

- * наименование ЛПУ;**
- * наименование подразделения;**
- * ответственное лицо;**
- * дата запаковки отходов.**

Основные типоразмеры

Номер типа	Класс отходов	Цвет	Габаритные размеры, мм		
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мкм
№001	A	белый	330	300	20
№002	A	белый	330	600	20
№003	A	белый	500	600	20
№004	A	белый	600	1000	20
№005	A	белый	700	800	20
№006	A	белый	700	1100	20
№007	A	белый	800	1000	20

Тамбовская область
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Госстандарт России
Генеральный директор

Бондарев Р.Д.

Бондарев Р.Д.

Пролито
и пронумеровано

2 листа



Инструкция к применению.

Пакеты класса Г.

состав

Пакеты производятся из полиэтилена низкого давления.

показания

Пакеты предназначен для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса Г

К отходам данного класса относятся:

Просроченные лекарственные средства отходы от лекарственных и диагностических препаратов, дезсредства, не подлежащие использованию, с истекшим сроком годности. Цитостатики и другие химпрепараты. Ртутьсодержащие предметы, приборы и оборудование.

Пакеты выдерживают нагрузку до 15 кг

противопоказания

нет

клиническая фармакология

Пакеты позволяют герметично хранить отходы до момента их вывоза с территории ЛПУ

Пакет закрепляют на специальной стойке (тележке) и заполняют отходами, по объему примерно на $\frac{3}{4}$. После этого из пакета полностью удаляют воздух и производят его герметизацию. Для дополнительной герметизации можно использовать пластиковые хомуты – стяжки. После заполнения пакеты доставляются в межкорпусные баки, установленные на территории ЛПУ.

способ применения и дозы

условия хранения

Срок годности **пакетов** - 1 год. Хранить вдали от источников открытого огня, в сухом месте, без прямого солнечного света.

Требования к ресурсосбережению и экологии

Порядок сбора, хранения, удаления, и утилизации отходов медицинских подразделениях осуществляется согласно СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Маркировка

На каждый пакет наносится маркировка содержащая: класс опасности; выдержка из СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»; инструкция по заполнению; предупреждения о работе в средствах индивидуальной защиты; информационное окно для заполнения, со следующими графами:

- * наименование ЛПУ;
- * наименование подразделения;
- * ответственное лицо;
- * дата запаковки отходов.

Прошито
и пронумеровано

2 листа



Инструкция к применению.

Пакеты класса В.

состав

Пакеты производятся из полиэтилена низкого давления.

показания

Пакеты предназначены для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса В

К отходам данного класса относятся:

Материалы, контактирующие с больными особо опасными инфекциями. Отходы из лабораторий, работающих с микроорганизмами 1-4 групп патогенности. Отходы фтизиатрических микологических больниц. Отходы от пациентов с анаэробной инфекцией.

Пакеты выдерживают нагрузку до 15 кг

противопоказания

нет

клиническая
фармакология

Пакеты позволяют герметично хранить отходы до момента их вывоза с территории ЛПУ

способ применения и
дозы

Пакет закрепляют на специальной стойке (тележке) и заполняют отходами, по объему примерно на $\frac{3}{4}$. После этого из пакета полностью удаляют воздух и производят его герметизацию. Для дополнительной герметизации можно использовать пластиковые хомуты – стяжки. После заполнения пакеты доставляются в межкорпусные баки, установленные на территории ЛПУ.

условия хранения

Срок годности пакетов - 1 год. Хранить вдали от источников открытого огня, в сухом месте, без прямого солнечного света.

требования к
ресурсосбережению и
экологии

Порядок сбора, хранения, удаления, и утилизации отходов медицинских подразделений осуществляется согласно СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

маркировка

На каждый пакет наносится маркировка содержащая: класс опасности; выдержка из СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»; инструкция по заполнению; предупреждения о работе в средствах индивидуальной защиты; информационное окно для заполнения, со следующими графами:

- * наименование ЛПУ;
- * наименование подразделения;
- * ответственное лицо;
- * дата запаковки отходов.

Основные типоразмеры

Номер типа	Класс отходов	Цвет	Габаритные размеры, мм		
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
№015	В	Красный	330	300	20
№016	В	Красный	330	600	20
№017	В	Красный	500	600	20
№018	В	Красный	600	1000	20
№019	В	Красный	700	800	20
№020	В	Красный	700	1100	20
№021	В	Красный	800	1000	20

генеральный директор

п.



Бондарев Р.Д.

Пролито
и пронумеровано

2 листа



Инструкция к применению.

Пакеты класса Б.

состав Пакеты производятся из полиэтилена низкого давления.

показания Пакеты предназначены для сбора, хранения и утилизации медицинских отходов класса Б
К отходам данного класса относятся:
Потенциально инфицированные отходы. Материалы и инструменты, загрязненные выделениями, в т.ч кровью. Выделения пациентов. Патологоанатомические отходы. Органические операционные отходы (органы, ткани и т.п.). Все отходы из инфекционных отделений (в т.ч пищевые). Отходы из микробиологических лабораторий, работающих с микроорганизмами 3-4 групп патогенности). Биологические отходы вивариев.
Пакеты выдерживают нагрузку до 15 кг.

противопоказания нет

клиническая фармакология Пакеты позволяют герметично хранить отходы до момента их вывоза с территории ЛПУ.
способ применения и дозы Пакет закрепляют на специальной стойке (тележке) и заполняют отходами, по объему примерно на ¾. После этого из пакета полностью удаляют воздух и производят его герметизацию. Для дополнительной герметизации можно использовать пластиковые хомуты – стяжки. После заполнения пакеты доставляются в межкорпусные баки, установленные на территории ЛПУ.
условия хранения

Срок годности пакетов - 1 год. Хранить вдали от источников открытого огня, в сухом месте, без прямого солнечного света.

Основные типоразмеры

Номер типа	Класс отходов	Цвет	Габаритные размеры, мм		
			Длина, мм	Ширина, мм	Толщина, мм
№008	Б	Желтый	330	300	20
№009	Б	Желтый	330	600	20
№010	Б	Желтый	500	600	20
№011	Б	Желтый	600	1000	20
№012	Б	Желтый	700	800	20
№013	Б	Желтый	700	1100	20
№014	Б	Желтый	800	1000	20

14

Порядок сбора, хранения, удаления, и утилизации отходов медицинских подразделений осуществляется согласно СанПин 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

На каждый пакет наносится маркировка содержащая: класс опасности; выдержка из СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-Эпидемиологические требования к организациям осуществляющим медицинскую деятельность»; инструкция по заполнению; предупреждения о работе в средствах индивидуальной защиты; информационное окно для заполнения, со следующими графами:

- Маркировка
- * наименование ЛПУ;
 - * наименование подразделения;
 - * ответственное лицо;
 - * дата запаковки отходов.

II.

Прошито
и пронумеровано

2 листа

