

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ГОРСКОЕ»


В.К. Хмелев.
« » 2011 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ИМН

Мебель медицинская смотровая ММС-«ЛАВКОР-Горское»

2011

1. Назначение изделия.

Мебель медицинская смотровая ММС-«ЛАВКОР-Горское» (в дальнейшем мебель), предназначена для проведения медицинских осмотров, несложных медицинских процедур, оснащения различных медицинских кабинетов.

Мебель применяется в смотровых кабинетах больниц и поликлиник, в хирургических отделениях больниц и поликлиник, перевязочных кабинетах, приемных отделениях больниц.

2. Основные технические характеристики.

Высота изделий мебели до сидения - постоянная.

Каркас разборный, выполнен из стальных труб с полимерным покрытием. Мягкие элементы изготовлены из ДСП, с настилом из пенополиуретана, покрытия искусственной кожей.

. Вид климатического исполнения – УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

По устойчивости к механическим воздействиям кушетка относится к группе 2 по ГОСТ Р 50444-92.

Мебель при горизонтальной установке выдерживает равномерно-распределенную двукратную номинальную нагрузку. За номинальную принимают нагрузку массой 80 кг.

Поверхности изделий мебели устойчивы к дезинфекции.

Срок эксплуатации – не менее 6 лет.

3. Подготовка к работе изделия.

После транспортировки изделий мебели в условиях отрицательных температур необходимо выдержать изделие при комнатной температуре не менее 6 часов.

Перед началом работы необходимо:

- провести сборку изделия;
- проверить фиксацию винтовых соединений.

4. Правила хранения и использования.

Хранение мебели должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях поставщика или потребителя, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отопляемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-6.2.

При использовании мебели вертикальная нагрузка на спинку и подголовник не должна превышать указанной в паспорте.

Генеральный директор



В.К. Хмелев