

«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
ООО «Бергус»

Р.М. Гурбанов

«10» апреля 2020 г.

Инструкция
по применению
(введена впервые)

«Бахилы медицинские»
ТУ 32.50.50-013-01716953-2020

производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус»
(ООО «Бергус»), Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район,
пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14, тел. 88005007985, info@bergus.ru.com,
www.bergus24.ru

НАИМЕНОВАНИЕ:

«Бахилы медицинские» по ТУ 32.50.50-013-01716953-2020

Варианты исполнения:

- Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Эконом»;
- Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Стандарт»;
- Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Особо прочные».

Производства Общество с ограниченной ответственностью «Бергус»

(ООО «Бергус »), Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14

НАЗНАЧЕНИЕ: Для посещения лечебно-профилактических учреждений.

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ: Потребителями являются медицинский и производственный персонал, посетители.

КОНТАКТ С ОРГАНИЗМОМ ЧЕЛОВЕКА: Изделия, кратковременно контактирующие с неповрежденной кожей рук. Первичная (потребительская) упаковка кратковременно контактирует с неповрежденной кожей рук.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: Применяется для соблюдения санитарно-гигиенических норм в лечебно-профилактических учреждениях, на производстве и в быту.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№	Наименование изделия	Вес $\pm 0,2$, г	Размер, ± 2 см	Цвет	Текстура
1	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Эконом»	1,8	15 x 40	синий	гладкие
2	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Стандарт»	2,5	15 x 40	синий	гладкие
3	Бахилы медицинские одноразовые полиэтиленовые «Особо прочные»	3,2	15 x 40	синий	гладкие

СОСТАВ:

Полиэтиленовая пленка, нить латексная.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Применяются для уменьшения риска распространения инфекций, а также количества бактерий на полах медицинских или других учреждений. Также бахилы защищают обувь и ноги от контакта с кровью или другой жидкостью.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Отсутствуют.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Наденьте бахилы поверх обуви. После использования выбросить в урну.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Отсутствуют.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Хранить в сухом месте при температуре от -5°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности воздуха не выше 80 % на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов, вдали от прямых солнечных лучей.

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Изделие одноразового использования.

Изделия эксплуатируют при температуре $+10$ до $+35^{\circ}\text{C}$ и влажности воздуха 60 - 80%.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия транспортирования в диапазоне температур от -50 до $+50$ °C и влажности воздуха 80% при температуре $+25$ °C.

Транспортирование изделий следует проводить в закрытом транспорте в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

СРОК ГОДНОСТИ:

Гарантийный срок службы – 5 лет со дня изготовления.

УТИЛИЗАЦИЯ И УНИЧТОЖЕНИЕ

Утилизация изделий потребителями при самостоятельном использовании осуществляется обычным путем совместно с бытовыми отходами.

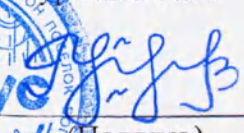
Утилизация отходов в конце производственного цикла осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ/ МЕСТО ПРОИЗВОДСТВА:

ООО «Бергус », Россия, 601270, Владимирская область, Суздальский район, пос. Боголюбово, ул. Ленина, д. 14 тел. 88005007985, www.bergus24.ru, info@bergus.ru

Генеральный директор
ООО «Бергус»

«10» апреля 2020 г.

Гурбанов Р.М.

М.П. (Подпись)



ООО «Бергус»

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью

3

Генеральный директор

Гурбанов Р.М.

«10»

апреля

2020 года

