

УСЛОВИЯ

ЭКСПЛУАТАЦИИ, ХРАНЕНИЯ И

ТРАНСПОРТИРОВКИ

1. НАЗНАЧЕНИЕ МЕБЕЛИ.

- Мебель предназначена для применения в лечебно-профилактических учреждениях и клинико-диагностических лабораториях.
- Медицинская мебель используется для хранения медицинских инструментов, лекарственных средств, перевязочных материалов и изделий медицинского назначения.
- Мебель для клинико-диагностических лабораторий предназначена для размещения и хранения лабораторной посуды и химических реактивов, лабораторных исследований, материалов для исследования, мойки лабораторной посуды (для изделий с мойками).

2. СРОК СЛУЖБЫ.

- Требования к надёжности мебели соответствуют требованиям РД 50-707-91 для класса Г.
- Средний срок службы медицинской и лабораторной мебели не менее 8 лет.
- Предельное состояние – состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим причинам.

3. ПРАВИЛА ДЕЗИНФЕКЦИИ.

- Устойчивость к дезинфекции соответствует ОСТ 42-21-2-85.
- Дезинфекцию необходимо проводить салфеткой, смоченной дезинфицирующим агентом. Салфетка должна быть отжата.
- Дезинфекция должна проводиться по ОСТ 42-21-2 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% синтетического моющего средства типа «Лотос» или 1% раствором хлорамина по ОСТ 6-01-76, а также может проводиться растворами, содержащими глутаровые альдегиды.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ВОДЕ.

- В связи с использованием высококачественной сантехники, чувствительной к жесткой воде, насыщенной солями и минералами, вода должна проходить глубокую фильтровую очистку.

5. МАКСИМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ.

максимальная равномерно распределенная нагрузка:

- на полки и дно ящиков – не более 20 кг;
- на полки из ламинированного ДСП – не более 8 кг;
- на крышки столов – не более 100 кг;
- на крышки тумб – не более 20 кг;
- на стеклянные полки – не более 3 кг.

6. УСТОЙЧИВОСТЬ РАБОЧИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ К АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ.

- Устойчивость мебели к механическим воздействиям соответствует ГОСТ Р 50444-92.
- Рабочие поверхности, выполненные из слоистого пластика, устойчивы к агрессивным средам, таким, как: серная, азотная, хлорная, уксусная кислоты, высокие температуры, при длительном нагревании (до 6 часов) до 150 градусов Цельсия;
- Рабочие поверхности, выполненные из эпоксидной смолы (материал DURCON) имеют высокую химическую стойкость к большинству агрессивных химических соединений (уксусная кислота, ацетон, едкий аммиак, хромовая кислота, соляная кислота, олеиновая кислота, углекислый натрий, азотная кислота, изооктан, дихлорэтан и др.), особенно устойчивы к воздействию высоких (при длительном нагревании до 6 часов – до 200 градусов Цельсия) и низких температур при ежедневных лабораторных работах.
- Рабочие поверхности из ДСП, покрытые ламинатом высокого давления, ударопрочны, влагостойки, имеют очень хорошую стойкость к водопоглощению, воздействию высоких температур, химических веществ.

7. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ.

- Вариант исполнения мебели: УХЛ 4.2; ГОСТ 15150.
- После транспортирования или хранения в условиях отрицательных температур мебель должна быть выдержана в нормальных климатических условиях не менее 24 часов.
- Перед началом эксплуатации необходимо обследовать на целостность деталей изделий.
- Хранение изделий должно осуществляться при температуре окружающего воздуха от - 50 до +50 градусов Цельсия
- Эксплуатация изделий осуществляется при температуре окружающего воздуха от +10 до +50 градусов Цельсия и относительной влажности 80% при температуре +25 градусов Цельсия.

8. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВКИ.

- Автомобильным транспортом: по дорогам с неусовершенствованным покрытием скорость не должна превышать 50 км/час.

- Все виды транспортировки крытыми транспортными средствами должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 504444 и правилами перевозки грузов, действующими на транспорте данного вида.

9. УСТОЙЧИВОСТЬ К МЕХАНИЧЕСКИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ.

- Механические повреждения могут нарушить структуру материалов используемых в производстве.
- Ударная вязкость слоистого пластика – $A=3,57$ кДж/м.кв.
- Ударная вязкость материала «DURCON» – $A=5,4$ к Дж/м. кв.

10. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ.

- Изделия должны быть утилизированы, обезврежены или захоронены в специальных вагонах в соответствии с «Санитарными правилами проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения не утилизируемых промышленных отходов», утверждённых приказом заместителя Главного санитарного врача СССР от 22.08.77 г. № 1746-77.

«УТВЕРЖДАЮ»

«ЛАБРОМЕД» Ю.В. Якимов



Генеральный директор ООО