


МОЙКИ НАСТЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ "ЛАБРОМЕД-3"

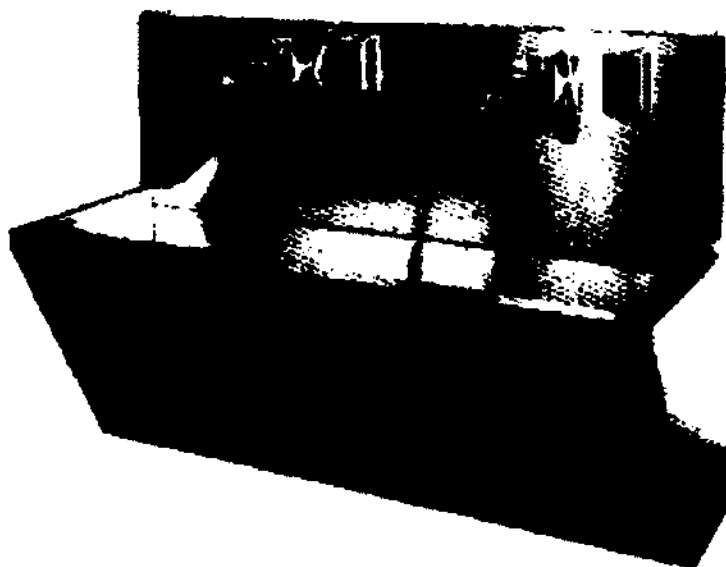

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Производитель: ООО Лабромед, РФ, Моск. обл., г. Химки

Настенная хирургическая мойка изготовлена из нержавеющей стали марки AISI 304. Конструкция медицинской мойки предполагает ее крепление на стену (все необходимое входит в комплект). Если особенности помещения (гипсокартонные стены и прочее) не позволяют прикрепить медицинскую мойку на стену, она может быть снабжена специальной подставкой. Смеситель в комплект медицинской мойки не входит.

1. ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ

Перед началом использования убедитесь, что в результате транспортировки упаковка не была повреждена и отсутствуют видимые повреждения. Убедитесь, что присутствуют все дополнительные принадлежности, перечисленные в упаковочном листе. В случае расхождений, пожалуйста обратитесь к производителю или его поставщику на вашей территории.

2. ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Перед началом использования убедитесь, что весь упаковочный материал удален.



Переместите мойки на предполагаемое место установки и совершите сборку согласно схеме сборки!

3. ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чистка моек

Дезинфекция металлических частей проводится при помощи дезрастворов

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Наименование изделия	Габаритные размеры (Ширина x Глубина x Высота) мм
Мойка настенная хирургическая ХММ-071 "Лабромед-3"	1045 x 470 x 800
Мойка настенная хирургическая ХММ-072 "Лабромед-3"	1045 x 470 x 1600
Мойка настенная хирургическая ХММ-073 "Лабромед-3"	1045 x 470 x 2300

Примечания

- 1 Смеситель и дозатор в комплект поставки мойки не входят

2 По желанию заказчика мойка комплектуется локтевым (ORAS) или сенсорным (ORAS) смесителем, механическим или сенсорным дозатором

Средний срок службы моек должен быть не менее 10 лет. За критерий предельного состояния моек принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим или функциональным показателям (когда стоимость годовых ремонтов достигнет 60 % стоимости нового изделия).

Внешний вид моек

ЛАБРОМЕД

141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д.2, (495) 234-84-00

Исх № 251

От 01.01.2008

Доверенность

ООО «ЛАБРОМЕД», расположенная по адресу: 141400, Московская область, г. Химки, ул. Заводская, д.2, (495) 234-84-00, в лице Генерального директора Ю.В. Якимов, действующего на основании Устава, доверяет Маковской Анжеле Ивановне, проживающей по адресу: Москва, гор. Зеленоград, дом 1818, кв. 158, паспорт 45 00 197322, выдан ОВД «КРЮКОВО» УВД Зеленоградского округа города Москвы 17.01.2001 г., ведение дел по регистрации и внесению изменений в регистрационную документацию на изделия медицинского назначения. В связи с исполнением данного поручения, доверяет Маковской Анжеле Ивановне подавать на исполнение заявки на регистрацию и внесение изменений в регистрационную документацию на изделия медицинского назначения; получать и подписывать от имени организации все необходимые документы; получать готовые Регистрационные Удостоверения и другие документы, выполненные по заявкам, а так же совершать все необходимые действия в интересах организации, связанные с выполнением данного поручения.

Доверенность выдана сроком на 1 год.

ООО «ЛАБРОМЕД»
Генеральный директор




Якимов Ю.В.

МЕБЕЛЬ ОБЩЕБОЛЬНИЧНАЯ

Подставка для мусора ПМ

ПМ-1

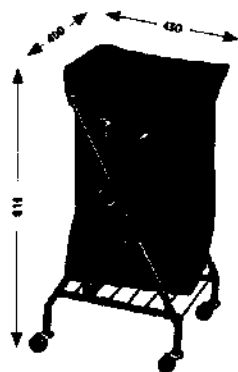

Выполнена из нержавеющей стали. Металлическая складная конструкция, позволяющая легко крепить на ней одноразовый пакет для сбора мусора. Диаметр колесных опор 50 мм.

Подставки медицинские для тазов серии ПТ

ПТ-1

Объем:
с одним тазом – 9 л.
с двумя тазами – 6,5 л.




Выполнена полностью из нержавеющей стали. Пятилучевое основание на колесных опорах Ø 50 мм.

Штатив для длительных инфузий серии ШДВ

ШДВП-2

Штатив подвижный. Основание пятилучевое на пластмассовых колесных опорах Ø50 мм. Изготовлен из нержавеющей стали. Имеет четыре крючка и два держателя для флаконов. Регулируется по высоте цанговым зажимом.

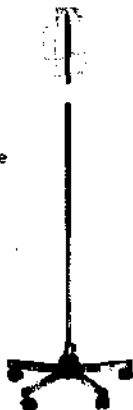

Подставка для стерилизационных коробок серии ПСК

ПСК-1

Подставка выполнена полностью из нержавеющей стали. Обеспечивает надежную установку всех типоразмеров стерилизационных коробок. Высота открывания крышки регулируется механически. Крышка коробки открывается с помощью ножного привода. Основание с регулирующимися опорами.



Стойка для инфузий

БК-2

Основание и тубус хромированные или электростатически лакированные. Штатив хромированный. Регулировка высоты механическая. Ролики 75 мм. Штатив с двумя крючками (WK-02.0) или с двумя крючками и двумя держателями бутылок (WK-02.1).

Технические характеристики
Высота 1720х2470 мм.
Основание 550 мм.



НОВИНКА!

НАСТЕННЫЕ ХИРУРГИЧЕСКИЕ МОЙКИ



ш 800 г 470 в 1045



ш 1500 г 470 в 1045



ш 2300 г 470 в 1045

Изготовлены из шлифованной нержавеющей стали марки AISI 304.

Конструкция хирургических моек предполагает крепление на стену (все необходимое входит в комплект).

Смеситель и дозатор в комплект хирургической мойки не входит.



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Выбор смесителей:

- локтевой (ORAS),

- сенсорный (ORAS)

Выбор дозаторов: механика, сенсорный

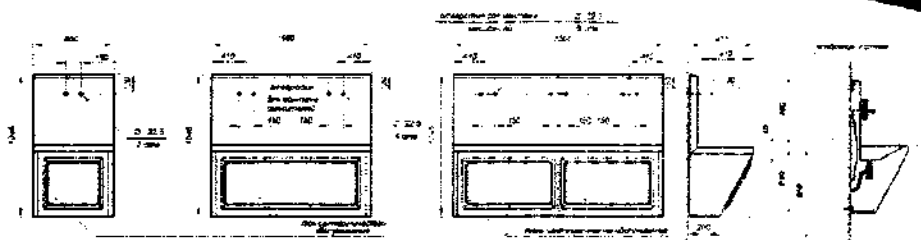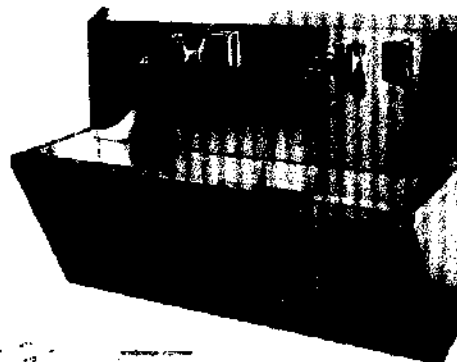


МЕБЕЛЬ ДЛЯ КОСМЕТОЛОГИИ И МАССАЖА

СТОЛ МАССАЖНЫЙ

СМ - 1

Д 2000 Ш 650 В 600-835

Базовая модель.

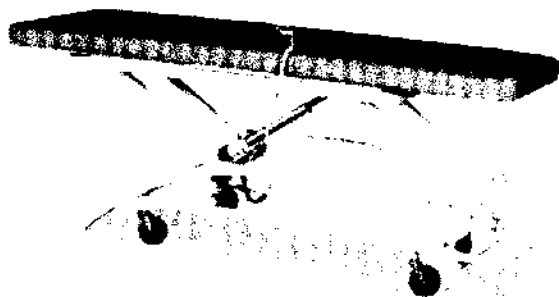


СТОЛ МАССАЖНЫЙ

СМ - 2

Д 2070 Ш 650 В 600-835

Ложе стола имеет две секции. Спинная секция регулируется ступенчато при помощи механизма "Rostomat".

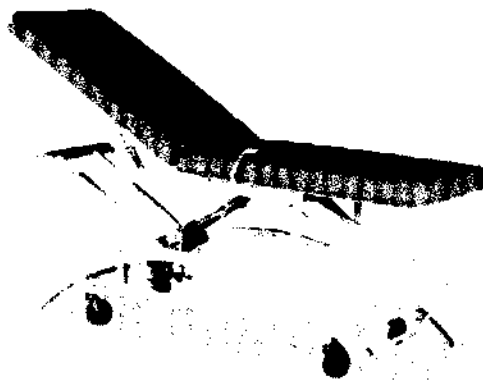

СТОЛ МАССАЖНЫЙ

СМ - 3

Д 2120 Ш 900 В 600-835

Ложе стола имеет три секции. Спинная и ножная секции регулируются ступенчато при помощи механизма "Rostomat". Дополнительно стол оснащается регулируемыми подлокотниками.



СТОЛ МАССАЖНЫЙ

СМ - 4

Д 2070 Ш 900 В 600-835

Ложе стола имеет три секции. Головная секция с вырезом для лица может использоваться для массажа шейно-воротниковой зоны, регулируются ступенчато при помощи механизма "Rostomat". Дополнительно стол оснащается регулируемыми подлокотниками.

