

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «ФармИнформ»

Макарова О.Е.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению изделия медицинского назначения:

Игла инъекционная одноразовая стерильная и нестерильная BD Eclipse с технологией SmartSlip.

производства Бектон Дикинсон энд Компани, США.

Организация-изготовитель:

Бектон Дикинсон С.А., Испания,
Becton Dickinson S.A., Crta. Mequinenza, s/n 22520 Fraga (Huesca) Spain.

Назначение.

Иглы одноразовые BD Eclipse с технологией SmartSlip производства компании "Becton Dickinson and Company" (США и Испания) предназначены для парентерального введения растворов лекарственных средств и являются универсальным изделием, так как подходят к любому шприцу «луер слип» или «луер-лок» ведущих мировых производителей.

Область применения:

Общая клиническая медицина – для обеспечения процедуры инфузионной терапии.

Предупреждение при использовании:

Не используйте изделие, если упаковка пакета открыта или повреждена. Внимание: перед использованием прочтите все предупреждения и инструкции. Неправильное применение может повлечь за собой травму пациента или его смерть.

Изделие предназначено для однократного применения. Не использовать повторно. Не заменять, не переустанавливать и не использовать другие элементы изделия. Это устройство должно использоваться и продаваться только как шприц для инъекций одноразовый.

Применение:

- Обработка рук персонала перед проведением инъекции – согласно принятому в клинике протоколу
- Обработка мест стыковки изделий – с применением дезинфицирующих растворов, применяющихся в клинике
- После применения – обязательная утилизация, аналогично шприцам однократного применения и катетерам внутривенным.

Противопоказания: Отсутствуют.

Краткое руководство пользователя

1




Соединение с шприцом.

Для соединения «луер-лок» вращайте иглу по часовой стрелке до упора.


Для соединения «луер-лок» просто наденьте иглу до упора.

2a

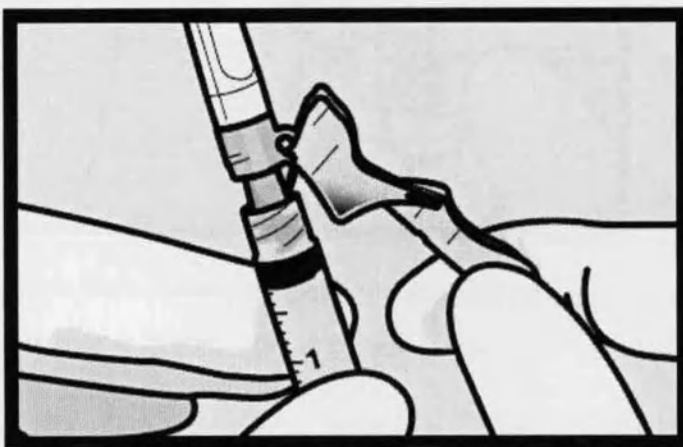

Отведите назад защитный кожух, освободив колпачок канюли.


2b

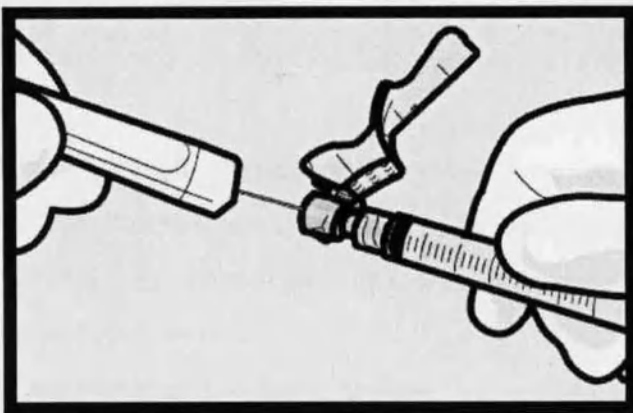

Одной рукой держите шприц. Свободной рукой снимите защитный колпачок с иглы.*


*В случае, если потребуется смена иглы, предварительно опустите защитный кожух, затем произведите замену.

3a

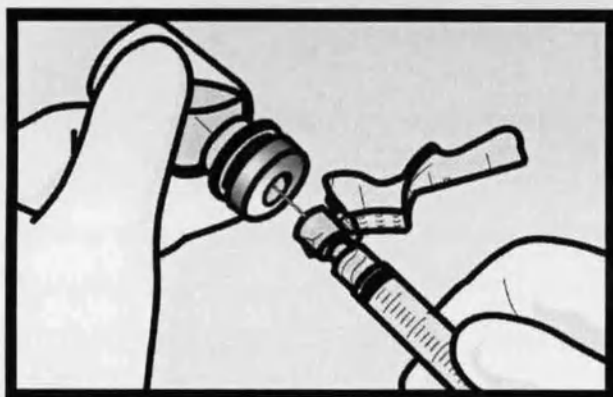

Произведите забор лекарственного вещества.

3b

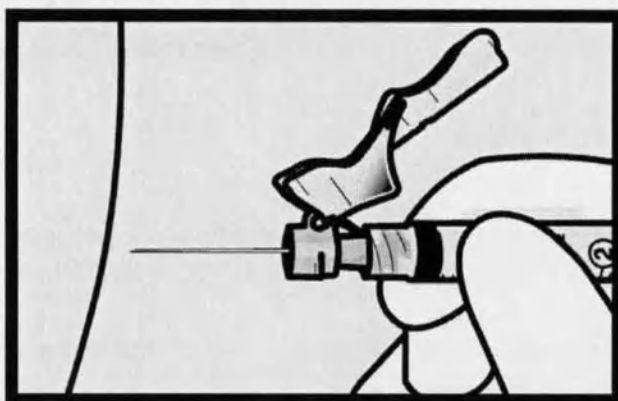

Произведите инъекцию лекарственного вещества.

Защитный кожух должен быть отведен вверх.



Пригодная для функционирования температура окружающей среды 0 до +45 С.

Проведение внутримышечной инъекции

- Выбрать место инъекции.
- Обработать дезинфицирующим раствором (напр. спиртом) участок кожи в месте инъекции.
- Свободной рукой растянуть кожу над местом введения и проколоть иглой. Прокол рекомендуется производить резким движением для уменьшения болевых ощущений (уменьшается время взаимодействия острия иглы с болевыми рецепторами, находящимися преимущественно в коже).
- Игла вводится в глубину тканей до проникновения в мышцу, что ощущается по увеличению сопротивления (плотность мышечной ткани выше, чем у жировой клетчатки). Игла вводится приблизительно на 5 мм в мышечную ткань. Толщина жировой клетчатки, и, соответственно, необходимая глубина погружения иглы — индивидуальна.

Перед началом введения препарата поршень шприца оттягивается назад для проверки, не попала ли игла в крупный кровеносный сосуд. В случае, если при этом в шприц поступает кровь, не вынимая иглы изменяют направление и глубину погружения, чтобы миновать повреждённый сосуд.

- Содержимое шприца медленно ввести в мышцу.
- Иглу быстрым движением извлечь, к месту укола прижать ватный шарик со спиртом.
- При повторных инъекциях рекомендуется менять место укола.

Упаковка: полиэтилен, ламинированная бумага, стерильно.

Стерилизация: оксид этилена.

Хранение.

Хранить шприцы в отапливаемых помещениях при температуре от -20 С до + 45 С и относительной влажностью воздуха до 80% при температуре +25°С.

Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей!

Утилизация:

Согласно принятому в клинике протоколу утилизации средств однократного применения, контаминированных биологическими материалами.

Срок годности:

5 лет.

Не применять после истечения срока годности!

Внимание: Для снижения уровня риска заражением ВИЧ или другими инфекционными заболеваниями медицинский персонал должен соблюдать все меры предосторожности и предписания при работе с кровью или продуктами крови со всеми пациентами.



Прошито и
пронумеровано 5 листов