

Руководство по применению изделия медицинского назначения

Повязка Унипласт самофиксирующаяся

Описание

Повязка Унипласт самофиксирующаяся представляет собой подушечку из адсорбирующего материала на ленте фиксирующей липкой из пленки или нетканого материала, с антиадгезионным защитным покрытием с одной стороны или с обеих сторон изделия. Изделие стерильно.

Руководство по применению

Повязка Унипласт самофиксирующаяся предназначена для закрытия первично леченых ран и хирургических разрезов со слабой и умеренной экссудацией, для фиксации мазовых повязок, трубок, катетеров, дренажей и других предметов медицинского назначения.

Способ применения

Вскрыть упаковку, извлечь повязку.

При использовании повязки на основе пленки: руководствуясь рисунками на защитном покрытии, снять защитную бумагу, наложить повязку на рану, осторожно зафиксировать по краям, не прикладывая усилия, затем снять защитную пленку.

При использовании повязки на основе нетканого материала: снять защитную бумагу, наложить повязку на рану, осторожно зафиксировать по краям, не прикладывая усилия.

Менять при каждой перевязке, не применять повторно.

Противопоказания

Нет

Форма выпуска

Повязка Унипласт самофиксирующаяся по 1 штуке в контурной безъячейковой упаковке.

Наборы от 2 до 10 штук изделий одного размера в пакете с клапаном или в пачке складной из картона.

Хранение

В сухом месте.

Срок годности

3 года.

Заместитель генерального
Директора ОАО «ВЕРОФАРМ»



Т.Х.Чибиляев