

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Технологии здоровья»
Азимов С. А.
«15» 2021 г.



Инструкция по применению
Массажеры медицинские НИРВАНА®
по ТУ 32.50.21-001-76456205-2020

г. Москва 2021

Настоящая инструкция по применению на Массажеры медицинские НИРВАНА® по ТУ 32.50.21-001-76456205-2020, предназначено для ознакомления с ними и их работой, и содержит сведения по использованию, регламенту работы и паспортные данные на изделия.

1. Наименование медицинского изделия.

Массажеры медицинские НИРВАНА® по ТУ 32.50.21-001-76456205-2020

Варианты исполнения:

1. Коврик акупунктурный НИРВАНА® (артикул KZ 0075, KZ 0664, KZ 0665, KZ 0666, KZ 0667, KZ 0668, KZ 0669, KZ 0670, KZ 0671, KZ 0672, KZ 0673, KZ 0674, KZ 0675, KZ 0676);
2. Коврик-сумка акупунктурный НИРВАНА® (артикул KZ 0577, KZ 0677, KZ 0678, KZ 0679, KZ 0680, KZ 0681, KZ 0682, KZ 0683, KZ 0691, KZ 0692);
3. Валик для акупунктурного массажа НИРВАНА® (артикул KZ 0491, KZ 0578, KZ 0684, KZ 0685, KZ 0686, KZ 0687, KZ 0688, KZ 0689, KZ 0690);
4. Подушка акупунктурная НИРВАНА® (артикул KZ 0492, KZ 0579, KZ 0694, KZ 0695, KZ 0696, KZ 0697, KZ 0698, KZ 0699, KZ 0700, KZ 0701, KZ 0702, KZ 0703);
5. Аппликатор игольчатый НИРВАНА® (артикул KZ 0001, KZ 0704, KZ 0705, KZ 0706, KZ 0580, KZ 0707, KZ 0708, KZ 0709, KZ 0710, KZ 0711);
6. Повязка для акупунктурного массажа НИРВАНА® (артикул KZ 0493, KZ 0714, KZ 0715, KZ 0716, KZ 0717, KZ 0718, KZ 0719, KZ 0720, KZ 0721);
7. Набор акупунктурный НИРВАНА® (подушка, коврик, сумка) (артикул KZ 0722, KZ 0723, KZ 0724, KZ 0725, KZ 0726, KZ 0727, KZ 0728, KZ 0729, KZ 0730, KZ 0731, KZ 0732, KZ 0581, KZ 0733, KZ 0712, KZ 0713, KZ 0693, KZ 0754, KZ 0755, KZ 0756, KZ 0762);
8. Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА® (артикул KZ 0734, KZ 0735, KZ 0736, KZ 0737, KZ 0738, KZ 0739, KZ 0740, KZ 0741, KZ 0742, KZ 0743, KZ 0744, KZ 0745, KZ 0746, KZ 0747, KZ 0748, KZ 0749);
9. Подушка для сидения с памятью акупунктурная НИРВАНА® (артикул KZ 0750, KZ 0751, KZ 0752, KZ 0753, KZ 0757, KZ 0758, KZ 0759, KZ 0760, KZ 0761, KZ 0906, KZ 0907);
10. Пояс для акупунктурного массажа с двумя сменными подушками НИРВАНА® (артикул KZ 0908, KZ 0909, KZ 0910, KZ 0911, KZ 0912);
11. Набор аппликаторов игольчатых НИРВАНА® (артикул KZ 0763, KZ 0764, KZ 0765, KZ 0766, KZ 0767, KZ 0768, KZ 0769, KZ 0770, KZ 0771, KZ 0772, KZ 0773, KZ 0794, KZ 0795, KZ 0796, KZ 0797, KZ 0798, KZ 0799);
12. Стельки для акупунктурного массажа НИРВАНА® (артикул KZ 0774, KZ 0775, KZ 0776, KZ 0777, KZ 0778, KZ 0779, KZ 0780, KZ 0781, KZ 0782);
13. Варежки массажные акупунктурные НИРВАНА® (артикул KZ 0800, KZ 0784, KZ 0785, KZ 0786, KZ 0787);
14. Наколенники массажные акупунктурные НИРВАНА® (артикул KZ 0788, KZ 0789, KZ 0790, KZ 0791, KZ 0792, KZ 0793);
15. Массажер для акупунктурного массажа НИРВАНА® (артикул KZ 0801, KZ 0802, KZ 0803, KZ 0804, KZ 0805, KZ 0806, KZ 0807, KZ 0808, KZ 0809, KZ 0810);
16. Коврик акупунктурный с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0811, KZ 0812, KZ 0813, KZ 0814, KZ 0815, KZ 0816, KZ 0817, KZ 0818, KZ 0819, KZ 0820, KZ 0821, KZ 0822, KZ 0823, KZ 0824, KZ 0825);
17. Коврик-сумка акупунктурный с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0826, KZ 0827, KZ 0828, KZ 0829, KZ 0830);
18. Валик для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0831, KZ 0832, KZ 0833, KZ 0834, KZ 0835, KZ 0836, KZ 0837);
19. Подушка акупунктурная с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0838, KZ 0839, KZ 0840, KZ 0841, KZ 0842, KZ 0843, KZ 0844, KZ 0845);
20. Повязка-аппликатор акупунктурная с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0846, KZ

0847, KZ 0848, KZ 0849, KZ 0850, KZ 0851);

21.Повязка для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0852, KZ 0853, KZ 0854, KZ 0855, KZ 0856, KZ 0857);

22.Набор акупунктурный с магнитами НИРВАНА® (подушка, коврик, сумка) (артикул KZ 0858, KZ 0859, KZ 0860, KZ 0861, KZ 0862, KZ 0863, KZ 0864, KZ 0865);

23.Подушка дорожная акупунктурная с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0866, KZ 0867, KZ 0868, KZ 0869, KZ 0870);

24.Подушка для сидения с памятью акупунктурная с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0871, KZ 0872, KZ 0873, KZ 0874, KZ 0875);

25. Набор аппликаторов игольчатых с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0876, KZ 0877, KZ 0878, KZ 0879, KZ 0880, KZ 0881, KZ 0882);

26.Пояс с двумя сменными акупунктурными подушками с аппликаторами с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0883, KZ 0884, KZ 0885, KZ 0886, KZ 0887);

27.Стельки для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0888, KZ 0889, KZ 0890, KZ 0891, KZ 0892, KZ 0893);

28. Варежки массажные акупунктурные с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0894, KZ 0895, KZ 0896, KZ 0897);

29. Наколенники массажные акупунктурные с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0898, KZ 0899, KZ 0900);

30. Массажер для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0901, KZ 0902, KZ 0903, KZ 0904).

-Инструкция по применению – 1 шт.

(далее по тексту – изделия или массажер).

2. Сведения о производителе медицинского изделия.

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии здоровья»

117405, г. Москва, Варшавское шоссе 145, корп. 8.

(495) 648-26-66

market@bradex.ru

Место производства:

1. ООО «Технологии здоровья»

117405, г. Москва, Варшавское шоссе 145, корп. 8. №I-1-17, I-1-18, I-1-19, I-1-20, I-1-21.

2. NEH (NINGBO) INDUSTRY & TRADE CO.,LTD

NO.13,XINHENG YI ROAD,PRIVATELY-OPERATED INDUSTRIAL ZONE,JIANGBEI DISTRICT,NINGBO CITY,ZHEJIANG PROVINCE, Zip Code 315035

3. Область применения медицинского изделия.

в условиях ЛПУ и в домашних условия

4. Назначение медицинского изделия.

Изделия предназначены для снятия болей и восстановление потери подвижности в мышцах и суставах, в том числе, в пояснице, грудном и шейном отделах позвоночника (остеохондроз, радикулит), релаксации и нормализации сна при бессоннице, используются в условиях ЛПУ и в домашних условиях.

Показания:

- Снятие болей и потери подвижности в мышцах и суставах, в том числе, в пояснице, грудном и шейном отделах позвоночника (остеохондроз, радикулит)
- Релаксация
- Нормализация сна при бессоннице
- Снижение проявлений предменструального синдрома

- Снижение проявлений климактерического синдрома
- Снятие головных болей
- Повышение общего тонуса организма, восстановление и повышение работоспособности
- Повышение половой активности
- Улучшение местного кровообращения
- При плоскостопии
- Для проведения терапии по зонам Захарьина-Геда
- Для уменьшения проявлений целлюлита

5. Противопоказания при применении медицинского изделия.

- наличие кожных образований, таких как родинки, бородавки или папилломы в зонах применения
- наличие тромбофлебита
- различные формы дерматоза
- диагностирована эпилепсия
- высокая температура
- воспалительные процессы
- беременность
- повреждения кожи

6. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.

Ключевой момент использования изделия – соблюдение гигиены: желательно, чтобы купленный массажер был только вашим, поскольку иглы даже при незначительном давлении могут провоцировать микроповреждение кожных покровов.

Еще несколько важных нюансов, как пользоваться изделием:

С целью минимизации вреда желательно проводить сеанс после опорожнения мочевого пузыря и не раньше, чем через 1,5 после приема пищи.

При сеансе, ориентированном на расслабление, после использования массажера нужно сохранять горизонтальное положение еще полчаса.

Обязательно проветривайте помещение, в котором будет проводиться процедура.

Если у вас есть родинки или бородавки, но в малом количестве, однако вы боитесь их повредить, заклейте их пластырем.

Решать, сколько лежать или использовать массажер, необходимо ориентируясь на рекомендованные врачами цифры:

Боли в пояснице, проблемы позвоночника, остеохондроз, нарушения сна, усталость, простатит, сексуальная дисфункция – 15 минут.

Вегето-сосудистая дистония, мигрень, предменструальный синдром – 7-10 минут.

Массажеры предназначены для индивидуального использования.

7. Возможные побочные действия при использовании изделия.

Возрастных ограничений по использованию аппликатора нет. Единственный возможный нежелательный результат может быть в том случае, если пациент использует массажёр со слишком большим нажимом, из-за чего происходит травмирование кожи (возможны незначительные микроповреждения кожи).

8. Технические характеристики.

Варианты исполнения и описание

1.Коврик акупунктурный НИРВАНА® (артикул KZ 0075, KZ 0664, KZ 0665, KZ 0666, KZ 0667, KZ 0668, KZ 0669, KZ 0670, KZ 0671, KZ 0672, KZ 0673, KZ 0674, KZ 0675, KZ 0676)

- это тканевый акупунктурный коврик с мягким наполнителем, который полностью покрыт аппликаторами (шипами);

2.Коврик-сумка акупунктурный НИРВАНА® (артикул KZ 0577, KZ 0677, KZ 0678, KZ 0679, KZ 0680, KZ 0681, KZ 0682, KZ 0683, KZ 0691, KZ 0692) - это тканевый акупунктурный коврик с мягким наполнителем, который полностью покрыт аппликаторами (шипами). Может складываться в форму сумки для удобной носки;

3.Валик для акупунктурного массажа НИРВАНА® (артикул KZ 0491, KZ 0578, KZ 0684, KZ 0685, KZ 0686, KZ 0687, KZ 0688, KZ 0689, KZ 0690) - представляет собой массажное акупунктурное изделие в форме валика, на поверхности которого распложены аппликаторы(шпы). Внутри валика находится мягкий наполнитель. Форма валика позволяет обрабатывать те участки тела, которые сложно обработать при помощи коврика;

4.Подушка акупунктурная НИРВАНА® (артикул KZ 0492, KZ 0579, KZ 0694, KZ 0695, KZ 0696, KZ 0697, KZ 0698, KZ 0699, KZ 0700, KZ 0701, KZ 0702, KZ 0703) - это тканевый акупунктурный коврик в форме подушки с мягким наполнителем, который полностью покрыт аппликаторами (шипами);

5.Аппликатор игольчатый НИРВАНА® (артикул KZ 0001, KZ 0704, KZ 0705, KZ 0706, KZ 0580, KZ 0707, KZ 0708, KZ 0709, KZ 0710, KZ 0711) – это тканевый коврик в форме широкого пояса, с внутренней стороны которого размещены несколько рядов игольчатых аппликаторов (шпов);

6.Повязка для акупунктурного массажа НИРВАНА® (артикул KZ 0493, KZ 0714, KZ 0715, KZ 0716, KZ 0717, KZ 0718, KZ 0719, KZ 0720, KZ 0721) - это тканевый акупунктурный коврик в форме повязки с мягким наполнителем, который полностью покрыт аппликаторами (шипами). Повязку одевают на поверхность головы и шеи. Благодаря небольшому размеру повязку удобно носить с собой и использовать по мере необходимости;

7.Набор акупунктурный НИРВАНА® (подушка, коврик, сумка) (артикул KZ 0722, KZ 0723, KZ 0724, KZ 0725, KZ 0726, KZ 0727, KZ 0728, KZ 0729, KZ 0730, KZ 0731, KZ 0732, KZ 0581, KZ 0733, KZ 0712, KZ 0713, KZ 0693, KZ 0754, KZ 0755, KZ 0756, KZ 0762) - это набор, в составе которого: тканевый акупунктурный коврик с наполнителем из кокосового волокна, который полностью покрыт аппликаторами (шипами) и тканевая акупунктурная подушка с наполнителем из гречневой лузги (шелухи). Элементы набора удобно использовать вместе или отдельно, сложить в сумку и взять с собой;

8.Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА® (артикул KZ 0734, KZ 0735, KZ 0736, KZ 0737, KZ 0738, KZ 0739, KZ 0740, KZ 0741, KZ 0742, KZ 0743, KZ 0744, KZ 0745, KZ 0746, KZ 0747, KZ 0748, KZ 0749) - представляет собой массажное акупунктурное изделие в

форме валика, на поверхности которого расположены аппликаторы (шипы). Внутри валика находится мягкий наполнитель. Форма валика позволяет удобно обрабатывать зону шеи;

9.Подушка для сидения с памятью акупунктурная НИРВАНА® (артикул KZ 0750, KZ 0751, KZ 0752 KZ 0753, KZ 0757, KZ 0758, KZ 0759, KZ 0760, KZ 0761, KZ 0906, KZ 0907) - представляет собой массажное акупунктурное изделие в форме подушки для сидения, на поверхности которой расположены аппликаторы (шипы). Внутри подушки находится мягкий наполнитель. Форма подушки позволяет удобно расположиться на стуле и получить массажный эффект;

10.Пояс для акупунктурного массажа с двумя сменными подушками НИРВАНА® (артикул KZ 0908, KZ 0909, KZ 0910, KZ 0911, KZ 0912) - это тканевый акупунктурный пояс, к которому крепятся сменные подушки, покрытые аппликаторами (шипами). В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты;

11.Набор аппликаторов игольчатых НИРВАНА® (артикул KZ 0763, KZ 0764, KZ 0765, KZ 0766, KZ 0767, KZ 0768, KZ 0769, KZ 0770, KZ 0771, KZ 0772, KZ 0773, KZ 0794, KZ 0795, KZ 0796, KZ 0797, KZ 0798, KZ 0799) – комплект аппликаторов (шипов), которые можно пришивать на любое изделие из ткани;

12.Стельки для акупунктурного массажа НИРВАНА® (артикул KZ 0774, KZ 0775, KZ 0776, KZ 0777, KZ 0778, KZ 0779, KZ 0780, KZ 0781, KZ 0782) - представляет собой массажное акупунктурное изделие в форме стельки, на поверхности которого расположены аппликаторы (шипы). Внутри находится мягкий наполнитель. Стельки используются для массажа для предотвращения застойных явлений в ногах при сидячей или стоячей работе;

13.Варежки массажные акупунктурные НИРВАНА® (артикул KZ 0800, KZ 0784, KZ 0785, KZ 0786, KZ 0787) - это тканевые акупунктурные варежки, покрытые аппликаторами (шипами);

14.Наколенники массажные акупунктурные НИРВАНА® (артикул KZ 0788, KZ 0789, KZ 0790, KZ 0791, KZ 0792, KZ 0793) - это тканевые акупунктурные наколенники, покрытые аппликаторами (шипами);

15.Массажер для акупунктурного массажа НИРВАНА® (артикул KZ 0801, KZ 0802, KZ 0803, KZ 0804, KZ 0805, KZ 0806, KZ 0807, KZ 0808, KZ 0809, KZ 0810) - представляет собой массажное акупунктурное изделие в форме валика или шара, на поверхности которого расположены аппликаторы (шипы);

16.Коврик акупунктурный с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0811, KZ 0812, KZ 0813, KZ 0814, KZ 0815, KZ 0816, KZ 0817, KZ 0818, KZ 0819, KZ 0820, KZ 0821, KZ 0822, KZ 0823, KZ 0824, KZ 0825) - это тканевый акупунктурный коврик с мягким наполнителем,

который полностью покрыт аппликаторами (шипами). В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты;

17.Коврик-сумка акупунктурный с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0826, KZ 0827, KZ 0828, KZ 0829, KZ 0830) - это тканевый акупунктурный коврик с мягким наполнителем, который полностью покрыт с одной стороны аппликаторами (шипами). В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты. Может складываться в форму сумки для удобной переноски;

18.Валик для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0831, KZ 0832, KZ 0833, KZ 0834, KZ 0835, KZ 0836, KZ 0837) - представляет собой массажное акупунктурное изделие в форме валика, на поверхности которого расположены аппликаторы (шипы). Внутри валика находится мягкий наполнитель. В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты. Форма валика позволяет обрабатывать те участки тела, которые сложно обработать при помощи коврика;

19.Подушка акупунктурная с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0838, KZ 0839, KZ 0840, KZ 0841, KZ 0842, KZ 0843, KZ 0844, KZ 0845) - это тканевый акупунктурный коврик в форме подушки с мягким наполнителем, который полностью покрыт аппликаторами (шипами). В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты;

20.Повязка-аппликатор акупунктурная с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0846, KZ 0847, KZ 0848, KZ 0849, KZ 0850, KZ 0851) – это тканевый коврик в форме широкого пояса, с внутренней стороны которого размещены несколько рядов игольчатых аппликаторов (шипов). В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты;

21.Повязка для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0852, KZ 0853, KZ 0854, KZ 0855, KZ 0856, KZ 0857) - это тканевый акупунктурный коврик в форме подушки с мягким наполнителем, который полностью покрыт аппликаторами (шипами). В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты;

22.Набор акупунктурный с магнитами НИРВАНА® (подушка, коврик, сумка) (артикул KZ 0858, KZ 0859, KZ 0860, KZ 0861, KZ 0862, KZ 0863, KZ 0864, KZ 0865) - тканевый акупунктурный коврик с наполнителем из кокосового волокна, который полностью покрыт аппликаторами (шипами) и тканевая акупунктурная подушка с наполнителем из гречневой лузги (шелухи). В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты. Элементы набора удобно использовать вместе или отдельно, сложить в сумку и взять с собой;

23.Подушка дорожная акупунктурная с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0866, KZ 0867, KZ 0868, KZ 0869, KZ 0870) - представляет собой массажное акупунктурное изделие в форме валика, на поверхности которого расположены аппликаторы (шипы). Внутри валика находится мягкий наполнитель. В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие

магниты. Форма валика позволяет обрабатывать те участки тела, которые сложно обработать при помощи коврика. Валик удобно использовать в дороге;

24.Подушка для сидения с памятью акупунктурная с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0871, KZ 0872, KZ 0873, KZ 0874, KZ 0875) - представляет собой массажное акупунктурное изделие в форме подушки для сидения, на поверхности которой расположены аппликаторы (шипы). Внутри подушки находится мягкий наполнитель. Форма подушки позволяет удобно расположиться на стуле и получить массажный эффект;

25.Набор аппликаторов игольчатых с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 08676, KZ 0877, KZ 0878, KZ 0879, KZ 0880, KZ 0881, KZ 0882) - комплект аппликаторов (шипов), которые можно пришивать на любое изделие из ткани. В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты;

26.Пояс с двумя сменными акупунктурными подушками с аппликаторами с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0883, KZ 0884, KZ 0885, KZ 0886, KZ 0887) - это тканевый акупунктурный пояс, к которому крепятся сменные подушки, покрытые аппликаторами (шипами). В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты;

27.Стельки для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0888, KZ 0889, KZ 0890, KZ 0891, KZ 0892, KZ 0893) - представляет собой массажное акупунктурное изделие в форме стельки, на поверхности которого расположены аппликаторы (шипы). Внутри находится мягкий наполнитель. В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты. Стельки используются для массажа для предотвращения застойных явлений в ногах при сидячей или стоячей работе;

28.Варежки массажные акупунктурные с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0894, KZ 0895, KZ 0896, KZ 0897) – это тканевые акупунктурные варежки, покрытые аппликаторами (шипами). В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты;

29.Наколенники массажные акупунктурные с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0898, KZ 0899, KZ 0900) - это тканевые акупунктурные наколенники, покрытые аппликаторами (шипами). В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты;

30.Массажер для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА® (артикул KZ 0901, KZ 0902, KZ 0903, KZ 0904) - представляет собой массажное акупунктурное изделие в форме валика или шара, на поверхности которого расположены аппликаторы (шипы). В центр аппликаторов (шипов) помещены небольшие магниты.

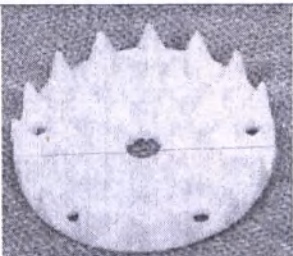
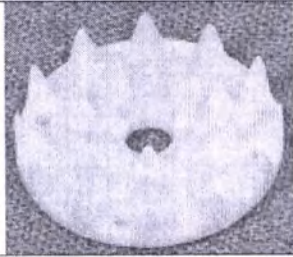
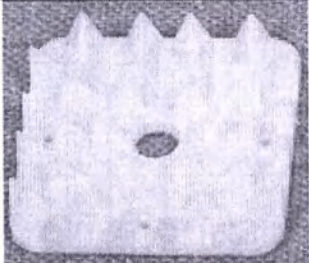
Формы аппликаторов (шипов):

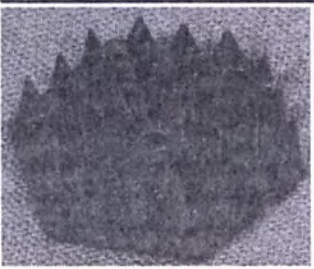
Аппликаторы могут быть: круглые, квадратные, треугольные, прямоугольные и в виде шестиугольника.

Цвета аппликаторов: синий, белый, желтый, зеленый, коричневый, золотой, сиреневый, бирюзовый, черный, красный, оранжевый, голубой, розовый.

Формы наконечника аппликатора (шипа):

Таблица 1а.

п.	Тип аппликатора	Кол-во выступов, шт	Диаметр, мм ($\pm 5\%$)	Вес, гр ($\pm 5\%$)
1		33	29,7	1,39
2		27	17,9	0,51
3		19	30,1	2,4
4		27	26,7	1,8
5		34	27,2	1,78
6		42	31,9	1,75

7			48	30,1	1,87
---	---	--	----	------	------

Формы магнитов: круглые. Размеры магнитов: диаметр - 5 мм, высота – 2.5 мм.

Технические характеристики изделий

Таблица 1

Коврик акупунктурный НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Масса , кг	Количество аппликаторов , шт.	Цвет изделия	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0075	0,4 0,02 0,65	0,60	230	синий	2
KZ 0664	0,5 0,02 1,25	1	450	синий	2
KZ 0665	0,4 0,02 0,65	0,60	230	оранжевый	2
KZ 0666	0,5 0,02 1,65	1,1	548	чёрный	2
KZ 0667	0,4 0,02 0,65	0,60	230	зеленый	2
KZ 0668	0,44 0,02 0,72	0,8	210	бежевый	3
KZ 0669	0,5 0,02 1,25	1	450	фуксия	3
KZ 0670	0,51 0,02 0,81	0,8	231	черный	5
KZ 0671	0,44 0,02	0,8	210	бежевый	3

	0,72				
KZ 0672	0,44 0,02 0,72	0,8	210	бежевый	3
KZ 0673	0,43 0,02 0,47	0,4	160	зелёный	2
KZ 0674	0,35 0,02 0,35	0,4	72	фиолетовы й	5
KZ 0675	0,4 0,02 0,6	0,3	198	чёрный	2
KZ 0676	0,4 0,02 0,6	0,3	198	чёрный	2

Таблица 2

Коврик-сумка акупунктурный НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктам и Таблица 1а.)
KZ 0577	1,3 0,48 0,02	2,5	414	бежевый	2
KZ 0677	1,3 0,48 0,02	2,5	414	бирюзов ый	2
KZ 0678	1,3 0,48 0,02	2,5	414	розовый	2
KZ 0679	0,74 0,44 0,02	2	210	чёрный	2
KZ 0680	0,74 0,44 0,02	2	210	фиолето вый	2
KZ 0681	0,74 0,44 0,02	2	210	бежевый	3
KZ 0682	0,74 0,44 0,02	2,3	210	бежевый	3
KZ 0683	0,74 0,44 0,02	2,3	210	бежевый	3
KZ 0691	0,74	2,3	210	серый	3

	0,44 0,02				
KZ 0692	0,74 0,44 0,02	2,3	210	серый	3

Таблица 3

Валик для акупунктурного массажа НИРВАНА®					
Артику л	Габаритны е размеры ДхШхВ, м	Масса , кг	Количество аппликаторов , шт.	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктам и Таблица 1а.)
KZ 0491	0,37 0,15 0,1	0,375	73	синий	1
KZ 0578	0,37 0,15 0,10	0,55	63	бежевый	2
KZ 0684	0,37 0,15 0,1	0,375	73	Зеленый	2
KZ 0685	0,37 0,15 0,1	0,375	73	оранжевый	2
KZ 0686	0,37 0,15 0,1	0,375	73	фиолетовы й	2
KZ 0687	0,37 0,15 0,1	0,4	51	бежевый	3
KZ 0688	0,37 0,15 0,1	0,4	51	бежевый	3
KZ 0689	0,37 0,15 0,10	0,4	51	бежевый	3
KZ 0690	0,37 0,15 0,1	0,375	73	чёрный	2

Таблица 4

Подушка акупунктурная НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)

KZ 0492	0,3 0,23 0,09	0,38	50	синий	1
KZ 0579	0,3 0,23 0,09	0,55	50	бежевый	2
KZ 0694	0,3 0,23 0,09	0,38	50	Зеленый	2
KZ 0695	0,3 0,23 0,09	0,38	50	оранжевый	2
KZ 0696	0,32 0,32 0,1	0,42	65	фиолетовый	3
KZ 0697	0,32 0,32 0,1	0,42	65	черный	3
KZ 0698	0,4 0,3 0,1	0,34	51	бежевый	2
KZ 0699	0,4 0,3 0,1	0,94	51	бежевый	3
KZ 0700	0,4 0,3 0,1	0,94	51	бежевый	3
KZ 0701	0,4 0,3 0,1	0,94	51	бежевый	3
KZ 0702	0,35 0,25 0,1	1	65	мультиколор	3
KZ 0703	0,33 0,38 0,08	1,05	61	мультиколор	3

Таблица 5

Аппликатор игольчатый НИРВАНА [®]					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0001	1,32 0,2 0,01	0,1	56	синий	2
KZ 0580	1,40 0,21 0,01	0,3	46	бежевый	2
KZ 0704	1,32	0,3	56	оранжевый	2

	0,2 0,01				
KZ 0705	1,32 0,2 0,01	0,1	56	зеленый	2
KZ 0706	1,32 0,2 0,01	0,1	56	чёрный	2
KZ 0707	1,40 0,21 0,01	0,3	46	чёрный	2
KZ 0708	1,40 0,21 0,01	0,3	46	бирюзовый	2
KZ 0709	1,40 0,21 0,01	0,3	46	розовый	2
KZ 0710	1,40 0,21 0,01	0,3	46	серый	2
KZ 0711	1,40 0,21 0,01	0,3	46	серый	2

Таблица 6

Повязка для акупунктурного массажа НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0493	0,73 0,07 0,015	0,01	12	синий	6
KZ 0714	0,73 0,07 0,015	0,01	12	оранжевый	2
KZ 0715	0,73 0,07 0,015	0,01	12	зелёный	2
KZ 0716	0,73 0,07 0,015	0,01	12	чёрный	5
KZ 0717	0,73 0,07 0,015	0,01	12	бежевый	2
KZ 0718	0,73 0,07 0,015	0,01	12	фиолетовый	2
KZ 0719	0,73 0,07 0,015	0,01	12	бирюзовый	2
KZ 0720	0,73	0,01	12	розовый	2

	0,07 0,015				
KZ 0721	0,73 0,07 0,015	0,01	12	серый	2

Таблица 7

Набор акупунктурный НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0581	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,30 0,40 0,10 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 0,94 Коврик 1,2 Сумка 0,2	Коврик -221 Подушка -51	бежевый	3
KZ 0722	Коврик 0,65 0,4 0,02 Подушка 0,37 0,15 0,1 Сумка 0,42 0,25 0,25	Подушка 0,375 Коврик 0,6 Сумка 0,2	Коврик -230 Подушка -73	чёрный	2
KZ 0723	Коврик 0,65 0,4 0,02 Подушка 0,37 0,15 0,1 Сумка 0,42 0,25 0,25	Подушка 0,375 Коврик 0,6 Сумка 0,2	Коврик -230 Подушка -73	чёрный	2
KZ 0724	Коврик	Подушка	Коврик -230	чёрный	2

	0,65 0,4 0,02 Подушка 0,37 0,15 0,1 Сумка 0,42 0,25 0,25	0,375 Коврик 0,6 Сумка 0,2	Подушка -73		
KZ 0725	Коврик 0,65 0,4 0,02 Подушка 0,37 0,15 0,1 Сумка 0,42 0,25 0,25	Подушка 0,375 Коврик 0,6 Сумка 0,2	Коврик -230 Подушка -73	чёрный	2
KZ 0726	Коврик 0,74 0,42 0,02 Подушка 0,40 0,30 0,02 Сумка 0,45 0,35 0,1	Подушка 0,9 Коврик 0,8 Сумка 0,2	Коврик -230 Подушка -115	красный	3
KZ 0727	Коврик 0,74 0,42 0,02 Подушка 0,40 0,30 0,02 Сумка 0,45 0,35 0,1	Подушка 0,9 Коврик 0,8 Сумка 0,2	Коврик -230 Подушка -115	хаки	3
KZ 0728	Коврик 1,25 0,5 0,02 Подушка	Подушка 0,94 Коврик 1,1 Сумка	Коврик -450 Подушка -115	бежевый	3

	0,45 0,40 0,02 Сумка 0,5 0,25 0,25	0,2			
KZ 0729	Коврик 1,25 0,5 0,02 Подушка 0,45 0,40 0,02 Сумка 0,5 0,25 0,25	Подушка 0,94 Коврик 1,1 Сумка 0,2	Коврик -450 Подушка -115	серый	3
KZ 0730	Коврик 0,65 0,4 0,02 Подушка 0,37 0,15 0,12 Сумка 0,42 0,27 0,27	Подушка 0,4 Коврик 0,7 Сумка 0,2	Коврик -230 Подушка -74	синий	3
KZ 0731	Коврик 0,65 0,4 0,02 Подушка 0,37 0,15 0,12 Сумка 0,42 0,27 0,27	Подушка 0,4 Коврик 0,7 Сумка 0,2	Коврик -230 Подушка -74	розовый	3
KZ 0732	Коврик 0,65 0,4 0,02 Подушка 0,37 0,15 0,12 Сумка	Подушка 0,4 Коврик 0,7 Сумка 0,2	Коврик -230 Подушка -74	зелёный	3

	0,42 0,27 0,27				
KZ 0733	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,30 0,40 0,10 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 0,94 Коврик 1,2 Сумка 0,2	Коврик -221 Подушка -51	бежевый	3
KZ 0712	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,30 0,40 0,010 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 0,94 Коврик 1,2 Сумка 0,2	Коврик -221 Подушка -51	бежевый	3
KZ 0713	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,30 0,40 0,10 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 0,94 Коврик 1,2 Сумка 0,2	Коврик -221 Подушка -51	бежевый	3
KZ 0693	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,30 0,40 0,10 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 0,94 Коврик 1,2 Сумка 0,2	Коврик -221 Подушка -51	фиолетовый	3
KZ 0754	Коврик	Подушка	Коврик -221	оранжевый	3

	0,72 0,44 0,02 Подушка 0,30 0,40 0,10 Сумка 0,45 0,35 0,2	0,94 Коврик 1,2 Сумка 0,2	Подушка -51		
KZ 0755	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,30 0,40 0,10 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 0,94 Коврик 1,2 Сумка 0,2	Коврик -221 Подушка -51	бежевый	3
KZ 0756	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,30 0,40 0,10 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 0,94 Коврик 1,2 Сумка 0,2	Коврик -221 Подушка -51	бежевый	3
KZ 0762	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,30 0,40 0,10 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 0,94 Коврик 1,2 Сумка 0,2	Коврик -221 Подушка -51	бежевый	3

Таблица 8

Подушка дорожная акупунктурная НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ,	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Тип аппликатора размеры аппликатора

	м				(в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0734	0,3 0,3 0,12	0,38	56	синий	2
KZ 0735	0,3 0,3 0,12	0,38	56	оранжевый	2
KZ 0736	0,3 0,3 0,12	0,38	56	зелёный	2
KZ 0737	0,3 0,3 0,12	0,38	56	бирюзовый	2
KZ 0738	0,3 0,3 0,12	0,38	56	розовый	2
KZ 0739	0,3 0,3 0,12	0,38	56	серый	2
KZ 0740	0,3 0,3 0,12	0,38	56	чёрный	2
KZ 0741	0,3 0,3 0,12	0,38	56	черный	2
KZ 0742	0,3 0,3 0,12	0,38	56	чёрный	2
KZ 0743	0,3 0,3 0,12	0,5	56	бежевый	3
KZ 0744	0,3 0,3 0,12	0,5	56	бежевый	3
KZ 0745	0,3 0,3 0,12	0,5	56	бежевый	3
KZ 0746	0,3 0,3 0,12	0,5	56	бежевый	3
KZ 0747	0,3 0,3 0,12	0,5	56	бежевый	3
KZ 0748	0,3 0,3 0,12	0,5	56	фиолетовый	3
KZ 0749	0,3 0,3 0,12	0,5	56	оранжевый	3

Таблица 9

20

Подушка для сидения с памятью акупунктурная НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ,	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0750	0,45 0,35 0,07	0,65	56	синий	2
KZ 0751	0,45 0,35 0,07	0,65	56	зелёный	2
KZ 0752	0,45 0,35 0,07	0,65	56	бирюзовый	2
KZ 0753	0,45 0,35 0,07	0,65	56	розовый	2
KZ 0757	0,45 0,35 0,07	0,65	56	серый	2
KZ 0758	0,45 0,35 0,07	0,65	56	чёрный	2
KZ 0759	0,45 0,35 0,07	0,65	56	чёрный	2
KZ 0760	0,45 0,35 0,07	0,65	56	чёрный	2
KZ 0761	0,45 0,35 0,07	0,65	56	чёрный	3
KZ 0906	0,45 0,35 0,07	0,65	56	фиолетовый	3
KZ 0907	0,45 0,35 0,07	0,65	56	оранжевый	3

Таблица 10

Пояс для акупунктурного массажа с двумя сменными подушками НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)

KZ 0908	1,0 0,20 0,05	0,645	74	синий	2, 5
KZ 0909	1,05 0,20 0,05	0,645	74	синий	2, 5
KZ 0910	1,10 0,20 0,02	0,645	74	синий	2, 5
KZ 0911	1,15 0,20 0,02	0,645	74	синий	2, 5
KZ 0912	1,20 0,20 0,02	0,645	74	синий	2, 5

Таблица 11

Набор аппликаторов игольчатых НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0763	0,15 0,1 0,1	0,1	30	белый	2
KZ 0764	0,2 0,15 0,1	0, 2	50	белый	2
KZ 0765	0,2 0,2 0,1	0,4	100	белый	2
KZ 0766	0,15 0,1 0,1	0,1	30	красный	2
KZ 0767	0,2 0,15 0,1	0,2	50	красный	2
KZ 0768	0,2 0,2 0,1	0,4	100	красный	2
KZ 0769	0,15 0,1 0,1	0,1	30	зелёный	2
KZ 0770	0,2	0,2	50	зелёный	2

	0,15 0,1				
KZ 0771	0,2 0,2 0,1	0,4	100	зелёный	2
KZ 0772	0,15 0,1 0,1	0,1	30	тёмное золото	2
KZ 0773	0,2 0,15 0,1	0,2	50	тёмное золото	2
KZ 0794	0,2 0,2 0,1	0,4	100	тёмное золото	2
KZ 0795	0,3 0,2 0,1	0,8	200	мультикolor	2
KZ 0796	0,15 0,1 0,1	0,1	30	фиолетовый	5
KZ 0797	0,2 0,15 0,1	0,2	50	фиолетовый	5
KZ 0798	0,2 0,2 0,1	0,4	100	фиолетовый	5
KZ 0799	0,3 0,2 0,1	0,8	200	мультикolor	5

Таблица 12

Стельки для акупунктурного массажа НИРВАНА [®]					
Артику л	Разме р	Масса , кг	Количество аппликаторов , шт. (на 2 стельки)	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктам и Таблица 1а.)
KZ 0774	37-40	0,20	34	оранжевы й	2
KZ 0775	40-43	0,20	38	серый	2
KZ 0776	43-46	0,20	42	серый	2
KZ 0777	37-40	0,20	34	синий	2
KZ 0778	40-43	0,20	38	синий	2
KZ 0779	43-46	0,20	42	синий	2
KZ 0780	37-40	0,20	34	черный	2
KZ 0781	40-43	0,20	38	черный	2
KZ 0782	43-46	0,20	42	черный	2

Таблица 13

Варежки массажные акупунктурные НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт. (на 2 варежки)	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0800	0,30 0,20 0,01	0,2	44	синий	2
KZ 0784	0,30 0,20 0,01	0,2	44	зелёный	2
KZ 0785	0,30 0,20 0,01	0,2	44	чёрный	2
KZ 0786	0,30 0,20 0,01	0,2	44	бежевый	2
KZ 0787	0,30 0,20 0,01	0,2	44	розовый	2
Наколенники массажные акупунктурные НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов , шт.	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)

KZ 0788	0,675 0,35 0,01	0,32	158	синий	2
KZ 0789	0,675 0,35 0,01	0,32	158	чёрный	2
KZ 0790	0,675 0,35 0,01	0,32	158	бежевый	2
KZ 0791	0,675 0,35 0,01	0,32	158	серый	2
KZ 0792	0,675 0,35 0,01	0,32	158	бирюзовый	2
KZ 0793	0,675 0,35 0,01	0,32	158	розовый	2

Таблица 14

Массажёр для акупунктурного массажа НИРВАНА®					
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0801	0,42 0,1 0,1	0,8	108	синий	5
KZ 0802	0,42 0,1 0,1	0,8	108	фиолетовый	5
KZ 0803	0,42 0,1 0,1	0,8	108	чёрный	5

KZ 0804	0,42 0,1 0,1	0,8	108	бежевый	5
KZ 0805	0,42 0,1 0,1	0,8	108	бежевый	5
KZ 0806	0,12 0,12 0,12	0,7	56	оранжевый	7
KZ 0807	0,12 0,12 0,12	0,7	56	синий	7
KZ 0808	0,12 0,12 0,12	0,7	56	чёрный	7
KZ 0809	0,12 0,12 0,12	0,7	56	бежевый	7
KZ 0810	0,12 0,12 0,12	0,7	56	бежевый	7

Таблица 15

Коврик акупунктурный с магнитами НИРВАНА®							
Арти кул	Габаритн ые размеры ДхШхВ, м	Мас са, кг	Количес тво аплика торов, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабоче й поверх ности, мТл ±10%	Тип аппликатор а и размеры аппликатор а (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0811	0,65 0,4 0,02	0,8	230	бирюзов ый	45	35	4
KZ 0812	0,65 0,4 0,02	0,8	230	фиолето вый	45	35	4
KZ 0813	0,65 0,4 0,02	0,7	230	зелёный	10	35	4
KZ 0814	0,65 0,4 0,02	0,7	230	чёрный	10	35	4
KZ 0815	0,65 0,4 0,02	0,9	230	синий	230	35	4

KZ 0816	0,65 0,4 0,02	0,9	230	оранже вый	230	35	4
KZ 0817	0,65 0,4 0,02	0,9	230	бежевый	230	35	4
KZ 0818	0,72 0,44 0,02	2,3	210	бежевый	210	35	4
KZ 0819	0,72 0,44 0,02	2,3	210	бежевый	210	35	4
KZ 0820	0,72 0,44 0,02	2,3	210	бежевый	210	35	4
KZ 0821	1,25 0,5 0,02	2	450	синий	450	35	4
KZ 0822	1,25 0,5 0,02	2	450	фиолето вый	450	35	4
KZ 0823	0,47 0,43 0,02	0,5	198	чёрный	198	35	4
KZ 0824	0,47 0,43 0,02	0,5	198	чёрный	198	35	4
KZ 0825	0,6 0,4 0,02	0,6	160	фиолето вый	160	35	4

Таблица 16

Коврик-сумка акупунктурный с магнитами НИРВАНА®							
Арт икул	Габарит ные размеры ДхШхВ, м	Ма сса, кг	Количес тво аплика торов, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабо чей поверх ности, мТл ±10%	Тип аппликатор а и размеры аппликатор а (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0826	0,74 0,44 0,02	0,4	210	чёрный	210	35	4
KZ 0827	0,74 0,44 0,02	0,4	210	фиолетов ый	210	35	4
KZ 0828	0,74 0,44 0,02	0,4	210	серый	210	35	4
KZ 0829	0,74 0,44	0,4	210	бежевый	210	35	4

	0,02						
KZ 0830	0,74 0,44 0,02	0,4	210	бежевый	210	35	4

Таблица 17

Валик для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА [®]							
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл ±10%	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0831	0,37 0,15 0,10	0,3	73	фиолетовый	9	35	4
KZ 0832	0,37 0,15 0,10	0,3	73	зелёный	9	35	4
KZ 0833	0,37 0,15 0,10	0,3	73	чёрный	9	35	4
KZ 0834	0,37 0,15 0,10	0,3	73	синий	9	35	4
KZ 0835	0,37 0,15 0,10	0,3	73	бежевый	9	35	4
KZ 0836	0,37 0,15 0,10	0,3	73	бежевый	9	35	4
KZ 0837	0,37 0,15 0,10	0,3	73	бежевый	9	35	4

Таблица 18

Подушка акупунктурная с магнитами НИРВАНА [®]
--

Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл $\pm 10\%$	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0838	0,3 0,23 0,09	0,25	50	бирюзовый	12	35	4
KZ 0839	0,3 0,23 0,09	0,25	50	чёрный	12	35	4
KZ 0840	0,32 0,32 0,01	0,25	65	синий	65	35	4
KZ 0841	0,32 0,32 0,01	0,25	65	оранжевый	65	35	4
KZ 0842	0,4 0,3 0,1	1,1	51	бежевый	51	35	4
KZ 0843	0,4 0,3 0,1	1,1	51	бежевый	51	35	4
KZ 0844	0,4 0,3 0,1	1,1	51	бежевый	51	35	4
KZ 0845	0,4 0,3 0,1	1,1	51	бежевый	51	35	4

Таблица 19

Повязка-аппликатор акупунктурная с магнитами НИРВАНА®

Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл ±10%	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0846	1,32 0,2 0,01	0,5	56	фиолетовый	16	35	4
KZ 0847	1,32 0,2 0,01	0,5	56	зелёный	16	35	4
KZ 0848	1,32 0,2 0,01	0,5	56	синий	16	35	4
KZ 0849	1,32 0,2 0,01	0,5	56	оранжевый	16	35	4
KZ 0850	1,4 0,21 0,01	0,5	46	бежевый	46	35	4
KZ 0851	1,4 0,21 0,01	0,5	46	бежевый	46	35	4

Таблица 20

Поязка для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА®							
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл±10%	Тип аппликато ра и размеры аппликато ра (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0852	0,73 0,07 0,015	0,7	12	синий	12	35	4
KZ 0853	0,73 0,07 0,015	0,7	12	оранжевый	12	35	4
KZ 0854	0,73 0,07 0,015	0,7	12	зелёный	12	35	4
KZ 0855	0,73 0,07 0,015	0,7	12	бежевый	12	35	4
KZ 0856	0,73 0,07 0,015	0,7	12	фиолетовы й	12	35	4
KZ 0857	0,73 0,07 0,015	0,7	12	бирюзовый	12	35	4

Таблица 21

Набор акупунктурный с магнитами НИРВАНА®

Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторо в, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл±10%	Тип апплика тора и размер ы апплика тора (в соотв. с пункта ми Таблица 1а.)
KZ 0858	Коврик – 0,65 0,4 0,02 Поду шка – 0,37 0,15 0,1 Сумка 0,42 0,25 0,25	Подушка 0,4 Коврик 0,65 Сумка 0,2	Коврик - 230 Подушк а -73	синий	Коврик – 10 Подушка - 9	35	4

KZ 0859	Коврик – 0,65 0,4 0,02 Подушка – 0,37 0,15 0,1 Сумка 0,42 0,25 0,25	Подушка 0,4 Коврик 0,65 Сумка 0,2	Коврик - 230 Подушка -73	фиолет овый	Коврик – 10 Подушка - 9	35	4
KZ 0860	Коврик 0,74 0,42 0,02 Подушка 0,40 0,30 0,02 Сумка 0,45 0,35 0,1	Подушка 1 Коврик 0,9 Сумка 0,2	Коврик - 230 Подушка -115	серый	Коврик -230 Подушка -115	35	4
KZ 0861	Коврик 0,74 0,42 0,02 Подушка 0,40 0,30 0,02 Сумка 0,45 0,35 0,1	Подушка 1 Коврик 0,9 Сумка 0,2	Коврик - 230 Подушка -115	зелёный	Коврик -230 Подушка -115	35	4

KZ 0862	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,40 0,30 0,01 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 1,05 Коврик 1,3 Сумка 0,2	Коврик - 221 Подушка -51	бежевый	Коврик -221 Подушка -51	35	4
KZ 0863	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,40 0,30 0,01 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 1,05 Коврик 1,3 Сумка 0,2	Коврик - 221 Подушка -51	бежевый	Коврик -221 Подушка -51	35	4

KZ 0864	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,40 0,30 0,01 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 1,05 Коврик 1,3 Сумка 0,2	Коврик - 221 Подушка -51	бежевый	Коврик - 221 Подушка - 51	35	4
KZ 0865	Коврик 0,72 0,44 0,02 Подушка 0,40 0,30 0,01 Сумка 0,45 0,35 0,2	Подушка 1,05 Коврик 1,3 Сумка 0,2	Коврик -221 Подушка -51	бежевый	Коврик - 221 Подушка - 51	35	4

Таблица 22

Подушка дорожная акупунктурная с магнитами НИРВАНА [®]							
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл±10%	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0866	0,3 0,3 0,12	0,4	56	зелёный	5	35	4
KZ 0867	0,3 0,3 0,12	0,4	56	розовый	5	35	4
KZ 0868	0,3 0,3 0,12	0,4	56	серый	5	35	4
KZ 0869	0,3 0,3 0,12	0,4	56	чёрный	5	35	4
KZ 0870	0,3 0,3 0,12	0,4	56	бежевый	5	35	4

Таблица 23

Подушка для сидения с памятью акупунктурная с магнитами НИРВАНА [®]							
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл±10%	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0871	0,45 0,35 0,07	0,7	56	оранжевый	56	35	4
KZ 0872	0,45 0,35 0,07	0,7	56	зелёный	56	35	4
KZ 0873	0,45 0,35	0,7	56	бирюзовый	56	35	4

	0,07						
KZ 0874	0,45 0,35 0,07	0,7	56	серый	56	35	4
KZ 0875	0,45 0,35 0,07	0,7	56	чёрный	56	35	4

Таблица 24

Набор аппликаторов игольчатых с магнитами НИРВАНА®							
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Масса, кг	Количество апплика торов, шт.	Цвет	Количество магнит ов, шт.	Магнитная индукция на рабоче й поверх ности, мТл±1 0%	Тип аппликатор а и размеры аппликатор а (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0876	0,15 0,1 0,1	0,15	30	белый	30	35	4
KZ 0877	0,2 0,15 0,1	0,25	50	белый	50	35	4
KZ 0878	0,2 0,2 0,1	0,45	100	белый	100	35	4
KZ 0879	0,15 0,1 0,1	0,15	30	красный	30	35	4
KZ 0880	0,2 0,15 0,1	0,25	50	красный	50	35	4
KZ 0881	0,2 0,2 0,1	0,45	100	красный	100	35	4
KZ 0882	0,3 0,2 0,1	0,85	200	мультико лор	200	35	4

Таблица 25

Пояс двумя сменными акупунктурными подушками с аппликаторами с магнитами НИРВАНА®							
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл±10%	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0883	Пояс — 1,0 0,2 0,01 Подушки — 0,22 0,12 0,02	0,7	74	синий	37	35	4
KZ 0884	Пояс — 1,05 0,2 0,01 Подушки — 0,22 0,12 0,02	0,7	74	синий	37	35	4
KZ 0885	Пояс — 1,1 0,2 0,01 Подушки — 0,22 0,12 0,02	0,7	74	синий	37	35	4

KZ 0886	Пояс — 1,15 0,2 0,01 Подушки — 0,22 0,12 0,02	0,7	74	синий	37	35	4
KZ 0887	Пояс — 1,20 0,2 0,01 Подушки — 0,22 0,12 0,02	0,7	74	синий	37	35	4

Таблица 26

Стежки для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА [®]							
Артикул	Размеры	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт. (на 2 стельки)	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл±10%	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0888	37-40	0,25	34	оранжевый	34	35	4
KZ 0889	40-43	0,25	38	синий	38	35	4
KZ 0890	43-46	0,25	42	синий	42	35	4
KZ 0891	37-40	0,25	34	чёрный	34	35	4
KZ 0892	40-43	0,25	38	чёрный	38	35	4
KZ 0893	43-46	0,25	42	чёрный	42	35	4

Таблица 27

Варежки массажные акупунктурные с магнитами НИРВАНА®							
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт. (на 2 варежки)	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл±10%	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0894	0,3 0,2 0,02	0,1	44	синий	44	35	4
KZ 0895	0,3 0,2 0,02	0,1	44	чёрный	44	35	4
KZ 0896	0,3 0,2 0,02	0,1	44	бежевый	44	35	4
KZ 0897	0,3 0,2 0,02	0,1	44	розовый	44	35	4

Таблица 28

Наколенники массажные акупунктурные с магнитами НИРВАНА®							
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, м	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл±10%	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)

KZ 0898	0,675 0,35 0,02	0,4	158	синий	158	35	4
KZ 0899	0,675 0,35 0,02	0,4	158	бежевый	158	35	4
KZ 0900	0,675 0,35 0,02	0,4	158	серый	158	35	4

Таблица 29

Массажёр для акупунктурного массажа с магнитами НИРВАНА®							
Артикул	Габаритные размеры ДхШхВ, мм	Масса, кг	Количество аппликаторов, шт.	Цвет	Количество магнитов, шт.	Магнитная индукция на рабочей поверхности, мТл±10%	Тип аппликатора и размеры аппликатора (в соотв. с пунктами Таблица 1а.)
KZ 0901	0,42 0,1 0,1	0,8	108	синий	108	35	4
KZ 0902	0,42 0,1 0,1	0,8	108	бежевый	108	35	4
KZ 0903	0,12 0,12 0,12	0,7	56	чёрный	56	35	4
KZ 0904	0,12 0,12 0,12	0,7	56	бежевый	56	35	4

Размеры аппликаторов (шипов): диаметр 17,9 мм, 26,7 мм, 27,2 мм, 29,7 мм, 30,1 мм, 31,9 мм. Погрешность ±5%.

Требования к изготовлению:

Сшивание деталей изделий должно осуществляться нитками швейными синтетическими или хлопчатобумажными, неокрашенными (белого цвета) по ГОСТ 6309, либо ультразвуковой, либо термической сваркой (ширина шва 4 - 8 мм).

Методы обработки должны соответствовать промышленной технологии изготовления швейных изделий. Виды стежков, строчек и швов должны быть выполнены в соответствии с ГОСТ 12807.

Строчки должны быть ровными не более 30 мм от края, без пропусков стежков и изменения их количества. Швы должны быть ровными, без растяжения или посадки одного из срезов. Концы ниток в строчках должны быть закреплены и отрезаны.

Изделия не должны иметь внешних дефектов в виде разрывов, вмятин и других механических повреждений.

Изделия при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ Р 50444 для вида климатического исполнения УХЛ 4.2.

Изделия при транспортировании должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для условий хранения 5.

Изделия медицинские при эксплуатации должны быть устойчивы к механическим воздействиям по ГОСТ Р 50444 для группы 2.

Средний срок службы медицинских изделий должен быть не менее 5 лет. Изделия медицинские не являются ремонтпригодными изделиями. За предельное состояние принимают такое состояние медицинского изделия, при котором восстановление его работоспособности экономически нецелесообразно.

Изделия нестерильные.

Поверхности аппликаторов должны быть устойчивы к дезинфекции в соответствии с МУ-287-113, химическим методом, 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% моющего средства по ГОСТ 25644.

Материалы для изготовления изделий, должны соответствовать параметрам:

- Поверхностная плотность, г/м², не менее- 105
- Разрывная нагрузка, Н (кгс) не менее (в поперечном сечении) 150
- Разрывная нагрузка, Н (кгс) не менее (в продольном сечении) 250
- Водоупорность мм вд.ст. –не применимо.

Сырье и материалы:

Таблица 30

Наименование	Материал и марка	Производитель	Контакт
Чехол (основание массажера)	Хлопок Hengxin	NEH (Ningbo) Industry&Trade Co.,Ltd, Китай	Кратковременный контакт с

	натуральный 45% хлопок, 55% лен.	NEH (Ningbo) Industry&Trade Co.,Ltd, Китай	неповрежденной кожей
	Краситель Синий активный СВ 3 Зеленый активный СВ Красный активный СВ 2С	ООО «Химтехник», Россия	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей
	Пластик INKULEN PE	ООО "ТД Пластмасс Групп",Россия	-
	Полиуретан Yongxing	NEH (Ningbo) Industry&Trade Co.,Ltd, Китай	
Аппликатор (шип)	АБС-пластик Qimei	NEH (Ningbo) Industry&Trade Co.,Ltd, Китай	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей
	HIPS-пластик Kunlun	NEH (Ningbo) Industry&Trade Co.,Ltd, Китай	
Магнит	Ферритовый сплав марка Y30	АО «Технология магнитных материалов», Россия	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей
Красители	Синий RAL 5002 Зеленый RAL 6001 Красный RAL 3000	ЗАО «ГЛОБАЛ КОЛОПС», Россия	Кратковременный контакт с неповрежденной кожей

Наполнитель	100% натуральное кокосовое волокно.	ООО Компания «Нафта-Хим», Россия	-
	Поролон ППУ толщиной 10мм	ООО «Интерфом», Россия	-
	100% натуральная гречневая лузга и шелуха	Компания «Лика», Россия	-
	Латекс Patex	Pattani Industry 1971 Co., ltd., Таиланд	-
Сумка	Хлопок хлопчатобумажная пряжа линейной плотностью 18,5	ООО «Камышинский текстиль», Россия	-
Упаковка	Картон		-

9. Комплект поставки

В комплект поставки изделия входит:

Массажер медицинский НИРВАНА® по ТУ 32.50.21-001-76456205-2020 в варианте исполнения в упаковке -1 шт.

Инструкция по применению – 1 шт.

10. Требования безопасности, в т.ч. охрана окружающей среды

10.1 В условиях эксплуатации изделия должны быть нетоксичными.

10.2 Производственные помещения и оборудование должно соответствовать требованиям, действующим на данный момент правилам и нормативам.

10.3 Производственные и складские помещения должны быть оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией по ГОСТ 12.4.021, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны, соответствующее требованиям ГОСТ 12.1.005.

10.4 Параметры микроклимата, уровни физических факторов, содержание пыли и вредных веществ в воздухе рабочих зон всех производственных помещений с постоянным или непостоянным пребыванием в них людей, должны соответствовать действующим санитарным правилам, нормам и гигиеническим нормативам.

10.5 Изделия относятся к группе горючих (сгораемых) материалов по ГОСТ 12.1.044.

10.6 Пожарная безопасность производства должна обеспечивать соблюдение требований ГОСТ 12.1.004, взрывобезопасность по ГОСТ 12.1.010, электростатическая искробезопасность по ГОСТ 12.1.018.

10.7 Производственные и складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием по ГОСТ 12.4.009.

10.8 Производственный контроль должен производиться в соответствии с СП 1.1.1058.

10.9 Работники, занятые в производстве продукции, должны быть обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с требованиями технологического процесса и ГОСТ 12.4.011.

10.10 Все работающие предприятия должны проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в соответствии с законодательством РФ.

ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

10.11 Требования к санитарной охране атмосферного воздуха, почвы и водных объектов должны соответствовать действующим санитарно-эпидемиологическим правилам и гигиеническим нормативам, установленным в законодательстве РФ.

10.12 Технология производства изделий не предполагает образование жидких отходов. Производство изделий не должно выделять в окружающую среду токсичных веществ и оказывать раздражающего, сенсibilизирующего воздействия на человека и должно соответствовать требованиям ГОСТ ISO 10993-1.

10.13 Утилизация или уничтожение технологических потерь, образующихся при производстве изделий, а также готовой продукции, при ее несоответствии требованиям настоящих технических условий, должны проводиться в соответствии с действующими нормами и требованиями.

10.14 Запрещается неорганизованное сжигание бывших в употреблении изделий.

11. Подготовка к работе и порядок работы

Важная информация

Использовать изделие нужно после еды, не раньше, чем через полтора часа — иначе ускорение кровотока может негативно отразиться на пищеварении, что принесет вред.

Массаж не должен быть слишком долгим — обычно его делают всего по несколько минут с перерывами. Максимальная продолжительность процедуры за один день не превышает часа.

После сеанса домашнего массажа будет полезно принять расслабляющий теплый или контрастный душ для усиления эффекта — польза процедуры

Внимание! Перед использованием массажера в целях лечения конкретного недуга нужно обязательно проконсультироваться с врачом и узнать, не пойдут ли свойства массажера во вред.

Рекомендации по использованию:

На иголках можно просто лежать, а можно слегка перекатываться по ним больным местом, регулируя силу воздействия — положительные свойства массажа от этого увеличатся.

При остеохондрозе

При обострении остеохондроза применять массажер можно с разрешения врача, не больше 4 – 6 раз в день по 7 минут на болезненную область в положении лежа на спине. Если болезнь сопровождается позвоночными грыжами и протрузией, то лучше прижимать аппликатор к телу не более чем на минуту с перерывами по 10 секунд — иначе можно получить вред.

В период ремиссии можно применять устройство по полчаса подряд до 2 раз в день. Это снимет напряжение мышц и уберет воспаления и отеки.

При радикулите

Если боли локализуются в поясничном отделе позвоночника, то полезнее всего будет выполнить комплекс упражнений с закрепленным на спине массажером. А именно:

проделать наклоны корпуса влево и вправо;

сделать повороты корпуса в левую и правую стороны;

выполнить легкие потягивания вверх влево и вверх вправо, поочередно поднимая над головой руки.

Внимание! Двигаться нужно очень осторожно, чтобы не причинить себе лишний вред.

При головной боли

Свойства массажера помогут снять болевые ощущения в голове, если в течение нескольких минут (5 – 10) воздействовать им на затылочно-теменную, шейную или височную часть — в зависимости от локализации боли.

При плоскостопии рекомендуется:

ходить по массажеру;

стоять, периодически перенося вес тела с ноги на ногу;

поворачивать при ходьбе стопы то на внешнюю, то на внутреннюю сторону для полноценного воздействия на мышцы.

При болях в спине и пояснице

Даже здоровые люди нередко испытывают дискомфорт в верхней или нижней части спины. При неосторожных движениях или поднятии тяжестей очень легко потянуть мышцы. Массажер с пластиковыми шипами — действенное средство для устранения мышечных болей в области спины.

Применять устройство можно по-разному — например, полежать на нем на протяжении 10 – 20 минут, или закрепить аппликатор на больной области и проделать комплекс нехитрых упражнений для мышц спины.

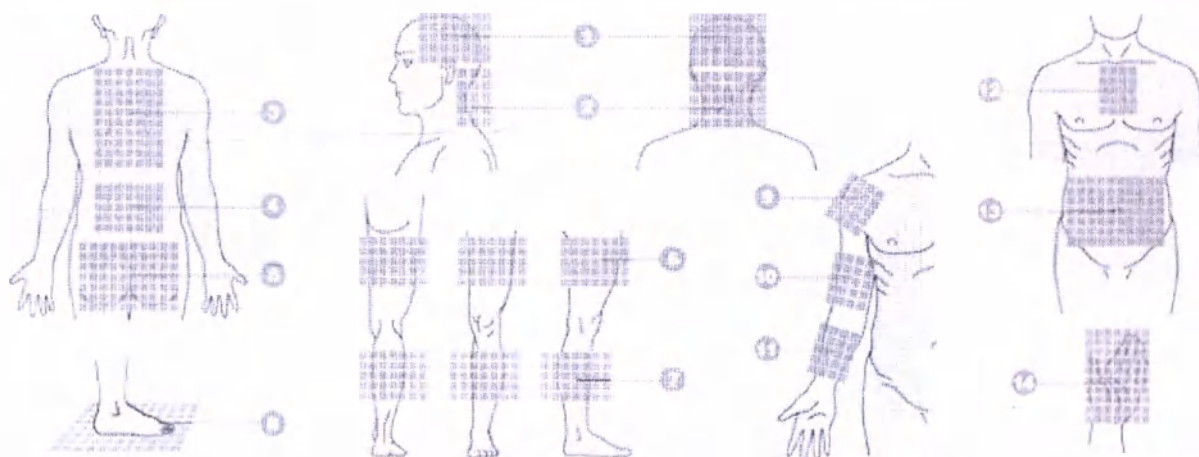
При болях в шее

Массажер при шейном остеохондрозе или при мышечных болях, удобнее всего в виде валика с удобной ручкой. Перекатывая валик с легким надавливанием, можно самостоятельно массировать шею.

При неимении валика можно просто свернуть аппликатор и укладывать на него шею из положения сидя или лежа на несколько минут с перерывами.

Зоны воздействия

Зоны воздействия



- Снятие болей в мышцах и суставах, включая остеохондроз и радикулит – болевая зона ②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪
- Снятие головных болей – зоны ①②, в отдельных случаях ③
- Улучшение эластичности и восстановление нормального тонуса кожи, уменьшение целлюлита и нежелательных жировых отложений – проблемные зоны ③④⑤
- Повышение общего тонуса организма, восстановление и повышение работоспособности, восстановление после физических нагрузок, нормализация сна – зоны ③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩⑪
- Повышение половой активности – зоны ③④

12. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности).

Срок службы – не менее 5 лет.

13. Условия хранения и транспортировки.

Изделия медицинские транспортируются всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444 и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта.

Транспортирование изделий медицинских морским транспортом производится в соответствии с «Правилами безопасности морской перевозки генеральных грузов».

Вид отправки – контейнерами, мелкая малотоннажная, повагонная отправка.

Условия при транспортировке изделий медицинских соответствуют условиям хранения 5 по ГОСТ 15150.

В упаковке предприятия-изготовителя изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре от +10 до +35 °С и относительной влажности до 70%. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в складских помещениях, исключая воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

14. Техническое обслуживание.

В случае неисправности изделия в течение гарантийного срока - «Владелец» должен направить в адрес предприятия-изготовителя следующие документы:

- заявку на ремонт (замену) с указанием своего адреса и контактного телефона;
- гарантийный талон, оформленный, со своей стороны.

При обнаружении неисправности в изделии следует обратиться к производителю для проведения ремонта по следующему адресу:

Общество с ограниченной ответственностью «Технологии здоровья»

117405, г. Москва, Варшавское шоссе 145, корп. 8.

(495) 648-26-66

market@bradex.ru

Регулярный осмотр

Для более безопасного использования продукта пользователь может проводить регулярный осмотр в соответствии с инструкциями ниже.

План технического обслуживания пользователя:

Проверка/калибровка	Период
Внешний вид Проверить наличие физических повреждений шипов	По необходимости

Для безопасной эксплуатации рекомендуется выполнять процедуры технического обслуживания. Для безопасной работы изделия требуется регулярное техническое обслуживание.

Чистка и дезинфекция

Инструменты для чистки: чистая вата или губка.

Моющее средство: раствор перекиси водорода с добавлением моющего средства (по МУ 287-113)

Процесс чистки: смочить чистую вату или губку раствором перекиси водорода с моющим средством и почистить внешние части изделия.

Необходимость калибровки для обеспечения надлежащей и безопасной работы медицинского изделия в течение срока его службы: Не требуется

Методы снижения рисков, связанных с установкой, калибровкой или техническим обслуживанием медицинского изделия:

Не требуется

15. Указание, при необходимости, специальных мер предосторожности при уничтожении неиспользованных медицинских изделий (утилизация).

Использованные изделия утилизируются в соответствии с СанПиНом 2.1.7.2790. По степени опасности отходов – класс А, как эпидемиологические безопасные отходы и утилизируются как бытовые отходы.

16. Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.

Гарантийный срок годности составляет 36 месяцев с момента изготовления изделия.

17. Маркировка

На каждую индивидуальную упаковку с изделием наклеивают этикетку. На этикетке указывают:

- ☐ наименование страны-изготовителя;
- ☐ наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя, адрес;
- ☐ обозначение настоящих технических условий;
- ☐ наименование изделия и тип изделия;
- ☐ размеры;
- ☐ дата изготовления (месяц и год) и номер партии;
- ☐ слова «годен до...» (месяц и год) / или гарантийный срок службы;
- ☐ условия хранения;
- ☐ условия утилизации;
- ☐ номер регистрационного удостоверения;
- ☐ знак соответствия (при необходимости);
- ☐ штрих-код продукции (при необходимости).

Примечание: допускается наносить на маркировку графические символы и рисунки, поясняющие условия хранения изделий, их утилизацию и т.п. по ГОСТ Р ИСО 15223-1.

Материал этикетки должен соответствовать ГОСТ 7625.

18. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН № 1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Массажеры медицинские НИРВАНА® по ТУ 32.50.21-001-76456205-2020

№ Дата изготовления « » 20 г.

М.П. предприятия-изготовителя

1. Приобретен

(дата, подпись и штамп торгового предприятия)

2. Признаки отказа, неисправностей и обстоятельства, при которых они возникли
(заполняется «Владельцем»):

.....
.....
.....

3. Заключение предприятия-изготовителя:

.....
.....
.....

4. Выполненные работы

.....
.....
.....

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью 20 листов
Подпись _____

