


Аппарат лазерный терапевтический CLEAR and BRILLIANT™

***Наконечники к аппарату
лазерному терапевтическому
CLEAR + BRILLIANT***

Инструкция по эксплуатации

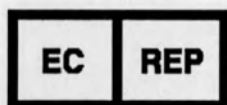

МДСС ГмбХ

**Германия
30175 Ганновер
Шиффграбен 41**

**Тел. (+49) -511-6262 8630
Факс (+49) -511-6262 8633**



**Солта Медикал Инк.
США, Калифорния 94545, Хейворд
Бульвар Индастриал 25881**

**Телефон: 510-782-2286
Отдел обслуживания клиентов: 510-782-2286;
или обращаться к
Официальному дистрибьютору**

Рукоятка с наконечником


Через отверстие в рукоятке луч лазера направляется на поверхность кожи пациента; при этом необходимо, чтобы на рукоятке был установлен надлежащий наконечник. Кнопки активации и настройки (для выбора низкого, среднего или высокого уровня излучения), а также световые индикаторы находятся на верхней стороне рукоятки.

Когда аппарат не используется, рукоятка должна находиться в гнезде.

Рукоятка, вид сбоку (с установленным наконечником)



Рукоятка, вид сверху (с установленным наконечником)

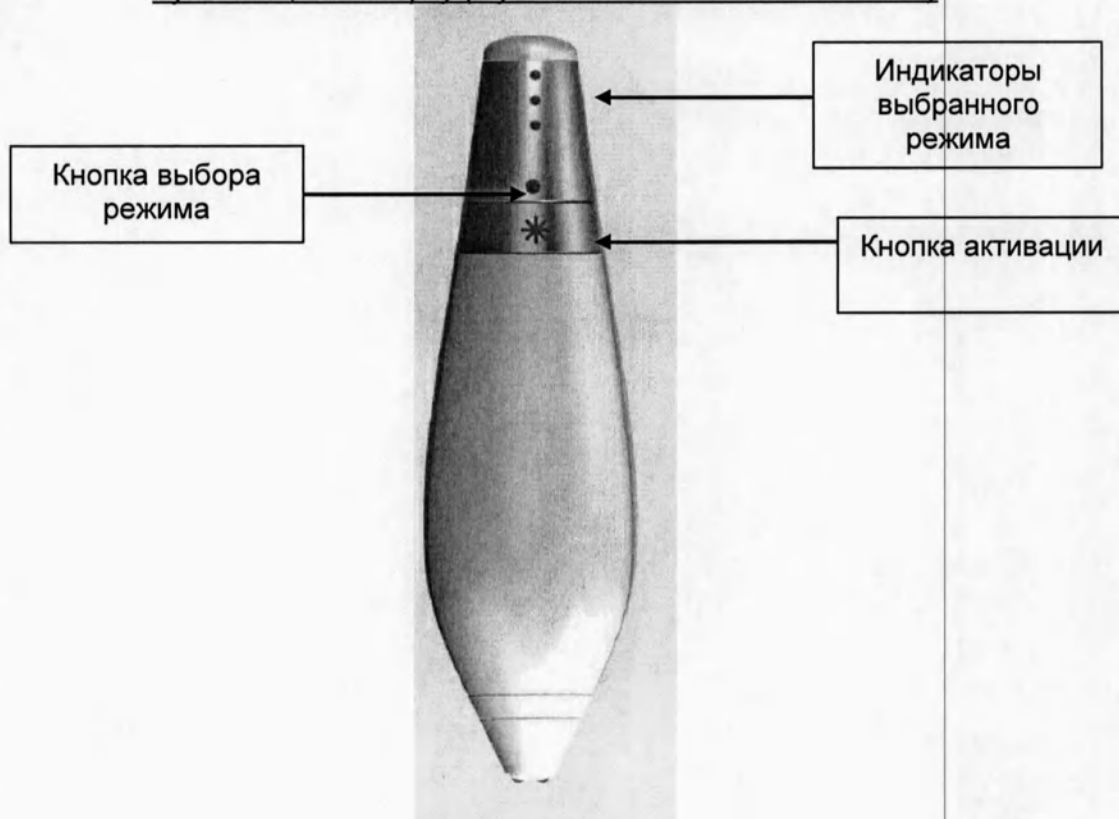

Наконечник

Одноразовый наконечник присоединяется к длинному концу рукоятки; он **ОБЯЗАТЕЛЬНО** устанавливается перед началом терапии. Система регистрирует контакт между наконечником и кожей и вычисляет скорость движения рукоятки.

Наконечники совместимы с живыми тканями (стандарт ISO 10993); материал наконечника может контактировать с кожей.

При правильном расположении наконечник закрепляется на рукоятке механически и при помощи магнитов и при правильном использовании не соскальзывает.

Срок службы наконечника — один сеанс терапии. Наконечники одноразовые.



Осторожно:

Во избежание неправомерного использования лазера неуполномоченным персоналом (что может привести к травматизму или пожару) следует снимать наконечник с рукоятки. Наконечники хранятся в специально предназначенном для этого месте, доступном только обученному уполномоченному персоналу и защищенном от доступа необученного персонала.

Внимание: Наконечник присоединяется к длинному концу рукоятки перед каждым сеансом терапии. Без наконечника система не будет функционировать.

Внимание: Следует принимать меры по предотвращению загрязнения внутреннего отверстия рукоятки и отверстия наконечника до, во время или после самотестирования, так как это может привести к неблагоприятному клиническому исходу, повреждению аппарата или травматизму окружающих.

Проверить целостность рукоятки и наконечника. Не использовать наконечник и рукоятку с явными дефектами.

Подсоединить наконечник к рукоятке

По завершении установки лимита процедур присоединить наконечник к длинному концу рукоятки. Наконечник имеет два запора, которые удерживают наконечник механически и при помощи магнитов. При надевании наконечника направить запоры в соответствующие пазы на рукоятке. Если наконечник не встает на место со щелчком, скорее всего, наконечнику придано неверное положение. Повернуть наконечник таким образом, чтобы верхний запор точно совпадал с верхним межкомпонентным соединением на рукоятке.

Если наконечник не поставлен на рукоятку должным образом, лазер не будет активирован и система не позволит начать терапию.

После нажатия кнопки активации на рукоятке поставить наконечник рукоятки на участок кожи. Лазерное излучение начнется, как только наконечник соприкоснется с кожей и придет в движение. В рукоятку встроен оптический индикатор, подобный оптической мыши, определяющий наличие контакта с кожей. В процессе терапии звуковые сигналы показывают, что происходит лазерное излучение и осуществляется терапевтический процесс.

Если наконечник еще не установлен на рукоятку, экран выдает сообщение, что наконечник не установлен. Присоединить наконечник к рукоятке, как указано в данной инструкции.

Снятие и утилизация наконечника

По завершении процедуры и отключении лазера путем нажатия кнопки активации на рукоятке снять наконечник; запоры наконечника высвобождаются нажатием с боков наконечника. Утилизация наконечника производится в соответствии с местным законодательством.

Наконечники для Аппарата CLEAR and BRILLIANT предназначены для одноразового использования и утилизируются после сеанса терапии.



Примечание: Чтобы система IOTS не теряла ориентации, важно, чтобы наконечник всегда находился в плотном контакте с кожей в примерно перпендикулярном положении относительно кожи.

Для чистки наконечника не использовать ацетон, так как это может привести к повреждению наконечника и некорректному функционированию прибора.

Использовать только съемные наконечники CLEAR and BRILLIANT. Для получения дополнительной информации следует обратиться в отдел обслуживания клиентов компании "Солта Медикал" или к местному официальному дистрибьютору компании.

**ВСЕГО ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШНУРОВАНО И
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ
✓ ЛИСТА (ОВ)**

