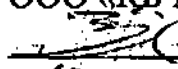


Генеральный директор
ООО «КБ Аудиомаг»
 И.Г. Иванов
«10» 12 2012 г.

АППАРАТЫ СЛУХОВЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ЦИФРОВЫЕ
ТРИММЕРНЫЕ, ПРОГРАММИРУЕМЫЕ ВОЗДУШНОГО
ЗВУКОПРОВЕДЕНИЯ ЗАУШНОГО ТИПА
"ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+"

Паспорт

236-00-00 ПС

2012

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № д.	Подпись и дата

СОДЕРЖАНИЕ

	Лист
1 Технические требования	5
2 Комплектность	6
3 Техническое описание	7
4 Подготовка к работе	11
5 Использование СА	13
6 Техническое обслуживание	14
7 Простейшие неисправности и методы их устранения	16
8 Свидетельство о приемке	17
9 Гарантии изготовителя	18
Приложение (гарантийный талон)	19

Инв. № подл	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. №	Подпись и дата

236-00-00 ПС				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.		Панушко	<i>[Подпись]</i>	10.12.10
Провер.		Скворцов	<i>[Подпись]</i>	10.12.10
Н. Контр.			<i>[Подпись]</i>	10.12.10
Аппараты слуховые электронные цифровые триммерные, программируемые воздушного звукопроводения заушного типа "ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-3Т+"				
Паспорт				
ООО "КБ АУДИОМАГ"				

Настоящий паспорт распространяется на аппараты слуховые электронные цифровые триммерные, программируемые воздушного звукопроведения заушного типа "ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+" (далее СА) и является документом, удостоверяющим гарантированные предприятием-изготовителем основные параметры аппаратов в соответствии с техническими условиями ТУ 9444-24-93307926-2012, а так же содержит информацию, необходимую потребителю для правильной эксплуатации и технического обслуживания СА.

СА предназначены для звукоусиления по воздушному звукопроведению при слабых, средних и тяжелых потерях слуха.

В СА осуществляется цифровая обработка звуковых сигналов.

СА "ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+" имеют две программы прослушивания и настраиваются с помощью триммеров. Триммерная настройка позволяет настроить СА без применения компьютера.

СА предназначены для индивидуального пользования.

Цифровая обработка звукового сигнала, широкий динамический диапазон и разнообразные регулировки программируемых параметров СА обеспечивают естественное звучание, оптимальную разборчивость речи.

СА отличаются современным дизайном, хорошими электроакустическими характеристиками, удобны в эксплуатации, надежны.

При эксплуатации СА располагается за ухом пациента и соединяется со слуховым проходом при помощи гибкого звукопровода с ушным вкладышем.

СА по устойчивости к механическим воздействиям относятся к группе 3 по ГОСТ Р 50444-92.

СА по последствиям отказа относятся к классу Г5 по РД-50-707 и ГОСТ Р 50444-92.

В зависимости от степени потенциального риска применения СА относятся к классу 2а ГОСТ Р 51609-2000.

СА применяются по назначению врача.

Подпись и дата	
Инф. № доку	
Взам. инф. №	
Подпись и дата	
Инф. № подл	

--	--	--	--	--

236-00-00 ПС

Лист

3

Подбор и настройку СА должен осуществлять специалист по слухопротезированию.

Примечание – Если СА приобретен в организации, которая не оказывает услуги по подбору и настройке СА, то обращайтесь в сурдологический центр или кабинет слухопротезирования по месту жительства.

СА сертифицированы.

Сертификат соответствия №

Срок действия – по

Выдан ООО ЦСМИ ВНИИМП

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дук.	Подпись и дата					Лист
Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дук.	Подпись и дата	236-00-00 ПС				4
ООО ЦСМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU ИСБ					Дата				

1 Технические требования

1.1 СА при эксплуатации размещаются за ухом пациента. Внешний вид СА Показан на рисунке 1. СА имеют ветрозащитный вход микрофона, просты и удобны в обслуживании.

1.2 Номинальное напряжение питания слухового аппарата 1,4 В. Питание осуществляется от элемента питания тип 13 или аналогичного.

1.3 Средний срок службы СА 5 лет.

1.4 В СА "ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-2Т+" два регулировочных триммера, а в "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-3Т+" три триммера.

1.5 В СА "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+" вторая программа настроена на индукционную катушку для удобства разговора по телефону.

Подпись и дата

Инд. № до

Взам инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

2 Комплектность

2.1 Комплект поставки должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Обозначение документа	Количество
1	2	3
Аппарат слуховой электронный цифровой триммерный- программируемый		
"ЭЛЬФ-2Т",	236-00-00	1
"ЭЛЬФ-3Т",	236-00-00-01	
"ЭЛЬФ2Т+"	236-00-00-02	
"ЭЛЬФ-3Т+"	236-00-00-03	
Принадлежности		
2* Звукопровод № 1	180-06-00	1
3* Звукопровод № 2	180-06-00-01	1
4* Звукопровод № 3	180-06-00-02	1
6* Элемент питания 1,4В	Тип 13	2
7 Футляр	227-00-00	1
8 Коробка	126-00-14	1
9* Комплект Bluetooth с индукционной петлей		1
Эксплуатационная документация		
10 Паспорт на СА	236-00-00 ПС	1

Примечание - По согласованию с потребителем, слуховой аппарат может комплектоваться позициями принадлежностей, отмеченными * в любом наборе.

Подпись и дата	
Инд. № дуб.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

3 Техническое описание

3.1 В СА окружающие звуки воспринимаются миниатюрным микрофоном, преобразуются им в электрические сигналы, которые затем усиливаются и подводятся к электромагнитному телефону, где вновь преобразуются в акустические сигналы, поступающие по системе звукопроводов в наружный слуховой проход пользователя.

3.2 Внешний вид СА показан на рисунках 1-2.

В СА "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+" предусмотрены два режима работы – от микрофона "М" и индукционной катушки "Т". Режим работы с индукционной катушкой применяется при пользовании телефонным аппаратом, либо при нахождении в помещении, оборудованном индукционной петлёй связи. В остальных случаях используется режим работы от микрофона.

Назначение триммеров осуществляется программным способом в зависимости от функционального назначения СА и указывается в таблице 3 при выпуске СА или при его подборе.

Таблица назначения триммеров для СА "ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+".

Таблица 3

Триммер	Красный	Зелёный	Жёлтый	Примечание
L				тембр высоких частот ТВЧ
H				тембр низких частот ТНЧ
P				(пик клиппирование) ограничение ВУЗД
Ао				автоматическая регулировка усиления (АРУ) по выходу

Подпись и дата	
Инд. № докум.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

СА "ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+" настраивается на заводе-изготовителе по параметрам ВУЗД₉₀ и максимальному акустическому усилению, а также по функциям неоперативных регуляторов в соответствии с заявкой потребителя.

При подборе аппарата, в зависимости от индивидуальных потерь слуха, специалист по слухопротезированию выставляет нужное положение неоперативных регуляторов. Самостоятельно этими регуляторами пользоваться не рекомендуется.

Внимание!

Обращайтесь с регулятором усиления СА бережно, без усилий, плавными движениями регулируя громкость.

На поверхности корпуса СА "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+" имеются следующие переключатели:

- **переключатель режима работы О-Т-М** предназначен для включения – выключения слухового аппарата и выбора программы прослушивания с подключением телефонной катушки или микрофона;
- ◆ в положении **О** переключателя СА выключен;
- ◆ в положении **М** переключателя работает основная программа прослушивания с помощью микрофона. СА усиливает акустические сигналы (речь, музыка и другие звуки) принимаемые микрофоном;
- ◆ в положении **Т** переключателя работает программа прослушивания с помощью телефонной катушки. СА усиливает электромагнитные сигналы, принимаемые телефонной катушкой.

На поверхности корпуса СА "ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3Т" имеются следующие переключатели:

- **переключатель режима работы О-1-2** предназначен для включения – выключения слухового аппарата и выбора программы прослушивания.
- ◆ в положении **О** переключателя СА выключен;

Подпись и дата	
Инд. № д.з.	
Взам инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

♦ в положении 1 переключателя работает основная программа прослушивания с помощью микрофона. СА усиливает акустические сигналы (речь, музыка и другие звуки) принимаемые микрофоном;


♦ в положении 2 переключателя работает программа прослушивания с помощью микрофона, использующая функции шумоподавление и подавление обратной связи.

- выдвижной держатель элемента питания предназначен для установки элемента питания в СА;

- триммеры – регуляторы для настройки СА

Примечание: Положение триммеров настраивается специалистом по слухопротезированию и отмечается на рисунке 2.

Рисунок 1 - Внешний вид СА "ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+"

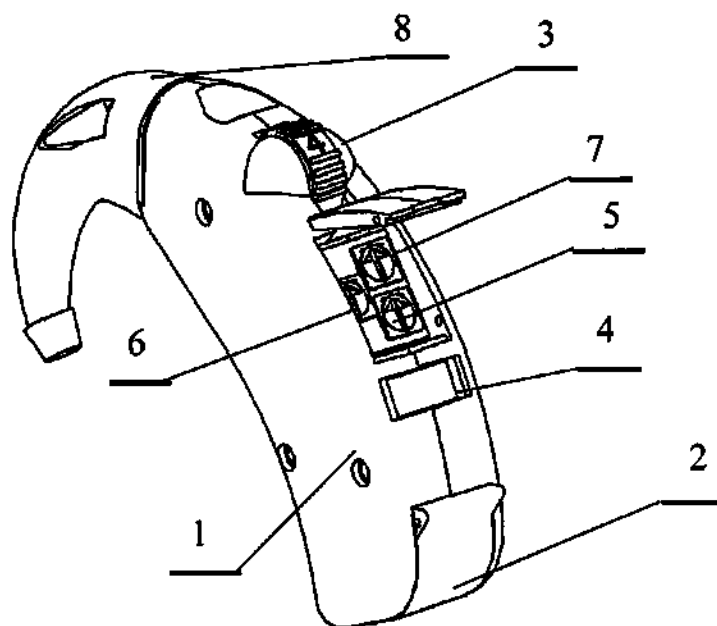

- 1 – корпус СА;
- 2 – выдвижной держатель элемента питания;
- 3 – регулятор усиления;
- 4 – переключатель "О-Т-М" или "О-1-2"
- 5 – регулятор зелёного цвета;
- 6* – регулятор жёлтого цвета;
- 7 – регулятор красного цвета;
- 8 – звукопровод (крючок).

Подпись и дата

Инд. № дус

Взам. инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

236-00-00 ПС

Лист

9

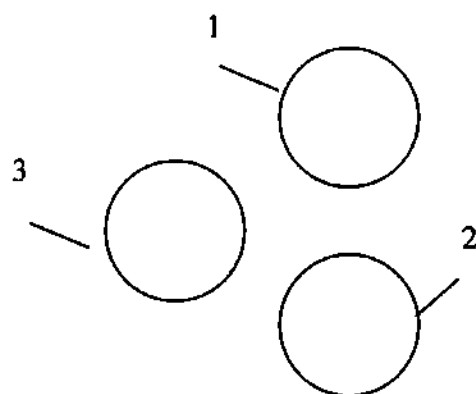


Рисунок 2

1 – регулятор красного цвета;

2 – регулятор зелёного цвета;

3* регулятор жёлтого цвета.

* – отсутствует в "ЭЛЬФ-2Т" и "ЭЛЬФ-2Т+",

Положение триммеров (регуляторов) при настройке

СА "ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+" специалистом по слухопротезированию.

Подпись и дата	
Инд. № доз	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

4 Подготовка к работе

4.1 Установка или замена элемента питания.

4.1.1 Питание СА осуществляется от элемента питания- типа 3 или аналогичного.

4.1.2 Поместите элемент питания в выдвинутый из корпуса аппарата держатель так, чтобы знак "+", обозначенный на элементе питания, совпал со знаком "+" на держателе.

4.1.3 Осторожно задвиньте держатель с элементом питания в корпус СА.

Примечание – Осторожно обращайтесь с держателем элемента питания, не применяйте силу.

4.1.4 В случае разряда элемента питания, использованный элемент питания следует удалить и установить новый. После замены элемента питания может пройти некоторое время, прежде чем установленный элемент питания заработает в полную силу.

4.2 Установка ушного вкладыша

4.2.1 Из комплекта СА выберите гибкий звукопровод с ушным вкладышем такого размера, чтобы он плотно входил в слуховой проход уха. Свободный конец гибкого звукопровода оденьте на жесткий звукопровод (крючок) СА, предварительно укоротив длину трубки до необходимого размера.

Наденьте жесткий звукопровод (крючок) СА на ушную раковину, а СА разместите за ухом.

Ушной вкладыш звукопровода введите в слуховой проход уха.

При больших потерях слуха рекомендуется пользоваться индивидуальными ушными вкладышами, сделанными по слепку с ушной раковины и слухового прохода. Индивидуальные ушные вкладыши можно заказать на пунктах слухового протезирования.

ВНИМАНИЕ! При снятии (или установке) ушного вкладыша с СА, необходимо держать СА за жесткий звукопровод (крючок) для исключения механического повреждения корпуса.

Подпись и дата

Инд. № докум.

Взам. инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

4.3 Подготовка СА к использованию

4.3.1 Предварительную настройку СА должен осуществлять специалист по слухопротезированию.

4.3.2 Регулировку громкости производите колесиком регулятора усиления 3 (рисунок 1), который имеет маркировку с цифрами от 1 до 4.

Минимальная громкость (вниз) соответствует цифре 1.

Максимальная громкость (вверх) соответствует цифре 4. Увеличивать громкость следует поворотом регулятора вверх; уменьшать – вниз.

При исправном СА, после установки регулятора усиления в положение максимального усиления, должен появиться характерный высокочастотный свист, который исчезает, если ушной вкладыш плотно прилегает к стенкам слухового прохода.

4.3.3 Установите регулятор усиления СА на минимальную громкость и поставьте выключатель аппарата в положение «М» (микрофон) или 1.

4.3.4 Поместите СА за ушной раковиной и вставьте ушной вкладыш плотно в наружный слуховой проход.

4.3.5 Установите регулятор усиления на наиболее благоприятный для Вас уровень громкости.

4.3.6 При разговоре по телефону установите переключатель режима работы в положение «Т» (телекатушка). При необходимости, откорректируйте громкость принимаемых звуков с помощью регулятора усиления.

Подпись и дата

Инф. № ду

Взам инб. №

Подпись и дата

Инб. № подл.

5 Использование СА

5.1 Рекомендации по использованию СА

5.1.1 Для эффективного использования СА необходимо некоторое время для привыкания к нему.

В течение первого месяца рекомендуется пользоваться СА дома, избегая шумных мест. Начинать тренировки следует с разговора с одним собеседником.

Попросите собеседника говорить медленно и правильно произносить слова.

Старайтесь концентрировать внимание на тех звуках, которые хотите слышать.

Следует научиться отделять звуки, которые Вы хотите слышать, от всех остальных.

Во избежание утомления слуха в первые дни не рекомендуется пользоваться СА более получаса. Затем с каждым разом увеличивайте время ношения СА.

5.2 Прослушивание радио и телепередач

5.2.1 Слушать радио и телепередачи можно, установив переключатель режима работы в положение "Т" (телекатушка).

Включив радио, послушайте передачу в течении 20 минут с СА. Расстояние до приемника или телевизора определите сами, установив регулятор усиления в СА по наиболее комфортному звучанию. Первые дни время прослушивания должно быть невелико.

5.3 Участие в групповой беседе

5.3.1 У многих пользователей СА возникают сложности при общении в большой группе людей. Эту проблему можно преодолеть, сокращая расстояние между собой и говорящим, а также концентрируя свое внимание на артикуляции и мимике собеседника. Старайтесь не слушать остальных и не стесняйтесь переспросить, если что не поняли.

Подпись и дата

Инд. № док.

Взам. инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Регулярное пользование СА в различной обстановке улучшит способность слышать и получать от СА максимум возможного.

5.4 Посещение общественных мест

5.4.1 Многие кинотеатры, лекционные залы, театры оборудованы специальными устройствами, преобразующими звук в электромагнитные колебания. Переключите СА переключателем рода работы в положение "Т", что позволит четко воспринимать звук.

5.4.2 Находясь в общественных местах располагайтесь в той части зала, где имеются наилучшие акустические условия, но не слишком близко к источнику звука. Обычно этим местом является середина зала.

5.5 Разговор по телефону

5.5.1 Переключите СА переключателем рода работы в положение "Т". При этом СА работает в режиме восприятия звуков, исходящих только от телефонной трубки.

5.5.2 Телефонную трубку следует держать около уха, на котором установлен слуховой аппарат, при этом не следует с силой прижимать телефонную трубку к уху. Попробуйте найти такое положение телефонной трубки, при котором телефонный сигнал слышен достаточно громко и четко.

6 Техническое обслуживание

6.1 СА являются сложным электроакустическим устройством, поэтому техническое обслуживание и ремонт должны производиться специалистами ремонтных организаций.

**КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО
ВСКРЫВАТЬ И ПРОИЗВОДИТЬ РЕМОНТ СЛУХОВОГО АППАРАТА.**

6.2 Следует оберегать СА от механических повреждений, воздействия прямых солнечных лучей и сырости, высокой температуры и органических растворителей.

Примечание. Если СА берется в руки, держать его следует над мягкой поверхностью, чтобы не повредить, если уроните.

Подпись и дата

Инд. № ду

Взам инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

6.3 Не используйте СА в непосредственной близости от источников мощных излучений, чтобы не повредить СА. Маломощные излучения, например, мобильная связь, радиооборудование, сигнализация охраны систем не опасны для СА, но могут временно повлиять на качество звука, что не является дефектом.

6.4 Хранить СА следует вдали от обогревательных приборов и в местах, недоступных малолетним детям, а также домашним животным.

6.5 Выключайте СА, когда им не пользуетесь, а также при длительном хранении СА, вынимайте элемент питания из держателя элемента питания.

6.6 Не подвергайте СА воздействию повышенной влажности. Не допускайте попадания на корпус СА воды, лака для волос, одеколona и т.п. Снимайте при посещении бани, душа, парикмахерской.

6.7 Соблюдайте гигиену слухового прохода.

6.8 Содержите ушной вкладыш в чистоте. Для его дезинфекции и очистке пользуйтесь теплой мыльной водой, предварительно сняв ушной вкладыш и трубку со СА. Прополощите его чистой водой и протрите насухо мягкой тряпочкой. Капли воды, попавшие внутрь ушного вкладыша или трубки, должны быть удалены продуванием. Перед присоединением ушного вкладыша и трубки к СА убедитесь, что они сухие. Если трубка стала жесткой или хрупкой, ее необходимо заменить.

6.9 СА следует протирать сухой мягкой хлопчатобумажной материей.

6.10 Если отверстие микрофона забьется грязью, работа слухового аппарата может ухудшиться. Для очистки отверстия необходимо обратиться к специалисту.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЧИСТИТЬ ОТВЕРСТИЕ МИКРОФОНА САМОСТОЯТЕЛЬНО.

6.11 Если при работе СА возникают трудности, попробуйте устранить их самостоятельно, используя таблицу 4.

Подпись и дата	
Инв. № дуг	
Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл	

7 Простейшие неисправности и методы их устранения

7.1 Если при работе СА возникают простейшие неисправности, попробуйте их исправить самостоятельно, используя таблицу 4.

При более сложных неисправностях обращайтесь за технической помощью в организации по ремонту изделий медицинской техники.

Таблица 4

Признак неисправности	Возможная причина неисправности	Устранение неисправности
1	2	3
Полностью отсутствует слышимость.	1 Аппарат не включен.	Включите аппарат с помощью выключателя питания.
	Неправильно вставлен элемент питания.	Вставьте элемент питания правильно.
Слабая слышимость.	Ручка регулятора усиления установлена на малую громкость.	Добейтесь нормальной громкости, поворачивая ручку регулятора усиления
	Засорился канал ушного вкладыша.	Прочистите канал ушного вкладыша .
	Разрядился элемент питания.	Замените элемент питания. . Использованный элемент питания выбросите.
Слышимость постепенно уменьшается.	Разряжен элемент питания.	Замените элемент питания. Использованный элемент питания выбросите.
При пользовании аппаратом слышен "свист".	Ушной вкладыш неплотно вставлен в слуховой проход.	Плотно вставьте ушной вкладыш в слуховой проход. При необходимости обратитесь на пункт слухового протезирования для подбора или изготовления индивидуального вкладыша.

Подпись и дата

Инд № д

Взам инд №

Подпись и дата

Инд № подл

8 Свидетельство о приемке

Аппарат слуховой электронный цифровой триммерный,
программируемый воздушного звукопроводения заушного типа
"ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+"

(наименование изделия)

(обозначение)

заводской номер _____

соответствует ТУ 9444-024-93307926-2012
(номер стандарта или технических условий)

и признан годным для эксплуатации

Дата изготовления _____

М.П.

(личные подписи (оттиски личных клейм)
должностных лиц предприятия, ответственных
за приемку изделия)

Подпись и дата	
Инд. №	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

236-00-00 ПС

Лист

17

9 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие выпускаемого аппарата требованиям технических условий ТУ 9444-024-93307926-2012 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня продажи через розничную торговую сеть, а для внерыночного потребления – со дня получения потребителем.

Продолжительность установленных гарантийных сроков не распространяется на источники питания.

При отказе или обнаружении неисправности аппарата в период гарантийных обязательств, потребителем должен быть предъявлен, (оформленный торгующей организацией) гарантийный талон предприятию, осуществляющему гарантийное обслуживание изделий медицинской техники или заводу-изготовителю.

Гарантийные обязательства не распространяются на слуховые аппараты:

- если нарушен внешний вид пломбировки (аппарат подвергшийся самостоятельной разборке) или установлен факт неправильной эксплуатации аппарата;

- с механическими повреждениями (трещины, сколы, царапины), а также с повреждениями носящие следы химического или термического воздействия;

- с поломками от попадания в аппарат посторонних предметов или вследствие использования не предусмотренных настоящим паспортом источников питания.

В этих случаях ремонт производится за счет потребителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на источники питания, звукопроводы и ушные вкладыши.

Подпись и дата	
Ид. №	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Ид. № подл.	

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	Лист	Дата

236-00-00 ПС

Лист

18

Приложение А

ООО "КБ Аудиомаг" Москва, 127238, Дмитровское шоссе, д.81.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники Аппарат слуховой электронный цифровой
наименование и тип изделия

триммерный, программируемый воздушного звукопроводения заушного типа

"ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+"

ТУ 9444-024-93307926-2012

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска

заполняется заводом-изготовителем

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения
владельца

Подпись и дата

Инд. № до

Взам инд. №

Подпись и дата

Инд. № подл.

Продолжение приложения А

ООО "КБ Аудиомаг" Москва, 127238, Дмитровское шоссе, д.81

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники Аппарат слуховой электронный цифровой
наименование и тип изделия

триммерный, программируемый воздушного звукопроведения заушного типа

"ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+"

ТУ 9444-024-93307926-2012

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____
заполняется заводом-изготовителем

Приобретен _____
дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию _____
дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

_____ города _____

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения
владельца

Подпись и дата	
Инд. № доз.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	ИСЗ	Дата

236-00-00 ПС

Лист
20

Продолжение приложения А

ООО "КБ Аудиомаг" Москва, 127238, Дмитровское шоссе, д.81

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники Аппарат слуховой электронный цифровой
наименование и тип изделия

триммерный, программируемый воздушного звукопроводения заушного типа

"ЭЛЬФ-2Т", "ЭЛЬФ-3Т", "ЭЛЬФ-2Т+", "ЭЛЬФ-3Т+"

ТУ 9444-024-93307926-2012

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска

заполняется заводом-изготовителем

Приобретен

дата, подпись и штамп торгующей организации

Введен в эксплуатацию

дата, подпись

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием

города

Подпись и печать
руководителя ремонтного
предприятия

Подпись и печать
руководителя учреждения
владельца

Подпись и дата	
Инд. № док.	
Взам. инд. №	
Подпись и дата	
Инд. № подл.	

000 ЦИРМИ	INFO@CIRMI.RU	WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU	ИСЗ	Дата	

236-00-00 ПС


Лист

21

Лист регистрации изменений

[illegible]

№№ № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дгу	Подпись и дата

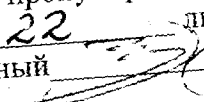Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 22 листов
Генеральный  Иванов И.Г.
директор
м.п.