

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «КЛЮВЕРМЕД»
Засеева О.В.
«27» ноября 2020 г.



**ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ
МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ**


**Рукав EZ Fan для установки силиконовых гелевых имплантатов при
операциях по реконструкции груди, стерильный**

Производство компании:

Kims Med CO., LTD. (Кимс Мед КО., ЛТД.), #112, #214 Bio Material and
Component Service Center, Gwangju Techno Park, 249, Chuam-ro, Buk-gu,
Gwanju, Korea, Республика Корея

**Рукав EZ Fan для установки силиконовых гелевых имплантатов при операциях по
реконструкции груди, стерильный**

в стерильной упаковке

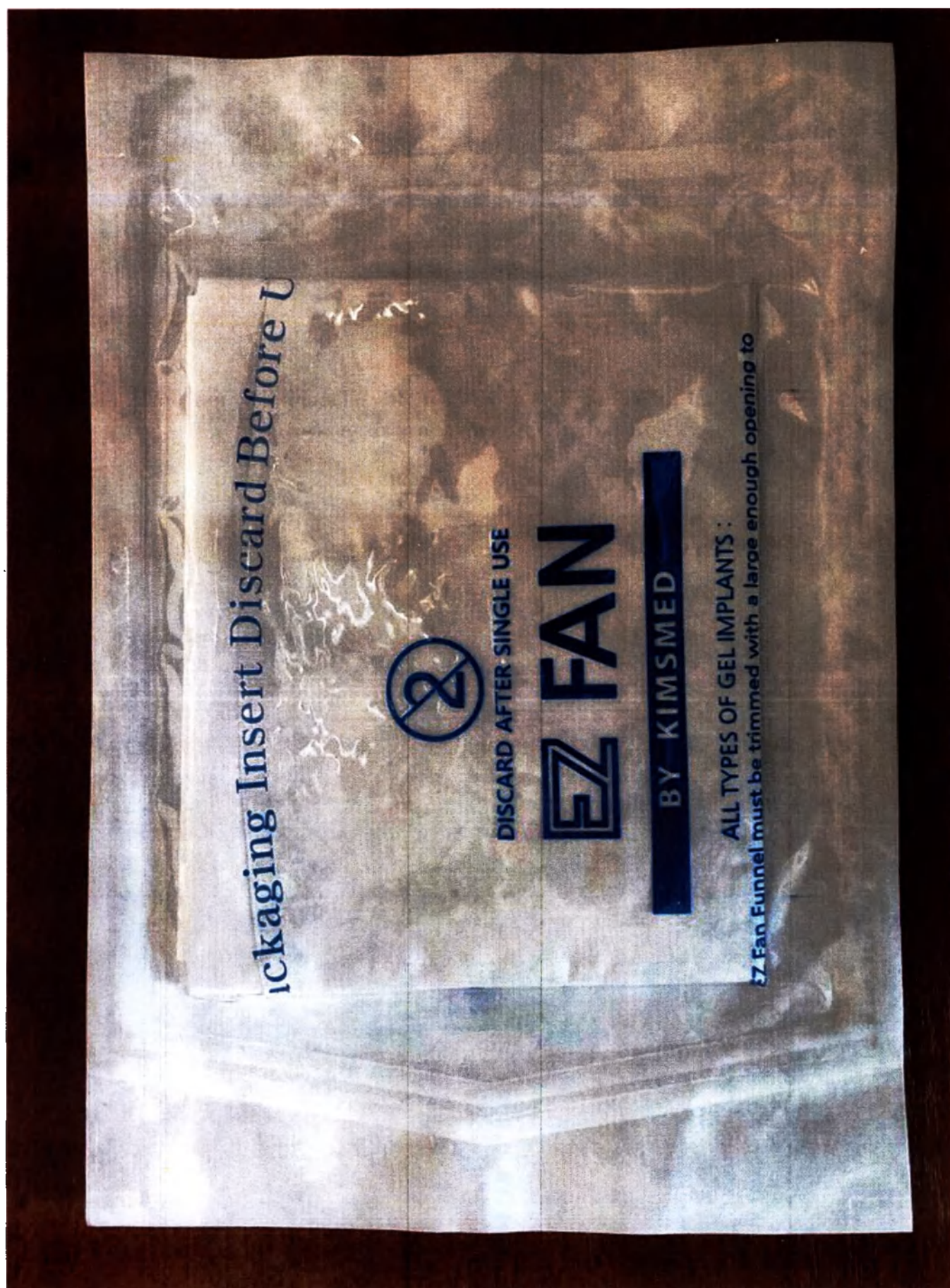

Рукав EZ Fan для установки силиконовых гелевых имплантатов при операциях по
реконструкции груди, стерильный

без упаковки



DISCARD AFTER SINGLE USE

EZ FAN

BY KIMSMED

ALL TYPES OF GEL IMPLANTS :

The EZ Fan Funnel must be trimmed with a large enough opening to allow the implant to pass through the funnel with gentle manipulation.

BREAST IMPLANTS :

The indicated range in cc's is recommended for smooth, round implants and is a suggestion only.

Variables such as shape, cohesiveness, texture and projection need to be considered and trim location increased 1cm-2cm when using these implants.

Information to trim the EZ Fan funnel

Smooth Round	Textured Round
Moderate&Moderate Plus : as shown	Moderate&Moderate Plus : +1.5cm larger
High Profile: +0.5cm larger	High Profile: +2cm larger
Ultra High Profile: +1cm larger	Ultra High Profile: +2cm larger
Anatomical / Shaped Implant +2cm larger	



Model Name: REF_OIKR

F: Implant Volume in CC's

8.0 cm	
7.5 cm	
7.0 cm	
6.5 cm	
6.0 cm	$550cc \leq F$
5.5 cm	$450cc \leq F < 550cc$
5.0 cm	$315cc \leq F < 450cc$

Пронумеровано, прошнуровано

и скреплено печатью 3 листов (

Генеральный директор Засеева О.В.



УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «КЛОВЕРМЕД»

О.В.Засеева



2021 г.

Макет маркировки
упаковки с информацией на русском языке

Рукав EZ Fan для установки силиконовых гелевых имплантатов при операциях по реконструкции груди, стерильный

Количество в упаковке:

Материал: Поливинилхлорид (65%) / Диоктилтерефталат (35%)

Номер партии см. на упаковке

СТЕРИЛЬНО (этиленоксид). Не токсично

Для однократного применения. Повторное использование или повторная стерилизация категорически запрещены

Срок годности: см на упаковке

Производитель/ место производства: Kims Med Co., Ltd. (Кимс Мед КО., ЛТД.)

#112, #214 Bio Material and Component Service Center, Gwangju Techno Park, 249, Chuam-ro, Buk-gu, Gwangju, Korea, Республика Корея

Условия хранения: при температуре от 1°C до 25°C, в сухом месте. Использовать при комнатной температуре: 15°C – 25°C

Уполномоченный представитель на территории РФ: ООО «КЛОВЕРМЕД», 121099, г. Москва, ул.

Новый Арбат, д. 34 стр. 1, пом. I, эт. 5, ком.1.

Тел. +7 499 918 17 72; www.clovermed.ru

Номер и дата Рег. Удостоверения

(будут нанесены после завершения процесса регистрации)