

Руководство по эксплуатации

Шкаф медицинский металлический по ТУ 32.50.30-011-14513602-2020

Содержание

1. Назначение медицинского изделия	3
1.1. Наименование медицинского изделия.....	3
1.2. Назначение медицинского изделия.....	3
1.3. Показания	3
1.4. Противопоказания.....	3
1.5. Условия эксплуатации.....	3
2. Сведения о производителе медицинского изделия.....	3
2.1. Наименование.....	3
2.2. Адрес места нахождения.....	3
2.3. Адрес места производства медицинского изделия.....	3
3. Классификация медицинского изделия	3
4. Техническое описание медицинского изделия	4
4.1. Общая фотография МИ	4
4.2. Варианты исполнения и комплектность.....	25
4.3. Материалы, из которых изготовлено медицинское изделие или его основные части.....	29
5. Основные параметры и характеристики медицинского изделия	34
6. Сведения о маркировке.....	39
7. Сведения об упаковке	39
8. Условия транспортирования и хранения	39
9. Срок годности.....	40
10. Требования безопасности и меры предосторожности	40
11. Порядок утилизации и уничтожения.....	40
12. Методы и средства дезинфекции и очистки	40
13. Методы и условия стерилизации, сроки сохранения стерильности.....	40
14. Перечень национальных стандартов, которым соответствует медицинское изделие.....	40
15. Требования к монтажу и установке	40
16. Сведения о техническом обслуживании	40
17. Гарантийные обязательства.....	40
18. Рекламация	41

1. Назначение медицинского изделия

1.1. Наименование медицинского изделия

Шкаф медицинский металлический по ТУ 32.50.30-011-14513602-2020

1.2. Назначение медицинского изделия

Установка в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений, медицинских лабораториях с целью выделения места для хранения лекарств, медицинских инструментов, медицинской аппаратуры при проведении медицинской реабилитации заболеваний и проведении медицинских исследований.

1.3. Показания

установка в кабинетах и палатах лечебно-профилактических учреждений, медицинских лабораторий с целью выделения места для хранения лекарств, медицинских инструментов, медицинской аппаратуры при проведении медицинской реабилитации заболеваний и проведении медицинских исследований.

1.4. Противопоказания

отсутствуют, при использовании в соответствии с эксплуатационной документацией.

1.5. Условия эксплуатации

Шкафы следует эксплуатировать в помещениях при температуре окружающего воздуха от 1°C до 40°C и относительной влажностью воздуха не более 60 %

Условия применения - лечебно-профилактические учреждения, научно-исследовательские, медицинские лаборатории.

2. Сведения о производителе медицинского изделия

2.1. Наименование

ООО «ТК ПРОФИ-М»

2.2. Адрес места нахождения

624071, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, ул. Вторая, д. 1

2.3. Адрес места производства медицинского изделия

624071, Свердловская обл.,
г. Среднеуральск, ул. Вторая, д. 1

3. Классификация медицинского изделия

Класс в зависимости от потенциального риска применения медицинского изделия	1
---	---


4. Техническое описание медицинского изделия

4.1. Чертеж общего вида изделия


Конструкция и внешний вид шкафа

Пример шкафа


LASER-PROF МД 1 1650-SG

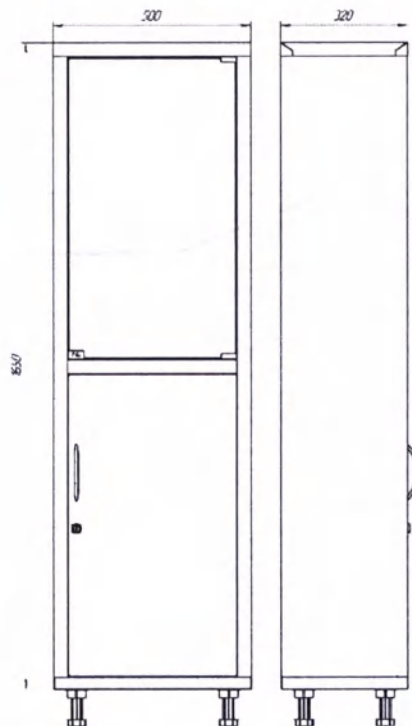

LASER-PROF МД 1 1650-SS

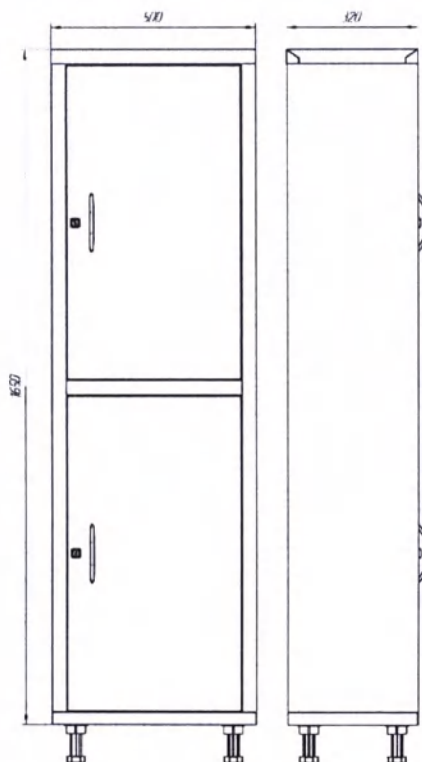

LASER-PROF МД 1 1650-T

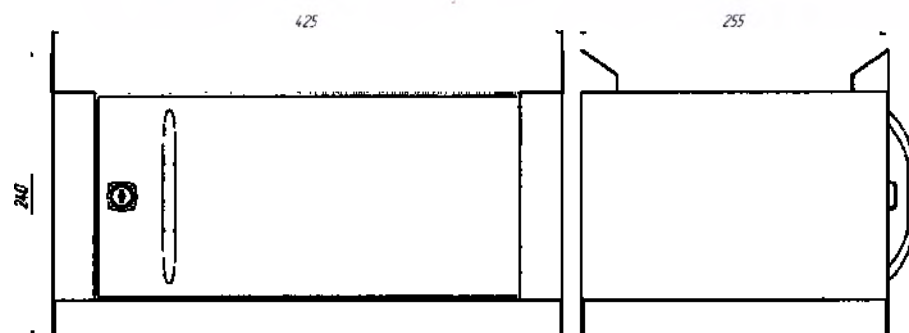


LASER-PROF МД 1 1657-SG




LASER-PROF МД 1 1657-SS



LASER-PROF МД 1 1760 R

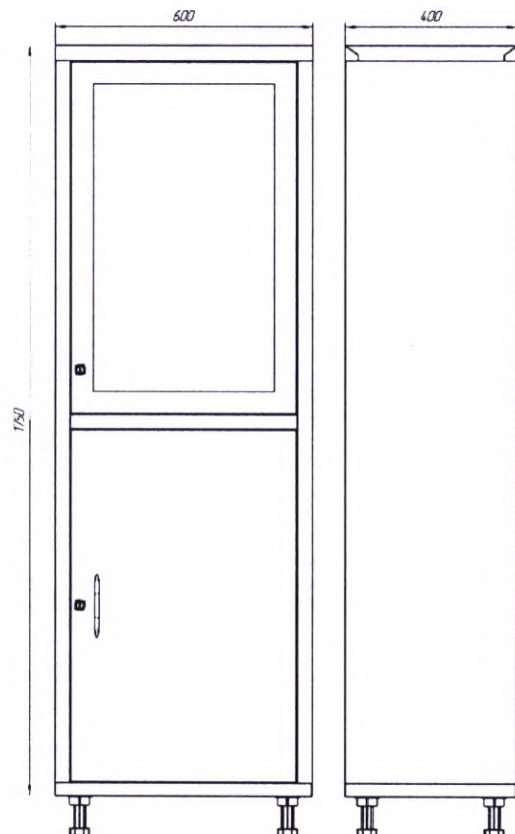


LASER-PROF МД 1 1760 R-1

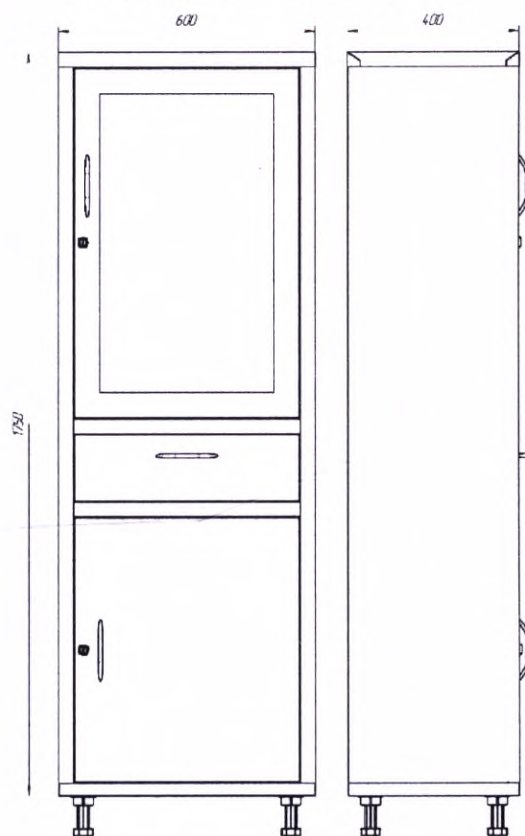


LASER-PROF МД 1 1760-SG



LASER-PROF МД 1 1760-SS

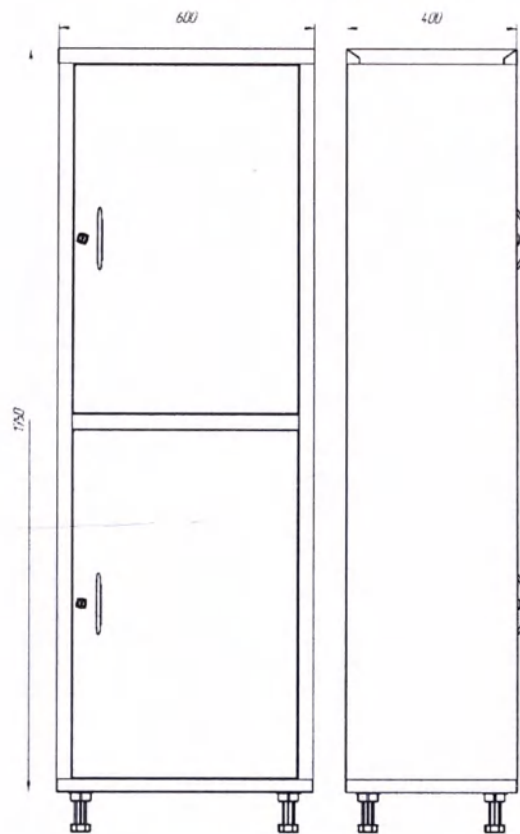


LASER-PROF МД 2 1670-SG

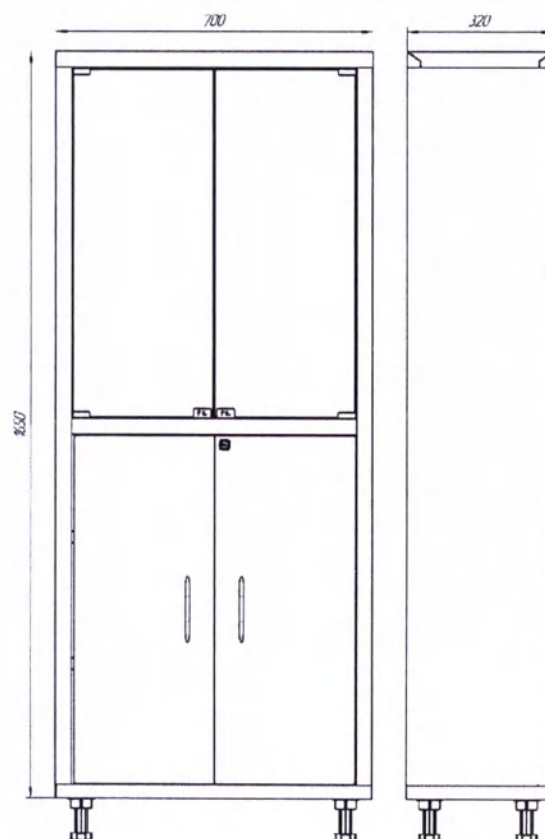

LASER-PROF МД 2 1670-SS




LASER-PROF МД 2 1670-T

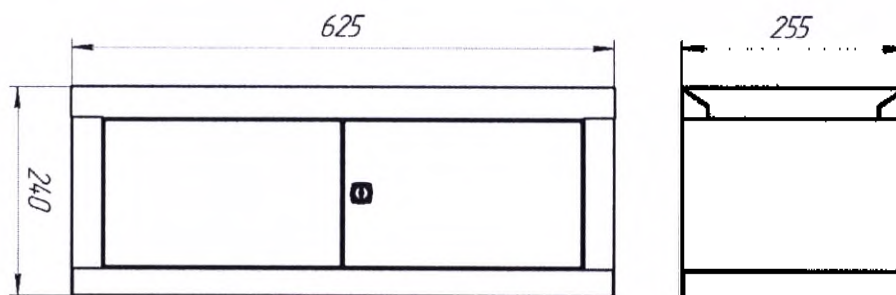


LASER-PROF МД 2 1780 R



LASER-PROF МД 2 1780 R-1

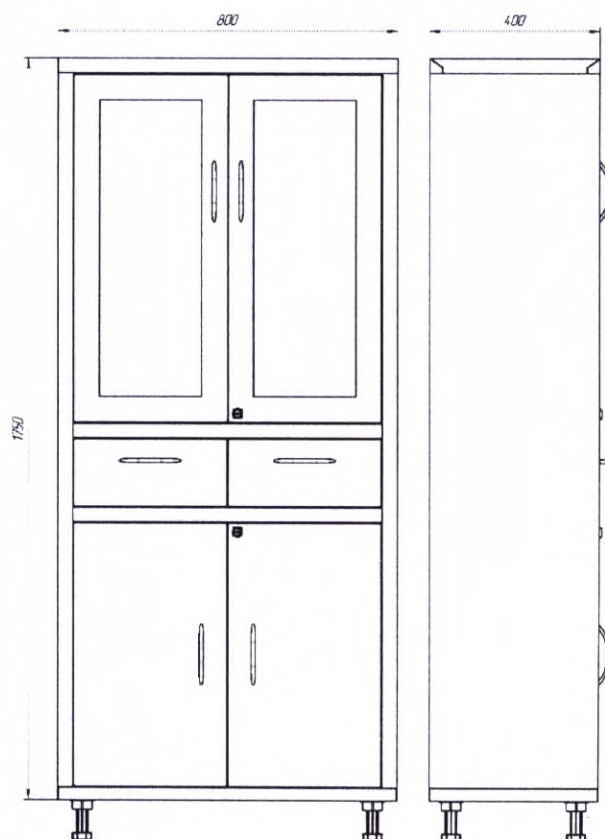

LASER-PROF МД 2 1780 R-5

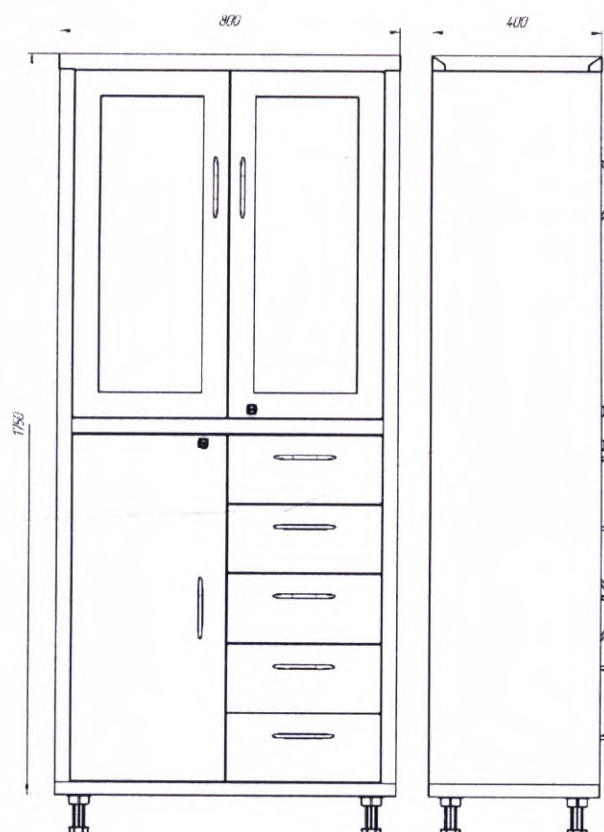

LASER-PROF МД 2 1780-SG



LASER-PROF МД 2 1780-SS



LASER-PROF МД 1 ПИМ-SS (11-50)




LASER-PROF МД 2 ШМ-SS (21-50)




LASER-PROF МД LS(LE)-21




LASER-PROF МД LS(LE)-21-60 U

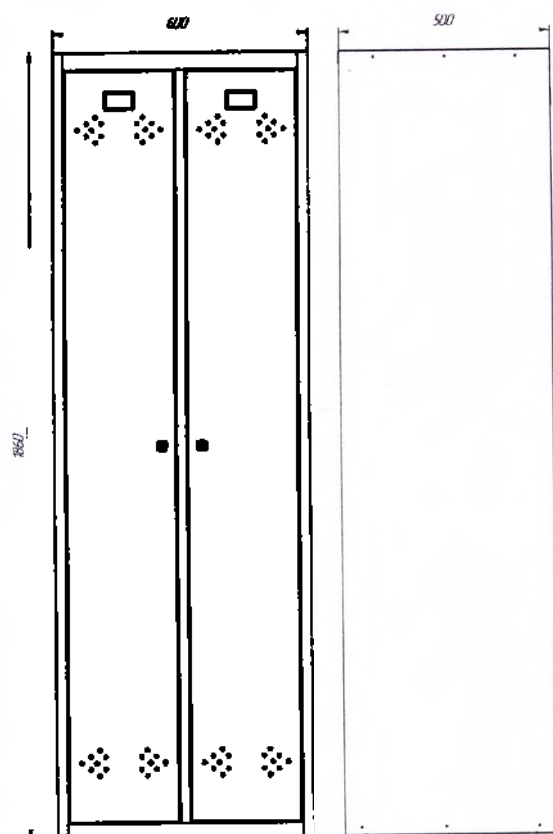


LASER-PROF МД LS(LE)-21-80 U

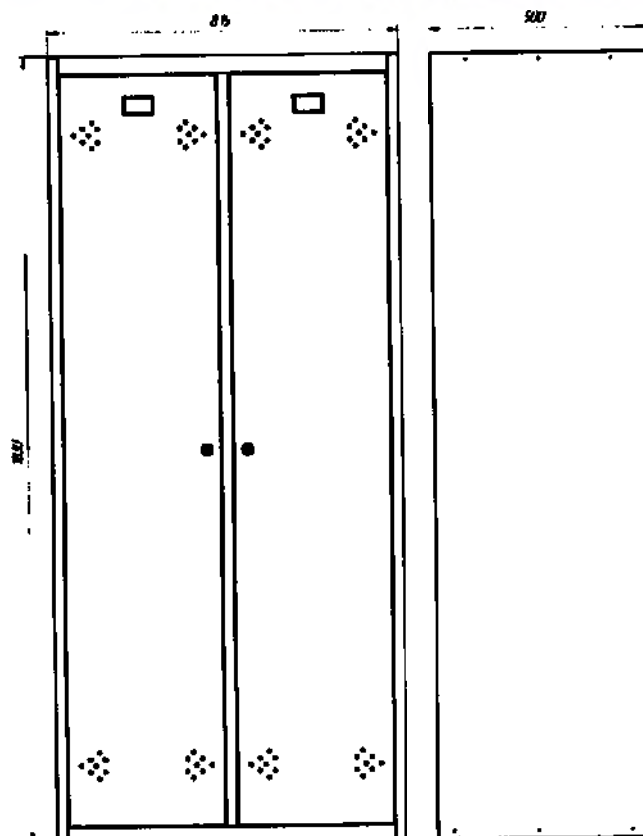


LASER-PROF МД LS(LE)-21-80

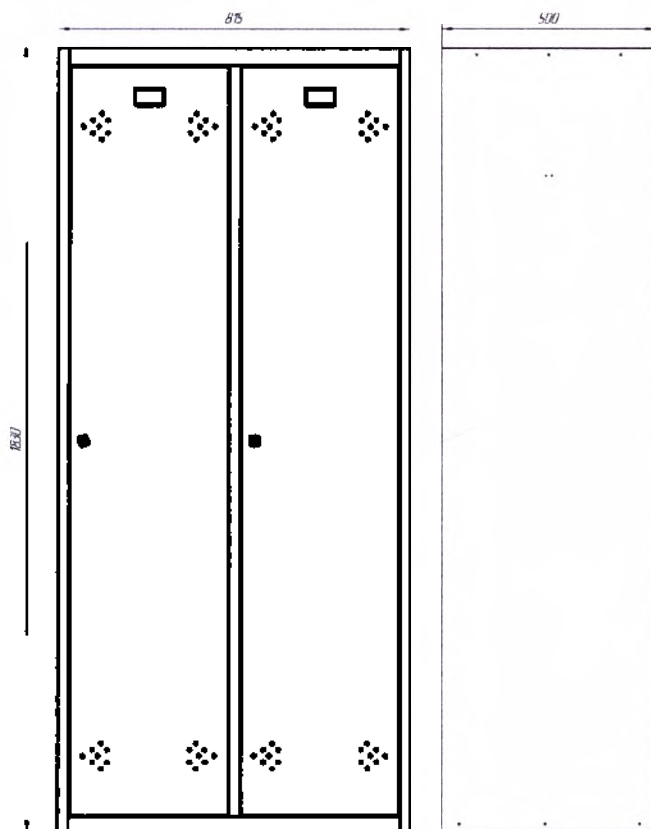

LASER-PROF МД LS(LE)-31

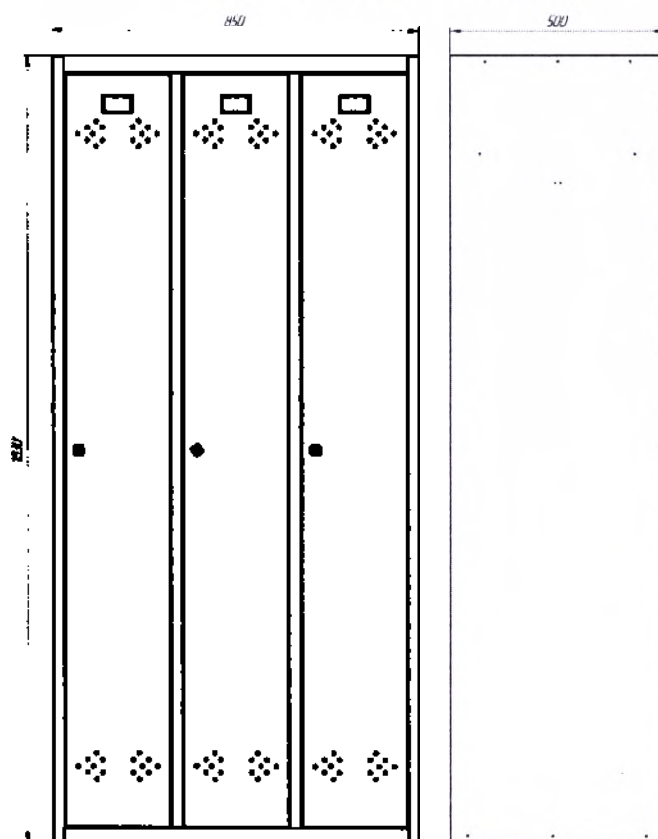

LASER-PROF МД LS(LE)-41

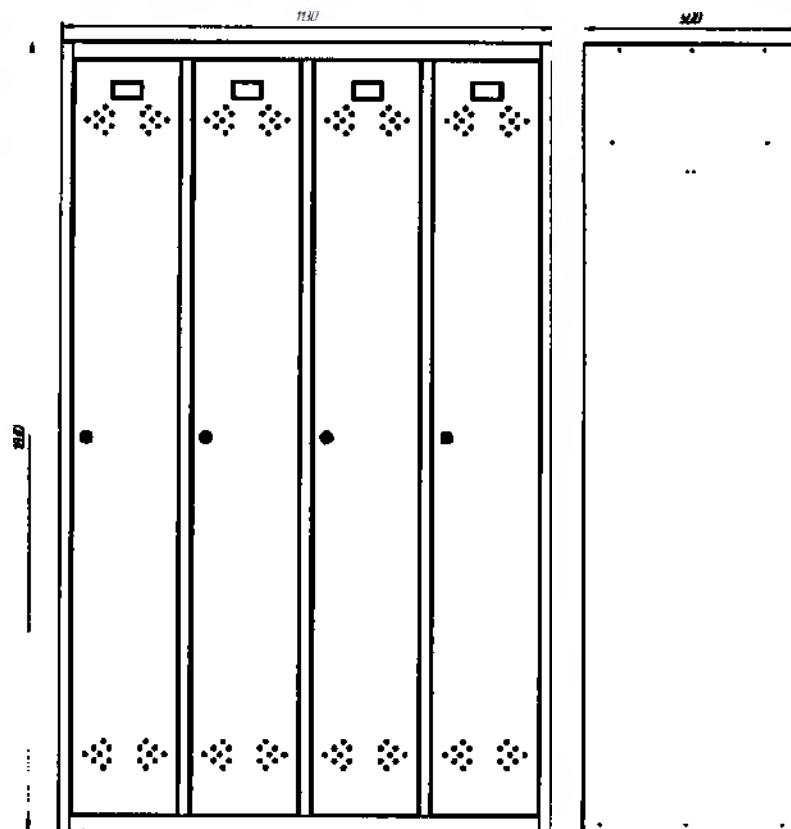

LASER-PROF МД СВ-14




LASER-PROF МД AM 1891




LASER-PROF МД AM 2091



LASER-PROF МД AM-1845

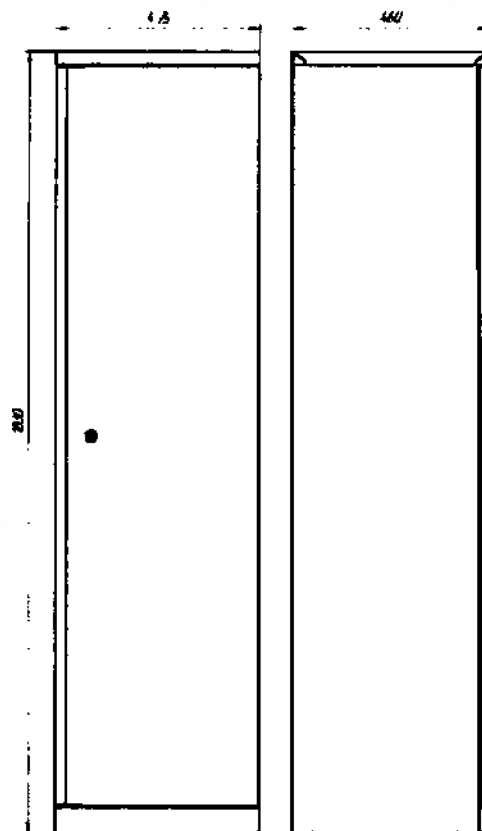


LASER-PROF МД AM-1845-4

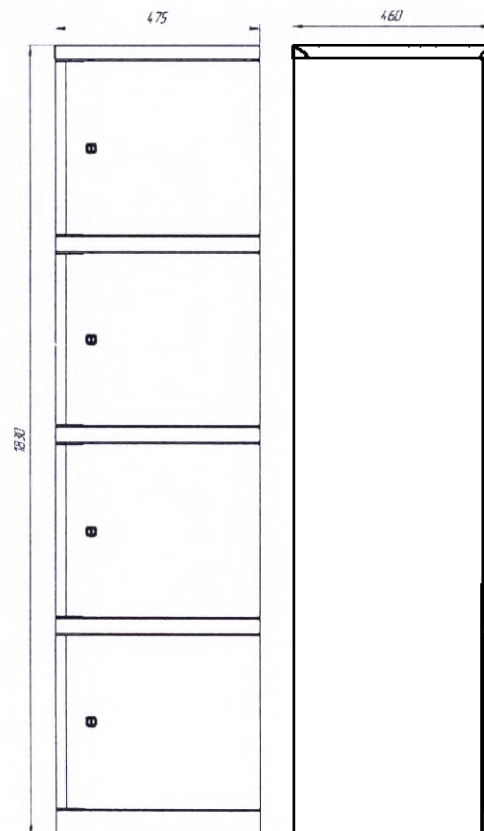


LASER-PROF МД М-18




LASER-PROF МД СВ-12

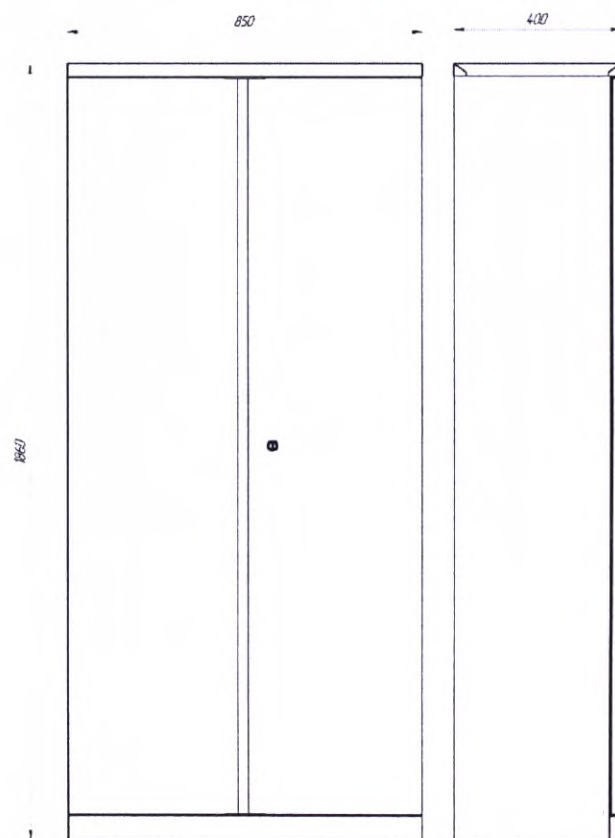


LASER-PROF AMD-39

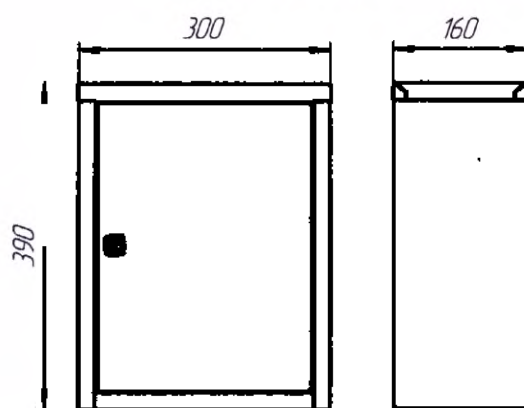


LASER-PROF AMD-39G

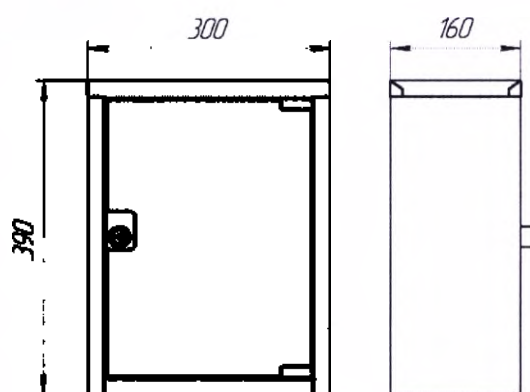


LASER-PROF AMD-40

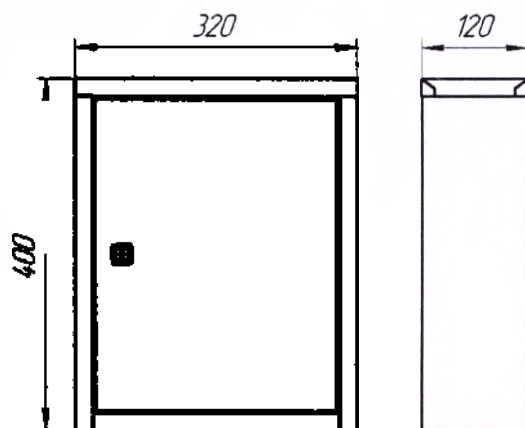


LASER-PROF МД А 42

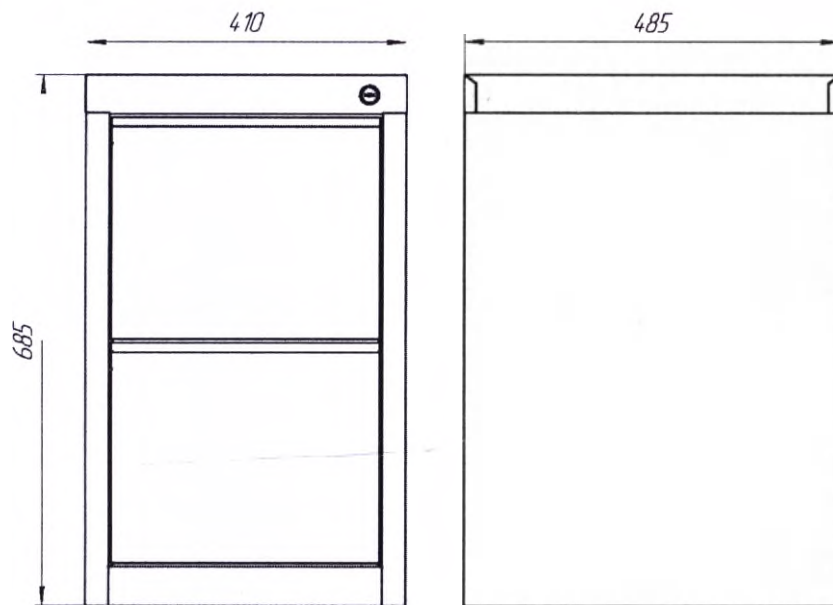


LASER-PROF МД А 43

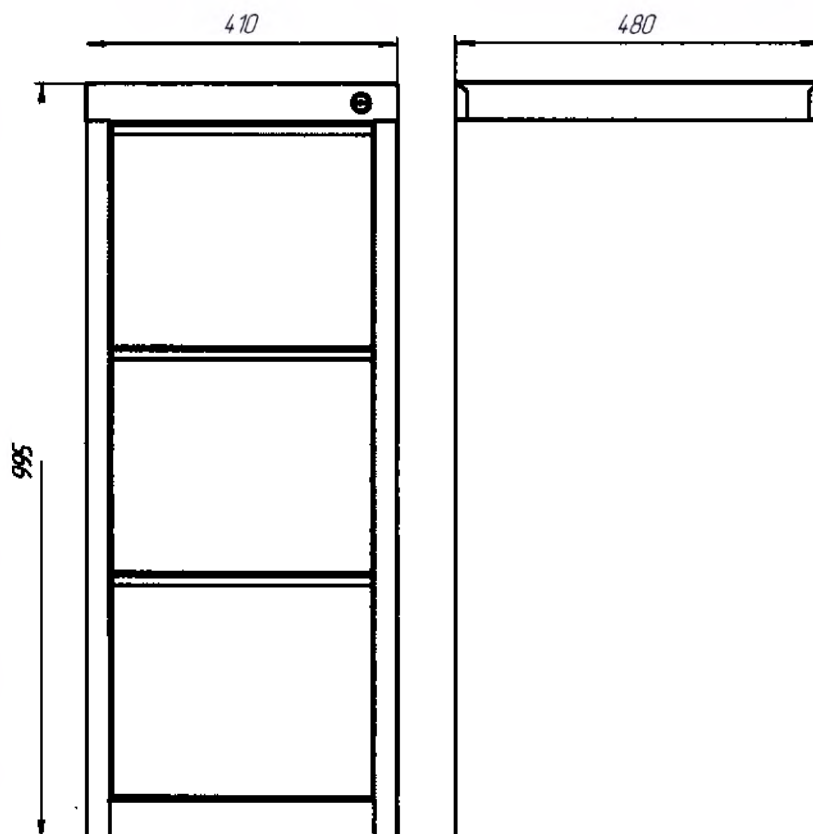


LASER-PROF МД А 44

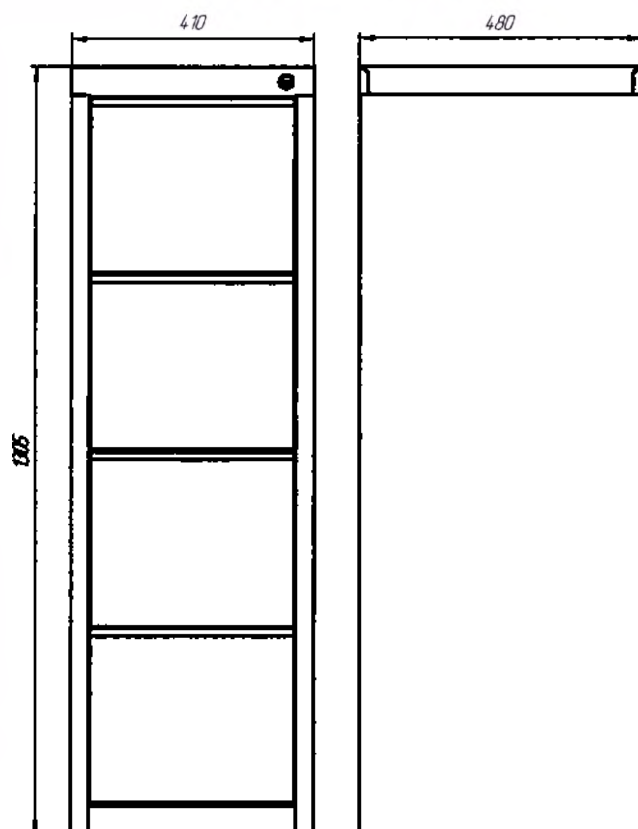


LASER-PROF МД AFC-04

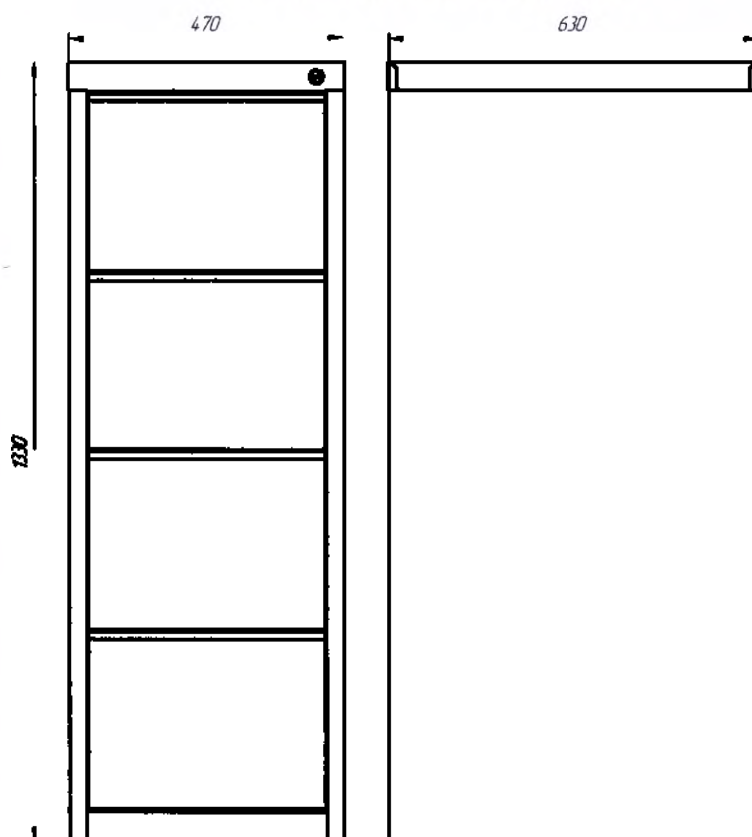


LASER-PROF МД AFC-05

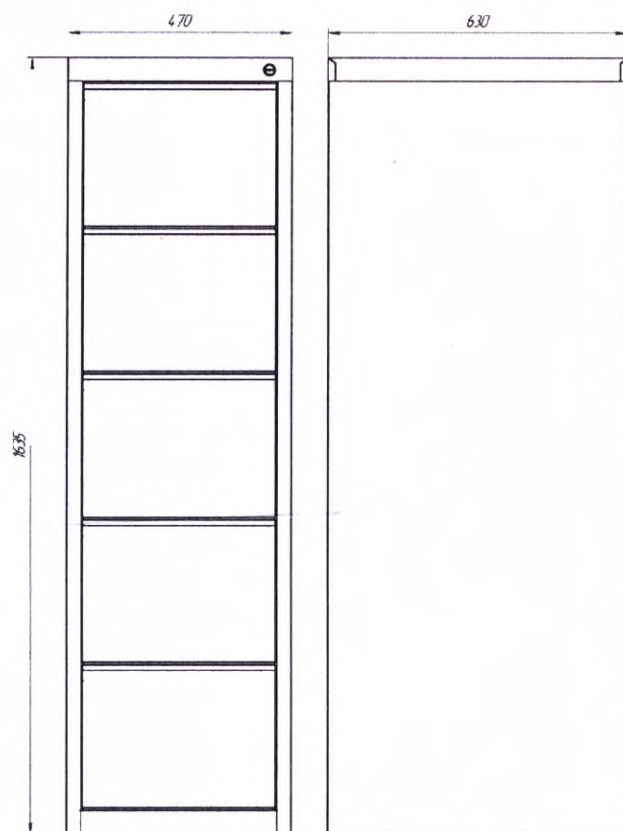


LASER-PROF МД AFC-06

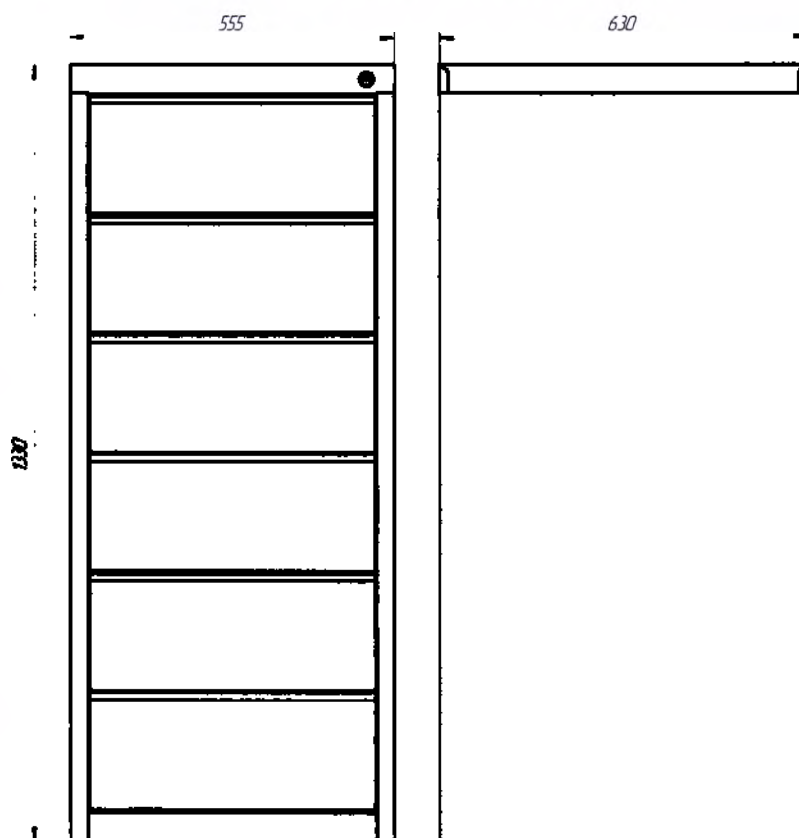

LASER-PROF МД AFC-07

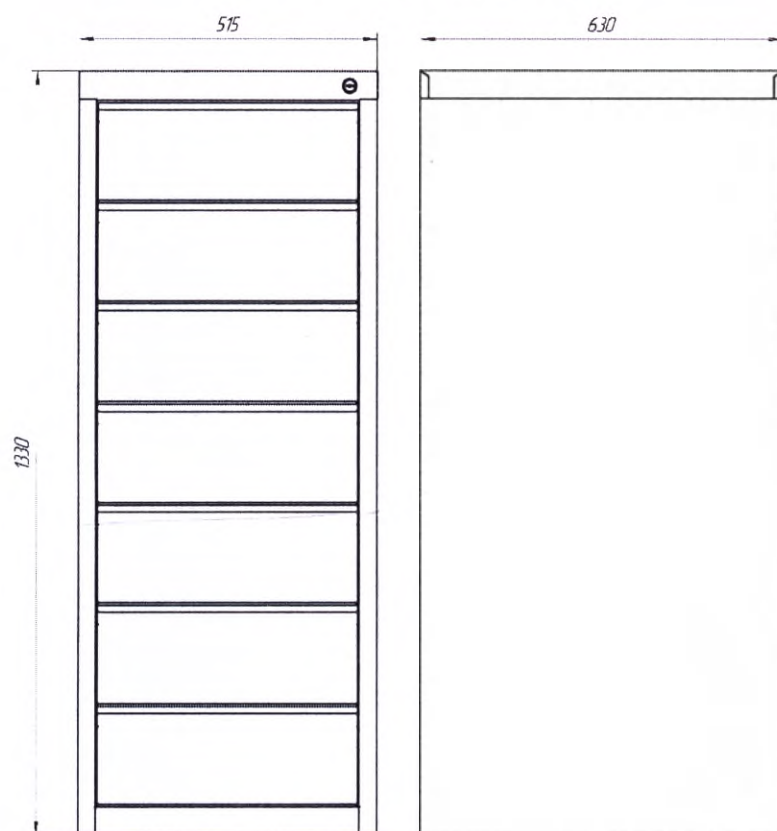

LASER-PROF МД AFC-09C

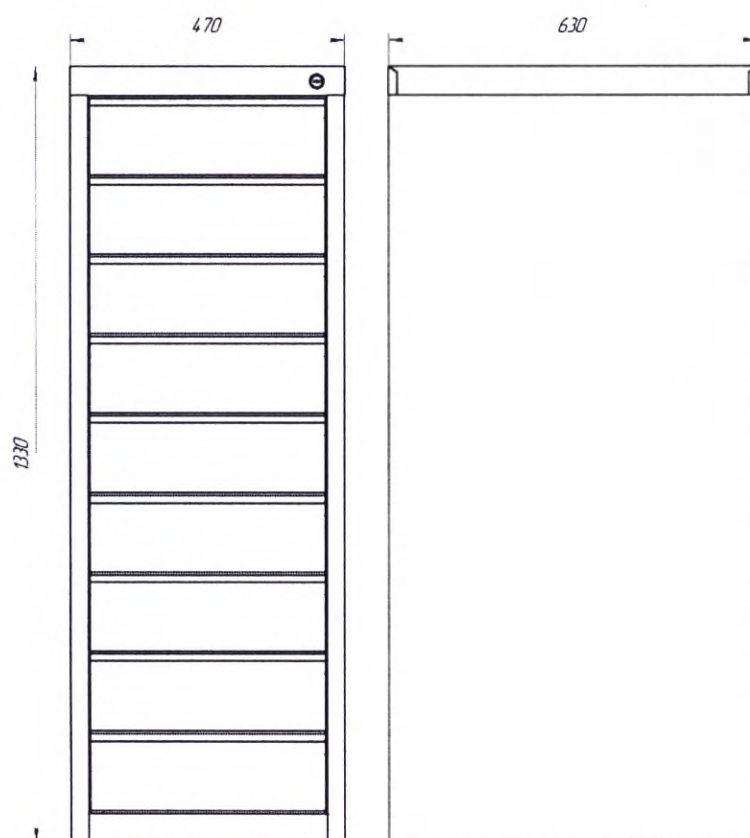

4.2. *Варианты исполнения и комплектность медицинского изделия*

Каф медицинский металлический по ТУ 32.50.30-011-14513602-2020, варианты исполнения:

- [illegible]

- [illegible]

не более 2шт. (при необходимости), полка шкафа стальная - не более 3шт.(при необходимости), замок шкафа – не более 2шт.(при необходимости), руководство по эксплуатации.

- [illegible]

эксплуатации.

40. LASER-PROF МД AFC-05, в составе: корпус шкафа – 1 шт., ящик шкафа – не более 5 шт.(при необходимости), замок шкафа – не более 1 шт.(при необходимости), руководство по эксплуатации.
41. LASER-PROF МД AFC-06, в составе: корпус шкафа – 1 шт., ящик шкафа – не более 6 шт.(при необходимости), замок шкафа – не более 1 шт.(при необходимости), руководство по эксплуатации.
42. LASER-PROF МД AFC-07, в составе: корпус шкафа – 1 шт., ящик шкафа – не более 7 шт.(при необходимости), замок шкафа – не более 1 шт.(при необходимости), руководство по эксплуатации.
43. LASER-PROF МД AFC-09С, в составе: корпус шкафа – 1 шт., ящик шкафа – не более 9 шт.(при необходимости), замок шкафа – не более 1 шт.(при необходимости), руководство по эксплуатации.

4.3. *Материалы, из которых изготовлено медицинское изделие или его основные части*

п/п	Наименование	Компоненты	Материал/марка материала	Вид контакта с организмом человека	Наименование поставщика или производителя
1	LASER-PROF МД 1 1650/SS LASER-PROF МД 1 1657/SS LASER-PROF МД 1 1760/SS LASER-PROF МД 2 1670/SS LASER-PROF МД 2 1780/SS LASER-PROF МД 1 1650 T LASER-PROF МД 2 1670 T LASER-PROF AMD-39 LASER-PROF AMD-40	Корпус шкафа	Сталь 08пс-6 ; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMittal Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
		Дверцы шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMittal Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
		Полки шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMittal Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
		Ручка	Алюминий: АД31	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Поставщик - ООО «БОЯРД» Екатеринбург, производитель - "SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD", Китай
		Почтовый замок	Металлический сплав ЦАМ4-1	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Поставщик - ООО «Торговый дом ЕВРОЛОК» Москва, производитель - "SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD",

					Китай
2	LASER-PROF МД 1 1650/SG LASER-PROF МД 1 1657/SG LASER-PROF МД 1 1760/SG LASER-PROF МД 2 1670/SG LASER-PROF МД 2 1780/SG LASER-PROF МД 1 1760 R LASER-PROF МД 1 1760 R-1 LASER-PROF МД 2 1780 R LASER-PROF МД 2 1780 R-1 LASER-PROF МД 2 1780 R-5 LASER-PROF AMD-39G	Корпус шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMitall Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
		Дверцы шкафа	Стекло марки М1 прозрачное 4мм, 5мм, 6мм	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель - АГС, Россия, Московская область, Клинский район, село Спас-Заулок
		Дверцы шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMitall Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
		Полки шкафа	Стекло марки М1 прозрачное 4мм, 5мм, 6мм	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель - АГС, Россия, Московская область, Клинский район, село Спас-Заулок
		Полки шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMitall Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
		Петли для стек- ла HG001 толщиной до 6мм.	Сталь 08пс-6; покрытие - цинк	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Поставщик ООО «БОЯРД» Екатеринбург производитель - "SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD",

					Китай
		Ручка	Алюминий: АДЗ1	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Поставщик - ООО «БОЯРД» Екатеринбург, производитель - "SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD", Китай
		Ящик шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMittal Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
		Почтовый замок	Металлический сплав ЦАМ4-1	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Поставщик - ООО «Торговый дом ЕВРОЛОК» Москва, производитель - "SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD", Китай
3	LASER-PROF МД 1 ШМ-SS (11-50) LASER-PROF МД 2 ШМ-SS (21-50) LASER-PROF МД LS(LE)-21 LASER-PROF МД LS(LE)-31 LASER-PROF МД LS(LE)-41 LASER-PROF МД LS(LE)-21-60 U LASER-PROF МД LS(LE)-21-80 LASER-PROF МД LS(LE)-21-80 U	Корпус шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMittal Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
		Дверцы шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMittal Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г.

				Дзержинск, ул. Строителей, 6
	Полки шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П-ПЛ-1321	Кратковременный с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMittal Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
	Ручка	Алюминий: АДЗ1	Кратковременный с неповрежденной кожей	Поставщик - ООО «БОЯРД», производитель - "SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD", Китай
	Перекладина	Труба полипропиленовая PN10	Кратковременный с неповрежденной кожей	Поставщик «ПЛАСТЭКО» 620000, Свердловская область, Екатеринбург, ул. Щорса 56
	Почтовый замок	Металлический сплав ЦАМ4-1	Кратковременный с неповрежденной кожей	Поставщик - ООО «Торговый дом ЕВРОЛОК» Москва, производитель - "SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD", Китай
	Крючок	Сталь 08пс оцинкованная	Кратковременный с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMittal Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец
4	LASER-PROF МД СВ-12 LASER-PROF МД СВ-14 LASER-PROF МД М-18 LASER-PROF МД АМ-1845 LASER-PROF МД АМ-1845/4 LASER-PROF МД АМ 1891 LASER-PROF МД АМ-2091	Корпус шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П-ПЛ-1321	Производитель металл: ArcelorMittal Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МАВ», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
	Дверцы шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П-	Кратковременный с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMittal Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец

			ПЛ-1321		Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МAB», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
	Полки шкафа		Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMitall Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МAB», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
	Почтовый замок		Металлический сплав ЦАМ4-1	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Поставщик - ООО «Торговый дом ЕВРОЛОК» Москва, производитель - "SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD", Китай
	Ригельный почтовый замок (ручка замка)		АБС-пластик ER-400, Металлический сплав ЦАМ4-1	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Поставщик - ООО «Торговый дом ЕВРОЛОК» Москва, производитель - "SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD", Китай
5	LASER-PROF МД А 42 LASER-PROF МД А 43 LASER-PROF МД А 44 LASER-PROF МД AFC-04 LASER-PROF МД AFC-05 LASER-PROF МД AFC-06 LASER-PROF МД AFC-07 LASER-PROF МД AFC-09C	Корпус шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMitall Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МAB», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
		Ящики шкафа	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMitall Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска:

				Частное производственное унитарное предприятие «МAB», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
	Разделители ящика, компрессионн ые пластины	Сталь 08пс-6; покрытие - краска порошковая П- ПЛ-1321	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Производитель металл: ArcelorMittal Казахстан, либо ПАО "СеверСталь" г. Череповец Производитель краска: Частное производственное унитарное предприятие «МAB», Республика Беларусь, Минская область, 222720, г. Дзержинск, ул. Строителей, 6
	Почтовый замок	Металлический сплав ЦАМ4-1	Кратковременны й с неповрежденной кожей	Поставщик - ООО «Торговый дом ЕВРОЛОК», производе ль - "SHANGHAI MEATON TRADE CO., LTD", Китай

Основные параметры и характеристики медицинского изделия

Основные размеры и масса шкафа

Наименование	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм	Масса, кг
LASER-PROF МД 1 1650/SS	500	320	1650	24
LASER-PROF МД 1 1650/SG	500	320	1650	27
LASER-PROF МД 1 1657/SS	570	320	1650	26
LASER-PROF МД 1 1657/SG	570	320	1650	29
LASER-PROF МД 1 1760/SS	600	400	1750	31
LASER-PROF МД 1 1760/SG	600	400	1750	35
LASER-PROF МД 1 1760 R	600	400	1750	32
LASER-PROF МД 1 1760 R-1	600	400	1750	37
LASER-PROF МД 1 1650 T	425	255	240	4
LASER-PROF МД 2 1670/SS	700	320	1650	30
LASER-PROF МД 2 1670/SG	700	320	1650	34
LASER-PROF МД 2 1780/SS	800	400	1700	38

LASER-PROF МД 2 1780/SG	800	400	1700	47
LASER-PROF МД 2 1780 R	800	400	1750	40
LASER-PROF МД 2 1780 R-1	800	400	1750	46
LASER-PROF МД 2 1780 R-5	800	400	1750	51
LASER-PROF МД 2 1670 T	630	250	240	5
LASER-PROF МД 1 ИМ-SS (11-50)	500	500	1920	31
LASER-PROF МД 2 ИМ-SS (21-50)	575	500	1920	34
LASER-PROF МД LS(LE)-21	575	500	1830	32
LASER-PROF МД LS(LE)-31	850	500	1830	45
LASER-PROF МД LS(LE)-41	1130	500	1830	58
LASER-PROF МД LS(LE)-21-60 U	600	500	1860	37
LASER-PROF МД LS(LE)-21-80	815	500	1830	39
LASER-PROF МД LS(LE)-21-80 U	815	500	1830	42
LASER-PROF МД CB-12	850	400	1860	41
LASER-PROF МД CB-14	850	500	1860	46
LASER-PROF МД M-18	915	370	1830	42
LASER-PROF МД AM-1845	470	460	1830	30
LASER-PROF МД AM-1845/4	470	460	1830	28
LASER-PROF МД AM 1891	915	460	1830	46
LASER-PROF МД AM-2091	915	460	1996	48
LASER-PROF AMD-39	300	160	390	3,2
LASER-PROF AMD-39G	300	160	390	3,5
LASER-PROF AMD-40	320	160	400	3
LASER-PROF МД А 42	440	485	685	24
LASER-PROF МД А 43	440	480	995	34
LASER-PROF МД А 44	440	480	1305	44
LASER-PROF МД AFC-04	495	630	1330	49
LASER-PROF МД AFC-05	495	630	1635	60
LASER-PROF МД AFC-06	555	630	1325	60
LASER-PROF МД AFC-07	515	630	1325	62
LASER-PROF МД AFC-09C	470	630	1325	64

Предельные отклонения высоты, ширины, глубины не должны превышать ± 4 мм. Отклонения массы шкафа составляет $\pm 10\%$.

Наименование	Ширина, мм	Количество полок, шт.	Габаритные размеры полок, мм	Шаг регулировки полок, мм	Наличие замков, шт.	Наличие ручек, шт.	Расположение ручек, мм (высота от дна шкафа)
LASER-PROF МД 1 1650/SS	500	4	500x280	45	2	2	415/1225
LASER-PROF МД 1 1650/SG	500	4	500x280	45	1	1	550
LASER-PROF МД 1 1657/SS	570	4	500x280	45	2	2	415/1225
LASER-PROF МД 1 1657/SG	570	4	570x280	45	1	1	415
LASER-PROF МД 1 1760/SS	600	4	600x360	45	2	2	440/1300
LASER-PROF МД 1 1760/SG	600	4	600x360	45	1	1	440
LASER-PROF МД 1 1760 R	600	4	600x360	45	2	1	440
LASER-PROF МД 1 1760 R-1	600	4	600x360	45	2	3	345/800/1435
LASER-PROF МД 1 1650 T	425	-	-	-	1	-	-
LASER-PROF МД 2 1670/SS	700	4	700x280	45	2	4	415/1225
LASER-PROF МД 2 1670/SG	700	4	700x280	45	1	2	415
LASER-PROF МД 2 1780/SS	800	4	800x360	45	2	4	440/1300
LASER-PROF МД 2 1780/SG	800	4	800x360	45	1	2	440
LASER-PROF МД 2 1780 R	800	4	800x360	45	2	4	440/1435
LASER-PROF МД	800	4	800x360	45	2	6	345/800/1435

2 1780 R-1							
ASER-PROF МД 2 1780 R-5	800	4	800x360	45	2	8	140/305/470/6 35/800
ASER-PROF МД 2 1670 T	630	-	-	-	1	-	-
ASER-PROF МД ИИМ-SS (11-50)	500	3	265x440	80	1	-	-
ASER-PROF МД ИИМ-SS (21-50)	575	2	295x460 275x465	-	2	-	-
ASER-PROF МД LS(LE)-21	575	2	275x465 295x460	-	2	-	-
ASER-PROF МД LS(LE)-31	850	3	295x460 275x465	-	3	-	-
ASER-PROF МД LS(LE)-41	1130	4	275x465 295x460	-	4	-	-
ASER-PROF МД LS(LE)-21-60 U	600	3	305x435	80	2	-	-
ASER-PROF МД LS(LE)-21-80	815	2	415x460 395x465	-	2	-	-
ASER-PROF МД LS(LE)-21-80 U	815	3	415x435	80	2	-	-
ASER-PROF МД CB-12	850	4	330x830	45	1	-	-
ASER-PROF МД CB-14	850	4	430x830	45	1	-	-
ASER-PROF МД M-18	915	4	300x890	45	1	-	-
ASER-PROF МД AM-1845	470	4	453x390	45	1	-	-
ASER-PROF МД AM-1845/4	470	-	-	-	4	-	-
ASER-PROF МД AM 1891	915	4	390x890	45	1	-	-
ASER-PROF МД AM-2091	915	4	390x890	45	1	-	-

LASER-PROF AMD-39	300	2	300x140 155x140	-	1	-	-
LASER-PROF AMD-39G	300	2	300x140 155x140	-	1	-	-
LASER-PROF AMD-40	320	2	175x100 320x100	-	1	-	-
LASER-PROF МД A 42	440	-	-	-	1	-	335/625
LASER-PROF МД A 43	440	-	-	-	1	-	302/640/ 935
LASER-PROF МД A 44	440	-	-	-	1	-	345/645/945 /1245
LASER-PROF МД AFC-04	495	-	-	-	1	-	350/655/965/ 1270
LASER-PROF МД AFC-05	495	-	-	-	1	-	350/655/965/ 1270/1575
LASER-PROF МД AFC-06	555	-	-	-	1	-	240/445/650/8 55/1060/1260
LASER-PROF МД AFC-07	515	-	-	-	1	-	215/390/565/7 40/915/1090/1 265
LASER-PROF МД AFC-09C	470	-	-	-	1	-	175/310/446/5 82/780/855/99 0/1125/1265

Предельные отклонения от установленных габаритных размеров отдельных элементов шкафа не должны превышать ± 5 мм.

Размеры в проемах на сторону не должны превышать:

4,0 мм - для дверей;

4,0 мм - для наружных ящиков с передними стенками, входящими в проем.

Сведения о маркировке

1 Маркировка должна соответствовать ГОСТ Р 50444, ГОСТ Р ИСО 15223-1.

2 Маркировка в полном объеме наносится на индивидуальную потребительскую упаковку и должна содержать;

- наименование изготовителя, его адрес и телефон;
- наименование или обозначение типа (вида, модели) изделия;
- номер изделия по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- год изготовления изделия (или две последние цифры);
- обозначение технических условий на изделие;
- номер и дата выдачи регистрационного удостоверения;

3 Допускается использование соответствующих символов ГОСТ Р ИСО 15223-1;

4 Транспортная маркировка - по ГОСТ 14192 и ГОСТ Р 51474.

5 Допускается приведение другой информации, а также информации рекламного характера.

Сведения об упаковке

1 Упаковка шкафа должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 50444 и конструкторской документации изготовителя.

2 Шкаф в индивидуальной потребительской упаковке, исполнение и количество определенным образом, допускается помещать в групповую упаковку - ящики из картона по ГОСТ 9142 или ГОСТ 933 или иную тару, изготовленную по действующей нормативно-технической документации. Ящики оклеивают лентой по ГОСТ 18251 или ГОСТ 20477.

3 Эксплуатационная документация должна быть помещена в пакет из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354 и уложена в ящик.

4 Допускаются иные способы упаковки, обеспечивающие защиту шкафа от воздействия механических и климатических факторов во время транспортирования и хранения, а также наиболее полное использование вместимости транспортных средств и удобство выполнения разгрузочно-погрузочных работ.

Условия транспортирования и хранения

1 Транспортирование и хранение шкафов должны производиться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50444.

Транспортирование шкафов может осуществляться железнодорожным, автомобильным, речным и воздушным видами транспорта в крытых транспортных средствах.

Фиксирование транспортной упаковки в транспортных средствах и перевозка продукции на них должны производиться согласно правилам, действующим на соответствующих видах транспорта.

При транспортировании самолетом - в отапливаемом герметизированном отсеке.

2 Условия транспортирования шкафов должны соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150. Шкафы транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также в контейнерах. Шкафы следует хранить в упаковке изготовителя, в крытых помещениях отправителя (получателя) при относительной влажности воздуха от 45% до 70%.

3 Условия хранения шкафов в упаковке на складах изготовителя (потребителя) должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150.

Срок годности

Срок годности должен быть не менее 7 лет.

Требования безопасности и меры предосторожности

Ящики шкафов нагружаются массой не более 10 кг, дно ящиков не более 20 кг.

Порядок утилизации и уничтожения

- 1 Сбор, учёт и утилизация использованного шкафа должны выполняться согласно СанПиН 1.7.2790 для отходов класса А.
- 2 Утилизации должна подлежать вся упаковка, в том числе и транспортная. Утилизации должны подвергаться отдельно бумага, полиэтилен и пластмасса.

Методы и средства дезинфекции и очистки

Внутренние поверхности шкафа дезинфицируются, при необходимости, по МУ 287-113 3% раствором перекиси водорода ГОСТ 177 с добавлением 0,5- процентного раствора моющего средства типа "Ботос" ГОСТ 25644

Методы и условия стерилизации, сроки сохранения стерильности

Шкаф относится к нестерильным изделиям.

Перечень национальных стандартов, которым соответствует медицинское изделие

ГОСТ Р 50444; ГОСТ ISO 10993

Требования к монтажу и установке

- 5.1. Извлечь шкаф из транспортной тары.
- 5.2. Проверить комплектность шкафа (шкаф поставляется в собранном состоянии).
- 5.3. После транспортирования шкафа в условиях отрицательных температур, перед использованием его выдерживают в помещении при комнатной температуре не менее 3 часов.

Сведения о техническом обслуживании

Рекомендуется каждые 6 месяцев смазывать трущиеся поверхности запирающего механизма тонким слоем смазки.

Гарантийные обязательства

- 7.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий и правил транспортирования, хранения и эксплуатации.
- 7.2 Гарантийный срок хранения шкафов - 12 месяцев со дня продажи предприятием-изготовителем.
- 7.3 Изготовитель не несет ответственность за неисправность шкафа и не гарантирует безотказную работу изделия в случаях: нарушений рекомендаций по транспортировке, хранению, эксплуатации; проведения ремонта некомпетентными лицами; умышленной порчи.

Рекламация

вопросам обращения изделия, обращаться к производителю:

Наименование юридического лица	ООО «ТК ПРОФИ-М»
Адрес места нахождения юридического лица	624071, Свердловская обл., г. Среднеуральск, ул. Вторая, д. 1
Номера телефонов	(343)383-32-18, 8-922-14-65-777
Адрес электронной почты юридического лица	sale@dpm66.ru

Всего прошнуровано и
скреплено печатью
41 листов

Горбунев О.Г.

