

**Кресло гинекологическое-урологическое КГУ – 05.00 «Горское»
ПАСПОРТ**

ТУ 9452-005-49894635-2011



Тех. задание
ООО «Горское»
В. К. Хитров

LLC "Gorskoye"

Зав. № _____

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.00 «Горское» предназначено для проведения гинекологических и урологических процедур.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

- 2.1. КГУ – 05.00 «Горское» состоит из кресла и навесных приспособлений.
- 2.2. Каркас кресла изготовлен из стальных труб с эпокиполимерным порошковым покрытием.
- 2.3. Кресло стоит на основании – «краб», на которое крепится стойка.
- 2.3. Мягкие элементы кресла: спинка, сидение, крепятся через раму на стойку.
- 2.4. Мягкие элементы кресла выполнены по бесшовной технологии для облегчения проведения санитарной обработки.
- 2.5. Подколенные упоры регулируются по высоте.
- 2.6. Подколенные упоры выполнены из интегрированного пенополиуретана, эргономичные по форме, легко обрабатываются санитарными растворами, не требуют дополнительных чехлов из винилискожи.
- 2.7. Кресло укомплектовано выдвигающимся судном из нержавеющей стали под сидением.
- 2.8. Угол наклона спинки осуществляется при помощи механизма «растомат».
- 2.9. Кресло имеет четыре регулируемые опоры.
- 2.10. Кресло укомплектовано опорными ручками.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Габаритные размеры кресла: -длина 1300 мм; -ширина 660 мм; -высота – 1350 мм. -высота до сидения – 900 мм.
- 3.2. Размеры панелей кресла: --спинка – 880мм х550 мм -сидение – 400мм х550мм;
- 3.3. Спинка кресла меняет угол наклона от 40 до 90 градусов относительно вертикали.
- 3.4. Высота до сидения постоянная.
- 3.5. Кресло укомплектовано регулируемыми опорами, которые позволяют устранить неровности пола.
- 3.6. Масса кресла - не более 55 кг.
- 3.7. Кресло выдерживает рабочую нагрузку не менее 160 кг.
- 3.8. Габаритные размеры упаковки: ДхШхВ = 1040 х 670 х 590 мм.
- 3.9. Кресло транспортируется в разобранном виде.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

- 4.1. Фирма-производитель ООО «Горское», 127055, Москва, Порядковый переулок, дом 19, строение 2, офис 23, e-mail gorskoe@mail.ru; <http://www.gorskoye.ru>, тел/факс: (495)223-26-52 - гарантирует соответствие Кресел гинекологических-урологических заявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования.
- 4.2. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и печатью продавца.

Дата продажи

Печать организации, продавшей изделие

ООО «Горское»

Адрес производства:

ЭЛЕКТРОННАЯ КОПИЯ ОФОРМЛЕНА ЦЕНТРОМ ИСПЫТАНИЙ И РЕГИСТРАЦИИ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

**142400 г.Ногинск Московской области, ул. 200 лет города, д.2,
тел./факс (495) 223-26-52, gorskoe@mail.ru**

**Кресло гинекологическое-урологическое КГУ – 05.01 «Горское»
ПАСПОРТ**

ТУ 9452-005-49894635-2011

Зав. № _____



Тем. директор
ООО «Горское»
В.к. Горское
Ош

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

1.1. Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.01 «Горское» предназначено для проведения гинекологических и урологических процедур.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

- 2.1. КГУ – 05.01 «Горское» состоит из кресла и навесных приспособлений.
- 2.2. Каркас кресла изготовлен из стальных труб с эпоксиполимерным порошковым покрытием.
- 2.3. Кресло стоит на основании – «краб», на которое крепится стойка.
- 2.4. Мягкие элементы кресла: спинка, сидение, крепятся через раму на стойку.
- 2.5. Мягкие элементы кресла выполнены по бесшовной технологии для облегчения проведения санитарной обработки.
- 2.6. Подколенные упоры регулируются по высоте.
- 2.7. Подколенные упоры выполнены из интегрированного пенополиуретана, эргономичные по форме, легко обрабатываются санитарными растворами, не требуют дополнительных чехлов из винилискожи.
- 2.8. Кресло укомплектовано выдвижным судном из нержавеющей стали под сидением.
- 2.9. Угол наклона спинки осуществляется при помощи механизма «растомат» от 10 до 90° относительно вертикали.
- 2.10. Угол наклона сидения осуществляется при помощи пневмопружины от 0 до 20°.
- 2.11. Кресло имеет четыре регулируемые опоры.
- 2.12. Кресло укомплектовано опорными ручками.
- 2.13. Кресло укомплектовано подъемным сидением.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Габаритные размеры кресла: -длина 1300 мм; -ширина 660 мм; -высота – 1350 мм. -высота до сидения – 900 мм.
- 3.2. Размеры панелей кресла: --спинка – 880мм x 550 мм -сидение – 400мм x 550мм;
- 3.3. Спинка кресла меняет угол наклона от 10 до 90° относительно вертикали.
- 3.4. Высота до сидения при горизонтальном положении 900 мм.
- 3.5. Кресло укомплектовано регулируемыми опорами, которые позволяют устранить неровности пола.
- 3.6. Масса кресла - не более 55 кг.
- 3.7. Кресло выдерживает рабочую нагрузку не менее 160 кг.
- 3.8. Габаритные размеры упаковки: ДхШхВ = 1040 x 670 x 590 мм.
- 3.9. Кресло транспортируется в разобранном виде.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

- 4.1. Фирма-производитель ООО «Горское», 127055, Москва, Порядковый переулок, дом 19, строение 2, офис 23, e-mail gorskoe@mail.ru; <http://www.gorskoye.ru>, тел/факс: (495)223-26-52 - гарантирует соответствие Кресел гинекологических аявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования.
- 4.2. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и печатью продавца.

Дата продажи

Печать организации, продавшей изделие

ООО «Горское»

Адрес производства: 142400 г. Ногинск Московской области, ул. 200 лет города, д.2

ООО ЦИРМИ INFO@CIRMI.RU WWW.GOSZDRAVNADZOR.RU

тел./факс (495) 223-26-52, gorskoe@mail.ru

**Кресло гинекологическое-урологическое КГУ – 05.02 «Горское»
ПАСПОРТ**

ТУ 9452-005-49894635-2011

Зав. № _____



Ген. директор
ООО «Горское»
В.К. Хмелев


1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-05.02 «Горское» предназначено для проведения гинекологических и урологических процедур.

2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ.

- 2.1. КГУ – 05.02 «Горское» состоит из кресла и навесных приспособлений.
- 2.2. Каркас кресла изготовлен из стальных труб с эпокиполимерным порошковым покрытием.
- 2.3. Кресло стоит на основании – «краб», на которое крепится стойка.
- 2.4. Мягкие элементы кресла: спинка, сидение, крепятся через раму на стойку.
- 2.5. Мягкие элементы кресла выполнены по бесшовной технологии для облегчения проведения санитарной обработки.
- 2.6. Подколенные упоры регулируются по высоте.
- 2.7. Подколенные упоры выполнены из интегрированного пенополиуретана, эргономичные по форме, легко обрабатываются санитарными растворами, не требуют дополнительных чехлов из винилискожи.
- 2.8. Кресло укомплектовано выдвижным судном из нержавеющей стали под сидением.
- 2.9. Угол наклона спинки осуществляется при помощи механизма пневмопружины от 10 до 90° относительно вертикали.
- 2.10. Угол наклона сидения осуществляется при помощи пневмопружины от 0 до 20 град.
- 2.11. Кресло имеет четыре регулируемые опоры.
- 2.12. Кресло укомплектовано опорными ручками.
- 2.13. Кресло укомплектовано подъемным сидением.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- 3.1. Габаритные размеры кресла: – длина 1300 мм; – ширина 660 мм; – высота – 1350 мм. – высота до сидения – 900 мм.
- 3.2. Размеры панелей кресла: – спинка – 880 мм x 550 мм – сидение – 400 мм x 550 мм;
- 3.3. Спинка кресла меняет угол наклона от 10 до 90° относительно вертикали.
- 3.4. Высота до сидения при горизонтальном положении 900 мм.
- 3.5. Кресло укомплектовано регулируемыми опорами, которые позволяют устранить неровности пола.
- 3.6. Масса кресла – не более 55 кг.
- 3.7. Кресло выдерживает рабочую нагрузку не менее 160 кг.
- 3.8. Габаритные размеры упаковки: ДхШхВ = 1040 x 670 x 590 мм.
- 3.9. Кресло транспортируется в разобранном виде.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

- 4.1. Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям технических условий ТУ 9452-005-49894635-2011 и ГОСТ Р 50444-92 (Рр. 3, 4), ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.0.2-2005.
- Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев с момента продажи изделия.
- 4.2. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и печатью продавца.

Дата выпуска

Штамп производителя

Дата продажи

Печать организации, продавшей изделие

ООО «Горское»

**Адрес производства: 142400 г. Ногинск Московской области, ул. 200 лет города, д. 2
тел./факс (495) 223-26-52, gorskoe@mail.ru**

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Горское»

В.К. Хмелев.

«29» ~~марта~~ 2016 г.

М.п.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МИ

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-«Горское»

модель КГУ-05.00 «Горское»

1. Назначение

Настоящее руководство распространяется на кресло гинекологическое-урологическое КГУ-«Горское» модель КГУ-05.00 «Горское» (далее кресло), предназначенное для проведения гинекологических и урологических осмотров, процедур.

2. Основные технические характеристики

Конструкция кресла выполнена из стальных труб и листа, покрытых порошковой краской. Мягкие элементы лежа выполнены из пенополиуритана и облицованы искусственной кожей, устойчивой к чистке и дезинфекции, марка ВИНЛИСКОЖ-ТР МЕБЕЛЬНАЯ производства ОАО «Искож» г. Нефтекамск. Допускается применение других материалов, не ухудшающих физико-химические свойства кресла.

В модели КГУ-05.00 «Горское» высота до сидения при горизонтальном положении сидения постоянная, высота кресла постоянная, наклон спинки осуществляется механизмом «растomat» от 40° до 90° относительно вертикали.

Кресло установлено на четыре регулируемые опоры.

Габаритные размеры кресла, мм:

- длина – 1300, ширина – 660, высота 1350;
- длина спинки – 880, ширина спинки – 550;
- длина сидения – 400, ширина сидения – 550;
- высота до сидения при горизонтальном положении сидения – 900 мм.

Масса кресла со съемными приспособлениями - не более 55 кг.

Максимальная рабочая нагрузка - 160 кг.

Поверхности кресла устойчивы к дезинфекции.

Средний срок службы изделия не менее 6 лет.

3. Комплект поставки

- кресло – 1 шт.;
- подколennые упоры – 2 шт.;
- поддон – 1 шт.;
- зажим – 4 шт.;
- подъемное сидение - 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- инструкция по сборке.

4. Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- провести сборку изделия согласно инструкции по сборке кресла;
- проверить фиксацию винтовых соединений и крепление навесных приспособлений на кресле;
- отрегулировать ножки кресла на рабочем месте для достижения устойчивого положения.

5. Дезинфекция кресла

Дезинфекцию кресла проводить 3 %-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1%-ным раствором хлорамина, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113), с последующим просушиванием сухой ветошью.

6. Правила хранения и транспортирования

Кресла хранят и транспортируют в разобранном виде без установки навесных приспособлений в недоступном для детей чистом, сухом, месте в упаковке производителя при температуре от -50°C до +40°C. Допускается перевозить кресла любым видом транспорта при соблюдении правил транспортирования.

Запрещено воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. Гарантия изготовителя и техническое обслуживание

Фирма-производитель ООО «Горское», 127055, Москва, Порядковый переулок, дом 19, строение 2, офис 23, e-mail gorskoe@mail.ru; <http://www.gorskoye.ru>, тел/факс: (495)223-26-52 - гарантирует соответствие Кресел гинекологических-урологических заявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования.

Срок службы – 6 лет с даты изготовления, указанной на упаковке, или даты продажи.

Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет фирма-производитель ООО «Горское».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Горское» - почтовый адрес: 142400, г. Ногинск, ул. 200 лет города, дом 2.

Тел/факс: (495)223-26-52, e-mail: gorskoe@mail.ru

8. Утилизация

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.


Генеральный директор



В.К. Хмелев

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Горское»

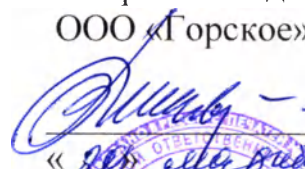 В.К. Хмелев.
« 28 » ~~сентября~~ апреля 2016 г.
М.п.


РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МИ

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-«Горское»

модель КГУ-05.01 «Горское»

1. Назначение

Настоящее руководство распространяется на кресло гинекологическое-урологическое КГУ-«Горское» модель КГУ-05.01«Горское» (далее кресло), предназначенное для проведения гинекологических и урологических осмотров, процедур.

2. Основные технические характеристики

Конструкция кресла выполнена из стальных труб и листа, покрытых порошковой краской. Мягкие элементы ложа выполнены из пенополиуритана и облицованы искусственной кожей, устойчивой к чистке и дезинфекции, марка ВИНИЛИСКОЖ-ТР МЕБЕЛЬНАЯ производства ОАО «Искож» г. Нефтекамск. Допускается применение других материалов, не ухудшающих физико-химические свойства кресла.

В модели КГУ-05.01-«Горское-ЛАВКОР» высота до сидения при горизонтальном положении сидения постоянная, высота кресла постоянная, наклон спинки осуществляется пневмопружиной от 10° до 90° относительно вертикали.

Кресло установлено на четыре регулируемые опоры.

Габаритные размеры кресла, мм:

- длина – 1300, ширина – 660, высота 1350;
- длина спинки – 880, ширина спинки – 550;
- длина сидения – 400, ширина сидения – 550;
- высота до сидения при горизонтальном положении сидения – 900 мм.

Масса кресла со съемными приспособлениями - не более 55 кг.

Максимальная рабочая нагрузка - 160 кг.

Поверхности кресла устойчивы к дезинфекции.

Средний срок службы изделия не менее 6 лет.

3. Комплект поставки

- кресло – 1 шт.;
- подколennые упоры – 2 шт.;
- поддон – 1 шт.;
- зажим – 4 шт.;
- подъемное сидение - 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- инструкция по сборке.

4. Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- провести сборку изделия согласно инструкции по сборке кресла;
- проверить фиксацию винтовых соединений и крепление навесных приспособлений на кресле;
- отрегулировать ножки кресла на рабочем месте для достижения устойчивого положения.

5. Дезинфекция кресла

Дезинфекцию кресла проводить 3 %-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства или 1%-ным раствором хлорамина, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113), с последующим просушиванием сухой ветошью.

6. Правила хранения и транспортирования

Кресла хранят и транспортируют в разобранном виде без установки навесных приспособлений в недоступном для детей чистом, сухом, месте в упаковке производителя при температуре от -50°С до +40°С. Допускается перевозить кресла любым видом транспорта при соблюдении правил транспортирования.

7. Гарантия изготовителя и техническое обслуживание

Фирма-производитель ООО «Горское», 127055, Москва, Порядковый переулок, дом 19, строение 2, офис 23, e-mail gorskoe@mail.ru; <http://www.gorskoye.ru>, тел/факс: (495)223-26-52 - гарантирует соответствие Кресел гинекологических-урологических заявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования.

Срок службы – 6 лет с даты изготовления, указанной на упаковке, или даты продажи.

Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет фирма-производитель ООО «Горское».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Горское» - почтовый адрес: 142400, г. Ногинск, ул. 200 лет города д. 2

Тел/факс: (495)223-26-52, e-mail: gorskoe@mail.ru

8. Утилизация

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.


Генеральный директор



В.К. Хмелев

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Горское»

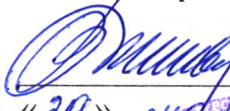 - В.К. Хмелев.
«29» ~~сентября~~ 2016 г.
М.п.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ МИ

Кресло гинекологическое-урологическое КГУ-«Горское»

модель КГУ-05.02 «Горское»

1. Назначение

Настоящее руководство распространяется на кресло гинекологическое-урологическое КГУ-«Горское» модель КГУ-05.02 «Горское» (далее кресло), предназначенное для проведения гинекологических и урологических осмотров, процедур.

2. Основные технические характеристики

Конструкция кресла выполнена из стальных труб и листа, покрытых порошковой краской. Мягкие элементы ложа выполнены из пенополиуритана и облицованы искусственной кожей, устойчивой к чистке и дезинфекции, марка ВИНИЛИСКОЖ-ТР МЕБЕЛЬНАЯ производства ОАО «Искож» г. Нефтекамск. Допускается применение других материалов, не ухудшающих физико-химические свойства кресла.

В модели КГУ-05.02 «Горское» высота до сидения при горизонтальном положении сидения постоянная, угол наклона сидения меняется при помощи пневмопружины от 0° до 20°, наклон спинки осуществляется пневмопружиной от 10° до 90° относительно вертикали.

Кресло установлено на четыре регулируемые опоры.

Габаритные размеры кресла, мм:

- длина – 1300, ширина – 660, высота 1350;
- длина спинки – 880, ширина спинки – 550;
- длина сидения – 400, ширина сидения – 550;
- высота до сидения при горизонтальном положении сидения – 900 мм.

Масса кресла со съемными приспособлениями - не более 55 кг.

Максимальная рабочая нагрузка - 160 кг.

Поверхности кресла устойчивы к дезинфекции.

Средний срок службы изделия не менее 6 лет.

3. Комплект поставки

- кресло – 1 шт.;
- подколенные упоры – 2 шт.;
- поддон – 1 шт.;
- зажим – 4 шт.;
- подъемное сидение - 1 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- инструкция по сборке.

4. Подготовка к работе

Перед началом работы необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- провести сборку изделия согласно инструкции по сборке кресла;
- проверить фиксацию винтовых соединений и крепление навесных приспособлений на кресле;
- отрегулировать ножки кресла на рабочем месте для достижения устойчивого положения.

5. Дезинфекция кресла

Дезинфекцию кресла проводить 3 %-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0.5% моющего средства или 1%-ным раствором хлорамина, согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» (утв. Минздравом РФ 30.12.1998 N МУ-287-113), с последующим просушиванием сухой ветошью.

6. Правила хранения и транспортирования

Кресла хранят и транспортируют в разобранном виде без установки навесных приспособлений в недоступном для детей чистом, сухом, месте в упаковке производителя при температуре от -50°C до +40°C. Допускается перевозить кресла любым видом транспорта при соблюдении правил транспортирования.

Запрещено воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред.

7. Гарантия изготовителя и техническое обслуживание

Фирма-производитель ООО «Горское», 127055, Москва, Порядковый переулок, дом 19, строение 2, офис 23, e-mail gorskoe@mail.ru; <http://www.gorskove.ru>, тел/факс: (495)223-26-52 - гарантирует соответствие Кресел гинекологических-урологических заявленным свойствам в течение 12 месяцев с даты продажи, при условии соблюдения правил хранения, применения, обслуживания и транспортирования.

Срок службы – 6 лет с даты изготовления, указанной на упаковке, или даты продажи.

Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет фирма-производитель ООО «Горское».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Горское» - почтовый адрес: 142400, г. Ногинск, ул. 200 лет города, д. 2.

Тел/факс: (495)223-26-52, e-mail: gorskoe@mail.ru

8. Утилизация

Упаковку утилизируют в места сбора бытового мусора

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», как отходы класса А.

Генеральный директор



В.К. Хмелев

Инструкция по сборке кресла гинекологического-урологического КГУ-05.00 «Горское»

1. Прикрепить мягкий элемент спинки кресла (поз. 4) к рамке спинки (поз. 11) шурупами 4x25 мм
2. Закрепить механизм «растомат» (поз. 5) к основанию кресла (поз. 1) при помощи винта М6х30мм и самоконтрящейся гайки М 6.
3. Установить опорные ручки (поз. 2) во втулки (поз. 12) на основании кресла (1) и тщательно зафиксировать крепежный винт.
4. Закрепить на держателях (поз. 6) подколеники (поз. 7) с помощью винтов М 4х10.
5. Установить держатели (поз. 6) на основание (поз. 1) и закрепить их с помощью фиксаторов (поз. 9)
6. Установить поддон (поз. 8) в рамку.
7. Отрегулировать опорные ножки (поз. 13) в основании кресла.

Комплектность

Наименование составных частей	Кол-во	Поз. (рис.)	Перечень метизов	Кол-во
Основание кресла	1	1		
Опорные ручки	1	2		
Сиденье	1	3	Винт М 6х30мм	2
Спинка	1	4	Гайка самоконтрящаяся М6	2
Пневмопружина	1	5	Фиксатор-ручка	2
Держатель	2	6	Винт М4х10	2
Подколенные упоры	2	7	Шуруп - саморез Ф4.2х25	10
Поддон	1	8		
Фиксаторы	2	9		
Выдвижная ступенька	1	10		
Рамка спинки	1	11		
Втулка под опорную ручку	2	12		
Регулируемые ножки	4	13		

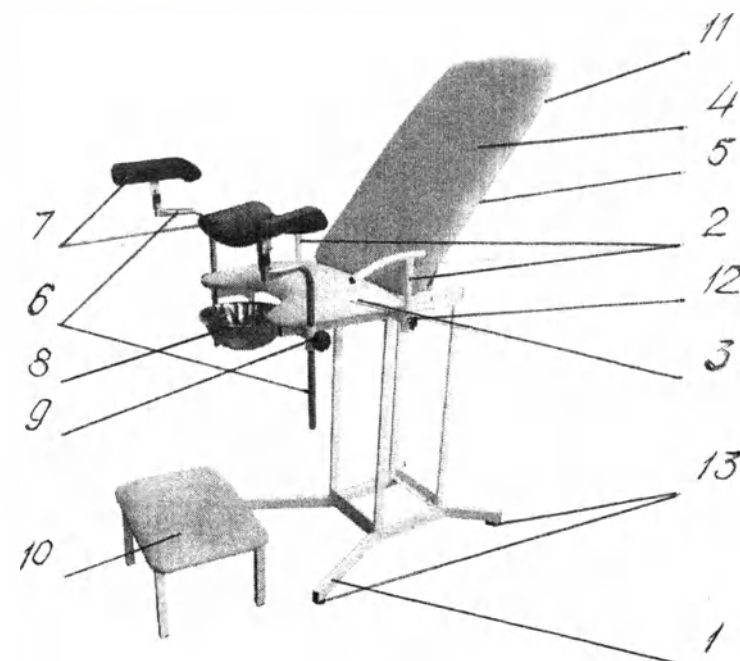


Рисунок 1

- 1 – основание кресла,
- 2 – опорные ручки,
- 3 – сиденье,
- 4 – спинка,
- 5 – пневмопружина,
- 6 – держатель,
- 7- подколенные упоры,
- 8- поддон,
- 9- фиксаторы,
- 10- ступенька приставная
- 11- рамка спинки,
- 12- втулка под опорную ручку.
- 13 –регулируемые ножки



Инструкция по сборке кресла гинекологического-урологического КГУ-05.01 «Горское»

1. Соединить основание (поз. 1) и стойку (поз. 2) с помощью болтов М10х20 и гаек М10.
2. К стойке (поз.2) прикрепить сиденье (поз.3) с помощью болтов М10х20 и гаек М10.
3. Прикрепить мягкий элемент спинки кресла (поз. 10) к каркасу (поз.3) шурупами 4х25 мм
4. Закрепить на держателях (поз.7) подколенники (поз.9) с помощью винтов М 4х10
5. Установить держатели (поз.7) на сиденье (поз.3) и закрепить их с помощью фиксаторов (поз.13)
5. Установить поддон (поз. 8) в раму.
7. Установить хвостовик газовой пружины (поз.5) к упору (поз.6) на стойке и закрепить болтом М8х40, гайки М8 и шайбы. Ф8.
3. Установить выдвижную ступеньку (поз.14) в направляющие (поз.15), закрепить в нужном положении фиксаторы (поз.16).
3. Произвести регулировку опор (поз.12) и колес выдвижной ступеньки (поз.14) по месту.
- 10 Установить опорные ручки (16) в направляющие втулки сидения (3) и закрепить их с помощью фиксаторов.

Комплектность

Наименование составных частей	Кол-во	Поз. (рис.)	Перечень метизов	Кол-во
Основание кресла	1	1	Болт М10х20	8
Стойка	1	2	Гайка М 10	8
Сиденье	1	3	Шайба (диаметр 8)	1
Спинка	1	4	Болт М 8*40мм	1
Газовая пружина	2	5	Гайка самоконтрящаяся Ф8	1
Выдвижная ступенька	1	6	Винт М4х10	2
Держатель	2	7	Шуруп саморез Ф 4.2х25	10
Поддон	1	8	Фиксатор	2
Подколенник	2	9	Фиксатор	2
Спинка мягкая	1	10		
Сиденье мягкое	1	11		
Опора	4	12		

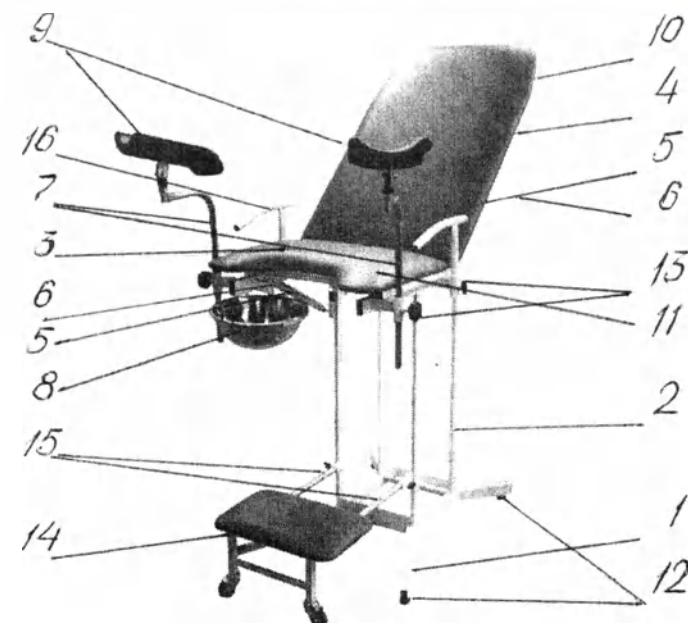


Рисунок 1

- 1 – основание кресла,
2 – стойка,
3 – сиденье,
4 – спинка,
5 – газовая пружина,
6 – упор для газовой пружины,
7- держатель,
8- поддон,
9 – подколенник,
10 – спинка мягкая,
11 – сиденье мягкое,
12 – опора,
13 – фиксатор-ручка,
14 – выдвижная ступенька,
15 – направляющие для выдвижной ступеньки,
16 – опорные ручки

Директор
ООО «Горское»
И.И. Гордеев

ООО «Горское»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1045000000000
ИНН 5005000000
ОГРНИП 1045000000000

Инструкция по сборке кресла гинекологического-урологического КГУ-05.02 «Горское»

1. Соединить основание (поз. 1) и стойку (поз. 2) с помощью болтов М10х20 и гаек М10.
2. К стойке (поз. 2) прикрепить сиденье (поз. 3) с помощью болтов М10х20 и гаек М10.
3. Прикрепить мягкий элемент спинки кресла (поз. 10) к каркасу (поз. 3) шурупами 4х25 мм.
4. Закрепить на держателях (поз. 7) подколеники (поз. 9) с помощью винтов М 4х10.
5. Установить держатели (поз. 7) на сиденье (поз. 3) и закрепить их с помощью фиксаторов (поз. 13)
6. Установить поддон (поз. 8) в раму.
7. Установить хвостовик газовой пружины (поз. 5) к упору (поз. 6) на стойке и закрепить болтом М8х40, гайки М8 и шайбы. Ф8.
8. Установить выдвижную ступеньку (поз. 14) в направляющие (поз. 15), закрепить в нужном положении фиксаторы (поз. 16).
9. Произвести регулировку опор (поз. 12) и колес выдвижной ступеньки (поз. 14) по месту.
10. Установить опорные ручки (16) в направляющие втулки сидения (3) и закрепить их с помощью фиксаторов.

Комплектность

Наименование составных частей	Кол-во	Поз. (рис.)	Перечень метизов	Кол-во
Основание кресла	1	1	Болт М10х20	8
Стойка	1	2	Гайка М 10	8
Сиденье	1	3	Шайба (диаметр 8)	1
Спинка	1	4	Болт М 8*40мм	1
Газовая пружина	2	5	Гайка самоконтрящаяся Ф8	1
Выдвижная ступенька	1	6	Винт М4х10	2
Держатель	2	7	Шуруп саморез Ф 4.2х25	10
Поддон	1	8	Фиксатор	2
Подколенник	2	9	Фиксатор	2
Спинка мягкая	1	10		
Сиденье мягкое	1	11		
Опора	4	12		

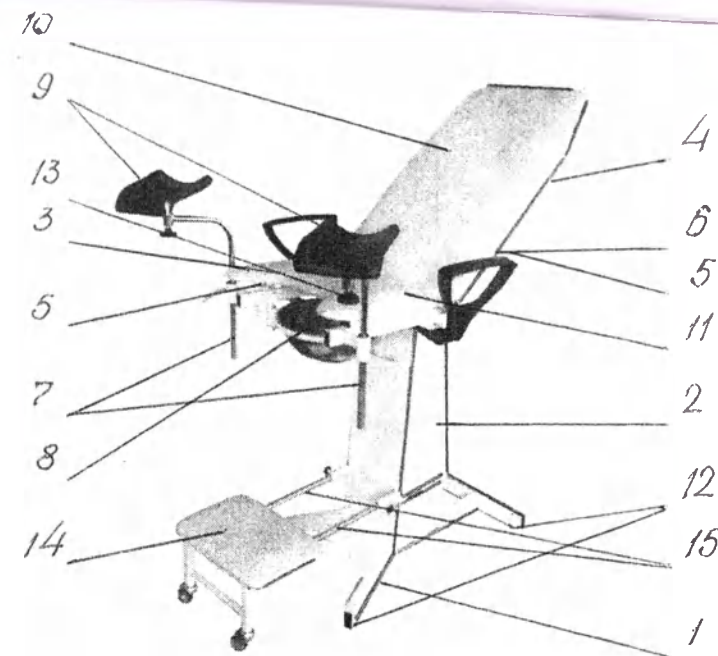


Рисунок 1

- 1 – основание кресла,
2 – стойка,
3 – сиденье,
4 – спинка,
5 – газовая пружина,
6 – упор для газовой пружины,
7 – держатель,
8 – поддон,
9 – подколенник,
10 – спинка мягкая,
11 – сиденье мягкое,
12 – опора,
13 – фиксатор-ручка,
14 – выдвижная ступенька,
15 – направляющие для выдвижной ступеньки,
16 – опорные ручки

В.И. Горское
Директор ООО «Горское»
[Signature]

Макет этикетки

**КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ-
УРОЛОГИЧЕСКОЕ КГУ-«Горское»**

модель

КГУ-05.00-« Горское»

ТУ 9452-001-91587838-2011

ООО «Горское»

127055 Москва, Порядковый

пер., д. 19, стр. 2, оф. 23

Адрес производства: 142400

Московская область, г. Ногинск,

ул. 200 лет города , 2

Зав. № _____

Сделано в России _____ 201_г.

РУ № _____



**КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ-
УРОЛОГИЧЕСКОЕ КГУ-«Горское»**

модель

КГУ-05.01-« Горское»

ТУ 9452-001-91587838-2011

ООО «Горское»

127055 Москва, Порядковый

пер., д. 19, стр. 2, оф. 23

Адрес производства: 142400

Московская область, г. Ногинск,

ул. 200 лет города , 2

Зав. № _____

Сделано в России _____ 201_г.

РУ № _____



**КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ-
УРОЛОГИЧЕСКОЕ КГУ-«Горское»**

модель

КГУ-05.02-« Горское»

ТУ 9452-001-91587838-2011

ООО «Горское»

127055 Москва, Порядковый

пер., д. 19, стр. 2, оф. 23

Адрес производства: 142400

Московская область, г. Ногинск,

ул. 200 лет города , 2

Зав. № _____

Сделано в России _____ 201_г.

РУ № _____



Пронумеровано, прошито, скреплено подписью

и печатью 16 (шесть рука страниц).

Генеральный директор

 В.К. Хмелев

