



## Проверка вакуум-отсоса

Проверка вакуум-отсоса осуществляется путем сравнения показателей вакуума, отображенных на встроенном манометре с калиброванным манометром.

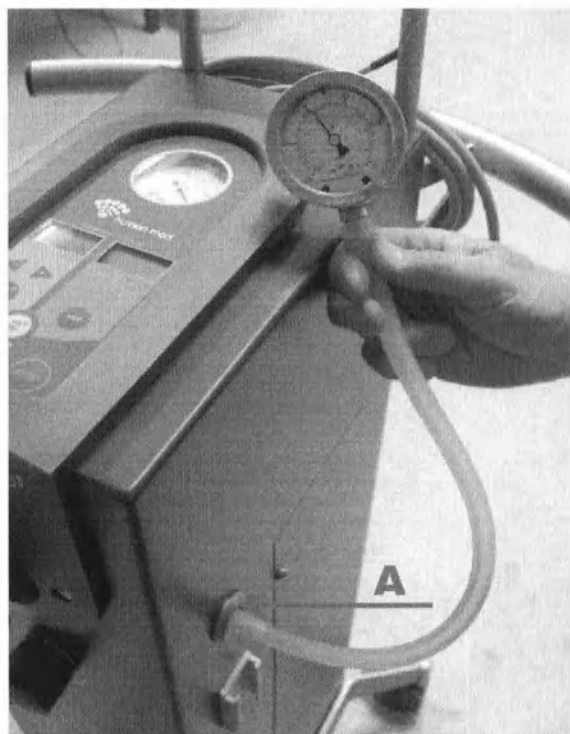

Для проверки, соедините манометр с соединением для откачивания жировых тканей (А) на приборе с помощью вакуумной трубки и сравните давление, показанное на встроенном манометре при помощи поворотного регулятора (В) с давлением, отображаемым на внешнем манометре.

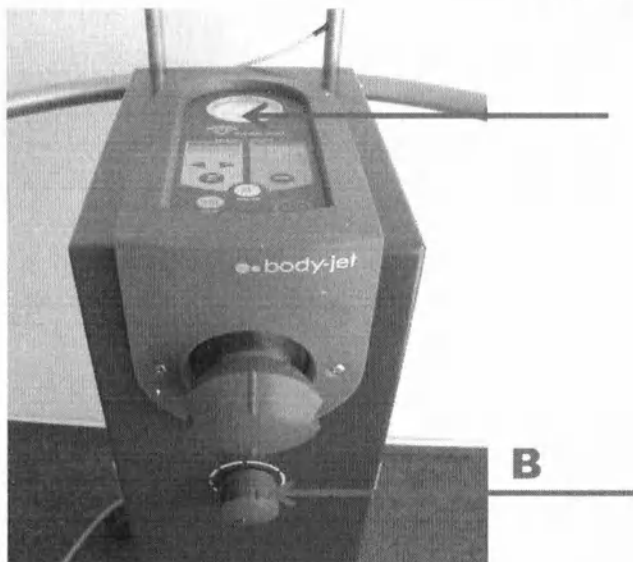

Закройте второе аспирационное соединение при помощи заглушки, иначе невозможно будет создать вакуум на первом аспирационном соединении.

**Допустимая разница в давлении  $\pm 50$  мбар.**

Функция откачивания жировых тканей должна быть задокументирована в отчет по проверке безопасности.

Если полученное давление выходит за пределы допустимой погрешности, то необходимо проверить встроенный манометр и аспирационную помпу.

Для этого свяжитесь со Службой Технической поддержки производителя.