



*Биоимплантаты костные аллогенные механически и ультразвуком
обработанные лиофилизированные стоматологические стерильные
«ЛИОПЛАСТ-С»*

Спонгиозная крошка

ТУ 9398-001-01963143-2010г.



**Имплантаты костные аллогенные механически и ультразвуком
обработанные лиофилизированные «Лиопласт»®**

Инструкция по медицинскому применению

Торговое название: ЛИОПЛАСТ®
Метод консервации: лиофилизация
Метод стерилизации: гамма-лучи
Применение: перед использованием провести регидротацию в 0,9 % физ. растворе с антибиотиком широкого спектра действия

хрящи, тракт	не более 20-30 мин.
МО - офтальмология	3-5 мин.
- оториноларингология	не более 15 мин.
- травматология, стоматология	15-30 мин.
хондральная крошка	можно не регид-ть или до 5мин.
хондроостеоматрикс (чипсы)	можно не регидр-ть или не более 5-10 мин.
большие фрагменты (проксимальный, дистальный отделы, диафизы (15-20 см) бедра и большеберцовой кости)	18-24 ч.
диафизы бедра, большеберцовой кости (до 12 см)	10-18 ч.
диафизы бедра, голени	40мин.- 1ч.20мин.
кортикальные распорки большие (15-20 см) деминерализованные	18-24 ч.
кортикальные распорки маленькие (до 12 см)	12-18 ч.
кортикальные распорки деминерализованные	30-40 мин.
кубчатые блоки, цилиндры	15-30 мин.
энкортикал, трикортикал	5 – 15 мин.
порошок	Не регидротруется

Условия хранения: при комнатной температуре, в сухом защищенном от света месте.
Срок годности: 3 года с момента забора ткани.

Регистрационное удостоверение № _____ У 9398-001-01963143-2004	ГОУ ВПО «СамГМУ Росздрава» Самарский банк тканей: РФ, 443079, г. Самара, ул. Гагарина, 20 Тел./факс (846) 260-10-89
--	--

