

ОКП 94 4470


УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ООО «Тайши Трейдинг»

Дьяченко И. В.

25.09.2010 г.

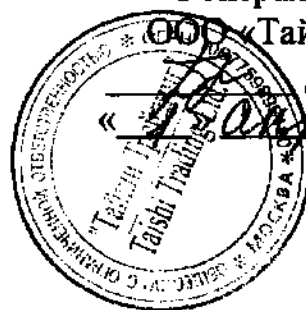

Инструкция по применению

Система трансфузионные «KANPO»

**Соответствует требованиям национальных стандартов
ГОСТ Р 25047-87, ГОСТ Р 50444-92**

Система трансфузионная «KANPO»

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Система для переливания крови стерильная однократного применения в составе:

- защитный колпачок 2 шт.
- игла пластиковая
- капельница с фильтром
- соединительная трубка
- роликовый регулятор
- гибкая трубка коннектор
- игла металлическая

2. Противопоказания к применению

Не использовать, если упаковка загрязнена или повреждена.

3. Подготовка к работе

1. Извлечь изделие из транспортной упаковки-коробки.
2. Проверить визуально целостность индивидуальной упаковки.
3. Проверить информацию на индивидуальной упаковке:
 - срок годности
 - тип изделия

4. Порядок работы изделия:

1. Закрывать зажим.
2. Ввести иглу устройства в коннектор.
3. Заполнить капельницу до половины контрольной емкости (фильтра).
4. Открыть зажим выпустить воздух из системы трубок.
5. Закрывать зажим.
6. Произвести венопункцию.
7. Зажимом установить необходимую скорость инфузии.

5. Правила хранения и использования:

Стерильно и апиrogenно – только в не открытой и не поврежденной упаковке.

Использовать после вскрытия упаковки.

20 капель/1мл.

Уничтожить после применения, что бы избежать возможного инфицирования, соблюдая правила безопасности.

Не использовать, если или упаковка или само изделие повреждены или загрязнены.

20 капель/1мл.

Не хранить при высокой температуре или влажности. Избегать попадания прямых солнечных лучей.

Стерилизовано этиленоксидом.

Только для однократного применения.