


ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»


« 26 » апреля 2021 г. А.В. Пушин

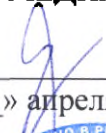

**НАБОР ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НИТСП-02-«МЕДПЛАНТ»
(ТУ 9437-013-52777873-2014).**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.022РЭ

*Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России

**НАБОР ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НИТсп-02-«МЕДПЛАНТ»**Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.022РЭ**1. Назначение**

Набор травматологический для оказания скорой медицинской помощи НИТсп-02-«МЕДПЛАНТ» предназначен для оказания скорой медицинской травматологической помощи.

2. Область применения

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. Условия применения

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи.

4. Основные технические характеристики

Основные параметры и размеры наборов приведены в Таблице 1.

Табл. 1

Параметр \ Серия	В сумке медицинской универсальной СМУ-02	В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2
Габаритные размеры	(530x260x260)±50 мм	(440x252x340)±50 мм
Масса набора (не более), кг	4	4,7
Предельная нагрузка (максимально допустимая масса с вложений), кг	12	12

Средний срок службы – не менее 3 лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °C.

5. Комплект поставки

1. Сумка медицинская универсальная СМУ-02 или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 – 1 шт.;
2. Комплект вложений – 1 комп. (согласно. табл. 2);
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-Пм/2;
2. Столик манипуляционный для УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

6. Описание изделия

Набор травматологический для оказания скорой медицинской помощи НИТсп-01-«МЕДПЛАНТ» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов. Набор выпускается в сумке медицинской универсальной СМУ-02 или в футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2.

Сумка медицинская универсальная СМУ-02 изготовлена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ 420Д, дно сумки изготовлено из непромокаемого тентового материала, что обеспечивает хорошую влагоизоляцию сумки. Для защиты вложений от механических повреждений, в стенках сумки находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из полирекса НПЭ. Для размещения вложений сумка имеет 3 кармана, основной отсек и отсек для хранения документов. На внешней части сумки расположен держатель для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и эмблема красного креста. По всему корпусу сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в тёмное время суток. Для удобства переноски сумка снабжена двумя ручками (для ношения одной рукой) и плечевым ремнём, со специальной накладкой, которая предохраняет его от сминания.

Компактность сумки позволяет размещать набор на стеллаже в помещении или в салоне санитарного автомобиля, а малый вес делает набор в сумке более удобным для женщин-медиков.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 (ТУ 9437-006-52777873-2010), адаптирован к данному набору. Футляр изготовлен из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и

замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора.

На верхней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в темное время суток. Футляр надёжно защищает элементы набора от повреждений и легко обрабатывается, поэтому набор в футляре особенно удобен для частого использования.

7. Подготовка к работе и правила работы

7.1. Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав набора.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеет жёсткий каркас и защищает элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке и работе избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на сумку и рюкзак при их использовании. Чтобы исключить повреждение изделий не нагружайте их более чем на 12 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с изделием продлевает срок его службы.

ВНИМАНИЕ! Не используйте изделие, если вы не имеете достаточной квалификации!


7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить.

ВНИМАНИЕ! Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!

7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта входящего в состав футляра, как показано на рисунке 1.

Состав ремкомплекта:
- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4х1 – 2 шт.;
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.

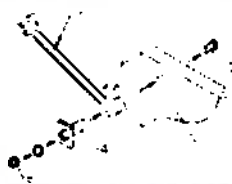

обозначения на рисунке:
1 - винт;
2 – корпус укладки, внутренняя сторона
3 - тяга
4 - втулка
5 – пружинная шайба
6 - гайка

Рис. 1 Замена тяги футляра-саквояжа УМСП-01-Пм/2 с использованием ремонтного комплекта

7.7. Сумки самостоятельному ремонту не подлежат.

8. Транспортирование, хранение и уход

8.1. Транспортирование набора может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75% при 15 °С.

8.2. Наборы могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой медицинской помощи в области травматологии. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Противопоказания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. Указания по утилизации

Сумки, рюкзак и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения укладки утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. Гарантии изготовителя

11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи.

Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2 Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3 Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.4 В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

11.5 Рекламации направлять на адрес производителя

12. Контактная информация производителя

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, эт.2, пом. I, ком. 296-318

Телефон: 8(495)223-6016

E-mail: medplant@medplant.ru

13. Свидетельство о приемке

Набор травматологический для оказания скорой медицинской помощи НИТсп-02-«МЕДПЛАНТ»

Наименование	Артикул
В сумке медицинской универсальной СМУ-02	
В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	

соответствует ТУ 9437-013-52777873-2014 и признан годным к эксплуатации.

№ партии:

Дата продажи:

Дата выпуска:

Подпись продавца:

Штамп ОТК:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки – это поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

Перечень вложений, входящих в состав набора травматологического для оказания скорой медицинской помощи НИТсп-02-«МЕДПЛАНТ»

Табл. 2

N	Наименование медицинского изделия	Кол-во, не менее	Наименование изделия в соответствии с РУ	Номер РУ	Производитель
1	Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см)	2 шт.	Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см; 7м x 14см.	ФСР 2011/12237	ООО «Фарм-Глобал», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см; 7м x 14см.	ФСР 2007/01317	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см; 7м x 14см.	ФСР 2007/00081	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см; 7м x 14см.	ФСР 2010/08705	ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см; 7м x 14см.	ФСР 2010/06612	ООО "НЬЮФАРМ", (Россия)
2	Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см)	6 шт.	Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014 следующих типоразмеров: 5м x 10см; 7м x 14см.	РЗН 2015/2558	ООО «ХБК Навтекс», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см; 7м x 14см.	РЗН 2015/2552	ООО «ХБК Навтекс», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см; 7м x 14см.	ФСР 2009/05650	ООО "Лейко", (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см; 7м x 14см.	ФСР 2008/03226	ООО "ПКФ ВераМед", (Россия)
			Бинты медицинские эластичные сетчато-трубчатые фиксирующие по ТУ 9393-027-42965160-2005	ФСР 2010/07995	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)
3	Бинт эластичный сетчато-трубчатый фиксирующий разных размеров	3 шт.	Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный "ФЭСТ" по ТУ 9393-006-10973749-2015	ФСР 2009/05993	ООО «Предприятие «ФЭСТ», (Россия)
			Бинты медицинские эластичные модели ELAST-трубчатые	ФСЗ 2008/02390	ООО "ТОНУС ЭЛАСТ", (Латвия)
			Бинты эластичные трубчатые латексно-полиэфирные "ИНТЕКС" по ТУ 9393-007-46838010-2001	ФСР 2010/06795	ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп», (Россия)
			Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ-"Медплант" по ТУ 9438-001-91531720-2011	ФСР 2012/13255	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
4	Воротник-шина шейная для взрослых (либо комплект шин)	3 шт.	Комплект заготовок из гофрированного картона с водоотталкивающей пропиткой для моментального изготовления на месте происшествия шин транспортных для иммобилизации конечностей и шейного отдела позвоночника КЗШТ-"Омнимед" по ТУ 9398-024-43018878-2003	ФСР 2008/02955	ООО ППИЦ «Омнимед», (Россия)
			Комплект шин для иммобилизации шейного отдела позвоночника типа Шанца ВШ по ТУ 9438-002-16895134-2003	ФСР 2010/08382	ООО «Медикон», (Россия)
			Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ-"Медплант" по ТУ 9438-001-91531720-2011	ФСР 2012/13255	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
5	Воротник-шина шейная для детей (либо комплект шин)	1 шт.	Комплект заготовок из гофрированного картона с водоотталкивающей пропиткой для моментального изготовления на месте происшествия шин транспортных для иммобилизации конечностей и шейного отдела позвоночника КЗШТ-"Омнимед" по ТУ 9398-024-43018878-2003	ФСР 2008/02955	ООО ППИЦ «Омнимед», (Россия)
			Комплект шин для иммобилизации шейного отдела позвоночника типа Шанца ВШ по ТУ 9438-002-16895134-2003	ФСР 2010/08382	ООО «Медикон», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» по ТУ 9398-041-00149535-2006	ФСР 2012/13201	ООО «Объединение Альфапластик», (Россия)
6	Жгут кровоостанавливающий	2 шт.	Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10	ФСР 2010/07432	ООО НПФ «МИРАЛ», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий ЖК-"Медплант" по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014. Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-"Медплант"; Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-"Медплант"	РЗН 2014/2113	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007	ФСР 2007/00032	ООО «Объединение Альфапластик», (Россия)

7	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, прямой, 160мм	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной зажим кровоостанавливающий	ФСЗ 2010/07357	«СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ», (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): прямой	ФСЗ 2012/12517	«Саммар Интернешнл», (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011. Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №2; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
8	Игла атравматическая	2 шт.	Иглы атравматические однократного применения, прямые и изогнутые по ТУ 9398-003-24648800-2011	ФСР 2008/03992	Общество с ограниченной ответственностью "Волоть", (Россия)
			Иглы атравматические однократного применения стерильные ИАКПл «ВОЛОТЬ» с нитями хирургическими по ТУ 9432-002-24648800-2010	ФСР 2010/07849	ООО "Волоть", (Россия)
			Иглы атравматические длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными по ТУ 9432-003-47295014-2005	ФСР 2008/03571	ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)
9	Иглодержатель общехирургический	1 шт.	Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-286-07613444-2010: держатели	ФСР 2010/08119	ОАО "Медико-инструментальный завод им. М. Горького", (Россия)
			Инструменты медицинские хирургические зажимные. Иглодержатель общехирургический, с твердосплавными пластинами, 160мм. Иглодержатель общехирургический, с твердосплавными пластинами, 200мм. Иглодержатель для атравматических игл, детский, 200мм	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (зажимные): держатели	ФСЗ 2012/12517	«Саммар Интернешнл», (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные): Иглодержатели: стандартные, с твердосплавными вставками	РЗН 2013/598	"Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
10	Комплект повязок разгружающих для верхней конечности (повязка косыночная)	10 шт.	Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ-"Медплант" по ТУ 9438-001-91531720-2011: ПКд-01, ПКу-10, ПКв-01	ФСР 2012/13255	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Комплекты шин транспортных складных по ТУ 9438-016-43018878-2005: ПКс; ПКд; ПКб	ФСР 2010/08612	ООО ПШИЦ "Омнимед", (Россия)
			Повязка из эластичного полотна косыночного типа для фиксации предплечья К-Трио-МИД по ТУ 9396-003-48508104-01	ФСР 2011/10261	ООО "Интерлин", (Россия)
11	Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см х 5 м)	1 шт.	Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский	ФСЗ 2008/01442	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", (КНР)
			Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе "Импэкс-Мед"	ФСЗ 2008/02807	"Чангжоу Хуалинь Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.", (Китай)
			Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009: полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием или без него, намотанная на картонную или пластмассовую шпулю (катушка) 500х2,0 см	ФСР 2009/05363	АО "ВЕРОФАРМ", (Россия)
			Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	ФСЗ 2008/01959	«ФармЛайн Лимитед», (Великобритания)
			Лейкопластырь медицинский фиксирующий	ФСЗ 2011/09593	«Чангжоу Хуалинь Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», (КНР)
12	Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л)	1 шт.	Полиэтиленовые пакеты одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А (ПО-01 "МедПак"), Б (ПО-02 "МедПак") по ТУ 9464-001-84354588-2008	ФСР 2008/02806	ООО «МедПак», (Россия)
13	Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л)	1 шт.			
14	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.	Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010: ножницы	ФСР 2010/07370	ОАО «МИЗ им. М. Горького», (Россия)
			Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ФСЗ 2012/13136	"ХОБРИ ИНТЕРНЭШНЛ", (Пакистан)
			Ножницы медицинские для разрезания повязок по Листеру, размеры 14,5 см, 18,0 см	РЗН 2015/2724	"Джерман Хелскере Индастрие (ПВТ)ЛТД", (Пакистан)
			Инструменты медицинские режущие: ножницы	ФСЗ 2012/12515	«Саммар Интернешнл», (Пакистан)
			Инструменты медицинские хирургические режущие: ножницы	ФСЗ 2008/02888	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструменты режущие с острой (режущей) кромкой	РЗН 2013/592	"Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)

15	Пакет гипотермический	2 шт	Пакет охлаждающий (гипотермический) для оказания первой медицинской помощи "АППОЛО" по ТУ 9398-014-42965160-2011	ФСР 2011/12263	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» по ТУ 9398-003-10973749-2016; пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №1; пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №2.	ФСР 2007/01584	ООО «Предприятие «ФЭСТ», (Россия)
16	Пакет перевязочный медицинский стерильный	3 шт	Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93	ФСР 2008/03791	ООО «ИНГ АКАМФ», (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93	ФСР 2010/08699	ООО «ПО «МЕДТЕКС», (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский по ГОСТ 1179-93	ФСР 2010/07563	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Пакеты перевязочные медицинские стерильные по ГОСТ 1179-93 следующих типов: пакет индивидуальный, пакет первой помощи с одной подушечкой	РЗН 2014/1656	ООО ПКФ "Пioneer", (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный по ГОСТ 1179	ФСР 2009/05126	ООО "Предприятие "ФЭСТ", (Россия)
			Пакеты перевязочные медицинские стерильные в следующих исполнениях: индивидуальный, обыкновенный, первой помощи с одной подушечкой и первой помощи с двумя подушечками по ГОСТ 1179-93	ФСР 2007/01319	ООО "ПКЦ СпецТехСбыт", (Россия)
17	Перчатки медицинские нестерильные смотровые	5 пар	Перчатки смотровые латексные нестерильные опудренные и неопудренные	ФСЗ 2010/06671	«Тан Син Лиан Индастриз Сдн. Бхд», (Малайзия)
			Перчатки диагностические из натурального и синтетического латекса нестерильные с текстурированной поверхностью, с гладкой поверхностью, опудренные и неопудренные	ФСЗ 2009/05162	«ТОП ГЛАВ СДН. БХД», (Малайзия)
			1. Перчатки латексные опудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovu». 2. Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovu». 3. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovu».	ФСЗ 2011/10210	«Макстер Глов Мануфакчуринг СДН БХД (229862-Х)», (Малайзия)
			Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные	ФСЗ 2009/05130	Топ Глав Сдн Бхд, (Малайзия)
			Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: латексные, виниловые, нитриловые (опудренные и неопудренные, гладкие и текстурированные), особочные удлиненные	ФСЗ 2011/09747	"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", (Германия)
			Перчатки хирургические стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2007	ФСР 2007/00196	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
18	Перчатки хирургические стерильные	2 пары	Перчатки латексные хирургические стерильные по ТУ 9398-001-70224340-2008	ФСР 2008/02982	ООО «Фарм-Глобал», (Россия)
			Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные одноразовые торговой марки «Medic-Dent»	ФСЗ 2011/10210	«Макстер Глов Мануфакчуринг СДН БХД (229862-Х)», (Малайзия)
			Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса опудренные. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные. Перчатки хирургические стерильные из синтетического латекса неопудренные по ТУ 9398-002-54854000-2011	ФСР 2011/12244	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
19	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (размер не менее 12,5 см x 11,0 см)	16 шт.	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К. Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00	ФСР 2009/05438	ООО «М.К. Асептика», (Россия)
			Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013	РЗН 2014/1695	ООО "Фармэль", (Россия)
			Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта, одноразовая по ТУ 9393-006-56334457-2008	ФСР 2008/03704	ООО «Лейко», (Россия)
			Салфетки спиртовые стерильные по ТУ 9393-004-52707619-2006	ФСР 2007/01592	ООО "ЭВТЕКС", (Россия)
			Салфетки дезинфицирующие для инъекций из нетканого материала пропитанного 70% водно-спиртовым раствором, одноразовые по ТУ 9393-001-58716163-2003	ФСР 2008/02512	ООО «НПФ «Медтехмаркет», (Россия)
			Салфетки антимикробные из трикотажного полотна, стерильные "Активтекс" по ТУ 9393-001-83188142-2008; Активтекс-Х с хлорексидином	ФСР 2009/06117	ООО "АЛЬТЕКС", (Россия)

20	Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см x 14 см, N 10)	1 уп.	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16x14 см	ФСР 2008/03219	ООО «АПСАНА», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские по ГОСТ 16427-93 типоразмеры: 16 см x 14 см.	ФСР 2009/05213	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16x14 см	ФСР 2008/03225	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 в следующих исполнениях: четырехслойные (16 см x 14 см) стерильные; двухслойные (16 см x 14 см) стерильные; однослойные (16 см x 14 см) стерильные.	ФСР 2011/11141	ООО «НБЮФАРМ», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16x14 см.	ФСР 2011/12069	ООО ПКФ "Ахтамар", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16x14 см.	ФСР 2007/01316	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
21	Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 45 см x 29 см)	2 уп.	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 45x29 см.	ФСР 2008/03219	ООО «АПСАНА», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские по ГОСТ 16427-93 типоразмеры: 45смx29 см	ФСР 2009/05213	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 45x29 см.	ФСР 2008/03225	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 в следующих исполнениях: четырехслойные (45смx29 см) стерильные; двухслойные (45смx29 см) стерильные; однослойные (45смx29 см) стерильные.	ФСР 2011/11141	ООО «НБЮФАРМ», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 45x29 см.	ФСР 2011/12069	ООО ПКФ "Ахтамар", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 45x29 см.	ФСР 2007/01316	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
22	Средство перевязочное гемостатическое стерильное сорбционного действия биodeградируемое (не менее 50г)	3 шт.	Средство перевязочное гемостатическое, «ГЕМОСТОП®», стерильное по ТУ 9393-001-8152288-2009	ФСР 2010/07420	ФГУП НПЦ Фармзащита ФМБА России, (Россия)
			Средство перевязочное гемостатическое "ГЕМОСПАС" стерильное по ТУ 9393-001-40086098-2015, в индивидуальных упаковках по 50, 75 и 100 г	РЗН 2016/4680	ООО "МДК Медика", (Россия)
			Средство перевязочное гемостатическое "ГЕМОСПАС М", стерильное по ТУ 9393-002-40086098-2015, в индивидуальных упаковках по 50, 75 и 100 г	РЗН 2017/6201	ООО "МДК Медика", (Россия)
23	Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминаокапроновой кислотой (не менее 6 см x 10 см)	2 шт.	Повязка аравматичная нетканая с аминаокапроновой кислотой гемостатическая стерильная ПАГ "АППОЛО-Гем" по ТУ 9393-021-42965160-2009	ФСР 2009/05054	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)
			Салфетки гемостатические с альгинатом натрия и е-аминаокапроновой кислотой «Колетекс-АК» и с альгинатом натрия, е-аминаокапроновой кислотой и лидокаином «Колетекс-АКЛ» по ТУ 9393-019-58223785-2011	ФСР 2011/11523	ООО "КОЛТЕКС", (Россия)
24	Шины иммобилизационные (либо заготовки шин, либо комплект шин) длиной не менее 120 см	1 шт.	Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ-"Медплант" по ТУ 9438-001-91531720-2011	ФСР 2012/13255	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
25	Шины иммобилизационные (либо заготовки шин, либо комплект шин) длиной не менее 60 см	1 шт.	Комплект заготовок из гофрированного картона с водоотталкивающей пропиткой для моментального изготовления на месте происшествия шин транспортных для иммобилизации конечностей и шейного отдела позвоночника КЗШП-"Омнимед" по ТУ 9398-024-43018878-2003	ФСР 2008/02955	ООО ППИЦ «Омнимед», (Россия)
26	Шины иммобилизационные (либо заготовки шин, либо комплект шин) длиной не менее 80 см	1 шт.			

ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»

А.В. Пушин

« 26 » апреля 2021 г.



**НАБОР ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НИТСП-01-«МЕДПЛАНТ»
(ТУ 9437-013-52777873-2014).**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.020РЭ

*Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России

НАБОР ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НИТсп-01-«МЕДПЛАНТ»

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.020РЭ

1. Назначение

Набор травматологический для оказания скорой медицинской помощи НИТсп-01-«МЕДПЛАНТ» предназначен для оказания скорой медицинской травматологической помощи.

2. Область применения

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. Условия применения

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи.

4. Основные технические характеристики

Основные параметры и размеры наборов приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Исполнение набора	В сумке медицинской универсальной СМУ-02	В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2
Габаритные размеры, мм		(530x260x260)±50	(440x252x340)±50
Масса набора (не более), кг		6	6.7
Номинальная нагрузка (не более), кг		12	12

Средний срок службы – не менее 3 лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °C.

5. Комплект поставки

1. Сумка медицинская универсальная СМУ-02 или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 – 1 шт;
2. Комплект вложений – 1 комп. (согласно табл. 2);
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-Пм/2;
2. Столик манипуляционный для УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

6. Описание изделия

Набор травматологический для оказания скорой медицинской помощи НИТсп-01-«МЕДПЛАНТ» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов. Набор выпускается в сумке медицинской универсальной СМУ-02 или в футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2.

Сумка медицинская универсальная СМУ-02 изготовлена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ 420Д, дно сумки изготовлено из непромокаемого тентового материала, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию сумки. Для защиты вложений от механических повреждений, в стенках сумки находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из полирекса НПЭ. Для размещения вложений сумка имеет 3 кармана, основной отсек и отсек для хранения документов. На внешней части сумки расположен держатель для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и эмблема красного креста. По периметру корпуса сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток. Для удобства переноски сумка снабжена двумя ручками (для ношения одной рукой) и плечевым ремнём, со специальной накладкой, которая предохраняет его от сминания.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 (ТУ 9437-006-52777873-2010), адаптирован к данному набору. Футляр изготовлен из холодно- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок,

открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора.

На верхней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в темное время суток. Футляр надёжно защищает элементы набора от повреждений и легко обрабатывается, поэтому набор в футляре особенно удобен для частого использования.

7. Подготовка к работе и правила работы

7.1. Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав набора.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеет жёсткий каркас и защищает элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке и работе избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на сумку и рюкзак при их использовании. Чтобы исключить повреждение изделий не нагружайте их более чем на 12 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с изделием продлевает срок его службы.


ВНИМАНИЕ! Не используйте изделие, если вы не имеете достаточной квалификации!

7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить.

ВНИМАНИЕ! Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!

7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта входящего в состав футляра, как показано на рисунке 1.

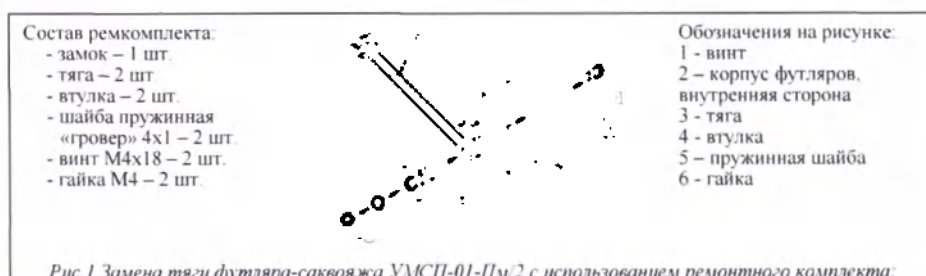

7.7. Сумки самостоятельному ремонту не подлежат.

8. Транспортирование, хранение и уход

8.1. Транспортирование набора может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75% при 15 °С.

8.2. Наборы могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой медицинской помощи в области травматологии. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. Указания по утилизации

Сумки, рюкзак и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения укладки утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. Гарантии изготовителя

11.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи.

Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2 Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, рюкзаки, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3 Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.4 В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

11.5. Рекламации направлять на адрес производителя

12. Контактная информация производителя

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, эт.2, пом. I, ком.296-318.

Телефон: 8(495)223-6016

E-mail: medplant@medplant.ru

13. Свидетельство о приёмке

Набор травматологический для оказания скорой медицинской помощи НИТсп-01-«МЕДПЛАНТ»

Наименование	Артикул
В сумке медицинской универсальной СМУ-02	
В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	

соответствует ТУ 9437-013-52777873-2014 и признан годным к эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Дата продажи:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет замечания по конструкции и составу набора – это поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

Перечень вложений, входящих в состав набора травматологического для оказания скорой медицинской помощи НИТсп-01-«МЕДПЛАНТ»

Табл. 2

N	Наименование медицинского изделия	Кол-во, не менее	Наименование изделия в соответствии с РУ	Номер РУ	Производитель
1	Комплект шин транспортных складных взрослых	1 комп.	Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ-"Медплант" по ТУ 9438-001-91531720-2011	ФСР 2012/13255	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Комплект заготовок из гофрированного картона с водоотталкивающей пропиткой для моментального изготовления на месте происшествия шин транспортных для иммобилизации конечностей и шейного отдела позвоночника КЗШТ-"Омнимед" по ТУ 9398-024-43018878-2003	ФСР 2008/02955	ООО ППИЦ «Омнимед», (Россия)
2	Шина-воротник взрослого (либо комплект шин-воротников)	1 шт.	Комплект шин транспортных иммобилизационных складных КШТИ-"Медплант" по ТУ 9438-001-91531720-2011	ФСР 2012/13255	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Комплект заготовок из гофрированного картона с водоотталкивающей пропиткой для моментального изготовления на месте происшествия шин транспортных для иммобилизации конечностей и шейного отдела позвоночника КЗШТ-"Омнимед" по ТУ 9398-024-43018878-2003	ФСР 2008/02955	ООО ППИЦ «Омнимед», (Россия)
			Комплект шин для иммобилизации шейного отдела позвоночника типа Шанца ВШ по ТУ 9438-002-16895134-2003	ФСР 2010/08382	ООО «Медикон», (Россия)
3	Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, прямой, 160мм	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий	ФСЗ 2010/07357	«СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ», (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): прямой	ФСЗ 2012/12517	«Саммар Интернешенл», (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый №2; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	1 шт.	Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» по ТУ 9398-041-00149535-2006	ФСР 2012/13201	ООО «Объединение Альфапластик», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10	ФСР 2010/07432	ООО НПФ «МИРАЛ», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий ЖК-"Медплант" по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014; Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-"Медплант"; Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-"Медплант"	РЗН 2014/2113	ООО «МЕДПЛАНТ» (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007	ФСР 2007/00032	ООО «Объединение Альфапластик», (Россия)
5	Пакет гипотермический	2 шт.	Пакет охлаждающий (гипотермический) для оказания первой медицинской помощи "АППОЛО" по ТУ 9398-014-42965160-2011	ФСР 2011/12263	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» по ТУ 9398-003-10973749-2016; пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №1; пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №2.	ФСР 2007/01584	ООО «Предприятие «ФЭСТ», (Россия)
6	Игла атравматическая со стерильной нитью	1 шт.	Иглы атравматические однократного применения, прямые и изогнутые по ТУ 9398-003-24648800-2011	ФСР 2008/03992	Общество с ограниченной ответственностью "Волоть", (Россия)
			Иглы атравматические однократного применения стерильные ИАКПл «ВОЛОТЬ» с нитями хирургическими по ТУ 9432-002-24648800-2010	ФСР 2010/07849	ООО "Волоть", (Россия)
			Иглы атравматические длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными по ТУ 9432-003-47295014-2005	ФСР 2008/03571	ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)

7	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м. х 10 см.	2 шт.	Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 10см; 7м х 14см.	ФСР 2011/12237	ООО «Фарм-Глобал», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 10см; 7м х 14см.	ФСР 2007/01317	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 10см; 7м х 14см.	ФСР 2007/00081	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 10см; 7м х 14см.	ФСР 2010/08705	ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 10см; 7м х 14см.	ФСР 2010/06612	ООО "НЬЮФАРМ", (Россия)
8	Бинт марлевый медицинский стерильный 7 м. х 14 см.	4 шт.	Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014 следующих типоразмеров: 5м х 10см; 7м х 14см.	РЗН 2015/2558	ООО "ХБК Навтекс", (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 10см; 7м х 14см.	РЗН 2015/2552	ООО "ХБК Навтекс", (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 10см; 7м х 14см.	ФСР 2009/05650	ООО "Лейко", (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м х 10см; 7м х 14см.	ФСР 2008/03226	ООО "ПКФ ВераМед", (Россия)
9	Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный (№3, №4, №6)	3 шт.	Бинты медицинские эластичные сетчато-трубчатые фиксирующие по ТУ 9393-027-42965160-2005	ФСР 2010/07995	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)
			Бинт эластичный трубчатый медицинский нестерильный "ФЭСТ" по ТУ 9393-006-10973749-2015	ФСР 2009/05993	ООО «Предприятие «ФЭСТ», (Россия)
			Бинты медицинские эластичные модели ELAST: трубчатые	ФСЗ 2008/02390	ООО "ТОНУС ЭЛАСТ", (Латвия)
			Бинты эластичные трубчатые латексно-полиэфирные "ИНТЕКС" по ТУ 9393-007-46838010-2001	ФСР 2010/06795	ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп», (Россия)
10	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 см х 14 см	1 уп.	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2008/03219	ООО «АПСАНА», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские по ГОСТ 16427-93 типоразмеры: 16 см х 14 см.	ФСР 2009/05213	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2008/03225	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 в следующих исполнениях: четырехслойные (16 см х 14 см) стерильные; двухслойные (16 см х 14 см) стерильные; однослойные (16 см х 14 см) стерильные	ФСР 2011/11141	ООО "НЬЮФАРМ", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2011/12069	ООО ПКФ "Ахтамар", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2007/01316	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
11	Салфетка марлевая медицинская стерильная 45 см х 29 см	1 уп.	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 45х29 см.	ФСР 2008/03219	ООО «АПСАНА», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские по ГОСТ 16427-93 типоразмеры: 45смх29 см.	ФСР 2009/05213	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 45х29 см.	ФСР 2008/03225	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 в следующих исполнениях: четырехслойные (45смх29 см) стерильные; двухслойные (45смх29 см) стерильные; однослойные (45смх29 см) стерильные.	ФСР 2011/11141	ООО "НЬЮФАРМ", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 45х29 см.	ФСР 2011/12069	ООО ПКФ "Ахтамар", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 45х29 см.	ФСР 2007/01316	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)

12	Пакет перевязочный медицинский стерильный	3 шт	Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93	ФСР 2008/03791	ООО «ИНГАКАМФ», (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93	ФСР 2010/08699	ООО «ПО «МЕДТЕКС», (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский по ГОСТ 1179-93	ФСР 2010/07563	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Пакеты перевязочные медицинские стерильные по ГОСТ 1179-93 следующих типов: пакет индивидуальный; пакет первой помощи с одной подушечкой	РЗН 2014/1656	ООО ПКФ «Пионер», (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный по ГОСТ 1179	ФСР 2009/05126	ООО «Предприятие "ФЭСТ", (Россия)
			Пакеты перевязочные медицинские стерильные в следующих исполнениях: индивидуальный; обыкновенный; первой помощи с одной подушечкой и первой помощи с двумя подушечками по ГОСТ 1179-93	ФСР 2007/01319	ООО «ПКЦ СпецТехСбыт», (Россия)
13	Салфетка асептическая кровоостанавливающая	10 шт.	Салфетки гемостатические из нетканого материала с липкими краями и без, стерильные "Колетекс-гем" по ТУ 9393-008-58223785-2005	ФСР 2010/08240	ООО «КОЛЕТЕКС», (Россия)
			Повязки гемостатические с лекарственными средствами стерильные "Гемотекс" по ТУ 9393-004-40383494-2002	ФСР 2009/06480	ООО «АЛЬТЕКС», (Россия)
14	Лейкопластырь ленточный	1 шт.	Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский	ФСЗ 2008/01442	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", (КНР)
			Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе "Импэкс-Мед"	ФСЗ 2008/02807	"Чангжоу Хуалиань Хэле Дрессинг Ко., Лтд.", (Китай)
			Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009: полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием или без него, намотанная на картонную или пластмассовую шпулю (катушка) 500x2,0 см	ФСР 2009/05363	АО «ВЕРОФАРМ», (Россия)
			Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	ФСЗ 2008/01959	«ФармЛайн Лимитед», (Великобритания)
			Лейкопластырь медицинский фиксирующий	ФСЗ 2011/09593	«Чангжоу Хуалиань Неалф Дрессинг Ко., Лтд.», (КНР)
15	Ножницы медицинские для разрезания повязок по Листеру	1 шт	Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010: ножницы	ФСР 2010/07370	ОАО «МИЗ им. М Горького», (Россия)
			Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ФСЗ 2012/13136	"ХОБРИ ИНТЕРНЭШНЛ", (Пакистан)
			Ножницы медицинские для разрезания повязок по Листеру, размеры 14,5 см; 18,0 см	РЗН 2015/2724	"Джерман Хелскере Индастрие (ПВТ)ЛТД.", (Пакистан)
			Инструменты медицинские режущие: ножницы	ФСЗ 2012/12515	«Саммар Интернэшнл», (Пакистан)
			Инструменты медицинские хирургические режущие: ножницы	ФСЗ 2008/02888	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
16	Перчатки хирургические стерильные	2 пары	Инструменты режущие с острой (режущей) кромкой	РЗН 2013/592	"Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
			Перчатки хирургические стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2007	ФСР 2007/00196	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
			Перчатки латексные хирургические стерильные по ТУ 9398-001-70224340-2008	ФСР 2008/02982	ООО «Фарм-Глобал», (Россия)
			Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные одноразовые торговой марки «Medic-Dent»	ФСЗ 2011/10210	«Макетер Глов Мануфактуринг СДН БХД (229862-Х)», (Малайзия)
17	Перчатки смотровые нестерильные	5 пар	Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса опудренные. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные. Перчатки хирургические стерильные из синтетического латекса неопудренные по ТУ 9398-002-54854000-2011	ФСР 2011/12244	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
			Перчатки смотровые латексные нестерильные опудренные и неопудренные	ФСЗ 2010/06671	«Тан Син Лиан Индастриз Сдн. Бхд.», (Малайзия)
17	Перчатки смотровые нестерильные	5 пар	Перчатки диагностические из натурального и синтетического латекса нестерильные с текстурированной поверхностью, с гладкой поверхностью, опудренные и неопудренные	ФСЗ 2009/05162	«ТОП ГЛАВ СДН БХД.», (Малайзия)

			1. Перчатки латексные опудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovy». 2. Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovy». 3. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovy».	ФСЗ 2011/10210	«Макстер Глов Маньюфакчуринг СДН БХД (229862-Х)», (Малайзия)
			Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные	ФСЗ 2009/05130	Топ Глав Сдн Бхд, (Малайзия)
			Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: латексные, виниловые, нитриловые (опудренные и неопудренные, гладкие и текстурированные), особопрочные удлиненные.	ФСЗ 2011/09747	"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", (Германия)
18	Салфетка дезинфицирующая для обработки рук	6 шт.	Салфетки дезинфицирующие для инъекций из нетканого материала пропитанного 70% водно-спиртовым раствором, одноразовые по ТУ 9393-001-58716163-2003	ФСР 2008/02512	ООО «НПФ «Медтехмаркет», (Россия)
			Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М.К Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00	ФСР 2009/05438	ООО «М.К. Асептика», (Россия)
			Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта, одноразовая по ТУ 9393-006-56334457-2008	ФСР 2008/03704	ООО «Лейко», (Россия)
			Салфетки антимикробные из трикотажного полотна, стерильные "Активтекс" по ТУ 9393-001-83188142-2008); Активтекс-Х с хлоргексидином	ФСР 2009/06117	ООО "АЛЪТЕКС", (Россия)
			Салфетки спиртовые стерильные по ТУ 9393-004-52707619-2006	ФСР 2007/01592	ООО "ЭВТЕКС", (Россия)
			Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013	РЗН 2014/1695	ООО "Фармэль", (Россия)
19	Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л)	5 шт.	Полиэтиленовые пакеты одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А (ПО-01 "МедПак"), по ТУ 9464-001-84354588-2008	ФСР 2008/02806	ООО «МедПак», (Россия)

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 8

цифрами

(восемь)

прописью

1) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПУШИН А.В.

должность, ФИО



ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»

_____ А.В. Пушин
« 26 » апреля 2021 г.



**НАБОР ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НИСМПТ-02-«МЕДПЛАНТ»
(ТУ 9437-013-52777873-2014).**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.018РЭ

*Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России

НАБОР ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НИСМПт-02-«МЕДПЛАНТ»

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.018РЭ

1. Назначение

Набор токсикологический для оказания скорой медицинской помощи НИСМПт-02-«МЕДПЛАНТ» предназначен для оказания скорой медицинской токсикологической помощи.

2. Область применения

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. Условия применения

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи

4. Основные технические характеристики

Основные параметры и размеры наборов приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Серия	В сумке медицинской универсальной СМУ-01	В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2
Габаритные размеры, мм		(370x175x310)±50	(440x252x340) ±50
Масса набора (не более), кг		2,6	3,6
Номинальная нагрузка (не более), кг		9	12

Средний срок службы – не менее 3 лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °C.

5. Комплект поставки

1. Сумка медицинская универсальная СМУ-01 или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 – 1 шт.;
2. Комплект вложений – 1 комп. (согласно табл. 2);
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-Пм/2;
2. Столик манипуляционный для УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

6. Описание изделия

Набор токсикологический для оказания скорой медицинской помощи НИСМПт-02-«МЕДПЛАНТ» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов. Набор выпускается в сумке медицинской универсальной СМУ-01 или в футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2.

Сумка медицинская универсальная СМУ-01 изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, раскрывается с помощью застёжки-молнии и раскладывается на две одинаковые по толщине половины. Внутри сумки расположены вкладыши для размещения вложений. При необходимости элементы набора можно зафиксировать резинками. Сумка имеет две ручки для ношения одной рукой (сверху и сбоку), ремень для ношения через плечо. На ремне предусмотрена специальная накладка, которая предохраняет его от сминания. На боковой стенке сумки имеется бирочное окошко для информационной таблички. Вдоль корпуса сумки проходит светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 (ТУ 9437-006-52777873-2010), адаптирован к данному набору. Футляр изготовлен из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну

надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора. На верхней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в темное время суток. Футляр надёжно защищает элементы набора от повреждений и легко обрабатывается, поэтому набор в футляре особенно удобен для частого использования.

7. Подготовка к работе и правила работы

7.1. Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав набора.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеет жёсткий каркас и защищает элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке и работе избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на сумку и рюкзак при их использовании. Чтобы исключить повреждение изделий не нагружайте футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 более чем на 12 кг, а сумку медицинскую универсальную СМУ-01 более чем на 9 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с изделием продлевает срок его службы.

ВНИМАНИЕ! Не используйте изделие, если вы не имеете достаточной квалификации!

7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить.


ВНИМАНИЕ! Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!

7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта входящего в состав футляра, как показано на рисунке 1.

Состав ремкомплекта:

- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4х1 – 2 шт.
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.

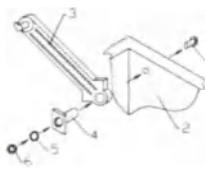

обозначения на рисунке:

- 1 - винт;
- 2 - корпус укладки, внутренняя сторона
- 3 - тяга
- 4 - втулка
- 5 - пружинная шайба
- 6 - гайка

Рис. 1 Замена тяги футляра-саквояжа УМСП-01-Пм/2 с использованием ремонтного комплекта

7.7. Сумки самостоятельному ремонту не подлежат.

8. Транспортирование, хранение и уход

8.1. Транспортирование набора может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75% при 15 °С.

8.2. Наборы могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой реанимационной медицинской помощи в области токсикологии. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. Указания по утилизации

Сумки, рюкзак и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения укладки утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. Гарантии изготовителя

11.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи.

Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2 Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, рюкзаки, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3 Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.4 В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

11.5 Рекламации направлять на адрес производителя

12. Контактная информация производителя

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318.

Телефон: 8(495)223-6016

E-mail: medplant@medplant.ru

13. Свидетельство о приёмке:

Набор токсикологический для оказания скорой медицинской помощи НИСМПт-02-«МЕДПЛАНТ»

Наименование	Артикул
В сумке медицинской универсальной СМУ-01	
В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	

соответствует ТУ 9437-013-52777873-2014 и признан годным к эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Штамп ОТК:

Дата продажи:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу набора – это поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

Перечень вложений, входящих в состав набора токсикологического для оказания скорой медицинской помощи НИСМП-02-«МЕДПЛАНТ»

Табл. 2

N	Наименование медицинского изделия	Кол-во, не менее	Наименование изделия в соответствии с РУ	Номер РУ	Производитель
1	Груша резиновая (спринцовка) или шприц типа Жане	1 шт.	Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные с наконечниками полиэтиленовыми типа Б по ТУ 2537-010-26528997-10	ФСР 2010/07433	ООО НПФ «МИРАЛ», (Россия)
			Спринцовки пластизольные "Виталфарм" по ТУ 9464-005-50887801-2008	ФСР 2008/03467	ЗАО "Виталфарм", (Россия)
			Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005	ФСР 2010/08648	АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)
			Шприцы для промывания полостей с наконечником для катетерной насадки, объемом 150мл; Шприцы для промывания полостей с наконечником типа Луер, объемом 150мл	ФСЗ 2012/11952	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные по ТУ 32.50.13-001-96673695-2017	ФСР 2010/07710	ООО "МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН", (Россия)
			Шприц однократного применения по ТВНЛ.942311.025 ТУ, вместимостью 150 мл: с катетерным наконечником, с наконечником "Луер-лок"	РЗН 2017/6650	ООО «МИМ», (Россия)
2	Зонд желудочный (в стерильной упаковке, разных размеров)	6 шт.	Зонды APEXMED: желудочный, аспирационный	ФСЗ 2008/02867	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды); "Цзянсу Кангзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Зонд полимерный желудочный одноразовый стерильный по ТУ 9398-164-05519988-2004	ФСР 2009/05817	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Зонд желудочный	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Катетер (зонд) желудочный	ФСЗ 2008/02333	"КонваТек Лимитед", (Соединенное Королевство)
			Катетеры медицинские однократного применения по ТУ BY 190682947 002-2008: катетер питающий - Feeding tube, катетер (зонд) желудочный - Stomach tube	ФСЗ 2010/06636	ООО "Ассомедика" (Республика Беларусь)
			Катетеры медицинские однократного применения Inekta. Катетер желудочный.	ФСЗ 2012/12814	"Нинбо Гринмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетеры медицинские желудочно-кишечные однократного применения MEDEREN	РЗН 2018/7433	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
3	Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л)	1 шт.	Полиэтиленовые пакеты одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А (ПО-01 "МедПак"), Б (ПО-02 "МедПак") по ТУ 9464-001-84354588-2008	ФСР 2008/02806	ООО «МедПак», (Россия)
4	Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л)	1 шт.			
5	Перчатки медицинские нестерильные смотровые	5 пар	Перчатки смотровые латексные нестерильные опудренные и неопудренные	ФСЗ 2010/06671	«Тан Син Лиан Индастриз Сдн. Бхд», (Малайзия)
			Перчатки диагностические из натурального и синтетического латекса нестерильные с текстурированной поверхностью, с гладкой поверхностью, опудренные и неопудренные	ФСЗ 2009/05162	«ТОП ГЛАВ СДН. БХД», (Малайзия)
			1. Перчатки латексные опудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovy». 2. Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovy». 3. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Benovy».	ФСЗ 2011/10210	«Макстер Глов Маньюфакчуринг СДН БХД (229862-Х)», (Малайзия)
			Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные	ФСЗ 2009/05130	Топ Глав Сдн Бхд, (Малайзия)
			Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: латексные, виниловые, нитриловые (опудренные и неопудренные, гладкие и текстурированные), особопрочные удлиненные	ФСЗ 2011/09747	"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", (Германия)

6	Роторасширитель	1 шт.	Роторасширитель винтовой одноразовый	РЗН 2021/13297	"Сямьнь Компауэр Медикал Тек. Ко., Лтд.", (Китай)
			Инструменты оттесняющи. Расширители ротовые	РЗН 2013/591	"Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
			Роторасширитель винтовой. Гладилка двусторонняя, серповидная и дистальная № 6.	ФСЗ 2008/02886	«СУРДЖИВЕЛЛ», (Пакистан)
7	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (размер не менее 12,5 см x 11,0 см)	6 шт.	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М К Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, типоразмер, мм: 110x125; 115x250; 120x150; 125x125; 125x150; 130x150; 130x180; 130x200; 135x145; 135x185; 135x200; 140x190; 140x200; 150x150; 150 x 200	ФСР 2009/05438	ООО «М К Асептика», (Россия)
			Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013 следующих типоразмеров: 135x185 мм, 110x125 мм.	РЗН 2014/1695	ООО "Фармэль", (Россия)
			Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта, одноразовая по ТУ 9393-006-56334457-2008	ФСР 2008/03704	ООО «Лейко», (Россия)
			Салфетки спиртовые стерильные по ТУ 9393-004-52707619-2006	ФСР 2007/01592	ООО "ЭВТЕКС", (Россия)
			Салфетки дезинфицирующие для инъекций из нетканого материала пропитанного 70% водно-спиртовым раствором, одноразовые по ТУ 9393-001-58716163-2003	ФСР 2008/02512	ООО «НПФ «Медтехмаркет», (Россия)
			Салфетки антимикробные из трикотажного полотна, стерильные "Активтекс" по ТУ 9393-001-83188142-2008); Активтекс-Х с хлоргексидином	ФСР 2009/06117	ООО "АЛЪТЕКС", (Россия)
8	Шприц инъекционный однократного применения 20 мл	1 шт.	Шприцы инъекционные однократного применения, стерильные по ТУ 32.50.13-001-25597097-2005	ФСР 2010/07477	АО «Медполимер ЛТД», (Россия)
			Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008	ФСР 2008/03253	ООО «Стерин», (Россия)
			Шприцы стерильные инъекционные однократного применения с иглами	ФСЗ 2009/05672	«СФ Медикал Продактс ГмбХ», (Германия)
			Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005	ФСР 2010/08648	АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)
			Шприцы одноразовые стерильные АРЕХМЕД объемом, мл: 20	ФСЗ 2008/02859	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды), "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Шприцы одноразовые трехдетальные стерильные объемом 20 мл с иглами	ФСЗ 2011/09587	"Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Шприцы одноразовые стерильные с иглами и без игл SITEKMED	ФСЗ 2007/00530	"Шаньдун Жибо Шанчжоань Медикал Инструментс Ко. Лтд.", (Китай)
			Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные по ТУ 32.50.13-001-96673695-2017	ФСР 2010/07710	ООО "МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН", (Россия)
			Шприцы инъекционные одноразовые с иглами и без игл, объемом 20мл	ФСЗ 2008/02301	"Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Эплианс Ко. Лтд", (Китай)
9	Языкодержатель	1 шт.	Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
			Языкодержатели	РЗН 2013/598	"Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
Прочие средства					
10	Воронка пластмассовая	2 шт.	-	-	ООО «Бытпласт», (Россия)
11	Фиксатор рук пациента	1 комп.	-	-	ООО «МЕДПЛАНТ» (Россия)

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 6
цифрами

(шесть
прописью

) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПУШИН А.В.


должность, ФИО



ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»

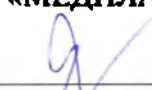
А.В. Пушин
« 26 » апреля 2021 г.



**НАБОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НИП-02-«МЕДПЛАНТ»
(ТУ 9437-013-52777873-2014).**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.016РЭ

*Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

ОКПД2 32.50.13.190

ТУ 9437-013-52777873-2014

Рег. уд. № РЗН 2015/2746 от от __.__.20__ г.

ООО «МЕДПЛАНТ»

Набор реанимационный педиатрический
для оказания скорой медицинской помощи

НИП-02-«МЕДПЛАНТ»

ТУ 9437-013-52777873-2014

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛКЯМ.942439.016РЭ

Ver.013

Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Сделано в России

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	1
2. Область применения.....	1
3. Условия применения.....	1
4. Основные технические характеристики.....	1
5. Комплект поставки.....	1
6. Описание изделия.....	2
7. Подготовка к работе и правила работы с укладкой.....	3
8. Транспортирование, хранение и уход.....	4
9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия.....	4
10. Указания по утилизации.....	4
11. Гарантии производителя.....	4
12. Контактная информация производителя	4
13. Свидетельство о приёмке	5
Перечень вложений укладки.....	5

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи **НИП-02-«МЕДПЛАНТ»** предназначен для оказания скорой медицинской педиатрической помощи.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры наборов приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Серия	В сумке реанимационной СР-03	В сумке медицинской универсальной СМУ-02	В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	В рюкзаке медицинском универсальном РМУ-04
Параметр				
Габаритные размеры, мм	(500x255x280) ±50	(530x260x260)±50	(440x252x340) ±50	(350x270x530) ±50
Масса набора (не более), кг	5,6	5,5	6,5	7,1
Номинальная нагрузка (не более), кг	12	12	12	12

Средний срок службы: не менее 3 лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °C.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сумка реанимационная СР-03, или Сумка медицинская универсальная СМУ-02, или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2, или Рюкзак медицинский универсальный РМУ-04 – 1 шт;
2. Комплект вложений – 1 компл. (согласно табл. 2)*;
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-Пм/2;
2. Столик манипуляционный для УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

* - допускается расширение и сокращение позиций комплекта вложений по согласованию с заказчиком. В этом случае комплект вложений согласно приложению к РЭ.

6. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи НИП-02-«МЕДПЛАНТ» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов. Набор выпускается: в сумке реанимационной СР-03; в сумке медицинской универсальной СМУ-02; в футляре-саквояже УМСП-02-Пм/2; в рюкзаке медицинском универсальном РМУ-04.

Сумка реанимационная СР-03

Имеет специальную конструкцию и обеспечивает защиту вложений при хранении, их удобное расположение и быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, в стенках сумки в специальных карманах находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из ПВХ-пластика и изолона ППЭ. На внешней стороне крышки сумки расположен отдельный отсек (на молнии) с держателем для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и карманом для бланков и других бумаг. Внутри сумки под крышкой расположен встроенный ампулярий для ампул разного размера (общим кол-вом 56 мест) и сетка для удобного расположения расходных материалов. Дополнительная пряжка на плечевом ремне и накладка предохраняет ремень от сминания.

Сумка медицинская универсальная СМУ-02

Изготовлена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ 420Д, дно сумки изготовлено из непромокаемого тентового материала, что обеспечивает хорошую влагоизоляцию сумки. Для защиты вложений от механических повреждений, в стенках сумки находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из полирекса НПЭ. Для размещения вложений сумка имеет 3 кармана, основной отсек и отсек для хранения документов. На внешней части сумки расположен держатель для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и эмблема красного креста. По периметру корпуса сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток. Для удобства переноски сумка снабжена двумя ручками (для ношения одной рукой) и плечевым ремнём, со специальной накладкой, которая предохраняет его от сминания.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2

(ТУ 9437-006-52777873-2010)

Адаптирован к данному набору. Футляр изготовлен из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора. На верхней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в темное время суток. Футляр надёжно защищает элементы набора от повреждений и легко обрабатывается, поэтому набор в футляре особенно удобен для частого использования.

Рюкзак медицинский универсальный РМУ-04

Изготовлен из синтетической ткани ПВХ 420Д, в стенках рюкзака находятся каркасные элементы из полирекса НПЭ. Часть корпуса рюкзака выполнена из специальной тентовой ткани для лучшей защиты вложений от влаги и загрязнений при работе на земле. С внешней стороны рюкзак имеет 2 больших кармана, внутри рюкзака вложения упаковываются в 6 съёмных модульных отделений с прозрачным верхом. Для удобства ношения рюкзака на спине имеются широкие удобные плечевые лямки, для ношения одной рукой рюкзак снабжен 2 пластиковыми ручками, на верхней части рюкзака и сбоку, также рюкзак можно носить на одном плече с помощью плечевого ремня. На корпусе рюкзака расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток, эмблема красного креста и бирочное окошко для указания номера бригады.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С УКЛАДКОЙ

7.1. Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав укладки.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеет жёсткий каркас и защищает элементы укладки от повреждений. Однако, при транспортировке укладки и работе с ней избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов укладки и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на сумку и рюкзак при их использовании. Чтобы исключить повреждение изделий не нагружайте их более чем на 12 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с укладкой продлевает срок ее службы.

ВНИМАНИЕ!

● Не используйте укладку, если вы не имеете достаточной квалификации!


7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить.

ВНИМАНИЕ!

● Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!

7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта, входящего в состав футляра, как показано на Рисунке 1.

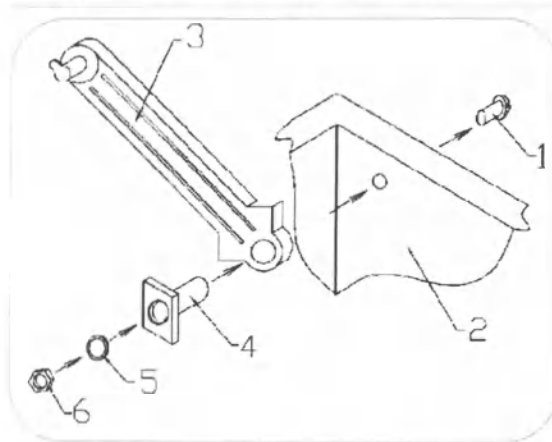

Состав ремкомплекта:

- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4х1 – 2 шт.
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.

Обозначения на рисунке:

- 1 – винт;
- 2 – корпус футляров, внутренняя сторона
- 3 – тяга
- 4 – втулка
- 5 – пружинная шайба
- 6 – гайка

Рис. 1 Замена тяги футляра-саквояжа УМСП-01-Пм/2 с использованием ремонтного комплекта

7.7. Сумки и рюкзаки самостоятельному ремонту не подлежат.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УХОД

8.1. Транспортирование укладки может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75% при 15 °С.

8.2. Укладки могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

ВНИМАНИЕ!

● Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой реанимационной медицинской помощи. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сумки, рюкзак и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения укладки утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи.

Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2 Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, рюкзаки, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3 Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.4 В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, **ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!**

11.5 Рекламации направлять на адрес производителя

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016 e-mail: medplant@medplant.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Набор реанимационный педиатрический для оказания скорой медицинской помощи НИП-02-«МЕДПЛАНТ»:

Наименование	Артикул
В сумке реанимационной СР-03	
В сумке медицинской универсальной СМУ-02	
В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	
В рюкзаке медицинском универсальном РМУ-04	

Соответствует ТУ 9437-006-52777873-2014 и признана годной для эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки, что поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ УКЛАДКИ:
Таблица 2

N	Наименование медицинского изделия	Кол-во, не менее	Наименование изделия в соответствии с РУ	Номер РУ	Производитель
7.1.	Груша резиновая (спринцовка)	1 шт.	Спринцовки пластизольные поливинилхлоридные с наконечниками полиэтиленовыми типа Б по ТУ 2537-010-26528997-10	ФСР 2010/07433	ООО НПФ «МИРАП», (Россия)
			Спринцовки пластизольные "Виталфарм" по ТУ 9464-005-50887801-2008	ФСР 2008/03467	ЗАО "Виталфарм", (Россия)
7.2.	Аспиратор механический	1 шт.	Аспиратор портативный с механическим приводом АПМ-МП-1 по ТУ 9444-004-52777873-2007	ФСР 2008/02413	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Отсасыватель носной ОНП-600 по ТУ 9444-002-18859607-2009	ФСР 2009/05562	ООО «МИТК-М», (Россия)
7.3.	Зонд желудочный (в стерильной упаковке, разных размеров)	2 шт.	Зонды АРЕХМЕД: желудочный аспирационный	ФСЗ 2008/02867	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Зонд полимерный желудочный одноразовый стерильный по ТУ 9398-164-05519988-2004	ФСР 2009/05817	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Зонд желудочный (типа Левина)	ФСЗ 2008/03466	"Чжэньцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД", (Китай)
			Зонд желудочный	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Катетер (зонд) желудочный	ФСЗ 2008/02333	"КонваТек Лимитед", (Соединенное Королевство)
			Катетеры медицинские однократного применения по ТУ ВУ 190682947.002-2008: катетер питающий - Feeding tube; катетер (зонд) желудочный - Stomach tube	ФСЗ 2010/06636	ООО "Ассомедика" (Республика Беларусь)
			Катетеры медицинские однократного применения Inektal: Катетер желудочный.	ФСЗ 2012/12814	"Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетеры медицинские желудочно-кишечные однократного применения MEDEREN	РЗН 2018/7433	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
7.4.	Игла Дюфо	1 шт.	Инструменты колющие по ТУ 9432-294-07610776-2011: игла для взятия крови	ФСР 2009/05085	ОАО "Медино-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
7.5.	Комплект воздуховодов орофарингеальных (назофарингеальных) для детей (не менее 3 шт, разных размеров)	1 комп.	Воздуховод ротолоточный, одноразового использования	ФСЗ 2009/04992	"Алба Хелскеа ЛЛС", (США)
			Изделия для дыхательной и кислородной терапии АРЕХМЕД	ФСЗ 2011/10188	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды)
			Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012	ФСР 2011/10719	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Изделия для респираторной терапии в анестезиологии и реанимации: Воздуховоды	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
			Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в наборах и отдельных упаковках: Трубки-воздуховоды	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Воздуховод MEDEREN орофарингеальный Гведела	РЗН 2018/7567	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
7.6.	Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких детский (с возможностью подключения к источнику кислорода)	1 комп.	Воздуховод орофарингеальный одноразовый стерильный	РЗН 2021/13426	"Чжэньцзян Хайшэн Медикал Дивайс Ко., Лтд.", (Китай)
			Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-Д по ТУ 9444-003-52777873-2007	ФСР 2007/00439	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких ShineBall: ENT-1022 SILICONE	ФСЗ 2008/01782	"Энтер Медикал Корпорейшн", (Тайвань, Китайская Республика)
			Система дыхательная реанимационная многоканальная TOPMED, детская	РЗН 2019/8899	"Омнимедикс Энтерпрайз Ко., Лтд.", (КНР)
7.7.	Комплект катетеров (зондов) аспирационных (для отсасывания) (не менее 2 шт, разных размеров)	1 комп.	Мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, детский	РЗН 2018/6725	ООО "Ассомедика", (Республика Беларусь)
			Катетер аспирационный, размерный ряд: 5, 6, 8, 10 Fr.	ФСЗ 2008/03465	"Чжэньцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД", (Китай)
			Катетеры аспирационные	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
			Катетер для отсасывания	ФСЗ 2012/11565	"М. Шиллинг ГмбХ Медикл Продактс", (Германия)



			Катетер аспирационный	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к." (Польша)
			Катетер стерильный аспирационный	ФСЗ 2012/12486	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетеры аспирационные MEDEREN	РЗН 2018/7836	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
			Катетер аспирационный	ФСЗ 2012/12814	"Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (Китай)
7.8.	Комплект трубок ларингеальных (либо комплект масок ларингеальных, либо комбитуб) детских (не менее 2 шт., разных размеров)	1 комп.	Ларингеальные маски	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
			Маски ларингеальные	ФСЗ 2011/10188	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды)
			Маски ларингеальные Aerotube.	ФСЗ 2011/10317	"ТЮЭМ Гезелльшафт Фюр Хаумкейр унд Медизинтехник мбх" (Германия)
			Маска ларингеальная однократного и многократного применения	ФСЗ 2008/03467	"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)
			Ларингиальная силиконовая трубка (маска).	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Маска ларингеальная MEDEREN: поливинилхлоридная; силиконовая; армированная поливинилхлоридная; армированная силиконовая; армированная силиконовая двухходовая	РЗН 2018/7743	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
7.9.	Комплект трубок эндотрахеальных детских (не менее 3 шт., N 3; 5)	1 комп.	Трубки эндотрахеальные рентгеноконтрастные с манжеткой однократного применения, стерильные по ТУ 9398-039-00480230-2005	ФСР 2010/09058	ОАО "Фирма Медполимер", (Россия)
			Трубки эндотрахеальные APEXMED	ФСЗ 2008/02861	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетеры из полимерных материалов по ТУ 9398-002-12966417-2007	ФСР 2010/07388	ЗАО "Витал", (Россия)
			Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном, размерный ряд от 3 до 10 мм, с шагом 0,5 мм. Трубка эндотрахеальная без манжеты, размерный ряд от 2 до 10 мм, с шагом 0,5 мм.	ФСЗ 2008/03467	"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)
			Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в отдельных упаковках: Трубка эндотрахеальная	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Трубка эндотрахеальная Vogt Medical	РЗН 2017/5422	"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", (Германия)
			Изделия медицинские для респираторной терапии в анестезиологии и реанимации, MEDEREN	РЗН 2017/6257	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
			Припособления для дыхательного наркоза и интенсивной терапии Nitex	ФСЗ 2008/00075	"Бикакилар Тибби Джехазлар Санай ве Тиджарет А. С.", (Турция)
7.10.	Ларингоскоп волоконно-оптический (4 клинка) детский	1 шт.	Ларингоскопы для экстренной медицины серии ЛЭМ-02 по ТУ 26.6Q12-001-52777873-2006: ЛЭМ-02/В0	ФСР 2011/12691	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Ларингоскопы APEXMED: Ларингоскоп с волоконной оптикой.	ФСЗ 2011/08956	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды)
			Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп с волоконной оптикой.	ФСЗ 2012/12627	"Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ + Ко. КГ", (Германия)
			Ларингоскоп с рукояткой и лампочкой "Optima" или "Orion"	ФСЗ 2011/10663	"Тимеско Хелскеа Лтд.", (Соединенное Королевство)
7.11.	Набор для коникотомии и/или трахеостомии детский	1 набор.	Набор для крикотиреотомии (канюля трахеостомическая, стилет, шприц, фиксатор, трубка)	ФСЗ 2011/09985	"ВБМ Медизинтехник ГмбХ", (Германия)
			1. Набор для чрескожной трахеостомии 2. Набор для минитрахеостомии 3. Набор для крикотиреотомии 4. Набор для чрескожной трахеостомии с дилататором	ФСЗ 2009/05211	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
			Наборы для трахеостомии по ТУ 9437-002-37966967-2014	РЗН 2017/5727	ООО "Энспиромед", (Россия)
			Наборы для трахеостомии, одноразового использования по ТУ 32.5Q13-005-81442642-2016	РЗН 2018/7719	ООО "Ютипадо", (Россия)

			Трахеостомическая система TRACOE (ТРАКО)	ФСЗ 2008/03118	"Трако медикал ГмбХ", (Германия)
			Набор для чрескожной трахеостомии «Tracheo S.E.T.», с зажимом; Набор для чрескожной трахеостомии «Tracheo S.E.T.», без зажима	РЗН 2015/3355	"Икс-Мед срл.", (Италия)
			Инструменты для чрескожного доступа к верхним дыхательным путям	РЗН 2015/2533	"Кук Инкорпорэйтед", (США)
7.12	Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса)	1 шт.	Фиксатор эндотрахеальной трубки	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
			Устройства для фиксации эндотрахеальных трубок у взрослых и детей Thomas	ФСЗ 2010/07691	"Лаердал Медикал АС", (Норвегия)
			Комплекты фиксации трахеальных трубок; Держатели шлангов	ФСЗ 2009/04992	"Алба Хелскеа ЛЛС", (США)
			Фиксатор для эндотрахеальных трубок APXEMED	ФСЗ 2008/02212	"Бэлл Лид Медикал Инструментс Ко, Лтд.", (Китай)
			Держатель эндотрахеальной трубки Nitex	ФСЗ 2008/00075	"Бикакцилар Тибби Джехазаар Санай ве Тиджарет А. С.", (Турция)
7.13	Фильтр дыхательный бактериальный/вирусный	2 шт.	Фильтр дыхательный бактериальный/вирусный; размеры: ID 15мм, ID 22мм; модификации: электростатическая, механическая	ФСЗ 2011/10188	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Фильтры механические; Фильтры электростатические; Фильтры воздушные	ФСЗ 2011/11170	"Ковидмен Ллс", (США)
			Бактериальный фильтр нестерильный, стерильный. Фильтр бактериальный для медицинских газов, нестерильный, многократного использования	ФСЗ 2009/04992	"Алба Хелскеа ЛЛС", (США)
7.14	Шприц 150 мл типа Жане	1 шт.	Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005	ФСР 2010/08648	АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)
			Шприцы для промывания полостей с наконечником для катетерной насадки, объемом 150мл; Шприцы для промывания полостей с наконечником типа Луер, объемом 150мл	ФСЗ 2012/11952	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные по ТУ 32.50.13-001-96673695-2017	ФСР 2010/07710	ООО "МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН", (Россия)
			Шприц однократного применения по ТВНЛ.942311.025 ТУ, вместимостью 150 мл: с катетерным наконечником; с наконечником "Луер-лок"	РЗН 2017/6650	ООО «МИМ», (Россия)
Прочие средства					
7.15	Воронка пластмассовая	2 шт.		-	ООО «Бытпласт», (Россия)

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 12

цифрами

(двенадцать)

прописью

) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПУШИН А. В.

должность, ФИО

подпись



ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»

_____ А.В. Пушин
« 26 » апреля 2021 г.



**НАБОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НИРН-01-«МЕДПЛАНТ»
(ТУ 9437-013-52777873-2014).**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.012РЭ

*Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России

**НАБОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
НИРН-01-«МЕДПЛАНТ»**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.012РЭ

1. Назначение

Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи НИРН-01-«МЕДПЛАНТ» предназначен для оказания скорой медицинской реанимационной неонатальной помощи.

2. Область применения

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. Условия применения

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи

4. Основные технические характеристики

Основные параметры и размеры упаковок приведены в Таблице 1.

Табл. 1

Параметр \ Серия	В сумке медицинской универсальной СМУ-01	В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2
Габаритные размеры, мм	(370x175x310)±50	(440x252x340)±50
Масса набора (не более), кг	3,8	4,7
Номинальная нагрузка (не более), кг	9	12

Средний срок службы – не менее 3 лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C

- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °С.

5. Комплект поставки

1. Сумка медицинская универсальная СМУ-01 или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 – 1 шт;

2. Комплект вложений – 1 комп. (согласно. табл. 2);

3. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-Пм/2;

2. Столик манипуляционный для УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

6. Описание изделия

Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи НИРН-01-«МЕДПЛАНТ» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов. Набор выпускается в сумке медицинской универсальной СМУ-01 или в футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2

Сумка медицинская универсальная СМУ-01 изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, раскрывается с помощью застёжки-молнии и раскладывается на две одинаковые по толщине половины. Внутри сумки расположены вкладыши для размещения вложений. При необходимости элементы набора можно зафиксировать резинками. Сумка имеет две ручки для ношения одной рукой (сверху и сбоку), ремень для ношения через плечо. На ремне предусмотрена специальная накладка, которая предохраняет его от сминания. На боковой стенке сумки имеется бирочное окошко для информационной таблички. Вдоль корпуса сумки

проходит светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 (ТУ 9437-006-52777873-2010), адаптирован к данному набору. Футляр изготовлен из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора.

На верхней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в темное время суток. Футляр надёжно защищает элементы набора от повреждений и легко обрабатывается, поэтому набор в футляре особенно удобен для частого использования.

7. Подготовка к работе и правила работы

7.1. Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав набора.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеет жёсткий каркас и защищает элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке и работе избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на сумку и рюкзак при их использовании. Чтобы исключить повреждение изделий не нагружайте футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 более чем на 12 кг, а сумку медицинскую универсальную СМУ-01 более чем на 9 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с изделием продлевает срок его службы.

ВНИМАНИЕ! Не используйте изделие, если вы не имеете достаточной квалификации!

7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить.

ВНИМАНИЕ! Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!

7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта входящего в состав футляра, как показано на рисунке 1.

Состав ремкомплекта:

- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4х1 – 2 шт.;
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.



обозначения на рисунке:

- 1 - винт;
- 2 - корпус укладки,
- внутренняя сторона
- 3 - тяга
- 4 - втулка
- 5 - пружинная шайба
- 6 - гайка

Рис. 1 Замена тяги футляра-саквояжа УМСП-01-Пм/2 с использованием ремонтного комплекта

7.7. Сумки самостоятельному ремонту не подлежат.

8. Транспортирование, хранение и уход

8.1. Транспортирование набора может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75% при 15 °С.

8.2. Наборы могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой реанимационной неонатальной медицинской помощи. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. Указания по утилизации

Сумки, рюкзак и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения укладки утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. Гарантии изготовителя

11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи.

Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2. Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, рюкзаки, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3. Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.4. В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

11.5. Рекламации направлять на адрес производителя

12. Контактная информация производителя

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, эт.2, пом.1, ком.296-318

Телефон: 8(495)223-6016

E-mail: medplant@medplant.ru

13. Свидетельство о приёме

Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи НИРН-01-«МЕДПЛАНТ»

Наименование	Артикул
В сумке медицинской универсальной СМУ-01	
В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	

соответствует ТУ 9437-013-52777873-2014 и признан годным к эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу набора – это поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

Перечень вложений, входящих в состав набора реанимационного неонатального для оказания скорой медицинской помощи НИРН-01-«МЕДПЛАНТ»

Табл. 2

№	Наименование	Кол-во, не менее	Наименование изделия в соответствии с РУ	Номер РУ	Производитель
1.	Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких неонатальный	1 комп.	Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007	ФСР 2007/00439	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких ShineBall: ENT-1015 SILICONE	ФСЗ 2008/01782	«Энтер Медикал Корпорейшн», (Тайвань, Китайская Республика)
			Система дыхательная реанимационная многоразовая TORMED, неонатальная	РЗН 2019/8899	"Омнимэйт Энтерпрайз Ко., Лтд.", (КНР)
			Мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, неонатальный	РЗН 2018/6725	ООО "Ассомедика", (Республика Беларусь)
2.	Аспиратор (отсасыватель) портативный механический	1 шт.	Аспиратор портативный с механическим приводом АПМ-МП-1 по ТУ 9444-004-52777873-2007	ФСР 2008/02413	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Отсасыватель ножной ОНП-600 по ТУ 9444-002-18859607-2009	ФСР 2009/05562	ООО «МИТК-М», (Россия)
3.	Ларингоскоп волоконно-оптический неонатальный с 3-мя клинками	1 шт.	Ларингоскопы для экстренной медицины серии ЛЭМ-02 по ТУ 26.60.12-001-52777873-2006: ЛЭМ-02/ВО	ФСР 2011/12691	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Ларингоскопы APEXMED: Ларингоскоп с волоконной оптикой.	ФСЗ 2011/08956	"Апексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп с волоконной оптикой.	ФСЗ 2012/12627	«Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ + Ко. КГ», (Германия)
			Ларингоскоп с рукояткой и лампочкой "Optima" или "Orion"	ФСЗ 2011/10663	"Тимеско Хелскеа Лтд.", (Соединенное Королевство)
4.	Комплект воздуховодов детский (не менее 2 шт., разных размеров)	1 комп.	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования	ФСЗ 2009/04992	"Алба Хелскеа ЛЛС", (США)
			Изделия для дыхательной и кислородной терапии APEXMED: Воздуховоды 40, 50, 60 мм	ФСЗ 2011/10188	"Апексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012	ФСР 2011/10719	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Изделия для респираторной терапии в анестезиологии и реанимации: Воздуховоды	ФСЗ 2009/05401	"Смите Медикал Интернэшнл Лими тед", (Великобритания)
			Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в наборах и отдельных упаковках: Трубки-воздуховоды	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Воздуховод MEDEREN орофарингеальный Гведела: Размер 00; Размер 0	РЗН 2018/7567	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
			Воздуховод орофарингеальный одноразовый стерильный, размер №№ 4, 5, 6	РЗН 2021/13426	"Чжэцзян Хайшэн Медикал Дивайс Ко., Лтд.", (Китай)
5.	Трубка эндотрахеальная однократного применения	3 шт.	Трубки эндотрахеальные рентгеноконтрастные с манжеткой однократного применения, стерильные по ТУ 9398-039-00480230-2005	ФСР 2010/09058	ОАО "Фирма Медполимер", (Россия)
			Трубки эндотрахеальные APEXMED	ФСЗ 2008/02861	"Апексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды), "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетеры из полимерных материалов по ТУ 9398-002-12966417-2007	ФСР 2010/07388	ЗАО "Витал", (Россия)
			Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном, размерный ряд от 3 до 10 мм, с шагом 0,5 мм. Трубка эндотрахеальная без манжеты, размерный ряд от 2 до 10 мм, с шагом 0,5 мм.	ФСЗ 2008/03467	"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)
			Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в отдельных упаковках: Трубка эндотрахеальная	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Трубка эндотрахеальная Vogt Medical	РЗН 2017/5422	"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", (Германия)
			Изделия медицинские для респираторной терапии в анестезиологии и реанимации, MEDEREN	РЗН 2017/6257	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
			Приспособления для дыхательного наркоза и интенсивной терапии Nitex	ФСЗ 2008/00075	"Бикакцилар Тибби Джахазлар Санай ве Тиджарет А. С.", (Турция)

6.	Проводник (стилет) для интубации одноразовый	1 шт.	Стилеты для интубации.	ФСЗ 2011/10188	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Стилеты для интубации	ФСЗ 2009/05401	"Смите Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
			Стилет для эндотрахеальных трубок. Стилет для трубок типа Паркер.	РЗН 2017/6257	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
7.	Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, прямой, 160мм	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий	ФСЗ 2010/07357	"СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ", (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): прямой	ФСЗ 2012/12517	"Саммар Интернешнл", (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый прямой №2; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый зубчатый прямой №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
8.	Салфетки марлевые медицинские стерильные 14 см. x 16 см.	1 уп.	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер 16x14 см.	ФСР 2008/03219	ООО «АПСАНА», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские по ГОСТ 16427-93 типоразмеры: 16 см x 14 см.	ФСР 2009/05213	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер 16x14 см.	ФСР 2008/03225	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 в следующих исполнениях: четырехслойные (16 см x 14 см) стерильные; двухслойные (16 см x 14 см) стерильные; однослойные (16 см x 14 см) стерильные.	ФСР 2011/11141	ООО "НЬЮФАРМ", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер 16x14 см.	ФСР 2011/12069	ООО ПКФ "Ахтамар", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер 16x14 см.	ФСР 2007/01316	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
9.	Устройство для вливания инфузионных растворов однократного применения	2 шт.	Устройства для вливания, переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов: Устройство инфузионное однократного применения с пластиковой иглой.	ФСЗ 2009/05662	"СФ Медикал Продактс ГмбХ", (Германия)
			Устройство инфузионное одноразового использования (с иглой)	ФСЗ 2010/07086	"Хуайань Сити Хэнчунь Медикал Продакт Ко., Лтд.", (Китай)
			Системы инфузионная	ФСЗ 2009/05610	"Веньчжоу Бэйпу Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд.", (Китай)
			Системы инфузионная	ФСЗ 2011/09652	"Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда" (Китай)
			Устройство для вливания инфузионных растворов "Вольф Медикал"	РЗН 2016/3514	"Чанчжоу Тонда Медикал Эпплайнс Ко., Лтд" (Китай)
			Система инфузионная стерильная для однократного применения с иглами	ФСЗ 2011/09586	"Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Устройство одноразовое для вливания инфузионных растворов, с иглой ECO-IV20, варианты исполнения IV20-V1, IV20-V2, IV20-V3	ФСЗ 2010/06983	"Цзянсу Чжэнь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Устройства для вливания инфузионных растворов одноразовые SPTKMED	ФСЗ 2007/00509	ШАНЬДУН ЖИБО ШАНЧОАНЬ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД., (Китай)
10.	Канюля для периферических вен	2 шт.	Катетеры внутривенные однократного применения	ФСЗ 2010/08754	"КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс", (Германия)
			La-med I.V. cannula - канюли с портом и без порта	ФСЗ 2009/05411	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			1. Катетер внутривенный с дополнительным портом и крылышками (POLYFLON). 2. Катетер внутривенный без дополнительного порта, но с крылышками (POLYCAN). 3. Катетер внутривенный без дополнительного порта и с малыми крылышками (POLYNEO). 4. Катетер внутривенный без дополнительного порта и без крылышек (POLYON). 5. Катетер внутривенный без дополнительного порта и без крылышек (POLYWIN).	ФСЗ 2011/09113	"Поли Медикьюр Лимитед", (Индия)

			Канюля внутривенная с ПТФЭ катетером BIO-FLON, типоразмеры: G20, G22, G24, G26	РЗН 2014/1679	"Био-Мед Хэлскеа Продактс Прайвет Лимитед", (Индия)
			Катетеры внутривенные периферические TOPMED: G16, G18, G20, G22	РЗН 2018/7555	"Велмед Интернэшнл Индастриз Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетеры (канюли) внутривенные, стерильные однократного применения в вариантах исполнения с принадлежностями: Катетер (канюля) внутривенный, стерильный однократного применения с крыльями и инъекционным портом CK-FLON (CK-ФЛОН): G18, G20, G22, G24	РЗН 2017/5585	"Диспозейф Хелс энд Лайф Кеа Лтд.", (Индия)
11.	Устройство для вливания в малые вены однократного применения (Игла-катетер Бабочка)	1 шт.	Канюля инфузионная (игла-"бабочка") SITEKMED для вливания в малые вены, однократного применения.	ФСЗ 2007/00509	«ШАНЬДУН ЖИБО ШАНЧЮАНЬ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД», (Китай)
			Набор (игла-бабочка, катетер, луэр-адаптер).	ФСЗ 2010/06622	«Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд», (Китай)
			Устройство для вливания в малые вены однократного применения	ФСЗ 2008/02135	"КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс", (Германия)
			Устройство для вливания в малые вены однократного применения.	ФСЗ 2009/05662	"СФ Медикал Продактс ГмбХ", (Германия)
			La-med I.V. cannula - канюли с портом и без порта	ФСЗ 2009/05411	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетер внутривенный с дополнительным портом и крыльшками (POLYFLON). 2. Катетер внутривенный с дополнительным портом, крышкой «snap-fit» и перфорированными крыльшками (POLYFLEX). 3. Катетер внутривенный без дополнительного порта, но с крыльшками (POLYCAN). 4. Катетер внутривенный без дополнительного порта и с малыми крыльшками (POLYNEO).	ФСЗ 2011/09113	«Поли Медикьюр Лимитед», (Индия)
12.	Шприц инъекционный однократного применения стерильный 1 мл.	3 шт.	Шприцы инъекционные однократного применения, стерильные по ТУ 32.50.13-001-25597097-2005	ФСР 2010/07477	АО «Медполимер ЛТД», (Россия)
			Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008	ФСР 2008/03253	ООО «Стерин», (Россия)
			Шприцы стерильные инъекционные однократного применения с иглами	ФСЗ 2009/05672	«СФ Медикал Продактс ГмбХ», (Германия)
			Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005	ФСР 2010/08648	АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)
13.	Шприц инъекционный однократного применения стерильный 2 мл.	3 шт.	Шприцы одноразовые стерильные APEXMED объемом, мл: 1, 2, 5	ФСЗ 2008/02859	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзяньсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Шприцы инъекционные одноразовые с иглами и без игл, объем: 1мл, 2мл	ФСЗ 2008/02301	"Чангдзюу Джинлонг Медикал Пластик Эпплианс Ко. Лтд", (Китай)
			Шприцы одноразовые стерильные с иглами и без игл SITEKMED	ФСЗ 2007/00530	"Шаньдун Жибо Шанчюань Медикал Инструментс Ко. Лтд.", (Китай)
			Шприцы одноразовые трехдетальные стерильные объемом 1 мл, 2 мл с иглами	ФСЗ 2011/09587	"Бейджинг Форнерс Медикал Эквипмент Ко., Лтд", (Китай)
			Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные по ТУ 32.50.13-001-96673695-2017	ФСР 2010/07710	ООО "МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН", (Россия)
14.	Салфетка дезинфицирующая для инъекций одноразовая	10 шт.	Салфетки дезинфицирующие для инъекций из нетканого материала пропитанного 70% водно-спиртовым раствором, одноразовые по ТУ 9393-001-58716163-2003	ФСР 2008/02512	ООО «НПФ «Медтехмаркет», (Россия)
			Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М К Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00	ФСР 2009/05438	ООО «М.К. Асептика», (Россия)
			Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта, одноразовая по ТУ 9393-006-56334457-2008	ФСР 2008/03704	ООО «Лейко», (Россия)

			Салфетки антимикробные из трикотажного полотна, стерильные "Активтекс" по ТУ 9393-001-83188142-2008; Активтекс-Х с хлоргексидином	ФСР 2009/06117	ООО "АЛЬТЕКС", (Россия)
			Салфетки спиртовые стерильные по ТУ 9393-004-52707619-2006	ФСР 2007/01592	ООО "ЭВТЕКС", (Россия)
			Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013	РЗН 2014/1695	ООО "Фармэл", (Россия)
15.	Зонд желудочный	1 шт.	Зонды APEXMED: желудочный, аспирационный	ФСЗ 2008/02867	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцинью Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Зонд полимерный желудочный одноразовый стерильный по ТУ 9398-164-05519988-2004	ФСР 2009/05817	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Зонд желудочный (типа Левина)	ФСЗ 2008/03466	"Чжэнцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД", (Китай)
			Зонд желудочный	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Катетер (зонд) желудочный	ФСЗ 2008/02333	"КонваТек Лимитед", (Соединенное Королевство)
			Катетеры медицинские однократного применения по ТУ ВУ 190682947.002-2008. катетер питающий - Feeding tube, катетер (зонд) желудочный - Stomach tube	ФСЗ 2010/06636	ООО "Ассомедика" (Республика Беларусь)
			Катетеры медицинские однократного применения Inekta. Катетер желудочный.	ФСЗ 2012/12814	"Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетеры медицинские желудочно-кишечные однократного применения MEDEREN	РЗН 2018/7433	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
16.	Ножницы медицинские с одним острым концом	1 шт.	Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010: ножницы	ФСР 2010/07370	ОАО «МИЗ им. М Горького», (Россия)
			Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ФСЗ 2012/13136	"ХОБРИ ИНТЕРНЭШНЛ", (Пакистан)
			Ножницы медицинские для разрезания повязок по Листеру, размеры 14,5 см, 18,0 см	РЗН 2015/2724	"Джерман Хелскере Индастрис (ПВТ)ЛТД", (Пакистан)
			Инструменты медицинские режущие: ножницы	ФСЗ 2012/12515	"Саммар Интернешнл", (Пакистан)
			Инструменты медицинские хирургические режущие: ножницы	ФСЗ 2008/02888	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
17.	Лейкопластырь ленточный	1 шт.	Инструменты режущие с острой (режущей) кромкой	РЗН 2013/592	"Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
			Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский	ФСЗ 2008/01442	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", (КНР)
			Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе "Импэкс-Мед"	ФСЗ 2008/02807	"Чангжоу Хуалинь Хэс Дрессинг Ко., Лтд.", (Китай)
			Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009: полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием или без него, намотанная на картонную или пластмассовую шпулю (катушка) 500x2,0 см	ФСР 2009/05363	АО "ВЕРОФАРМ", (Россия)
			Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	ФСЗ 2008/01959	"ФармЛайн Лимитед", (Великобритания)
18.	Маска медицинская лицевая однократного применения	2 шт.	Лейкопластырь медицинский фиксирующий	ФСЗ 2011/09593	"Чангжоу Хуалинь Неалф Дрессинг Ко., Лтд.", (КНР)
			Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010	ФСР 2010/08512	ООО «МАСКА», (Россия)
			Маска медицинская одноразовая трехслойная	ФСЗ 2008/02100	"Вухан Лифарма Кемикалз Ко., Лтд.", (Россия)
			Маска медицинская стандарт (классик) по ТУ 9398-001-65578626-2010	ФСР 2010/09673	ООО "КИТ", (Россия)
			Маска 3-х слойная	ФСЗ 2011/10269	"ЛЕБОО ХЕЛСКЭА ПРОДАКТС ЛИМИТЕД", (Китай)
			Маска медицинская из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 трехслойная	ФСР 2010/07908	ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", (Россия)

19.	Перчатки хирургические стерильные	2 пары	Перчатки хирургические стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2007	ФСР 2007/00196	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
			Перчатки латексные хирургические стерильные по ТУ 9398-001-70224340-2008	ФСР 2008/02982	ООО «Фарм-Глобал», (Россия)
			Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные одноразовые торговой марки «Medic-Dent»	ФСЗ 2011/10210	«Макстер Глов Мануофактуринг СДН БХД (229862-Х)», (Малайзия)
			Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса опудренные. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные. Перчатки хирургические стерильные из синтетического латекса неопудренные по ТУ 9398-002-54854000-2011	ФСР 2011/12244	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
20.	Салфетка дезинфицирующая для обработки рук	6 шт.	Салфетки дезинфицирующие для инъекций из нетканого материала пропитанного 70% водно-спиртовым раствором, одноразовые по ТУ 9393-001-58716163-2003	ФСР 2008/02512	ООО «НПФ «Медтехмаркет», (Россия)
			Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "М К Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00	ФСР 2009/05438	ООО «М.К. Асептика», (Россия)
			Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта, одноразовая по ТУ 9393-006-56334457-2008	ФСР 2008/03704	ООО «Лейко», (Россия)
			Салфетки антимикробные из трикотажного полотна, стерильные "Активтекс" по ТУ 9393-001-83188142-2008; Активтекс-Х с хлоргексидином	ФСР 2009/06117	ООО "АЛЬТЕКС", (Россия)
			Салфетки спиртовые стерильные по ТУ 9393-004-52707619-2006	ФСР 2007/01592	ООО "ЭВТЕКС", (Россия)
			Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013	РЗН 2014/1695	ООО "Фармэль", (Россия)
21.	Комплект катетеров (зондов) аспирационных (для отсасывания) (не менее 2 шт., разных размеров)	1 комп.	Катетер аспирационный, размерный ряд: 5, 6, 8, 10 Fr.	ФСЗ 2008/03465	«Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания
			Катетеры аспирационные	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
			Катетер для отсасывания	ФСЗ 2012/11565	"М. Шиллинг ГмбХ Медикл Продакте", (Германия)
			Катетер аспирационный	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к." (Польша)
			Катетер стерильный аспирационный	ФСЗ 2012/12486	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетеры аспирационные MEDEREN	РЗН 2018/7836	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
			Катетер аспирационный	ФСЗ 2012/12814	"Нинбо Гритмед Медикал Инструменте Ко., Лтд.", (Китай)
22.	Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л)	5 шт.	Полиэтиленовые пакеты одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А (ПО-01 "МедПак"), по ТУ 9464-001-84354588-2008	ФСР 2008/02806	ООО «МедПак», (Россия)
23.	Комплект держателей инфузионных флаконов (из 2-х держателей на 200 мл и 400 мл с	1 комп.	Изделия для фиксации емкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013. Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-«Медплант»	РЗН 2014/1603	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 9

цифрами

(девяносто

прописью

) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПУШИН А. В.

должность, ФИО

подпись



ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»

_____ А.В. Пушин
« 26 » апреля 2021 г.



**НАБОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ НЕОНАТАЛЬНЫЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ
СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НИРН-02-«МЕДПЛАНТ»
(ТУ 9437-013-52777873-2014).**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.014РЭ

*Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

ОКПД2 32.50.13.190

ТУ 9437-013-52777873-2014

Рег. уд. № РЗН 2015/2746 от __.__.20__г.

ООО «МЕДПЛАНТ»

Набор реанимационный неонатальный
для оказания скорой медицинской помощи

НИРН-02-«МЕДПЛАНТ»

ТУ 9437-013-52777873-2014

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛКЯМ.942439.014РЭ

Ver.009

Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Сделано в России

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	1
2. Область применения.....	1
3. Условия применения.....	1
4. Основные технические характеристики.....	1
5. Комплект поставки.....	1
6. Описание изделия.....	2
7. Подготовка к работе и правила работы.....	2
8. Транспортирование, хранение и уход.....	3
9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия.....	4
10. Указания по утилизации.....	4
11. Гарантии изготовителя.....	4
12. Контактная информация производителя.....	4
13. Свидетельство о приемке.....	5
Перечень вложений.....	5

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи **НИРН-02-«МЕДПЛАНТ»** предназначен для оказания скорой медицинской реанимационной неонатальной помощи.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры комплектов приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Серия	В сумке медицинской универсальной СМУ-01	В сумке медицинской универсальной СМУ-02	В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2
Габаритные размеры, мм		(370x175x310)±50	(530x260x260)±50	(440x252x340)±50
Масса набора (не более), кг		6,1	3,7	6,4
Номинальная нагрузка (не более), кг		9	12	12

Средний срок службы: не менее 3 лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °C.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сумка медицинская универсальная СМУ-01, или Сумка медицинская универсальная СМУ-02, или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 – 1 шт;
2. Комплект вложений – 1 компл. (согласно. табл. 2);
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-Пм/2;
2. Столик манипуляционный для УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

6. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи НИРН-02-«МЕДПЛАНТ» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов. Набор может выпускаться в сумке медицинской универсальной СМУ-01 или СМУ-02, или в футляре-саквояже УМСП-02-Пм/2.

Сумка медицинская универсальная СМУ-01

Изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, раскрывается с помощью застёжки-молнии и раскладывается на две одинаковые по толщине половины. Внутри сумки расположены вкладыши для размещения вложений. При необходимости элементы набора можно зафиксировать резинками. Сумка имеет две ручки для ношения одной рукой (сверху и сбоку), ремень для ношения через плечо. На ремне предусмотрена специальная накладка, которая предохраняет его от сминания. На боковой стенке сумки имеется бирочное окошко для информационной таблички. Вдоль корпуса сумки проходит светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток.

Сумка медицинская универсальная СМУ-02

Изготовлена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ 420Д, дно сумки изготовлено из непромокаемого тентового материала, что обеспечивает хорошую влагоизоляцию сумки. Для защиты вложений от механических повреждений, в стенках сумки находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из полирекса НПЭ. Для размещения вложений сумка имеет 3 кармана, основной отсек и отсек для хранения документов. На внешней части сумки расположен держатель для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и эмблема красного креста. По всему корпусу сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток. Для удобства переноски сумка снабжена двумя ручками (для ношения одной рукой) и плечевым ремнём, со специальной накладкой, которая предохраняет его от сминания.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2

(ТУ 9437-006-52777873-2010)

Адаптирован к данному набору. Футляр изготовлен из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора.

На верхней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в темное время суток. Футляр надёжно защищают элементы набора от повреждений и легко обрабатывается, поэтому набор в футляре особенно удобен для частого использования.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С УКЛАДКОЙ

7.1. Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав набора.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеет жёсткий каркас и защищает элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке и работе избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на набор при его использовании. Чтобы исключить повреждение изделий не нагружайте их более чем на 12 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с изделием продлевает срок его службы.

ВНИМАНИЕ!

- Не используйте укладку, если вы не имеете достаточной квалификации!


7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить.

ВНИМАНИЕ!

- Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!

7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта входящего в состав футляра, как показано на рисунке 1.

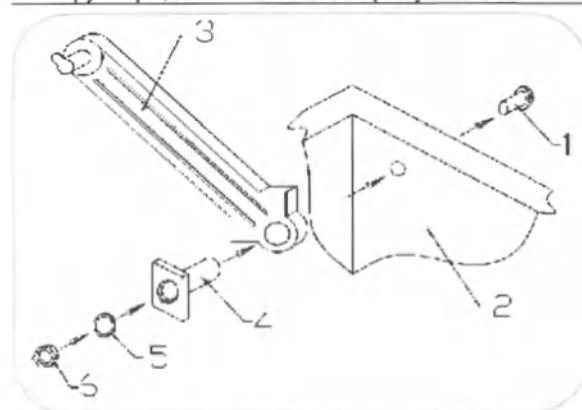

Состав ремкомплекта:

- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4x1 – 2 шт.
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.

Обозначения на рисунке:

- 1 – винт;
- 2 – корпус футляров, внутренняя сторона
- 3 – тяга
- 4 – втулка
- 5 – пружинная шайба
- 6 – гайка

Рис. 1 Замена тяги футляра-саквояжа УМСП-01-Пм/2 с использованием ремонтного комплекта

7.7. Сумки самостоятельному ремонту не подлежат.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УХОД

8.1. Транспортирование укладки может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75% при 15 °С.

8.2. Укладки могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

ВНИМАНИЕ!

- Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой неонатальной медицинской помощи. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в наборы – согласно их инструкциям по применению.

10. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сумки и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения укладки утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2. Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3. Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.4. В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, **ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!**

11.5. Рекламации направлять на адрес производителя

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru



13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Набор реанимационный неонатальный для оказания скорой медицинской помощи **НИРН-02-«МЕДПЛАНТ»:**

Наименование	Артикул
В сумке медицинской универсальной СМУ-01	
В сумке медицинской универсальной СМУ-02	
В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	

Соответствует ТУ 9437-013-52777873-2014 и признан годным к эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки, что поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ УКЛАДКИ:
Таблица 2

N	Наименование медицин-ского изделия	Кол-во, не менее	Наименование изделия в соответствии с РУ	Номер РУ	Производитель
6.1	Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких неонатальный	1 комп.	Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-Н по ТУ 9444-003-52777873-2007	ФСР 2007/00439	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких ShineBall: ENT-1015 SILICONE	ФСЗ 2008/01782	«Энтер Медикал Корпорейшн», (Тайвань, Китайская Республика)
			Система дыхательная реанимационная многоразовая TOPMED, неонатальная	РЗН 2019/8899	«Омнимэйт Энтерпрайз Ко, Лтд.», (КНР)
			Мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, неонатальный	РЗН 2018/6725	ООО "Ассомедика", (Республика Беларусь)
6.2	Трубка эндотрахеальная детская (разных размеров)	3 шт.	Трубки эндотрахеальные рентгеноконтрастные с манжеткой однократного применения, стерильные по ТУ 9398-039-00480230-2005	ФСР 2010/09058	ОАО "Фирма Медполимер", (Россия)
			Трубки эндотрахеальные APEXMED	ФСЗ 2008/02861	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетеры из полимерных материалов по ТУ 9398-002-12966417-2007	ФСР 2010/07388	ЗАО "Витал", (Россия)
			Трубка эндотрахеальная с манжеткой и клапаном, размерный ряд от 3 до 10 мм, с шагом 0,5 мм. Трубка эндотрахеальная без манжеты, размерный ряд от 2 до 10 мм, с шагом 0,5 мм.	ФСЗ 2008/03467	"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)
			Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в отдельных упаковках: Трубка эндотрахеальная	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Трубка эндотрахеальная Vogt Medical	РЗН 2017/5422	"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", (Германия)
			Изделия медицинские для респираторной терапии в анестезиологии и реанимации, MEDEREN	РЗН 2017/6257	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
			Пристоспособления для дыхательного наркоза и интенсивной терапии Nitex	ФСЗ 2008/00075	"Бикацилар Тибби Джехазлар Санай ве Тиджарет А.С.", (Турция)
6.3	Ларингеальная дыхательная маска (размер №1 для новорожденных весом более 1500 г)	1 шт.	Ларингеальные маски	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернэшнл Линимед", (Великобритания)
			Маски ларингеальные, размеры: №1	ФСЗ 2011/10188	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды)
			Маски ларингеальные Aertube.	ФСЗ 2011/10317	"ГЮЭМ Гезелльшафт фюр Хаумкейр унд Медикентехник мбХ", (Германия)
			Маска ларингеальная однократного и многократного применения, размерный ряд № 1	ФСЗ 2008/03467	"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)
			Ларингеальная силиконовая трубка (маска).	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Маска ларингеальная MEDEREN: поливинилхлоридная; силиконовая; армированная поливинилхлоридная; армированная силиконовая; армированная силиконовая двухходовая размер №1	РЗН 2018/7743	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
6.4	Ларингоскоп волоконно-оптический неонатальный с тремя клинками №№ 00, 0 и 1	1 шт.	Ларингоскопы для экстренной медицины серии ЛЭМ-02 по ТУ 26.60.12-001-52777873-2006: ЛЭМ-02/В0	ФСР 2011/12691	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Ларингоскопы APEXMED: Ларингоскоп с волоконной оптикой.	ФСЗ 2011/08956	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды)
			Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп с волоконной оптикой	ФСЗ 2012/12627	"Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ + Ко. КГ", (Германия)
			Ларингоскоп с рукояткой и лампочкой "Optima" или "Orion"	ФСЗ 2011/10663	"Тимеско Хелскеа Лтд.", (Соединенное Королевство)
6.5	Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см х 5 м)	1 шт.	Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский	ФСЗ 2008/01442	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.", (КНР)
			Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе "Импэкс-Мед"	ФСЗ 2008/02807	"Чангжоу Хуалинь Хэлс Дрессинг Ко, Лтд.", (Китай)
			Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009: полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием или без него, намотанная на картонную или пластмассовую шпулю (катушка) 500х2,0 см	ФСР 2009/05363	АО "ВЕРОФАРМ", (Россия)



			Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	ФСЗ 2008/01959	«ФармЛайн Лимитед», (Великобритания)
			Лейкопластырь медицинский фиксирующий	ФСЗ 2011/09593	«Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко,Лтд.» (КНР)
6.6	Ножницы медицинские с одним острым концом прямые	1 шт.	Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010: ножницы	ФСР 2010/07370	ОАО «МИЗ им. М.Горького», (Россия)
			Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ФСЗ 2012/13136	«ХОБРИ ИНТЕРНЭШНЛ», (Пакистан)
			Ножницы медицинские для разрезания повязок по Листеру, размеры 14,5 см; 18,0 см	РЗН 2015/2724	«Джерман Хелскере Индастрис (ПВТ)ЛТД.», (Пакистан)
			Инструменты медицинские режущие: ножницы	ФСЗ 2012/12515	«Саммар Интернешнл», (Пакистан)
			Инструменты медицинские хирургические режущие: ножницы	ФСЗ 2008/02888	«СУРДЖИВЕЛЛ», (Пакистан)
			Инструменты режущие с острой (режущей) кромкой	РЗН 2013/592	«Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед», (Пакистан)
6.7	Стилет N 6	1 шт.	Стилеты для интубации.	ФСЗ 2011/10188	«Апексмед Интернэшнл Б. В.», (Нидерланды)
			Стилеты для интубации	ФСЗ 2009/05401	«Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед», (Великобритания)
			Стилет для эндотрахеальных трубок, СН/Fr 6. Стилет для трубок типа Паркер, размер 6.0	РЗН 2017/6257	«Медерен Неотех Лтд.», (Израиль)
6.8	Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса)	1 шт.	Фиксатор эндотрахеальной трубки	ФСЗ 2009/05401	«Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед», (Великобритания)
			Устройства для фиксации эндотрахеальных трубок у взрослых и детей Thomas	ФСЗ 2010/07691	«Лаердал Медикал АС», (Норвегия)
			Комплекты фиксации трахеальных трубок; Держатели шлангов	ФСЗ 2009/04992	«Алба Хелскеа ЛЛС», (США)
			Фиксатор для эндотрахеальных трубок APXIMED	ФСЗ 2008/02212	«Вэлл Лид Медикал Инструментс Ко, Лтд.», (Китай)
			Держатель эндотрахеальной трубки Nitex	ФСЗ 2008/00075	«Бикакцилар Тибби Джехазлар Санай ве Тиджарет А. С.», (Турция)

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

11

(одежда)

_____) ЛИСТОВ

ПУШИН А. В.

подпись



ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»

_____ А.В. Пушин
« 26 » апреля 2021 г.



**НАБОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НРСР-02-«МЕДПЛАНТ»
(ТУ 9437-013-52777873-2014).**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.010РЭ

*Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

ОКПД2 32.50.13.190

ТУ 9437-013-52777873-2014

Рег. уд. № РЗН 2015/2746 от __.__.20__г.

ООО «МЕДПЛАНТ»

Набор реанимационный
для оказания скорой медицинской помощи

НРСП-02-«МЕДПЛАНТ»

ТУ 9437-013-52777873-2014

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЛКЯМ.942439.010РЭ

Ver.012

Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Сделано в России

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	1
2. Область применения.....	1
3. Условия применения.....	1
4. Основные технические характеристики.....	1
5. Комплект поставки.....	1
6. Описание изделия.....	2
7. Подготовка к работе и правила работы с укладкой.....	3
8. Транспортирование, хранение и уход.....	4
9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия.....	4
10. Указания по утилизации.....	4
11. Гарантии производителя.....	4
12. Контактная информация производителя	4
13. Свидетельство о приёмке	5
Перечень вложений укладки.....	5

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи **НРСП-02-«МЕДПЛАНТ»** предназначен для оказания скорой медицинской реанимационной помощи.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры наборов приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Серия	В сумке реанимационной СР-03	В сумке медицинской универсальной СМУ-02	В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	В футляре-саквояже УМСП-01-П	В рюкзаке медицинском универсальном РМУ-04
Параметр					
Габаритные размеры, мм	(500x255x280) ±50	(530x260x260)±50	(440x252x340) ±50	(520x310x390) ±50	(350x270x530) ±50
Масса набора (не более), кг	5,8	5,8	6,8	8,4	7,4
Номинальная нагрузка (не более), кг	12	12	12	12	12

Средний срок службы: не менее 3 лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °C.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сумка реанимационная СР-03 или Сумка медицинская универсальная СМУ-02, или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2, или Футляр-саквояж УМСП-01-П, или Рюкзак медицинский универсальный РМУ-04 – 1 шт;
2. Комплект вложений – 1 компл. (согласно табл. 2)*;
3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-П/УМСП-01-Пм/2;
2. Столик манипуляционный для УМСП-01-П/УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

6. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСР-02-«МЕДПЛАНТ» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов. Набор выпускается: в сумке реанимационной СР-03; в сумке медицинской универсальной СМУ-02; в футляре-саквояже УМСП-02-Пм/2; в футляре-саквояже УМСП-01-П; в рюкзаке медицинском универсальном РМУ-04.

Сумка реанимационная СР-03 имеет специальную конструкцию и обеспечивает защиту вложений при хранении, их удобное расположение и быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, в стенках сумки в специальных карманах находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из ПВХ-пластика и изолона ППЭ. На внешней стороне крышки сумки расположен отдельный отсек (на молнии) с держателем для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и карманом для бланков и других бумаг. Внутри сумки под крышкой расположен встроенный ампулярий для ампул разного размера (общим кол-вом 56 мест) и сетка для удобного расположения расходных материалов. Дополнительная пряжка на плечевом ремне и накладка предохраняет ремень от сминания.

Сумка медицинская универсальная СМУ-02 изготовлена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ 420Д, дно сумки изготовлено из непромокаемого тентового материала, что обеспечивает хорошую влагоизоляцию сумки. Для защиты вложений от механических повреждений, в стенках сумки находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из полирекса НПЭ. Для размещения вложений сумка имеет 3 кармана, основной отсек и отсек для хранения документов. На внешней части сумки расположен держатель для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и эмблема красного креста. По всему корпусу сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в тёмное время суток. Для удобства переноски сумка снабжена двумя ручками (для ношения одной рукой) и плечевым ремнём, со специальной накладкой, которая предохраняет его от сминания. Компактность сумки позволяет размещать набор на стеллаже в помещении или в салоне санитарного автомобиля, а малый вес делает набор в сумке более удобным для женщин-медиков.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 и Футляр-саквояж УМСП-01-П (ТУ 9437-006-52777873-2010), адаптирован к данному набору. Футляр изготовлен из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора. На верхней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в тёмное время суток. Футляр надёжно защищают элементы набора от повреждений и легко обрабатывается, поэтому набор в футляре особенно удобен для частого использования.

Рюкзак медицинский универсальный РМУ-04 изготовлен из синтетической ткани ПВХ 420Д, в стенках рюкзака находятся каркасные элементы из полирекса НПЭ. Часть корпуса рюкзака выполнена из специальной тентовой ткани для лучшей защиты вложений от влаги и загрязнений при работе на земле. С внешней стороны рюкзак имеет 2 больших кармана, внутри рюкзака вложения упаковываются в 6 съёмных модульных отделений с прозрачным верхом. Для удобства ношения рюкзака на спине имеются широкие удобные плечевые лямки, для ношения одной рукой рюкзак снабжен 2 пластиковыми ручками, на верхней части рюкзака и сбоку, также рюкзак можно носить на одном плече с помощью плечевого ремня. На корпусе рюкзака расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в тёмное время суток, эмблема красного креста и бирочное окошко для указания номера бригады.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С УКЛАДКОЙ

7.1. Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав укладки.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-П и футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеют жёсткий каркас и защищают элементы укладки от повреждений. Однако, при транспортировке укладки и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов укладки и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на сумку и рюкзак при их использовании. Чтобы исключить повреждение изделий не нагружайте их более чем на 12 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с укладкой продлевает срок ее службы.

ВНИМАНИЕ!

● Не используйте укладку, если вы не имеете достаточной квалификации!


7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить.

ВНИМАНИЕ!

● Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!

7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта, входящего в состав футляра, как показано на Рисунке 1.

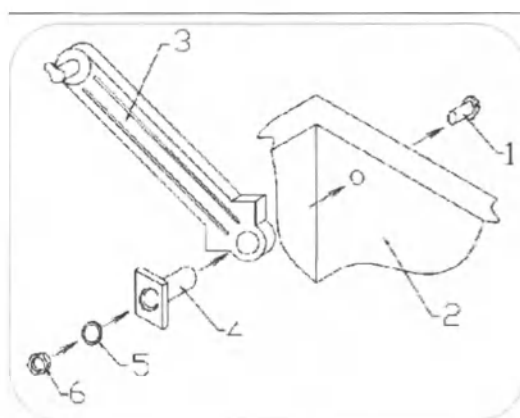

Состав ремкомплекта:

- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4х1 – 2 шт.
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.

Обозначения на рисунке:

- 1 – винт;
- 2 – корпус футляров, внутренняя сторона
- 3 – тяга
- 4 – втулка
- 5 – пружинная шайба
- 6 – гайка

Рис. 1 Замена тяги футляра-саквояжа УМСП-01-П и Пм/2 с использованием ремонтного комплекта

7.7. Сумки и рюкзаки самостоятельному ремонту не подлежат.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УХОД

8.1. Транспортирование укладки может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75% при 15 °С.

8.2. Укладки могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

ВНИМАНИЕ!

Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой реанимационной медицинской помощи. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сумки, рюкзак и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения укладки утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2. Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, рюкзаки, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3. Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.

11.4. Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.5. В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, **ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!**

11.6. Рекламации направлять на адрес производителя

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.1, ком.296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016 e-mail: medplant@medplant.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСГ-02-«МЕДПЛАНТ»

Наименование	Артикул
☐ В сумке реанимационной СР-03	—
☐ В сумке медицинской универсальной СМУ-02	—
☐ В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	—
☐ В футляре-саквояже УМСП-01-П	—
☐ В рюкзаке медицинском универсальном РМУ-04	—

Соответствует ТУ 9437-013-52777873-2014 и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки, что поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ УКЛАДКИ:
Таблица 2

N	Наименование медицинского изделия	Кол-во, не менее	Наименование изделия в соответствии с РУ	Номер РУ	Производитель
4.1.	Аспиратор механический	1 шт.	Аспиратор портативный с механическим приводом АПМ-МП-1 по ТУ 9444-004-52777873-2007	ФСР 2008/02413	ООО «МЕДПЛАНТ» (Россия)
			Отсасыватель ножной ОНП-600 по ТУ 9444-002-18859607-2009	ФСР 2009/05562	ООО «МИТК-М», (Россия)
4.2.	Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий жесткий для операций, изогнутый, №1, 219мм; Зажим кровоостанавливающий с атравматической насечкой, изогнутый.	ФСЗ 2008/02889	«СУРДЖИВЕЛЛ», (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий; Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, изогнутый	ФСЗ 2010/07357	«СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ» (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): изогнутый	ФСЗ 2012/12517	«Санмар Интернешнл», (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый, изогнутый №2; Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый по плоскости длиной 125мм; Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый № 2, длиной 196 мм "ЗКи-МИЗ-В"; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый изогнутый №3; Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №3; Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый по ребру длиной 125мм; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый, изогнутый №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
4.3.	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, прямой, 160мм	ФСЗ 2008/02889	«СУРДЖИВЕЛЛ», (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий	ФСЗ 2010/07357	«СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ», (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): прямой	ФСЗ 2012/12517	«Санмар Интернешнл», (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №2; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
4.4.	Зонд желудочный (в стерильной упаковке, разных размеров)	2 шт.	Зонды АРЕХМЕД: желудочный, аспирационный	ФСЗ 2008/02867	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Зонд полимерный желудочный одноразовый стерильный по ТУ 9398-164-05519988-2004	ФСР 2009/05817	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Зонд желудочный (типа Левина)	ФСЗ 2008/03466	«Чжэнцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД», (Китай)
			Зонд желудочный	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Катетер (зонд) желудочный	ФСЗ 2008/02333	"КонваТек Лимитед", (Соединенное Королевство)
			Катетеры медицинские одноразового применения по ТУ ВУ 190682947.002-2008: катетер питающий - Feeding tube; катетер (зонд) желудочный - Stomach tube	ФСЗ 2010/06636	ООО "Ассомедика" (Республика Беларусь)
			Катетеры медицинские одноразового применения Inecta: Катетер желудочный	ФСЗ 2012/12814	"Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетеры медицинские желудочно-кишечные одноразового применения MEDEREN	РЗН 2018/7433	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
4.5.	Игла хирургическая	2 шт.	Иглы атравматические одноразового применения, прямые и изогнутые по ТУ 9398-003-24648800-2011	ФСР 2008/03992	Общество с ограниченной ответственностью "Волють", (Россия)
			Иглы атравматические одноразового применения стерильные ИАКПл «ВОЛЮТЬ» с нитями хирургическими по ТУ 9432-002-24648800-2010	ФСР 2010/07849	ООО "Волють", (Россия)



			Иглы атравматические длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными по ТУ 9432-003-47295014-2005	ФСР 2008/03571	ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)
4.6.	Иглодержатель	1 шт.	Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-286-07613444-2010 следующих видов: держатели	ФСР 2010/08119	ОАО "Медико-инструментальный завод им. М. Горького", (Россия)
			Иглодержатель общехирургический, с твердосплавными пластинами 160мм; Иглодержатель сосудистый 160мм.	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Иглодержатели: мини, микро, стандартные, артикуляционные, твердосплавные, сосудистые, прямые, изогнутые	ФСЗ 2012/12517	"Санмар Интернешнл", (Пакистан)
			Иглодержатели: стандартные	РЗН 2013/598	"Хилбро Интернешнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
4.7.	Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких взрослый (с возможностью подключения к источнику кислорода)	1 комп.	Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В по ТУ 9444-003-52777873-2007	ФСР 2007/00439	ООО «МЕДПЛАНТ» (Россия)
			Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких ShineBall: ENT-1024 SILICONE	ФСЗ 2008/01782	"Энтер Медикал Корпорейшн", (Тайвань, Китайская Республика)
			Система дыхательная реанимационная многоразовая TOPMED, взрослая	РЗН 2019/8899	"Омнинэйт Энтерпрайз Ко, Лтд.", (КНР)
			Мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения взрослый	РЗН 2018/6725	ООО "Ассомедика", (Республика Беларусь)
4.8.	Набор катетеров (зондов) аспирационных	1 комп.	Катетер аспирационный, размерный ряд: 12, 16, 18, Fr.	ФСЗ 2008/03465	"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД", (Китай)
			Катетеры аспирационные	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернешнл Лимитед", (Великобритания)
			Катетер для отсасывания	ФСЗ 2012/11565	"М. Шиллинг ГмбХ Медикл Продактс", (Германия)
			Катетер аспирационный	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Катетер стерильный аспирационный	ФСЗ 2012/12486	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетеры аспирационные MEDEREN	РЗН 2018/7836	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
			Катетер аспирационный	ФСЗ 2012/12814	"Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (Китай)
4.9.	Комплект трубок ларингеальных (либо комплект масок ларингеальных, либо комбинью) для взрослых	1 комп.	Ларингеальные маски; Воздуховоды	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернешнл Лимитед", (Великобритания)
			Маски ларингеальные, размеры: №№ 3, 4, 5. Воздуховоды, размеры: 90 мм, 100 мм, 110 мм, 120 мм	ФСЗ 2011/10188	"Алексмед Интернешнл Б.В.", (Нидерланды)
			Воздуховод Гюедела	ФСЗ 2011/09985	"ВБМ Медицинтехник ГмбХ", (Германия)
			Маски ларингеальные Aerotube. Воздуховоды Aerotube	ФСЗ 2011/10317	"ТЮЭМ Гезельшафт фюр Хаумкейр унд Медиктехник мбХ" (Германия)
			Маска ларингеальная однократного и многократного применения, размерный ряд №№ 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5.	ФСЗ 2008/03467	"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД", (Китай)
			Ларингиальная силиконовая трубка (маска).	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования	ФСЗ 2009/04992	"Алба Хелскеа ЛЛС", (США)
			Маска ларингеальная MEDEREN; поливинилхлоридная; силиконовая; армированная поливинилхлоридная; армированная силиконовая; армированная силиконовая двухходовая размеры: 2; 2,5; 3; 4; 5.	РЗН 2018/7743	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
4.10.	Комплект трубок эндотрахеальных	1 комп.	Трубки эндотрахеальные рентгеноконтрастные с манжеткой однократного применения, стерильные по ТУ 9398-039-00480230-2005	ФСР 2010/09058	ОАО "Фирма Медполимер", (Россия)
			Трубки эндотрахеальные APEXMED	ФСЗ 2008/02861	"Алексмед Интернешнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)

			Катетеры из полимерных материалов по ТУ 9398-002-12966417-2007	ФСР 2010/07388	ЗАО "Витал", (Россия)
			Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном, размерный ряд от 3 до 10 мм, с шагом 0,5 мм. Трубка эндотрахеальная без манжеты, размерный ряд от 2 до 10 мм, с шагом 0,5 мм.	ФСЗ 2008/03467	"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)
			Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в отдельных упаковках: Трубка эндотрахеальная	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Трубка эндотрахеальная Vogt Medical	РЗН 2017/5422	"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", (Германия)
			Изделия медицинские для респираторной терапии в анестезиологии и реанимации, MEDEREN	РЗН 2017/6257	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
			Припособления для дыхательного наркоза и интенсивной терапии Nitex	ФСЗ 2008/00075	"Бикацилар Тибби Джехазлар Санай ве Тиджарет А. С.", (Турция)
4.11.	Ларингоскоп (3 клинка) для взрослых	1 шт.	Ларингоскопы для экстренной медицины серии ЛЭМ-02 по ТУ 26.60.12-001-52777873-2006: ЛЭМ-02/Л; ЛЭМ-02/ВО	ФСР 2011/12691	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Ларингоскопы APEXMED: Ларингоскоп со стандартной оптикой; Ларингоскоп с волоконной оптикой.	ФСЗ 2011/08956	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп со стандартной оптикой; Ларингоскоп с волоконной оптикой.	ФСЗ 2012/12627	"Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ + Ко. КГ", (Германия)
			Ларингоскоп с рукояткой и лампочкой "Optima" или "Orion"	ФСЗ 2011/10663	"Тимеско Хелскеа Лтд", (Соединенное Королевство)
4.12.	Набор для коникотомии и/или трахеостомии взрослый	1 набор	1. Набор для чрескожной трахеостомии 2. Набор для минитрахеостомии 3. Набор для криотиреоидотомии 4. Набор для чрескожной трахеостомии с дилататором	ФСР 2009/05211	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
			Наборы для трахеостомии по ТУ 9437-002-37966967-2014	РЗН 2017/5727	ООО "Энспиромед", (Россия)
			Наборы для трахеостомии, одноразового использования по ТУ 32.50.13-005-81442642-2016	РЗН 2018/7719	ООО "Ютипадо", (Россия)
			Трахеостомическая система TRACOE (ТРАКО)	ФСЗ 2008/03118	"Трако медикал Гмб.Х.", (Германия)
			Набор для чрескожной трахеостомии «Tracheo S.E.T.» с зажимом; Набор для чрескожной трахеостомии «Tracheo S.E.T.», без зажима	РЗН 2015/3355	"Икс-Мед срл.", (Италия)
			Инструменты для чрескожного доступа к верхним дыхательным путям	РЗН 2015/2533	"Кук Инкорпорейтед", (США)
4.13.	Переходник гибкий для интубационных трубок одноразовый	1 шт.	Коннектор (адаптор) дыхательный	ФСЗ 2009/04791	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
			Коннектор прямой, размеры: ID15 мм, ID22мм; ID15 мм, ID22мм; ID15 мм, ID22мм	ФСЗ 2011/10188	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Коннекторы	ФСЗ 2011/11170	"Ковиден Лтс" (США)
4.14.	Ротораширитель	1 шт.	Ротораширитель винтовой одноразовый	РЗН 2021/13297	"Сямынь Компауз Медикал Тек. Ко, Лтд.", (Китай)
			Инструменты отеснящи: Расширители ротовые	РЗН 2013/591	"Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
			Ротораширитель винтовой. Гладилка двусторонняя, серповидная и дистальная № 6.	ФСЗ 2008/02886	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
4.15.	Скальпель стерильный одноразовый	1 шт.	Скальпели, лезвия для скальпелей одноразовые APEXMED	ФСЗ 2008/02862	"Алексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Скальпели хирургические одноразовые по ТУ 9433-121-05519988-2002	ФСР 2012/13462	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Скальпель одноразовый	ФСЗ 2011/11258	"Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ", (Германия)
			Скальпель одноразовый (Scalpels)	ФСЗ 2009/03547	"Беромед ГмбХ Хоспитал Продуктс", (Германия)
			Скальпель	ФСЗ 2008/02137	"Риббел Интернэшнл Лтд.", (Индия)
			Инструменты хирургические одноразовые CERTUS	РЗН 2017/5689	"Хуайинь Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (КНР)
			Скальпель одноразовый хирургический VOLKMAN	РЗН 2018/8001	"Фольманн Медикал Техник ГмбХ", (Германия)
			Скальпель стерильный	ФСЗ 2012/12980	"Фе эр Сэйфти Рэйвор Ко., ЛТД.", (Япония)

4.16.	Стилет N 10	1 шт.	Стилеты для интубации.	ФСЗ 2011/10188	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Стилеты для интубации	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
4.17.	Стилет N 6	1 шт.	Стилет для эндотрахеальных трубок. Стилет для трубок типа Паркер.	РЗН 2017/6257	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
4.18.	Троакарный дренажный катетер	1 шт.	Изделия для дренирования APEXMED в отдельных упаковках: Дренажные трубки одноканальные/двухканальные.	ФСЗ 2012/11952	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Катетеры торакальные; Троакар-катетеры с троакаром или без него	ФСЗ 2012/12449	"Ковидиен Лтс", (США)
			Катетеры дренажные	ФСЗ 2011/09231	"Примед Хальберштадт Медиктехник ГмбХ", (Германия)
			Катетеры торакальные Nitex	ФСЗ 2008/00072	"Бикакцилар Тибби Джехазлар Санай ве Тиджарет А. С.", (Турция)
			Катетер стерильный Торакальный с Троакаром/ без Троакара	ФСЗ 2012/12486	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
4.19.	Устройство для крепления эндотрахеальной трубки (держатель Томаса)	1 шт.	Фиксатор эндотрахеальной трубки	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
			Устройства для фиксации эндотрахеальных трубок у взрослых и детей Thomas	ФСЗ 2010/07691	"Лардал Медикал АС", (Норвегия)
			Комплекты фиксации трахеальных трубок; Держатели шлангов	ФСЗ 2009/04992	"Алба Хелскеа ЛЛС", (США)
			Фиксатор для эндотрахеальных трубок APEXMED	ФСЗ 2008/02212	"Вэлл Лид Медикал Инструментс Ко, Лтд.", (Китай)
			Держатель эндотрахеальная трубки Nitex	ФСЗ 2008/00075	"Бикакцилар Тибби Джехазлар Санай ве Тиджарет А. С.", (Турция)
4.20.	Фильтр дыхательный бактериовирусный	1 шт.	Фильтр дыхательный бактериальный/вирусный; размеры: ID 15мм, ID 22мм; модификации: электростатическая, механическая	ФСЗ 2011/10188	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Фильтры механические; Фильтры электростатические; Фильтры воздушные	ФСЗ 2011/11170	"Ковидиен Лтс", (США)
			Бактериальный фильтр нестерильный, стерильный. Фильтр бактериальный для медицинских газов, нестерильный многократного использования	ФСЗ 2009/04992	"Алба Хелскеа ЛЛС", (США)
4.21.	Шприц 150 мл типа Жане	1 шт.	Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-"Прогресс" по ТУ 9398-093-43892776-2005	ФСР 2010/08648	АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)
			Шприцы для промывания полостей с наконечником для катетерной насадки, объемом 150мл; Шприцы для промывания полостей с наконечником типа Луер, объемом 150мл	ФСЗ 2012/11952	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные по ТУ 32.50.13-001-96673695-2017	ФСР 2010/07710	ООО "МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН", (Россия)
			Шприц однократного применения по ТВНЛ.942311.025 ТУ, вместимостью 150 мл: с катетерным наконечником; с наконечником "Луер-лок"	РЗН 2017/6650	ООО «МИМ», (Россия)
4.22.	Языкодержатель	1 шт.	Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011	ФСР 2007/00268	ОАО "Медио-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
			Языкодержатели	РЗН 2013/598	"Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
4.23.	Шовный материал	1 шт.	Нити хирургические в отрезках по ТУ 9398-003-24648800-2011	ФСР 2008/03992	Общество с ограниченной ответственностью "Волот", (Россия)
			Нити хирургические в отрезках по ТУ 9432-002-24648800-2010	ФСР 2010/07849	ООО "Волот", (Россия)
			Материалы хирургические шовные "РЕПРОМЕД" по ТУ 9398-003-13278599-2010: Нити хирургические	ФСР 2010/08774	ООО «Репромед», (Россия)
			Нити хирургические стерильные по ТУ 9432-003-47295014-2005	ФСР 2008/03571	ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)
Прочие средства					
4.24.	Воронка пластмассовая	2 шт.		-	ООО «Бытпласт», (Россия)

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

скреплено печатью 12
цифрами
(Пушица)
прописью) ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПУШИН А.В.

должность, ФИО



ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»

« 26 » апреля 2021 г. А.В. Пушкин



**НАБОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НРСП-01-«МЕДПЛАНТ»
(ТУ 9437-013-52777873-2014).**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.007РЭ

*Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России



**НАБОР РЕАНИМАЦИОННЫЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НРСП-01-«МЕДПЛАНТ»**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.007РЭ

1. Назначение

Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСП-01-«МЕДПЛАНТ» предназначен для оказания скорой медицинской реанимационной помощи.

2. Область применения

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. Условия применения

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи.

4. Основные технические характеристики

Основные параметры и размеры упаковок представлены в таблице 1.

Таблица 1

Параметр \ Серия	В сумке реанимационной СР-03	В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	В футляре-саквояже УМСП-01-П
Габаритные размеры, мм	(500x255x280)±50	(440x252x340)±50	(520x310x390)±50
Масса укладки (не более), кг	5,8	6,4	7,8
Номинальная нагрузка (не более), кг	12	12	12

Средний срок службы – не менее 3 лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °C.

5. Комплект поставки

1. Сумка реанимационная СР-03 или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 или Футляр-саквояж УМСП-01-П – 1 шт;
2. Комплект вложений – 1 комп. (согласно. табл. 2);
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-П/УМСП-01-Пм/2;
2. Столик манипуляционный для УМСП-01-П/УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

6. Описание изделия

Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСП-01-«МЕДПЛАНТ» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов. Набор выпускается: в сумке реанимационной СР-03; в футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2; в футляре-саквояже УМСП-01-П.

Сумка реанимационная СР-03 имеет специальную конструкцию и обеспечивает защиту вложений при хранении, их удобное расположение и быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, в стенках сумки в специальных карманах находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из ПВХ-пластика и изолон ППЭ.

На внешней стороне крышки сумки расположен отдельный отсек (на молнии) с держателем для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и карманом для бланков и других бумаг. Внутри сумки под крышкой расположен встроенный ампулярий для ампул разного размера (общим кол-вом 56 мест) и сетка для удобного расположения расходных материалов. Дополнительная пряжка на плечевом ремне и накладка предохраняет ремень от сминания.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 и Футляр-саквояж УМСП-01-П (ТУ 9437-006-52777873-2010), адаптирован к данному набору. Футляр изготовлен из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика

оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора.

На верхней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в темное время суток. Футляр надёжно защищает элементы набора от повреждений и легко обрабатывается, поэтому набор в футляре особенно удобен для частого использования.

7. Подготовка к работе и правила работы

7.1. Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав набора.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-П и футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеют жёсткий каркас и защищают элементы набора от повреждений. Однако, при транспортировке набора и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов набора и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на сумку и рюкзак при их использовании. Чтобы исключить повреждение изделий не нагружайте их более чем на 10 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с набором продлевает срок его службы.

ВНИМАНИЕ! Не используйте набор, если вы не имеете достаточной квалификации!

7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования набор необходимо пополнить.

ВНИМАНИЕ! Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!

7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0.5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта входящего в состав футляра, как показано на рисунке 1.



7.7. Сумки самостоятельному ремонту не подлежат.

8. Транспортирование, хранение и уход

8.1. Транспортирование набора может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75% при 15 °С.

8.2. Наборы могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой реанимационной медицинской помощи. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. Указания по утилизации

Сумка и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения набора утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. Гарантии изготовителя

11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи.

Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2. Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, рюкзаки, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3. Гарантии не распространяются на повреждения, вызванные небрежным хранением, транспортированием и эксплуатацией изделия.

11.4. Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.5. В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

11.6. Рекламации направлять на адрес производителя.

12 Контактная информация производителя

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318.

Телефон: 8(495)223-6016

E-mail: medplant@medplant.ru

13. Свидетельство о приёмке:

Набор реанимационный для оказания скорой медицинской помощи НРСР-01-«МЕДПЛАНТ»:

Наименование	Артикул
В сумке реанимационной СР-03	
В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	
В футляре-саквояже УМСП-01-П	

соответствует ТУ 9437-013-52777873-2014 и признан годным к эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу набора – это поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

Перечень вложений, входящих в состав набора реанимационного для оказания скорой медицинской помощи НРСП-01-«МЕДПЛАНТ»

Таблица 2

N	Наименование медицинского изделия	Кол-во, не менее	Наименование изделия в соответствии с РУ	Номер РУ	Производитель
1	Комплект дыхательный для ручной искусственной вентиляции легких взрослых (с возможностью подключения к источнику кислорода)	1 комп.	Комплект дыхательный для ручной ИВЛ КД-МП-В по ТУ 9444-003-52777873-2007	ФСР 2007/00439	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Устройство реанимационное для ручной вентиляции легких ShineBall ENT-1024 SILICONE	ФСЗ 2008/01782	«Энтер Медикал Корпорейшн», (Тайвань, Китайская Республика)
			Система дыхательная реанимационная многоканальная TOPMED, взрослая	РЗН 2019/8899	"Омнимэйт Энтерпрайз Ко., Лтд.", (КНР)
			Мешок дыхательный типа "Амбу" многократного применения, взрослый	РЗН 2018/6725	ООО "Ассомедика", (Республика Беларусь)
2	Аспиратор (отсасыватель) механический	1 шт.	Аспиратор портативный с механическим приводом АПМ-МП-1 по ТУ 9444-004-52777873-2007	ФСР 2008/02413	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Отсасыватель ножной ОНП-600 по ТУ 9444-002-18859607-2009	ФСР 2009/05562	ООО «МИТК-М», (Россия)
3	Комплект катетеров (зондов) аспирационных (для отсасывания) (не менее 3шт., разных размеров)	1 шт.	Катетер аспирационный, размерный ряд 12, 16, 18, Fr.	ФСЗ 2008/03465	«Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД», (Китай)
			Катетеры аспирационные	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернешнл Лимитед", (Великобритания)
			Катетер для отсасывания	ФСЗ 2012/11565	"М. Шиллинг ГмбХ Медикл Продакте", (Германия)
			Катетер аспирационный	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп з о о. сп. к.", (Польша)
			Катетер стерильный аспирационный	ФСЗ 2012/12486	"Ла-мед Хэлсека Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетеры аспирационные MEDEREN	РЗН 2018/7836	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)
			Катетер аспирационный	ФСЗ 2012/12814	"Нинбо Гритмед Медикал Инструменте Ко., Лтд.", (Китай)
4	Набор для коникотомии взрослый	1 шт.	1. Набор для чрескожной трахеостомии 2 Набор для минитрахеостомии 3 Набор для крикотиреоидотомии 4. Набор для чрескожной трахеостомии с дилататором	ФСЗ 2009/05211	«Смитс Медикал Интернешнл Лимитед», (Великобритания)
			Наборы для трахеостомии по ТУ 9437-002-37966967-2014	РЗН 2017/5727	ООО "Энспиромед", (Россия)
			Наборы для трахеостомии, одноразового использования по ТУ 32.50.13-005-81442642-2016	РЗН 2018/7719	ООО "Ютипадо", (Россия)
			Трахеостомическая система TRACOE (ТРАКО)	ФСЗ 2008/03118	"Трако медикал Г.м.б.Х.", (Германия)
			Набор для чрескожной трахеостомии «Tracheo S.E.T.», с зажимом; Набор для чрескожной трахеостомии «Tracheo S.E.T.», без зажима	РЗН 2015/3355	"Икс-Мед с р. л.", (Италия)
			Инструменты для чрескожного доступа к верхним дыхательным путям	РЗН 2015/2533	"Кук Инкорпорейтед", (США)
5	Шприц типа Жане однократного применения стерильный	1 шт.	Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005	ФСР 2010/08648	АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)
			Шприцы для промывания полостей с наконечником для катетерной насадки, объемом 150мл, Шприцы для промывания полостей с наконечником типа Луер, объемом 150мл	ФСЗ 2012/11952	"Апексмед Интернешнл Б. В.", (Нидерланды)
			Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные по ТУ 32.50.13-001-96673695-2017	ФСР 2010/07710	ООО «МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН», (Россия)
			Шприц однократного применения по ТВНЛ.942311.025 ТУ, вместимостью 150 мл, с катетерным наконечником, с наконечником "Луер-лок"	РЗН 2017/6650	ООО «МИМ», (Россия)
6	Ларингоскоп для взрослых	1 шт.	Ларингоскопы для экстренной медицины серии ЛЭМ-02 по ТУ 26.60.12-001-52777873-2006: ЛЭМ-02/Л; ЛЭМ-02/ВО	ФСР 2011/12691	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Ларингоскопы APEXMED: Ларингоскоп со стандартной оптикой, Ларингоскоп с волоконной оптикой	ФСЗ 2011/08956	"Апексмед Интернешнл Б. В.", (Нидерланды)
			Ларингоскопы интубационные: Ларингоскоп со стандартной оптикой, Ларингоскоп с волоконной оптикой	ФСЗ 2012/12627	«Кирхнер энд Вильгельм ГмбХ + Ко. КГ», (Германия)

			Ларингоскоп с рукояткой и лампочкой "Optima" или "Orion"	ФСЗ 2011/10663	"Тимеско Хелскеа Лтд", (Соединенное Королевство)
7	Зонд желудочный	1 шт.	Зонды APEXMED: желудочный, аспирационный	ФСЗ 2008/02867	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Зонд полимерный желудочный одноразовый стерильный по ТУ 9398-164-05519988-2004	ФСР 2009/05817	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Зонд желудочный (типа Левина)	ФСЗ 2008/03466	"Чжэньцзянская Интегральная Медицинская Компания"
			Зонд желудочный	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о о. сп. к.", (Польша)
			Катетер (зонд) желудочный	ФСЗ 2008/02333	"КонваТек Лимитед", (Соединенное Королевство)
			Катетеры медицинские однократного применения по ТУ ВУ 190682947 002-2008: катетер питающий - Feeding tube, катетер (зонд) желудочный -	ФСЗ 2010/06636	ООО "Ассомедика" (Республика Беларусь)
			Катетеры медицинские однократного применения Inekta: Катетер желудочный.	ФСЗ 2012/12814	"Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (Израиль)
			Катетеры медицинские желудочно-кишечные однократного применения MEDEREN	РЗН 2018/7433	"Медерен Неотех Лтд", (Израиль)
8	Комплект воздуховодов универсальный (не менее 3 шт. разных размеров)	1 комп.	Воздуховод ротоглоточный, одноразового использования	ФСЗ 2009/04992	"Алба Хелскеа ЛЛС", (США)
			Изделия для дыхательной и кислородной терапии APEXMED: Воздуховоды 60мм, 90мм, 120мм	ФСЗ 2011/10188	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012	ФСР 2011/10719	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Изделия для респираторной терапии в анестезиологии и реанимации. Воздуховоды	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернэшнл Лими тед", (Великобритания)
			Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в наборах и отдельных упаковках: Трубки-воздуховоды	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о о. сп. к.", (Польша)
			Воздуховод MEDEREN орофарингеальный Гведеля: Размер 0, Размер 3, Размер 6	РЗН 2018/7567	"Медерен Неотех Лтд", (Израиль)
			Воздуховод орофарингеальный одноразовый стерильный, размер: №№ 6, 9, 12	РЗН 2021/13426	"Чжэньцзян Хайшэн Медикал Дивайс Ко., Лтд.", (Китай)
9	Трубка эндотрахеальная однократного применения (№5-9)	3 шт.	Трубки эндотрахеальные рентгеноконтрастные с манжеткой однократного применения, стерильные по ТУ 9398-039-00480230-2005	ФСР 2010/09058	ОАО "Фирма Медполимер", (Россия)
			Трубки эндотрахеальные APEXMED	ФСЗ 2008/02861	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетеры из полимерных материалов по ТУ 9398-002-12966417-2007	ФСР 2010/07388	ЗАО "Витал", (Россия)
			Трубка эндотрахеальная с манжетой и клапаном, размерный ряд от 3 до 10 мм, с шагом 0,5 мм. Трубка эндотрахеальная без манжеты, размерный ряд от 2 до 10 мм, с шагом 0,5 мм.	ФСЗ 2008/03467	"Чжэньцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД", (Китай)
			Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в отдельных упаковках: Трубка эндотрахеальная	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о о. сп. к.", (Польша)
			Трубка эндотрахеальная Vogt Medical	РЗН 2017/5422	"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", (Германия)
			Изделия медицинские для респираторной терапии в анестезиологии и реанимации, MEDEREN	РЗН 2017/6257	"Медерен Неотех Лтд", (Израиль)
			Приспособления для дыхательного наркоза и интенсивной терапии Nitex	ФСЗ 2008/00075	"Бикакцилар Тибби Джехазлар Санай ве Тиджарет А. С.", (Турция)
10	Проводник (стиллет) для интубации одноразовый	2 шт.	Коннектор (адаптор) дыхательный	ФСЗ 2009/04791	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
			Коннектор прямой, размеры: ID15 мм, ID22мм, ID15 мм, ID22мм, ID15 мм, ID22мм	ФСЗ 2011/10188	"Алексмед Интернэшнл Б. В.", (Нидерланды)
			Коннекторы	ФСЗ 2011/11170	"Ковиден Лтс" (США)
11	Роторасширитель	1 шт.	Роторасширитель винтовой одноразовый	РЗН 2021/13297	"Сямьнь Компануэр Медикал Тек. Ко., Лтд.", (Китай)
			Инструменты оттесняющие: Расширители ротовые	РЗН 2013/591	"Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)

			Роторасширитель винтовой. Гладилка двусторонняя, серповидная и дистальная № 6	ФСЗ 2008/02886	«СУРДЖИВЕЛЛ», (Пакистан)
12	Языкодержатель	1 шт.	Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина",
			Языкодержатели	РЗН 2013/598	"Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
13	Зажим медицинский кровоостанавливающий (прямой)	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, прямой, 160мм	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий	ФСЗ 2010/07357	«СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ», (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): прямой	ФСЗ 2012/12517	«Саммар Интернешнл», (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый прямой №2; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый прямой №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
14	Зажим медицинский кровоостанавливающий (изогнутый)	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий жесткий для операций, изогнутый, №1, 219мм, Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, изогнутый.	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, изогнутый	ФСЗ 2010/07357	«СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ» (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной) изогнутый	ФСЗ 2012/12517	«Саммар Интернешнл», (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый №1, Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый, изогнутый №2; Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый № 2, длиной 196 мм "ЗКи-МИЗ-В", Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый изогнутый №3; Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №3; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый, изогнутый №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
15	Жгут для внутривенных инъекций	2 шт.	Жгут кровоостанавливающий матерчатый-эластичный для само- и взаимопомощи по ТУ 9398-026-42965160-2004	ФСР 2009/06312	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛЮ», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий "ФЭСТ" из эластичной тесьмы по ТУ 9398-057-10973749-2006	ФСР 2011/10332	ООО "Предприятие "ФЭСТ" (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007	ФСР 2007/00032	ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха	ФСЗ 2012/12991	ООО "Киевгума", (Украина) "МЕРИДИАН МЕДИКАЛ"
			Жгут кровоостанавливающий венозный с пластмассовой застежкой марки «MERIDIAN»	ФСЗ 2010/06464	ПРОДАКТС ЛТД" (Соединенное Королевство)
			Изделия медицинские для забора крови: жгут многоразовый, жгут одноразовый	ФСЗ 2011/09572	"Грейнер Био-Уан ГмбХ", (Австрия)
16	Жгут кровоостанавливающий	1 шт.	Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застежкой в виде петли «Альфа» по ТУ 9398-041-00149535-2006	ФСР 2012/13201	ООО «Объединение Альфапластик», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10	ФСР 2010/07432	ООО НПФ «МИРАЛ», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий ЖК-"Медплант" по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014: Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-"Медплант"; Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-"Медплант"	РЗН 2014/2113	ООО «МЕДПЛАНТ» (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007	ФСР 2007/00032	ООО «Объединение Альфапластик», (Россия)
17	Устройство для вливания инфузионных растворов однократного применения	2 шт.	Устройства для вливания, переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов. Устройство инфузионное однократного применения с пластиковой иглой.	ФСЗ 2009/05662	«СФ Медикал Продактс ГмбХ», (Германия)
			Устройство инфузионное одноразового использования (с иглой)	ФСЗ 2010/07086	«Хуайань Сити Хянчунь Медикал Продакт Ко., Лтд.», (Китай)
			Системы инфузионная	ФСЗ 2009/05610	«Веньчжоу Бэйпу Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд.», (Китай)

			Системы инфузионная	ФСЗ 2011/09652	"Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда" (Китай)
			Устройство для вливания инфузионных растворов "Вольф Медикал"	РЗН 2016/3514	"Чанчжоу Тонда Медикал Эплайенс Ко., Лтд" (Китай)
			Система инфузионная стерильная для однократного применения с иглами	ФСЗ 2011/09586	"Бейджинг Форниере Медикал Эквипмент Ко., Лтд", (Китай)
			Устройство одноразовое для вливания инфузионных растворов, с иглой ECO-IV20, варианты исполнения: IV20-V1, IV20-V2, IV20-V3	ФСЗ 2010/06983	"Цзянсу Чжэной Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Устройства для вливания инфузионных растворов одноразовые SITEK MED	ФСЗ 2007/00509	ШАНЬДУН ЖИБО ШАНЧЮАНЬ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД., (Китай)
18	Канюля для периферических вен (разных размеров)	4 шт.	Катетеры внутривенные однократного применения	ФСЗ 2010/08754	"КД Медикал ГмбХ Хоспита Продактс", (Германия)
			La-med I.V. cannula - канюли с портом и без порта	ФСЗ 2009/05411	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			1. Катетер внутривенный с дополнительным портом и крылышками (POLYFLON). 2. Катетер внутривенный без дополнительного порта, но с крылышками (POLYCAN). 3. Катетер внутривенный без дополнительного порта и с малыми крылышками (POLYNEO). 4. Катетер внутривенный без дополнительного порта и без крылышек (POLYON). 5. Катетер внутривенный без дополнительного порта и без крылышек (POLYWIN).	ФСЗ 2011/09113	"Поли Медикьюр Лимитед", (Индия)
			Канюля внутривенная с ППФЭ катетером BIO-FLON, типоразмеры: G16, G18, G20, G22	РЗН 2014/1679	"Био-Мед Хэлскеа Продактс Прайвет Лимитед", (Индия)
			Катетеры внутривенные периферические TOPMED: G16, G18, G20, G22	РЗН 2018/7555	"Веллмед Интернэшнл Индастриз Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетеры (канюли) внутривенные, стерильные однократного применения в вариантах исполнения с принадлежностями. Катетер (канюля) внутривенный, стерильный однократного применения с крыльями и инъекционным портом CK-FLON (СК-ФЛОН). G16, G18, G20, G22	РЗН 2017/5585	"Диспозейф Хелс энд Лайф Кеа Лтд.", (Индия)
19	Салфетки марлевые медицинские стерильные 16 см x 14 см	2 уп.	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16x14 см.	ФСР 2008/03219	ООО «АПСАНА», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские по ГОСТ 16427-93 типоразмеры: 16 см x 14 см.	ФСР 2009/05213	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16x14 см.	ФСР 2008/03225	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 в следующих исполнениях: четырехслойные (16 см x 14 см) стерильные; двухслойные (16 см x 14 см) стерильные; однослойные (16 см x 14 см) стерильные.	ФСР 2011/11141	ООО "НЬЮФАРМ", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16x14 см.	ФСР 2011/12069	ООО ПКФ "Ахтамар", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16x14 см.	ФСР 2007/01316	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
20	Бинт марлевый медицинский стерильный 5 м x 10 см	2 шт.	Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см	ФСР 2011/12237	ООО «Фарм-Глобал», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см	ФСР 2007/01317	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см	ФСР 2007/00081	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см	ФСР 2010/08705	ООО СЦ "МЕДТЕХНИКА", (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см	ФСР 2010/06612	ООО "НЬЮФАРМ", (Россия)
			Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014 следующих типоразмеров: 5м x 10см	РЗН 2015/2558	ООО "ХБК Навтекс", (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см	РЗН 2015/2552	ООО "ХБК Навтекс", (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см	ФСР 2009/05650	ООО "Лейко", (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5м x 10см	ФСР 2008/03226	ООО "ПКФ ВераМед", (Россия)

21	Перчатки хирургические стерильные	2 пары	Перчатки хирургические стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2007	ФСР 2007/00196	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
			Перчатки латексные хирургические стерильные по ТУ 9398-001-70224340-2008	ФСР 2008/02982	ООО «Фарм-Глобал», (Россия)
			Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные одноразовые торговой марки «Medic-Dent»	ФСЗ 2011/10210	«Макстер Глов Маньюфакчуринг СДН БХД (229862-Х)», (Малайзия)
			Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса опудренные. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные. Перчатки хирургические стерильные из синтетического латекса неопудренные по ТУ 9398-002-54854000-2011-2011	ФСР 2011/12244	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
22	Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л)	5 шт.	Полиэтиленовые пакеты одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А (ПО-01 "МедПак"), по ТУ 9464-001-84354588-2008	ФСР 2008/02806	ООО «МедПак», (Россия)
23	Комплект держателей инфузионных флаконов (из 2-х держателей на 200 мл и 400 мл с кронштейнами)	1 комп.	Изделия для фиксации ёмкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013: Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-«Медплант»	РЗН 2014/1603	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 9
цифрами

(деветь
прописью) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПУШИН А. В.


должность, ФИО



ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»

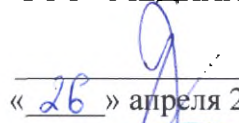
« 26 » апреля 2021 г. А.В. Пушин



**УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» ОБЩЕПРОФИЛЬНАЯ / СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ (РЕАНИМАЦИОННАЯ)
(ТУ 9437-013-52777873-2014).
ИСПОЛНЕНИЕ: ОБЩЕПРОФИЛЬНАЯ**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.003-02РЭ

*Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

ОКПД2 32.50.13.190

ТУ 9437-013-52777873-2014

Рег.уд. № РЗН 2015/2746 от __.__.20__ г.

ООО «МЕДПЛАНТ»

Укладка для оказания скорой медицинской помощи

УМСП-02-«МЕДПЛАНТ»

Общепрофильная/специализированная
(реанимационная)

ТУ 9437-013-52777873-2014

исполнение: ОБЩЕПРОФИЛЬНАЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛКЯМ.942439.003-02РЭ

Ver.013

Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Сделано в России

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	1
2. Область применения.....	1
3. Условия применения.....	1
4. Основные технические характеристики.....	1
5. Комплект поставки.....	2
6. Описание изделия.....	2
7. Подготовка к работе и правила работы с укладкой.....	4
8. Транспортирование, хранение и уход.....	5
9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия.....	5
10. Указания по утилизации.....	5
11. Гарантии производителя.....	6
12. Контактная информация производителя	6
13. Свидетельство о приёмке	7
Перечень вложений укладки.....	8

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Укладка для оказания скорой медицинской помощи **УМСП-02-«МЕДПЛАНТ»** общепрофильная/специализированная (реанимационная): исполнение общепрофильная. Предназначена для оказания скорой медицинской помощи всем категориям пациентов в области общего профиля.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстренной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры упаковок приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Серия	В сумке реанимационной СР-03	В сумке медицинской универсальной СМУ-02	В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	В футляре-саквояже УМСП-01-П	В рюкзаке медицинском универсальном РМУ-04
Габаритные размеры, мм		(500x255x280)±50	(530x260x260)±50	(440x252x340)±50	(520x310x390)±50	(350x270x530)±50
Масса укладки (не более), кг		6,4	6,2	6,9	8,5	7,1
Номинальная нагрузка (не более), кг		12	12	12	12	12

Средний срок службы

не менее 3-х лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °C.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сумка реанимационная СР-03 или Сумка медицинская универсальная СМУ-02, или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2, или Футляр-саквояж УМСП-01-П, или Рюкзак медицинский универсальный РМУ-04 – 1 шт;

2. Комплект вложений – 1 компл. (согласно. Табл. 2);

3. Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-П/УМСП-01-Пм/2;

2. Столик манипуляционный для УМСП-01-П/УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

6. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Укладка для оказания скорой медицинской помощи УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная / специализированная (реанимационная): исполнение общепрофильная. Представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на до-госпитальном этапе всем категориям пациентов. Укладка выпускается: в сумке реанимационной СР-03; в сумке медицинской универсальной СМУ-02; в футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2; в футляре-саквояже УМСП-01-П; в рюкзаке медицинском универсальном РМУ-04.

Сумка реанимационная СР-03

Имеет специальную конструкцию и обеспечивает защиту вложений при хранении, их удобное расположение и быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, в стенках сумки в специальных карманах находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из ПВХ-пластика и изолон ППЭ.

На внешней стороне крышки сумки расположен отдельный отсек (на молнии) с держателем для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и карманом для бланков и других бумаг. По периметру корпуса сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в тёмное время суток. Внутри сумки под крышкой расположен встроенный ампулярий для ампул разного размера (общим количеством 56 мест) и сетка для удобного расположения расходных материалов. Дополнительная пряжка на плечевом ремне и накладка предохраняют ремень от сминания.

Сумка медицинская универсальная СМУ-02

Изготовлена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ 420Д, дно сумки изготовлено из непромокаемого тентового материала, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию сумки. Для защиты вложений от механических повреждений в стенках сумки находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из полирекса НПЭ. Для размещения вложений сумка имеет 3 кармана, основной отсек и отсек для хранения документов.

На внешней части сумки расположен держатель для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и эмблема красного креста.

По периметру корпуса сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток.

Для удобства переноски сумка снабжена двумя ручками (для ношения одной рукой) и плечевым ремнём со специальной накладкой, которая предохраняет его от сминания.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 и Футляр-саквояж УМСП-01-П (ТУ 9437-006-52777873-2010)

Адаптирован к данному набору. Футляр изготовлен из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора.

На внешней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в темное время суток. Футляр надёжно защищает элементы набора от повреждений и легко обрабатывается моющими средствами, поэтому набор в футляре особенно удобен для частого использования.

Рюкзак медицинский универсальный РМУ-04

Изготовлен из синтетической ткани ПВХ 420Д, в стенках рюкзака находятся каркасные элементы из полирекса НПЭ. Часть корпуса рюкзака выполнена из специальной тентовой ткани для лучшей защиты вложений от влаги и загрязнений при работе на земле. С внешней стороны рюкзак имеет 2 больших кармана, внутри рюкзака вложения упаковываются в 6 съёмных модульных отделений с прозрачным верхом. Для удобства ношения рюкзака на спине имеются широкие плечевые лямки, для ношения одной рукой рюкзак снабжен 2-мя пластиковыми ручками (на верхней части рюкзака и сбоку), также рюкзак можно носить на одном плече с помощью плечевого ремня. На корпусе рюкзака расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток, эмблема красного креста и бирочное окошко для указания номера бригады.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С УКЛАДКОЙ

7.1. Изделия и инструменты в укладке уложены для транспортировки. Перед началом работы с укладкой изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав укладки.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-П и Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеют жёсткий каркас и защищают элементы укладки от повреждений. Однако, при транспортировке укладки и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов укладки и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на сумку и рюкзак при их использовании. Чтобы исключить повреждение изделий, не нагружайте их более чем на 12 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с укладкой продлевает срок ее службы.

ВНИМАНИЕ!

● **Не используйте укладку, если вы не имеете достаточной квалификации!**

7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить. Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат.

ВНИМАНИЕ!

● **Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!**


7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта, входящего в состав футляра, как показано на Рисунке 1.

7.7. Сумки и рюкзаки самостоятельному ремонту не подлежат

Состав ремкомплекта:

- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4x1 – 2 шт.
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.

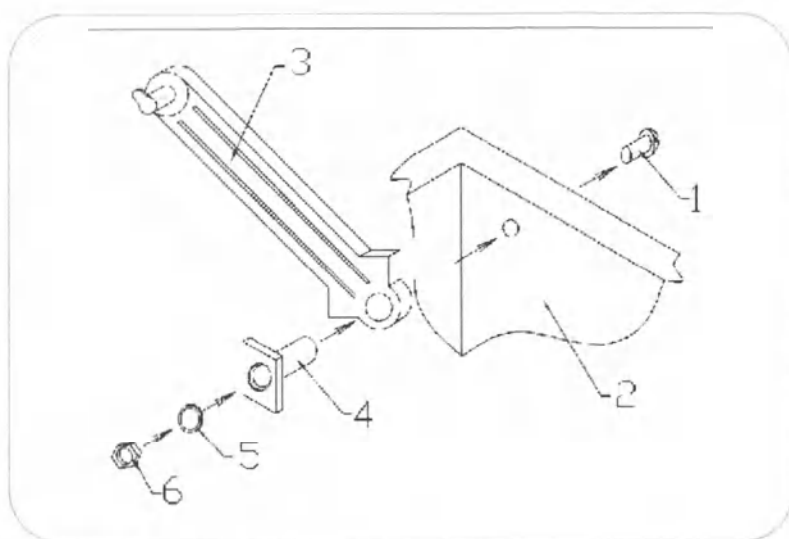

- 1 - винт;
- 2 - корпус футляров, внутренняя сторона
- 3 - тяга
- 4 - втулка
- 5 - пружинная шайба
- 6 - гайка

Рис. 1 Замена тяги футляра-саквояжа УМСП-01-П и футляра-саквояжа УМСП-01-Пм/2 с использованием ремонтного комплекта

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УХОД

8.1. Транспортирование укладки может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75% при 15 °С.

8.2. Укладки могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от + 5 °С до + 40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

Примечание: Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой медицинской помощи в области общего профиля. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сумки, рюкзак и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения укладки утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи.

Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2. Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, рюкзаки, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3. Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.4. В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, **ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!**

11.5. Рекламации направлять на адрес производителя

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Укладка для оказания скорой медицинской помощи УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная/специализированная (реанимационная): исполнение общепрофильная.

Наименование	Артикул
В Сумке реанимационной СР-03	
В Сумке медицинской универсальной СМУ-02	
В Футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	
В Футляре-саквояже УМСП-01-П	
В Рюкзаке медицинском универсальном РМУ-04	

Соответствует ТУ 9437-013-52777873-2014 и признан годным к эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки, что поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ УКЛАДКИ:
Таблица 1

N	Наименование медицинского изделия	Кол-во, не менее	Наименование изделия в соответствии с РУ	Номер РУ	Производитель
1.1	Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м x 5 см)	5 шт.	Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2007/01317	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2007/00081	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2010/08705	ООО СЦ «МЕДТЕХНИКА», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2010/06612	ООО «НЬЮФАРМ», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ТУ 9393-005-10715071-2014, типоразмер 5 м x 5 см	РЗН 2015/2557	ООО «ХБК Навтекс», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	РЗН 2015/2555	ООО «ХБК «Навтекс», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2009/05650	ООО «Лейко», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2008/03223	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
1.2	Бинт фиксирующий эластичный нестерильный (7,5 см x 2 м) и/или (10 см x 2 м)	5 шт.	Бинт медицинский эластичный компрессионный по ТУ 9393-012-46838010-2011, типоразмер: «ИНТЕКС» (10 см x 2 м) / «ВЕНО-ПРОФ» (10 см x 2 м)	ФСР 2007/01084	ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.», (Россия)
			Бинт медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС-СМАРТ» по ТУ 9393-012-46838010-2016, типоразмер: 10 см x 2 м	РЗН 2017/5386	ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.», (Россия)
			Бинт фиксирующий эластичный нестерильный по ТУ 9393-001-18909432-2007	ФСР 2007/01072	ООО «МИЦАР-Н», (Россия)
			Бинт медицинский эластичный, компрессионный и фиксирующий «Доктор БИНТ»	ФСЗ 2009/04273	ОАО «Лента», (Республика Беларусь)
			Бинт медицинский эластичный модели ELAST	ФСЗ 2008/02390	ООО «ТОНУС ЭЛАСТ», (Латвия)
			Бинт эластичный компрессионный ленточный высокой растяжимости «Идеал/200» по ТУ 9393-001-05137229-2003	ФСР 2008/03803	ЗАО «Клинские ПТГО», (Россия)
1.3	Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см)	5 шт.	Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2011/12237	ООО «Фарм-Глобал», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2007/01317	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2007/00081	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2010/08705	ООО СЦ «МЕДТЕХНИКА», (Россия)
1.4	Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см)	5 шт.	Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2010/06612	ООО «НЬЮФАРМ», (Россия)
			Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	РЗН 2015/2558	ООО «ХБК Навтекс», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	РЗН 2015/2552	ООО «ХБК Навтекс», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2009/05650	ООО «Лейко», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2008/03226	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
1.5	Вата медицинская гигроскопическая	1 уп.	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81, типоразмер: 25г; 50г; 100г	ФСР 2010/06930	ООО «ЕМЕЛЬЯНЬ САВОСТИНЬ ВАТНАЯ ФАБРИКА», (Россия)
			Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81, типоразмер: 25г; 50г; 100г.	ФСР 2009/04702	ООО «Лейко», (Россия)
			Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная и нестерильная хлопковая по ГОСТ 5556-81 фасованная: стерильная и нестерильная; в рулонах (25 г, 50 г, 100 г)	ФСР 2010/07843	ООО «НЬЮФАРМ», (Россия)
			Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная и нестерильная, хлопковая и хлопко-вискозная по ГОСТ 5556-81	ФСР 2009/06567	АО «Фабрика «Ника», (Россия)
			Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая хлопковая стерильная и нестерильная по ГОСТ 5556-81: в рулонах (25 г, 50 г, 100 г)	ФСР 2010/07841	ООО «НЬЮФАРМ», (Россия)

1.6	Воздуховод Гведела (60 мм)	1 шт.	Воздуховод ротолоточный, одноразового использования	ФСЗ 2009/04992	"Алба Хелскеа ЛЛС", (США)
1.7	Воздуховод Гведела (90 мм)	1 шт.	Изделия для дыхательной и кислородной терапии APEXMED: Воздуховоды 60мм; 90мм; 120мм.	ФСЗ 2011/10188	"Алексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды)
			Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065 44942795-2012	ФСР 2011/10719	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
1.8	Воздуховод Гведела (120 мм)	1 шт.	Изделия для респираторной терапии в анестезиологии и реанимации: Воздуховоды	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернэшнл Лими тед", (Великобритания)
			Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в наборах и отдельных упаковках: Трубки-воздуховоды	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп. з о.о. сп. к.", (Польша)
			Воздуховод MEDEREN орофарингеальный Гведела: Размер 0; Размер 3; Размер 6	РЗН 2018/7567	"Медерен Неотек Лтд.", (Израиль)
			Воздуховод орофарингеальный одноразовый стерильный, размер: №№ 6, 9, 12	РЗН 2021/13426	"Чжэцзян Хайшэн Медикал Дивайс Ко., Лтд.", (Китай)
1.9	Средство (губка, пластина) кровоостанавливающее коллагеновое биодegradируемое	1 шт.	Губка коллагеновая кровоостанавливающая по ТУ 9393-004-13380984-2009	ФСР 2011/10301	ЗАО "Зеленая дубрава", (Россия)
			Губка биодegradируемая коллагеновая гемостатическая, ранозаживляющая, противожелочная по ТУ 9393-001-00417467-2006, типоразмер: губка гемостатическая (с фурацилином и борной кислотой), (50±5)х(50±5)х(7±2) мм/ (90±10)х(90±10)х(7±2) мм	ФСР 2012/13528	ООО "Лужский завод "Белкозин", (Россия)
1.10	Комплект держателей инфузионных флаконов (из 2-х держателей на 200 мл и 400 мл, с кронштейнами)	1 комп.	Изделия для фиксации емкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013: Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-"Медплант"	РЗН 2014/1603	ООО "МЕДПЛАНТ", (Россия)
1.11	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	2 шт.	Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застёжкой в виде петли «Альфа» по ТУ 9398-041-00149535-2006	ФСР 2012/13201	ООО «Объединение Альфапластик», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10	ФСР 2010/07432	ООО НПФ «МИРАЛ», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий ЖК-"Медплант" по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014: Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-"Медплант"; Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-"Медплант".	РЗН 2014/2113	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007	ФСР 2007/00032	ООО «Объединение Альфапластик», (Россия)
1.12	Жгут для внутривенных инъекций	1 шт.	Жгут кровоостанавливающий материал-эластичный для само- и взаимопомощи по ТУ 9398-026-42965160-2004	ФСР 2009/06312	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий "ФЭСТ" из эластичной тесьмы по ТУ 9398-057-10973749-2006	ФСР 2011/10332	ООО "Предприятие "ФЭСТ", (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007	ФСР 2007/00032	ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха	ФСЗ 2012/12991	ООО "Киевгума", (Украина)
			Жгут кровоостанавливающий венозный с пластмассовой застёжкой марки «MERIDIAN»	ФСЗ 2010/06464	ПРОДАКТС ЛТД "Соединенное Королевство"
			Изделия медицинские для забора крови: жгут многоразовый; жгут одноразовый	ФСЗ 2011/09572	"Грейнер Био-Уан ГмбХ", (Австрия)
1.13	Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий жесткий для операций, изогнутый, №1, 219мм; Зажим кровоостанавливающий, с травматической насечкой, изогнутый.	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий; Зажим кровоостанавливающий, с травматической насечкой, изогнутый	ФСЗ 2010/07357	"СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ", (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): изогнутый	ФСЗ 2012/12517	"Саммар Интернешнл", (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый, изогнутый №2; Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый № 2, длиной 196 мм "ЗКМ-М/З-В"; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый изогнутый №3; Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №3; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый, изогнутый №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медицинский инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
1.14	Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий, с травматической насечкой, прямой, 160мм	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий	ФСЗ 2010/07357	"СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ", (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): прямой	ФСЗ 2012/12517	"Саммар Интернешнл", (Пакистан)

			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №2; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубый зубчатый прямой №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медио-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
1.15	Катетер (канюля) для периферических вен (разных размеров)	4 шт.	Катетеры внутривенные однократного применения	ФСЗ 2010/08754	«КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс», (Германия)
			La-med I.V. cannula - канюли с портом и без порта	ФСЗ 2009/05411	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			1. Катетер внутривенный с дополнительным портом и крылышками (POLYFLON). 2. Катетер внутривенный без дополнительного порта, но с крылышками (POLYCAN). 3. Катетер внутривенный без дополнительного порта и с малыми крылышками (POLYNEO). 4. Катетер внутривенный без дополнительного порта и без крылышек (POLYON). 5. Катетер внутривенный без дополнительного порта и без крылышек (POLYWIN).	ФСЗ 2011/09113	«Поли Медикьюр Лимитед», (Индия)
			Канюля внутривенная с ПТФЭ катетером BIO-FLON, типоразмеры: G16, G18, G20, G22	РЗН 2014/1679	"Био-Мед Хэлскеа Продактс Прайвет Лимитед", (Индия)
			Катетеры внутривенные периферические TOPMED: G16, G18, G20, G22	РЗН 2018/7555	"Веллмед Интернэшнл Индастриз Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетеры (канюли) внутривенные, стерильные однократного применения в вариантах исполнения с принадлежностями: Катетер (канюля) внутривенный, стерильный однократного применения с крыльями и инъекционным портом CK-FLOH (СК-ФЛОН): G16, G18, G20, G22	РЗН 2017/5585	"Диспозейф Хелс энд Лайф Кеа Лтд.", (Индия)
1.16	Устройство для вливания в малые вены (игла-катетер «бабочка»)	2 шт.	Канюля инфузионная (игла-«бабочка») SITEKMED для вливания в малые вены, однократного применения.	ФСЗ 2007/00509	«ШАНЬДУН ЖИБО ШАНЧЮ-АНЬ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД.», (Китай)
			Набор (игла-бабочка, катетер, луэр-адаптер).	ФСЗ 2010/06622	«Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд.», (Китай)
			Устройство для вливания в малые вены однократного применения	ФСЗ 2008/02135	"КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс", (Германия)
			Устройство для вливания в малые вены однократного применения.	ФСЗ 2009/05662	"СФ Медикал Продактс ГмбХ", (Германия)
			La-med I.V. cannula - канюли с портом и без порта	ФСЗ 2009/05411	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетер внутривенный с дополнительным портом и крылышками (POLYFLON). 2. Катетер внутривенный с дополнительным портом, крышкой «snap-fit» и перфорированными крылышками (POLYFLEX). 3. Катетер внутривенный без дополнительного порта, но с крылышками (POLYCAN). 4. Катетер внутривенный без дополнительного порта и с малыми крылышками (POLYNEO).	ФСЗ 2011/09113	«Поли Медикьюр Лимитед», (Индия)
1.17	Катетер уретральный детский однократного применения стерильный	1 шт.	Катетеры урологические APREXMED: Фолея, Нелатона, наружный мужской, урологический женский	ФСЗ 2008/02858	"Алексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды), Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд., (Китай)
			1. Катетер урологический (катетер Фолея), размерный ряд от 6 до 26 Fr, с шагом 2 Fr. 2. Катетер урологический (катетер Нелатона), размерный ряд от 6 до 20 Fr, с шагом 2 Fr	ФСЗ 2008/03465	"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)
			Катетер урологический	ФСЗ 2012/11565	"М. Шиллинг ГмбХ Медикл Продактс", (Германия)
			Катетеры одноразовые урологические Нелатона, Фолея	ФСЗ 2011/10794	«Хайань Канджин Медикал Инструмент Ко, Лтд.», (Китай)
1.18	Катетер уретральный женский однократного применения стерильный	1 шт.	Катетер уретральный: Нелатон; Женский Nitex; Фолея Nitex.	ФСЗ 2008/00072	«Бикакцилар Тибби Джехалар Санай ве Тиджарет А. С.» (Турция)
1.19	Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный	1 шт.	Катетеры медицинские однократного применения по ТУ ВУ 190682947.002-2008(2010: 2011): Катетер Нелатона мужской (Nelaton male); Катетер женский (Female); Катетер Тиманна мужской (Tiemann male)	ФСЗ 2010/06636	ООО "Ассомедика", (Республика Беларусь)
			Катетер Нелатона мужской, типоразмер: Ch/Fr 16, Ch/Fr 18, Ch/Fr 20. Катетер Нелатона женский: Ch/Fr 6, Ch/Fr 8, Ch/Fr 10, Ch/Fr 12. Катетер Нелатона с концом по Тиманну мужской: Ch/Fr 16, Ch/Fr 18, Ch/Fr 20. Катетер Нелатона с концом по Тиманну женский: Ch/Fr 6, Ch/Fr 8, Ch/Fr 10, Ch/Fr 12. Катетер Нелатона лубрицированный: Ch/Fr 16, Ch/Fr 18, Ch/Fr 20. Катетер Нелатона лубрицированный	РЗН 2018/7355	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)



			женский: Ch/Fr 6, Ch/Fr 8, Ch/Fr 10, Ch/Fr 12		
1.20	Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см)	5 шт.	Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный на тканой основе, гипоаллергенный размер 1,9х7,2 см; на нетканой основе, гипоаллергенный, размер 1,9х7,2 см; на полимерной основе, гипоаллергенный размер 1,9х7,2 см Лейкопластырь бактерицидный Лейкопластырь медицинский бактерицидный Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подушкой размером 1,9х7,2 см	ФСЗ 2008/01495 ФСЗ 2008/01958 ФСЗ 2011/09594 ФСР 2008/03213	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко. Лтд.", (Китай) «ФармЛайн Лимитед», (Великобритания) «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко.Лтд.», (Китай) АО "ВЕРОФАРМ", (Россия)
1.21	Лейкопластырь рулонный (не менее 2 см х 5 м)	1 шт.	Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе "Импэкс-Мед" Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009: полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием или без него, намотанная на картонную или пластмассовую шпулю (катушка) 500х2,0 см Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах Лейкопластырь медицинский фиксирующий	ФСЗ 2008/01442 ФСЗ 2008/02807 ФСР 2009/05363 ФСЗ 2008/01959 ФСЗ 2011/09593	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко. Лтд.", (КНР) "Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко.Лтд.", (Китай) АО "ВЕРОФАРМ", (Россия) «ФармЛайн Лимитед», (Великобритания) «Чанчжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко.Лтд.», (КНР)
1.22	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками	6 шт.	Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010 Маска медицинская одноразовая трехслойная Маска медицинская стандарт (классиф) по ТУ 9398-001-65578626-2010 Маска 3-х слойная Маска медицинская из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 трехслойная	ФСР 2010/08512 ФСЗ 2008/02100 ФСР 2010/09673 ФСЗ 2011/10269 ФСР 2010/07908	ООО «МАСКА», (Россия) «Вухан Лифарма Кемикалз Ко. Лтд.», (Китай) ООО "КИТ", (Россия) "ЛЕБОО ХЕЛСЗА ПРОДАКТС ЛИМИТЕД", (Китай) ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", (Россия)
1.23	Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л)	1 шт.	Полиэтиленовые пакеты одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А (ПО-01 "МедПак"), Б (ПО-02 "МедПак") по ТУ 9464-001-84354588-2008	ФСР 2008/02806	ООО «МедПак», (Россия)
1.24	Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л)	1 шт.			
1.25	Набор для канюлизации губчатых кистей для оказания скорой медицинской помощи (шприц, пистолет либо иное устройство установки канюли для внутривенных инъекций для взрослых и детей с канюлей (канюлями) для внутривенных инъекций, системой для внутривенного введения лекарственных препаратов)	1 шт.	Прибор инфузионный внутривенный B.I.G. Adult (Blue 15G); Прибор инфузионный внутривенный B.I.G. Pediatric (Red 18G). Система внутривенная инфузионная EZ-IO с принадлежностями Иглы медицинские трубчатые по ТУ 9432-002-87251883-2010	РЗН 2018/6799 ФСЗ 2008/02759 ФСР 2010/08346	"ВаисМед Лтд.", (Израиль) «Телефлекс Медикал Европа Лимитед», (Ирландия) ООО "Нижегородский Завод Сложного Медицинского Инструмента "Парацельс", (Россия)
1.26	Набор для катетеризации центральных вен для оказания скорой медицинской помощи (игла для пункции центральной вены, катетер подключичный с проводником)	1 шт.	Набор для катетеризации центральных вен Venoflex APXEMED Наборы для катетеризации центральных вен (по Сельдингеру): одноканальный (ZKDN); двухканальный (ZKDN2); трехканальный (ZKDN3); четырехканальный (ZKDN4). Набор одноразовый с центральным венозным катетером	ФСЗ 2010/06510 ФСЗ 2010/06121 ФСЗ 2010/08300	"Алексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды) ООО "Балтон Сп.з о.о.", (Польша) "Лепу Медикал Технолоджи (Пемин) Ко., Лтд.", (Китай)
1.27	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.	Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010: ножницы	ФСР 2010/07370	ОАО «МИЗ им. М.Горького», (Россия)

			Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ФСЗ 2012/13136	"ХОБРИ ИНТЕРНЕШНЛ", (Пакистан)
			Ножницы медицинские для разрезания повязок по Листеру, размеры 14,5 см; 18,0 см	РЗН 2015/2724	"Джерман Хелскере Индустри (ПВТ)ЛТД", (Пакистан)
			Инструменты медицинские режущие: ножницы	ФСЗ 2012/12515	"Саммар Интернешнл", (Пакистан)
			Инструменты медицинские хирургические режущие: ножницы	ФСЗ 2008/02888	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструменты режущие с острой (режущей) кромкой	РЗН 2013/592	"Хилбро Интернешнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
1.28	Пакет гипотермический	3 шт.	Пакет охлаждающий (гипотермический) для оказания первой медицинской помощи "АППОЛО" по ТУ 9398-014-42965160-2011	ФСР 2011/12263	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» по ТУ 9398-003-10973749-2016: пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №1; пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №2.	ФСР 2007/01584	ООО «Предприятие «ФЭСТ», (Россия)
1.29	Пакет перевязочный медицинский стерильный	3 шт.	Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93	ФСР 2008/03791	ООО «ИНГАКАМФ», (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93	ФСР 2010/08699	ООО «ПО «МЕДТЕКС», (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский по ГОСТ 1179-93	ФСР 2010/07563	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Пакеты перевязочные медицинские стерильные по ГОСТ 1179-93 следующих типов: пакет индивидуальный; пакет первой помощи с одной подушечкой	РЗН 2014/1656	ООО ПКФ "Пионер", (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный по ГОСТ 1179	ФСР 2009/05126	ООО "Предприятие "ФЭСТ", (Россия)
			Пакеты перевязочные медицинские стерильные в следующих исполнениях: индивидуальный; обыкновенный; первой помощи с одной подушечкой и первой помощи с двумя подушечками по ГОСТ 1179-93	ФСР 2007/01319	ООО "ПКЦ СпецТехСбыт", (Россия)
1.30	Перчатки медицинские нестерильные смотровые	6 пар	Перчатки смотровые латексные нестерильные опудренные и неопудренные	ФСЗ 2010/06671	"Тан Син Лиан Индастриз Сдн. Бхд", (Малайзия)
			Перчатки диагностические из натурального и синтетического латекса нестерильные с текстурированной поверхностью, с гладкой поверхностью, опудренные и неопудренные	ФСЗ 2009/05162	"ТОП ГЛАВ СДН БХД", (Малайзия)
			1. Перчатки латексные опудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Велову». 2. Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Велову». 3. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Велову».	ФСЗ 2011/10210	"Макстер Глов Маньюфакчуринг СДН БХД (229862-Х)", (Малайзия)
			Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные	ФСЗ 2009/05130	Топ Глав Сдн Бхд (Малайзия)
			Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: латексные, виниловые, нитриловые (опудренные и неопудренные, гладкие и текстурированные), особопрочные удлиненные.	ФСЗ 2011/09747	"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", (Германия)
			Перчатки хирургические стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2007	ФСР 2007/00196	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
1.31	Перчатки хирургические стерильные	3 пары	Перчатки латексные хирургические стерильные по ТУ 9398-001-70224340-2008	ФСР 2008/02982	ООО «Фарм-Глобал», (Россия)
			Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные одноразовые торговой марки «Medic-Dent»	ФСЗ 2011/10210	"Макстер Глов Маньюфакчуринг СДН БХД (229862-Х)", (Малайзия)
			Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса опудренные. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные. Перчатки хирургические стерильные из синтетического латекса неопудренные по ТУ 9398-002-54854000-2011	ФСР 2011/12244	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
			Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005 варианты исполнения: Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм в лотке	ФСР 2010/07936	ООО «Полимерные изделия», (Россия)
1.32	Пинцет медицинский	2 шт.	Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011 в следующих исполнениях: пинцет хирургический ПХ 150х1,5; пинцет хирургический общего назначения (нагато-	ФСР 2007/00268	ОАО "Медио-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)



			ванный холодной штамповкой) ПХ 150х2,5; пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2.		
			Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (заклинные): Пинцеты	ФСЗ 2012/12517	"Саммар Интернешнл", (Пакистан)
1.33	Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см х 200 см)	1 шт.	Покрывало спасательное для пострадавших от перегрева или переохлаждения, для комплектации аптечек первой медицинской помощи (Rettungsdecke)	ФСЗ 2011/08867	«Лайна-Верте ГмбХ», (Германия)
			Покрывало спасательное от перегрева или переохлаждения пострадавших по ТУ 9398-001-74050508-2005	ФСР 2010/06812	ООО «ШАНС», (Россия)
			Покрывало спасательное изотермическое по ТУ 9398-014-26528997-2011	ФСР 2011/11915	ООО НПФ «МИРАЛ», (Россия)
			"Покрывало спасательное для оказания первой медицинской помощи пострадавшим от перегрева или переохлаждения"	РЗН 2013/891	"Имеко ГмбХ энд Ко КГ", (Германия)
1.34	Салфетка антисептическая из нетканного материала спиртовая (не менее 12,5 см х 11,0 см)	20 шт.	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "МК Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, типоразмер, мм: 110х125; 115х250; 120х150; 125х125; 125х150; 130х150; 130х180; 130х200; 135х145; 135х185; 135х200; 140х190; 140х200; 150х150; 150 х 200	ФСР 2009/05438	ООО «М.К. Асептика», (Россия)
			Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013 следующих типоразмеров: 135х185 мм, 110х125 мм.	РЗН 2014/1695	ООО "Фармэль", (Россия)
			Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта, одноразовая по ТУ 9393-006-56334457-2008	ФСР 2008/03704	ООО «Лейко», (Россия)
			Салфетки спиртовые стерильные по ТУ 9393-004-52707619-2006	ФСР 2007/01592	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
			Салфетки дезинфицирующие для инъекций из нетканого материала пропитанного 70% водно-спиртовым раствором, одноразовые по ТУ 9393-001-58716163-2003	ФСР 2008/02512	ООО «НПФ «Медтехмаркет», (Россия)
			Салфетки антимикробные из трикотажного полотна, стерильные "Активтекс" по ТУ 9393-001-83188142-2008; Активтекс-Х с хлоргексидином	ФСР 2009/06117	ООО "АЛЬТЕКС", (Россия)
1.35	Средство антисептическое с перекисью водорода	3 шт.	Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода по ТУ 9393-053-42965160-2012	РЗН 2013/716	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
1.36	Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака	3 шт.	Салфетка для стимуляции дыхания "РАДИАН" по ТУ 9398-001-86566053-2009	ФСР 2009/06146	ООО «РАДИАН-М» (Россия)
			Салфетка для стимуляции дыхания «ЭВТЕКС» по ТУ 9393-006-14959781-2012	РЗН 2013/847	ООО "ЭВТЕКС", (Россия)
1.37	Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см х 14 см, № 10)	1 уп.	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2008/03219	ООО «АПСАНА», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские по ГОСТ 16427-93 типоразмеры: 16 см х 14 см.	ФСР 2009/05213	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2008/03225	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 в следующих исполнениях: четырехслойные (16 см х 14 см) стерильные; двухслойные (16 см х 14 см) стерильные; однослойные (16 см х 14 см) стерильные.	ФСР 2011/11141	ООО "НЬЮФАРМ", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2011/12069	ООО ПКФ "Ахтамар", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2007/01316	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
1.38	Скальпель стерильный одноразовый	2 шт.	Скальпели, лезвия для скальпелей одноразовые АРЕХМЕД	ФСЗ 2008/02862	"Алексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Скальпели хирургические одноразовые по ТУ 9433-121-05519988-2002	ФСР 2012/13462	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Скальпель одноразовый	ФСЗ 2011/11258	"Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ", (Германия)
			Скальпель одноразовый (Scalpels)	ФСЗ 2009/03547	"Беромед ГмбХ Хоспитал Продуктс", (Германия)
			Скальпель	ФСЗ 2008/02137	"Риббел Интернэшнл Лтд.", (Индия)
			Инструменты хирургические одноразовые CERTUS	РЗН 2017/5689	"Хуайинь Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (КНР)

			Скальпель одноразовый хирургический VOLKMANN	РЗН 2018/8001	"Фольманн МедицинТехник ГмБХ", (Германия)
			Скальпель стерильный	ФСЗ 2012/12980	"Феэер Сэйфти Рэйзор Ко, ЛТД.", (Япония)
1.39	Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе цеолитов или алюмосиликатов кальция и натрия или гидросиликата кальция (не менее 50г) и/или на основе хитозана	2 шт.	Средство перевязочное гемостатическое, «ГЕМОСТОП®», стерильное по ТУ 9393-001-8152288-2009	ФСР 2010/07420	ФГУП НПЦ Фармзащита ФМБА России, (Россия)
			Средство перевязочное гемостатическое "ТЕМОПАС" стерильное по ТУ 9393-001-40086098-2015, в индивидуальных упаковках по 50, 75 и 100 г	РЗН 2016/4680	ООО "МДК Медика", (Россия)
			Средство перевязочное гемостатическое "ТЕМОСПАС М", стерильное по ТУ 9393-002-40086098-2015, в индивидуальных упаковках по 50, 75 и 100 г	РЗН 2017/6201	ООО "МДК Медика", (Россия)
			Средство гемостатическое «Гемофлекс» Про и «Гемофлекс» Комбат, стерильное по ТУ 9393-003-67539369-2013	РЗН 2014/1691	ООО "Инмед", (Россия)
			Средство местное гемостатическое, "ЭЛЛАРГА", стерильное по ТУ 9393-001-90501533-2015	РЗН 2017/6661	ООО "НОВР", (Россия)
			Средство гемостатическое стерильное "Теполос" по ТУ 9393-003-33129878-2016	РЗН 2017/5945	ООО "ЛЮМИ", (Россия)
1.40	Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокaproновой кислотой (не менее 6 см x 10 см)	2 шт	Повязка асептическая нетканая с аминокaproновой кислотой гемостатическая стерильная ПАГ "АППОЛО-Гем" по ТУ 9393-021-42965160-2009	ФСР 2009/05054	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)
			Салфетки гемостатические с альгинатом натрия и с-аминокaproновой кислотой «Колетекс-АК» и с альгинатом натрия, с-аминокaproновой кислотой и лидокаином «Колетекс-АКЛ» по ТУ 9393-019-58223785-2011	ФСР 2011/11523	ООО "КОЛЕТЕКС", (Россия)
1.41	Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см)	1 шт.	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93	ФСР 2007/01316	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93: размер 70 x 68 см	ФСР 2011/12069	ООО ПКФ "Ахтамар", (Россия)
1.42	Стерильная салфетка или простыня (не менее 70 см x 140 см)	1 шт.	Простыни и салфетки медицинские, одноразовые, стерильные по ТУ 9398-024-34357587-2010: простыня; салфетка	ФСР 2010/09130	ЗАО "Мастерица", (Россия)
1.43	Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с anerоидным манометром	1 шт.	Измеритель артериального давления мембранный ИАДМ-01-Медтехника с принадлежностями по ТУ 9441-015-27418804-2007	ФСР 2008/01763	ООО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)
			Измеритель артериального давления механический ИАДМ - ТРИВЕС-ПЧЗ-М" по ТУ 9441-002-33094849-2005 с принадлежностями	ФСР 2010/08666	ООО "Тривес", (Россия)
			Измерители артериального давления серии ИАД-01 - "Адютор" по ТУ 9441-003-58286981-2014	РЗН 2015/3206	ООО "АДЬЮТОР", (Россия)
1.44	Термометр медицинский в футляре	1 шт.	Термометры медицинские цифровые: AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13, AMDT14	РЗН 2013/1314	"Амрус Энтерпрайзис Лтд.", (США)
			Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic	ФСЗ 2009/05423	ОМРОН ХЕЛСКЭА Ко., Лтд., (Япония)
1.45	Трубка ректальная газоотводная детская одноразовая	1 шт.	Трубки ректальные следующих типов: газоотводные; для глубоких клизм; для новорожденных по ТУ 9398-006-05769082-2007	ФСР 2007/00194	ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)
			Зонд АРЕХМЕД ректальный	ФСЗ 2008/02867	"Алексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцинью Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетер (зонд) ректальный	ФСЗ 2008/02333	"КонваТек Лимитед", (Соединенное Королевство)
			Катетер стерильный ректальный	ФСЗ 2012/12486	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетер медицинский однократного применения Inektа ректальный	ФСЗ 2012/12814	"Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетеры из полимерных материалов по ТУ 9398-002-12966417-2007, ректальные.	ФСР 2010/07388	ЗАО "Витал", (Россия)
			Зонд ректальный.	ФСЗ 2008/03466	"Чжецзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)
			Катетер ректальный Nitex	ФСЗ 2008/00072	"Бикакцилар Тибби Джехазлар Санай ве Тиджарет А. С.", (Турция)



1.46	Устройство для вливания инфузионных растворов	2 шт.	Устройства для вливания, переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов; Устройство инфузионное однократного применения с пластиковой иглой.	ФСЗ 2009/05662	«СФ Медикал Продактс ГмбХ», (Германия)
			Устройство инфузионное одноразового использования (с иглой)	ФСЗ 2010/07086	«Хуайань Сити Хэнчунь Медикал Продакт Ко., Лтд.», (Китай)
			Системы: инфузионная	ФСЗ 2009/05610	«Веньчжоу Бэйпу Сайенс энд Технологджи Ко., Лтд.», (Китай)
			Системы: инфузионная	ФСЗ 2011/09652	«Группа Цзянсийских Медицинских Оборудований Хунда» (Китай)
			Устройство для вливания инфузионных растворов "Вольф Медикал"	РЗН 2016/3514	"Чанчжоу Тонда Медикал Эппайенс Ко., Лтд" (Китай)
			Система инфузионная стерильная для однократного применения с иглами	ФСЗ 2011/09586	"Бейджинг Форнерс Медикал Эквипмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Устройство одноразовое для вливания инфузионных растворов, с иглой ЕСО-IV20, варианты исполнения: IV20-V1, IV20-V2, IV20-V3	ФСЗ 2010/06983	"Цзянсу Чжюй Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Устройства для вливания инфузионных растворов одноразовые SITEKMED	ФСЗ 2007/00509	ШАНЬДУН ЖИБО ШАНЧЮАНЬ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД., (Китай)
1.47	Фонарик диагностический с элементом питания	1 шт.	Прибор для первичной визуальной диагностики LD-V09	ФСЗ 2012/13398	«Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.», (Сингапур)
1.48	Фонендоскоп	1 шт.	Фонендоскоп CS Medica CS-404	ФСЗ 2009/04074	"Шеньчжень Комплекссервис Индастриал энд Трэйд Ко., Лтд.", (Китай)
			Стетофонендоскоп Б.Е.Вотчала СФОН-01 по ТУ 64-1-3121-77	ФСР 2010/07228	Закрытое акционерное общество "Нижнетагильский медико-инструментальный завод", (Россия)
			Стетоскоп LD с принадлежностями варианты исполнения: LD Prof-Plus; LD Prof-I; LD Prof-II; LD Prof-III; LD Prof-IV; LD Focus; LD Cardio; LD Medic; LD Special (длина трубок 56 см или 72 см); LD SteTime	ФСЗ 2008/01941	«Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд.», (Сингапур)
			Стетоскопы серии WS, модели: WS-1, WS-2, WS-3, WS - 8R	РЗН 2015/3080	"Би. Велл Свисс АГ", (Швейцария)
			Стетофонендоскопы «СФ-Адютор» по ТУ 26.60.12-002-58286981-2019	РЗН 2014/1813	ООО "АДЬЮТОР", (Россия)
1.49	Шпатель стерильный	10 шт.	Шпатели медицинские деревянные однократного применения по ТУ 9398-107-43892776-2010	ФСР 2010/08880	АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)
			Шпатель медицинский одноразовый деревянный по ТУ 9434-002-83144357-2010	ФСР 2010/08671	ООО "Ардейл-Импэкс", (Россия)
			Шпатель медицинский деревянный шлифованный стерильный по ТУ 9398-008-56334457-2010	ФСР 2010/08869	ООО «Лейко», (Россия)
			Шпатель медицинский деревянный стерильный по ТУ 32.50.13-001-24986833-2017	ФСР 2012/13410	ООО «Ирбис», (Россия)
			Шпатель медицинский одноразовый стерильный	ФСЗ 2012/12456	"Далиан Ронгбанг Медикал Хелси Девайсес Ко., Лтд.", (Китай)
			Шпатель для языка	РЗН 2013/591	"Хилбро Интернэшнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
			Шпатель терапевтический TOPMED, варианты исполнения: деревянный, деревянный педиатрический, пластиковый (ПВХ)	РЗН 2017/6438	"Нинбо Грейтэкс Трэйдинг Ко., Лтд.", (Китай)
1.50	Шприц инъекционный однократного применения (2 мл)	4 шт.	Шприцы инъекционные однократного применения, стерильные по ТУ 32.50.13-001-25597097-2005	ФСР 2010/07477	АО «Медполимер ЛТД», (Россия)
			Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008	ФСР 2008/03253	ООО «Стерин», (Россия)
			Шприцы стерильные инъекционные однократного применения с иглами	ФСЗ 2009/05672	«СФ Медикал Продактс ГмбХ», (Германия)
1.51	Шприц инъекционный однократного применения (5 мл)	4 шт.	Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005	ФСР 2010/08648	АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)
			Шприцы одноразовые стерильные АРЕХMED объемом, мл: 2,5; 5; 10; 20	ФСЗ 2008/02859	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канц-"
1.52	Шприц инъекционный однократного применения (10 мл)	2 шт.	Шприцы одноразовые стерильные с иглами и без игл SITEKMED	ФСЗ 2007/00530	"Шаньдун Жибо Шанчюань Медикал Инструментс Ко. Лтд.", (Китай)



			Шприцы одноразовые трехдетальные стерильные объемом 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл с иглами	ФСЗ 2011/09587	"Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд", (Китай)
1.53	Шприц инъекционный однократного применения (20 мл)	5 шт.	Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные по ТУ 32.50.13-001-96673695-2017	ФСР 2010/07710	ООО "МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН", (Россия)
			Шприцы инъекционные одноразовые с иглами и без игл, объем: 2мл, 5мл, 10мл, 20мл	ФСЗ 2008/02301	"Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Эпплиансе Ко. Лтд", (Китай)
Прочие средства					
1.54	Ампульница или специально предназначенное для хранения (применения) ампулированных лекарственных препаратов приспособление	1 шт.		-	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
1.55	Чехол для инструментария	1 шт.		-	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
1.56	Чехол для перевязочных материалов	1 шт.		-	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 20

цифрами

(двадцать)

прописью

) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПУШИН А.В.

должность, ФИО

подпись



ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»

А.В. Пушин

« 26 » апреля 2021 г.



**НАБОР АКУШЕРСКИЙ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ
ПОМОЩИ НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ»
(ТУ 9437-013-52777873-2014).**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.005РЭ

*Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

ОКПД2 32.50.13.190

ТУ 9437-013-52777873-2014

Рег. уд. № РЗН 2015/2746 от __.__.20__г.

ООО «МЕДПЛАНТ»

Набор акушерский

для оказания скорой медицинской помощи

НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ»

ТУ 9437-013-52777873-2014

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛКЯМ.942439.005РЭ

Ver.009

Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Сделано в России

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	1
2. Область применения.....	1
3. Условия применения.....	1
4. Основные технические характеристики.....	1
5. Комплект поставки.....	1
6. Описание изделия.....	2
7. Подготовка к работе и правила работы с укладкой.....	2
8. Транспортирование, хранение и уход.....	4
9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия.....	4
10. Указания по утилизации.....	4
11. Гарантии производителя.....	4
12. Контактная информация производителя	4
13. Свидетельство о приёме	5
Перечень вложений укладки.....	5

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ» предназначен для оказания скорой медицинской акушерской помощи.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры упаковок приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Параметр	Серия	В сумке медицинской универсальной СМУ-02	В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2
Габаритные размеры, мм		(530x260x260) ±50	(440x252x340) ±50
Масса укладки (не более), кг		5	5,9
Номинальная нагрузка (не более), кг		12	12

Средний срок службы: не менее 3 лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C
- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °C.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сумка медицинская универсальная СМУ-02 или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 – 1 шт;
2. Комплект вложений – 1 компл. (согласно. табл. 2);
3. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-Пм/2;
2. Столик манипуляционный для УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

6. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи НАСП-02-«МЕДПЛАНТ» представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов. Набор выпускается в сумке медицинской универсальной СМУ-02 или в футляре-саквояже УМСП-02-Пм/2.

Сумка медицинская универсальная СМУ-02

Изготовлена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ 420Д, дно сумки изготовлено из непромокаемого тентового материала, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию сумки. Для защиты вложений от механических повреждений, в стенках сумки находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из полирекса НПЭ. Для размещения вложений сумка имеет 3 кармана, основной отсек и отсек для хранения документов. На внешней части сумки расположен держатель для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и эмблема красного креста. По периметру корпуса сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в тёмное время суток. Для удобства переноски сумка снабжена двумя ручками (для ношения одной рукой) и плечевым ремнём, со специальной накладкой, которая предохраняет его от сминания.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2

(ТУ 9437-006-52777873-2010)

Адаптирован к данному набору. Футляр изготовлен из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому набора.

На верхней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в тёмное время суток. Футляр надёжно защищает элементы набора от повреждений и легко обрабатывается, поэтому набор в футляре особенно удобен для частого использования.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С УКЛАДКОЙ

7.1. Изделия и инструменты в наборе уложены для транспортировки. Перед началом работы с набором изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с набором внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав укладки.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеет жёсткий каркас и защищает элементы укладки от повреждений. Однако, при транспортировке укладки и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов укладки и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на сумку и рюкзак при их использовании. Чтобы исключить повреждение изделий не нагружайте их более чем на 12 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с укладкой продлевает срок ее службы.

ВНИМАНИЕ!

● **Не используйте укладку, если вы не имеете достаточной квалификации!**


7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить. Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат.

ВНИМАНИЕ!

● **Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!**

7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта, входящего в состав футляра, как показано на Рисунке 1.

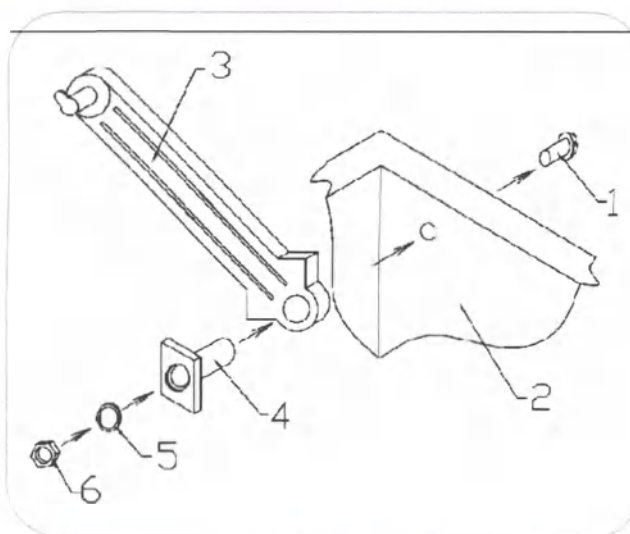

Состав ремкомплекта:

- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4х1 – 2 шт.
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.

Обозначения на рисунке:

- 1 – винт;
- 2 – корпус футляров, внутренняя сторона
- 3 – тяга
- 4 – втулка
- 5 – пружинная шайба
- 6 – гайка

Рис. 1 Замена тяги футляра-саквояжа УМСП-01-Пм/2 с использованием ремонтного комплекта

7.7. Сумки самостоятельному ремонту не подлежат.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УХОД

8.1. Транспортирование укладки может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75% при 15 °С.

8.2. Укладки могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

ВНИМАНИЕ! Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой медицинской помощи в области акушерства. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сумки, рюкзак и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения укладки утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2. Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, рюкзаки, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3. Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.4. В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, **ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!**

11.5. Рекламации направлять на адрес производителя

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г. Москва, Волгоградский пр-кт, д.42, корп.5, эт.2, пом.1, ком.296-318.

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Набор акушерский для оказания скорой медицинской помощи НАСМП-02-«МЕДПЛАНТ»:

Наименование	Артикул
В сумке медицинской универсальной СМУ-02	
В футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	

Соответствует ТУ 9437-006-52777873-2010 и признан годным для эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки, что поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ УКЛАДКИ:
Таблица 2

N	Наименование медицинского изделия	Кол-во, не менее	Наименование изделия в соответствии с РУ	Номер РУ	Производитель
2.1	Воротник-шина шейная для новорожденных (или комплект шин)	2 шт.	Комплект шин для иммобилизации шейного отдела позвоночника типа Шанца ВШ по ТУ 9438-002-16895134-2003	ФСР 2010/08382	ООО «Медион», (Россия)
			Бандажи согревающие, компрессионные и фиксирующие для головы и шеи - "Крейт" по ТУ 9396-002-96814693-2006: бандаж для шейного отдела - «Крейт».	ФСР 2010/09773	ООО "Крейт", (Россия)
2.2	Глазная повязка стерильная (не менее 55 мм x 70 мм)	2 шт.	Повязки сорбционные Айюпад/ Еусорад (стерильно)	ФСЗ 2011/11281	"Пауль Хартманн АГ", (Германия)
			Пластыри медицинские ГЛАЗНЫЕ на нетканой основе по ТУ 32.50.50-037-17707123-2019: Пластыри ГЛАЗНЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ (60 x 48 мм)	РЗН 2019/8882	ООО "Альпина Пласт", (Россия)
2.3	Грелка	2 шт.	Грелки термохимические солевые (малые, средние, большие) по ТУ 9398-001-29888905-94	ФСР 2008/02193	ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)
			Изделия медицинские для ухода за больными марки "MERIDIAN": Грелки объемом 1,0; 1,5; 2,0; 3,0л	ФСЗ 2009/05663	"МЕРИДИАН МЕДИКАЛ ПРОДАКТС ЛТД", (Соединенное Королевство)
			Грелки резиновые тип А и тип Б	ФСЗ 2008/01235	ООО "Киевгума", (Украина)
			Термоактивная грелка BodiHeat	ФСЗ 2010/06756	"Окамото Индастриз, Инк.", (Япония)
2.4	Зажим Кохера	2 шт.	Инструменты медицинские хирургические зажимные	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимный	ФСЗ 2010/07357	«СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ», (Германия)
			Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (зажимные): Kocher	ФСЗ 2012/12517	«Саммар Интернешнл», (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011	ФСР 2007/00268	ОАО "Медио-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
2.5	Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий жесткий для операций, изогнутый, №1, 219мм; Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, изогнутый	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий; Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, изогнутый	ФСЗ 2010/07357	«СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ», (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): изогнутый	ФСЗ 2012/12517	«Саммар Интернешнл», (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый, изогнутый №2; Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый №2, длиной 196 мм "ЗКИ-МИБ-В"; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый изогнутый №3; Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №3; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый, изогнутый №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медио-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
2.6	Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий с атравматической насечкой, прямой, 160мм	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий	ФСЗ 2010/07357	«СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ», (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): прямой	ФСЗ 2012/12517	«Саммар Интернешнл», (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый прямой №2; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый зубчатый прямой №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медио-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)



2.7	Зажим пуповины (и/или скобы для пуповины и/или клипса)	6 шт.	Зажим пупочный одноразовый стерильный АРЕХМЕД	ФСЗ 2008/02865	"Апексмед Интернешнл Б.В.", (Нидерланды) "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Зажим пупочный для новорожденных полимерный одноразовый стерильный по ТУ 9435-058-44942795-2010	ФСР 2011/10731	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Изделия медицинские для неонатологии: Зажим пуповины	ФСЗ 2012/11775	"М. Шиллинг ГмбХ Медикл Продактс", (Германия)
			Зажим для пуповины одноразовый SUYUN	ФСЗ 2010/06848	"Цзянсу Суюн Медикал Материалс Ко., Лтд.", (Китай)
			Изделия медицинские одноразовые для первичной обработки новорожденных: Зажим для пуповины	ФСЗ 2011/10589	"Цзянсу Яда Технолоджи Групп Ко., Лтд.", (Китай)
			Зажим пуповины новорожденного одноразового применения по ТУ ВУ 600012098.015-2007	ФСЗ 2008/02242	Унитарное Предприятие "Фре-Бор" (Республика Беларусь)
			Изделия медицинские для неонатологии: Зажим пуповины	ФСЗ 2012/11775	"М. Шиллинг ГмбХ Медикл Продактс", (Германия)
2.8	Игла атравматическая	1 шт.	Иглы атравматические одноразового применения, прямые и изогнутые по ТУ 9398-003-24648800-2011	ФСР 2008/03992	Общество с ограниченной ответственностью "Волоть", (Россия)
			Иглы атравматические одноразового применения стерильные ИАКПл «ВОЛОТЬ» с нитями хирургическими по ТУ 9432-002-24648800-2010	ФСР 2010/07849	ООО "Волоть", (Россия)
			Иглы атравматические длиной от 5 мм до 70 мм, диаметрами в мм от 0,10 до 1,12 с нитями хирургическими стерильными по ТУ 9432-003-47295014-2005	ФСР 2008/03571	ООО "ПТО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)
2.9	Иглодержатель общехирургический	1 шт.	Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-286-07613444-2010: держатели	ФСР 2010/08119	ОАО "Медио-инструментальный завод им. М. Горького", (Россия)
			Инструменты медицинские хирургические зажимные: Иглодержатель общехирургический, с твердосплавными пластинами, 160мм. Иглодержатель общехирургический, с твердосплавными пластинами, 200мм. Иглодержатель для атравматических игл, детский, 200мм	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛ", (Пакистан)
			Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (зажимные): держатели	ФСЗ 2012/12517	"Санмар Интернешнл", (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия (зажимные): Иглодержатели: стандартные; с твердосплавными вставками	РЗН 2013/598	"Хилбро Интернешнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
2.10	Катетер для отсоса слизи с фильтром или спринцовка резиновая	2 шт.	Изделия медицинские для неонатологии: Отсос слизи	ФСЗ 2012/11775	"М. Шиллинг ГмбХ Медикл Продактс", (Германия)
			Катетеры одноразовые для аспирации дыхательных путей для реанимации	ФСЗ 2012/13230	"КонваТек Лимитед", (Соединенное Королевство)
			Спринцовки пластиковые поливинилхлоридные с наконечниками полистиленовыми типа Б по ТУ 2537-010-26528997-10	ФСР 2010/07433	ООО НПФ "МИРАЛ", (Россия)
			Спринцовки пластиковые "Виталфарм" по ТУ 9464-005-50887801-2008	ФСР 2008/03467	ЗАО "Виталфарм", (Россия)
2.11	Комплект акушерского белья для роженицы и новорожденного	2 комп.	Комплекты одежды и белья акушерские, гинекологические одноразовые "ВОЛГА МЕДИКАЛ" по ТУ 9398-001-64985111-2010	ФСР 2010/08336	ООО НПФ "Волга Медикал", (Россия)
			Комплект акушерский для роженицы из нетканого материала одноразовый стерильный «МСМ» КА-03 по ТУ 9398-001-14680599-2004	ФСР 2009/06393	ООО "МСМ", (Россия)
			Комплект акушерский, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный по ТУ 9398-006-48357450-2009	ФСР 2009/05685	ЗАО "ЗДРАВМЕДТЕХ-КАЛУГА", (Россия)
			Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-69519394-2011	ФСР 2012/13821	ООО "Инмедиа", (Россия)
			Комплект акушерский из нетканых материалов, одноразовый, стерильный и нестерильный по ТУ 9398-009-72242950-2011	ФСР 2012/13195	ООО "Индион Н", (Россия)
			Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные в комплектах и отдельных упаковках по ТУ 9398-007-38957094-2012	РЗН 2013/823	ЗАО "ЗДРАВМЕДТЕХ-П", (Россия)

			Комплекты белья хирургического одноразового стерильного "ЗДРАВМЕДТЕХ" по ТУ 9398-003-38957094-2005	ФСР 2011/12833	ООО "Здравмедтех-Н", (Россия)
			Набор одежды медицинской из нетканых материалов одноразового пользования по ТУ 32.50.50-001-06891655-2018	РЗН 2020/11973	ООО "ПО"ЗДРАВМЕДТЕХ-К", (Россия)
2.12	Комплект одежды хирургической одноразовой	2 комп.	Комплекты медицинские одноразовые из нетканых материалов стерильные и нестерильные по ТУ 9398-001-69519394-2011	ФСР 2012/13821	ООО "Инмедив", (Россия)
			Комплекты одежды и белья хирургического одноразового, стерильные и нестерильные КОБХ-009-"МЕДИТЕК" по ТУ 9398-009-55694047-2012	ФСР 2012/13544	ООО ПКФ "МЕДИТЕК", (Россия)
			Комплект акушерский из нетканых материалов, одноразовый, стерильный и нестерильный по ТУ 9398-009-72242950-2011	ФСР 2012/13195	ООО "Индион Н", (Россия)
			Комплект белья и одежды хирургический, из нетканых материалов, одноразовый, стерильный по ТУ 9398-005-48357450-2009	ФСР 2009/05684	ЗАО "ЗДРАВМЕДТЕХ-КАЛУГА", (Россия)
			Комплекты одежды и белья хирургические одноразовые "ВОЛГА МЕДИКАЛ" по ТУ 9398-001-64985111-2010	ФСР 2010/08335	ООО НПФ "Волга Медикал", (Россия)
			Одежда и белье медицинские одноразовые нестерильные в комплектах и отдельных упаковках по ТУ 9398-007-38957094-2012	РЗН 2013/823	ЗАО "ЗДРАВМЕДТЕХ-П", (Россия)
			Комплекты белья хирургического одноразового стерильного "ЗДРАВМЕДТЕХ" по ТУ 9398-003-38957094-2005	ФСР 2011/12833	ООО "Здравмедтех-Н", (Россия)
			Комплект белья и одежды хирургический, одноразовый, стерильный и нестерильный КМ-"ИМС" по ТУ 9398-002-50337012-2010	ФСР 2011/11012	ООО «Интермедсервис», (Россия)
			Комплект белья хирургического из нетканого материала одноразовый стерильный КБХ "МСМ" по ТУ 9398-003-14680599-2004	ФСР 2009/04509	ООО "МСМ", (Россия)
			Набор одежды медицинской из нетканых материалов одноразового пользования по ТУ 32.50.50-001-06891655-2018	РЗН 2020/11973	ООО "ПО"ЗДРАВМЕДТЕХ-К", (Россия)
2.13	Пинцет стерильный	2 шт.	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005 варианты исполнения: Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм в лотке	ФСР 2010/07936	ООО «Полимерные изделия», (Россия)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011 в следующих исполнениях: пинцет хирургический ПХ 150х1,5; пинцет хирургический общего назначения (нагартонный холодной штамповкой) ПХ 150х2,5; пинцет хирургический общего назначения ПХ 150х2.	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
			Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (зажимные): Пинцеты	ФСЗ 2012/12517	"Саммар Интернешнл", (Пакистан)
2.14	Скальпель стерильный одноразовый или ножницы для пресечения пуповины	2 шт.	Скальпели, лезвия для скальпелей одноразовые APXHEMED	ФСЗ 2008/02862	"Алексмед Интернешнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко.,Лтд.", (Китай)
			Скальпели хирургические одноразовые по ТУ 9433-121-05519988-2002	ФСР 2012/13462	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Скальпель одноразовый	ФСЗ 2011/11258	"Гебрюдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ", (Германия)
			Скальпель одноразовый (Scalpels)	ФСЗ 2009/03547	"Беромед ГмбХ Хоспитал Продуктс", (Германия)
			Скальпель	ФСЗ 2008/02137	"Риббел Интернешнл Лтд", (Индия)
			Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS	РЗН 2017/5689	"Хуайинь Медикал Инструментс Ко. Лтд.", (КНР)
			Скальпель одноразовый хирургический VOLKMANN	РЗН 2018/8001	"Фольманн Медиктехник ГмбХ", (Германия)
			Скальпель стерильный	ФСЗ 2012/12980	"Фезер Сэйфти Рэйвор Ко. ЛТД.", (Япония)
2.15	Стетоскоп акушерский деревянный	1 шт.	Стетоскоп акушерский деревянный Сад-"М-МИЗ" по ТУ 9398-093-07613473-2003	ФСР 2007/00767	ОАО «Можайский медико-инструментальный завод», (Россия)
Прочие средства					
2.16	Одеяло байковое детское	2 шт.		-	ООО «ЕРМОЛИНО», (Россия)

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

Всего прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 12

цифрами

(двенадцать

прописью

) листов

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПУШИН А. В.

должность, ФИО

подпись



ОКПД2 32.50.13.190
ТУ 9437-013-52777873-2014

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор
ООО «МЕДПЛАНТ»

А.В. Пушин
« 26 » апреля 2021 г.



**УКЛАДКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» ОБЩЕПРОФИЛЬНАЯ / СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ (РЕАНИМАЦИОННАЯ)
(ТУ 9437-013-52777873-2014).
ИСПОЛНЕНИЕ: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ (РЕАНИМАЦИОННАЯ)**

Руководство по эксплуатации
ЛКЯМ.942439.003-01РЭ

*Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.*

Сделано в России



МЕДПЛАНТ
производственное предприятие

ОКПД2 32.50.13.190

ТУ 9437-013-52777873-2014

Рег.уд. № РЗН 2015/2746 от __.__.20__ г.

ООО «МЕДПЛАНТ»

Укладка для оказания скорой медицинской помощи

УМСП-02-«МЕДПЛАНТ»

Общепрофильная/специализированная
(реанимационная)

ТУ 9437-013-52777873-2014

исполнение: СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ (РЕАНИМАЦИОННАЯ)

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЛКЯМ.942439.003-02РЭ

Ver.012

Перед началом работы с изделием
внимательно прочтите руководство по эксплуатации.

Сделано в России

СОДЕРЖАНИЕ

1. Назначение.....	1
2. Область применения.....	1
3. Условия применения.....	1
4. Основные технические характеристики.....	1
5. Комплект поставки.....	2
6. Описание изделия.....	2
7. Подготовка к работе и правила работы с укладкой.....	4
8. Транспортирование, хранение и уход.....	5
9. Показания и противопоказания к применению медицинского изделия.....	5
10. Указания по утилизации.....	5
11. Гарантии производителя.....	6
12. Контактная информация производителя	6
13. Свидетельство о приёмке	7
Перечень вложений укладки.....	8

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Укладка для оказания скорой медицинской помощи **УМСП-02-«МЕДПЛАНТ»** **общепрофильная/специализированная (реанимационная)**: исполнение специализированная (реанимационная) предназначена для оказания скорой медицинской реанимационной помощи.

2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военной и экстремальной медицины, учреждения амбулаторной медицины, другие медицинские учреждения.

3. УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Полевые условия, на дому, в лечебных и лечебно-профилактических медицинских учреждениях, передвижных комплексах, автомобилях медицинской помощи.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры упаковок приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Серия Параметр	В сумке реанимаци онной СР- 03	В сумке медицинской универсаль- ной СМУ-02	В футляре- саквояже УМСП-01- Пм/2	В футляре- саквояже УМСП-01-П	В рюкзаке медицинском универсаль- ном РМУ-04
Габаритные размеры, мм	(500x255x 280)±50	(530x260x 260)±50	(440x252x 340)±50	(520x310x 390)±50	(350x270x 530)±50
Масса укладки (не более), кг	6,4	6,2	6,9	8,5	7,1
Номинальная нагрузка (не более), кг	12	12	12	12	12

Средний срок службы:

не менее 3-х лет, при своевременном восполнении израсходованных вложений.

Условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от -10 до +40°C

- относительная влажность окружающего воздуха до 98% при температуре 25 °C.

5. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Сумка реанимационная СР-03, или Сумка медицинская универсальная СМУ-02, или Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2, или Футляр-саквояж УМСП-01-П, или Рюкзак медицинский универсальный РМУ-04 – 1 шт;

2. Комплект вложений – 1 компл. (согласно. табл. 2);

3. Руководство по эксплуатации – 1шт.

Принадлежности:

1. Плечевой ремень для УМСП-01-П/УМСП-01-Пм/2;

2. Столик манипуляционный для УМСП-01-П/УМСП-01-Пм/2.

Примечание: Количество принадлежностей в комплекте поставки согласовывается с заказчиком.

6. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Укладка для оказания скорой медицинской помощи УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная / специализированная (реанимационная): исполнение специализированная (реанимационная) представляет собой комплект приборов, инструментов и изделий медицинского назначения, позволяющий подготовленному медицинскому персоналу оказывать скорую помощь на догоспитальном этапе всем категориям пациентов. Укладка выпускается: в сумке реанимационной СР-03; в сумке медицинской универсальной СМУ-02; в футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2; в футляре-саквояже УМСП-01-П; в рюкзаке медицинском универсальном РМУ-04.

Сумка реанимационная СР-03

Имеет специальную конструкцию и обеспечивает защиту вложений при хранении, их удобное расположение и быстрый доступ к ним. Сумка изготовлена из синтетической ткани ПВХ 420Д, в стенках сумки в специальных карманах находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из ПВХ-пластика и изолона ППЭ.

На внешней стороне крышки сумки расположен отдельный отсек (на молнии) с держателем для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и карманом для бланков и других бумаг. Внутри сумки под крышкой расположен встроенный ампулярий для ампул разного размера (общим кол-вом 56 мест) и сетка для удобного расположения расходных материалов. Дополнительная пряжка на плечевом ремне и накладка предохраняет ремень от сминания.

Сумка медицинская универсальная СМУ-02

Изготовлена из синтетической водоотталкивающей ткани ПВХ 420Д, дно сумки изготовлено из непромокаемого тентового материала, что обеспечивает хорошую теплоизоляцию сумки. Для защиты вложений от механических повреждений, в стенках сумки находятся моющиеся съёмные каркасные элементы из полирекса НПЭ. Для размещения вложений сумка имеет 3 кармана, основной отсек и отсек для хранения документов. На внешней части сумки расположен держатель для информационной таблички (для обозначения номера бригады и т.п.) и эмблема красного креста. По периметру корпуса сумки расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток. Для удобства переноски сумка снабжена двумя ручками (для ношения одной рукой) и плечевым ремнём, со специальной накладкой, которая предохраняет его от сминания.

Футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 и Футляр-саквояж УМСП-01-П

(ТУ 9437-006-52777873-2010)

Адаптирован к данному изделию. Футляр изготовлен из холодо- и теплостойкого пищевого АБС пластика оранжевого цвета, имеет удобную ручку и замки, исключающие его открытие при транспортировке. Верхняя часть футляра выполнена в виде створок, открывающихся в стороны, в створках установлены лотки для размещения вложений. Створки крепятся ко дну надёжными петлями со стальным стержнем внутри. При открытии футляра обеспечена постоянная вертикальная ориентация лотков и удобный доступ к содержимому укладки.

На верхней поверхности футляра имеется окно для информационной таблички, эмблема красного креста и светоотражающая полоса для обеспечения безопасной работы в темное время суток. Футляр надёжно защищают элементы укладки от повреждений и легко обрабатывается, поэтому изделие в футляре особенно удобен для частого использования.

Рюкзак медицинский универсальный РМУ-04

Изготовлен из синтетической ткани ПВХ 420Д, в стенках рюкзака находятся каркасные элементы из полирекса НПЭ. Часть корпуса рюкзака выполнена из специальной тентовой ткани для лучшей защиты вложений от влаги и загрязнений при работе на земле. С внешней стороны рюкзак имеет 2 больших кармана, внутри рюкзака вложения упаковываются в 6 съемных модульных отделений с прозрачным верхом. Для удобства ношения рюкзака на спине имеются широкие удобные плечевые лямки, для ношения одной рукой рюкзак снабжен 2 пластиковыми ручками, на верхней части рюкзака и сбоку, также рюкзак можно носить на одном плече с помощью плечевого ремня. На корпусе рюкзака расположена светоотражающая полоса для обеспечения безопасности работы в темное время суток, эмблема красного креста и бирочное окошко для указания номера бригады.

7. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПРАВИЛА РАБОТЫ С УКЛАДКОЙ

7.1. Изделия и инструменты в укладке уложены для транспортировки. Перед началом работы с укладкой изделия и инструменты должны быть стерилизованы в условиях Вашего лечебного учреждения.

7.2. Перед началом работы с укладкой внимательно прочтите руководства по эксплуатации медицинских изделий, входящих в состав укладки.

7.3. Футляр-саквояж УМСП-01-П и футляр-саквояж УМСП-01-Пм/2 имеют жёсткий каркас и защищают элементы укладки от повреждений. Однако, при транспортировке укладки и работе с ним избегайте резких ударов, которые могут привести к поломке элементов укладки и нарушению стерильности вложений. Избегайте воздействие острых предметов на сумку и рюкзак при их использовании. Чтобы исключить повреждение изделий не нагружайте их более чем на 12 кг. Бережное отношение и аккуратная работа с укладкой продлевает срок ее службы.

ВНИМАНИЕ!

- **Не используйте укладку, если вы не имеете достаточной квалификации!**

7.4. После окончания работы с пациентом не убирайте загрязнённое имущество в футляр. Загрязнённое имущество надо упаковать в полиэтиленовые пакеты и поместить в специально предусмотренные отсеки. После каждого применения проводите надлежащую дезинфекцию и стерилизацию использованных изделий. Убирайте в чистые отсеки только чистые изделия и инструменты, вновь стерилизованные после использования. По истечении сроков годности изделий медицинского назначения и прочих средств и в случае их использования укладку необходимо пополнить.

ВНИМАНИЕ!

● Помните, что одноразовые изделия повторному использованию не подлежат!

7.5. Дезинфекцию, при необходимости, рекомендуется проводить 3%-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0,5% моющего средства типа «Лотос». Марлевым тампоном, смоченным в растворе, легким нажатием потереть в прямом и обратном направлениях.

7.6. При поломке тяги в футляре-саквояже замените её с помощью рем. комплекта входящего в состав футляра, как показано на рисунке 1.

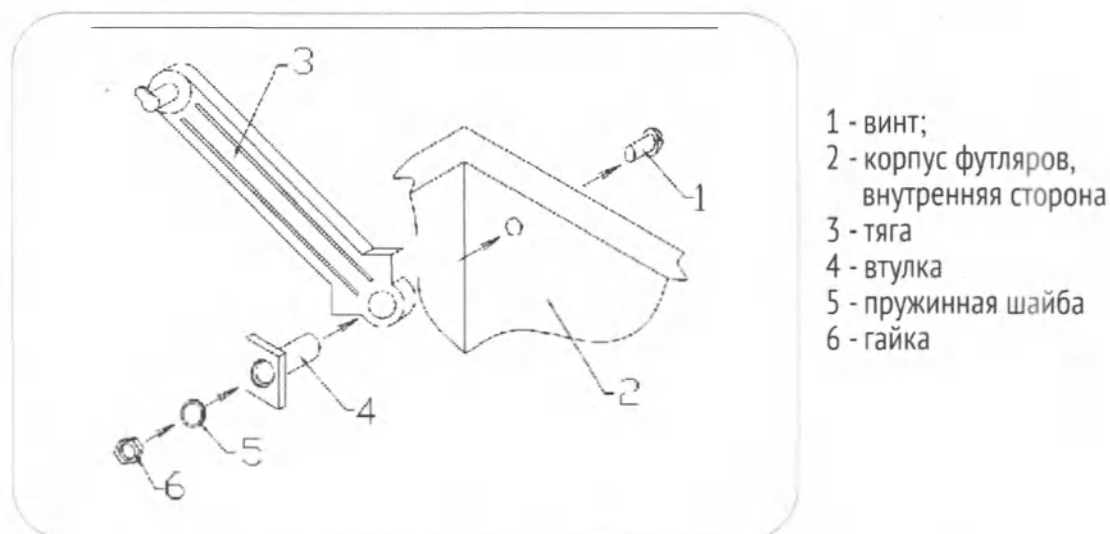


Рис. 1 Замена тяги футляра-саквояжа УМСП-01-П и футляра-саквояжа УМСП-01-Пм/2 с использованием ремонтного комплекта

Состав ремкомплекта:

- замок – 1 шт.;
- тяга – 2 шт.;
- втулка – 2 шт.;
- шайба пружинная («гровер») 4х1 – 2 шт.
- винт М4х18 – 2 шт.;
- гайка М4 – 2 шт.

7.7. Сумки и рюкзаки самостоятельному ремонту не подлежат.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УХОД

8.1. Транспортирование укладки может производиться всеми видами транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта при температуре от -50 °С до +50 °С и относительной влажности 75% при 15 °С.

8.2. Укладки могут храниться на складах или других закрытых помещениях при температуре воздуха от +5 °С до +40 °С и относительной влажности 60% при 20 °С.

8.3. Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

Примечание: Не допускайте хранение в неотапливаемых машинах и других неотапливаемых помещениях.

9. ПОКАЗАНИЯ И ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Показаниями к применению медицинского изделия являются ситуации оказания скорой (реанимационной) медицинской помощи. Противопоказания, при правильном применении медицинского изделия, отсутствуют. Показания, противопоказания для комплектующих входящих в набор – согласно их инструкциям по применению.

10. УКАЗАНИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сумки, рюкзак и футляры-саквояжи относятся к медицинским отходам класса «А». Они утилизируются стандартным способом согласно СанПиН 2.1.7.2790-10. Вложения укладки утилизируются согласно их эксплуатационных документов.

11. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

11.1. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев от даты продажи.

Гарантийный срок хранения устанавливается по сроку годности медицинских вложений с наименьшим сроком годности.

11.2. Гарантии распространяются на изделия производства ООО «МЕДПЛАНТ» (сумки, футляры-саквояжи, рюкзаки, вложения) и не распространяются на вложения производства сторонних организаций (перевязочные и расходные материалы, инструменты, одноразовые медицинские изделия).

11.3. Гарантийные требования реализуются при предъявлении настоящего документа, копий товарной накладной, счета-фактуры, акта приемки продукции по качеству или акта о скрытых недостатках. Для реализации гарантийных требований следует направить претензию с приложением вышеуказанных документов. В случае признания обоснованности претензии компенсация будет осуществлена согласно условиям договора и действующего законодательства РФ.

11.4. В случае несоблюдения потребителем правил эксплуатации, изложенных в настоящем руководстве, повлекших за собой неблагоприятные последствия для пациента, ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ!

11.5. Рекламации направлять на адрес производителя.

12. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

13. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Укладка для оказания скорой медицинской помощи УМСП-02-«МЕДПЛАНТ» общепрофильная/специализированная (реанимационная): исполнение специализированная (реанимационная).

Наименование	Артикул
В Сумке реанимационной СР-03	
В Сумке медицинской универсальной СМУ-02	
В Футляре-саквояже УМСП-01-Пм/2	
В Футляре-саквояже УМСП-01-П	
В Рюкзаке медицинском универсальном РМУ-04	

Соответствует ТУ 9437-013-52777873-2014 и признан годным к эксплуатации.

№ партии:

Дата выпуска:

Дата продажи:

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

Изготовитель с благодарностью примет любые замечания по конструкции и составу укладки, что поможет создать ещё более совершенный образец для удобной работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ВЛОЖЕНИЙ УКЛАДКИ:
Таблица 2

N	Наименование медицинского изделия	Кол-во, не менее	Наименование изделия в соответствии с РУ	Номер РУ	Производитель
1.1	Бинт марлевый медицинский нестерильный (5 м x 5 см)	5 шт.	Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2007/01317	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2007/00081	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2010/08705	ООО СЦ «МЕДТЕХНИКА», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2010/06612	ООО «НЬЮФАРМ», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ТУ 9393-005-10715071-2014, типоразмер 5 м x 5 см	РЗН 2015/2557	ООО «ХБК Навтекс», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	РЗН 2015/2555	ООО «ХБК Навтекс», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2009/05650	ООО «Лейко», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский нестерильный по ГОСТ 1172-93, типоразмер 5 м x 5 см	ФСР 2008/03223	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
1.2	Бинт фиксирующий эластичный нестерильный (7,5 см x 2 м) и/или (10 см x 2 м)	5 шт.	Бинт медицинский эластичный компрессионный по ТУ 9393-012-46838010-2011, типоразмер: «ИНТЕКС» (10 см x 2 м) / «ВЕНО-ПРОФ» (10 см x 2 м)	ФСР 2007/01084	ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.», (Россия)
			Бинт медицинский эластичный компрессионный «ИНТЕКС-СМАРТ» по ТУ 9393-012-46838010-2016, типоразмер: 10 см x 2 м	РЗН 2017/5386	ООО «ИНТЕРТЕКСТИЛЬ корп.», (Россия)
			Бинт фиксирующий эластичный нестерильный по ТУ 9393-001-18909432-2007	ФСР 2007/01072	ООО «МИЦАР-Н», (Россия)
			Бинт медицинский эластичный, компрессионный и фиксирующий «Доктор БИНТ»	ФСЗ 2009/04273	ОАО «Лента», (Республика Беларусь)
			Бинт медицинский эластичный модели ELAST	ФСЗ 2008/02390	ООО «ТОНУС ЭЛАСТ», (Латвия)
			Бинт эластичный компрессионный ленточный высокой растяжимости «Идеал/200» по ТУ 9393-001-05137229-2005	ФСР 2008/03803	ЗАО «Клинико-ПТГО», (Россия)
1.3	Бинт марлевый медицинский стерильный (5 м x 10 см)	5 шт.	Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2011/12237	ООО «Фарм-Глобал», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2007/01317	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2007/00081	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2010/08705	ООО СЦ «МЕДТЕХНИКА», (Россия)
1.4	Бинт марлевый медицинский стерильный (7 м x 14 см)	5 шт.	Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2010/06612	ООО «НЬЮФАРМ», (Россия)
			Бинты марлевые медицинские стерильные по ТУ 9393-004-10715071-2014 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	РЗН 2015/2558	ООО «ХБК Навтекс», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	РЗН 2015/2552	ООО «ХБК Навтекс», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2009/05650	ООО «Лейко», (Россия)
			Бинт марлевый медицинский стерильный по ГОСТ 1172-93 следующих типоразмеров: 5 м x 10 см; 7 м x 14 см.	ФСР 2008/03226	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
1.5	Вата медицинская гигроскопическая	1 уп.	Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81, типоразмер: 25г; 50г; 100г	ФСР 2010/06930	ООО «ЕМЕЛЬЯНЬ САВОСТИНЪ ВАТНАЯ ФАБРИКА», (Россия)
			Вата медицинская гигроскопическая хирургическая хлопковая нестерильная по ГОСТ 5556-81, типоразмер: 25г; 50г; 100г.	ФСР 2009/04702	ООО «Лейко», (Россия)
			Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная и нестерильная хлопковая по ГОСТ 5556-81 фасованная: стерильная и нестерильная: в рулонах (25 г, 50 г, 100 г)	ФСР 2010/07843	ООО «НЬЮФАРМ», (Россия)
			Вата медицинская гигроскопическая хирургическая стерильная и нестерильная, хлопковая и хлопко-вискозная по ГОСТ 5556-81	ФСР 2009/06567	АО «Фабрика «Ника», (Россия)
			Вата медицинская гигроскопическая гигиеническая хлопковая стерильная и нестерильная по ГОСТ 5556-81: в рулонах (25 г, 50 г, 100 г)	ФСР 2010/07841	ООО «НЬЮФАРМ», (Россия)

1.6	Воздуховод Гвеедела (60 мм)	1 шт.	Воздуховод ротоглоточный одноразового использования	ФСЗ 2009/04992	"Алба Хелскеа ЛЛС", (США)
1.7	Воздуховод Гвеедела (90 мм)	1 шт.	Изделия для дыхательной и кислородной терапии АРЕХМЕД: Воздуховоды 60мм; 90мм; 120мм.	ФСЗ 2011/10188	"Алексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды)
			Воздуховоды полимерные по ТУ 9444-065-44942795-2012	ФСР 2011/10719	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Изделия для респираторной терапии в анестезиологии и реанимации: Воздуховоды	ФСЗ 2009/05401	"Смитс Медикал Интернэшнл Лимитед", (Великобритания)
1.8	Воздуховод Гвеедела (120 мм)	1 шт.	Инструменты медицинские зондирующие, бужирующие в наборах и отдельных упаковках: Трубки-воздуховоды	ФСЗ 2011/10986	"СУМИ Сп.з о.о. сп.к.", (Польша)
			Воздуховод MEDEREN орофарингеальный Гвеедела: Размер 0; Размер 3; Размер 6	РЗН 2018/7567	"Медерен Неотек Лтд.", (Израиль)
			Воздуховод орофарингеальный одноразовый стерильный, размер: №№ 6, 9, 12	РЗН 2021/13426	"Чжэцзян Хайшэн Медикал Дивайс Ко., Лтд.", (Китай)
1.9	Средство (губка, пластина) кровоостанавливающее коллагеновое биодegradируемое	1 шт.	Губка коллагеновая кровоостанавливающая по ТУ 9393-004-13380984-2009	ФСР 2011/10301	ЗАО "Зеленая дубрава", (Россия)
			Губка биодegradируемая коллагеновая гемостатическая, ранозаживляющая, противоожоговая по ТУ 9393-001-00417467-2006, типоразмер: губка гемостатическая (с фурацилином и борной кислотой), (50±5)х(50±5)х(7±2) мм / (90±10)х(90±10)х(7±2) мм	ФСР 2012/13528	ООО "Лужский завод "Белкозин", (Россия)
1.10	Комплект держателей инфузионных флаконов (из 2-х держателей на 200 мл и 400 мл, с кронштейнами)	1 комп.	Изделия для фиксации емкостей с медицинскими жидкостями и лекарственными растворами по ТУ 9452-010-52777873-2013: Комплект держателей инфузионных флаконов ДФ-"Медплант"	РЗН 2014/1603	ООО "МЕДПЛАНТ", (Россия)
1.11	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	2 шт.	Жгут кровоостанавливающий резиновый рифленый с застёжкой в виде петли «Альфа» по ТУ 9398-041-00149535-2006	ФСР 2012/13201	ООО «Объединение Альфапластик», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией по ТУ 2545-008-26528997-10	ФСР 2010/07432	ООО НПФ «МИРАЛ», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий ЖК-"Медплант" по ТУ 32.50.13-012-52777873-2014: Жгут кровоостанавливающий ЖК-01-"Медплант"; Жгут кровоостанавливающий ЖК-02-"Медплант".	РЗН 2014/2113	ООО "МЕДПЛАНТ" (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007	ФСР 2007/00032	ООО «Объединение Альфапластик», (Россия)
1.12	Жгут для внутривенных инъекций	1 шт.	Жгут кровоостанавливающий матерчатно-эластичный для само- и взаимопомощи по ТУ 9398-026-42965160-2004	ФСР 2009/06312	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий "ФЭСТ" из эластичной тесьмы по ТУ 9398-057-10973749-2006	ФСР 2011/10332	ООО "Предприятие "ФЭСТ", (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый Эсмарха для применения в стационарных условиях по ТУ 9398-002-00149535-2007	ФСР 2007/00032	ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)
			Жгут кровоостанавливающий резиновый типа Эсмарха	ФСЗ 2012/12991	ООО "Киевгума", (Украина) "МЕРИДИАН МЕДИКАЛ"
			Жгут кровоостанавливающий венозный с пластмассовой застёжкой марки «MERIDIAN»	ФСЗ 2010/06464	ПРОДАКТС ЛТД* Соединенное Королевство)
			Изделия медицинские для забора крови: жгут многоразовый; жгут одноразовый	ФСЗ 2011/09572	"Грейнер Био-Уан ГмбХ", (Австрия)
1.13	Зажим медицинский кровоостанавливающий изогнутый	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий жесткий для операций, изогнутый, №1, 219мм; Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, изогнутый.	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий; Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, изогнутый	ФСЗ 2010/07357	"СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ", (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): изогнутый	ФСЗ 2012/12517	"Саммар Интернешнл", (Пакистан)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый, изогнутый №2; Зажим кровоостанавливающий зубчатый, изогнутый № 2, длиной 196 мм "ЗЖ-МИЗ-В"; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый изогнутый №3; Зажим кровоостанавливающий зубчатый изогнутый №3; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый, изогнутый №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медио-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
1.14	Зажим медицинский кровоостанавливающий прямой	1 шт.	Зажим кровоостанавливающий, с атравматической насечкой, прямой, 160мм	ФСЗ 2008/02889	"СУРДЖИВЕЛЛ", (Пакистан)
			Инструмент хирургический зажимной: зажим кровоостанавливающий	ФСЗ 2010/07357	"СЕАТЕК Медизинтехник ГмбХ", (Германия)
			Инструмент медицинский многоповерхностного воздействия (зажимной): прямой	ФСЗ 2012/12517	"Саммар Интернешнл", (Пакистан)

			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011: Зажим кровоостанавливающий зубчатый прямой №1; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый прямой №2; Зажим кровоостанавливающий 1х2 зубчатый прямой №1	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)
1.15	Катетер (канюля) для периферических вен (разных размеров)	4 шт.	Катетеры внутривенные однократного применения	ФСЗ 2010/08754	«КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс», (Германия)
			La-med LV. cathula - канюли с портом и без порта	ФСЗ 2009/05411	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			1. Катетер внутривенный с дополнительным портом и крылышками (POLYFLON). 2. Катетер внутривенный без дополнительного порта, но с крылышками (POLYCAN). 3. Катетер внутривенный без дополнительного порта и с малыми крылышками (POLYNEO). 4. Катетер внутривенный без дополнительного порта и без крылышек (POLYON). 5. Катетер внутривенный без дополнительного порта и без крылышек (POLYWIN).	ФСЗ 2011/09113	«Поли Медикьюр Лимитед», (Индия)
			Канюля внутривенная с ПТФЭ катетером BIO-FLON, типоразмеры: G16, G18, G20, G22	РЗН 2014/1679	"Био-Мед Хэлскеа Продактс Прайвет Лимитед", (Индия)
			Катетеры внутривенные периферические TOPMED: G16, G18, G20, G22	РЗН 2018/7555	"Веллмед Интернэшнл Индастриз Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетеры (канюли) внутривенные, стерильные однократного применения в вариантах исполнения с принадлежностями: Катетер (канюля) внутривенный, стерильный однократного применения с крыльями и инъекционным портом CK-FLON (СК-ФЛОН): G16, G18, G20, G22	РЗН 2017/5585	"Диспозиф Хелс энд Лайф Кеа Лтд.", (Индия)
1.16	Устройство для вливания в малые вены (игла-катетер «бабочка»)	4 шт.	Канюля инфузионная (игла-«бабочка») SITEKMED для вливания в малые вены однократного применения.	ФСЗ 2007/00509	«ШАНЬДУН ЖИБО ШАНЧЮАНЬ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД.», (Китай)
			Набор (игла-бабочка, катетер, луэр-адаптер).	ФСЗ 2010/06622	«Гуанчжоу Импрув Медикал Инструментс Ко., Лтд.», (Китай)
			Устройство для вливания в малые вены однократного применения	ФСЗ 2008/02135	"КД Медикал ГмбХ Хоспитал Продактс", (Германия)
			Устройство для вливания в малые вены однократного применения.	ФСЗ 2009/05662	"СФ Медикал Продактс ГмбХ", (Германия)
			La-med LV. cathula - канюли с портом и без порта	ФСЗ 2009/05411	"Ла-мед Хэлскеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетер внутривенный с дополнительным портом и крылышками (POLYFLON). 2. Катетер внутривенный с дополнительным портом, крышкой «snap-fit» и перфорированными крылышками (POLYFLEX). 3. Катетер внутривенный без дополнительного порта, но с крылышками (POLYCAN). 4. Катетер внутривенный без дополнительного порта и с малыми крылышками (POLYNEO).	ФСЗ 2011/09113	«Поли Медикьюр Лимитед», (Индия)
1.17	Катетер уретральный детский однократного применения стерильный	1 шт.	Катетеры урологические APEXMED: Фолея, Нелатона, наружный мужской, урологический женский	ФСЗ 2008/02858	"Апексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды), Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд., (Китай)
			1. Катетер урологический (катетер Фолея), размерный ряд от 6 до 26 Fr, с шагом 2 Fr. 2. Катетер урологический (катетер Нелатона), размерный ряд от 6 до 20 Fr, с шагом 2 Fr	ФСЗ 2008/03465	"Чжэцзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)
			Катетер урологический	ФСЗ 2012/11565	"М. Шиллинг ГмбХ Медикал Продактс", (Германия)
			Катетеры одноразовые урологические Нелатона, Фолея	ФСЗ 2011/10794	«Хайань Канджин Медикал Инструмент Ко, Лтд.», (Китай)
1.18	Катетер уретральный женский однократного применения стерильный	1 шт.	Катетер уретральный: Нелатон; Женский Nitex; Фолея Nitex.	ФСЗ 2008/00072	«Бикакцилар Тибби Джекхалар Санай ве Тиджарет А. С.» (Турция)
1.19	Катетер уретральный мужской однократного применения стерильный	1 шт.	Катетеры медицинские однократного применения по ТУ ВУ 190682947.002-2008(2010: 2011): Катетер Нелатона мужской (Nelatone male); Катетер женский (Female): Катетер Тиманна мужской (Tiemann male)	ФСЗ 2010/06636	ООО "Ассомедика", (Республика Беларусь)
			Катетер Нелатона мужской, типоразмер: Ch/Fr 16, Ch/Fr 18, Ch/Fr 20. Катетер Нелатона женский: Ch/Fr 6, Ch/Fr 8, Ch/Fr 10, Ch/Fr 12. Катетер Нелатона с концом по Тиманну мужской: Ch/Fr 16, Ch/Fr 18, Ch/Fr 20. Катетер Нелатона с концом по Тиманну женский: Ch/Fr 6, Ch/Fr 8, Ch/Fr 10, Ch/Fr 12. Катетер Нелатона лубрицированный:	РЗН 2018/7355	"Медерен Неотех Лтд.", (Израиль)

			Ch/Fr 16, Ch/Fr 18, Ch/Fr 20. Катетер Нелатона лубрицированный женский: Ch/Fr 6, Ch/Fr 8, Ch/Fr 10, Ch/Fr 12		
1.20	Лейкопластырь бактерицидный (не менее 1,9 см х 7,2 см)	5 шт.	Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) бактерицидный на тканой основе, гипоаллергенный размер 1,9х7,2 см; на нетканой основе, гипоаллергенный размер 1,9х7,2 см; на полимерной основе, гипоаллергенный размер 1,9х7,2 см	ФСЗ 2008/01495	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко. Лтд.", (Китай)
			Лейкопластырь бактерицидный	ФСЗ 2008/01958	"ФармЛайн Лимитед", (Великобритания)
			Лейкопластырь медицинский бактерицидный	ФСЗ 2011/09594	"Чанжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко.Лтд.", (Китай)
			Бактерицидный лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-017-45961725-2010: полоска липкая прямоугольной формы с закругленными углами с перфорацией или без нее с антисептической подложкой размером 1,9х7,2 см	ФСР 2008/03213	АО "ВЕРОФАРМ", (Россия)
1.21	Лейкопластырь рупонный (не менее 2 см х 5 см)	1 шт.	Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский	ФСЗ 2008/01442	"Цзянсу Нанфанг Медикал Ко. Лтд.", (КНР)
			Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе "Импэкс-Мед"	ФСЗ 2008/02807	"Чанжоу Хуалянь Хэлс Дрессинг Ко. Лтд.", (Китай)
			Лейкопластырь Верофарм по ТУ 9393-015-45961725-2009: полоска основы с клеевым слоем с защитным покрытием или без него, намотанная на картонную или пластмассовую шпулю (катушка) 500х2,0 см	ФСР 2009/05363	АО "ВЕРОФАРМ", (Россия)
			Лейкопластырь медицинский фиксирующий на полимерной, шелковой, нетканой, тканевой основах	ФСЗ 2008/01959	"ФармЛайн Лимитед", (Великобритания)
			Лейкопластырь медицинский фиксирующий	ФСЗ 2011/09593	"Чанжоу Хуалянь Неалф Дрессинг Ко.Лтд.", (КНР)
1.22	Маска медицинская нестерильная трехслойная из нетканого материала с резинками или с завязками	6 шт.	Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010	ФСР 2010/08512	ООО «МАСКА», (Россия)
			Маска медицинская одноразовая трехслойная	ФСЗ 2008/02100	"Вухан Лифарма Кемикалз Ко. Лтд.", (Китай)
			Маска медицинская стандарт (классик) по ТУ 9398-001-65578626-2010	ФСР 2010/09673	ООО "КИТ", (Россия)
			Маска 3-х слойная	ФСЗ 2011/10269	"ЛЕБОО ЖЕЛСЭА ПРОДАКТС ЛИМИТЕД", (Китай)
			Маска медицинская из нетканых материалов "СпецМедЗащита" по ТУ 9398-001-64015714-2010 трехслойная	ФСР 2010/07908	ООО "Казанская фабрика "СпецМедЗащита", (Россия)
1.23	Мешок для медицинских отходов класса А (объемом не менее 10 л)	1 шт.	Полиэтиленовые пакеты одноразового пользования для сбора, хранения и удаления медицинских отходов классов А (ПО-01 "МедПак"), Б (ПО-02 "МедПак") по ТУ 9464-001-84354588-2008	ФСР 2008/02806	ООО «МедПак», (Россия)
1.24	Мешок для медицинских отходов класса Б (объемом не менее 10 л)	1 шт.			
1.25	Набор для канюликации губчатых носей для оказания скорой медицинской помощи (шприц, пистолет либо иное устройство установки канюли для внутривенных инъекций для взрослых и детей с канюлей (канюлями) для внутривенных инъекций, системой для внутривенного введения лекарственных препаратов)	1 шт.	Прибор инфузионный внутривенный B.I.G. Adult (Blue 15G); Прибор инфузионный внутривенный B.I.G. Pediatric (Red 18G).	РЗН 2018/6799	"ВаисМед Лтд.", (Израиль)
			Система внутривенная инфузионная EZ-IO с принадлежностями	ФСЗ 2008/02759	"Телефлекс Медикал Европа Лимитед", (Ирландия)
			Иглы медицинские трубчатые по ТУ 9432-002-87251883-2010	ФСР 2010/08346	ООО "Нижегородский Завод Сложного Медицинского Инструмента "Парацельс", (Россия)
1.26	Набор для катетеризации центральных вен для оказания скорой медицинской помощи (игла для пункции центральной вены, катетер подключичный с проводником)	1 шт.	Набор для катетеризации центральных вен Venoflex APEXMED	ФСЗ 2010/06510	"Алексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды)
			Наборы для катетеризаций центральных вен (по Сельдингеру): одноканальный (ZKDN); двухканальный (ZKND); трехканальный (ZKNT); четырехканальный (ZKDNV).	ФСЗ 2010/06121	ООО "Балтон Сп.з.о.о.", (Польша)
			Набор одноразовый с центральным венозным катетером	ФСЗ 2010/08300	"Лепу Медикал Технолоджи (Пекин) Ко., Лтд.", (Китай)
1.27	Ножницы для разрезания повязок по Листеру	1 шт.	Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010: ножницы	ФСР 2010/07370	ОАО «ИИЗ им. М.Горького», (Россия)

			Ножницы для разрезания повязок по Листеру	ФСЗ 2012/13136	"ХОБРИ ИНТЕРНЕШНЛ", (Пакистан)
			Ножницы медицинские для разрезания повязок по Листеру, размеры 14,5 см; 18,0 см	РЗН 2015/2724	"Джерман Хелскере Индастрис (ПВТ)ЛТД", (Пакистан)
			Инструменты медицинские режущие: ножницы	ФСЗ 2012/12515	"Саммар Интернешнел", (Пакистан)
			Инструменты медицинские хирургические режущие: ножницы	ФСЗ 2008/02888	"СУРДЖИВЕЛ", (Пакистан)
			Инструменты режущие с острой (режущей) кромкой	РЗН 2013/592	"Хилбро Интернешнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
1.28	Пакет гипотермический	3 шт.	Пакет охлаждающий (гипотермический) для оказания первой медицинской помощи "АППОЛО" по ТУ 9398-014-42965160-2011	ФСР 2011/12263	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» по ТУ 9398-003-10973749-2016; пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №1; пакет гипотермический для оказания первой помощи «Снежок» №2.	ФСР 2007/01584	ООО «Предприятие «ФЭСТ», (Россия)
1.29	Пакет перевязочный медицинский стерильный	3 шт.	Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93	ФСР 2008/03791	ООО «ИНГАКАМФ», (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский стерильный по ГОСТ 1179-93	ФСР 2010/08699	ООО «ПО «МЕДТЕКС», (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский по ГОСТ 1179-93	ФСР 2010/07563	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Пакеты перевязочные медицинские стерильные по ГОСТ 1179-93 следующих типов: пакет индивидуальный; пакет первой помощи с одной подушечкой	РЗН 2014/1656	ООО ПКФ "Пионер", (Россия)
			Пакет перевязочный медицинский индивидуальный стерильный по ГОСТ 1179	ФСР 2009/05126	ООО "Предприятие "ФЭСТ", (Россия)
			Пакеты перевязочные медицинские стерильные в следующих исполнениях: индивидуальный; обыкновенный; первой помощи с одной подушечкой и первой помощи с двумя подушечками по ГОСТ 1179-93	ФСР 2007/01319	ООО "ПКЦ СпецТехСбыт", (Россия)
1.30	Перчатки медицинские нестерильные смотровые	10 пар	Перчатки смотровые латексные нестерильные опудренные и неопудренные	ФСЗ 2010/06671	"Тан Син Лиан Индастриз Сдн. Бхд", (Малайзия)
			Перчатки диагностические из натурального и синтетического латекса нестерильные с текстурированной поверхностью, с гладкой поверхностью, опудренные и неопудренные	ФСЗ 2009/05162	"ТОП ГЛАВ СДН БХД", (Малайзия)
			1. Перчатки латексные опудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Вепову». 2. Перчатки латексные неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Вепову». 3. Перчатки нитриловые неопудренные нестерильные смотровые одноразовые торговой марки «Вепову».	ФСЗ 2011/10210	"Макстер Глов Мануфакчуринг СДН БХД (229862-Х)", (Малайзия)
			Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные	ФСЗ 2009/05130	Топ Глав Сдн Бхд (Малайзия)
			Перчатки медицинские смотровые нестерильные Vogt Medical: латексные, виниловые, нитриловые (опудренные и неопудренные, гладкие и текстурированные), особопорочные удлиненные.	ФСЗ 2011/09747	"Фогт Медикал Фертриб ГмбХ", (Германия)
1.31	Перчатки хирургические стерильные	3 пары	Перчатки хирургические стерильные по ТУ 9398-002-54854000-2007	ФСР 2007/00196	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
			Перчатки латексные хирургические стерильные по ТУ 9398-001-70224340-2008	ФСР 2008/02982	ООО «Фарм-Глобал», (Россия)
			Перчатки хирургические латексные опудренные стерильные одноразовые торговой марки «Medic-Dent»	ФСЗ 2011/10210	"Макстер Глов Мануфакчуринг СДН БХД (229862-Х)", (Малайзия)
			Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса опудренные. Перчатки хирургические стерильные из натурального латекса неопудренные. Перчатки хирургические стерильные из синтетического латекса неопудренные по ТУ 9398-002-54854000-2011	ФСР 2011/12244	ООО "Русская Медицинская Упаковка", (Россия)
1.32	Пинцет медицинский	2 шт.	Пинцеты полимерные одноразовые стерильные по ТУ 9398-176-44942795-2005 варианты исполнения: Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм; Пинцет полимерный одноразовый стерильный 150 мм в лотке	ФСР 2010/07936	ООО «Полимерные изделия», (Россия)
			Инструменты многоповерхностного воздействия по ТУ 9435-296-07610776-2011 в следующих исполнениях: пинцет хирургический ПХ 150х1,5; пинцет хирургический общего назначения (нагартонный холодной штамповкой) ПХ 150х2,5; пинцет хирургический	ФСР 2007/00268	ОАО "Медико-инструментальный завод имени В.И. Ленина", (Россия)



			общего назначения ПХ 150х2.		
			Инструменты медицинские многоповерхностного воздействия (зажимные): Пинцеты	ФСЗ 2012/12517	"Саммар Интернешнл", (Пакистан)
1.33	Покрывало спасательное изотермическое (не менее 150 см х 200 см)	1 шт.	Покрывало спасательное для пострадавших от перегревания или переохлаждения, для комплектации аптечек первой медицинской помощи (Retningsdecke)	ФСЗ 2011/08867	«Лайна-Верге ГмбХ», (Германия)
			Покрывало спасательное от перегревания или переохлаждения пострадавших по ТУ 9398-001-74050508-2005	ФСР 2010/06812	ООО «ШАНС», (Россия)
			Покрывало спасательное изотермическое по ТУ 9398-014-26528997-2011	ФСР 2011/11915	ООО НПФ "МИРАЛ", (Россия)
			"Покрывало спасательное для оказания первой медицинской помощи пострадавшим от перегрева или переохлаждения"	РЗН 2013/891	"Имеко ГмбХ энд Ко. КГ", (Германия)
1.34	Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 см х 11,0 см)	20 шт.	Салфетки антисептические из бумажного текстилеподобного материала стерильные "МК.Асептика" спиртовые (70% этиловый спирт) по ТУ 9393-001-51276525-00, типоразмер, мм: 110х125; 115х250; 120х150; 125х125; 125х150; 130х150; 130х180; 130х200; 135х145; 135х185; 135х200; 140х190; 140х200; 150х150; 150 х 200	ФСР 2009/05438	ООО «М.К. Асептика», (Россия)
			Салфетки спиртовые антисептические из нетканого материала, стерильные по ТУ 9393-002-68845281-2013 следующих типоразмеров: 135х185 мм, 110х125 мм.	РЗН 2014/1695	ООО "Фармэл", (Россия)
			Салфетка прединъекционная дезинфицирующая с раствором спирта, одноразовая по ТУ 9393-006-56334457-2008	ФСР 2008/03704	ООО «Лейко», (Россия)
			Салфетки спиртовые стерильные по ТУ 9393-004-52707619-2006	ФСР 2007/01592	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
			Салфетки дезинфицирующие для инъекций из нетканого материала пропитанного 70% водно-спиртовым раствором, одноразовые по ТУ 9393-001-58716163-2003	ФСР 2008/02512	ООО «НПФ «Медтехмаркет», (Россия)
			Салфетки антимикробные из трикотажного полотна, стерильные "Активтекс" по ТУ 9393-001-83188142-2008; Активтекс-Х с хлоргексидином	ФСР 2009/06117	ООО «АЛЬТЕКС», (Россия)
1.35	Средство антисептическое с перекисью водорода	3 шт.	Салфетка антисептическая из нетканого материала с перекисью водорода по ТУ 9393-053-42965160-2012	РЗН 2013/716	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
1.36	Средство для стимуляции дыхания с раствором аммиака	3 шт.	Салфетка для стимуляции дыхания "РАДИАН" по ТУ 9398-001-86566053-2009	ФСР 2009/06146	ООО «РАДИАН-М» (Россия)
			Салфетка для стимуляции дыхания «ЭВТЕКС» по ТУ 9393-006-14959781-2012	РЗН 2013/847	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
1.37	Салфетка марлевая медицинская стерильная (не менее 16 см х 14 см, № 10)	1 уп.	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2008/03219	ООО «АПСАНА», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские по ГОСТ 16427-93 типоразмеры: 16 см х 14 см.	ФСР 2009/05213	ООО «ТД «АППОЛО», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2008/03225	ООО «ПКФ ВераМед», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93 в следующих исполнениях: четырехслойные (16 см х 14 см) стерильные; двухслойные (16 см х 14 см) стерильные; однослойные (16 см х 14 см) стерильные.	ФСР 2011/11141	ООО «НЬЮФАРМ», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2011/12069	ООО ПКФ "Ахтамар", (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93, типоразмер: 16х14 см.	ФСР 2007/01316	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
1.38	Скальпель стерильный одноразовый	2 шт.	Скальпели, лезвия для скальпелей одноразовые APREXMED	ФСЗ 2008/02862	"Алексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Скальпели хирургические одноразовые по ТУ 9433-121-05519988-2002	ФСР 2012/13462	ООО "Полимерные изделия", (Россия)
			Скальпель одноразовый	ФСЗ 2011/11258	"Гебрикдер Мартин ГмбХ & Ко. КГ", (Германия)
			Скальпель одноразовый (Scalpels)	ФСЗ 2009/03547	"Беромед ГмбХ Хоспитал Продуктс", (Германия)
			Скальпель	ФСЗ 2008/02137	"Риббел Интернейшнл Лтд", (Индия)
			Инструменты хирургические однолезвийные CERTUS	РЗН 2017/5689	"Хуайинь Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (КНР)

			Скальпель одноразовый хирургический VOLKMANH	РЗН 2018/8001	"Фольманн МедицинТехник ГмбХ", (Германия)
			Скальпель стерильный	ФСЗ 2012/12980	"Фежер Сэйфти Рэйзор Ко., (Россия)
1.39	Средство перевязочное гемостатическое стерильное на основе целлюлозы или алюмосиликатов кальция и натрия или гидрогеля кальция (не менее 50г) и/или на основе хитозана	3 шт.	Средство перевязочное гемостатическое, «ТЕМОСТОП®», стерильное по ТУ 9393-001-8152288-2009	ФСР 2010/07420	ФГУП НПО Фармзащита ФМБА России, (Россия)
			Средство перевязочное гемостатическое "ТЕМОСПАС" стерильное по ТУ 9393-001-40086098-2015, в индивидуальных упаковках по 50, 75 и 100 г	РЗН 2016/4680	ООО "МДК Медика", (Россия)
			Средство перевязочное гемостатическое "ТЕМОСПАС М", стерильное по ТУ 9393-002-40086098-2015, в индивидуальных упаковках по 50, 75 и 100 г	РЗН 2017/6201	ООО "МДК Медика", (Россия)
			Средство гемостатическое «Гемофлекс» Про и «Гемофлекс» Комбат, стерильное по ТУ 9393-003-67539369-2013	РЗН 2014/1691	ООО "Инемед", (Россия)
			Средство местное гемостатическое, "ЭЛЛАРГА", стерильное по ТУ 9393-001-90501533-2015	РЗН 2017/6661	ООО "НОБР", (Россия)
			Средство гемостатическое стерильное "Гепотос" по ТУ 9393-003-33129878-2016	РЗН 2017/5945	ООО "ЛЮМИ", (Россия)
1.40	Средство перевязочное гемостатическое стерильное с аминокaproновой кислотой (не менее 6 см x 10 см)	2 шт.	Повязка асептическая нетканая с аминокaproновой кислотой гемостатическая стерильная ПАГ "АППОЛО-Гем" по ТУ 9393-021-42965160-2009	ФСР 2009/05054	ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «АППОЛО», (Россия)
			Салфетки гемостатические с альгинатом натрия и ε-аминокaproновой кислотой «Колетекс-АК» и с альгинатом натрия, ε-аминокaproновой кислотой и лидокаином «Колетекс-АКЛ» по ТУ 9393-019-58223785-2011	ФСР 2011/11523	ООО "КОЛТЕКС", (Россия)
1.41	Стерильная салфетка (не менее 40 см x 60 см)	1 шт.	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93	ФСР 2007/01316	ООО «ЭВТЕКС», (Россия)
			Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93; размер 70 x 68 см	ФСР 2011/12069	ООО ПКФ "Ахтамар", (Россия)
1.42	Стерильная салфетка или простыня (не менее 70см x 140см)	1 шт.	Простыни и салфетки медицинские, одноразовые, стерильные по ТУ 9398-024-34357587-2010: простыня; салфетка	ФСР 2010/09130	ЗАО "Мастерица", (Россия)
1.43	Сфигмоманометр (измеритель артериального давления) со взрослой и детскими манжетами механический с anerоидным манометром	1 шт.	Измеритель артериального давления мембранный ИАДМ-01-Медтехника с принадлежностями по ТУ 9441-015-27418804-2007	ФСР 2008/01763	ООО "МЕДТЕХНИКА", (Россия)
			Измеритель артериального давления механический ИАДМ - "ТРИВЕС-ПЧЗ-М" по ТУ 9441-002-33094849-2005 с принадлежностями	ФСР 2010/08666	ООО "Тривес", (Россия)
			Измерители артериального давления серии ИАД-01 - "Адютор" по ТУ 9441-003-58286981-2014	РЗН 2015/3206	ООО "АДЬЮТОР", (Россия)
1.44	Термометр медицинский в футляре	1 шт.	Термометры медицинские цифровые: AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13, AMDT14	РЗН 2013/1314	"Амрус Энтерпрайзис Лтд.", (США)
			Термометр электронный медицинский OMRON Eco Temp Basic	ФСЗ 2009/05423	ОМРОН ХЕЛСХЕА Ко., Лтд., (Япония)
1.45	Трубка ректальная газоотводная детская одноразовая	1 шт.	Трубки ректальные следующих типов: газоотводные; для глубоких клизм; для новорожденных по ТУ 9398-006-05769082-2007	ФСР 2007/00194	ООО "Объединение Альфапластик", (Россия)
			Зонд АРЕХМЕД ректальный	ФСЗ 2008/02867	"Алексмед Интернэшнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетер (зонд) ректальный	ФСЗ 2008/02333	"КонваТек Лимитед", (Соединенное Королевство)
			Катетер стерильный ректальный	ФСЗ 2012/12486	"Ла-мед Хэлсхеа Пвт. Лтд.", (Индия)
			Катетер медицинский однократного применения Inecta ректальный	ФСЗ 2012/12814	"Нинбо Гритмед Медикал Инструментс Ко., Лтд.", (Китай)
			Катетеры из полимерных материалов по ТУ 9398-002-12966417-2007, ректальные.	ФСР 2010/07388	ЗАО "Витал", (Россия)
			Зонд ректальный.	ФСЗ 2008/03466	"Чжецзянская Интегральная Медицинская Компания ЛТД.", (Китай)
			Катетер ректальный Nitex	ФСЗ 2008/00072	"Бикакцилар Тибби Дджехазлар Санай ве Тиджарет А. С.", (Турция)
1.46	Устройство для вливания инфузионных растворов	4 шт.	Устройства для вливания, переливания крови, кровезаменителей и инфузионных растворов: Устройство инфузионное однократного применения с пластиковой иглой.	ФСЗ 2009/05662	"СФ Медикал Продактс ГмбХ", (Германия)



			Устройство инфузионное одноразового использования (с иглой)	ФСЗ 2010/07086	«Хуайань Сити Хэнчунь Медикал Продакт Ко., Лтд», (Китай)
			Системы: инфузионная	ФСЗ 2009/05610	«Веньжоу Бэйпу Сайенс энд Технолоджи Ко., Лтд», (Китай)
			Системы: инфузионная	ФСЗ 2011/09652	«Группа Цзяньсийских Медицинских Оборудований Хунда» (Китай)
			Устройство для вливания инфузионных растворов "Вольф Медикал"	РЗН 2016/3514	"Чанчжоу Тонда Медикал Эплайенс Ко., Лтд" (Китай)
			Система инфузионная стерильная для однократного применения с иглами	ФСЗ 2011/09586	"Бейджинг Форнерс Медикал Эквипмент Ко., Лтд" (Китай)
			Устройство одноразовое для вливания инфузионных растворов, с иглой ECO-IV20, варианты исполнения: IV20-V1, IV20-V2, IV20-V3	ФСЗ 2010/06983	"Цзянсу Чжиюй Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
			Устройства для вливания инфузионных растворов одноразовые SITEKMED	ФСЗ 2007/00509	ШАНЬДУН ЖИБО ШАНЧЮАНЬ МЕДИКАЛ ИНСТРУМЕНТС КО. ЛТД., (Китай)
1.47	Фонарик диагностический с элементом питания	1 шт.	Прибор для первичной визуальной диагностики LD-V09	ФСЗ 2012/13398	"Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд", (Сингапур)
1.48	Фонендоскоп	1 шт.	Фонендоскоп CS Medica CS-404	ФСЗ 2009/04074	"Шеньчжень Комплекссервис Индастриал энд Трейд Ко., Лтд.", (Китай)
			Стетофонендоскоп Б.Е.Вотчала СФОН-01 по ТУ 64-1-3121-77	ФСР 2010/07228	Закрытое акционерное общество "Нижнетагильский медико-инструментальный завод", (Россия)
			Стетоскоп LD с принадлежностями варианты исполнения: LD Prof-Plus; LD Prof-I; LD Prof-II; LD Prof-III; LD Prof-IV; LD Focus; LD Cardio; LD Medic; LD Special (длина трубок 56 см или 72 см); LD SteTime	ФСЗ 2008/01941	"Литл Доктор Интернешнл (С) Пте. Лтд", (Сингапур)
			Стетоскопы серии WS, модели: WS-1, WS-2, WS-3, WS - 8R	РЗН 2015/3080	"Би. Велл Свисс АГ", (Швейцария)
			Стетофонендоскопы «СФ-Адьютор» по ТУ 26.60.12-002-58286981-2019	РЗН 2014/1813	ООО "АДЬЮТОР", (Россия)
1.49	Шпатель стерильный	10 шт.	Шпатели медицинские деревянные однократного применения по ТУ 9398-107-43892776-2010	ФСР 2010/08880	АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)
			Шпатель медицинский одноразовый деревянный по ТУ 9434-002-83144357-2010	ФСР 2010/08671	ООО "Ардейл-Импэкс", (Россия)
			Шпатель медицинский деревянный шлифованный стерильный по ТУ 9398-008-56334457-2010	ФСР 2010/08869	ООО «Лейко», (Россия)
			Шпатель медицинский деревянный стерильный по ТУ 32.50.13-001-24986833-2017	ФСР 2012/13410	ООО «Ирбис», (Россия)
			Шпатель медицинский одноразовый стерильный	ФСЗ 2012/12456	"Далиан Ронгбанг Медикал Хелси Девайсес Ко., Лтд.", (Китай)
			Шпатель для языка	РЗН 2013/591	"Хилбро Интернешнл (Прайват) Лимитед", (Пакистан)
			Шпатель терапевтический TOPMED, варианты исполнения: деревянный, деревянный педиатрический, пластиковый (ПВХ)	РЗН 2017/6438	"Нинбо Грейтэа Трейдинг Ко., Лтд.", (Китай)
1.50	Шприц инъекционный однократного применения (2 мл)	4 шт.	Шприцы инъекционные однократного применения, стерильные по ТУ 32.50.13-001-25597097-2005	ФСР 2010/07477	АО «Медполимер ЛТД», (Россия)
			Шприцы инъекционные двухдетальные, трехдетальные однократного применения стерильные по ТУ 9398-004-11701993-2008	ФСР 2008/03253	ООО «Стерин», (Россия)
			Шприцы стерильные инъекционные однократного применения с иглами	ФСЗ 2009/05672	«СФ Медикал Продактс ГмбХ», (Германия)
1.51	Шприц инъекционный однократного применения (5 мл)	4 шт.	Шприцы инъекционные однократного применения трехдетальные и двухдетальные стерильные ШИ-«Прогресс» по ТУ 9398-093-43892776-2005	ФСР 2010/08648	АО Ракетно-космический центр "Прогресс", (Россия)
			Шприцы одноразовые стерильные АРЕХМЕД объемом, мл: 2,5; 5; 10; 20	ФСЗ 2008/02859	"Апексмед Интернешнл Б.В.", (Нидерланды); "Цзянсу Канцзинь Медикал Инструмент Ко., Лтд.", (Китай)
1.52	Шприц инъекционный однократного применения (10 мл)	2 шт.	Шприцы одноразовые стерильные с иглами и без игл SITEKMED	ФСЗ 2007/00530	"Шаньдун Жибо Шанчюань Медикал Инструментс Ко. Лтд.", (Китай)

			Шприцы одноразовые трехдетальные стерильные объемом 2 мл, 5 мл, 10 мл, 20 мл с иглами	ФСЗ 2011/09587	"Бейджинг Форнёрс Медикал Эквипмент Ко., Лтд", (Китай)
1.53	Шприц инъекционный однократного применения (20 мл)	5 шт.	Шприцы инъекционные однократного применения в комплекте с иглой, иглами и без иглы, стерильные по ТУ 32.50.13-001-96673695-2017	ФСР 2010/07710	ООО "МЕДПРОМ БОБЕНИ ПРОДАКШЕН", (Россия)
			Шприцы инъекционные одноразовые с иглами и без игл, объем: 2мл, 5мл, 10мл, 20мл	ФСЗ 2008/02301	"Чангджоу Джинлонг Медикал Пластик Эпплиансе Ко. Лтд", (Китай)
Прочие средства					
1.54	Ампульница или специально предназначенное для хранения (применения) ампулированных лекарственных препаратов приспособление	1 шт.		-	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
1.55	Чехол для инструментария	1 шт.		-	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)
1.56	Чехол для перевязочных материалов	1 шт.		-	ООО «МЕДПЛАНТ», (Россия)

ООО «МЕДПЛАНТ»

Адрес: 109316, г.Москва, пр-т Волгоградский, д.42, корп.5, эт.2, пом.І, ком.296-318

Телефон: 8 (495) 223-6016

e-mail: medplant@medplant.ru

Всего , прошито, пронумеровано,
скреплено печатью 20
цифрами

(двадцать
прописью
—) ЛИСТОВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ПУШИН А.В.

должность, ФИО

