


77

«УТВЕРЖДАЮ»

Индивидуальный
предприниматель

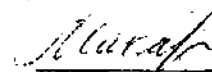

Е.В. Макарова

« » _____ 2010 г.

М.п.

Инструкция по использованию

**«Лезвия Zyoptix XR к микрокератому Zyoptix XR для
проведения кератомилеза при
рефрактивной лазерной коррекции зрения»**


Zyoptix XR сменные лезвия

Инструкция для использования с Микрокератомом Zyoptix XR производства «Technolas Perfect Vision GmbH», Германия

Содержимое упаковки стерильно, пока упаковка не вскрыта или не повреждена.

ВНИМАНИЕ. Федеральный закон (США) вводит ограничение на продажу данного устройства непосредственно или по требованию терапевта.

Обратитесь к руководству оператора устройства производства Микрокератомом Zyoptix XR для получения полной инструкции по установке.

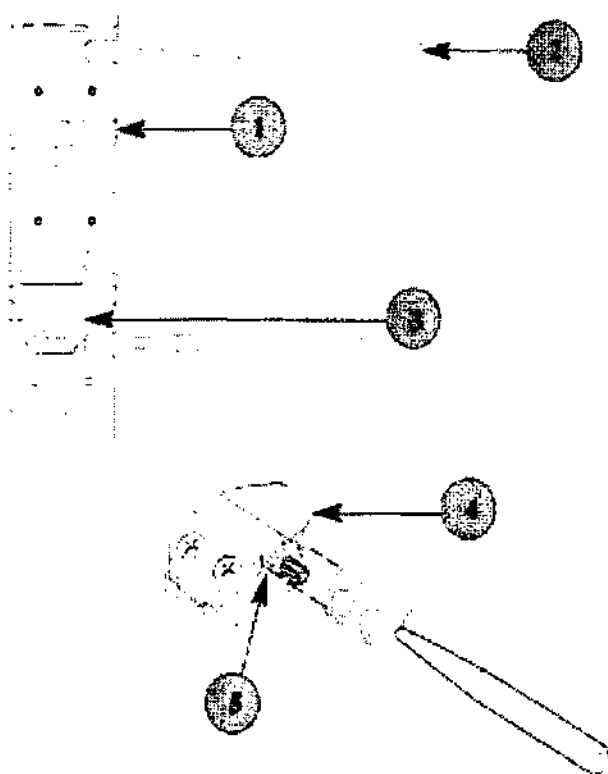

Инструкции по установке заменяемого лезвия

1. Разместите защитный корпус лезвия (1) на плоской поверхности, как показано на рисунке, организовав доступ к пластиковому держателю лезвия со стороны корпуса находящейся по правую руку
2. Вставьте стил (2) в отверстие (прорезь) в корпусе находящиеся с правой стороны и углубляйте его внутрь защитного корпуса
3. Придерживая нижнюю планку корпуса правым указательным пальцем, откройте корпус левой рукой
4. Аккуратно выдвиньте лезвие (3) из корпуса (горизонтально). Не вращайте лезвие, чтобы избежать повреждения режущей кромки при выемки из корпуса

ВНИМАНИЕ: Не трогайте режущую поверхность лезвия.

5. Крепко зажмите головку микрокератома (4) между указательным и большим пальцем левой руки, приподнимите пластину и вставьте лезвие, кромкой вверх в специальный паз (5), как показано на рисунке

6. Обратите внимание: левши могут просто заменить руки описанные в процессе.
7. Сдвиньте лезвие вперед и назад в слоте, чтобы убедиться в его плавной и беспрепятственной подвижности
8. Крепко зажмите головку микрокератома снова между указательным и большим пальцем левой руки, чтобы оставить на месте лезвие, выньте стиле легкими вращательными движениями

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сменные лезвия Zyoptix XR, должны быть использованы только с микрокератомом Zyoptix XR производства «Technolas Perfect Vision GmbH», Германия. Использование любых других лезвий может стать причиной повреждения прибора или неблагоприятных хирургических последствий, как например неустранимое повреждение глаза.

Гарантия и ограничения ответственности

Technolas Perfect Vision GmbH гарантирует, что заменяемые лезвия Zyoptix XR при поставке удовлетворяют текущей версии опубликованной спецификации производителя для подобных заменяемых лезвий во всех материальных отношениях, и свободны от дефектов в материалах или устройстве на период равный дате истечения срока годности лезвия.

Technolas Perfect Vision GmbH исключает все прочие гарантии, обозначенные, подразумеваемые, прецедентальные или прочие, включая, но не ограничивая любые подразумеваемые гарантии товарного состояния или пригодности к продаже.

Technolas Perfect Vision GmbH не ответственен за любые, косвенные потери или понесенные штрафные санкции, повреждения или расходы возникшие в прямую или косвенную в связи с использованием заменяемого лезвия Zyoptix XR, даже если Technolas Perfect Vision GmbH был уведомлен о возможности таких потерь, повреждений или затрат.

Политика возвращения товара

Все товары, возвращенные в Technolas Perfect Vision GmbH должны быть сопровождены авторизационным номером возврата. Позвоните + 49-6221 7502 140 для получения авторизации и полной информации о политике.

Патентная информация

Technolas Perfect Vision GmbH держатель патента США №6,051,009. При покупке каждого заменяемого лезвия Zyoptix XR Technolas Perfect Vision GmbH наделяет пользователя каждого лезвия не эксклюзивной лицензией для осуществления запатентованной процедуры связанной с указанным патентом.

Помимо вышеуказанного нет наделения никакими другими правами, выражено или подразумеваемо, в соответствии с патентом США №6,051,009.