

Утверждаю

Член правления

Лиепайской специальной экономической зоны



ООО «НордеПласт»

Р.Грамико

18 марта 2021 года

Инструкция по применению

Медицинского изделия

Кинезио тейп 5 см х 5 м, варианты исполнения:

розовый, синий, черный, бежевый, белый, красный, желтый,
оранжевый, фиолетовый, зелёный, голубой, коричневый.

Содержание

1. Наименование медицинского изделия.....	3
2. Область и способ применения медицинского изделия	3
3. Показания для применения медицинского изделия	4
4. Противопоказания для применения медицинского изделия	5
5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия.....	5
6. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия.....	5
7. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями.....	6
8. Указание возможности и особенностей применения медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания	6
9. Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами	6
10. Срок службы (годности) и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока службы (годности)	6
11. Условия хранения и транспортировки.....	6
12. Указание на необходимость хранения медицинского изделия в местах, недоступных для детей.....	7
13. Сведения о производителе медицинского изделия	7
14. Варианты комплектации медицинского изделия.....	7
15. Маркировка.....	8
16. Технические характеристики, общая схема изделия, характеристики применяемых расходных материалов	9
17. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия.....	16
18. Порядок осуществления утилизации и уничтожения	17
19. Гарантии.....	17

1. Наименование медицинского изделия

Кинезио тейп 5 см х 5 м, варианты исполнения: розовый, синий, черный, бежевый, белый, красный, желтый, оранжевый, фиолетовый, зелёный, голубой, коричневый.

2. Область и способ применения медицинского изделия

Медицинское изделие «Кинезио тейп 5 см х 5 м», можно использовать в полевых и в домашних условиях, стационарных, и амбулаторных медицинских учреждениях младшим персоналом и пациентами самостоятельно, согласно рекомендации специалистов.

Вид контакта с организмом человека- изделие временного применения при контакте с неповреждённой кожей не менее 24 часа.

Данное медицинское изделие выпускается в нестерильном виде.

1. Определите область нанесения медицинского изделия- прощупывая лёгкими нажимами пальцев, где ощущается мышечная усталость или боль. Накладывать тейпы можно самостоятельно, но при тейпировании некоторых областей Вам не обойтись без помощника.
2. Перед нанесением область наложения должна быть сухой, чистой и обезжиренной, в противном случае, тейп может приклепиться ненадёжно и отклеиться раньше времени.
3. Перед наложением, прощупайте проблемную область, чтобы почувствовать, как проходят мышцы, сгибая, разгибая, поворачивая ту часть тела или конечность, на которую должен быть наложен тейп.
4. Обязательно перед наложением, отмерьте соответствующую длину тейпа, в зависимости от области, которую Вы собираетесь тейпировать. Возможно, Вам понадобится несколько полосок тейпа. При отмеривании важно учесть, что тейп накладывается с натяжением.
5. Закруглите уголки тейпа, используя специальные ножницы с тефлоновым покрытием (ножницы для тейпирования).
6. Отклейте защитную бумажную подложку на 3-4 см от конца тейпа для создания основания для наклеивания тейпа (так называемого «якоря»).
7. Важно, чтобы область места наложения тейпа было в максимально растянутом состоянии, это можно сделать самостоятельно или при помощи партнёра. Приклеить «якорь» в месте соединения/прикрепления мышц и разгладить «якорь»

руками. При разглаживании руками возникает тепло, которое активизирует свойства клеящего акрилового слоя тейпа.

8. После крепкого приклеивания «якоря» необходимо медленно отклеить оставшуюся часть бумажной подложки, оставив на противоположном конце место для второго «якоря», второй «якорь» наклеить без растяжения.
9. В зависимости от техники наложения, тейп можно приклеивать с натяжением или без такового. Необходимо обратить внимание на то, что последующее разглаживание тейпа происходит всегда от середины ленты к её краям, во избежание отклеивания концов. Не допускать образование заломов или складок.
10. Рекомендуется накладывать тейп за 30 – 40 минут до какой-либо физической нагрузки.
11. После приёма душа, ванны, плавания, тейп необходимо подсушить полотенцем или марлей.
12. Длительность ношения тейпа зависит от того, на какую часть тела и с какой целью тейп наносится. При этом, при контакте с неповреждённой кожей желательно не менее 24 часов, но не более 7 дней. После, в случае необходимости, для получения желаемого эффекта, рекомендуем наложить новые тейпы.
13. Удалять тейп с кожи нужно аккуратно. Для начала тщательно намочите основу, после отклейте верхнее фиксирующее окончание тейпа и медленными движениями пальцев скатывайте тейп по всей длине. Если на коже остались следы клея, нанесите тонкий слой масла- масло хорошо растворяет акриловый клей.

Внимание!

При использовании техники кинезиотейпирования, необходимо отслеживать состояние проблемной области, до и после тейпирования. Каждый человек уникален и с учётом индивидуальности каждого человека, эффективность может отличаться.

Кинезио тейп не содержит лекарственных средств и действует за счет механического воздействия.

3. Показания для применения медицинского изделия

Кинезио тейп представляет собой эластичную ленту с нанесенным на нее адгезивным слоем, которая накладывается снаружи на поврежденные мышцы или сустав для облегчения боли и/или ускорения заживления травмы.

Кинезио тейп 5 см х 5 м используется при:

- остеохондроз, артроз, сколиоз;
- профилактика различных спортивных травм;
- стимуляция лимфо и кровотока
- ушибы мягких тканей туловища, конечностей;
- растяжение связок суставов конечностей;
- неврологические проявления остеохондроза шейного, грудного и поясничного отделов позвоночника;
- мышечно-фасциальные болевые синдромы туловища и конечностей

4. Противопоказания для применения медицинского изделия

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ➤ открытые раны и трофические язвы; ➤ экзема; ➤ аллергическая реакция на акрил; | <ul style="list-style-type: none"> ➤ ксеродерма; ➤ первый триместр беременности; ➤ индивидуальная непереносимость |
|---|--|

5. Меры предосторожности при применении медицинского изделия

Не использовать повторно.

6. Возможные побочные действия при использовании медицинского изделия

При применении медицинского изделия согласно инструкции, не выявлено побочных действий, угрожающих жизни и здоровью граждан и медицинских работников. В случае появления неприятных ощущений, зуда, покраснения кожи следует незамедлительно удалить тейп. Желательно обратиться к врачу.

7. Взаимодействие с другими медицинскими изделиями

Кинезио тейп не оказывает влияния на другие медицинские изделия при совместном использовании. Не использовать одновременно с другими наружными средствами на одних и тех же участках кожи.

8. Указание возможности и особенностей применения медицинского изделия для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания

Возможно применение кинезио тейпа для людей с имплантируемыми в организм человека медицинскими изделиями, беременных женщин, женщин в период грудного вскармливания, детей, взрослых, имеющих хронические заболевания, за исключением наличия индивидуальной непереносимости компонентов медицинского изделия.

9. Сведения о возможном влиянии использования медицинского изделия на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Медицинское изделие не влияет на способность управлять транспортными средствами или механизмами.

10. Срок годности и указание на запрет использования медицинского изделия по истечении срока годности

Срок годности медицинского изделия: 5 лет с даты изготовления.

Запрещено использование кинезио тейпы после окончания срока годности.

11. Условия хранения и транспортировки

Хранение: хранить вдали от источников света и тепла, в сухом и чистом месте, при температуре +5...+ 30°C, при относительной влажности от 20% до 80%.

Транспортирование: медицинское изделие может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств, в соответствии с правилами, утверждёнными в установленном порядке для каждого вида транспорта, при температуре +5...+ 30°C, при относительной влажности от 20% до 80%.

Изделие в транспортной упаковке устойчиво к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне 10-55 Гц, амплитудном смещении 0,35 мм и ударных нагрузок при пиковом ударном ускорении 100 м/с² (10g) и длительности ударного ускорения 16 мс.

12. Указание на необходимость хранения медицинского изделия в местах, недоступных для детей

Медицинское изделие не представляет прямой угрозы и не нуждается в специальном хранении вдали от детей, за исключением лиц, имеющих особую индивидуальную аллергическую реакцию при контактном применении на отдельные (к примеру, акриловый клей или текстильные синтетические ткани) компоненты, которые присутствуют в составе изделия.

13. Сведения о производителе медицинского изделия

Наименование (полное и сокращенное): Лиепайская специальная экономическая зона общество с ограниченной ответственностью «НордеПласт», Лиепайская специальная экономическая зона ООО «НордеПласт»

Юридический адрес: Латвийская Республика, г. Лиепая, LV-3405, ул. Зиёмелю 19 (Latvijas Republika, LV-3405, Liepāja, Ziemeļu iela 19)

Почтовый адрес: Латвийская Республика, г. Лиепая, LV-3405, ул. Зиёмелю 19 (Latvijas Republika, LV-3405, Liepāja, Ziemeļu iela 19)

Телефон: +(371)20037773

Адрес места производства: Лиепайская специальная экономическая зона ООО «НордеПласт», Латвийская республика, г. Лиепая, LV-3405, ул. Зиёмелю 19

14. Варианты комплектации медицинского изделия

В комплект поставки входят:

- кинезио тейп одного варианта исполнения и размера в потребительской упаковке с маркировкой – 1 шт.,
- инструкция по применению (вложена) (см. приложение №1).

15. Маркировка

Маркировка индивидуальной упаковки содержит:

- наименование изделия
- размер кинезио тейпа
- торговая марка NordePlast® (при наличии);
- логотип производителя NordePlast;
- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес и место производства;
- наименование, адрес и телефон уполномоченного представителя производителя;
- дата производства  (возможно нанесение печатным способом или стикером)
- срок годности  (возможно нанесение печатным способом или стикером);
- серия  (возможно нанесение печатным способом или стикером)
- маркировка CE (CE);
- символ соответствия (CE);
- температурный диапазон хранения и транспортирования (X);
- символ «однократного использования» (X);
- символ «трилистника»- национальный знак соответствия Украины (U);
- инструкция к применению (I)
- утилизация с обычным бытовым мусором (W)
- символ «защита от влаги» (J);
- символ «непищевая продукция» (N);
- код переработки 21 PAP (бумага) (PAP)
- символ «Защита от солнечных лучей» (S);
- Символ диапазона влажности (H);
- Символ медицинского изделия согласно правил (ЕС) 2017/745 Европейского Парламента и Совета- MD
- штрих-код
- номер и дата регистрационного удостоверения (возможно, нанесение печатным способом или стикером);
- условия утилизации
- рекламное изображение изделия;
- краткое описание;

* текст может быть дублирован на других языках

Маркировка транспортной упаковки содержит:

- торговая марка NordePlast®;
- наименование предприятия-изготовителя, юридический адрес и место производства;
- наименование изделия;
- размер кинезио тейпа;

- дата производства 
- срок годности 
- серия 
- количество кинезио тейпов в шт.;
- вес брутто;
- номер и дата регистрационного удостоверения;
- температурный диапазон хранения и транспортирования ();
- знак «Защита от влаги» ();
- штрих-код
- знак «Хрупкий груз» ()

* текст может быть дублирован на других языках

16. Технические характеристики, общая схема изделия, характеристики применяемых расходных материалов

Кинезио тейп 5 см х 5 м, варианты исполнения: розовый, синий, черный, бежевый, белый, красный, желтый, оранжевый, фиолетовый, зелёный, голубой, коричневый.

Изделие	Материал, производитель
Кинезио тейп 5 см х 5 м, вариант исполнения: черный	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China. Краситель: чёрный Zycron Black, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия. Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители красок Siegwerk (Франция), Sicolor GmbH (Германия), производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
Кинезио тейп 5 см х 5 м, вариант исполнения: бежевый	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China. Краситель: бежевый Zycron Beige, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия. Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители

	красок Siegwerk (Франция), Sicolor GmbH (Германия), производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: синий	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China. Краситель: синий Zycron Dark Blue, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия. Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители красок Siegwerk (Франция), Sicolor GmbH (Германия), производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: розовый	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China. Краситель: розовый Zycron Pink, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия. Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители красок Siegwerk (Франция), Sicolor GmbH (Германия), производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: белый	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China. Краситель: белый Zycron White, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия. Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители красок Siegwerk (Франция), Sicolor GmbH (Германия), производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China.

Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: красный	Краситель: красный Zycron Red, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия. Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители красок Siegwark (Франция), Sicolor GmbH (Германия), производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: желтый	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China. Краситель: жёлтый Zycron Yellow, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия. Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители красок Siegwark (Франция), Sicolor GmbH (Германия), производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: оранжевый	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China. Краситель: оранжевый Zycron Orange, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия. Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители красок Siegwark (Франция), Sicolor GmbH (Германия), производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China. Краситель: фиолетовый Zycron Violet, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия.

Кинезио тейп 5 см х 5 м, вариант исполнения: фиолетовый	Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители красок Siegwerk (Франция), Sicolor GmbH (Германия), производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
Кинезио тейп 5 см х 5 м, вариант исполнения: зеленый	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China. Краситель: зеленый Zycron Green, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия. Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители красок Siegwerk (Франция), Sicolor GmbH (Германия), производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
Кинезио тейп 5 см х 5 м, вариант исполнения: голубой	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China. Краситель: голубой Zycron Light Blue, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия. Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители красок Siegwerk (Франция), Sicolor GmbH (Германия), производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
Кинезио тейп 5 см х 5 м, вариант исполнения: коричневый	Подложка – Эластичная ткань Спандекс, производитель Jinhua Jingdi Medical Supplies Co.Ltd. China. Краситель: коричневый Zycron Brown, производитель: ZYCOPLUS SYSTEM, Zydex Industries Pvt. Ltd. (Индия). Липкий слой – acResin® A 250 UV, производитель BASF SE, Германия. Вакуумная упаковка (плёнка) – Полиолефин Eastoflex M1020PL-1, производитель: Eastman Chemical Company (США). Картонная упаковка – целлюлозный картон Alaska plus, производитель International Paper (Польша), производители красок Siegwerk (Франция), Sicolor GmbH (Германия),

	производители лака Actega (Германия), Hi-Tech Coatings International (Голландия), производитель клея Gludan GmbH (Германия).
--	--

Внешний вид изделия:

Рисунок №1 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (бежевый)



Рисунок №2 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (черный)



Рисунок №3 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (голубой)



Рисунок №5 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (красный)

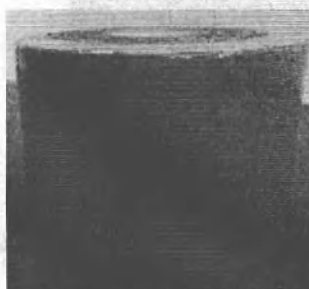


Рисунок №6 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (белый)

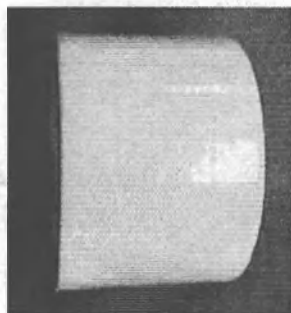


Рисунок №7 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (желтый)

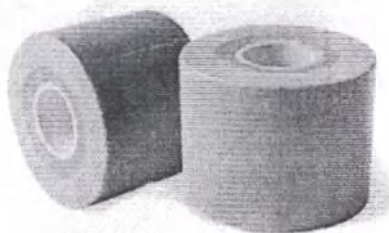


Рисунок №8 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (синий)



Рисунок №4 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (розовый)



Рисунок №9 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (оранжевый)



Рисунок №10 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (фиолетовый)

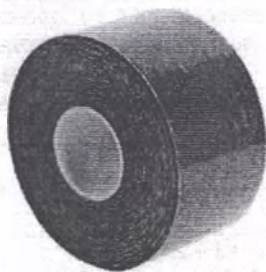


Рисунок №11 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (зелёный)



Рисунок №12 – Кинезио тейп 5 см х 5 м (коричневый)



16.1 Изделие является неактивным, так как не содержит лекарственных средств и биологически активных соединений.

16.2 Изделие является профилактическим по назначению.

16.3 Изделие по форме и конструкции выполнены:

- ленточной формы, в рулонах, без перфорации с клеевым слоем, в виде волнистого покрытия;
- на текстильной основе с нанесённым липким (клеевым) слоем (адгезивом);
- с защитным покрытием.

16.4 Технические характеристики представлены в Таблице 1.

Таблица № 1

Наименование медицинского изделия	Допускаемое отклонение от линейных размеров	Сопротивление отслаивания липкого (клеевого) слоя (Н/м)	Транспортная упаковка, кол-во рулонов в индивидуальной упаковке у, шт.	Транспортная упаковка, кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: бежевый	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: черный	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: синий	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: розовый	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: белый	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: красный	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: желтый	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: оранжевый	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: фиолетовый	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: зеленый	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: голубой	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг
Кинезио тейп 5 см x 5 м, вариант исполнения: коричневый	$\pm 10\%$	не менее - 10 не более - 1000	64 шт.	Масса брутто не более 50 кг

16.4 Изделие не должно иметь внешних дефектов: неровно обрезанных краев, складок основы, дефектов намотки, дыр, посторонних включений, комков, следов, неровного наложения клеевого слоя.

Намотка медицинского изделия в рулонах должна быть клеевым слоем внутри; при разматывании на наружной основе не должно наблюдаться остатков клеевого слоя, предыдущего витка.

16.5 Медицинское изделие может иметь специфический запах, входящих в него компонентов.

16.6 Медицинское изделие должно быть биологически безопасным, нетоксичным и не вызывать аллергических реакций при контакте с неповрежденной кожей.

16.7 Защитное покрытие должно сниматься без усилий; на поверхности защитного покрытия не должно оставаться следов липкого (клеевого) слоя.

16.8 Изделие не является влагостойким и водонепроницаемым.

16.9 Масса одного рулона, г. $80 \pm 10\%$

16.10 Габаритные размеры рулона, см:

- диаметр $7 \pm 10\%$
- высота $5 \pm 10\%$

17. Требования к применению и эксплуатации медицинского изделия

Медицинское изделие «Кинезио тейп 5 см х 5 м», можно использовать в полевых и/в домашних условиях, стационарных, и амбулаторных медицинских учреждениях младшим персоналом и пациентами самостоятельно, согласно рекомендации специалистов.

Изделия выдерживают воздействие температуры $(+5 \text{ до } + 40)^\circ\text{C}$, при относительной влажности от 20% до 80%..

В процессе эксплуатации устойчиво к воздействию вибрационных нагрузок в диапазоне 10-55 Гц, амплитудном смещении 0,35 мм и ударных нагрузок при пиковом ударном ускорении 100 м/с^2 (10g) и длительности ударного ускорения 16 мс.

18. Порядок осуществления утилизации и уничтожения

Утилизация согласно установленным инструкциям и требованиям по утилизации для данного вида продукции в вашем регионе. Возможна утилизация с обычным бытовым мусором.

19. Гарантии

Производитель гарантирует соответствие медицинского изделия требованиям нормативного документа, при условии соблюдения параметров эксплуатации, хранения, транспортирования. Величина гарантийного срока годности 5 лет.

На территории Российской Федерации

по вопросам, касающимся качества «Кинезио тейп 5 см х 5 м», производства компании Лиепайская специальная экономическая зона ООО «НордеПласт» (Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA "NordePlast"), Латвийская Республика, г. Лиепая, LV-3405, ул. Зиёмелю 19 (Latvijas Republika, LV-3405, Liepāja, Ziemeļu iela, 19)

Обращаться по адресу: Акционерное общество «Авангард»

Юридический адрес: 125212, г. Москва, Кронштадтский б-р, д.7А, строение 1, эт.5,
помещение I, ком.1-5

Телефон: +7(495) 781-41-79

Адрес электронной почты: lauma@laumamedical.ru

not

Латвия, город Лиепая, ул.Паста, д.7А, 18 марта 2021 года.

Я, присяжный нотариус Лариса МЕДВЕДЕВА, удостоверяю, что **Романс ГРАМИКО (Romāns GRAMIKO)**, родившийся 21 февраля 1977 года в г.Лиепая, персональный код 210277-10823, декларированное место жительства: Латвия, г.Лиепая, ул.Риегумкраста, д.1, кв.18, личность которого установлена по паспорту гражданина Латвии LV6082613, выданному Лиепайским отделением УДГМ 8 июля 2019 года, подписал этот документ в моём присутствии. Удостоверяю подлинность его подписи.

Документы, на которых удостоверена только подлинность подписи, признаются частными документами. За содержание документа присяжный нотариус ответственности не несёт.

Данные лица в день удостоверения подлинности подписи проверены в Регистре жителей и в Регистре недействительных документов.

По реестру № 1250

Оплата работы за нотариальное удостоверение	16,50 EUR
Оплата работы за проверку данных и связанные с этим расходы:	
в Регистре жителей	6,27 EUR
в Регистре недействительных документов	1,42 EUR
НДС	5,08 EUR
Взыскана государственная пошлина	0,71 EUR
Всего	29,98 EUR



[Handwritten signature of Larisa Medvedeva]

Л.МЕДВЕДЕВА



Скреплено и имеется под
печатью девятнацать/19/
нумерованных лист 36
Нотариус:

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the word "Нотариус:".

Печать: ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА ЛИЕПАЙСКАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
ЗОНА ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НОРДЕПЛАСТ»

 Инструкция по применению

Медицинского изделия


/ТЕКСТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ/

Гербовая печать: ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА КУРЗЕМСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД Г. ЛИЕПАЯ
ПРИСЯЖНЫЙ НОТАРИУС ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА

На сшивке:

Гербовая печать: ЛАТВИЙСКАЯ РЕСПУБЛИКА КУРЗЕМСКИЙ ОКРУЖНОЙ СУД Г. ЛИЕПАЯ
ПРИСЯЖНЫЙ НОТАРИУС ЛАРИСА МЕДВЕДЕВА

Перевод данного текста сделан мной, переводчиком Токаевой Луизой Казбековной. Требования к тексту перевода (максимальная точность, грамотное изложение) мне разъяснены.

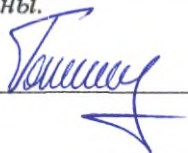

Российская Федерация

Двадцать четвертого марта две тысячи двадцать первого года.

Я, Пестрецова Татьяна Андреевна, нотариус города Москвы, свидетельствую подлинность подписи переводчика Токаевой Луизы Казбековны.

Подпись сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего документ установлена.

Зарегистрировано в реестре: № 73/218-н/77-2021- 4-3468
Уплачено за совершение нотариального действия: 400 руб. 00 коп.





Т.А. Пестрецова

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 20 (двадцать) листов
Нотариус:

