


Монитор состава тела OMRON VIVA (HBF-222T-EBK)

OMRON

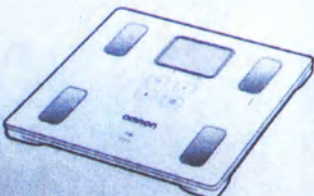

Монитор состава тела OMRON VIVA (HBF-222T-EBK)

- Instruction Manual
- Gebrauchsanweisung
- Mode d'emploi
- Manual de instrucciones
- Manuale di istruzioni
- Gebruiksaanwijzing
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Kullanım Kılavuzu

• كتيب الإرشادات • AR

Благодарим Вас за приобретение монитора состава тела компании OMRON. Перед началом работы с прибором, чтобы правильно и безопасно его использовать, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Сохраните это руководство по эксплуатации и обращайтесь к нему по мере необходимости.

All for Healthcare

M.HBF-222T-8-09-06/2022



OMRON

connect
omron

Setup Instructions

For the best experience with OMRON products, we recommend you use the OMRON Connect app to manage your health data.

Visit omronconnect.com/setup for more information.

© 2022 OMRON Healthcare Co., Ltd.







OMRON



ERC

Монитор состава тела OMRON VIVA (HBF-222T-EBK)

- Instruction Manual
- Gebrauchsanweisung
- Mode d'emploi
- Manual de instrucciones
- Manuale di istruzioni
- Gebruiksaanwijzing
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
- Kullanım Kılavuzu

EN

DE

FR

ES

IT

NL

RU

TR

AR

• كتيب الإرشادات

Благодарим Вас за приобретение монитора состава тела компании OMRON. Перед началом работы с прибором, чтобы правильно и безопасно его использовать, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации. Сохраните это руководство по эксплуатации и обращайтесь к нему по мере необходимости.

All for Healthcare

IM-HBF-222T-E-09-06/2022

OMRON



Setup Instructions

Thank you for purchasing an OMRON product.

With OMRON connect you can wirelessly sync measurements to your smartphone to easily view, save, and manage your health data.

To get started go to:

omronconnect.com/setup

* If you already have the OMRON connect app, go to:
Menu > Device > Add Device

For more details, visit:

omronconnect.com

All for Healthcare

3135911-7A
PM-1498-03-07/2017



TECHNOLOGY
BY OMRON HEALTHCARE
IN JAPAN

OMRON

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Монитор состава тела OMRON VIVA (HBF-222T-EVK)

EAC

Уважаемый покупатель!

Компания АО «КомплектСервис» эксклюзивный дистрибьютор медицинской техники OMRON в России, благодарит Вас за покупку монитора состава тела OMRON.

Высокое качество приборов OMRON и комфорт при использовании – это результат высоких технологий и внимательного отношения к отзывам и пожеланиям пользователей.

Если у Вас возникли вопросы по эксплуатации прибора, пожалуйста, обращайтесь в службу поддержки клиентов OMRON по телефону

**бесплатной горячей линии по России
8-800-555-00-80**

или посетите наш интернет-сайт по адресу:
<http://www.csmedica.ru>

В случае неисправности прибора Вы можете получить информацию о ближайшем центре технического обслуживания, осуществляющем гарантийный ремонт и послегарантийное обслуживание продукции торговой марки OMRON, по телефону горячей линии.

All for Healthcare

Исполнительный директор АО «КомплектСервис»



М. Б. Крикунчик

М.П. (Подпись)

Исполнительный директор
Крикунчик М. Б.



ПРОШУРОВАННО
Листов

Макеты маркировки и упаковки на медицинское изделие

Монитор состава тела OMRON VIVA (HBF-222T-EBK)



1. Макет маркировки медицинского изделия.

1.1 Маркировка на приборе



2. Макет упаковки медицинского изделия





All for Healthcare



VIVA
Body Composition Monitor

PK-400-2227-ESK
1115182

- SEE PROGRESS
- ACCESS ANYTIME
- GET CONNECTED

connect omron Blue tooth

(R) VIVA (R)B 222T (R)G

EXTRAORDINARY CONNECTIONS

Download on the
App Store

Get it on
Google Play

For a list of supported smartphones visit
www.mentimeter.com/devices
For more details visit our live Chatting Community
www.mentimeter.com



Made in China (Gigamon & Kuride)

ПРОШНУРОВАНО

4

ЛИСТОВ



Исполнительный директор
М. Б.