

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ООО «Лидер»



К.А. Моль
_____ 2021 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях (автомобильная) «Лидер»
по ТУ 21.20.24-001-30758823-2020

2021 г.

ООО "Лидер" Версия 3

от 11.11.2021 г.

НАИМЕНОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «Лидер» по ТУ 21.20.24-001-30758823-2020 (далее по тексту - «изделие» или «аптечка»).

НАЗНАЧЕНИЕ

Аптечка для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильная) «Лидер» предназначена для оснащения транспортных средств (автомобилей).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Условия применения аптечек: транспортные средства (автомобили).

ПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП с целью устранения угрожающих жизни нарушений в пределах компетенции участников дорожного движения.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Отсутствуют.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед эксплуатацией ознакомьтесь с инструкцией по применению.
Изделие с истекшим сроком годности использовать нельзя.

ВОЗМОЖНЫЕ ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Отсутствуют.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Используется совместно с любыми медицинскими изделиями разрешенными к применению в медицинской практике.

ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ

- 1). Открыть футляр.
- 2). Ознакомиться с инструкцией по применению аптечки.
- 3). Ознакомиться с перечнем вложений (см. Приложение 1).
- 4). Выбрать необходимое изделие в соответствии с перечнем вложений.
- 5). Использовать выбранное изделие в соответствии с Инструкцией по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) «Лидер» (Приложение 2).

Внимание!

- При оказании первой помощи все манипуляции выполнять в перчатках.
- При угрозе распространения инфекционных заболеваний и в период эпидемии использовать медицинскую маску .

СРОК СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ) И УКАЗАНИЕ НА ЗАПРЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА СЛУЖБЫ (ГОДНОСТИ)

Срок годности аптечки – не менее 48 месяцев, с даты упаковывания.

Изготовитель гарантирует соответствие аптечки требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных настоящими техническими условиями.

Не использовать после окончания срока годности

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Условия хранения аптечки в части воздействия климатических факторов должны соответствовать условиям хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150, при температуре от +5 °С до +40 °С.

Транспортирование аптечки в транспортной таре осуществляется любым видом крытого транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов по условиям хранения 5 (ОЖ4) по ГОСТ 15150, при температуре от -50 °С до +50°С.

УКАЗАНИЕ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ХРАНЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ В МЕСТАХ, НЕДОСТУПНЫХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Хранить в местах недоступных для детей.

УКАЗАНИЕ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ УНИЧТОЖЕНИИ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Использованные по назначению вложения аптечки, контактирующие с биологическими жидкостями, например, кровью, относят к отходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы).

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ МЕДИЦИНСКИХ ИЗДЕЛИЙ

Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» (ООО «Лидер»)

Юридический адрес: 633102, Новосибирская обл., г.Обь, ул.Толстого 53

Тел. 8-913-725-11-55

E-mail. konstantin.mol@mail.ru

Адрес места производства: ООО "Лидер", 630107, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Связистов, д. 161/1, бокс 26.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

В комплект поставки должны входить:

- футляр – 1 шт.;
- перечень вложений (Приложения № 1) - 1 шт.;
- вложения, согласно перечню вложений;
- инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) «Лидер» (Приложения № 2) - 1 шт.;
- упаковочный лист - 1 шт.
- инструкция по применению – 1 шт. (на транспортную тару).

Допускается текст упаковочного листа и перечня вложений размещать на один лист.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ОБЩАЯ СХЕМА ИЗДЕЛИЯ, ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИМЕНЯЕМЫХ РАСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПО ПРИМЕНИМОСТИ)

Комплектация аптечки соответствует Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации №1080н от 08 октября 2020г.

Габаритные размеры футляра: не более (176 x 157 x 70) мм.

Масса укомплектованной аптечки: не более 220 г.

Футляр аптечки изготовлен из: полипропилена марки "Полиом" PP H030GP по ТУ 20.16.51-001-76332549-2016 с изм. 1,2,3, производства ООО "Полиом", Россия или полипропилена марки SIBEX PP H270 FE/1 ТУ 2211-112-70353562-2015 с изм. 1-5, производства ООО "Томскнефтехим", Россия или балена: полипропилен и сополимеры пропилен марки 01030 по ТУ 2211-074-05766563-2015 с изм.1, производства ПАО "УФАОРГСИНТЕЗ", Россия или полипропилена марки PP H 030 GP/3 по ТУ 2211-006-93911504-2015 с изм.1-4, производства ООО "Сибур Тобольск", Россия. Применяемые красители: концентрат добавок и пигментов «БАСКО» черный на основе полиолефинов по ТУ 2243-001-23124265-2000, производства ООО "НПФ "Барс-2", Россия.

Футляр состоит из корпуса и крышки. Конструкция петель и замка футляра обеспечивает свободное открывание и надежную фиксацию в закрытом положении. На футляре не допускается трещины, сколы и отслоения, потертости, следы от толкателей и вставок высотой или глубиной более 1 мм, выступание литников более чем на 1 мм. Медицинские изделия (вложения), входящие в аптечку, зарегистрированы уполномоченным органом государственной власти России и имеют необходимую разрешительную документацию (регистрационное удостоверение).

При комплектации аптечек срок годности вложений составляет не менее 80% от полного срока годности, указанного в соответствующих документах. Срок годности аптечки устанавливается по наименьшему сроку годности вложений, входящих в его состав.

Вложения должны свободно размещаться и извлекаться из футляра аптечки и препятствовать плотному закрытию футляра. Футляр аптечки устойчив к дезинфекции в соответствии с требованиями МУ 287-113.

ТРЕБОВАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Потенциальные потребители: водители транспортных средств (автомобилей).

Условия применения аптечек: транспортные средства.

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Аптечка имеет полностью законченную конструкцию и не требует в процессе эксплуатации каких-либо вмешательств по техническому обслуживанию и ремонту, за исключением утилизации в соответствии со стандартами медицинского учреждения.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21. Использованные по назначению вложения аптечки, не контактирующие с биологическими жидкостями, а также не использованные по назначению вложения аптечки относят к отходам класса А

(эпидемиологически безопасные отходы, по составу приближенные к ТБО). Использованные по назначению вложения аптечки, контактирующие с биологическими жидкостями, например, кровью, относят к отходам класса Б (эпидемиологически опасные отходы). Аптечка с истекшим сроком годности утилизируется вместе с бытовыми отходами.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В условиях эксплуатации аптечка безвредна. Работа с аптечкой не требует особых мер предосторожности. Токсические и пожаро- взрывоопасные свойства аптечки не выражены. Вложения аптечки должны применяться только в соответствии с рекомендациями по применению. Складские помещения должны быть обеспечены необходимыми средствами пожаротушения и противопожарным оборудованием. При пожаре для тушения следует использовать огнетушители, воду, песок, асбестовую ткань.

ПЕРЕЧЕНЬ

вложений, входящих в «Аптечку для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильную) «Лидер».

№	Наименование вложений	Вид док-та	Производитель/держатель	Вид уп-ки	Кол-во, шт
1	2	3	4	5	6
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая			штг	2
	Маска медицинская из нетканого материала одноразовая по ТУ 9398-001-64260744-2010 или Маска медицинская нестерильная одноразовая по ТУ 9398-011-14959781-2015 или Маски медицинские из нетканого материала одноразовые по ТУ 32.50.50-009-71847378-2017)	РУ № ФСР 2010/08512 РУ № РЗН 2016/4118 РУ № РЗН 2018/7773	ООО «Маска», Россия ООО «ЭВТЕКС», Россия ООО «НЬЮФАРМ», Россия		
2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М			пара	2
	Перчатки одноразовые медицинские диагностические (смотровые) нестерильные «Basic», варианты исполнения: 1. Перчатки одноразовые медицинские диагностические (смотровые) нестерильные «Basic» Exam PF латексные неопудренные. 2. Перчатки одноразовые медицинские диагностические (смотровые) нестерильные «Basic» Dental PF латексные неопудренные. 3. Перчатки одноразовые медицинские диагностические (смотровые) нестерильные «Basic» Exam PF латексные опудренные. или Перчатки диагностические (смотровые) из натурального латекса, нестерильные или Перчатки медицинские нестерильные и стерильные: - перчатки латексные хирургические нестерильные; - перчатки латексные смотровые диагностические нестерильные; - перчатки синтетические смотровые диагностические нестерильные; - перчатки синтетические хирургические нестерильные или Перчатки диагностические MERCATOR MEDICAL из натурального латекса и синтетических каучуков (нитрил, винил, полихлоропрен, полиизопрен) нестерильные: - Перчатки диагностические Santex латексные опудренные. - Перчатки диагностические Ideal латексные опудренные. - Перчатки диагностические Comfort латексные текстурированные. - Перчатки диагностические Comfort PF латексные текстурированные	РУ № РЗН 2013/1071 РУ № ФСЗ 2009/05130 РУ № ФСЗ 2010/07368 РУ № ФСЗ 2012/13339	«Тераинг Нуса СДН., БХД., Малайзия «Топ Глаз СднБхд», Малайзия «СФМ Госпитал Продактс ГмБХ», Германия «Меркатор Медикал Лтд.», Таил.		

	желтый, размеры 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 4. Перчатки смотровые латексные нестерильные неопудренные, гладкие и/или текстурированные, цвет - белый, желтый, размеры 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5 5. или Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные 1.Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные латексные. 2.Перчатки медицинские смотровые (диагностические) нестерильные и стерильные синтетические (нитрил, поливинилхлорид).	РУ № ФСЗ 2009/04144	«Хелиомед Хандельсгез м.б.Х.», Австрия		
3	Устройство для проведения искусственного дыхания «Рот-устройство-рот»			шт.	1
	Устройство для проведения искусственного дыхания –«рот-устройство-рот» УДР (одноразового применения) по ТУ 9444-009-26528997-10)	РУ № ФСР 2010/07434	ООО НПФ «МИРАЛ», Россия		
4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения			шт.	1
	Жгут кровоостанавливающий одноразовый по ТУ 32.50.50-001-43660209-2020»	РУ № РЗН 2021/13681	ООО «Аурус», Россия		
	или	РУ № ФСР 2010/07432	ООО НПФ «МИРАЛ», Россия		
	Жгут кровоостанавливающий с дозированной компрессией) по ТУ 2545-008-26528997-10				
5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5м x 10 см			шт.	4
	Бинты марлевые медицинские нестерильные	РУ №ФСР 2011/11534 РУ № ФСР 2011/12070 РУ № ФСР 2011/09902 РУ № ФСР 2010/08341 РУ № ФСР 2007/01317 РУ № РЗН 2015/2555 РУ № ФСР 2008/03223	ООО «фирма «Ювента», Россия ООО ПКФ «Ахтамар», Россия ООО «Медкомпресс-», Россия ООО «НПЦ «Сериял-Мед», Россия ООО «ЭВТЕКС», Россия ООО «ХБК Навтекс», Россия ООО "ПКФ ВераМед", Россия		
	Бинты марлевые медицинские стерильные	РУ № ФСР 2011/12070 РУ № ФСР 2011/09902 РУ № ФСР 2010/08341 РУ № ФСР 2007/01317 РУ №ФСР 2008/03250 РУ № ФСР 2008/03226	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия ООО «Медкомпресс-», Россия ООО «НПЦ «Сериял-Мед», Россия ООО «ЭВТЕКС», Россия ООО «фирма «Ювента», Россия ООО "ПКФ ВераМед", Россия		
6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7м x 14 см			шт.	3
	Бинты марлевые медицинские нестерильные	РУ №ФСР 2011/11534 РУ № ФСР 2011/12070 РУ № ФСР 2011/09902 РУ № ФСР 2010/08341 РУ № ФСР 2007/01317 РУ № РЗН 2015/2555 РУ № ФСР 2008/03223	ООО «фирма «Ювента», Россия ООО ПКФ «Ахтамар», Россия ООО «Медкомпресс-», Россия ООО «НПЦ «Сериял-Мед», Россия ООО «ЭВТЕКС», Россия ООО «ХБК Навтекс», Россия ООО "ПКФ ВераМед", Россия		
	Бинты марлевые медицинские стерильные	РУ № ФСР 2011/12070 РУ № ФСР 2011/09902 РУ № ФСР 2010/08341 РУ № ФСР 2007/01317 РУ №ФСР 2008/03250 РУ № ФСР 2008/03226	ООО ПКФ «Ахтамар», Россия ООО «Медкомпресс-», Россия ООО «НПЦ «Сериял-Мед», Россия ООО «ЭВТЕКС», Россия ООО «фирма «Ювента», Россия ООО "ПКФ ВераМед", Россия		

7	Салфетки марлевые медицинские стерильные, размером не менее 16х14 см №10			уп.	2
	Салфетки марлевые медицинские стерильные по ГОСТ 16427-93. Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16х14 см.	РУ № ФСР 2008/03225	ООО "ПКФ ВераМед", Россия		
	Салфетки марлевые медицинские стерильные и нестерильные по ГОСТ 16427-93: Вариант исполнения: Салфетки марлевые медицинские стерильные размером 16х14 см № 10	РУ № ФСР 2011/11141	ООО «НЬЮФАРМ», Россия		
8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2х500 см			шт.	1
	Лейкопластырь LEIKO (ЛЕЙКО) фиксирующий медицинский или Лейкопластыри медицинские фиксирующие катушечные на тканевой, нетканой и полимерной основе «Импекс-Мед» или Лейкопластырь медицинский фиксирующий по ТУ 9393-00456334457-2007.	РУ № ФСЗ 2008/01442 РУ № ФСЗ 2008/02807 РУ № ФСР 2007/01017	«Цзянсу Нанфанг Медикал Ко., Лтд.», КНР «Чангжоу Хуалиань Хэлс Дрессинг Ко., Лтд.», КНР ООО «Лейко», Россия		
9	Ножницы			шт.	1
	Инструменты режущие по ТУ 9433-285-07613444-2010. Исполнение: Ножницы	РУ № ФСР 2010/07370 не подлежит обязательной сертификации и декларированию	ОАО «МИЗ им. М. Горького», Россия «Younker industrial corp», Китай «Yiwu Penghao Stationary Co., LTD.», Китай		
10	Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) Лидер			шт.	1
11	Футляр			шт.	1

Примечания:

Аптечка подлежит комплектации медицинскими изделиями, зарегистрированными в установленном порядке.

По истечении сроков годности медицинских изделий и прочих средств, предусмотренных настоящими требованиями, или в случае их использования аптечку необходимо пополнить.

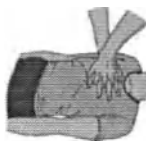
Не допускается использование медицинских изделий в случае нарушения их стерильности, а также повторное использование медицинских изделий, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями.

При комплектации аптечки допускается включение в ее состав одного медицинского изделия из числа включенных соответственно в пункты 1, 2, 4-8 настоящих требований.

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки
для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях
(автомобильной) «Лидер».

№ п/п	Наименование вложения	Использование
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
3	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см №10	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди
9	Ножницы	Применяйте для разрезания одежды для доступа к ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок.

**Общая последовательность действий на месте происшествия
(универсальный алгоритм оказания первой помощи)**

Если Вы стали участником или очевидцем происшествия, выполните следующие действия:		
1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте безопасные условия для оказания первой помощи.	п.1 	п.2 
2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания – перейдите к п.7 Алгоритма.	п.3 	п.4 
3. Восстановите проходимость дыхательных путей пострадавшего и определите признаки жизни (определите наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания переходите к п.6 Алгоритма.	п.5 	
4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие специальные службы. (по тел.112, 103, 03, или региональным номерам), привлекая помощника или используя громкую связь на телефоне.	п.6 	
5. Начните проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания «Роткорту», «Роткносу», с использованием устройства для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходите к п.6 Алгоритма.		п.7 
6. При появлении (или наличии) признаков жизни придайте пострадавшему устойчивое боковое положение для поддержания проходимости дыхательных путей.		
7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для обнаружения наружного кровотечения и остановите его (выполните прямое давление на рану, наложите давящую повязку). При невозможности или неэффективности этих действий осуществите пальцевое прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут; или выполните максимальное сгибание конечности в суставе.		п.9 
8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую помощь в случае выявления указанных состояний:		
9. Придайте пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий).		
10. Постоянно контролируйте состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывайте психологическую поддержку.		
Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, сообщив им необходимую информацию.		

Сшито и заверено печатью 11
(однолиственный лист)
ДИРЕКТОР ООО «ЛИДЕР»
Моль К.А.

УТВЕРЖДАЮ

Директор
ООО «Лидер»

К.А. Моль

“11” ноября 2021 г.

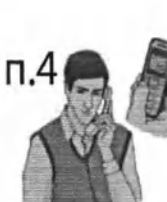


**Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для
оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях (автомобильной)
Лидер .**

Инструкция по оказанию первой помощи с применением аптечки для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной)

№ п/п	Наименование вложения	Использование
1	Маска медицинская нестерильная одноразовая	Применяйте для защиты от инфекций, передающихся воздушно-капельным путем
2	Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М	Надевайте перед началом оказания первой помощи. Поменяйте, если порвались
	Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот"	Используйте для выполнения искусственного дыхания при проведении сердечно-легочной реанимации
4	Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения	Накладывайте на плечо или бедро при сильном артериальном кровотечении выше раны максимально близко к ней, поверх одежды или тканевой подкладки
5	Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м x 10 см	Используйте для наложения повязок на разные части тела, для фиксации травмированных конечностей
6	Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м x 14 см	
7	Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16 x 14 см №10	Применяйте для закрытия ран и ожоговых поверхностей
8	Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см	Используйте для закрытия ссадин, потертостей, фиксации стерильных салфеток на ране, наложения окклюзионной повязки при ранении груди
9	Ножницы	Применяйте для разрезания одежды для доступа к ранению, отрезания бинтов и лейкопластыря нужной длины, для вскрытия упаковок.

**Общая последовательность действий на месте происшествия
(универсальный алгоритм оказания первой помощи)**

Если Вы стали участником или очевидцем происшествия, выполните следующие действия:	
1. Проведите оценку обстановки и обеспечьте безопасные условия для оказания первой помощи.	п.1  п.2 
2. Определите наличие сознания у пострадавшего. При наличии сознания – перейдите к п.7 Алгоритма.	
3. Восстановите проходимость дыхательных путей пострадавшего и определите признаки жизни (определите наличие нормального дыхания с помощью слуха, зрения и осязания). При наличии дыхания переходите к п.6 Алгоритма.	п.3  п.4 
4. Вызовите скорую медицинскую помощь, другие специальные службы. (по тел.112, 103, 03, или региональным номерам), привлекая помощника или используя громкую связь на телефоне.	
5. Начните проведение сердечно-легочной реанимации путем чередования давления руками на грудину пострадавшего и искусственного дыхания «Роткорту», «Роткносу», с использованием устройства для искусственного дыхания. При появлении признаков жизни переходите к п.6 Алгоритма.	п.5  
6. При появлении (или наличии) признаков жизни придайте пострадавшему устойчивое боковое положение для поддержания проходимости дыхательных путей.	п.6 
7. Проведите обзорный осмотр пострадавшего для обнаружения наружного кровотечения и остановите его (выполните прямое давление на рану, наложите давящую повязку). При невозможности или неэффективности этих действий осуществите пальцевое прижатие артерии и наложите кровоостанавливающий жгут; или выполните максимальное сгибание конечности в суставе.	 
8. Проведите подробный осмотр пострадавшего для выявления признаков травм и других состояний, угрожающих его жизни и здоровью, окажите первую помощь в случае выявления указанных состояний:	п.7 
9. Придайте пострадавшему оптимальное положение тела (для обеспечения ему комфорта и уменьшения степени его страданий).	
10. Постоянно контролируйте состояние пострадавшего (наличие сознания, дыхания и кровообращения) и оказывайте психологическую поддержку.	п.9 
Передайте пострадавшего бригаде скорой медицинской помощи, другим специальным службам, сотрудники которых обязаны оказывать первую помощь, сообщив им необходимую информацию.	 

Сшито и заверено печатью 3
(4) лист 2

ДИРЕКТОР ООО «ЛИДЕР»
Моль К.А.

