

ОКП 93 9800

8

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО Компания «Бакстер»

А.И. Ефремов


2009 г.



Инструкция по применению

Медицинский адаптер Виал-Мейт

2009

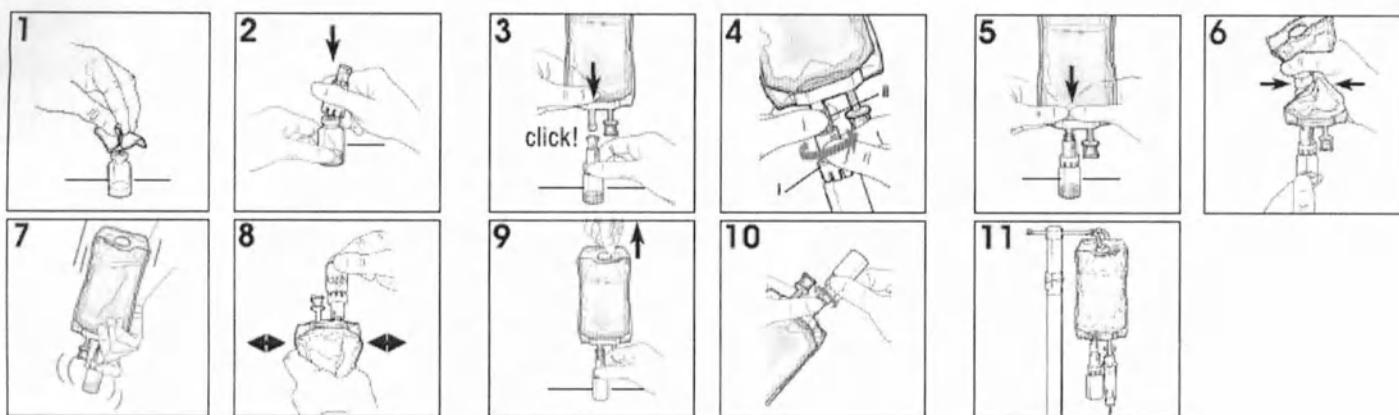

Устройство для разведения препаратов
Стерильно, апиrogenно.

Указания к применению:

Монтаж устройства – используйте асептический способ крепления

1. Снимите крышку пузырька с лекарством и продезинфицируйте мембрану антисептиком. Удалите упаковку. Запрещается использование адаптера, если есть риск нарушения упаковки.
2. Крепко удерживая пузырек с лекарством одной рукой, поместите его на твердую поверхность. Другой рукой надавите соединительной частью адаптера Виал-мейт на пузырек до щелчка. Не вращайте адаптер.
3. Протрите порт для лекарств контейнера Виафло антисептиком. Одной рукой крепко удерживайте соединенные пузырек с лекарством и адаптер Виал-Мейт, а другой рукой – место над дополнительным портом контейнера Виафло.

Активация

4. Крепко держа пистон (ii), вращайте корпус адаптера Виал-Мейт (i) по часовой стрелке, чтобы заблокировать пистон (ii).
5. Поместив смонтированный комплект на ровную поверхность, возьмите контейнер Виафло обеими руками и активируйте адаптер, надавливая пистоном (ii) на корпус (i).

Разведение препаратов

6. Держите контейнер пузырьком вниз. Выдавите раствор в пузырек. Наполните пузырек наполовину.
7. Перемешайте раствор лекарства взбалтыванием, одновременно удерживая корпус (i) адаптера и контейнер Виафло.
8. Поверните контейнер пузырьком вверх. Сжимая контейнер, добейтесь переливания лекарства в контейнер.

Шаги 6, 7 и 8 могут быть повторены до тех пор, пока весь раствор лекарства не будет перемещен в контейнер Виафло. Убедитесь, что весь объем лекарства поступил в контейнер, и как можно меньше лекарства осталось в пузырьке.

Деактивация

9. Для деактивации вытяните пистон (ii) из корпуса (i), удерживая корпус адаптера Виал-мейт и подвеску контейнера Виафло.

10. Крепко держа пистон (ii), вращайте корпус адаптера Виал-мейт (i) в направлении против часовой стрелки до блокировки пистона (ii).

Введение лекарства

11. Прикрепите набор администрирования как указано в его инструкции. Повесьте контейнер Виафло на I.V. Pole, и введите лекарство согласно его инструкции.

Внимание:

- использовать только с пузырьками с одной дозой лекарства с крышкой 20мм и контейнерами Виафло.
- Только для одноразового применения – для одноразового подсоединения к контейнеру Виафло.

Производитель:

Baxter Healthcare SA (Бакстер Хелскеа СА)
Hertistrasse 2, 8304 Wallisellen, Switzerland
Baxter Limited (Бакстер Лимитед)
A47, Industrial Estate, MRS3000 Marsa, Malta

Дистрибьютор в России:

ЗАО «Компания Бакстер»,
117571, г. Москва,
пр. Вернадского, д. 86, к. «0», к. 119
тел: +7 (495) 956-3839

зарегистрировано в РФ:

ЗНАК СООТВЕТСТВИЯ

Срок годности 59 месяцев.



