



Закрытое акционерное общество «Медтехника»

198516 г. С Петербург -Петродворец

ул.Фабричная д.1

(812) 326-54-76

Устройства внешней фиксации

Фиксатор пояса верхних конечностей «ФК - МЕДТЕХНИКА»

TU 9438-024-27418804-2008

ЭТИКЕТКА

1. Назначение и технические данные.

1.1. Фиксатор пояса верхних конечностей (в дальнейшем - фиксатор) предназначен для профилактики и лечения травм плечевого сустава, ключицы, ключично-акромиального сочленения; при отсроченном периоде реабилитации после иммобилизации и оперативных вмешательств на плечевом суставе; при обострении артроза плечевого сустава, ключично-акромиального сочленения; при обострении плечелопаточного перiarтроза; при привычных вывихах плеча, а также для профилактики рецидивов. В частности, это изделие рекомендуется использовать тем, кто вынужден проводить длительное время за письменным столом, компьютером и т.д. Особенно полезно школьникам и студентам для профилактики нарушения осанки и лечения искривления позвоночника.

2. Показания: 2.1. Фиксатор ключицы применяется как средство иммобилизации пояса верхних конечностей при транспортировке пострадавших с подозрением на переломы ключиц(ы) и (или) лопатки. Данное свойство обеспечивается за счет контролируемого надежного разведения плеч с последующей фиксацией их в необходимом положении. После чего пострадавший может доставляться в стационар в сидячем или полужающем положении. При использовании этого изделия резко уменьшается риск повреждения подключичного сосудисто-нервного пучка и легкого отломками кости и развитие осложнений.

2.2. Так же может быть использован как корректор осанки. Применяется для лечения следующих заболеваний: кифотическая болезнь, сколиозы I-II степеней, нарушение осанки (круглая, кругло-вогнутая, лордотическая осанки). В качестве корректора обладает следующими свойствами: позволяет корректировать положение спины в пространстве, поддерживать мышечный корсет туловища в оптимальном положении, устраняет сутулость, помогает поддерживать плечи в развернутом положении. Благодаря своей конструкции позволяет проводить лечебную фиксацию при искривлении позвоночного столба в грудном и поясничном отделах, сутулости и других нарушениях осанки. Данный фиксатор активно применяется у взрослых при остеохондрозе позвоночника, последствиях травм в грудном отделе позвоночника, при остеопорозе, дегенеративных заболеваниях суставов позвоночного столба.

3. Основные размеры:

3.1 «ФК-01-Медтехника»: прямоугольная межлопаточная базовая пластина: - 170x170 мм.; наплечная лента 1000x400 мм -2 шт.; мягкая накладка 390x85 мм - 2 шт.

«ФК-02-Медтехника»: прямоугольная межлопаточная базовая пластина - 150x140 мм; наплечная лента 900x300 мм -2 шт.; мягкая накладка 310x65 - 2 шт.

3.2 Фиксатор должен выдерживать статистическую нагрузку на разрыв не менее 50 кгс.

4. Комплектность

4.1 В комплект входят: изделие - 1шт, этикетка - 1шт.

5. Инструкция по эксплуатации, указание мер безопасности, дезинфекция.

5.1 В качестве иммобилизирующего средства. Расположить основание изделия на лопаточной области здоровой стороны, перекинув лямку соответствующей стороны вперед, обвести вокруг плеча через подмышечную впадину и завести в металлическую вставку на основании фиксатора. С помощью липучки на одной из сторон лямки свободный конец крепится в обратном направлении к той же лямке, при этом основание не должно сместиться. Далее перекинув лямку на пораженной стороне пострадавшего вперед, обвести вокруг плеча через подмышечную впадину и завести в металлическую вставку на основании фиксатора. Потянув за свободный конец лямки добиться необходимого разведения плеч и зафиксировать свободный конец липучкой. Установить подмышечные валики в удобное положение. После чего пострадавший может доставляться в стационар в сидячем или полужающем положении.

5.2 В качестве корректора осанки. Удаляются подмышечные валики. Расположив основание изделия в межлопаточной области, лямки перекидывают вперед, обводят вокруг плеч через подмышечные впадины и заводятся в металлические вставки на основании фиксатора. Далее с одинаковым усилием стягивают лямки, добиваясь необходимого разведения плеч, и при помощи липучек на одной из сторон свободные концы крепятся в обратном направлении к той же лямке. Лямки закрепляются при полностью разведенных плечах, но без натягивания.

СОВЕТЫ ВРАЧА: фиксатор необходимо носить по следующей схеме: первые 2-3 месяца по 6-7 часов в день, затем каждые два месяца время ношения уменьшают на один час, третий и четвертый месяц по 5 часов в день шестой и седьмой по 4 часа в день восьмой и девятый — по 3 часа в день).

После выполнения этой схемы фиксатор не носят, а при появлении признаков сутулости снова надевают его на 4 часа в день, и так носят в течение двух месяцев. При такой схеме не происходит расслабления мышц, а со временем пациент приобретает привычку уверенно и прямо ходить без корректора, поэтому он становится ненужным. Если вы чувствуете себя немного усталым, значит, ваши мышцы работают в полную силу. Продолжайте использование корректора, чтобы приучить ваш позвоночник к правильному положению. Если у вас возникают проблемы или вопросы по ношению корректора, необходима консультация специалиста (невропатолога, ортопеда, хирурга-вертебролога, мануального терапевта).

6. Дезинфекция: Корректор необходимо стирать по мере загрязнения в теплой воде с мылом. Сушить, не отжимая, при сушке не применять нагревательные приборы.

7. Срок эксплуатации

7.1 Средний срок службы - 2 года. 7.2. Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

Дата выпуска: _____

7.3 Гарантийный ремонт осуществляется при наличии этикетки.

Дата продажи: _____

7.4 Гарантийный ремонт осуществляется ЗАО «Медтехника».



Генеральный директор *А.И. Беглов*