



Закрытое акционерное общество «Медтехника»

198516 г. С-Петербург

Петродворец, ул. Фабричная д.1

Тел/факс 8-812-326-54-71

Косынка фиксации верхних конечностей «КФК - МЕДТЕХНИКА»

ТУ 9438-024-27418804-2008

ЭТИКЕТКА

1. Назначение и технические данные.

1.1 Косынка фиксации верхних конечностей (в дальнейшем - косынка) предназначена для иммобилизации верхних конечностей при травмах. С ее помощью можно подвесить в физиологически выгодном положении руку и фиксировать ее на поясе пациента с помощью ленты, продетой в кольца , вшитые в полотно косынки. С помощью вшитой петли для большого пальца достигается лучшая фиксация. Косынка разгружает верхнюю конечность, обеспечивая обездвижение в локтевом суставе и поясе верхних конечностей.

1.2. Выпускается три модификации в зависимости от размера: «КФК-01-Медтехника» - малая: 320х200мм;

«КФК-02-Медтехника» - средняя: 400х200 мм; «КФК-3-Медтехника» - большая: 500х200 мм

1.3. Статистическая нагрузка на разрыв - не менее 25 кгс.

2. Комплектность

2.1 В комплект входят: изделие – 1шт, этикетка – 1шт.

3. Инструкция по эксплуатации, указание мер безопасности, дезинфекция.

3.1. Косынка надевается на поврежденную руку, шейная лента перекидывается через голову и застегивается на груди застёжкой – «фастекс». Высота регулируется с помощью пряжки. Косынка закрепляется на поясе больного лентой с застёжкой - «липучкой». Дополнительно продевается большой палец травмированной верхней конечности во вшитую петлю для лучшей фиксации.

По мере загрязнения изделие подвергается санитарно-гигиенической обработке. Легко стирается в теплой воде со стиральным порошком.

Специальных действий по утилизации не требуется.

4. Срок эксплуатации

4.1 Средний срок службы –2 года.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации -12 месяцев со дня продажи,
но не более 18 месяцев с даты изготовления.

Дата выпуска: _____

4.3 Гарантийный ремонт осуществляется при наличии этикетки.

4.4 Гарантийный ремонт осуществляется ЗАО «Медтехника».

Дата продажи: _____

Секретарь *И.И. Боруля*