


ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ МИ

Кресло гинекологическое универсальное КГУ-01 VLANA
по ТУ 9452-002-91587838-2013

Генеральный директор
ООО «Горское»

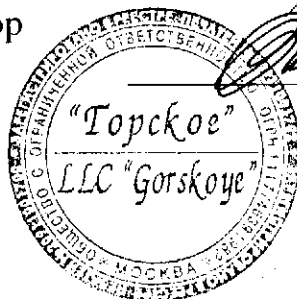

— В.К. Хмелев

Макет этикетки

**КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ**

КГУ-01 VLANA модель КГУ-01.1

ТУ 9452-002-91587838-2013

220В/50 Гц -360 ВА

ООО «Горское»

127055 Москва, Порядковый

пер., д.19, стр. 2, оф. 23

Адрес производства:

Московская область, г. Ногинск,

ул.200 лет города , 2

Зав. № _____

Сделано в России _____ 2013г.

ПУ № _____



**КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ**

КГУ-01 VLANA модель КГУ-01.2

ТУ 9452-002-91587838-2013

220В/50 Гц -360 ВА

ООО «Горское»

127055 Москва, Порядковый

пер., д.19, стр. 2, оф. 23

Адрес производства:

Московская область, г. Ногинск,

ул.200 лет города , 2

Зав. № _____

Сделано в России _____ 2013г.

ПУ № _____



**КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ
УНИВЕРСАЛЬНОЕ**

КГУ-01 VLANA модель КГУ-01.3

ТУ 9452-002-91587838-2013

220В/50 Гц -360 ВА

ООО «Горское»

127055 Москва, Порядковый

пер., д.19, стр. 2, оф. 23

Адрес производства:

Московская область, г. Ногинск,

ул.200 лет города , 2


Зав. № _____

Сделано в России _____ 2013г.

ПУ № _____



КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
Модель КГУ-01.1 VLANA
ПАСПОРТ

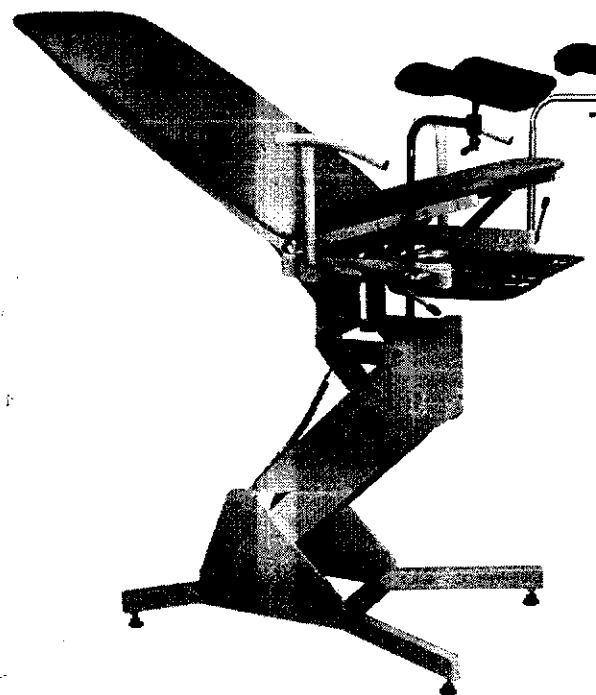

ООО «Горское»
115191 г. Москва, ул. 2 Рощинская, д.4, оф. 420
тел./факс (495) 223-26-52

Год выпуска 2014

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ КГУ-01 VLANA
Модель КГУ-01.1 VLANA
ПАСПОРТ

ТУ 9452-002-91587838-2013

Зав. № _____

ИЯ.

КГУ-01.1 VLANA предназначено для проведения
ологических и проктологических процедур и осмотров.

ПРИНЦИП РАБОТЫ.

LANA состоит из основания, ложа (спинки, сидения),
нения высоты кресла, угла наклона спинки, угла наклона сидения
а также навесных приспособлений..

а представляет собой жесткую сварную конструкцию из стали с
ным покрытием (краска порошковая Neotec EP 160 (Греция) на 4-
9 крепится подвижная спинка, сидение, при помощи подвижных
спечивают подъем кресла бесступенчатым пантографическим
ением.

ожа (спинка, сидение) имеют мягкий верх с покрытием из
устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами и
блучению, исполнены по бесшовной технологии.

вка высоты ложа, осуществляется при помощи ножной педали
ивода.

она спинки, и сидения – независимая друг от друга.

наклона спинки, положения Тренделенбурга/АнтиТренделенбурга
омощи пневмопружины.

наклона сидения осуществляется при помощи механизма Растомат
ла с двух сторон установлены две направляющие рейки для
нительных навесных приспособлений (принадлежностей).

закреплены четыре подвижных ползуна, в которых крепятся
коленные упоры с регулировкой положений по высоте при
дколенные упоры для ног мягкие, эргономичные по форме,
лиуретана

сла установлен выдвижной, съемный поддон (лоток) из

на креплении из нержавеющей стали. Поддон имеет
чение, независимо от угла наклона сидения.

я в горизонтальном положении (положение – «стол»).

жи кресла:

ленным на нем комплектом электропривода, сидением и спинкой

– 2 шт.:

– 1 шт.:

ит

ри – 4 шт.:

уатации – 1 шт.:

- инструкция по сборке – 1 шт.

- паспорт электропривода - 1 шт.

2.1.1. Кресло может быть оснащено дополнительными приспособлениями
(принадлежностями) по запросу: ножная съемная секция, мягкий под
рулонных полотенец, инструментальный столик, штатив для вливания
инъекций, колесные опоры, ступенька под ноги, проктологические уг

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Масса кресла со съемными приспособлениями - (70 ± 5) кг.

3.2. Размеры кресла, мм:

- длина в положении «стол» – (1280 ± 15), ширина – (660 ± 10), высота

- длина спинки – (880 ± 10), ширина спинки – (580 ± 8);

- длина сидения – (400 ± 6), ширина сидения – (580 ± 8);

3.3. Спинка кресла имеет угол наклона от 0° до 100° относительно

3.4. Сидение кресла имеет угол наклона от 0° до 30°.

3.5. Положение Тренделенбург - 12°.

3.6. Грузоподъемность кресла не более 200 кг.

3.7. Наполнитель обивки – пенополиуретан..

3.8. Толщина обивки спинки и сидения – 40мм.

3.9. Потребляемая мощность – 360 Вт

3.10. Напряжение электрической сети – 220В, 50 Гц.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям техн
91587838-2013, при условии соблюдения правил эксплуатации, тран
тирования и хранения.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты
эксплуатацию.

4.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить насто
со штампом производителя и печатью продавца.


Дата выпуска

Штамп производителя

Дата продажи

Печать организации, про

КРЕСЛА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Модель КГУ-01.2 VLANA
ПАСПОРТ

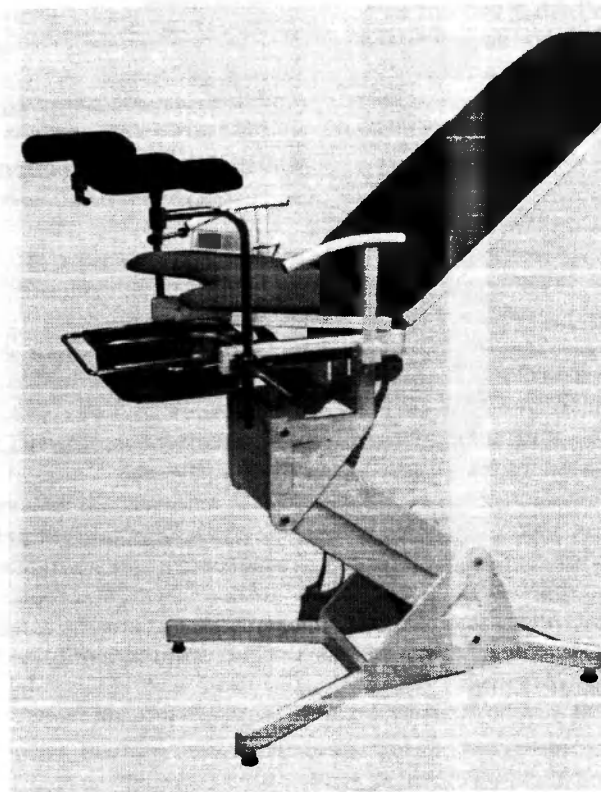

Год выпуска 2014

ООО «Горское»
115191 г. Москва, ул. 2 Рощинская, д.4, оф. 420
тел./факс (495) 223-26-52

ПРОКТОЛОГИЧЕСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ КГУ-01 VLANA
Модель КГУ-01.2 VLANA
ПАСПОРТ

ТУ 9452-002-91587838-2013

Зав. № _____

ИЯ.

ское КГУ-01.2 VLANA предназначено для проведения
проктологических и проктологических процедур и осмотров.

ПРИНЦИП РАБОТЫ.

VLANA состоит из основания, ложа (спинки, сидения),
енения высоты кресла, угла наклона спинки, угла наклона
привода); а также навесных приспособлений..

а представляет собой жесткую сварную конструкцию из стали с
ным покрытием (краска порошковая Neotec EP 160 (Греция) на 4-
о крепится подвижная спинка, сидение, при помощи подвижных
спечивают подъем кресла бесступенчатым пантографическим
чением.

ожа (спинка, сидение) имеют мягкий верх с покрытием из
устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами и
блучению, выполнены по бесшовной технологии.

вка высоты ложа, осуществляется при помощи ножной педали
ивода.

лона спинки, и сидения – независимая друг от друга.

наклона спинки, положения Тренделенбурга/АнтиТренделенбурга
омощи электропривода с ножной педалью.

наклона сидения осуществляется при помощи механизма Растомат
ла с двух сторон установлены две направляющие рейки для
нительных навесных приспособлений (принадлежностей).

закреплены четыре подвижных ползуна, в которых крепятся
коленные упоры с регулировкой положений по высоте при
дколенные упоры для ног мягкие, эргономичные по форме,
полиуретана

ла установлен выдвижной, съемный поддон (лоток) из
на креплении из нержавеющей стали. Поддон имеет
ение, независимо от угла наклона сидения.

я в горизонтальном положении (положение – «стол»).

ж и кресла:

ленными на нем двумя комплектами электроприводов, сидением

– 2 шт.;

– 1 шт.;

г.;

– 4 шт.;

луатации – 1 шт.;

- инструкция по сборке – 1 шт

- паспорт электропривода - 1 шт.

2.11. Кресло может быть оснащено дополнительными приспособлениями
(принадлежностями) по запросу: ножная съемная секция, мягкий под
держатель рулонных полотенец, инструментальный столик, штатив д
столик под руку для инъекций, колесные опоры, ступенька под ноги,
упоры

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Масса кресла со съемными приспособлениями - (70 ± 5) кг;

3.2. Размеры кресла, мм:

- длина в положении «стол» - (1280 ± 15), ширина – (660 ± 10), высота

- длина спинки – (880 ± 10), ширина спинки – (580 ± 8);

- длина сидения – (400 ± 6), ширина сидения – (580 ± 8);

3.3. Спинка кресла имеет угол наклона от 0° до 100° относительно

3.4. Сидение кресла имеет угол наклона от 0° до 30°.

3.5. Положение Тренделенбург - 12°.

3.6. Грузоподъемность кресла не более 200 кг.

3.7. Наполнитель обивки – пенополиуретан..

3.8. Толщина обивки спинки и сидения – 40мм.

3.9. Потребляемая мощность – 360 Вт

3.10. Напряжение электрической сети – 220В, 50 Гц.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям техни
002-91587838-2013, при условии соблюдения правил эксплуатации, т
тирования и хранения.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты
эксплуатацию.

4.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить насто
со штампом производителя и печатью продавца.

Дата выпуска

Штамп производителя

Дата продажи

Печать организации, прод

КРЕСЛА ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КГ
Модель КГУ-01.3 VLANA
ПАСПОРТ



Год выпуска 2014

ООО «Горское»
115191 г. Москва, ул. 2 Рощинская, д.4, оф. 420
тел./факс (495) 223-26-52

ПРОТОКОЛ ИЧЕСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ КГУ-01 VLANA
Модель КГУ-01.3 VLANA
ПАСПОРТ

9452-002-91587838-2013

Зав. №

Я.

ое КГУ-01.3 VLANA предназначено для проведения
логических и проктологических процедур и осмотров.
ПРИНЦИП РАБОТЫ.

LANA состоит из основания, ложа (спинки, сидения),
нения высоты кресла, угла наклона спинки, угла наклона
живода); а также навесных приспособлений.

представляет собой жесткую сварную конструкцию из стали с
ым покрытием (краска порошковая Neotec EP 160 (Греция) на
рую крепится подвижная спинка, сидение, при помощи
которые обеспечивают подъем кресла бесступенчатым
тупательным смещением.

ка (спинка, сидение) имеют мягкий верх с покрытием из
устойчивым к обработке дезинфицирующими средствами и
лучению, исполнены по бесшовной технологии.

ка высоты ложа, осуществляется при помощи ножной педали
ивода.

она спинки, и сидения – независимая друг от друга.

ла наклона спинки, сидения, положения
Гренделенбурга осуществляется при помощи электропривода с

ла с двух сторон установлены две направляющие рейки для
ительных навесных приспособлений (принадлежностей).
закреплены четыре подвижных ползуна, в которых крепятся
юленные упоры с регулировкой положений по высоте при
юленные упоры для ног мягкие, эргономичные по форме,
лиуретана

ла установлен выдвижной, съемный поддон (лоток) из
а креплении из нержавеющей стали. Поддон имеет
ение, независимо от угла наклона сидения.

в горизонтальном положении (положение – «стол»).

и кресла:

енными на нем двумя комплектами электроприводов.

- 1 шт.;

- 2 шт.;

1 шт.;

шт.;

1 – 4 шт.;

луатации – 1 шт.;

- инструкция по сборке - 1 шт.

- паспорт электропривода - 1 шт.

2.11. Кресло может быть оснащено дополнительными приспособлениями
по запросу: ножная съемная секция, мягкий подголовник, держатель руля,
инструментальный столик, штатив для вливаний, столик под руку для ин
опоры, ступенька под ноги, проктологические упоры

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

3.1. Масса кресла со съемными приспособлениями - (70 ± 5) кг;

3.2. Размеры кресла, мм:

- длина в положении «стол» - (1280 ± 15), ширина - (660 ± 10), высота (1

- длина спинки - (880 ± 10), ширина спинки - (580 ± 8);

- длина сидения - (400 ± 6), ширина сидения - (580 ± 8);

3.3. Спинка кресла имеет угол наклона от 0° до 100° относительно вер

3.4. Сидение кресла имеет угол наклона от 0° до 30°.

3.5. Положение Тренделенбург - 12°.

3.6. Грузоподъемность кресла не более 200 кг.

3.7. Наполнитель обивки – пенополиуретан..

3.8. Толщина обивки спинки и сидения – 40мм.

3.9. Потребляемая мощность – 360 Вт

3.10. Напряжение электрической сети – 220В, 50 Гц.

4. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

4.1. Изготовитель гарантирует соответствие кресла требованиям техниче
91587838-2013, при условии соблюдения правил эксплуатации, транспо
тирования и хранения.

4.2. Гарантийный срок эксплуатации составляет 12 месяцев с даты вво
эксплуатацию.

4.3. Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настояш
со штампом производителя и печатью продавца.

Дата выпуска

Штамп производителя

Дата продажи

Печать организации, прода

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Горское»

В.К. Хмелев.

2014 г.



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

КГУ-01.1 VLANA

Назначение изделия.

Кресло гинекологическое универсальное КГУ-01.1 VLANA (далее - кресло), предназначено для проведения гинекологических, урологических и проктологических процедур и осмотров.

Кресло применяют в условиях ЛПУ: в женских консультациях, смотровых и процедурных кабинетах, а также в роддомах.

2. Основные технические характеристики.

Конструкция кресла выполнена из стальных труб и листа, покрытых краской порошковой Neotec EP 160 (Греция). Мягкие элементы лежа выполнены из пенополиуритана и облицованы искусственной кожей на синтетической основе, покрытой ПВХ, устойчивой к чистке и дезинфекции, торговой марки ЕКОТАР производитель PROVEL SP.Z.O.O (Польша). Допускается применение других материалов, не ухудшающих физико-химические свойства кресла.

В модели КГУ -01.1 VLANA один электропривод:

высота кресла изменяется при помощи электромеханического привода от 600 мм до 1050 мм, угол наклона спинки меняется с помощью пневмопружины от 0° до 100°; угол наклона сидения меняется от 0° до 30° с помощью механизма «растомат».

Внимание: Все функции изменения положений кресла должны выполняться поочередно, т.е. одномоментно может выполняться только одна функция изменения положения кресла при помощи одного исполнительного механизма.

Кресло имеет положение Тренделенбург – 12 градусов.

Габаритные размеры кресла в рабочем положении, мм:

- длина в положении «стол» – (1280 ± 15) , ширина – (660 ± 10) , высота (1320 ± 15) ;
- длина спинки – (880 ± 10) , ширина спинки – (580 ± 8) ;
- длина сидения – (400 ± 6) , ширина сидения – (580 ± 8) ;

Масса кресла со съемными приспособлениями - не более 75 кг.

Исполнительный двигатель кресла питается от блока управления постоянного тока напряжением 24В. Блок управления должен подключаться в сеть 220В ($\pm 10\%$) частотой (50 ± 0.4) Гц.

Максимальная нагрузка - 200 кг.

Поверхности кресла устойчивы к дезинфекции.

Средний срок службы изделия не менее 6 лет.

3. Подготовка к работе изделия.

Перед началом работы необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- проверить корректность подключения электромеханического привода к креслу согласно паспорту на электропривод;
- проверить соответствие напряжения питания в сети на соответствие данным в паспорте;
- проверить состояние кабеля соединения;
- закрепить навесные приспособления согласно инструкции по сборке кресла;
- проверить фиксацию винтовых соединений и крепление навесных приспособлений на кресле;
- отрегулировать ножки кресла на рабочем месте для достижения устойчивого положения.

4. Правила хранения и транспортирования.

Кресла транспортируются и хранятся в разовой потребительской упаковке из пятислойного гофрокартона, который обеспечивает сохранность кресла при транспортировании и хранении.

Кресло транспортируется в собранном виде без установки навесных приспособлений.

Хранение кресла должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-6.2.

Кресло допускается транспортировать всеми видами закрытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта. Транспортирование кресла морским транспортом должно производиться в соответствии с действующими правилами безопасности морской перевозки грузов. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

Комплект поставки

- основание с установленным на нем комплектом электропривода, сидением и спинкой – 1 шт.;
- подколennые упоры – 2 шт.;
- выдвижной поддон – 1 шт.;
- зажим – 4 шт.;
- опорные ручки - 2 шт.;
- регулируемые опоры – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- инструкция по сборке – 1 шт.;
- паспорт электропривода - 1 шт.

Кресло может быть оснащено дополнительными приспособлениями (принадлежностями) по запросу: ножная съемная секция, мягкий подголовник, держатель рулонных полотенец, инструментальный столик, штатив для вливаний, столик под руку для инъекций, колесные опоры, ступенька под ноги, проктологические упоры.

6. Утилизация

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 как отходы класса А.

7. Дезинфекция кресла.

Дезинфекцию кресла проводить 3 %-ным раствором перекиси водорода с добавлением 0.5 %- моющего средства или 1 %-ным раствором хлорамина.

8. Ремонт и техническое обслуживание.

Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет фирма-производитель ООО «Горское».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Горское».

Почтовый адрес: 115191, г. Москва, ул. 2 Рощинская, д. 4, оф. 420.

Тел/факс: (495)223-26-52, e-mail: gorskoe@mail.ru

9. Меры предосторожности при работе с креслом.


- При подключении кресла к сети розетка должна иметь заземление;
- Не использовать кресло, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка;
- Перед чисткой и дезинфекцией кресло необходимо отключить от сети;
- Если кресло не используется, его необходимо отключать от сети.

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Горское»

В.К. Хмелев.

2014 г.

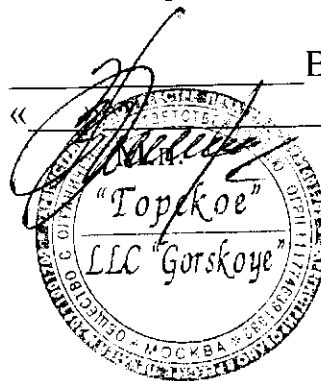

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ

КГУ-01.2 VLANA

Назначение изделия.

Кресло гинекологическое универсальное КГУ-01.2 VLANA (далее - кресло), предназначено для проведения гинекологических, урологических и проктологических процедур и осмотров.

Кресло применяют в условиях ЛПУ: в женских консультациях, смотровых и процедурных кабинетах, а также в роддомах.

2. Основные технические характеристики.

Конструкция кресла выполнена из стальных труб и листа, покрытых краской порошковой Neotess EP 160 (Греция). Мягкие элементы лежа выполнены из пенополиуритана и облицованы искусственной кожей на синтетической основе, покрытой ПВХ, устойчивой к чистке и дезинфекции, торговой марки ЕКОТАР производитель PROVEL SP.Z.O.O (Польша). Допускается применение других материалов, не ухудшающих физико-химические свойства кресла.

В модели КГУ -01.2 VLANA два электропривода:

высота кресла изменяется при помощи электромеханического привода от 600 мм до 1050 мм. угол наклона спинки меняется с помощью электропривода от 0° до 100°; угол наклона сидения меняется от 0° до 30° с помощью механизма «растомат»;

Внимание: Все функции изменения положений кресла должны выполняться поочередно, т.е. одномоментно может выполняться только одна функция изменения положения кресла при помощи одного исполнительного механизма.

Кресло имеет положение Тренделенбург – 12 градусов.

Габаритные размеры кресла в рабочем положении, мм:

- длина в положении «стол» – (1280 ± 15) , ширина – (660 ± 10) , высота (1320 ± 15) ;
- длина спинки – (880 ± 10) , ширина спинки – (580 ± 8) ;
- длина сидения – (400 ± 6) , ширина сидения – (580 ± 8) ;

Масса кресла со съемными приспособлениями - не более 75 кг.

Исполнительный двигатель кресла питается от блока управления постоянного тока напряжением 24В. Блок управления должен подключаться в сеть 220В ($\pm 10\%$) частотой (50 ± 0.4) Гц.

Максимальная нагрузка - 200 кг.

Поверхности кресла устойчивы к дезинфекции.

Средний срок службы изделия не менее 6 лет.

3. Подготовка к работе изделия.

Перед началом работы необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- проверить корректность подключения электромеханического привода к креслу согласно паспорту на электропривод;
- проверить соответствие напряжения питания в сети на соответствие данным в паспорте;
- проверить состояние кабеля соединения;
- закрепить навесные приспособления согласно инструкции по сборке кресла;
- проверить фиксацию винтовых соединений и крепление навесных приспособлений на кресле;
- отрегулировать ножки кресла на рабочем месте для достижения устойчивого положения.

4. Правила хранения и транспортирования.

Кресла транспортируются и хранятся в разовой потребительской упаковке из пятислойного гофрокартона, который обеспечивает сохранность кресла при транспортировании и хранении.

Кресло транспортируется в собранном виде без установки навесных приспособлений.

Хранение кресла должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-6.2.

Кресло допускается транспортировать всеми видами закрытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта. Транспортирование кресла морским транспортом должно производиться в соответствии с действующими правилами безопасности морской перевозки грузов. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

Комплект поставки

- основание с установленным на нем комплектом электропривода, сидением и спинкой – 1 шт.;
- подколенные упоры – 2 шт.;
- выдвижной поддон – 1 шт.;
- зажим – 4 шт.;
- опорные ручки – 2 шт.;
- регулируемые опоры – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- инструкция по сборке – 1 шт.;
- паспорт электропривода – 1 шт.

Кресло может быть оснащено дополнительными приспособлениями (принадлежностями) по запросу: ножная съемная секция, мягкий подголовник, держатель рулонных полотенец, инструментальный столик, штатив для вливаний, столик под руку для инъекций, колесные опоры, ступенька под ноги, проктологические упоры.

6. Утилизация

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 как отходы класса А.

7. Дезинфекция кресла.

Дезинфекцию кресла проводить 3 % -ным раствором перекиси водорода с добавлением 0.5 % моющего средства или 1 % -ным раствором хлорамина.

8. Ремонт и техническое обслуживание.

Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет фирма-производитель ООО «Горское».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Горское».

Почтовый адрес: 115191, г. Москва, ул. 2 Рошинская, д. 4, оф. 420.

Тел факс: (495)223-26-52, e-mail: gorskoe@mail.ru

9. Меры предосторожности при работе с креслом.

- При подключении кресла к сети розетка должна иметь заземление;
- Не использовать кресло, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка;
- Перед чисткой и дезинфекцией кресло необходимо отключить от сети;
- Если кресло не используется, его необходимо отключать от сети.


«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «Горское»



В.К. Хмелев.

2014 г.

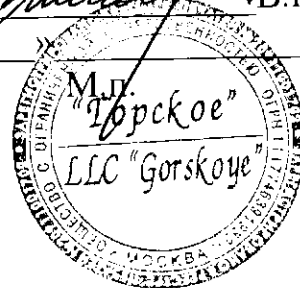

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

КРЕСЛО ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ
КГУ-01.3 VLANA

Назначение изделия.

Кресло гинекологическое универсальное КГУ-01.3 VLANA (далее - кресло), предназначено для проведения гинекологических, урологических и проктологических процедур и осмотров.

Кресло применяют в условиях ЛПУ: в женских консультациях, смотровых и процедурных кабинетах, а также в роддомах.

2. Основные технические характеристики.

Конструкция кресла выполнена из стальных труб и листа, покрытых краской порошковой Neotec EP 160 (Греция). Мягкие элементы лежа выполнены из пенополиуритана и облицованы искусственной кожей на синтетической основе, покрытой ПВХ, устойчивой к чистке и дезинфекции, торговой марки ЕКОТАР производитель PROVEL SP.Z.O.O (Польша). Допускается применение других материалов, не ухудшающих физико-химические свойства кресла.

В модели КГУ -01.3 VLANA три электропривода:

высота кресла изменяется при помощи электромеханического привода от 600 мм до 1050 мм. угол наклона спинки меняется с помощью электропривода от 0° до 100°; угол наклона сидения меняется от 0° до 30° с помощью электропривода;

Внимание: Все функции изменения положений кресла должны выполняться поочередно, т.е. одномоментно может выполняться только одна функция изменения положения кресла при помощи одного исполнительного механизма. Кресло имеет положение Тренделенбург – 12 градусов.

Габаритные размеры кресла в рабочем положении, мм:

- длина в положении «стол» – (1280 ± 15) , ширина – (660 ± 10) , высота (1320 ± 15) ;
- длина спинки – (880 ± 10) , ширина спинки – (580 ± 8) ;
- длина сидения – (400 ± 6) , ширина сидения – (580 ± 8) ;

Масса кресла со съемными приспособлениями - не более 75 кг.

Исполнительный двигатель кресла питается от блока управления постоянного тока напряжением 24В. Блок управления должен подключаться в сеть 220В ($\pm 10\%$) частотой (50 ± 0.4) Гц.

Максимальная нагрузка - 200 кг.

Поверхности кресла устойчивы к дезинфекции.

Средний срок службы изделия не менее 6 лет.

3. Подготовка к работе изделия.

Перед началом работы необходимо:

- выдержать кресло при комнатной температуре не менее 6 часов, если кресло хранилось или транспортировалось при отрицательной температуре;
- проверить корректность подключения электромеханического привода к креслу согласно паспорту на электропривод;
- проверить соответствие напряжения питания в сети на соответствие данным в паспорте;
- проверить состояние кабеля соединения;
- закрепить навесные приспособления согласно инструкции по сборке кресла;
- проверить фиксацию винтовых соединений и крепление навесных приспособлений на кресле;
- отрегулировать ножки кресла на рабочем месте для достижения устойчивого положения.

4. Правила хранения и транспортирования.

Кресла транспортируются и хранятся в разовой потребительской упаковке из пятислойного гофрокартона, который обеспечивает сохранность кресла при транспортировании и хранении.

Кресло транспортируется в собранном виде без установки навесных приспособлений.

Хранение кресла должно производиться в упаковке предприятия-изготовителя в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред. Для отапливаемых складов, условия хранения в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе условий хранения 2 по ГОСТ 15150-6.2.

Кресло допускается транспортировать всеми видами закрытого транспорта с соблюдением правил перевозки, которые действуют на данном виде транспорта. Транспортирование кресла морским транспортом должно производиться в соответствии с действующими правилами безопасности морской перевозки грузов. Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов должны соответствовать группе 5 по ГОСТ 15150.

5. Комплект поставки

- основание с установленным на нем комплектом электропривода, сидением и спинкой – 1 шт.;
- подколенные упоры – 2 шт.;
- выдвижной поддон – 1 шт.;
- зажим – 4 шт.;
- опорные ручки - 2 шт.;
- регулируемые опоры – 4 шт.;
- паспорт – 1 шт.;
- руководство по эксплуатации – 1 шт.;
- инструкция по сборке – 1 шт.;
- паспорт электропривода - 1 шт.

Кресло может быть оснащено дополнительными приспособлениями (принадлежностями) по запросу: ножная съемная секция, мягкий подголовник, держатель рулонных полотенец, инструментальный столик, штатив для вливаний, столик под руку для инъекций, колесные опоры, ступенька под ноги, проктологические упоры.

6. Утилизация

По истечении срока службы кресло подлежит утилизации в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790 как отходы класса А.

7. Дезинфекция кресла.

Дезинфекцию кресла проводить 3 % -ным раствором перекиси водорода с добавлением 0.5 % моющего средства или 1 % -ным раствором хлорамина.

8. Ремонт и техническое обслуживание.

Техническое обслуживание, гарантийный и постгарантийный ремонт кресла осуществляет фирма-производитель ООО «Горское».

Претензии на качество изделия принимает ООО «Горское».

Почтовый адрес: 115191, г. Москва, ул. 2 Рощинская, д. 4, оф. 420.

Тел/факс: (495)223-26-52, e-mail: gorskoe@mail.ru

9. Меры предосторожности при работе с креслом.

- При подключении кресла к сети розетка должна иметь заземление;
- Не использовать кресло, если поврежден шнур питания или штепсельная вилка;
- Перед чисткой и дезинфекцией кресло необходимо отключить от сети;
- Если кресло не используется, его необходимо отключать от сети.

но, прошито, скреплено
дписью 14 *В.К. Хмелев* листов

директор *В.К. Хмелев* В.К. Хмелев

ГОРСКОЕ
ЗЛС "Gorskoye"

МОСКВА # 2006 В
ГОРСКОЕ